

Mirage Micro™

MÁSCARA NASAL

Guia de colocação



- Rode o botão MicroFit™ para a posição 24, em que o suporte da testa está completamente alongado.



- Solte um clipe do arnês, coloque a máscara na face e puxe o arnês sobre a cabeça.



- Faça as correias inferiores passar por baixo das orelhas.
- Fixe o clipe inferior do arnês certificando-se de que fica bem encaixado.



- Desaperte as tiras de Velcro™ superiores, puxe as correias do arnês uniformemente até se sentir confortável e, em seguida, volte a apertar as tiras de Velcro.
- Não aperte as correias em demasia.



- Repita o passo 4 com as correias inferiores do arnês.
- Ligue uma das extremidades da tubagem de ar à peça giratória e a outra ao gerador de fluxo.
- Ligue o gerador de fluxo.



- Quando estiver deitado, rode o botão MicroFit até a máscara estar confortável e uniformemente colocada na face.
- Se sentir alguma fuga de ar, reajuste o botão e/ou o arnês.

⚠ Para obter mais informações, consulte o *Manual do Utilizador da Máscara Nasal Mirage Micro*.

ResMed Corp Poway, CA, EUA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (chamada grátis), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Austrália, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (chamada grátis). Filiais na Áustria, Brasil, China, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Japão, Malásia, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido (consultar o website para obter mais informações). Protegido pelas patentes: AU 710733, AU 741003, AU 766623, AU 775051, AU 777033, AU 785376, CA 2261790, DE 29724224 U, EP 0956069, EP 1187647, EP 1187649, EP 1187650, EP 1314445, EP 1479406, HK 1057714, JP 3686609, NZ 513052, NZ 526165, NZ 526166, NZ 526168, US 6112746, US 6119693, US 6357441, US 6374826, US 6439230, US 6463931, US 6532961, US 6557556, US 6581594, US 6581602, US 6634358, US 6691708, US 6823865, US 6860269, US 6871649, US 6997188, US 7011090, US 7159587, US 7178527, US 7188620, US 7216647, US 7234466, US 7243651. Outras patentes pendentes. Protegido pelos registos de design: AU 304309, CN 200530117106.1, EP 366844, JP 1264474, NZ 406357, US D532512, US D547439, US D545960. Outros pendentes. Mirage e Mirage Micro são marcas comerciais da ResMed Ltd e Mirage encontra-se registada na Agência de Registos de Patentes dos Estados Unidos. © 2007 ResMed Ltd. 1011988/1 07 11