

CONSERVE ESTE FOLHETO JUNTO DO MEDIDOR E VERIFIQUE O VISOR DO MESMO ANTES DE CADA TESTE.

Verifique o visor do medidor GlucoTouch®

É muito importante que verifique o visor antes de cada teste.

Como verificar se todos os símbolos do visor estão a funcionar:


a) Prima e solte o botão azul de ligar/desligar. O visor completo aparecerá durante 3 segundos quando ligar o medidor.

b) Deve observar cuidadosamente o visor, para ter a certeza de que todos os "segmentos" ou partes do visor se ligam antes de cada teste (consulte a Figura apresentada ao lado). Poderá encontrar uma imagem semelhante de um teste de visor a funcionar correctamente no manual do utilizador do OneTouch® GlucoTouch®.

Se verificar que o visor não está a funcionar correctamente, **não utilize o medidor** e ligue imediatamente para o Serviço de Apoio a Clientes da LifeScan através do número grátis: 800 201 203, para receber gratuitamente um novo medidor.




TESTE DO VISOR Visor a funcionar correctamente

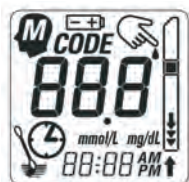

Todos os segmentos estão activos. O visor está a funcionar correctamente.

EXEMPLO DE TESTE DO VISOR O visor apresenta falta de segmentos

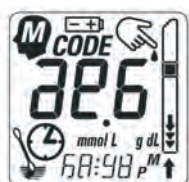

Algumas partes do visor não estão a funcionar. A mensagem apresentada será incompleta.

EXEMPLO DE RESULTADO DO TESTE Resultado reconhecível, mas incorrecto



Neste exemplo, o resultado 120 é, na verdade, 420, como podemos ver pelos segmentos em falta sombreados.

**ONETOUCH®
GlucoTouch®**

Como verificar se o visor do seu medidor está a funcionar correctamente?



Verifique o número de série na parte de trás o medidor OneTouch® GlucoTouch®

A LifeScan vai substituir todos os medidores OneTouch® GlucoTouch® com os números de série entre L3152Rxxxxxx e L5348Rxxxxxx.

Se tiver um medidor OneTouch® GlucoTouch® com um número de série dentro deste intervalo, por favor ligue imediatamente para o Serviço de Apoio a Clientes da LifeScan, através do número grátis: 800 201 203, para receber gratuitamente um novo medidor.

Enquanto não pudermos fornecer-lhe um novo medidor OneTouch® GlucoTouch®, faremos tudo para que receba gratuitamente um medidor de substituição.

Até chegar o medidor de substituição, deverá continuar a utilizar o medidor actual, desde que o visor esteja a funcionar correctamente.

Número de série na zona assinalada (exemplo)

