



ResMed

AirCurve™ 10 CS PACEWAVE



Botão Início para regressar ao ecrã
Início a qualquer momento

Botão Iniciar/Parar para dar início à terapia

Botão rotativo para navegação e alteração das opções

Saída de ar para ligar a tubagem de ar

Guia de início rápido
Português

Leia o manual do utilizador do AirCurve™ 10 na íntegra antes de utilizar.

Montagem




1 Coloque o dispositivo numa superfície nivelada estável.



2 Ligue o conector de alimentação à parte traseira do dispositivo. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação à fonte de alimentação e a outra extremidade à tomada da rede eléctrica.



3 Ligue a tubagem de ar firmemente à saída de ar situada na traseira do dispositivo.

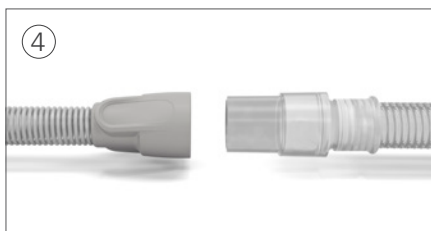

4 Ligue a extremidade livre da tubagem de ar com firmeza à máscara montada. Prima Iniciar/Parar para dar início à terapia.

AirCurve 10 com HumidAir

Se possui um dispositivo AirCurve 10 com HumidAir™, encha o humidificador da seguinte forma:



1 Abra o humidificador e encha-o com água até à marca do nível máximo de água.



2 Feche o humidificador e insira-o na parte lateral do dispositivo.

A humidificação aquecida proporciona alívio para a secura e congestão e foi concebida para tornar a terapia mais confortável. Se não possui um dispositivo AirCurve 10 com HumidAir, pondere comprar um HumidAir e uma tubagem de ar aquecido ClimateLineAir™.

Ajuste da terapia


Se esta é a sua primeira utilização, pode precisar de algum tempo para se habituar à terapia. Isto não é invulgar; é normal a maioria dos doentes demorar entre uma a duas semanas a adaptar-se à pressão do ar.

Superação dos sintomas através da modificação dos parâmetros de conforto

Se sentir dificuldade em habituar-se à terapia, utilize as funcionalidades de conforto do AirCurve 10 para o ajudar a alcançar um melhor sono.

- **Dificuldade em adormecer**—Se tem dificuldade em adormecer com a pressão alta, ligue a Rampa ou aumente o Tempo rampa.
- **Sensação de inchaço**—Caso se sinta ligeiramente inchado por causa do ar inspirado, ligue a Rampa ou aumente o Tempo rampa.
- **Sensação de não receber ar suficiente**—Caso sinta que não está a receber ar suficiente, desligue o Tempo rampa.


Para modificar o Tempo rampa:

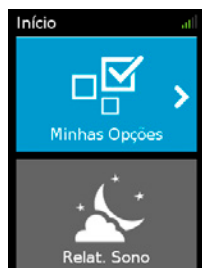


1. Pressione o botão rotativo para introduzir as Minhas opções.



2. Utilize o botão rotativo para realçar Tempo rampa e, em seguida, pressione para seleccionar essa opção.

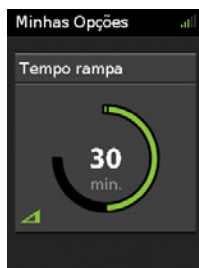

3. Utilize o botão rotativo para ajustar de acordo com a sua configuração preferida.

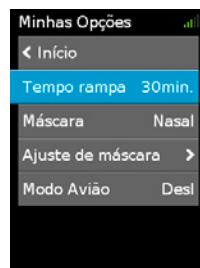

4. Pressione o botão rotativo para guardar a modificação.

Se possui um dispositivo AirCurve 10 com HumidAir, tem à sua disposição mais funcionalidades de conforto que o ajudam a tornar a terapia mais confortável.

- **Nariz seco ou a pingar**—Caso tenha o nariz seco ou a pingar, ajuste a Humidade aumentando-a.
- **Goticulas de água (condensação)**—Caso detecte gotículas de água no seu nariz, máscara ou tubagem de ar, ajuste a Humidade diminuindo-a.



Limpeza

1. Lave a tubagem de ar em água morna e detergente suave.
Não lave a tubagem de ar numa máquina de lavar roupa ou louça.
2. Enxagúe bem a tubagem de ar e deixe-a secar, ao abrigo da luz solar directa e/ou do calor.
3. Limpe o exterior do dispositivo com um pano seco.

Se possui um dispositivo AirCurve 10 com HumidAir, limpe o humidificador conforme indicado nos passos 1 e 2.

Consulte o manual do utilizador da máscara para obter informações detalhadas sobre a limpeza da sua máscara.

Verificação e substituição regulares das peças

É importante para o seu conforto e saúde que verifique e substitua as peças e consumíveis com regularidade. A substituição regular das peças e consumíveis ajuda a garantir que recebe a melhor terapia e um conforto contínuo.

Consulte o manual do utilizador do AirCurve 10 para obter instruções detalhadas acerca da verificação do seu dispositivo. Contacte o seu prestador de cuidados para obter informações acerca do cronograma de substituições.

Número de série	Número do dispositivo
Tipo e tamanho da máscara	Data da montagem
Notas	

 **ResMed Ltd**
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Austrália

DISTRIBUÍDO POR:
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA
CE/REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire
OX14 4RW Reino Unido

Consulte www.resmed.com para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. Para obter informações acerca de patentes, consulte www.resmed.com/ip. AirSense, ClimateLine e HumidAir são marcas comerciais da ResMed Ltd. ClimateLine está registada no Gabinete de Patentes e Marcas Comerciais dos EUA. © 2014 ResMed Ltd. 378379/1 2014-10

ResMed.com

CE
0123



378379