



ResMed

AirSense™ 10 AUTOSET

ELITE



Botão Início para regressar ao ecrã
Início a qualquer momento

Botão Iniciar/Parar para dar início à terapia

Botão rotativo para navegação e alteração das opções

Saída de ar para ligar a tubagem de ar

Guia de início rápido

Português

Leia o manual do utilizador do AirSense™ 10 na íntegra antes de utilizar.

Montagem




Coloque o dispositivo numa superfície nivelada estável.



Ligue o conector de alimentação à parte traseira do dispositivo. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação à fonte de alimentação e a outra extremidade à tomada da rede eléctrica.



Ligue a tubagem de ar firmemente à saída de ar situada na traseira do dispositivo.

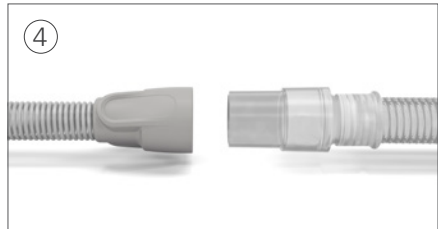

Ligue a extremidade livre da tubagem de ar com firmeza à máscara montada. Prima Iniciar/Parar para dar início à terapia.

AirSense 10 com HumidAir

Se possui um dispositivo AirSense 10 com HumidAir™, encha o humidificador da seguinte forma:



Abra o humidificador e encha-o com água até à marca do nível máximo de água.



Feche o humidificador e insira-o na parte lateral do dispositivo.

A humidificação aquecida proporciona alívio para a secura e congestão e foi concebida para tornar a terapia mais confortável. Se não possui um dispositivo AirSense 10 com HumidAir, pondere comprar um HumidAir e uma tubagem de ar aquecido ClimateLineAir™.

Ajuste da terapia


Se esta é a sua primeira utilização, pode precisar de algum tempo para se habituar à terapia. Isto não é invulgar; é normal a maioria dos doentes demorar entre uma a duas semanas a adaptar-se à pressão do ar.

Superação dos sintomas através da modificação dos parâmetros de conforto

Se sentir dificuldade em habituar-se à terapia, utilize as funcionalidades de conforto do AirSense 10 para o ajudar a alcançar um melhor sono.

- **Dificuldade em adormecer**—Se tem dificuldade em adormecer com a pressão alta, ligue a Rampa automática ou aumente o Tempo rampa.
- **Sensação de inchaço**—Caso se sinta ligeiramente inchado por causa do ar inspirado, ligue a Rampa automática ou aumente o Tempo rampa.
- **Sensação de não receber ar suficiente**—Caso sinta que não está a receber ar suficiente, desligue o Tempo rampa.

Para modificar o Tempo rampa:

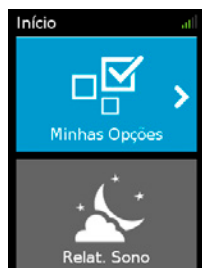


1. Pressione o botão rotativo para introduzir as Minhas opções.



2. Utilize o botão rotativo para realçar Tempo rampa e, em seguida, pressione para seleccionar essa opção.



3. Utilize o botão rotativo para ajustar de acordo com a sua configuração preferida.

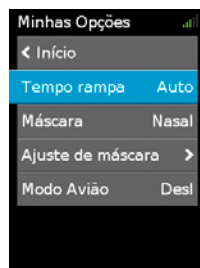

4. Pressione o botão rotativo para guardar a modificação.

Se possui um dispositivo AirSense 10 com HumidAir, tem à sua disposição mais funcionalidades de conforto que o ajudam a tornar a terapia mais confortável.

- **Nariz seco ou a pingar**—Caso tenha o nariz seco ou a pingar, ajuste a Humidade aumentando-a.
- **Goticulas de água (condensação)**—Caso detecte gotículas de água no seu nariz, máscara ou tubagem de ar, ajuste a Humidade diminuindo-a.



ResMed

Limpeza

1. Lave a tubagem de ar em água morna e detergente suave.
Não lave a tubagem de ar numa máquina de lavar roupa ou louça.
2. Enxagúe bem a tubagem de ar e deixe-a secar, ao abrigo da luz solar directa e/ou do calor.
3. Limpe o exterior do dispositivo com um pano seco.

Se possui um dispositivo AirSense 10 com HumidAir, limpe o humidificador conforme indicado nos passos 1 e 2.

Consulte o manual do utilizador da máscara para obter informações detalhadas sobre a limpeza da sua máscara.

Verificação e substituição regulares das peças

É importante para o seu conforto e saúde que verifique e substitua as peças e consumíveis com regularidade. A substituição regular das peças e consumíveis ajuda a garantir que recebe a melhor terapia e um conforto contínuo.

Consulte o manual do utilizador do AirSense 10 para obter instruções detalhadas acerca da verificação do seu dispositivo. Contacte o seu prestador de cuidados para obter informações acerca do cronograma de substituições.

Número de série	Número do dispositivo
Tipo e tamanho da máscara	Data da montagem
Notas	



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Austrália

DISTRIBUÍDO POR:

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire
OX14 4RW Reino Unido

Consulte www.resmed.com para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. Para obter informações acerca de patentes, consulte www.resmed.com/ip. AirSense, ClimateLine e HumidAir são marcas comerciais da ResMed Ltd. ClimateLine está registada no Gabinete de Patentes e Marcas Comerciais dos EUA. © 2014 ResMed Ltd. 378332/1 2014-09



ResMed.com



378332