


1. Lavar as mãos e secar muito bem.



2. Colocar a vareta de teste na abertura no topo do medidor e fechar a tampa imediatamente.

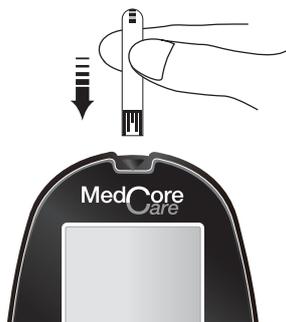

3. Desaparafusar a tampa da caneta de testes e colocar a lanceta incluída no saco do medidor; rodar a tampa da lanceta para a remover (*proteção de esterilização*), aparafusar novamente a tampa da caneta e rodar até obter a profundidade de penetração da agulha que pretende.



4. Aguardar até que apareça no visor uma gota a piscar e tirar uma amostra de sangue com a caneta de testes; limpar a primeira gota de sangue.




5. Colocar a extremidade da vareta de testes na gota de sangue e deixe que o sangue seja absorvido pela área do reagente.

12:1830-07 mmol/L



6. O resultado é apresentado no visor após 6 segundos.


No caso de pretender guardar os resultados do teste como “antes da refeição/depois da refeição”

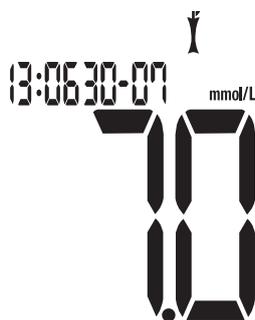

1. Se pretende guardar os resultados com marcação de refeições, deve premir ▲ até aparecer uma maçã com dentadas como “depois da refeição”,



2. ou premir ▲ novamente para não ser apresentada nenhuma das marcações acima e assim não marcar um resultado

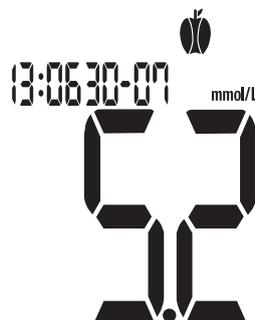

3. ou premir ▲ novamente até aparecer uma maçã sem dentadas para marcar “antes da refeição”

4. Premir ◻ para confirmar. Remover a vareta de testes, e de seguida descartar no recipiente indicado. O último resultado fica guardado.

9: 152 1.07 mem  
mmol/L  
54



9: 152 1.07 mem  
mmol/L  
54

1. Premir  durante cerca de 2-3 seg., (aparece "mem" no canto direito superior do visor) para ligar o medidor e o visor LCD acende-se com o último resultado de teste

2. Para voltar atrás na memória premir . Premir  para voltar.

3. Para visualizar os valores médios de 1 dia, 7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias ou 90 dias, premir  e de seguida , para ver estes resultados.



4. Premir  para voltar ao último resultado.

FunC



13:0630-07



1. Premir  $\odot$  (Ligar/Desligar) até aparecer "FunC" no visor. A data e a hora ficam a piscar, para alterar premir  $\odot$  mais uma vez

2. Com as setas  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  (cima/baixo) é possível alterar o mês, dia, ano, hora e minutos, e com  $\odot$  navega para a frente no menu. Quando todos os números de "data, hora" ficam novamente a piscar, premir  $\blacktriangle$  para Ligar/Desligar o som. O medidor está ajustado em Ligado na entrega. [...]


3. Premir  $\blacktriangle$  para aceder a ajustamento do som Ligar/Desligar. O medidor está ajustado em Ligado na entrega, premir em  $\odot$  para alterar com as setas  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  e premir  $\odot$  para confirmar.

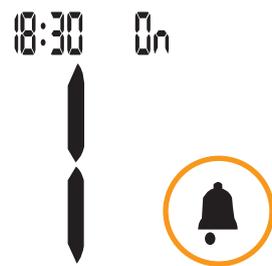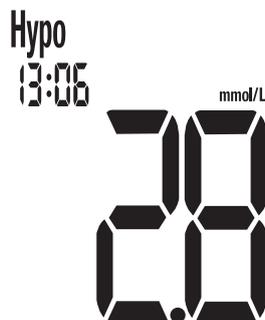

4. Premir  $\blacktriangle$  para aceder ao ajustamento do valor de Hipoglicémia, ficando "Hypo" a piscar; na entrega o valor de hipoglicémia está definido para 2,8 mmol/L. Premir  $\odot$  para alterar com as setas  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , premir  $\odot$  para confirmar.

5. Premir  $\blacktriangle$  para aceder ao ajustamento do valor de Hiperglucose, ficando "Hyper" a piscar; na entrega o valor de hiperglucose está definido para 2,8 mmol/L. Premir  $\odot$  para alterar com as setas  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , premir  $\odot$  para confirmar.

6. Premir  $\blacktriangle$  para aceder ao alarme onde encontra um relógio a piscar no visor; premir em  $\odot$  para o alarme nº. 1 para ajustar o alarme nº. 1

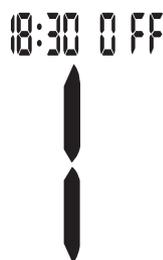

7. Premir  $\odot$  para alterar com  $\blacktriangle$  para definir o alarme como Ligado/Desligado. Se seleccionar Ligado, o tempo deve ser ajustado para quando pretende que o alarme seja emitido e apresentado, premir  $\odot$  e usar  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para ajustar a hora, e premir  $\odot$  para confirmar; 1 fica a piscar

8. Premir  $\blacktriangle$  para aceder ao alarme 2 e repetir a partir do ponto 6.

Premir em  $\odot$  durante 2-3 segundos para desligar o medidor ou este desliga-se depois de 2 minutos.

Por favor consultar o manual de utilização que é entregue com o medidor para mais informações.

Contactar o Serviço de Clientes da MedCore pelo tel: 08-631 08 30 ou [Info@medcore.se](mailto:Info@medcore.se)