

PT

Corpus 3G



Art. n°. 205254-PT-0

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

CE

PT

Corpus 3G

Sistema de assento para cadeira de rodas elétrica



Entre em contacto com Permobil

Permobil Benelux BV

De Beitel 11
6466 GZ Kerkrade
Nederland

Tel: +31 (0)45 564 54 80

Fax: +31 (0)45 564 54 81

Email: info@permobil.nl

Escritórios de vendas e serviços na Suécia

Permobil AB

Box 120
861 23 Timrå
Sweden

Tel: +46 60 59 59 00

Fax: +46 60 57 52 50

E-mail: info@permobil.se

***Corpus* 3G**

Sistema de assento para cadeira de rodas elétricas

Informações importantes sobre este manual de utilização.....	6
Apoio/Assistência técnica.....	6
Peças sobressalentes & acessórios.....	6
Eliminação.....	6
Garantia e assistência técnica.....	7
Instruções de segurança.....	8-15
Construção e funções.....	16
Geral.....	16
Elevação elétrica do assento.....	18
Inclinação elétrica do assento.....	18
Apoio das costas elétrico.....	19
Apoio das pernas elétrico.....	19
Movimento elétrico do apoio das pernas.....	20
Ajustamento elétrico do apoio das pernas.....	20
Painel de manobras ICS.....	21
Funções manuais da cadeira - Inclinação do apoio das pernas.....	26
Funções manuais da cadeira - inclinação do encosto.....	27
Definições.....	28
Comprimento do apoio das pernas.....	28
Altura do apoio dos pés.....	29
Ângulo do apoio dos pés.....	30
Posição do apoio de braço.....	31
Altura do apoio dos braços.....	32
Ângulo do apoio de braço.....	33
Altura/ângulo do apoio de braço.....	34
Apoio lombar.....	35
Apoio do tronco.....	36
Apoio da nuca.....	37
Painel de manobras.....	38
Cinto de segurança.....	40
Transporte.....	41
Cuidados e manutenção.....	42
Acessórios.....	43
Especificações técnicas.....	44

Informações importantes sobre este manual de utilização

Muitos parabéns por ter escolhido um produto Permobil. O nosso objetivo é que continue satisfeito com a sua escolha de fornecedor e de cadeira de rodas.

Antes de utilizar a sua cadeira de rodas é importante ler e entender o conteúdo deste manual de instruções, sobretudo o capítulo sobre Segurança.

O manual de utilização serve para que possa conhecer as funções e características da sua cadeira de rodas e a melhor forma de a utilizar. Contém também informações de segurança e de manutenção importantes, descrevendo eventuais problemas que possam surgir durante a sua condução.

Guardar sempre o manual na cadeira de rodas, pois poderá necessitar de informações importantes sobre a sua utilização, segurança e manutenção da mesma.

Encontra também informações sobre nossos produtos na nossa página da internet. Poderá visitar-nos em www.permobil.com.

Se a sua cadeira de rodas está identificada com o selo “Produto especialmente adaptado”, significa que foi adaptada para as suas necessidades e requisitos, ou seja, o desempenho e as funções da cadeira podem diferir do descrito neste manual, ou do desempenho e funções de outras cadeiras do mesmo tipo.

Todas as informações, fotos, ilustrações e especificações estão baseadas na informação do produto disponível no momento da impressão deste manual. As fotos e ilustrações incluídas no manual, representam exemplos típicos e não devem ser consideradas como uma reprodução exacta dos vários componentes da cadeira de rodas.

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações ao produto sem aviso prévio.

Pessoas com deficiência visual podem ler o documento em formato PDF que encontra em www.permobil.com, ou pode também encomendar com letras maiores.

Apoio/Assistência técnica

Por favor contactar o Permobil Customer Support Center caso necessite de apoio ou assistência técnica.

Tel: +46-60-59 59 03, Fax. +46 60-59 59 10, Email: supportgruppen@permobil.se

Peças sobressalentes & acessórios

Por favor contactar o Permobil Customer Support Center caso necessite de peças sobressalentes ou acessórios.

Tel: +46-60-59 59 01, Fax. +46 60-57 24 86, Email: partorders@permobil.se

A longevidade prevista deste produto é de 7 anos.

Eliminação

Em caso de dúvida, contactar o Centro de Atendimento ao Cliente Permobil para mais informações sobre os acordos vigentes de eliminação.

Tel: +46-60-59 59 03, Fax. +46 60-59 59 10, Email: supportgruppen@permobil.se

Garantia e assistência técnica

As cadeiras de rodas elétricas da Permobil são fornecidas com garantia de 1 ano, ou segundo o acordo em vigor. Esta garantia abrange erros no funcionamento, falhas de material ou defeitos de fabrico que surjam durante o período da garantia, em utilização normal.

A garantia não abrange

- Avarias que resultem de desgaste normal.
- Peças de desgaste como baterias, pneus/câmara de ar, capas ou almofadas.
- Avarias causadas por uma manutenção deficiente.
- Avarias e danos causados por colisões.

No caso de uma compra como privado, vigora a lei de proteção do consumidor.

Reparações abrangidas pela garantia devem ser efetuadas por parceiros autorizados da Permobil AB.

Para mais informações por favor contactar o Permobil Customer Support Center.

Tel: +46-60-59 59 03, Fax. +46 60-59 59 10, Email: supportgruppen@permobil.se

Comunicação de acidentes

Sempre que ocorrer um acidente, agradecemos que entre em contacto com o representante mais próximo da Permobil. Normalmente será a mesma pessoa que contactou para a compra da cadeira. Para esse contacto, acesse ao nosso site da internet, www.permobil.com, clique no link do seu país e abra a página dos contactos, onde encontra as informações de contacto necessárias, assim como um documento sobre o procedimento de comunicação do incidente. Será para nós uma grande ajuda se informação entregue for o mais pormenorizada possível.

Para que possamos melhorar a qualidade de nossos produtos e assegurar que continuam a oferecer segurança durante toda a sua vida útil, é importante preencher e enviar-nos o Relatório de incidentes (Incident Report). O MEDDEV 2.12/1 e Anexo 9 também indica que o fabricante deve *"Encorajar os utilizadores ou a pessoas responsáveis, a comunicarem acidentes ocorridos com equipamento médico técnico, que cumprem os critérios definidos nas suas diretivas sobre a comunicação de incidentes ao fabricante e/ou à autoridade competente, de acordo com a legislação nacional"*.

Necessitamos da sua ajuda para podermos cumprir estes critérios e assegurar que os nossos produtos permanecem seguros. Esperamos que nunca necessite de utilizar as informações contidas nesta página, mas caso ocorra um acidente, agradecemos que nos contacte.

Homologação do produto

Este produto cumpre os requisitos das normas NE 12184 e ISO 7176.

Instruções de segurança – Geral

O assento é pesado, com muitos componentes móveis e deve por isso ser manuseado com muito cuidado. Ler e cumprir cuidadosamente todas as instruções e avisos contidos neste manual, antes de utilizar o assento/cadeira de rodas. Uma utilização incorreta pode lesionar o utilizador e causar danos à cadeira.

Este Manual de utilização contém a “sinalização de aviso” abaixo, cujo objetivo é chamar a atenção para situações que podem resultar em problemas, incidentes, lesões pessoais, danos ao assento, etc.

ATENÇÃO

Ter atenção.

AVISO

Preste muita atenção.
Risco de lesões pessoais e danos à cadeira e imediações.

ATENÇÃO

A Permobil AB não se responsabiliza por lesões pessoais ou danos materiais que possam resultar caso o utilizador ou outros não cumpram as recomendações, avisos e instruções contidas nestas instruções de uso por parte do utilizador ou terceiro.

Instruções de segurança – geral

Este assento pode ser ajustado para as suas necessidades antes da entrega; deve por isso, consultar o seu médico antes de solicitar alterações ou ajustamentos do assento. Alguns ajustamentos podem dificultar as funções e segurança do assento ou podem não se adequar às suas necessidades.

Para eliminar uma utilização inadequada do assento, é muito importante que antes de a utilizar, dedique tempo suficiente para se familiarizar bem com o assento e os vários botões de acessórios, funções, instrumentos de condução, opções de configurações, etc.

Não faça o primeiro teste de condução sozinho, assegure-se que tem alguém consigo para o assistir caso necessite.

Para assegurar que não ocorreram danos à cadeira durante o transporte, verifique o seguinte antes de utilizar a cadeira:

- Controlar se todos os produtos encomendados estão incluídos na entrega. Se pensar que falta algo, contactar logo que possível o seu centro de saúde ou a Permobil para mais informações.
- Verifique se ocorreu algum dano durante o transporte ou outros danos à cadeira e seus acessórios. Se identificar algum dano ou constatar que há algo errado, contactar de imediato o seu centro de saúde ou a Permobil para obter informações, antes de continuar o seu controlo.

Instruções de segurança



AVISO

Risco de esmagamento

Notar que o assento é pesado, com muitos componentes móveis, incorrendo sempre o risco de esmagamento.

Utilizar com cuidado as funções elétricas do assento. Acima de tudo, sempre que se deslocar até ou sob uma mesa, ou outros objetos fixos ou móveis, certifique-se de que não há nenhum obstáculo próximo que possa obstruir os componentes móveis das funções da cadeira.

Operação do sistema de elevação/inclinação do assento e de inclinação do encosto

Controlar se não há o risco de algo ficar preso entre o chassis e o assento ao utilizar a função de elevação/inclinação do assento e de inclinação do encosto. Ao utilizar estas funções, o centro de gravidade da cadeira desloca-se, o que aumenta o risco de queda. Deve por isso conduzir sempre a baixa velocidade e limitar a utilização destas funções do assento em terreno plano, evitando-as em encostas, rampas ou outras inclinações.

Centro de gravidade

Notar que os fatores seguintes podem alterar o centro de gravidade do assento/cadeira de rodas e aumentar o risco de queda:

- Elevação do assento
- Altura e ângulo do assento
- Posição do corpo ou distribuição do peso
- Condução em superfícies inclinadas, por exemplo, rampas ou subidas
- Usar uma mochila ou outros acessórios, dependendo do peso adicionado.

Caso a cadeira de rodas se mova de forma inesperada, soltar imediatamente a alavanca de comando para parar a cadeira. Exceto em casos de emergência, NÃO utilizar o botão ligar/desligar para parar a cadeira de rodas. Pode causar uma paragem súbita e descontrolada da cadeira, o que pode resultar em lesões pessoais.

Instruções de segurança



AVISO

Cinto da fixação

O cinto de fixação da Permobil foi concebido para manter o utilizador no lugar, não como proteção contra colisões/acidentes. Controlar regularmente o estado geral do cinto para evitar danos ou desgaste.

Sentar e sair da cadeira

Certificar que a corrente está DESLIGADA antes de se sentar ou sair da cadeira de rodas, assim como, antes de levantar os apoios de braços om o painel de manobras.


Para se sentar ou sair da cadeira de rodas, ter atenção para reduzir a distância entre a cadeira e o local para onde o utilizador se pretende mover. Caso a distância seja grande, há o risco do utilizador perder o equilíbrio ou cair.

A Permobil recomenda que a transferência do utilizador ocorra na presença de uma pessoa que possa vigiar ou ajudar, se necessário.

Ter cuidado quando se dobrar ou esticar para alcançar algo.

Nunca utilizar a alavanca de comando como pega ou apoio.

Não utilizar o apoio dos pés ou braços para se sentar ou sair da cadeira de rodas. Os apoios dos pés e dos braços não devem suportar peso. Uma sobrecarga desnecessária pode resultar em colapso, resultando em lesões pessoais ou danos materiais, incluindo danos à cadeira de rodas.

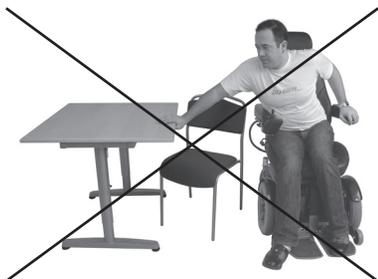

Instruções de segurança



AVISO

Passageiros

A cadeira não se destina ao transporte de passageiros, independentemente de sua idade, nem deve transportar artigos pesados, para além dos objetos pessoais do utilizador. Não ultrapassar o peso máximo de utilizador indicado neste manual, dado que prejudica a capacidade de manobra e estabilidade da cadeira de rodas.

Utilização em diversos tipos de clima

As cadeiras da Permobil são construídas para tolerar a maioria das condições climáticas mas deve evitar expor a cadeira a frio extremo, humidade prolongada, chuva ou neve, assim como outras condições extremas. Caso a cadeira tenha sido exposta ao acima mencionado, secar bem antes de a utilizar novamente.

Lembre-se que algumas superfícies da cadeira podem ficar quentes ou frias depois de exposição prolongada a luz do sol forte, ou a frio.

Substituir o estofado da cadeira ou a caixa do painel de manobras caso apresentem rachas ou semelhante, para evitar que a humidade penetre e danifique componentes eletrónicos.

Instruções de segurança



AVISO

Transporte

Transportar a cadeira de rodas apenas em veículos aprovados para esse fim. Controlar antes com o transportador se o veículo é adequado, e se está equipado e seguro para transportar pessoas em cadeiras de rodas. Uma cadeira de rodas não é construída para funcionar como um banco de automóvel, nem oferece a mesma segurança, estando bem fixa ao veículo ou não.

Verificar cuidadosamente se a cadeira de rodas está bem fixa e se o desengate de travões não está ativado (as rodas motrizes da cadeira devem estar bloqueadas). A cadeira de rodas pode ser fixa com cintas, presas aos anéis de transporte localizados na dianteira e traseira da estrutura, marcados com autocolantes amarelos, ou com o sistema de fixação Permlock.

Se for necessário transportar a cadeira de rodas com o utilizador sentado, verificar se a cadeira de rodas está fixa com um sistema homologado e adequado ao peso total da cadeira.

- A cadeira de rodas pode ser fixa com os anéis de fixação da cadeira, ou com um sistema de fixação Permlock.
- A Permobil recomenda que a cadeira de rodas seja equipada com o apoio para a nuca, que deverá ser utilizado durante o transporte.
- Durante o transporte, é importante que o utilizador sentado utilize o cinto de segurança de três pontos, fixo ao piso e ao painel lateral do veículo.
- Usar um cinto à volta do tronco fixo à cadeira de rodas, serve apenas para assegurar que o utilizador permanece no lugar, não protege da mesma forma que o cinto de segurança do veículo.

Instruções de segurança



AVISO

Manutenção e revisões

Efetuar apenas as revisões e manutenção indicada neste manual de utilização. Todas as restantes revisões, alterações ou reparações ao assento, ou aos sistemas vitais dos acessórios, devem ser efetuadas por técnicos qualificados, ou com conhecimentos suficientes para efetuar este tipo de trabalhos de forma profissional. No caso de dúvida, contactar sempre a assistência técnica ou a Permobil.

Desligar sempre a corrente elétrica antes de efetuar quaisquer reparações/revisões ao sistema elétrico do assento. Leia mais sobre como proceder no manual de utilização da sua cadeira de rodas (manual do chassis).

Utilizar apenas peças sobressalentes ou acessórios aprovados ou recomendados pela Permobil. A utilização de outros pode resultar em alterações e deterioração das funções e segurança do assento. Também pode acarretar a perda da garantia do assento.

Notar que o assento é pesado, com muitos componentes móveis, incorrendo sempre o risco de esmagamento.

Instruções de segurança



AVISO

Armazenagem

Nunca armazenar o assento e acessórios num local com condensação (vapor ou humidade nas superfícies), isto é, lavandarias ou semelhante.

Caso tenha dúvidas sobre como armazenar de forma adequada, contactar o seu fornecedor ou a Permobil para mais informações.

Danos ou anomalias nas funções do assento e acessórios

Se achar que o assento e respetivas funções não têm o desempenho previsto, ou se suspeitar alguma avaria, interromper de imediato o teste de condução e contactar o centro de saúde ou a Permobil para obter mais informações.

É muito importante informar a Permobil imediatamente caso o assento ou os acessórios apresentem danos causados durante o transporte, condução ou outros. Há o risco de não ser possível utilizar o assento ou os acessórios de forma segura e sem riscos.

Construção e funcionamento

Geral

O Corpus 3G é um assento ergonómico que pode ser facilmente ajustado às necessidades do utilizador. O assento pode ser complementado com um vasto sortimento de acessórios, como apoios para as barrigas das pernas, coxas, tronco, peito, nuca, etc.

O assento pode ser equipado com elevação elétrica do assento, assim como funções manuais e elétricas.

Geral



1. Apoio da nuca
2. Encosto
3. Painel de manobras
4. Assento

5. Apoio das pernas
6. Apoio dos pés
7. Braços

Construção e funcionamento

Funções elétricas do assento (podem variar dependendo do equipamento da cadeira de rodas)
As funções elétricas do assento são operadas por um acionador elétrico, através do painel de manobras da cadeira de rodas.

Funções

- elevação do assento
- apoio das pernas
- inclinação do assento
- inclinação das costas


Funções manuais do assento (podem variar dependendo do equipamento da cadeira de rodas)
Fixar a barra manual de bloqueio com o engate rápido numa das várias posições fixas do assento para o ajustamento manual do assento.

Funções


- ângulo do apoio das pernas
- inclinação das costas

Outros ajustamentos

O painel de manobras, os apoios de braços e pés, assim como outros acessórios como o apoio para as barrigas das pernas, coxas, tronco, nuca e outros, têm opções manuais de ajustamento e posicionamento.

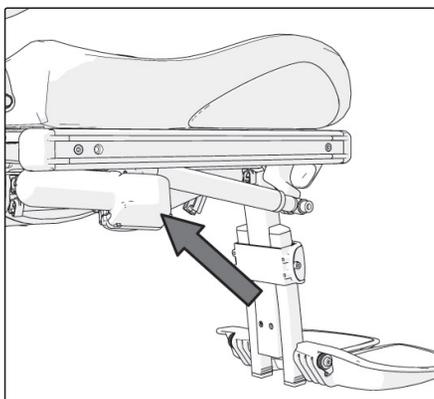

Acionador elétrico do ângulo do apoio das pernas.

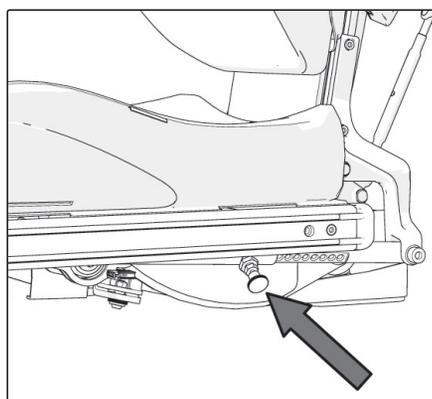

Tubo de bloqueio manual da inclinação do encosto.

Construção e funcionamento

Elevação elétrica do assento

Um elevador elétrico permite descer/eleva o assento gradualmente para adaptar a cadeira para uma altura confortável para mesas, bancadas, etc.

A velocidade máxima da cadeira é reduzida assim que o assento é elevado acima da sua posição mais baixa.



Elevação elétrica do assento.

Inclinação elétrica do assento

O ajustamento elétrico da inclinação do assento possibilita definir o ângulo do assento.



Inclinação elétrica do assento.



AVISO

Um assento elevado desloca o centro de gravidade e aumenta o risco de queda; deve por isso utilizar esta posição apenas em superfícies planas.

Conduzir sempre com velocidade baixa e nunca inclinar o assento/encosto para trás de forma a que não permita conduzir a cadeira de rodas de forma segura em superfícies inclinadas, desníveis ou ao ultrapassar obstáculos.

Construção e funcionamento

Apoio das costas elétrico

Uma inclinação elétrica do apoio das costas permite ajustar o seu ângulo.



Apoio das costas elétrico.

Apoio das pernas elétrico

Apoio das pernas elétrico que permite ajustar o apoio para dentro ou para fora.



Apoio das pernas elétrico.



AVISO

Há sempre o risco de esmagamento quando as funções elétricas do assento estão em movimento.

Construção e funcionamento

Movimento elétrico do apoio das pernas

Esta função eleva o assento ao mesmo tempo que desce o apoio das pernas, até à superfície. Desta forma, o utilizador pode descer ou sentar-se na cadeira mais facilmente. O apoio dos pés muito fino facilita mover de e para o solo.

ATENÇÃO

Para mais informações sobre a carga máxima e o comprimento mínimo do apoio das pernas, consultar as especificações técnicas na página 44.



Movimento elétrico do apoio das pernas.

Ajustamento elétrico do apoio das pernas

Apoio dos pés elétrico que permitem ajustar a sua altura (comprimento do apoio das pernas). Assim será mais fácil ajustar a pressão na parte de baixo das coxas.

ATENÇÃO

Para mais informações sobre a carga máxima e o comprimento mínimo do apoio das pernas, consultar as especificações técnicas na página 44.



Movimento elétrico do apoio das pernas.

AVISO

Há sempre o risco de esmagamento quando as funções elétricas do assento estão em movimento.

Construção e funcionamento

As funções elétricas do assento podem ser controladas pelo painel de manobras da cadeira de rodas; consultar as instruções do chassis para mais informações. Nas cadeiras equipadas com o sistema de controlo ICS, as funções elétricas podem ser controladas também pelo painel de manobras ICS.

Painel de manobras ICS


As funções elétricas do assento são controladas pelo respetivo painel de manobras. O dispositivo de manobras pode ser em forma de botões tradicionais ou, para facilitar para alguns utilizadores, em forma de alavancas móveis, fáceis de utilizar. Mover a alavanca para a frente para acionar o botão dianteiro e para trás para acionar o botão traseiro. De seguida, as funções do painel de manobras estão descritas como estando equipado com botões tradicionais; as funções, no entanto, são as mesmas, independentemente do formato do dispositivo.

Diferentes botões de manobras podem conter duas funções; o símbolo aceso indica qual a função ativa. Usar **shift** para alternar entre funções, ver a página. 22.



ATENÇÃO

O número de funções disponíveis varia de acordo com o equipamento da cadeira de rodas e do assento.

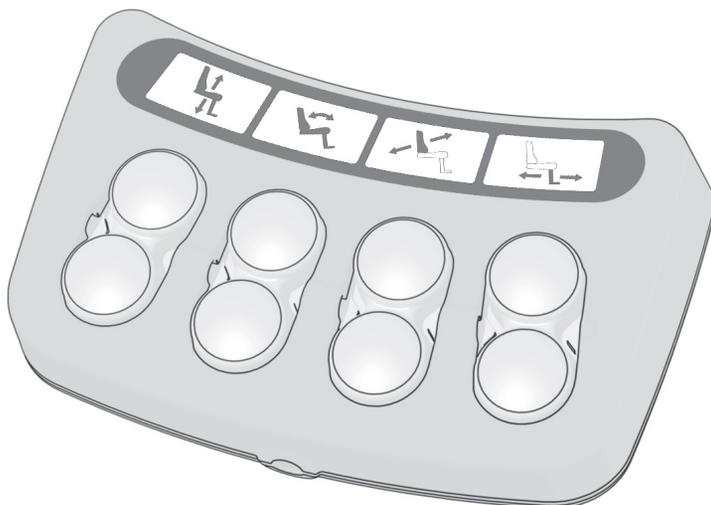

Painel de manobras do assento.

Construção e funcionamento

Os símbolos do painel de manobras indicam quais as funções do assento estão disponíveis, quais as funções estão limitadas e quais as funções que acarretam redução da velocidade ou a interrupção da condução.

Os símbolos podem estar apagados, ou acesos continuamente, ou a piscar.

Símbolo apagado

O símbolo da função está apagado. Significa que a função não está disponível nesse momento. Usar o botão “shift” no painel de manobras para alternar entre as funções da direita e esquerda do assento.

Símbolo aceso

O símbolo aceso continuamente oferece informações relacionadas com a velocidade da condução.

Uma luz *verde* contínua indica que a cadeira de rodas pode ser conduzida na velocidade máxima.

Uma luz *amarela* contínua indica que a velocidade máxima da cadeira de rodas foi reduzida devido à posição da atual função do assento.

Uma luz *vermelha* contínua indica que não é possível conduzir a cadeira de rodas devido à posição da atual função da cadeira.

Símbolos com luz intermitente

Um símbolo a piscar oferece informações sobre o acionador.

O símbolo verde a piscar indica uma função especial, por exemplo, a função de memória.

O símbolo amarelo intermitente indica que a função está bloqueada numa das direções por um interruptor de segurança; o dispositivo de manobras para essa função funciona apenas na direção “segura”.

O símbolo vermelho intermitente indica que foi detetada uma falha no acionador relevante, o que pode significar que a função do assento não funciona. Contactar a assistência técnica.

Construção e funcionamento



Elevação do assento

Para elevar o assento, premir a parte superior do botão e para o descer, premir a parte inferior.



Inclinação do encosto

Para inclinar o encosto para trás, premir a parte inferior do botão e para voltar à posição inicial, premir a parte superior.



Inclinação do assento

Para inclinar o assento para trás, premir a parte inferior do botão e para inclinar para a frente, premir a parte superior.



Ângulo do apoio das pernas

Para afastar os apoios das pernas para fora, premir na parte superior do botão e na parte inferior para voltar à posição inicial.


Em algumas versões, o botão de controlo da função do apoio das pernas controla também outra função, sem o botão “shift”; nestes casos, os apoios das pernas são afastados ou estreitados premindo duas vezes o botão de funções.

Construção e funcionamento



Shift

Premir o botão **shift** para alternar entre as funções nos botões de manobras. Premir novamente o botão **shift** para voltar à posição anterior. Acende o símbolo correspondente à função ativada.

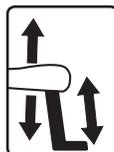

Movimento elétrico do apoio das pernas

Ao premir a parte superior do botão, o assento é elevado ao mesmo tempo que a placa dos pés desce. Ao premir a parte inferior do botão, o assento desce ao mesmo tempo que a placa dos pés é elevada.



Ajustamento elétrico da altura do apoio das pernas

Para elevar a placa dos pés, premir o parte superior do botão e para o descer, premir a parte inferior.

Construção e funcionamento



Função de memória

O painel de manobras tem uma memória incorporada com espaço para três memórias. Cada uma das memórias oferece a possibilidade de guardar as configurações eléctricas do assento.

Guardar as definições

Ajustar o assento na posição que pretende guardar na memória.

- Premir e manter premido o botão de memória (8) durante 2 segundos - ver figura - para ativar a função de memória. O símbolo verde pisca enquanto a função de memória estiver ativada.
- Premir e manter premido o botão 4 durante dois segundos para ativar a função de memória; a luz 7 fica verde, o que significa que a função está ativada.
- Manter premido o botão da função de memória desejada (5, 6 ou 7) durante três segundos para guardar as definições do assento, ver a figura. O símbolo vermelho por cima da função de memória em questão acende e o painel de manobras emite um breve sinal para indicar que a definição foi guardada.
- Premir o botão de memória (8) para voltar às funções normais do painel de manobras; ver a figura.

Visualizar as definições

- Premir e manter premido o botão de memória (8) durante 2 segundos - ver figura - para ativar a função de memória. O símbolo verde pisca enquanto a função de memória estiver ativada.
- Manter premido o botão da função de memória desejada (1, 2 ou 3) durante três segundos e o assento volta à posição anterior guardada, ver a figura. Por razões de segurança, o botão deve ser mantido premido até o assento estar na posição desejada. Quando estiver na definição guardada, o acionador pára, o símbolo verde por cima do botão de memória acende e o painel de manobras emite um breve sinal sonoro.
- Voltar às funções normais do painel de manobras premindo o botão de memória (8); ver a figura.




Função de memória do painel de manobras.

Construção e funcionamento

Funções manuais da cadeira - Inclinação do apoio das pernas

Ajustar o ângulo do apoio das pernas com a barra de bloqueio com engate rápido, numa das várias posições fixas.

1. Puxar para fora o botão de fecho com mola para soltar o movimento de barra e permitir a inclinação do apoio das pernas.
2. Ajustar o apoio das pernas no ângulo desejado e soltar o botão para que fique fixo no furo pretendido na barra.
3. Depois de efetuar o ajustamento, verificar se o apoio das pernas está bloqueado.

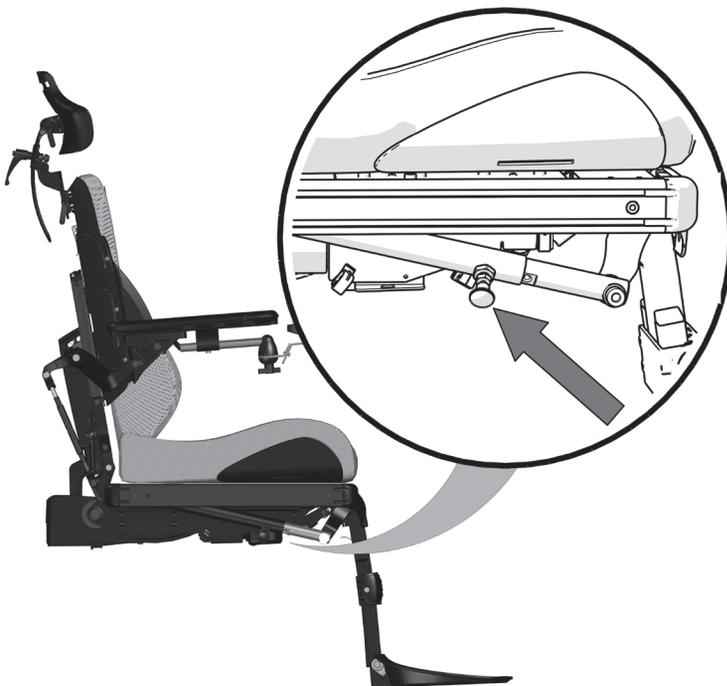

AVISO


Não colocar peso sobre o apoio das pernas durante o ajustamento do seu ângulo. Risco de esmagamento.

Construção e funcionamento

Funções manuais da cadeira - inclinação do encosto

Ajustar a inclinação do encosto com a barra de bloqueio com engate rápido, numa das várias posições fixas. A partir da posição vertical, o encosto pode ser inclinado até ao máx. 45° para trás.

1. Puxar para fora o botão de fixação com mola para soltar o movimento da barra e permitir a inclinação do encosto.
2. Ajustar o encosto no ângulo desejado e bloquear a barra soltando a pega para que fique fixa no furo previsto.
3. Depois do ajustamento, verificar se o encosto está bloqueado.

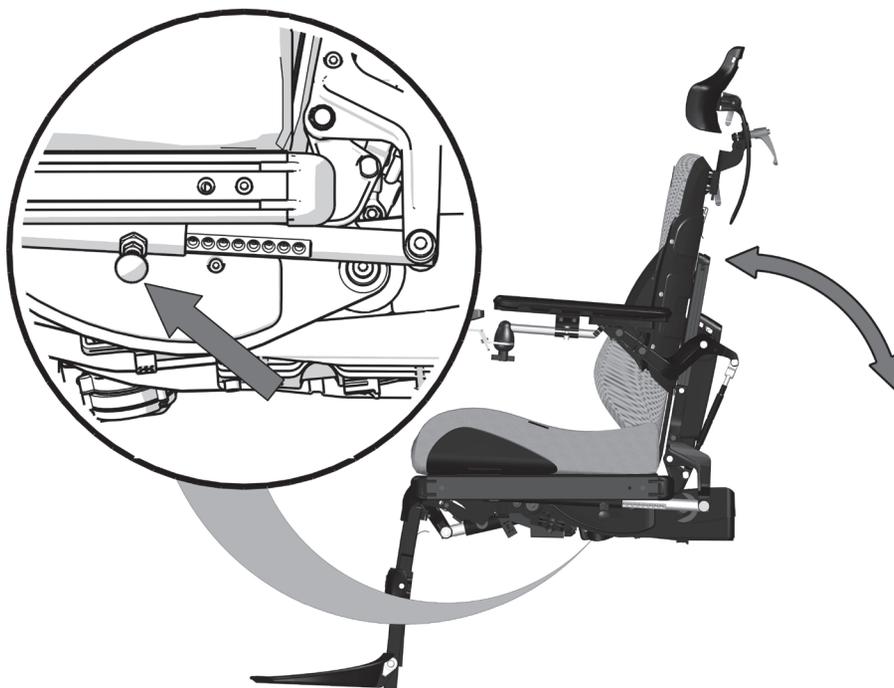


AVISO

Não colocar peso sobre o encosto durante o ajustamento da inclinação do encosto. Risco de esmagamento.

Definições

Cobertura apoio das pernas

Soltar os dois parafusos para desmontar a cobertura do apoio das pernas, e puxar para fora, ver figura. Para montar, encaixar a cobertura no sítio e de seguida fixar com os dois parafusos.

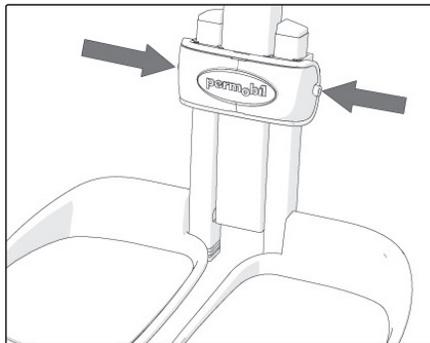


A cobertura do apoio das pernas é montada com dois parafusos.

Comprimento do apoio das pernas

Ajustar o comprimento do apoio das pernas e fixar com dois parafusos de retenção.

1. Desmontar a cobertura do apoio das pernas, ver a descrição acima.
2. Desapertar os dois parafusos de retenção interiores do apoio das pernas, ver figura.
3. Ajustar o apoio dos pés no comprimento desejado e fixar apertando os parafusos de retenção.
4. Depois de ajustar, controlar se o apoio das pernas está bem fixo.
5. Voltar a montar a cobertura de plástico, ver a descrição acima.

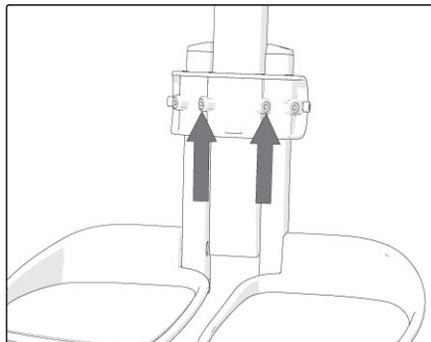

Fixar o comprimento do apoio das pernas com os parafusos de retenção interiores.



AVISO


Nunca colocar peso nos apoios dos pés durante o ajustamento.

Nunca colocar os apoios dos pés a uma altura em que a parte inferior do tubo quadrado do apoio das pernas fique por fora do lado de baixo dos apoios dos pés.

Altura do apoio dos pés

Ajustar individualmente a altura do apoio dos pés e fixar com os dois parafusos de retenção exteriores.

1. Desmontar a cobertura do apoio das pernas, ver a descrição na página anterior.
2. Desapertar os parafusos do retenção do apoio dos pés, ver a figura.
3. Ajustar o apoio dos pés na altura desejada e fixar apertando os parafusos de retenção.
4. Depois de ajustar, controlar se o apoio dos pés está bem fixo.
5. Voltar a montar a cobertura de plástico, ver a descrição na página anterior.

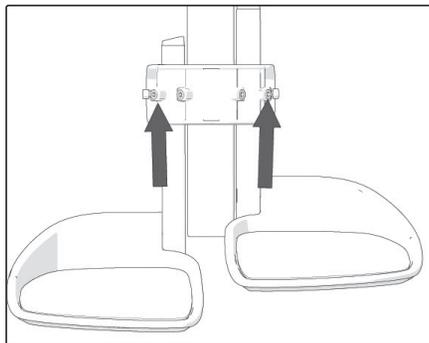

Fixar a altura do apoio dos pés com os parafusos de retenção exteriores.



AVISO

Nunca colocar peso nos apoios dos pés durante o ajustamento.

Nunca colocar os apoios dos pés a uma altura em que a parte inferior do tubo quadrado do apoio das pernas fique por fora do lado de baixo dos apoios dos pés.

Definições

Ângulo do apoio dos pés


Ajustar o ângulo do apoio dos pés com os parafusos de retenção localizados sob o respetivo apoio.

1. Levantar o(s) apoio(s).
2. Soltar a porca de retenção.
3. Ajustar para o ângulo desejado rodando o parafuso para dentro/para fora.
3. Fixar o parafuso de retenção na posição desejada com a porca de retenção.



AVISO

Nunca colocar peso nos apoios dos pés durante o ajustamento.

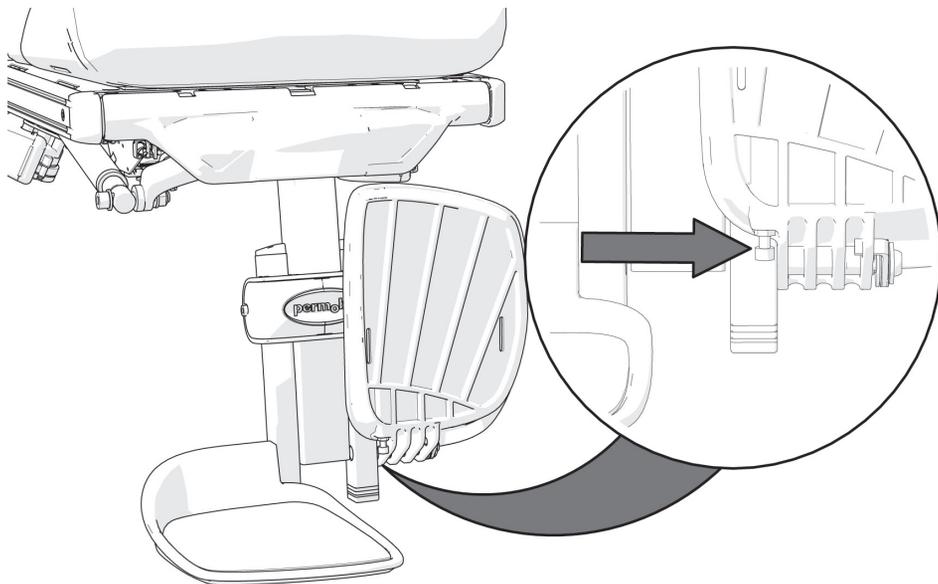

Ajustar o ângulo do apoio dos pés com um parafuso e fixar com uma porca de retenção.

Definições

Posição do apoio de braço


O apoio de braço pode ser movido para dentro ou para fora, para oferecer um maior conforto ao utilizador. Para alterar o ângulo, puxar a parte dianteira do apoio do braço para dentro ou para fora.

A posição final desta função pode ser definida em três posições fixas. Mover o parafuso no lado de baixo do apoio de braço para escolher a posição, ver a figura.



AVISO

Ter muito cuidado ao passar por portas ou outras passagens estreitas, caso o apoio do braço esteja definido entre 0° e $+15^\circ$. Há o risco de lesões ou danos materiais, incluindo danos à cadeira de rodas.

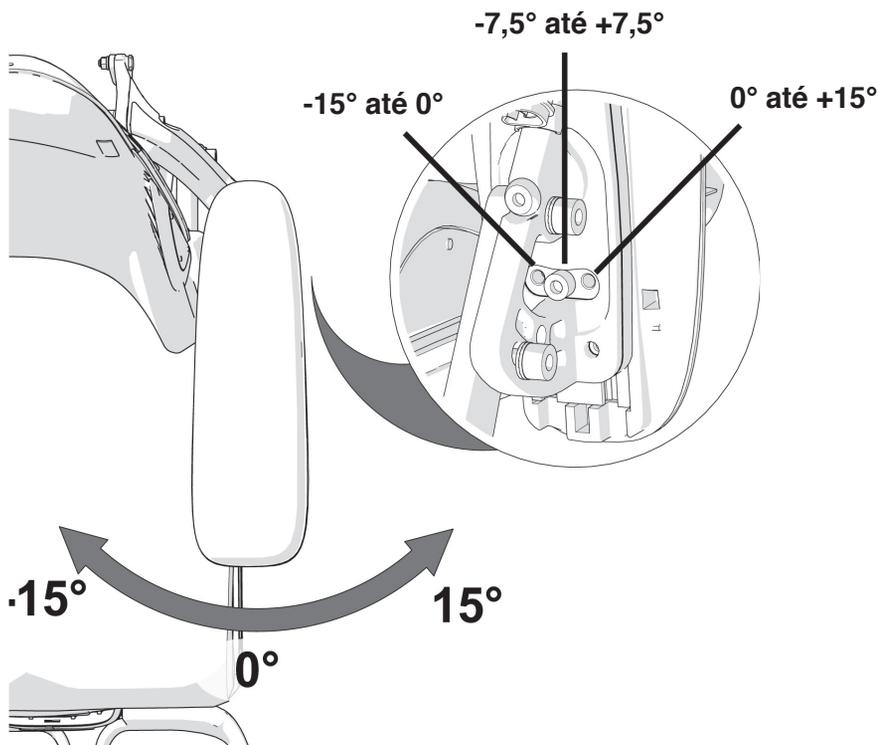


O apoio do braço pode ser movido para dentro ou para fora.

Definições

Altura do apoio dos braços

Para obter um maior conforto, pode ajustar a altura do apoio dos braços.

1. Soltar os quatro parafusos na parte de trás do encosto, que fixa a altura do apoio de braço; ver a figura abaixo.
2. Ajustar para a posição desejada com o parafuso de configuração na parte de trás do encosto, ver a figura abaixo. A escala do centro do encosto mostra a definição atual do apoio de braço.
3. Fixar a altura do apoio de braço, apertando os quatro parafusos na parte de trás do encosto, ver a figura.

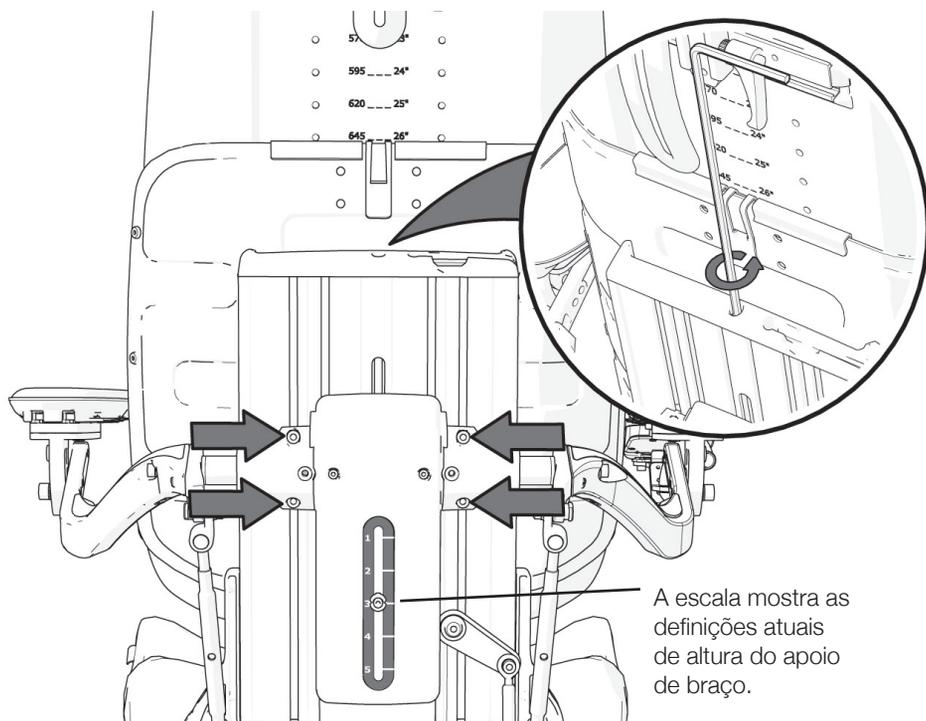


Ajustamento da altura do apoio de braço.

Definições

Ângulo do apoio de braço

É muito fácil ajustar o ângulo do apoio de braço para obter um maior conforto.

1. Ajustar o ângulo do apoio de braço, rodando as hastes de ajustamento, ver figura.

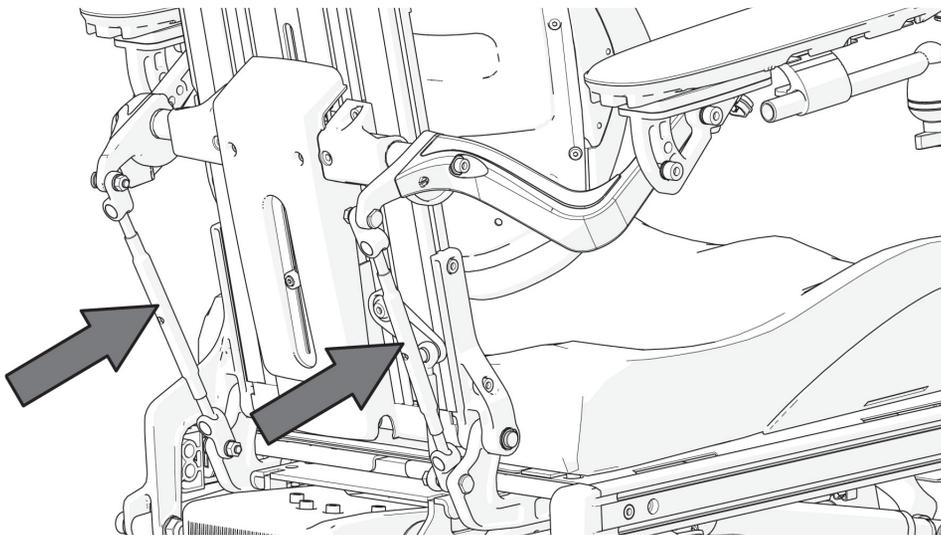

Ajustamento do ângulo do apoio de braço.



AVISO


Não colocar peso sobre os apoios dos braços durante o ajustamento. Risco de esmagamento.

Definições

Altura/ângulo do apoio de braço

Ajustar normalmente a altura e ângulo do apoio de braços, conforme o descrito nas páginas 30-31. No caso de necessidades especiais, o braço de apoio pode ser ajustado individualmente, destinado a utilizadores que necessitam de diferentes altura/ângulo no apoio da esquerda e da direita. Estes ajustamentos podem ser efetuados apenas para necessidades especiais. Esta definição pode ter efeitos negativos no movimento do apoio de braço, ao descer ou elevar o encosto.

1. Ajustar a altura do apoio de braço, rodando a haste de ajustamento (C), ver figura.
2. Fixar o ângulo do apoio de braço com um parafuso (B); mover o parafuso da posição fixa (A) para a posição flexível (B), ver a figura abaixo.
3. Ajustar o apoio de braço no ângulo desejado e fixar apertando o parafuso (B), ver a figura abaixo.

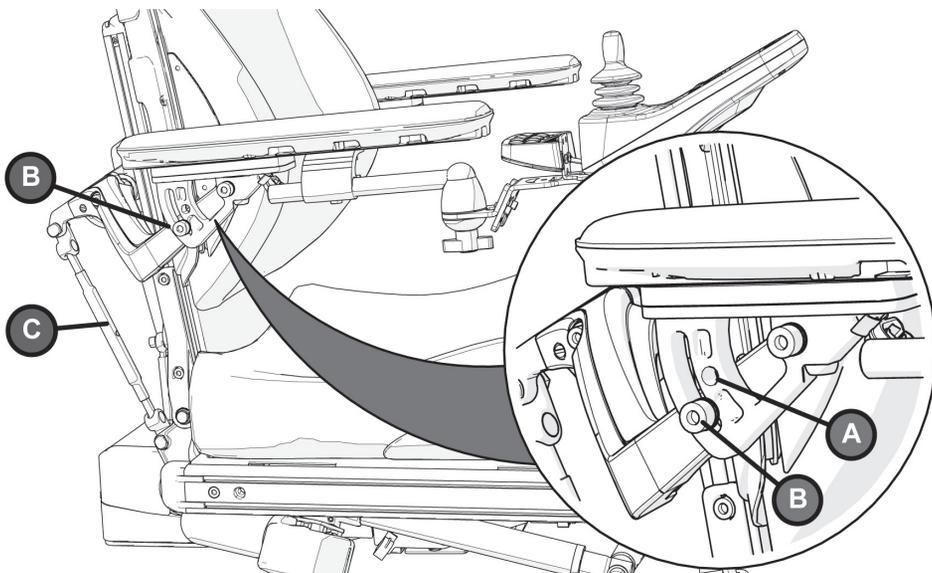

Ajustamento da altura e ângulo do apoio de braços.



AVISO

Não colocar peso sobre os apoios dos braços durante o ajustamento. Risco de esmagamento.


Estes ajustamentos podem ser efetuados apenas para necessidades especiais. Esta definição pode ter efeitos negativos no movimento do apoio de braço, ao descer ou elevar o encosto.

Definições

Apoio lombar

O apoio lombar é composto por 3 almofadas lombares, fixas com tiras de Velcro, que podem ser separadas dependendo do grau de apoio lombar desejado.

1. Remover a almofada do apoio lombar.
2. Ajustear o apoio lombar conforme necessário.
3. Voltar a colocar a almofada lombar.

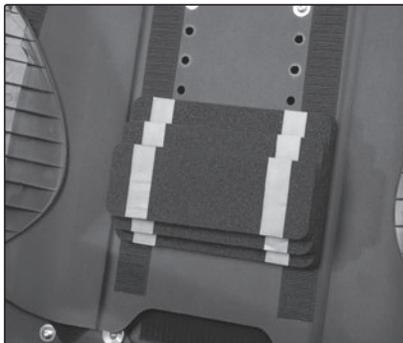

Apoio lombar.




Ajustamento da altura.


Definições

Apoio do tronco *Ajustamento da altura*

1. Remover a almofada do apoio lombar.
2. Soltar o parafuso que fixa o apoio do tronco, que está na parte de trás do encosto, ver a figura.
3. Ajustar o apoio do tronco na posição desejada.
4. Apertar o parafuso.
5. Voltar a colocar a almofada lombar.

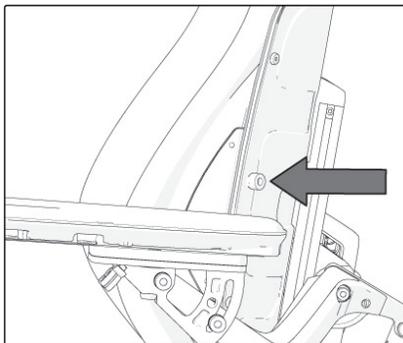

O apoio do tronco é montado com um parafuso.

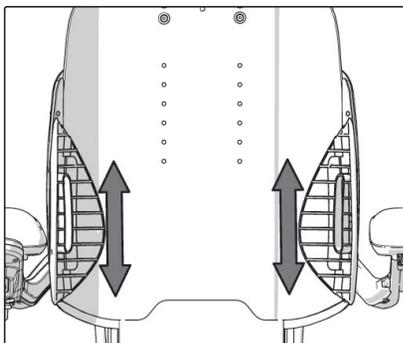

Ajustamento da altura.


Definições

Apoio da nuca (acessório)

Este apoio da nuca tem mais opções de ajustamento, para oferecer um maior conforto ao utilizador. O apoio da nuca também pode ser desmontado/montado mantendo as suas definições.

Desmontagem

1. Soltar o botão (3) na parte de trás do encosto, ver a figura.
2. Desmontar o apoio da nuca levantando-o para cima.

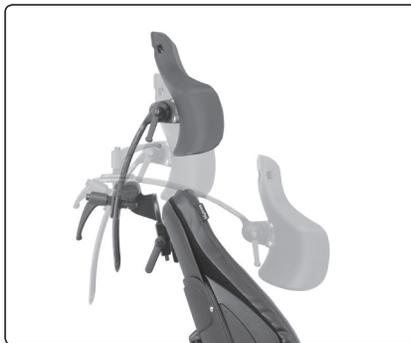


Montagem

Montar pela ordem inversa.

Ajustamento de altura/profundidade

1. Soltar o botão (1) na parte de trás do encosto, ver a figura.
2. Se necessário, ajustar a altura/profundidade do apoio da nuca.
3. Apertar o manípulo (1).

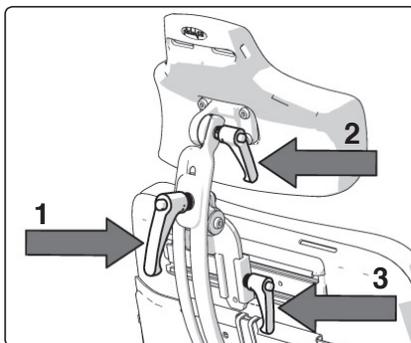

Ajustamento do apoio da nuca.

Ajustamento do ângulo

1. Soltar o manípulo (2) na parte de trás do apoio da nuca, ver a figura.
2. Ajustar o ângulo do apoio da nuca se necessário.
3. Apertar o manípulo (2).



AVISO

Não colocar peso sobre o apoio da nuca durante o ajustamento.

Definições

Painel de manobras, suporte rotativo do painel

Para obter a melhor posição de condução, a posição do painel de manobras pode ser ajustada ao comprimento. O painel também pode ser movido para fora para não obstruir a sentar-se ou sair da cadeira.

Ajustamento do comprimento

1. Soltar o parafuso no painel e ajustar na posição desejada.
2. Apertar o parafuso.

Ajustamento do ângulo com o tubo de fricção


Usar o manipulador no tubo de fricção para determinar o grau de bloqueio do painel, para afastar para o lado, mais lento ou mais solto.



Parafuso de ajustamento do comprimento.



Manipulo do tubo de fricção.

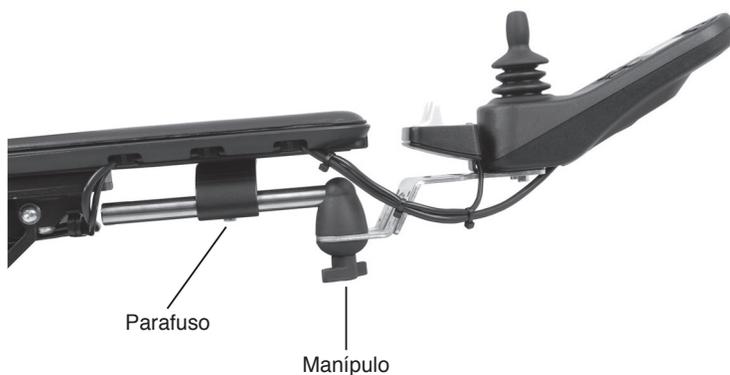

Painel de manobras *Suportes paralelos do painel*

Para obter a melhor posição de condução, a posição do painel de manobras pode ser ajustada ao comprimento. O painel também pode ser afastado para o lado ou inclinado para trás, para facilitar sentar e sair da cadeira.

Ajustamento do comprimento

1. Soltar o parafuso na parte inferior do braço e ajustar o painel na posição desejada.
2. Apertar o parafuso.

Ajustamento do tubo de fricção

Usar o manípulo no tubo de fricção para determinar o grau de bloqueio do painel, para afastar para o lado, mais lento ou mais solto.



O painel também pode ser afastado para o lado ou inclinado para trás, para facilitar a sentar e sair da cadeira.



Painel de manobras com suportes paralelos.

Cinto de segurança do assento (acessório)

Montagem do cinto do assento

De cada lado do chassis do assento, há uma calha para acessórios para montagem do cinto de segurança, por exemplo. O cinto de segurança é montado na ranhura superior da calha.

1. Aparafusar o cinto com o fecho no lado mais conveniente para o utilizador e o outro lado do cinto com a fivela no lado oposto.
2. Depois da montagem, verificar se a fivela do cinto fecha bem.



Cinto montado.



Cinto montado.



Fivela do cinto.



AVISO

O cinto de fixação da Permobil foi concebido para manter o utilizador no lugar, não como proteção contra colisões/acidentes. Controlar regularmente o estado geral do cinto para evitar danos ou desgaste.


Transporte

Desmontagem do encosto

Para facilitar o transporte da cadeira de rodas/estrutura, recomenda-se retirar o encosto com algumas operações simples.

1. Remover a almofada do encosto, que está fixa com Velcro na parte de trás.
2. Desmontar a parte superior do encosto soltando o bloqueio na parte de trás do encosto, ao mesmo tempo que puxa a parte superior para cima, ver a figura abaixo.

Se necessário, desmontar também o apoio da nuca, ver a pág. 37.

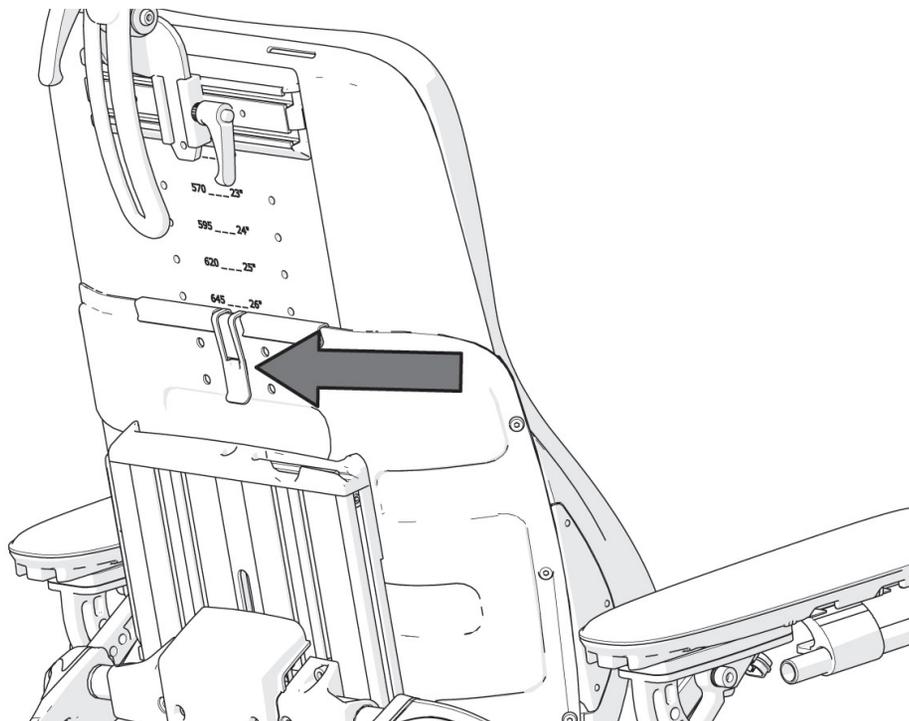

A parte de cima do encosto é fixa com um mecanismo de retenção.

Cuidados e manutenção

Normalmente, os cuidados e manutenção são uma prevenção contra desgaste e danos desnecessários ao assento. Oferecemos abaixo alguns conselhos gerais recomendados pela Permobil. Em caso de sujidade no estofado difícil de remover ou danos ao seu acabamento, contactar a Permobil para obter informações.

Estofado, tecido/vinil

Para a limpeza normal, limpar o revestimento do estofado com água morna e um sabão neutro, não abrasivo. Usar um pano ou escova macia. Remover o excesso de água ou sabão com um pano limpo e seco, antes de a superfície secar. Repetir para remover sujidade e manchas difíceis.

Se necessário, retirar a capa antes da limpeza. Consultar também as respetivas etiquetas do estofado.

Superfícies metálicas

Para limpeza normal, usar um pano/esponja húmidos, água morna e detergente neutro. Limpar bem com um pano e água e secar.

Remover marcas de superfícies de semi-polidas com cera macia (seguir as instruções do fabricante).

Remover marcas e riscos de superfícies polidas com cera de automóvel, líquida ou em pasta. Depois do polimento, aplicar cera macia para restaurar o brilho original.

Plástico

Para a limpeza normal, limpar as superfícies de plástico com um pano macio, detergente neutro e água morna. Passar bem por água e secar com um pano macio. Não utilizar diluentes ou detergentes abrasivos.

Controlo do cinto de fixação

Verificar regularmente o estado do cinto, para evitar danos ou pontos de desgaste.



AVISO

Nunca lavar a cadeira de rodas com uma mangueira de água, os componentes eletrónicos podem ficar danificados. Desligar sempre a cadeira de rodas antes da limpeza.

Acessórios

Os acessórios das cadeiras Permobil estão em permanente desenvolvimento. Contactar o representante Permobil mais próximo para obter mais informações sobre os acessórios que podem ser adicionados ao seu assento.

Dados

As dimensões e pesos abaixo referem-se ao Corpus 3G elétrico, na sua versão padrão (incl. painel de manobras).

Geral

Nome Corpus 3G

Dimensões e peso

Comprimento 860 mm.

Largura..... 780 mm.

Altura..... 1190 mm.

Peso..... aprox. 35 kg.
(incl. inclinação de assento, aprox. 45 kg)

Peso máx. do utilizador 136 kg

Movimento elétrico do apoio das pernas

Comp. mínimo do apoio dos pés até à placa do assento 300 mm.

Peso máx. de elevação 30 Kg

Ajustamento elétrico da altura do apoio das pernas

Comp. mínimo do apoio dos pés até à placa do assento 300 mm.

Comp. máximo do apoio dos pés até à placa do assento 520 mm.

Peso máx. de elevação 70 Kg

