

## Folheto de treino do Sistema Accu-Chek® Combo

Como mudar o cartucho da bomba de insulina Accu-Chek Spirit Combo\*



1 Retire a tampa de proteção do cartucho. (Não toque na ponta do cartucho).



2 Empurre o adaptador sobre a ponta do cartucho, até parar.



3 Prepare cuidadosamente um novo conjunto de infusão Accu-Chek, de acordo com as instruções de utilização fornecidas.




4 Segure no adaptador e rode manualmente o conector luer-lock do conjunto de infusão, para a direita, dentro do adaptador. Não aperte demais.




5 Se necessário, retire o cartucho usado. Desaperte cuidadosamente. Não puxe o cartucho para fora sem estar completamente desapertado.



6 Prima para ir para o ecrã MUDAR CARTUCHO. Prima para selecionar.

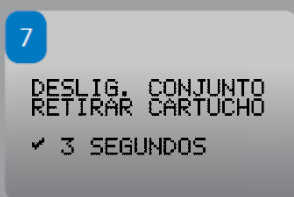

7 Confirme que o conjunto de infusão está desligado e o cartucho retirado. Prima durante 3 segundos, até ouvir um toque.

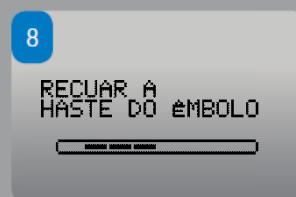

8 A haste do pistão começa a recolher. Não toque nem faça nada que interfira no recolhimento da haste do pistão, para evitar danos na bomba.



9 Quando a haste do êbolo estiver totalmente recolhida, o ecrã VOLUME CARTUCHO apresenta o volume máximo do cartucho (315U).



10 Mantenha a bomba de insulina na posição vertical. Segure o novo cartucho previamente cheio com o adaptador colocado e o conjunto de infusão voltado para cima, paralelamente, e perto do compartimento do cartucho.



11 Confirme que o bordo superior da parte roscada do adaptador está nivelado com a parte de cima do compartimento do cartucho.



12 Prima ou para fazer avançar a haste do pistão até a placa da base da haste do pistão estar nivelada com a parte inferior do êbolo do cartucho.



13 Posicione a bomba na diagonal (com o adaptador apontado para baixo). Introduza o cartucho no respetivo compartimento.



14 Rode (sem pressionar) o adaptador para a direita, até ficar assente no compartimento do cartucho.



15 O cartucho foi corretamente introduzido quando a placa da base da haste do pistão ficar assente no êmbolo do cartucho.




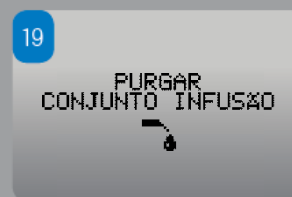
16 Se placa da base da haste do pistão não ficar bem alinhada com o êmbolo do cartucho, retire o cartucho do compartimento e repita os passos 10-14.



17 Verifique se o conector luer-lock do conjunto de infusão continua corretamente ligado ao adaptador. Aperte manualmente o conjunto de infusão, para a direita, até estar firmemente imobilizado no adaptador.



18 Prima  depois de introduzir corretamente o cartucho. A bomba de insulina executa um auto-teste.



19 Depois de concluído o auto-teste, aparece no visor o ecrã PURGAR CONJUNTO INFUSÃO. Purgar o conjunto de infusão significa encher o tubo com insulina empurrando eventuais bolhas de ar. Siga este procedimento conforme descrito no Manual de Utilização.



\* Estas instruções de utilização também são aplicáveis à bomba de insulina Accu-Chek Spirit. Tenha em atenção que alguns ecrãs das bombas podem apresentar um texto ligeiramente diferente do apresentado neste folheto.



## A utilização incorreta pode causar danos na sua bomba de insulina



NÃO insira o cartucho sem o conjunto de infusão conectado na bomba de insulina. Isto poderá levar à entrada de insulina no compartimento do cartucho. Se entrar insulina no compartimento do cartucho, poderá danificar a haste do pistão ao longo do tempo, causando uma potencial limitação ou o bloqueio das funções motoras da bomba de insulina.



NÃO mantenha a bomba de insulina na posição vertical, virada para cima, enquanto insere o cartucho. Isto poderá levar a que a insulina entre para o interior do compartimento de cartucho, causando o bloqueio da haste do pistão. Consequentemente, a bomba de insulina poderá exibir um erro E6 ou E10, ou parar.