



# **INSTRUÇÕES DE USO**

*ALTPRATIC*

# APRESENTAÇÃO

Seu equipamento foi projetado e aperfeiçoado dentro dos padrões da mais moderna tecnologia para o trabalho de profilaxia dentária.

A simplicidade de operação e manutenção, juntamente com importantes avanços tecnológicos incorporados faz deste equipamento indispensável aos profissionais da área de odontologia.

Dedicamo-nos intensamente para garantir sua segurança. Esperamos assim, obter o mais alto nível de satisfação de nossos clientes.

Este manual tem por finalidade familiarizá-lo com as características e funcionamento de seu equipamento e preveni-lo quanto aos cuidados que devem ser tomados para que sejam atingidos resultados satisfatórios, bem como obter um aumento da vida útil do equipamento.

Leia todas as instruções contidas nesta **Instrução de Uso** antes de instalar ou operar este produto.

Certifique-se de que todas as instruções estejam informadas no conteúdo deste manual.

Conhecer o produto é o primeiro passo para se obter dele o melhor desempenho de suas funções.

É importante conhecer alguns aspectos que podem comprometer a garantia em virtude de negligência, má utilização, reparos não autorizados, etc.

Os Termos de Garantia encontram-se no final deste manual.



**ALT Equipamentos Médico Odontológicos Ltda.**  
Rua Major Rubens Váz, 915 - Campos Elíseos - CEP. 14080-510 - Ribeirão Preto - SP  
Fone: (16) 3628-0057 alt.equipamentos@terra.com.br [www.altequipamentos.com](http://www.altequipamentos.com)

# ÍNDICE

Segurança.....	04
<b>1. Descrição do produto.....</b>	<b>05</b>
<b>2. Especificações técnicas.....</b>	<b>06</b>
2.1 condição transporte e armazenamento.....	06
<b>3. Especificaç técnicas.....</b>	<b>07</b>
3.1 simbologia no produto.....	07
<b>4. Instalação.....</b>	<b>08</b>
3.1 Instalação física.....	08
3.2 Instalação elétrica.....	08
3.3 Instalação hidráulica.....	08
<b>5. Normas de garantia.....</b>	<b>10</b>
5.1 Garantia.....	10
5.2 Manutenção.....	10
5.3 Serviço de atendimento.....	10
5.4 Considerações finais.....	10

# **SEGURANÇA**

## **INDICAÇÕES**

- Clínicas ,consultórios odontológicos,médicos,veterinários e de estética que necessitam executar procedimentos higienização das mãos.

## **CONTRA-INDICAÇÕES**

- Verificar voltagem antes de ligar.

## **ADVERTÊNCIAS**

- O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nestas Instruções de Uso é de inteira responsabilidade do usuário.

## **1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Equipamento para higienização das mãos. Possui uma válvula pneumática que foi desenvolvida para torneiras com acoplamento flexíveis.

### **APLICAÇÕES**

- *Higienização das mãos*

## **2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

## 2.1 CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O equipamento deve ser transportado e armazenado com as seguintes observações:

- Com cuidado para não sofrer quedas e nem receber impactos.

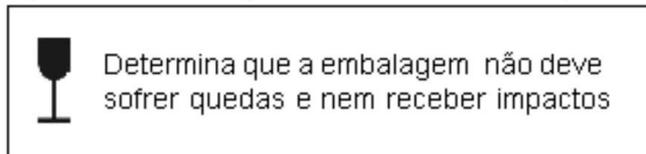


Fig. 05

- Com o lado da seta para cima.

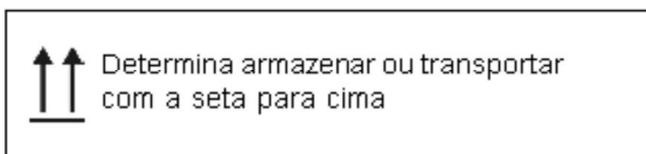


Fig. 06

- Com empilhamento máximo de 5 unidades.

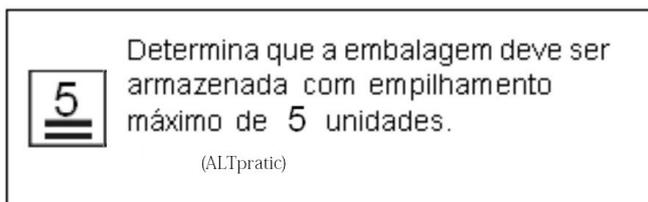


Fig. 07

- Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d'água ou piso umedecido.

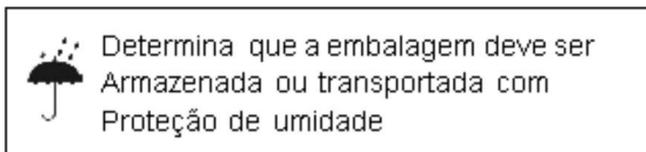


Fig. 08

### 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### 3.1 SIMBOLOGIA NO PRODUTO



Etiqueta de identificação de Voltagem 127 volts



Etiqueta de identificação de voltagem 220 volts



Etiqueta de Identificação do Produto



Atenção



Cuidado Risco de Choque



Por favor não jogue o equipamentos no lixo doméstico.  
Por favor use a coleta disponível em seu país para a  
dispor deste produto.



Grau de proteção do Pedal

## **4 INSTALAÇÃO**

### **4.1 INSTALAÇÃO FÍSICA**


- Tirar da embalagem e instalar o aparelho, respeitando as seguintes advertências.
- Verifique se o equipamento não sofreu danos durante o transporte.
- Abra a embalagem e retire a proteção que envolve o aparelho.
- Verifique se cada componente foi enviado corretamente.
- Para usufruir a garantia não remova nem danifique a etiqueta de identificação (15-fig.01).
- Posicionar o aparelho em lugar plano, nivelado e firme.
- Não coloque outros aparelhos ou qualquer outro objeto sobre o equipamento.
- Instalar o aparelho em ambiente apropriado, protegido de raios solares e umidade

### **4.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

- Deverá ser providenciada uma tomada elétrica de três pinos.
  - O aterramento é indispensável para a segurança do usuário e do paciente. Qualquer problema advindo do não aterramento do aparelho será de responsabilidade do usuário, implicando na perda da garantia.
  - O equipamento sai da fábrica com a voltagem em 127V, portanto certifique-se de que sua rede é compatível antes de ligar.
- OBS: caso seja instalado dentro de um gabinete para a remoção do pedal, desconectar os dois terminais de fio azul e cortar as abraçadeiras e após a instalação colocar novamente os terminais nos contatos da válvula pneumática.

### 4.3 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- Enrosque a válvula no cano de água.
- Use a mangueira flexível para enroscar na torneira.(Fig 1.0)

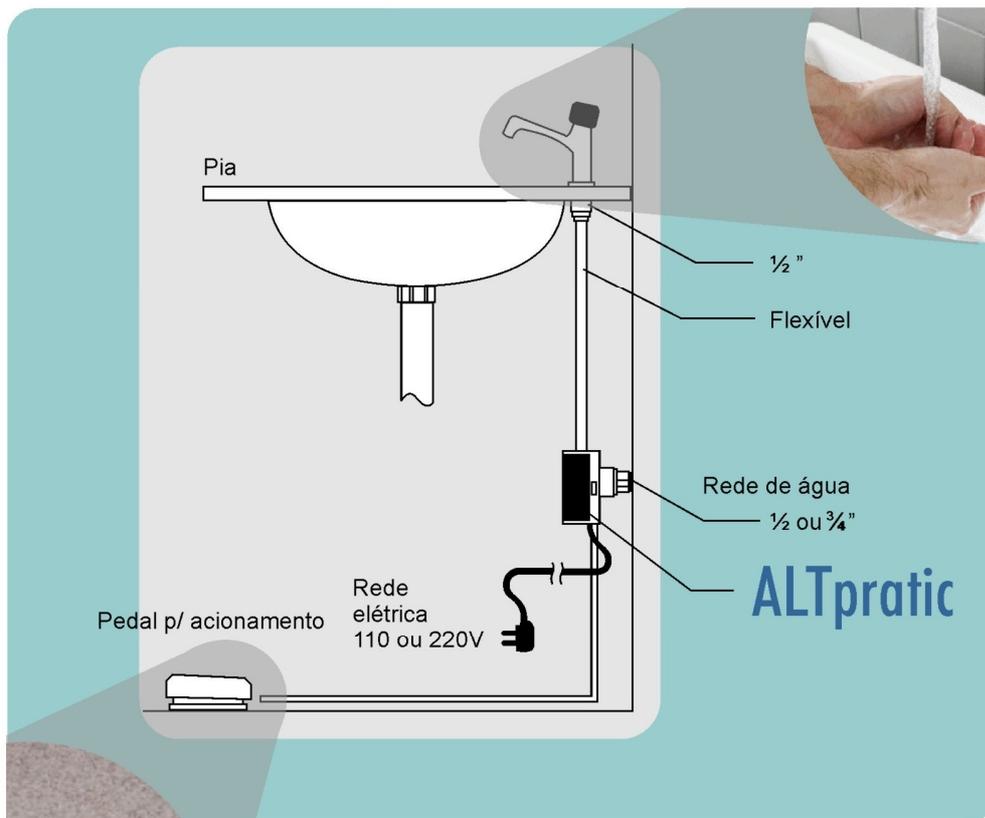

**ATENÇÃO**  
ESCOLHER A VOLTAGEM  
CERTA: 110v ou 220 v

fig 1.0

## **5. NORMAS DE GARANTIA**

### **5.1 GARANTIA**

Os “Termos de Garantia” são os constantes do Certificado que acompanha o produto. Ficam vetadas quaisquer alterações ou concessões de garantia, condições e ou autorizações, tanto verbais como por escrito, sem anuência prévia e documentada pela fábrica. Você obterá atendimento de garantia, quando devidamente comprovado. O prazo de Garantia do produto está descrito no Certificado de Garantia do Produto.

### **5.2 CERTIFICADO DE GARANTIA**

A ALT, garante por um ano o produto contra qualquer defeito de fabricação a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

As despesas de instalação do equipamento, locomoção e/ou estadia do técnico, serão de responsabilidade do comprador/proprietário, bem como as despesas de frete para o envio de equipamento(s) para conserto na fábrica ou para assistência Técnica Autorizada no caso de envio de peças. A ALT, não se responsabiliza por danos causados por uso diferente do pretendido. A garantia não cobre danos provocados pelo uso indevido do equipamento, negligência, falta da realização de qualquer item que conste no tópico 'manutenção'(item 5), acidentes, instalações inadequada e/ou reparos efetuados por pessoas que não fazem parte da rede de assistência Técnica autorizada ALT.

### **5.3 MANUTENÇÃO**

Toda as recomendações de utilização se encontram neste Manual, mas se algum problema ou mau funcionamento for detectado e não puder ser corrigido de acordo com as instruções aqui determinadas, entre em contato com a rede de serviços autorizada “**ALT**” para realizar a correção do problema.

### **5.4 SERVIÇO DE ATENDIMENTO**

Fone / Fax: ( 16 ) 3628 00 57

e-mail: [suporte@altequipamentos.com.br](mailto:suporte@altequipamentos.com.br)

Home page: [www.altequipamentos.com](http://www.altequipamentos.com)

**ALT Equipamentos Médicos Odontológicos Ltda.**

Rua Major Rubens Váz, n°915 – Campos Elíseos

CEP. 14080 - 510 / Ribeirão Preto – SP.

### **5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Dentre os cuidados que você deve tomar com o seu equipamento, o mais importante é o que diz respeito à reposição de peças. Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais “**ALT**”. Chamamos também a sua atenção para a nossa Rede de Distribuidores Autorizados. Só ela manterá seu equipamento constantemente novo, pois tem assistente técnico treinados e ferramentas específicas para a correta manutenção do seu aparelho.

**Não perca sua garantia, para validar ela entre no site [WWW.altequipamentos.com.br](http://WWW.altequipamentos.com.br) e cadastre-se assim você está garantindo que seu equipamento tenha um ano de garantia.**

