



---

EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA  
BAUMER  
**ULTRASSOM**

---

M A N U A L   D E   M A N U T E N Ç Ã O

---

Código

---

Modelo

Fabricado em

---

Núm. Série

Baumer - Compromisso com a saúde  
Responsável Técnico: Eng. Sérgio Yukio Koseki  
CREA-SP: 0601577094 - Cart: 157709/D  
Início da Responsabilidade Técnica: 31/01/1994  
Fabricado e Distribuído por Baumer S.A.  
Divisão STIC - Esterilização e Controle de Infecção  
Av. Prof. Antonio Tavares Leite, 181 • Parque da Empresa  
Caixa Postal 1081 • 13803-330 • Mogi Mirim • SP • Indústria Brasileira  
E-mail: [baumer@baumer.com.br](mailto:baumer@baumer.com.br)

# Parabéns!

Você adquiriu um produto Baumer e estamos empenhados em corresponder a sua confiança.

Para garantir a melhor performance de seu produto leia atentamente e siga as instruções contidas neste Manual.

Ressaltamos que as fotos, figuras e desenhos são ilustrativos, estando sujeitos a variações sem notificação prévia.

A Baumer S.A. considera-se responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho de seu produto desde que:

- A instalação a ponto, as modificações e os reparos sejam executados somente por um agente autorizado da Baumer S.A.;
- Os pontos de suprimentos estejam de acordo com o Manual de Instalação;
- O produto seja utilizado de acordo com os Manuais de Usuário, de Instalação e de Manutenção.

A Baumer S.A. não se responsabiliza por danos causados durante o transporte de seu produto. É de responsabilidade do Comprador a sua conferência no ato da entrega, acionando imediatamente a transportadora em caso de danos.

Caso decida utilizar pessoal especializado para desembalar o produto, podemos prestar o serviço através de nossa rede de agentes, filiais, ou da Divisão de G.P.V. - Gestão Pós-Venda. Consulte-nos sobre preços e condições.

Também oferecemos opções de Contrato de Manutenção Preventiva (CMP) e suporte técnico especializado, o que proporciona o prolongamento da vida útil de seu produto, maior tranquilidade e a certeza de um perfeito funcionamento a baixo custo.

Colocamo-nos à sua disposição para mais esclarecimentos e esperamos que você possa usufruir de seu produto por muitos anos.

De acordo com a política de contínuo desenvolvimento, a Baumer S.A. reserva-se ao direito de efetuar, sem notificação prévia, modificações no produto mencionado neste documento.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação de informações, nem transmitida sob nenhuma forma ou por nenhum meio, seja eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou de qualquer outro modo, sem a autorização prévia da Baumer S.A.

## Sumário

<b>1. Introdução</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Termo de Garantia Limitada Baumer</b> .....	<b>4</b>
I. Apresentação: .....	4
II. Prazo da Garantia: .....	4
III. Condições da Garantia Limitada: .....	4
IV. Responsabilidades do Comprador: .....	4
V. Exclusões: .....	5
VI. Limitações de Responsabilidade do Fabricante: .....	5
VII. Garantias Adicionais: .....	5
<b>3. Manutenção</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Peças e Reposições</b> .....	<b>7</b>
<b>5. Problemas e Soluções</b> .....	<b>7</b>
<b>6. Esquema Elétrico</b> .....	<b>8</b>
<b>7. Esquema Hidráulico</b> .....	<b>8</b>
<b>8. Vista Explodida</b> .....	<b>8</b>
<b>9. Descarte do Produto</b> .....	<b>9</b>
<b>10. G.P.V. - Gestão Pós-Venda</b> .....	<b>9</b>

# 1. Introdução

O Ultrassom é um equipamento utilizado para uma limpeza profunda e completa de pequenos objetos (instrumentos) utilizados em hospitais, postos odontológicos etc.

O processo de limpeza ocorre na ação de ondas de elevada frequência, geralmente de 20 a 40 KHZ. A ação destas ondas no líquido produzem a formação e o colapso de milhares de minúsculas bolhas. Os impactos destas bolhas fazem com que a erosão das superfícies e reentrâncias dos objetos imersos fiquem completamente limpos.

## 2. Termo de Garantia Limitada Baumer

### I. Apresentação:

Este termo estabelece as condições de garantia limitada do Produto BAUMER ao Comprador original.

O Comprador deve cumprir os requisitos de instalação, operação e manutenção, conforme constam dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção, recebidos no ato da compra e com a entrega do Produto.

### II. Prazo da Garantia:

A garantia inicia-se a partir da emissão da Nota Fiscal de venda e tem os seguintes prazos de duração:

- 13 (treze) meses contra defeito de fabricação para partes gerais, não indicadas em garantia específica;
- 6 (seis) meses para material elétrico / eletrônico (fiação, micros, pressostato, filtros, alarmes, campainhas, válvulas, comandos, conexões, resistências, reparo de válvulas, transdutores de pressão);
- 90 (noventa) dias para componentes de aquecimento (lâmpadas, material de desgaste normal pelo uso do Produto, como guarnições, mangueiras, borrachas, plugs de plástico); e,
- 5 (cinco) anos para vasos de pressão (câmara interna e externa e caldeira de geração de vapor), exceto para as lâmpadas e mesas cirúrgicas;
- 6 (seis) meses para vedações hidráulicas;
- 3 (três) meses para as membranas, desde que a análise de água de alimentação tenha sido aprovada pela Baumer S.A..

### III. Condições da Garantia Limitada:

- A Baumer S.A. garante que seus Produtos são livres de defeitos nos materiais e na fabricação pelo período supra mencionado, o qual se inicia na data de emissão da Nota Fiscal;
- Caso um Produto, durante o período de garantia aplicável, apresente defeito coberto pela garantia e por fato comprovadamente imputável à Baumer S.A. será reparado a seu exclusivo critério, respeitada a legislação vigente;
- A Baumer S.A. não garante que a operação de qualquer Produto seja ininterrupta ou livre de erros; e,
- O local de instalação do Produto deve estar de acordo com os requisitos descritos no Manual de Instalação, recebido pelo Comprador no ato da compra.

### IV. Responsabilidades do Comprador:

Para a validade da garantia o Comprador se obriga a:

- instalar os pontos de energia elétrica, vapor, ar comprimido e água, bem como manter o ambiente físico arejado e adequado, de acordo com o que consta dos Manuais de Instalação, Operação e Manutenção do Fabricante;
- comprovar as manutenções preventivas, indicadas no Manual de Manutenção, por meio de registros;
- utilizar peças e/ou componentes originais para o Equipamento, ou seja, somente aqueles fornecidos pela Baumer S.A.;
- não permitir intervenções por agentes técnicos não autorizados para reparos, aplicações e instalações de componentes adicionais;
- devolver formalmente ao departamento técnico da Baumer S.A. (fábrica Mogi Mirim), através de seu agente autorizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, os componentes e/ou peças substituídos em garantia.

**V. Exclusões:**

Os seguintes itens, entre outros compatíveis com o ora exposto, não estão cobertos pela garantia:

- Componentes externos ao Produto;
- Materiais de limpeza, conservação e desgaste normal pelo uso;
- Papéis e vidros;
- Mão de obra de manutenção preventiva;
- Ensaios de qualificação e de validação de processos;
- Aferição e calibração periódicas dos instrumentos de medição e controle;
- Atualização de software do controlador (quando for o caso), exceto nos casos em que as falhas comprovadas do programa prejudiquem as condições de operação e segurança;
- Despesas de viagem e estadias do técnico, fretes, embalagens e seguro;
- Custos com terceirização de processos em função de manutenções corretivas e preventivas;
- Danos causados por falhas nos suprimentos de água, energia elétrica (interrupção, sub ou sobre tensão, transientes) ou de deficiência no aterramento;
- Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência, imprudência ou imperícia;
- Danos causados por armazenamento ou uso em condições fora das especificações contidas nos Manuais;
- Danos causados por equipamentos que produzam ou induzam interferências eletromagnéticas ou ainda por problemas de instalação elétrica em desacordo com os Manuais de Instalação, Operação e Manutenção;
- Danos causados por acessórios e Produtos de terceiros adicionados a um Produto comercializado pela Baumer S.A.;
- Danos causados por violação do Produto, tentativa de reparo ou ajuste por terceiros não autorizados pela Baumer S.A.;
- Danos causados por agentes da natureza, como descargas elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremotos, etc;
- Perdas e danos causados pelo Produto ou por desempenho do Produto, inclusive, mas não limitado, a lucros cessantes, perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta garantia;
- Danos causados ao Produto instalado após o vencimento dos prazos de garantia acima descritos;
- Danos causados ao Produto decorrentes do transporte.

**VI. Limitações de Responsabilidade do Fabricante:**

- As obrigações assumidas pela Baumer S.A. em consequência deste Termo de Garantia limitam-se às expressamente aqui incluídas;
- As soluções fornecidas neste Termo de Garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente;
- Sob hipótese alguma a Baumer S.A. será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequências, seja baseado em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra teoria legal;
- Em nenhuma circunstância, a responsabilidade da Baumer S.A. por danos materiais excede o limite máximo do preço do Produto que tenha causado tal dano.

**VII. Garantias Adicionais:**

As garantias estendidas e/ou especiais serão objeto de negociação, à parte, entre a Baumer S.A. e o Comprador. Após a contratação, serão registradas em contrato de fornecimento específico para tal finalidade.

## 3. Manutenção

O procedimento de manutenção de qualquer equipamento é de vital importância para garantir a qualidade do processo e a longevidade do produto, e deve ser considerado pela instituição como um fator econômico, assim como a aquisição e uso do equipamento.

**Conceito de manutenção:**

São todas as ações necessárias para manter um equipamento ou sistema em operação ou para restituí-lo ao funcionamento. A manutenção inclui conservação, reparo, modificação, revisão, inspeção e determinação da eficiência do trabalho.

Nos produtos da Baumer S.A., pelo menos duas modalidades de manutenção devem ser previstas: a manutenção corretiva e preventiva.

**Manutenção corretiva:**

É a execução de tarefas de manutenção não planejadas para restaurar a capacidade de funcionamento de um equipamento ou sistema danificado ou que funciona mal. Economicamente, a manutenção corretiva pode equivaler à perda de recurso não planejado, dada a sua natureza aleatória.

Um bom programa de manutenção preventiva deve contemplar todas as atividades necessárias para manter o equipamento em plena operação pelo intervalo de tempo programado entre as intervenções.

**Manutenção Preventiva:**

Consistirá não só na limpeza e inspeção, mas também na troca programada de peças que tenham seu tempo de vida útil estimado, evitando-se a sua quebra durante o uso. A troca programada de componentes sujeitos a desgaste mantém o equipamento em operação dentro dos parâmetros adequados de qualidade e performance.

A Rede de Representantes da Baumer S.A. está apta no sentido de oferecer programas exclusivos de manutenção preventiva aos nossos clientes em condições especiais, mesmo durante o período de garantia do produto.



**Atenção:** Os procedimentos de manutenção preventiva não estão contemplados na garantia e, inclusive a não observância destes poderá anular a garantia do produto.

**Nota:** Conforme regulamentações da ANVISA (ou consulte regulamentação específica para o país de destino) o teste biológico deve ser executado ao término de todas as manutenções preventivas e corretivas.

**Imprescindível:** Durante os procedimentos de manutenção, testes de esforço e/ou exames de funcionamento por técnicos credenciados, a área ao redor do equipamento deve estar isolada, sem a presença de usuários. Somente o técnico responsável deve estar na área limitada. A demonstração dos trabalhos executados e a liberação do isolamento se darão, após a conclusão dos procedimentos.

**Diariamente**

- Ao final do dia esvaziar a água que por ventura esteja nas cubas.
- Limpar os ralos das cubas eliminando fiapos.
- Executar a limpeza das partes externas do equipamento com pano limpo e umedecido caso seja necessária à remoção de sujidade, utilize uma pequena quantidade de sabão ou detergente neutro.
- É aconselhável efetuar a limpeza do tanque após o uso do equipamento, pois as impurezas que se desprendem dos instrumentos se acumulam no tanque. Com o passar do tempo pode afetar a eficiência do produto.
- Para efetuar a limpeza, é necessária apenas água, e as impurezas mais resistentes podem ser limpas com esponja, detergente ou saponáceo. Não deixar que a água escorra exageradamente pelas paredes externas do tanque para não molhar a base.

**Semanalmente:**

Caso se processe instrumentos contaminados, a desinfecção das superfícies será necessária. A desinfecção será feita da seguinte forma:

- Com uso de luvas, retirar o excesso da carga contaminante em papel absorvente ou panos velhos;
- Desprezar o papel ou panos em saco plástico de lixo ou encaminhar para a lavanderia;
- Aplicar, sobre a área atingida, desinfetante adequado e deixar o tempo necessário;
- Remover o desinfetante com pano molhado e proceder à limpeza com água e sabão no restante da superfície.
- Examinar o elemento do filtro de água e limpar se necessário.

**Mensalmente:**

- Nos dois primeiros meses reapertar os contatos elétricos.
- Examinar toda a tubulação de água observando a presença de eventuais vazamentos.
- Quando o suprimento de água tiver alto teor de calcário (água dura), e esta não for tratada, deve-se lavar a bomba mensalmente.
- Reapertar todas as conexões elétricas do painel de controle e conexões das válvulas.

**Semestralmente:**

- Substituir o elemento do filtro de água através das verificações semanais pode ser detectada a necessidade desta substituição a intervalos de tempo menores.
- Fazer a limpeza do eletrodo de nível.
- Fazer a limpeza dos assentos das válvulas solenóides.

## 4. Peças e Reposições

ITEM	COMPONENTE DE REPOSIÇÃO	CÓDIGO DA BAUMER S.A.	QUANT.	ESQUEMA ELÉTRICO
1	Válvula solenóide ½ "".	46979	2	S1, S2
2	Válvula solenóide ¼ "".	44924	1	S3
4	Bomba d'água	88701	1	
5	Pistola de limpeza	82179	1	
6	Mangueira de entrada d'água	43927	1	
7	Fusível de vidro	81085	2	F1
8	Contator LC1D-099	47916	1	C1
9	Temporizador LA3-D2A	47933	1	BA1
10	Relé tipo soquete 8 pinos VCC	95357	1	
11	Base para relé	92214	1	
12	Transformador 6W - 110 X 220	43940	1	
13	Capacitor eletrolítico - 350 V - 10NF	44294	1	
14	Ponte retificadora - C 1000	94095	1	
15	TIMER- 60 COEL	96002	2	TR1, TR2
16	Botão de comando	46436	1	B1
17	Condensador do gerador	46438	1	CG1
18	Controle eletrônico de nível	85758	1	CN1
19	Chave seletora	81057	2	CH1, CH2

## 5. Problemas e Soluções

O produto não funciona:

- Examinar força de alimentação. Trocar fusível ou circuito queimado.
- Verificar as ligações do comando e do motor.
- Contatar assistência técnica.

Não entra água na cuba de lavagem:

- Examinar energia de alimentação. Trocar fusível ou circuito queimado.
- Verificar se à alimentação de água. Abrir válvula no cavalete d'água.

- Verificar válvula solenóide de entrada d'água. Bobina elétrica ou entupimento
- Verificar eletrodo de nível. Curto no contato elétrico.
- Contatar a Gestão de Pós-Venda.

Não drena a água na cuba de lavagem:

- Verificar bomba d'água. Alimentação elétrica ou travamento do rotor.
- Verificar sujeira no ralo da cuba.
- Temporizador com tempo inadequado.
- Contatar a Gestão de Pós-Venda.

Não entra água na cuba de enxágüe:

- Examinar energia de alimentação. Trocar fusível ou circuito queimado.
- Verificar se à alimentação de água. Abrir válvula no cavalete d'água.
- Verificar válvula solenóide de entrada d'água. Bobina elétrica ou entupimento.
- Contatar a Gestão de Pós-Venda.

Não entra fase de Ultrassom:

- Verificar eletrodo de nível. Curto no contato elétrico.
- Examinar energia de alimentação. Trocar fusível ou circuito queimado.
- Contatar a Gestão de Pós-Venda.


## 6. Esquema Elétrico

Anexo ao final deste manual (ee-151-3).

## 7. Esquema Hidráulico

Anexos no final do manual (H7-E153).

## 8. Vista Explodida

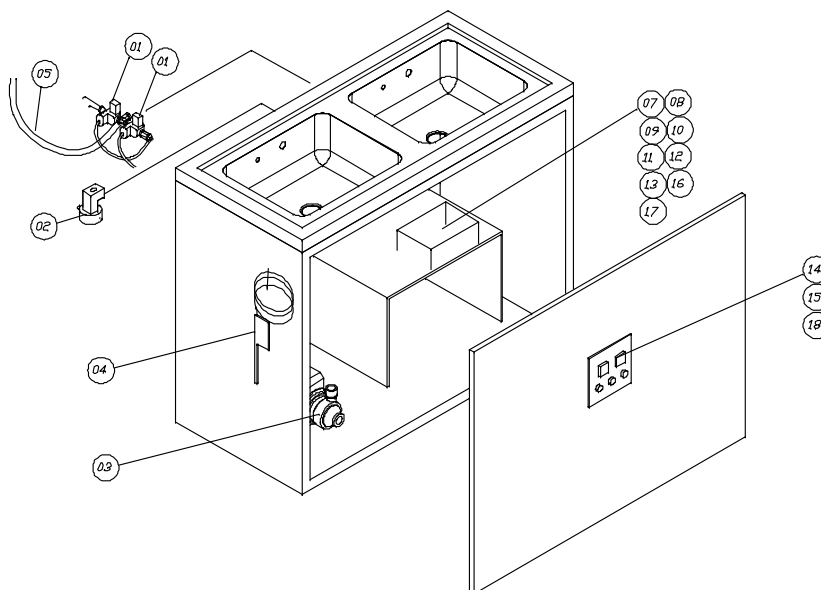



## 9. Descarte do Produto

A Baumer S.A. recomenda que a Termodesinfectora seja devolvida à sua unidade fabril, sem custo, em Mogi Mirim/SP Brasil, na Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181 – CEP: 13803-330 – A/C Gestão Pós-Venda, com a instrução de “Descarte do Produto”. Caso o comprador do produto decida pelo descarte em seu país e/ou cidade, este descarte deve seguir as normas de descarte do local e/ou país destino, bem como enviar um e-mail, carta e/ou fax para a empresa Baumer S.A. que a mesma foi descartada conforme legislação.

## 10. G.P.V. - Gestão Pós-Venda

### **Baumer S.A.**

Av. Prefeito Antonio Tavares Leite, 181 • Parque da Empresa

CEP: 13803-330 • Mogi Mirim • SP

Caixa Postal: 1081

Fone/Fax: 19 3805-7699

E-mail: [gpv@baumer.com.br](mailto:gpv@baumer.com.br) • [baumer@baumer.com.br](mailto:baumer@baumer.com.br)

EQUIPAMENTO: ULTRA-SOM E151-3



DATA:

DESENHO ELÉTRICO

NÚMERO DE PÁGINAS: 02

CÓDIGO:

DES: RIBEIRO

Substitui:

Sub:

FOLHA:

ee151-3

CONF: CANATTO


SUB  
LETRA

CAPA

APROV: KOSEKI

SUB-A:  
SUB-B:  
SUB-C:

SUB-D:  
SUB-E:  
SUB-F:

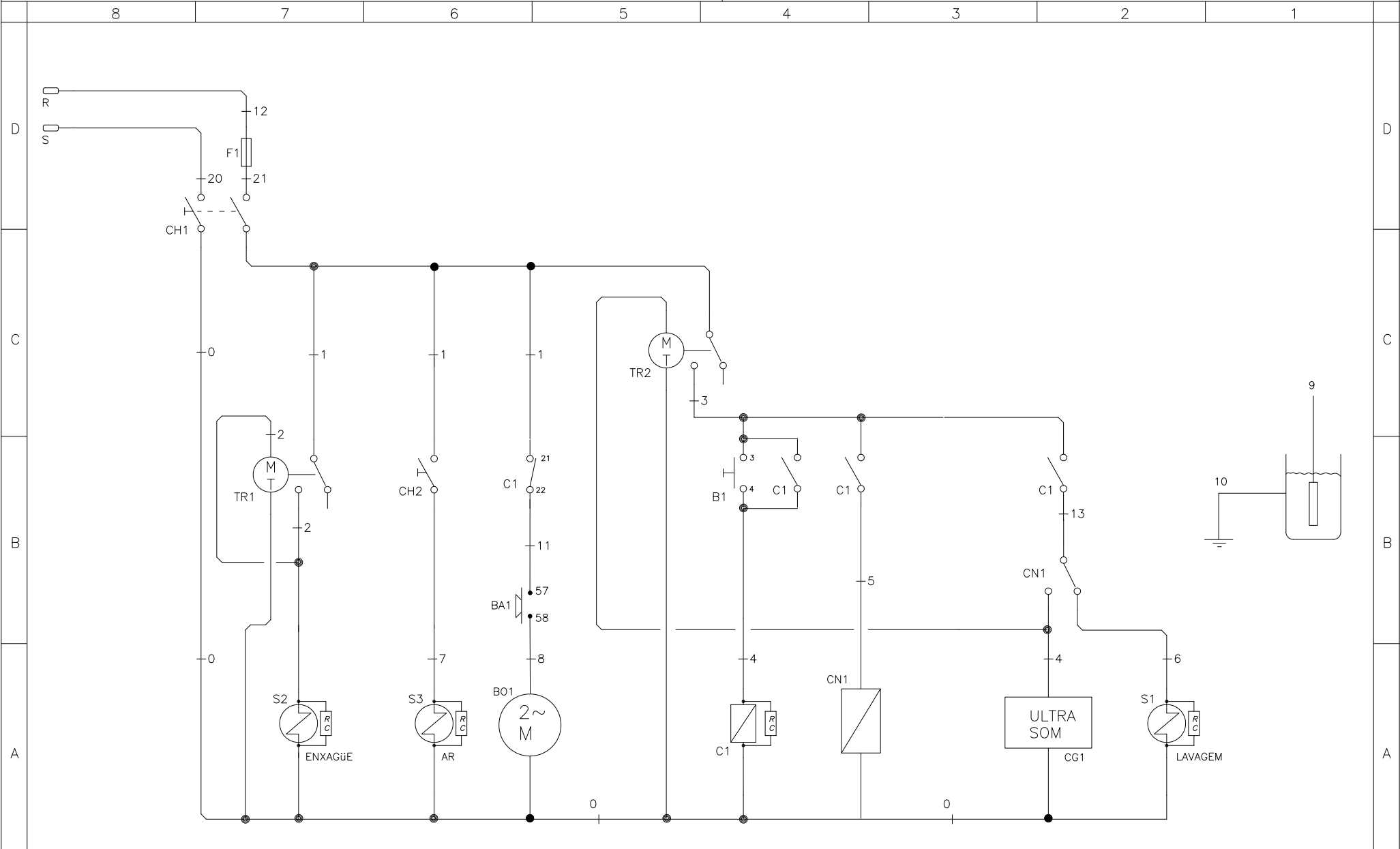

DENOMINAÇÃO: Esquema elétrico Ultra-som

CÓDIGO:

DES: RIBEIRO  
CONF: CANATTO  
APROV: KOSEKI

Substitui: Sub:  
SUB  
LETRA

FOLHA:


1/2


ee151-3

SUB-A:  
SUB-B:  
SUB-C:

SUB-D:  
SUB-E:  
SUB-F:

8			7			6			5			4			3			2			1			
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		CÓDIGO			REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		CÓDIGO			REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		CÓDIGO			REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		CÓDIGO			
D	F1	Fusível de vidro 7A		81085																				
	B1	Botão de impulso 1 contato NA		81060																				
	CN1	Controle Eletrônico de nível		85758																				
	BO1	Bomba d'água 0,5HP - 220V		88701																				
	C1	Contator 9A		47916																				
	CG1	Condensador gerador		46438																				
C	S1 e S2	Válvula solenóide de água 1/2"		46979																				
	S3	Válvula solenóide de ar 1/2"		44924																				
	BA1	Bloco aditivo temporizado 10 a 180s		47933																				
	TR1 e TR2	Timer Eletro-mecânico 60 min		96002																				
	CH1 e CH2	Chave 2 posições 2 Blocos NA		81057																				
B																								
A																								

8			7			6			5			4			3			2			1														
															DENOMINAÇÃO: Descrição dos componentes															CÓDIGO:					
															DES: RIBEIRO						Substitui:						Sub:			FOLHA:					
															CONF: CANATTO						SUB									2/2					
															APROV: KOSEKI						LETRA														

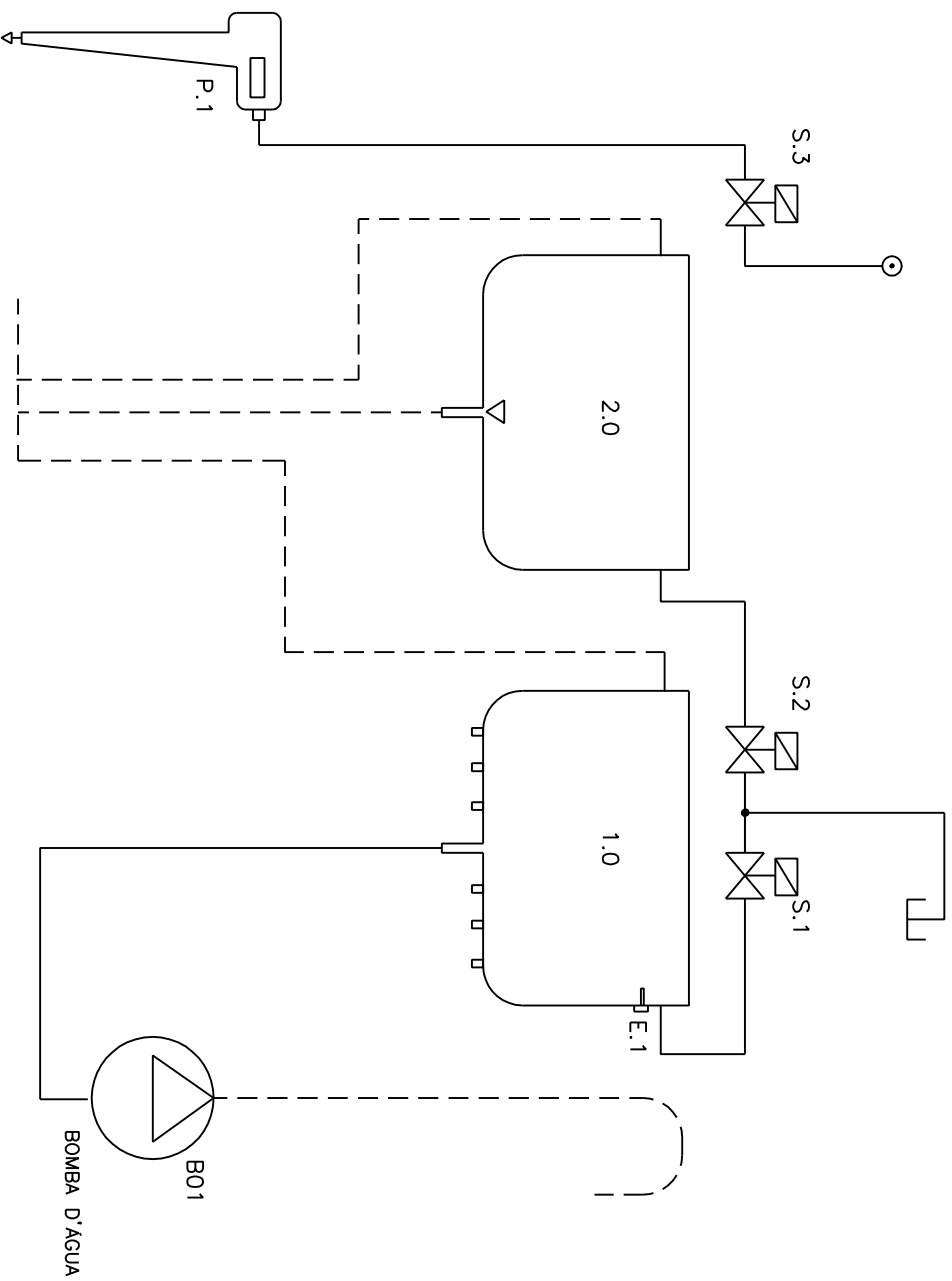

1.0	- CUBA DE LAVAGEM
2.0	- CUBA DE ENXAGÜE
S.1 e S2	- VÁLVULA SOLENÓIDE 1/2" NF
S.3	- VÁLVULA SOLENÓIDE 1/4" NF
B0.1	- BOMBA DE ÁGUA
E.1	- ELETRODO DE NIVEL
P.1	- PISTOLA DE AR

GRAU DE PRECISAO = PROCEDIMENTO DTBH-008	
MÉDIO (m)	USINAGEM
GROSSO (g)	FURADERIA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA
MUITO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA




SUPERFICIES	
<input type="checkbox"/>	limpo em bruto
<input type="checkbox"/>	desbastado
<input type="checkbox"/>	alisado
<input type="checkbox"/>	polido

DENOMINAÇÃO: ULTRA-SOM  
 ESQUEMA HIDROPNEUMÁTICO  
 ACABAMENTO: MATERIAL: DIMENSÃO: N:  
 OBS: TRATAMENTO: PESO: SUBSTITUI:

USADO EM:	DESCRILDO	ESCALA:	SUBSTITUI:
	CONF:		SUB
	APROV:		LETRA
			CODIGO
			H7-E1513



N. P7-E1513

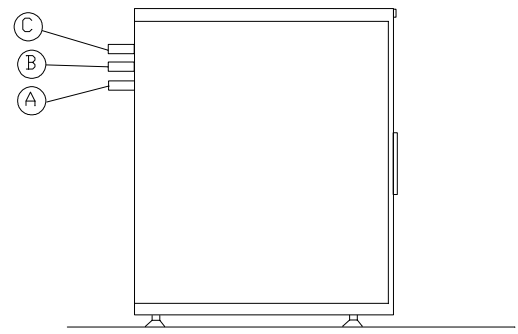
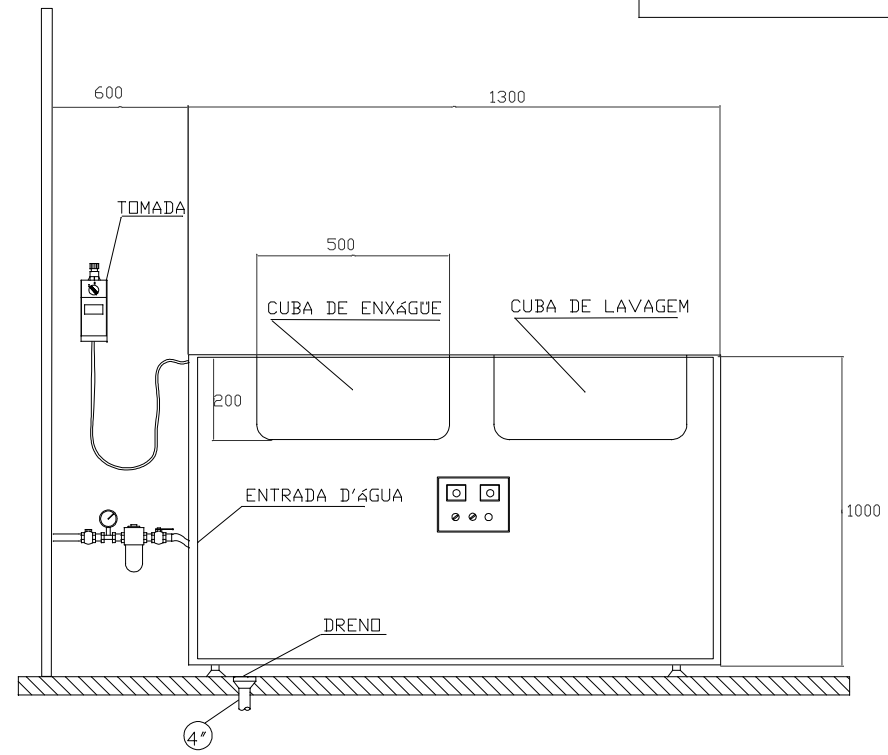
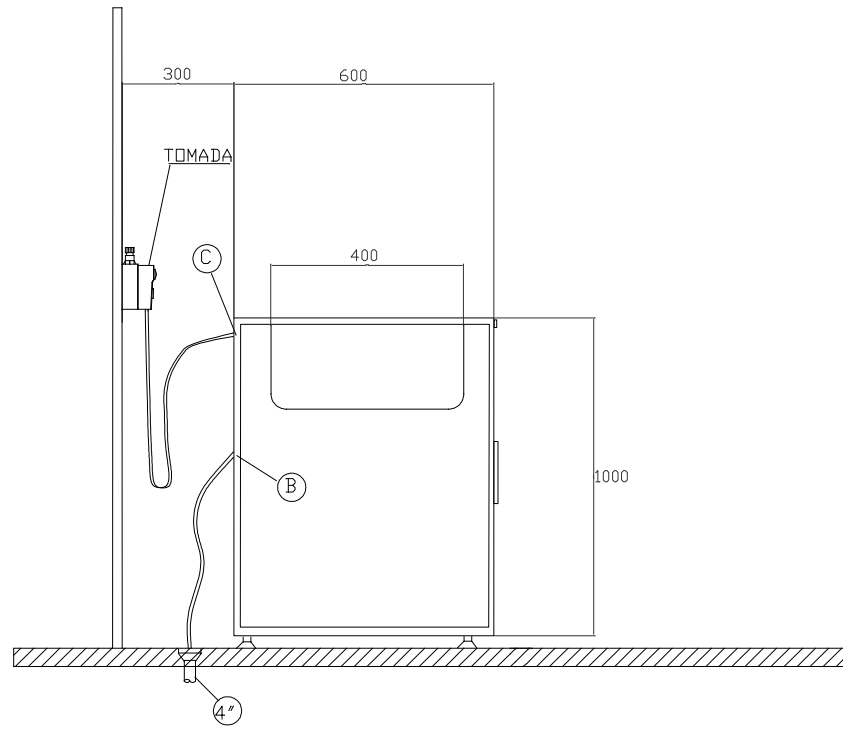


DIMENSÕES ÚTEIS			
ULTRASOM	LARGURA	PROFUND.	ALTURA
E-151-3	1300	600	1000

INSTALAÇÃO	
<b>A- água</b>	
Mangueira	Ø 3/4"
Consumo médio/pico l/h	2
Pressão(kgf/cm <sup>2</sup> )	0,5 a 2
<b>B- Dreno</b>	
Dreno	Ø 1"
Mangueira	Ø 3/8"
<b>C- Energia elétrica (Comando)</b>	
Tensão(V)	220V
Corrente(A)	5A
Potência (kW)	1000W

DENOMINAÇÃO: ULTRASOM E-151-3		MATERIAL:		N.º:	
PLANTA DE ASSENTAMENTO		DIMENSÃO:			
ACABAMENTO:		TRATAMENTO:		PESO:	
OBS:		SUBSTITUI:		SUB	
USADO EM:		DES: RILDO		ESCALA:	
		CONF:		SUB LETRA CÓDIGO P7-E1513	
		APROV:			

GRAU DE PRECISÃO = PROCEDIMENTO DTBH-008		SUPERFÍCIES	
MÉDIO (m)	USINAGEM	~	limpo em bruto
GROSSO (g)	FURADEIRA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA	▽	desbastado
MUITO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA	▽▽	alisado
		▽▽▽	polido

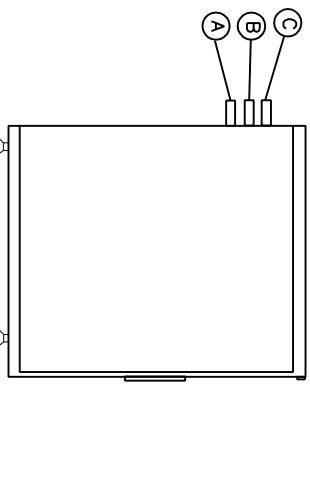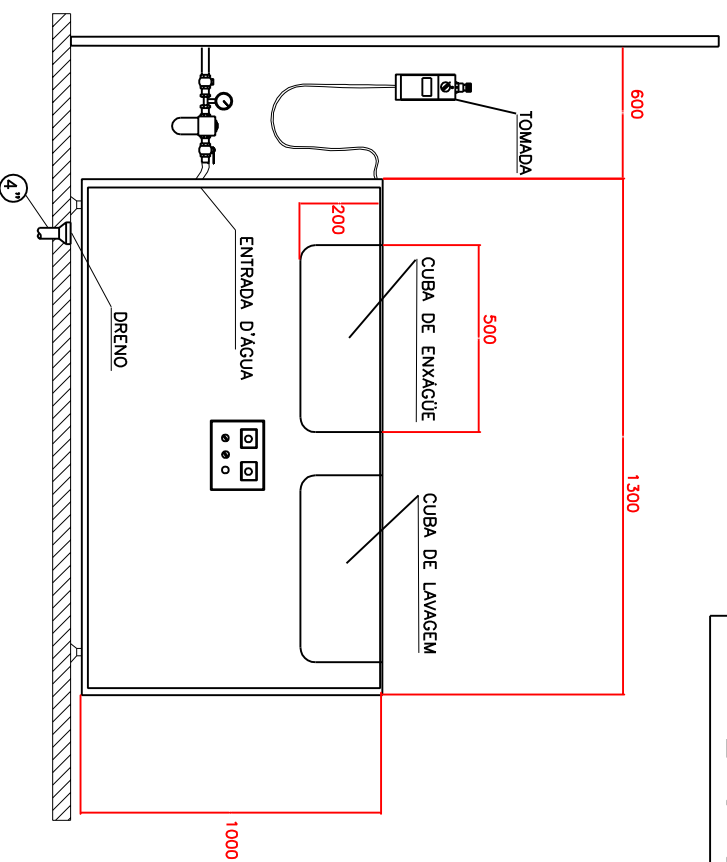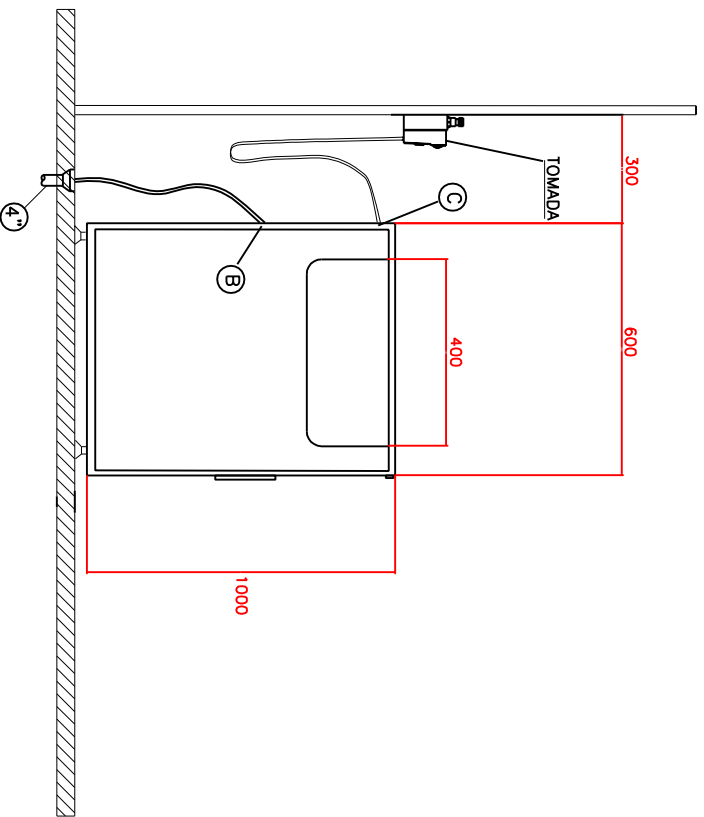

DIMENSÕES ÚTEIS			
ULTRASON	LARGURA	PROFUND.	ALTURA
E-151-3	1300	600	1000

INSTALAÇÃO	
A - Água	
Mangueira	Ø 3/4"
Consumo médio/pico l/h	2
Pressão(kgf/cm <sup>2</sup> )	0,5 a 2
B - Dreno	
Dreno	Ø 1"
Mangueira	Ø 3/8"
C - Energia elétrica (Comando)	
Tensão(V)	220V
Corrente(A)	5A
Potência (kW)	1000W


GRAU DE PRECISAO = PROCEDIMENTO DTBH-008	
MÉDIO (m)	USINAGEM
GROSSO (g)	FURADERIA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADERIA
FINURO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA

SUPERFÍCIES	
∩	limpo em bruto
∇	desbastado
▽	alisado
▽▽	polido

DENOMINAÇÃO: ULTRASON E-151-3  
 PLANTA DE ASSENTAMENTO

MATERIAL:	N:
DIMENSÃO:	
TRATAMENTO:	
ACABAMENTO:	
USADO EM:	
OBS:	

DES: RILDO	ESCALA: SUB
CONF: APROV:	LETRA
	CÓDIGO
	P7-E1513

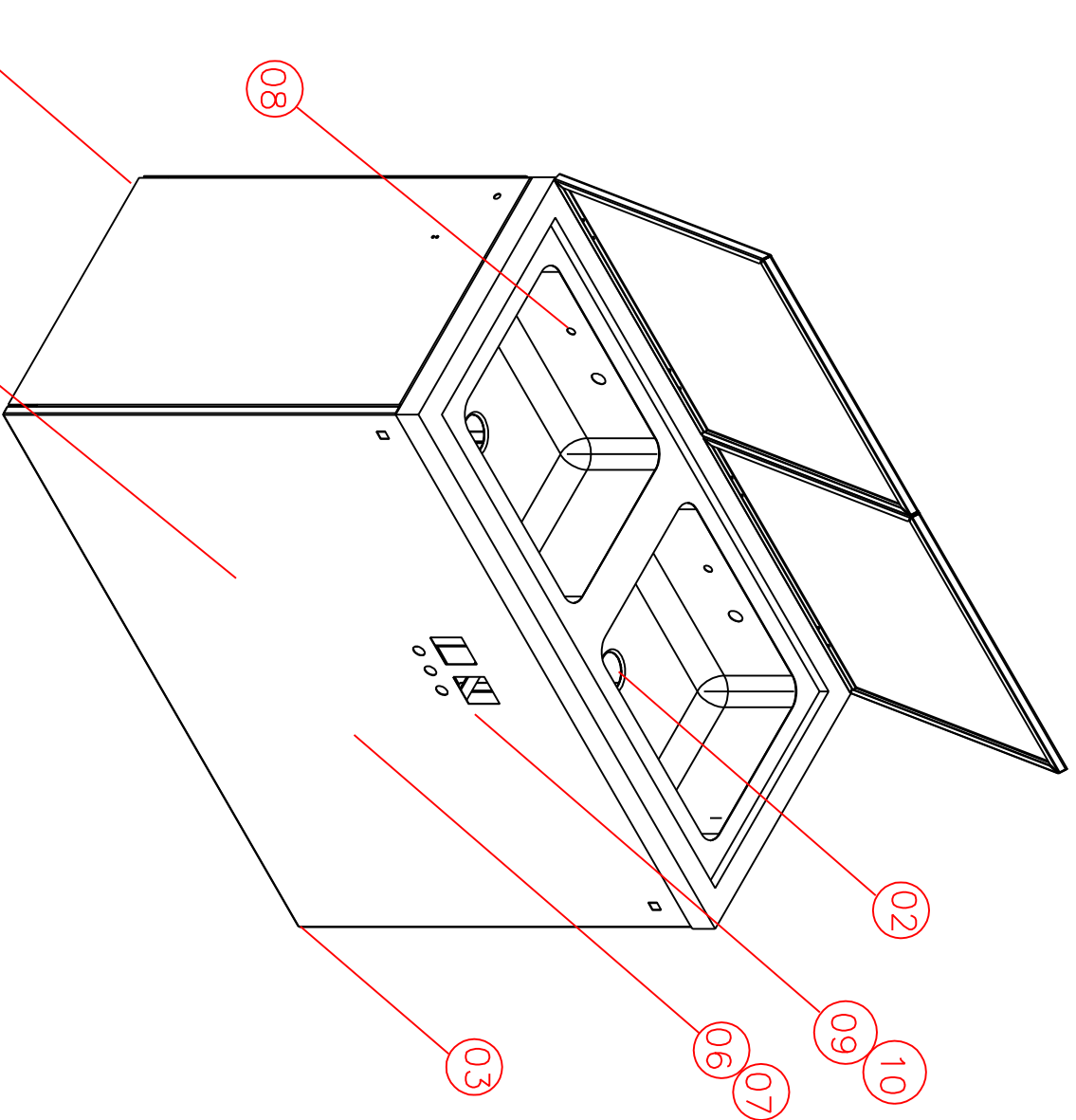

GRAU DE PRECISÃO = PROCEDIMENTO DTBH-008	
MÉDIO (m)	USINAGEM
GROSSO (g)	FURADEIRA/CORTE/ESTAMPARIA/VIRADEIRA
TALHO GROSSO (mg)	CALDEIRARIA / SOLDA

SUPERFÍCIES	
<input type="checkbox"/>	limpo em bruto
<input type="checkbox"/>	desbastado
<input type="checkbox"/>	alisado
<input type="checkbox"/>	polido

USADO EM:



DENOMINAÇÃO: VISTA EXPLODIDA  
 ULTRA-SOM E-151-3

MATERIAL: N:  
 DIMENSÃO: N:  
 TRATAMENTO: N:

DES: RILDO	ESCALA:	SUBSTITUI:	SUB
CONF:	LETRA		
APROV:	CÓDIGO	V7-E1513	

Obs: N.º