

	<b>AC LABOR ASSISTENCIA TÉCNICA LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>	
	Informativo	IN° 03 Revisão 00
	<b>BIO 2000/200 – BIOPLUS MANUAL DE INSTALAÇÃO PÓS MANUTENÇÃO</b>	

Prezado cliente,

*Antes de utilizar seu equipamento, leia este informativo atentamente e, em caso de dúvidas, entre em contato com AC Labor.*

Verifique as condições gerais de seu equipamento, pois antes de deixar nossa empresa, verificamos sua integridade e checamos todos os itens necessários. O equipamento sai pronto para uso, tendo sido testado e aprovado com testes de reprodutividade.

Desembale o equipamento cuidadosamente sem deitá-lo.

Verifique as conexões das tubulações de aspiração (frontal) e peristáltica (traseira).

Antes de ligá-lo na tomada, cheque a tensão - 110V ou 220V. De preferência, ligue-o em um estabilizador ou no-break.

Verifique se o HOLDER (suporte redondo) está em tubo ou fluxo.

Execute a calibração da bomba seguindo os passos abaixo:

- 1-F3 – SERV
- 2- Serviço do operador - F4 para selecionar
- 3-Calibrar bomba – F4 para selecionar
- 4-Siga as instruções que aparecem no display.

O equipamento está pronto para realização do exames.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco por telefone, 62 - 3251-9215 ou por e-mail, [aclabor@aclabor.com.br](mailto:aclabor@aclabor.com.br).

A AC Labor agradece por ter nos escolhido!