

	<b>AC LABOR ASSISTENCIA TÉCNICA LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>	
	Informativo	IN° 06 Revisão 00
	<b>PENTRA 60-C+ MANUAL DE INSTALAÇÃO PÓS MANUTENÇÃO</b>	

Prezado cliente,

*Antes de utilizar seu equipamento, leia este informativo atentamente e, em caso de dúvidas, entre em contato com AC Labor.*

Verifique as condições gerais de seu equipamento, pois antes de deixar nossa empresa, verificamos sua integridade e checamos todos os itens necessários. O equipamento sai pronto para uso, tendo sido testado e aprovado com testes de reprodutividade.

Desembalar cuidadosamente sem deitar o equipamento;

Verificar se há alguma trava fixando as partes móveis (carro e agulha);

Verificar a tensão em que o equipamento será ligado, se 110V ou 220V;

Confirmar a presença de um No-Break ou Estabilizador para ligar o equipamento;

Verificar as conexões das tubulações de reagente e esgoto (a tubulação superior Diluente e a inferior de esgoto)

Após ligar o equipamento realizar um PRIME de todos os reagentes, utilizando as teclas de setas, seguir o menu abaixo:

- 3 - Reagente (Reagente) - enter
- Prime- enter
- todos os reagentes (All Reagents)

Realizar um START UP e aguardar o equipamento zerar;

Caso o equipamento não apresente os resultados do START UP dentro dos valores mínimos estabelecidos deverá ser realizada uma limpeza concentrada com hipoclorito ou água morna.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco por telefone, 62 - 3251-9215 ou por e-mail, [aclabor@aclabor.com.br](mailto:aclabor@aclabor.com.br).

A AC Labor agradece por ter nos escolhido!