

	AC LABOR ASSISTENCIA TÉCNICA LABORATORIAL E HOSPITALAR	
	Informativo	IN° 04 Revisão 00
	KT – 6200 MANUAL DE INSTALAÇÃO PÓS MANUTENÇÃO	

Prezado cliente,

Antes de utilizar seu equipamento, leia este informativo atentamente e, em caso de dúvidas, entre em contato com AC Labor.

Verifique as condições gerais de seu equipamento, pois antes de deixar nossa empresa, verificamos sua integridade e checamos todos os itens necessários. O equipamento sai pronto para uso, tendo sido testado e aprovado com testes de reprodutividade.

Desembale o equipamento cuidadosamente sem deitá-lo.

Verifique se há alguma trava fixando as partes moles, tais como carro e agulha.

Verifique as conexões das tubulações de reagentes e esgoto. Olhando o equipamento pela parte de traz, a tubulação de diluente está do lado esquerdo e a do esgoto do lado direito.

Antes de ligá-lo na tomada, cheque a tensão - 110V ou 220V. De preferência, ligue-o em um estabilizador ou no-break.

Após ligar o equipamento, realize um PRIME de todos os reagentes utilizando as teclas de setas conforme descrito abaixo:

1-MENU

2-SERVIÇO

3-Prepare uma solução com DILUENTE, LISANTE E DE RINSE. A solução LISANTE deve ser passada TRÊS vezes.

Realize uma contagem em STARTUP, colocando na identificação ID, o número 999. Em seguida, pressione a barrar de aspiração e aguarde o equipamento zerar.

Se o equipamento não apresentar os resultados de PLANO DE FUNDO dentro dos valores mínimos estabelecidos, realize uma limpeza concentrada com hipoclorito de sódio ou água morna.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco por telefone, 62 - 3251-9215 ou por e-mail, aclabor@aclabor.com.br.

A AC Labor agradece por ter nos escolhido!