

### Conhecendo o Equipamento:



**Visão do operador**

**Visão lateral**

**Visão do usuário**

Parabéns você está adquirindo um produto de uso profissional que proporciona além do bem estar e benefícios em relaxamento muscular, também traz requinte e beleza em estabelecimento comercial ou residencial.

<b>Multi Estágio</b>	<b>Equipamento</b>	
<b>Potência</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Tensão</b>
	<b>Alt x Larg. x Prof.</b>	
1 Cv	86x 50 x 40	220v Mon.


**Painel de Controle:** Figura nº 01.



- A** - Etiqueta de instrução de uso
- B** - Controlador de pressão d' água (etiqueta azul)
- C** - Água quente
- D** - Água fria
- E** - Bico massageador
- F** - Controlador de temperatura analógico
- G** - Manômetro
- H** - Botão liga/ desliga

### Itens necessários:

Segue o desenho dos pontos a serem feitos no chão:

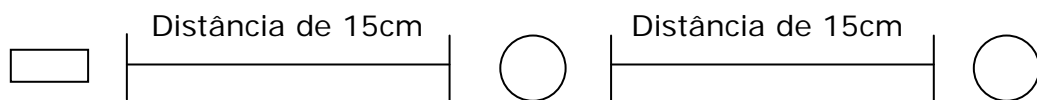

Ponto de energia      ponto de água quente      ponto de água fria

Ponto de água fria: tubulação de 1" com redução  $\frac{3}{4}$  c/ rosca

Ponto de água quente: tubulação de 1" com redução  $\frac{3}{4}$  c/ rosca

Ponto de força: 2 cabos 4mm + 1 terra.

### Recomendações:

1º ) É necessário que a tubulação tenha válvula de retenção tanto para água quente, quanto para água fria **(não acompanha o produto)**.

2º ) É necessário aterrar adequadamente o equipamento.

3º ) Usar 02 (dois) disjuntores de 20 amperes.

A Ducha Escocesa da Impercap possui três registros:



O registro do lado esquerdo controla a água quente, que possui  $\frac{1}{4}$  de volta. Gire a alavanca do registro no sentido anti-horário para abrir da posição C para a posição A como está escrito na canopla.

O registro do lado direito controla a água fria, obedece ao mesmo procedimento.

Esses dois registros constituem o misturador de água quente e fria da Ducha Escocesa Impercap.

O terceiro registro, o central, permite o usuário ter o controle da pressão desejada. Para aumentar a pressão, gire no sentido anti-horário e para diminuir, gire no sentido horário.



**Importante:** Somente ligar o motor da ducha quando houver passagem da água, ou seja, quando os registros tiverem abertos, pois caso contrário poderá danificar a bomba perdendo sua garantia.



# Saunas

**Na frontal da Ducha Impercap, existem mais três equipamentos adicionais:**

Possui um manômetro de leitura dupla.

A leitura preta varia de 0 a 14 kg. A leitura vermelha varia de 0 a 200 libras, atendendo o padrão nacional e internacional.

É importante lembrar que se deve evitar banhar o usuário com pressão acima de 4 Kg.

Ao lado direito do manômetro existe um controlador analógico de temperatura.

A terceira peça curva em borracha, possui um bico massageador onde o cabo é flexível para poder direcionar o jato de água.

### **Cuidados essenciais com os usuários:**

Mulheres devem evitar seios e virilha.

Evitar o jato nos olhos, nariz, ouvido e boca.

Recomendamos o uso de protetor auricular.

### **O que o usuário não poderá fazer:**

Trabalhar somente com o registro de água.

Ligar a máquina sem vazão de água.

O equipamento não poderá ser manuseado por pessoas não qualificadas.

Ao utilizar a Ducha Impercap em crianças e idosos, não ultrapassar a pressão de 2 kg, poderá causar lesões e hematomas.

### **Cuidados especiais com o equipamento da Ducha Impercap:**

Recomenda-se a limpeza com spray 3M Limpa Inox.

Não lavar a Ducha Impercap com mangueira ou balde d água, pois este é um equipamento eletro eletrônico.

Não instalar a Ducha Impercap ao tempo, principalmente em lugares muitos expostos aos raios solares.

Não deixar cair água na parte interna do equipamento, os registros de alimentação da Ducha Impercap deverão ser fechados e o disjuntor desligado.