

Pote Dappen Silicone



- Diversas cores
- Flexibilidade
- Base para fixação na mesa
- Não adere à resina
- Fácil limpeza

POTE DAPPEN SILICONE: Fabricado em silicone atóxico, em várias cores, não deforma, inquebrável e antiaderente, com duas concavidades que podem ser usadas de acordo com as necessidades do profissional. A base do pote dappen silicone prende-se com facilidade à mesa facilitando o trabalho do profissional.

INDICAÇÃO: Para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, como exemplo resina composta, acrílica, pasta profilática e outros.

INSTRUÇÕES DE USO: Colocar dentro do Pote Dappen Silicone o material a ser usado, conforme a necessidade do profissional. Para evitar o endurecimento dos materiais manipulados, faça a limpeza do pote dappen imediatamente após o uso.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Silicone atóxico.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código

Descrição

Apresentação

Registro na ANVISA

108052102102	Pote Dappen Silicone Transparente Pequeno	12 unidades	Dispensado
108052102103	Pote Dappen Silicone Transparente Médio	6 unidades	
108052102104	Pote Dappen Silicone Sortido Pequeno	12 unidades	
108052102105	Pote Dappen Silicone Sortido Médio	6 unidades	
108052102106	Pote Dappen Silicone Transparente Médio	1 unidade	
108052102107	Pote Dappen Silicone Azul Médio	1 unidade	
108052102108	Pote Dappen Silicone Lilás Médio	1 unidade	
108052102109	Pote Dappen Silicone Laranja Médio	1 unidade	
108052102110	Pote Dappen Silicone Rosa Médio	1 unidade	
108052102111	Pote Dappen Silicone Verde Médio	1 unidade	
108052102112	Pote Dappen Silicone Transparente Pequeno	1 unidade	
108052102113	Pote Dappen Silicone Azul Pequeno	1 unidade	
108052102114	Pote Dappen Silicone Lilás Pequeno	1 unidade	
108052102115	Pote Dappen Silicone Laranja Pequeno	1 unidade	
108052102116	Pote Dappen Silicone Rosa Pequeno	1 unidade	
108052102117	Pote Dappen Silicone Verde Pequeno	1 unidade	

 **Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

 Indústria Brasileira