



Cone Indicator



- *Permite a execução de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisão*
- *Película Radiográfica*
- *Enquadramento perfeito e praticidade*



CONE INDICATOR: Permite execução de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisão.

INDICAÇÃO: Nas diversas áreas odontológicas onde existe a necessidade de executar radiografias para diagnósticos durante os tratamentos clínicos.

INSTRUÇÕES PARA USO: Prenda o filme na aleta de pressão e leve o posicionador à boca da maneira que o dente em questão fique no centro da película radiográfica, o paciente deve fechar a boca para estabilizar o posicionador.

Nas radiografias periapicais alinhar o Cone do Aparelho de Raios-X com o anel do Cone Indicator.

Nas radiografias interproximais a vareta indicadora do BITE WINGS deve passar por fora do Cone do aparelho de Raios-X, ficando paralelo ao mesmo e o Cone do aparelho do Raios-X deve encostar no índice do BITE WINGS.

APRESENTAÇÃO: 1 PEÇA A para dentes posteriores (superiores esquerdo e inferiores direito); 1 PEÇA B para dentes posteriores (superiores direito e inferiores esquerdo); 1 PEÇA C para os dentes anteriores (superiores e inferiores); 1 BITE WINGS para os dentes posteriores (superiores e inferiores)

3 Dispositivos para mordida

1 Pote Autoclavável (exclusivo Indusbello)

1 Guia de Uso

ATENÇÃO: Película Radiográfica não está inclusa

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em

ubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Após inspeção visual, verificar a eficácia do processo de limpeza, desmontar o anel e acondicionar todas as peças do conjunto de posicionadores em embalagem para esterilização (grau cirúrgico no tamanho compatível para que o anel não sofra alterações em seu formato) ou dentro do pote exclusivo Indusbello, que deve ser colocado na autoclave com o dispositivo da tampa aberto e somente após a esterilização deverá ser fechado. A esterilização deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Poliacetal, policarbonato, pigmento e silicone atóxicos.

PRECAUÇÕES: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra

Código	Descrição	Apresentação	Cadastro na ANVISA
107588100002	Cone Indicator	1 Caixa	I 80213420034

EC REP Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

Indústria Brasileira



SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS



/indusbello



/indusbello



/indusbello