

Espátula Titânio



- Leveza e variedade de pontas
- A resina não adere a espátula
- Dentística restauradora e estética
- Reconstrução da coroa dental devolvendo sua forma e função
- Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontológicos

ESPÁTULA DE TITÂNIO: Espátula para resinas com design e pontas especiais que facilitam o procedimento odontológico atendendo às necessidades do profissional.

INDICAÇÃO: Utilizada na dentística restauradora e na estética para reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma e função.

INSTRUÇÕES DE USO: Levar a resina ao dente do paciente, uma vez inserida, esta resina poderá ser adaptada, moldada e esculpida pela espátula de titânio.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Aço inox e silicone.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código

Descrição

Apresentação

Registro na ANVISA

104510100401

Espátula Titânio nº1

1 unidade

180213420026

104510100402

Espátula Titânio nº2

1 unidade

104510100403

Espátula Titânio nº3

1 unidade

104510100404

Espátula Titânio nº4

1 unidade

104510100405

Espátula Titânio nº5

1 unidade

104510100406

Espátula Titânio nº6

1 unidade

104510100407

Espátula Titânio nº11

1 unidade

104510100408

Espátula Titânio nº12

1 unidade

104510100409

Espátula Titânio nº15

1 unidade

104510100410

Espátula Titânio Silicato

1 unidade

104510100411

Espátula Titânio Interproximal

1 unidade

 **Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

 Indústria Brasileira