



A Cristófoli é a única empresa nacional fabricante de autoclave com ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Sistema de Gestão de Qualidade - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº59).



ISO 9001:2000
FS 509853



ISO 13485:2003
MD 531811



ISO 14001:2004
EMS 509854

Autoclave Vitale Plus

MISSÃO DA CRISTÓFOLI

Proteger a vida através da Biossegurança.

POLÍTICA AMBIENTAL E DA QUALIDADE CRISTÓFOLI

A Cristófoli Equipamentos de Biossegurança LTDA., estabelecida na Rodovia BR-158, 127, Jardim Curitiba em Campo Mourão, Paraná, Brasil, fabrica equipamentos de biossegurança para atender a área de saúde, tendo como política: "Cumprir cada vez melhor sua missão como instituição, buscando a melhoria contínua de seus produtos e processos, adotando medidas preventivas e corretivas nas áreas funcionais e administrativas da empresa, para melhor atender seus clientes. Este comprometimento implica em cumprir a legislação, normas e requisitos ambientais aplicáveis, com a finalidade de prevenir a poluição e minimizar os impactos decorrentes de suas atividades produtivas, contribuindo assim para uma vida mais saudável".

“Cristófoli. Valorizando a Vida!”

Agradecemos sua escolha. Você, cliente, é a razão de existir da Cristófoli.

Elaboramos este Manual com a finalidade de orientá-lo sobre a melhor forma de utilizar sua Autoclave Vitale Plus Cristófoli.

Para melhor atendê-lo, disponibilizamos a consultoria de Biossegurança da bióloga Liliana Junqueira de P. Donatelli, através do e-mail: consultoria@crisstofoli.com ou do site: www.crisstofoli.com

Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores por nos ajudarem na melhoria contínua e na inovação de nossos produtos e serviços, em especial à Liliana Junqueira de P. Donatelli, Consultora de Biossegurança Cristófoli, que presta um grande e valioso auxílio na coordenação do Projeto Biossegurança Cristófoli; na pesquisa de produtos complementares; no treinamento de nossos funcionários, vendedores e técnicos; e como ministrante dos Cursos de Biossegurança para profissionais, acadêmicos e auxiliares.

Para quaisquer reclamações ou sugestões sobre nossos produtos, por favor entre em contato com o **CAC** - Central de Atendimento ao Cliente através do endereço abaixo.

CAC - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda.
Rodovia BR-158, 127, Saída para Maringá,
Campo Mourão, Paraná - Brasil.
CEP 87309-650
Tel: 0800-44-0800 / 44 3518-3432 / 3434 / 3435
Fax: 44 3518-3437
E-mail: cac@crisstofoli.com



APRESENTAÇÃO

Este equipamento foi desenvolvido para atendê-lo na importante função da esterilização de artigos/instrumentos utilizando vapor sob pressão. Dedicamo-nos intensamente para garantir sua segurança. Esperamos assim, obter o mais alto nível de satisfação de nossos clientes.

Este manual tem por finalidade familiarizá-lo com as características de funcionamento de sua autoclave e preveni-lo quanto aos cuidados que devem ser tomados para que sejam atingidos resultados satisfatórios na esterilização e secagem, bem como obter aumentar a vida útil do equipamento.

Para aqueles que por muito tempo usaram somente a estufa (Forno de Pasteur) para a esterilização, recomendamos atenção extra a este manual, pois a esterilização em autoclave, apesar de mais rápida e eficiente, requer uma rotina diferente, porém não necessariamente mais complexa.

Todos os dados sobre Biossegurança que constam neste manual são fruto da consulta de publicações relevantes e conceituadas, nacionais e internacionais sobre Biossegurança, com o objetivo de proporcionar informações atualizadas nos assuntos pertinentes ao controle de infecção e no processo de esterilização. Foram consideradas também a legislação brasileira e Normas Nacionais e internacionais.

É importante conhecer alguns aspectos que podem comprometer a garantia em virtude de negligência, má utilização, reparos não autorizados, etc.

O Certificado de Garantia encontra-se na página 31.

FABRICANTE

CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.
Rod. BR 158, nº127 - Campo Mourão - PR - Brasil.
CEP 87309-650
CNPJ 01.177.248/0001 - 95 - Inscr. Est. 90104860-65
www.cristofoli.com
e-mail: cristofoli@cristofoli.com

Responsável Técnico

Eng. Marcos Fuchs
CREA PR - 70700/D

ÍNDICE

Legenda de Símbolos.....	05
Cuidados Importantes para Segurança.....	06
Instruções de Instalação.....	07
Identificação dos Componentes da Autoclave.....	09
Dispositivos de Segurança.....	11
Observações de Segurança.....	12
Como Usar a Autoclave Vitale Plus.....	12
Situações Adversas.....	15
Requisitos a Serem Observados no Processo de Esterilização e suas Etapas.....	16
Como Evitar Manchas Superficiais e/ou Corrosão no Instrumental.....	22
Possíveis Falhas no Processo de Esterilização.....	23
Controle de Qualidade	24
Manutenção Preventiva.....	24
Como Identificar sua Autoclave.....	25
Gráfico Tempo x Pressão	26
Esquema Elétrico.....	27
Esquema Hidráulico.....	28
Resolvendo Pequenos Problemas.....	28
Dados Técnicos.....	30
Certificado de Garantia.....	31
Como Proceder em Caso de Constatação de Defeitos.....	31
Formulário de Garantia.....	32
Orientação para a Disposição Final do Equipamento.....	32
Links de Interesse.....	33
Referências Bibliográficas.....	34
Rede de Assistência Técnica Autorizada.....	35

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL ANTES DE USAR SUA
AUTOCLAVE, POIS O USO INCORRETO PODE RESULTAR
EM FALHAS NA ESTERILIZAÇÃO E/OU ACIDENTES.**

LEGENDA DE SÍMBOLOS

	Advertência, consulte manual de instruções		Frágil - manuseie com cuidado
	Autoclavável	 ISO 9001:2000	ISO 9001
	Boas Práticas de Fabricação	 ISO 13485:2003	ISO 13485
	Corrente alternada	 ISO 14001:2004	ISO 14001
	Cuidado! superfície quente		Mantenha seco
	Data de fabricação		Número de lote
	Empilhamento máximo		Número de série
	Equipamento Classe II		Proteja da luz solar
	Este lado para cima		Reciclável
	Fabricante		Tensão elétrica perigosa

CUIDADOS IMPORTANTES PARA SEGURANÇA

Para usar sua autoclave **Vitale Plus** são necessárias algumas medidas de segurança. As autoclaves para esterilização são equipamentos que trabalham com temperatura e pressão elevadas, portanto devem ser manuseadas por pessoas devidamente habilitadas e bem informadas quanto as suas características de funcionamento. É fundamental para tal habilitação que o operador leia atentamente todas as instruções e certifique-se do seu correto entendimento antes de usar a autoclave. O uso pretendido deste equipamento é o de realizar a esterilização em odontologia, aparelhos médico/hospitalares e artigo resistentes à temperatura de 135°C, vapor e pressão.

ADVERTÊNCIAS:

- ▶ Antes de iniciar qualquer esterilização, certifique-se com o fabricante do material a ser esterilizado se o mesmo é autoclavável (resistente à temperatura de 135°C e a presença de vapor e pressão).
- ▶ **Não** permita que pacientes e, principalmente crianças, aproximem-se da autoclave.
- ▶ **Nunca** esterilize ou aqueça alimentos na autoclave.
- ▶ **Nunca** realize nenhum experimento com animais na autoclave.
- ▶ **Nunca** realize nenhum procedimento não descrito neste manual.

ATENÇÃO DURANTE A INSTALAÇÃO:

- ▶ Use **somente** as mangueiras resistentes ao calor conforme a amostra fornecida juntamente com sua autoclave. **Nunca** utilizar mangueira de plástico comum na saída externa de vapor, pois a autoclave atinge temperaturas superiores às suportadas por este material. Consulte "*Instruções de Instalação*", tópico "*Instalação Hidráulica*" (Pág. 8).

CUIDADOS E OBSERVAÇÕES DURANTE O USO:

- ▶ Tenha por rotina assegurar-se de que o fecho da porta da autoclave esteja devidamente travado antes de usá-la. **A não observação deste procedimento poderá causar o escape do Anel de Vedação.** Consulte "*Como Usar a Autoclave Vitale Plus*", (Item c, pág.13).
- ▶ Caso haja pressão na câmara ao ligar a autoclave, o ciclo será cancelado automaticamente;
- ▶ Ao soltar o fecho, a porta da autoclave deve abrir com facilidade. **Nunca** force para abrir a autoclave!
- ▶ Ao abrir a autoclave ao final do ciclo esfriar o material esterilizado, é normal que saia algum vapor pela porta.
- ▶ No caso de acionamento de um dos dispositivos de segurança (escape súbito de vapor), geralmente ocasionado por obstrução do orifício interno da saída de vapor ou por obstrução da válvula solenóide, aguarde a total despressurização para abrir a porta. O display exibirá **CICLO CANCELADO**.

IMPORTANTE! Certifique-se sempre de ter desligado sua autoclave da tomada para realizar qualquer tipo de manutenção (limpeza diária ou até mesmo troca de fusível).

- ▶ **Recomendamos** a leitura deste manual até o completo entendimento do mesmo. Utilize-o como fonte de consulta e mantenha-o sempre em local de fácil acesso.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O transporte do equipamento deve ser feito por duas pessoas evitando assim quedas e choques. O armazenamento/instalação em local livre de intempéries em condições normais de temperatura ambiente sobre um balcão que suporte o peso do equipamento.

A autoclave Cristófoli Vitale Plus é de simples instalação. Verifique se a rede elétrica encontra-se de acordo com as especificações abaixo, para isso consulte um eletricitista profissional com o acompanhamento de um atendente do CAC pelo fone 0800-44-0800 ou a Rede de Assistência Técnica Autorizada Cristófoli. Veja também "Certificado de Garantia", (Pág. 31) e "Rede de Assistência Técnica Autorizada" (Pág. 35).

INSTALAÇÃO FÍSICA

Instale a autoclave em lugar plano, nivelado, seguro e na altura ergonomicamente adequada ao operador (aproximadamente 80 cm de altura do chão). Deixe espaço suficiente para o manuseio dos materiais a serem esterilizados. O local da instalação deverá ser arejado, limpo e afastado do local de atendimento aos pacientes. O local ideal para a instalação da autoclave é em sala exclusiva para esterilização.

Importante! Instale sua autoclave onde o cabo de energia possa ser facilmente desconectado da rede elétrica.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- 1▶ Verifique se a voltagem da autoclave coincide com a voltagem da rede elétrica do local de instalação. Para tanto, observe a voltagem indicada no rótulo metálico de identificação que se encontra na parte posterior do equipamento. Consulte "Como Identificar sua Autoclave" (Pág. 25, Fig. 25).
- 2▶ Na instalação utilize tomada de três pinos, do tipo usada em computador (Fig. 2, pág. 8) ligando fase/neutro ou fase/fase nos pinos laterais e o aterramento no pino central: **Nunca ligar o aterramento no neutro.**

ATENÇÃO! Como em qualquer outro equipamento elétrico, o aterramento é muito importante para a segurança do operador e garantia de seu equipamento. Por isso o pino central (aterramento) **nunca** deve ser retirado ou cortado. **A não observação desse procedimento poderá danificar sua autoclave. A Cristófoli não se responsabiliza por danos causados por instalações e/ou voltagens inadequadas.**


- 3▶ **Nunca** utilize extensões, adaptadores, benjamins ou transformadores de voltagem (Fig. 2A, pág. 8).
- 4▶ Para que a autoclave tenha um bom funcionamento, a voltagem da rede elétrica deverá ser estável, ou seja, sem oscilações. Acione um técnico eletricitista e verifique se a sua instalação elétrica está de acordo com as especificações necessárias. **É obrigatória a utilização de um disjuntor exclusivo para a tomada onde a autoclave será conectada.** Se mesmo após todas as especificações seguidas, a rede elétrica se apresentar oscilante, entre em contato com sua concessionária para adequação (Resolução nº 505 de 26/11/2001 - ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) - Art. 2º Incisos IV, V, VI e VII - Art. 6º Incisos I, II e III - Art. 16º).

A instalação elétrica deve seguir obrigatoriamente os dados da Tabela 1 abaixo.

MODELO	CORRENTE NOMINAL	DISJUNTOR	VOLTAGEM	DIÂMETRO DA FIAÇÃO (BITOLA) ⁽²⁾
Vitale Plus 12 - 127 V	10 A	1 Disjuntor 15 A.	(Brasil)	Para uma distância de até 5 m do disjuntor até a tomada do equipamento a fiação deverá ser 2,5 mm, de 5 a 15 m fiação 4 mm e de 15 a 50 m fiação 6 mm.
Vitale Plus 12 - 220 V	6 A	1 Disjuntor 10 A.	127 V AC » 114 V - 140 V	
Vitale Plus 21 - 127 V	12 A	1 Disjuntor 20 A.	220 V AC » 198 V - 242 V	
Vitale Plus 21 - 220 V	8 A	1 Disjuntor 15 A.	(Europa) 230 V AC » 207 V - 253 V	

Tabela 1 ⁽²⁾Conforme norma da ABNT NBR-0148, série métrica PVC 70°C.

OBS: Em regiões de rede 220V:
FF (Fase-Fase) use disjuntor "bipolar"
FN (Fase-Neutro) use disjuntor "unipolar" ligado na Fase.

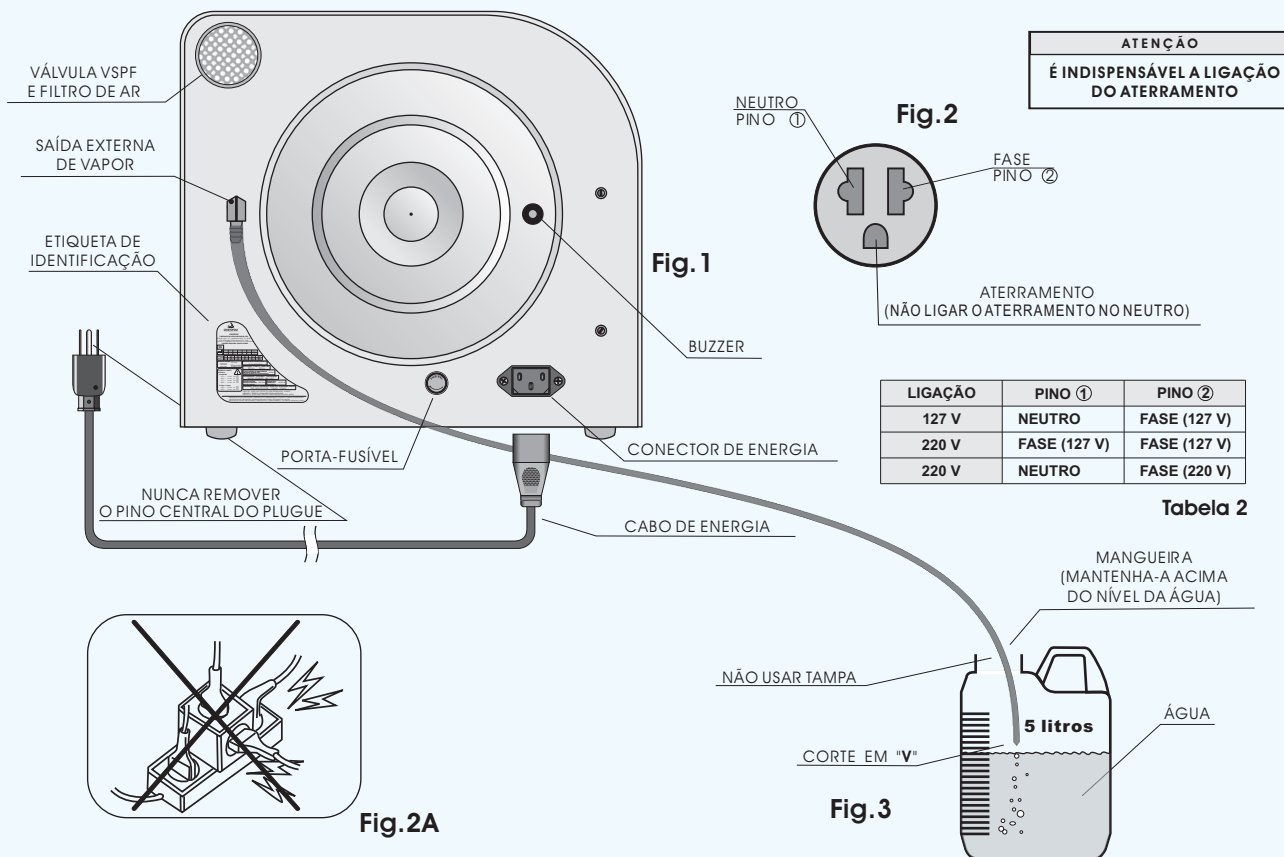

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

IMPORTANTE! Para a correta conexão dos componentes é indispensável a leitura do manual de instruções.

Adquira uma mangueira de borracha resistente ao calor com tecido interno de bitola 5/16 de polegada, 300 psi (conforme amostra) e conecte-a na extremidade da Saída Externa de Vapor (Fig. 1) localizada na parte posterior da autoclave, coloque a braçadeira (que acompanha a autoclave, Fig. 15, pág. 11) e aperte-a com uma chave de fenda. A outra extremidade deve ser conectada a uma tubulação de esgoto que suporte a temperatura de 100°C ou colocada dentro de um recipiente sem tampa posicionado 40 cm abaixo do nível da autoclave com água comum para a despressurização (Fig. 3), neste caso, a mangueira deve estar **acima do nível da água**, com corte em "V" na extremidade e deve ser inspecionada **anualmente** para a verificação de obstruções e condições gerais.

OBS: Para substituir a mangueira da saída externa de vapor, certifique-se de que a autoclave esteja fria e desligada da rede elétrica, solte a braçadeira, remova a mangueira antiga e coloque uma nova seguindo o mesmo procedimento de instalação descrito no parágrafo anterior.

ADVERTÊNCIA! Não utilize mangueira de plástico, pois o calor do vapor irá derretê-la, ocasionando obstrução e pane na Saída Externa de Vapor.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA AUTOCLAVE

- 1► **PAINEL** - Está localizado na parte frontal da autoclave, é feito em plástico ABS injetado, é onde se encontra o teclado de controle e o display da autoclave (Fig. 4).
- 2► **TAMPA** - Fica logo atrás do painel, é feita em alumínio e é responsável pelo fechamento da câmara da autoclave (Fig. 7).
- 3► **TECLADO DE CONTROLE** - Está localizado no painel, é onde ficam os botões de controle e o display da autoclave (Figs. 4 e 5).
- 4► **DISPLAY** - É onde são visualizadas todas as funções/mensagens exibidas pela autoclave, possui duas linhas de 16 caracteres cada, localiza-se na parte central do teclado de controle, (Figs. 4 e 5).
- 5► **FECHO** - Localizado na parte frontal da autoclave (Figs. 4 e 5), é utilizado para abrir, fechar e travar a porta da autoclave (conjunto painel/tampa). Para verificar a posição correta do fechamento consulte as Figs.17 e 18 (Pág. 12).

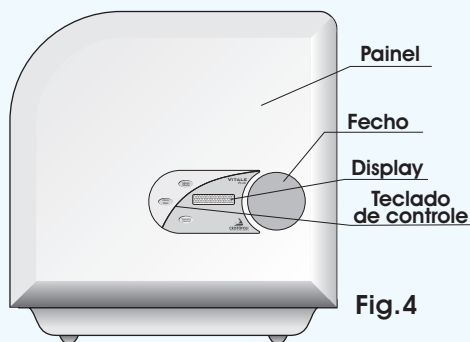


Fig.4

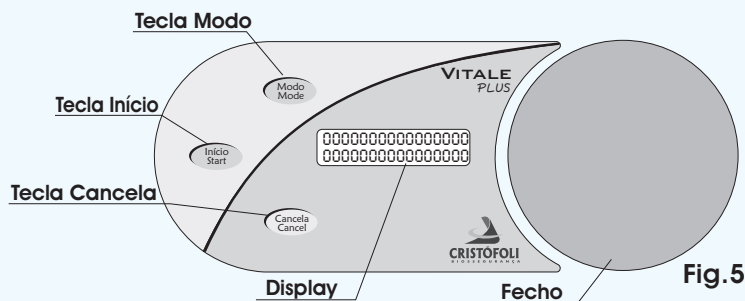


Fig.5

- 6► **ANEL DE VEDAÇÃO** - É encaixado na tampa, tem a função de vedá-la com a câmara (Figs. 6 e 7), servindo também como dispositivo de segurança. Consulte "Dispositivos de Segurança" (Pág. 11). Requer manutenção **semanal**. Consulte "Manutenção Preventiva" (Pág. 24).

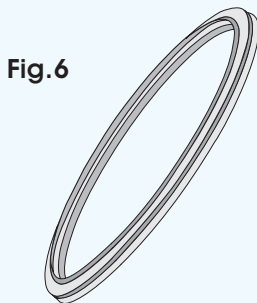


Fig.6


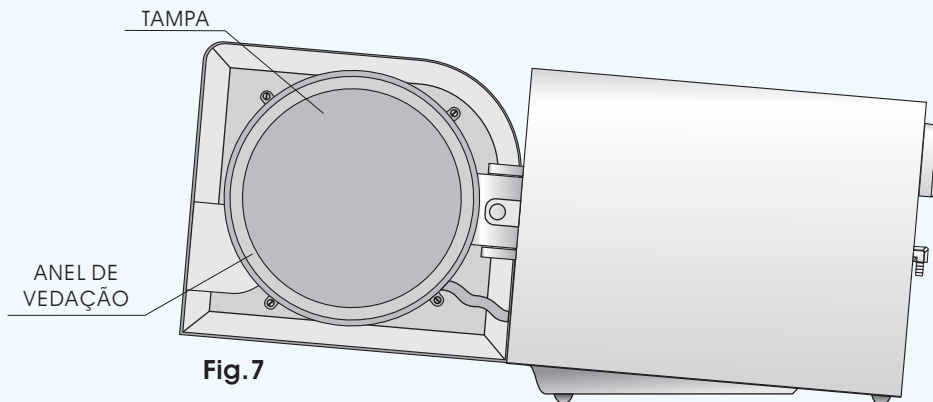


Fig.7

- 7► **VÁLVULA VSPF** - A válvula VSPF é um dos dispositivos responsáveis por aliviar a pressão da câmara caso ultrapasse 2,7 kgf/cm² ou eliminar o vácuo da câmara quando houver (Fig. 28, pág.28).
- 8► **SAÍDAS INTERNAS DE VAPOR** - Existem dois orifícios localizados na parede posterior da câmara (Fig. 8) que servem como conduto para o vapor até a válvula solenóide. Devem ser inspecionadas **diariamente** e permanecer livre de obstruções.
ATENÇÃO! Ao colocar os instrumentos/artigos na autoclave, tome sempre cuidado para não encostá-los nos orifícios das saídas internas de vapor, isso ocasionará interferência no ciclo. Consulte item 6.4 (Pág. 20).
- 9► **SAÍDA EXTERNA DE VAPOR** - Localizada na parte posterior da autoclave (Fig. 1, pág.8), possui um diâmetro de 5/16" para conexão da mangueira de despressurização, que por sua vez é conectada à tubulação de esgoto ou recipiente com água. É responsável por expulsar o ar frio da câmara no início do ciclo e o ar quente no final do ciclo. Consulte "Instruções de Instalação" tópico "Instalação Hidráulica"(Pág. 8).
- 10► **VÁLVULA SOLENÓIDE** - Componente interno do equipamento responsável pela desaeração e despressurização. A válvula abre no início do estágio de aquecimento para permitir a saída de ar frio e depois fecha para permitir o aumento da pressão para a esterilização e se abre novamente ao final do ciclo para a despressurização da câmara (Fig. 29, pág. 28).

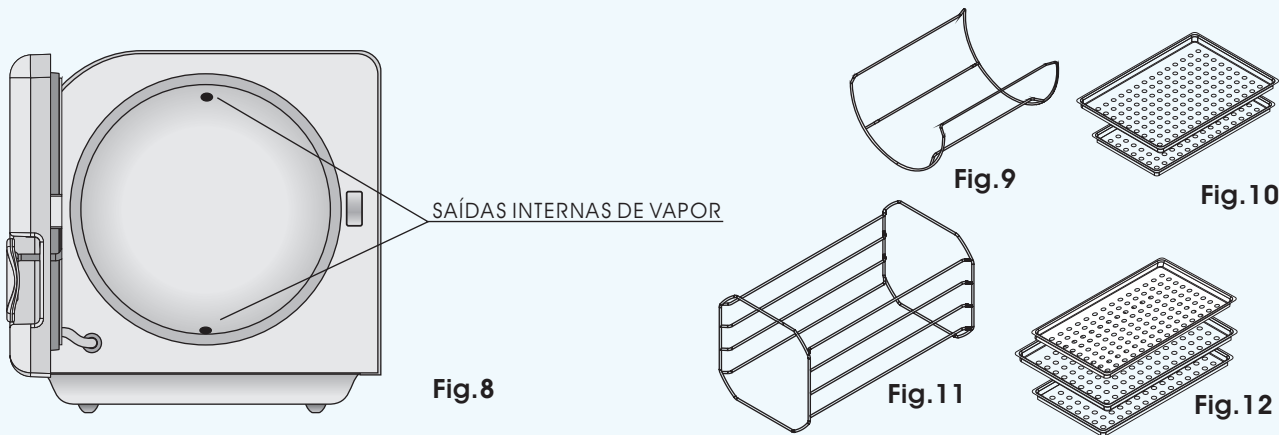

COMPONENTES DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO

- 11► **SUPORTE** - É fornecido 1 suporte para cada modelo, Vitale Plus 12 (Fig. 9) e Vitale Plus 21 (Fig. 11).
- 12► **BANDEJAS** - São fornecidas 2 bandejas para Vitale Plus 12 (Fig. 10) e 3 para Vitale Plus 21 (Fig. 12), que servem para manter os materiais a serem esterilizados fora do contato direto com a água e as paredes internas da câmara da autoclave.
- 13► **COPO DOSIFICADOR** - Usado para dosar a quantidade de **água destilada** necessária para o processo de esterilização (Fig. 13, pág.11).
- 14► **CABO DE ENERGIA** - Usado para conectar o equipamento à rede elétrica, (Fig. 14, pág. 11).
- 15► **BRAÇADEIRA** - Usada para fixar a mangueira de descarga à saída externa de vapor, (Fig. 15, pág.11).



Fig. 13

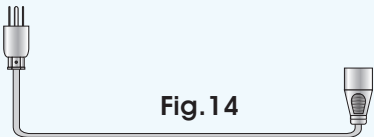


Fig. 14

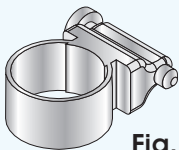


Fig. 15

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

As autoclaves **Vitale Plus** possuem os seguintes dispositivos de segurança:

- 1► **SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA X PRESSÃO** - Sistema interno do equipamento que verificará o ciclo assim que a autoclave atingir 107°C, caso seja detectado qualquer problema na leitura da câmara ou se a mesma exceder o limite de segurança, o ciclo será cancelado automaticamente.
- 2► **ANEL DE VEDAÇÃO** - Caso a pressão ultrapasse 3 kgf/cm² ou 294 kPa, o anel de vedação escapará pela borda ocasionando um ruído alto, consulte "*Identificação dos Componentes da Autoclave*" (Figs. 6 e 7, pág.9).
- 3► **VÁLVULA VSPF** - Válvula que atua como sistema anti-vácuo, (Fig. 28, pág.28).
- 4► **FUSÍVEL** - Dispositivo de segurança que tem por finalidade proteger as instalações elétricas contra excessos de corrente. O fusível utilizado é o 20 AGLF de Vidro - Ação Rápida - 10 A/250 V para 127 V e 6 A/250 V para 220 V. Caso o usuário deseje substituir o fusível pessoalmente, a Tabela 3 abaixo fornecerá as informações necessárias.



VOLTAGEM	LINHA DE VOLTAGEM ~	FUSÍVEL (Vitale Plus 12)	FUSÍVEL (Vitale Plus 21)
127 V	127 V (114 V - 140 V)	10 A (250 V)	12 A (250 V)
220 V	220 V (198 V - 253 V)	6 A (250 V)	8 A (250 V)

Tabela 3

- 5► **TERMOSTATO** - Dispositivo interno do equipamento. Tem a função de limitar o aquecimento excessivo da câmara durante os ciclos de esterilização ou em caso de mau funcionamento do circuito eletrônico (Fig. 27, pág. 27).
- 6► **SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA** - Sistema interno do equipamento que monitora a temperatura e a pressão da autoclave durante o funcionamento.

OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA

Atenção! Durante o funcionamento da autoclave é perfeitamente normal ouvir alguns ruídos, que são produzidos pela abertura e fechamento das válvulas, desaeração e despressurização, que fazem parte do adequado funcionamento do equipamento. O anel de vedação e a válvula VSPF são mecanismos de segurança que quando ativados liberam pressão automaticamente, produzindo ruídos relativamente altos. O ideal é que a autoclave seja instalada em sala própria para esterilização de acordo com a publicação da ANVISA (BRASIL, 2006). A Cristófoli não se responsabiliza por acidentes que possam ocorrer devido aos sobressaltos causados pelos ruídos produzidos pelo equipamento.

O símbolo 14  aparece em alguns locais da autoclave, e registra que é necessário uma atenção especial e que o usuário/operador deve observar suas referências no Manual de Instruções que acompanha o equipamento. No manual poderá ser encontrada a descrição dos potenciais riscos e as ações a serem tomadas em uma situação adversa que venha a ocorrer.

O símbolo 13  que tem como finalidade chamar a atenção do usuário/operador para superfícies que poderão estar quentes quando a autoclave estiver em funcionamento ou logo após o uso.

A Cristófoli não se responsabiliza por acidentes e falhas causados pela não observação dos itens acima.

COMO USAR A AUTOCLAVE VITALE PLUS

- Abra a porta da autoclave, usando o copo dosificador, coloque a quantidade correta de **água destilada** diretamente na câmara **antes** de cada ciclo (Fig. 16) de acordo com a Tabela 4 abaixo.

Quantidade de água destilada para cada ciclo	
Vitale Plus - 12 litros	Vitale Plus - 21 litros
150 ml	250 ml

Tabela 4

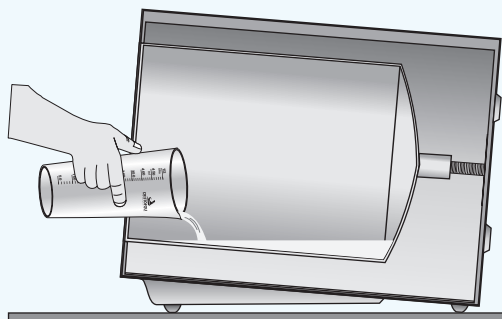


Fig. 16

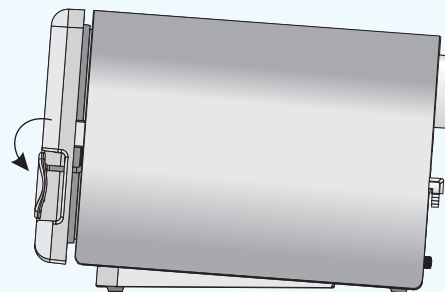


Fig. 17

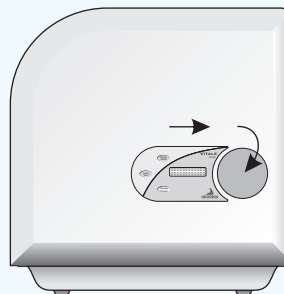


Fig. 18

ATENÇÃO! Utilizar somente água destilada na esterilização. O não cumprimento desta recomendação pode ocasionar a obstrução do sistema hidráulico da autoclave (tubulação e/ou válvulas), manchas no instrumental e perda da garantia.

► Abasteça a autoclave com os materiais a serem esterilizados, tomando cuidado para não encostá-los nos orifícios das saídas internas de vapor, pois isso ocasionará interferência no ciclo. Consulte “Recomendações para o Melhor Acondicionamento do Material na Autoclave” (Pág. 20, item 6.4). Não sobrecarregue a autoclave.

► Feche a porta da autoclave. Para fechar corretamente, ainda com a autoclave aberta e o fecho totalmente para a esquerda, feche a porta pressionando-a contra a câmara (cuba), mova o fecho totalmente para a direita e depois para baixo até o final do curso, (Figs.17 e 18, pág.12). Para a abertura da autoclave repita o mesmo procedimento de modo inverso.

ATENÇÃO! A não observação desta recomendação pode prejudicar o funcionamento adequado de sua autoclave, podendo até mesmo causar o desprendimento do anel de vedação. É muito importante manter a autoclave fechada e travada adequadamente para evitar acidentes e queimaduras.

► Conecte o cabo de energia à tomada e pressione a tecla **INÍCIO** por 2 segundos, nesse momento o display deverá mostrar as informações iniciais (marca, modelo e versão do software), a autoclave emitirá então dois bips e o display exibirá SELECCIONE UMI PROGRAMA.

► Selecione o ciclo desejado pressionando a tecla **MODO**. Cada ciclo possui um tempo e temperatura específicos de funcionamento. Para cada toque nessa tecla o display indicará as operações pré-programadas, na seguinte ordem:

Pressionando uma vez:	1- INSTRUMENTAL EMBALADO	10 MIN
Pressionando duas vezes:	2 -INSTRUMENTAL DESEMBALADO	6 MIN
Pressionando três vezes:	3- KIT CIRURGICO	18 MIN
Pressionando quatro vezes:	4- PLASTICOS E ALGODAO	18 MIN
Pressionando cinco vezes:	5- TECIDOS	30 MIN
Pressionando seis vezes:	6- LIQUIDOS	30 MIN

A Tabela 5 abaixo orienta quanto ao tempo de aquecimento, temperatura, pressão e tempo de esterilização, assim como o tempo de secagem de cada ciclo e temperatura máxima de secagem.

Modo	Tempo de Aquecimento	Temperatura e Pressão de Esterilização	Tempo de Esterilização	Tempo de Secagem
1- Instrumental Embalado	10 a 35 min	134 °C / 216 kPa (2.2 kgf/cm²)	10 min	35 min
2- Instrumental Desembalado	10 a 35 min	134 °C / 216 kPa (2.2 kgf/cm²)	6 min	30 min
3- Kit cirúrgico	8 a 35 min	121 °C / 118 kPa (1.2 kgf/cm²)	18 min	50 min
4- Plásticos e Algodão	8 a 35 min	121 °C / 118 kPa (1.2 kgf/cm²)	18 min	40 min
5- Tecidos	8 a 35 min	121 °C / 118 kPa (1.2 kgf/cm²)	30 min	40 min
6- Líquidos	8 a 35 min	121 °C / 118 kPa (1.2 kgf/cm²)	30 min	- - - -
Temperatura Máxima de Secagem: 120 °C				

Obs: Os valores do tempo de aquecimento expressos levam em consideração as informações na tabela de dados técnicos (Tabela 7) com relação à faixa de temperatura de trabalho adequada da autoclave.

Tabela 5

- f► Após optar por um dos ciclos pré-programados através da tecla **MOD0**, acione a tecla **INÍCIO**. Caso este não seja o primeiro ciclo do dia e a temperatura da autoclave estiver acima de 70 °C, o display exibirá **ESFRIANDO** e a temperatura correspondente. Assim que a temperatura ideal para o início do novo ciclo for atingida a autoclave passará automaticamente para **AQUECENDO**;

Quando a válvula solenóide fechar, o display exibirá a temperatura e a pressão subindo gradativamente. Ao atingir a temperatura/pressão de esterilização do ciclo selecionado, a autoclave soará 3 bips e o display indicará **ESTERILIZANDO**, permanecendo neste estado pelo tempo pré-programado conforme ciclo escolhido.

Obs: Ao término da esterilização a válvula solenóide se abrirá, poderá ser ouvido seu estalo de abertura e a autoclave soará 4 bips. O display indicará **DESPRESSURIZANDO**. Durante o aquecimento e a secagem, a válvula produz um ruído semelhante ao funcionamento de um motor elétrico, e pode também abrir/fechar automaticamente durante a fase de secagem.

- g► Ao final da depressurização a autoclave soará 2 bips e a secagem acontecerá automaticamente, o display exibirá a mensagem **SECANDO** e a temperatura da câmara. **A Vitale Plus realiza a secagem com a porta fechada**. Ao final da secagem, a autoclave emitirá 10 bips e o display exibirá a mensagem **ESFRIANDO**. Nesse momento, o operador deve abrir a porta da autoclave e deixá-la entreaberta para acelerar o resfriamento dos artigos esterilizados. Dentro de 5 minutos a autoclave bipará continuamente e o display exibirá a mensagem **CICLO CONCLUÍDO**, somente então retire os materiais esterilizados. Pressione a tecla **CANCELA**, o display exibirá a mensagem **AGUARDE**, (reinicialização do sistema).

ATENÇÃO! Mesmo após os bips contínuos de indicação de ciclo concluído os materiais ainda estarão quentes. **Nunca** toque nas partes internas da autoclave (câmara, bandejas, material, etc.) quando estiverem quentes, aguarde até que estejam frios o suficiente para o manuseio. Lembre-se de usar luvas adequadas para a manipulação dos artigos esterilizados.

- h► Desligue o equipamento após o uso. Para desligar a autoclave mantenha a tecla **Cancela** pressionada por 2 segundos, ao final do dia é recomendado desconectá-la da rede elétrica.



Relacionamos abaixo as várias mensagens exibidas pela autoclave. O display representado abaixo, exibe também as informações iniciais (marca, modelo e versão do software) quando a autoclave é ligada.

CICLOS

INSTRUMENTAL
EMBALADO 10 MIN

INSTRUMENTAL
DESEMBALADO 6 MIN

KIT CIRURGICO
18 MIN

PLASTICOS E
ALGODAO 18 MIN

TECIDOS 30 MIN

LIQUIDOS 30 MIN

MENSAGENS

SELECIONE UM
PROGRAMA

AQUECENDO
T: 000°C

AQUECENDO
T: 000°C P: 0.0

ESTERILIZANDO
T: 000°C P: 0.0

DESPRESSURIZAR?
IN: SIM CAN: NAO

DESPRESSURIZANDO
P: 0.0 KGf/cm2

SECAR?
IN: SIM CAN: NAO

SECANDO
T: 000°C

CICLO CONCLUIDO

CICLO CANCELADO
P: 0.0 KGf/cm2

ESFRIANDO
T: 000°C P: 0.0

ESFRIANDO
T: 000°C

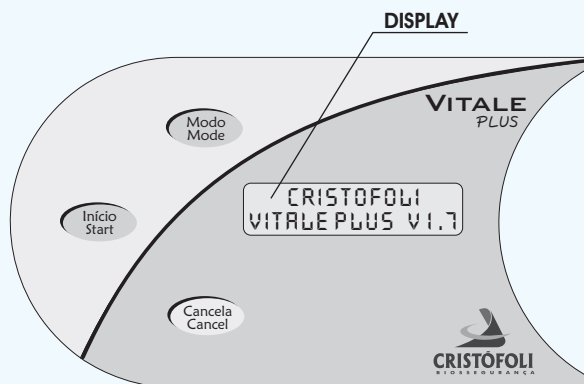


Fig.20

SITUAÇÕES ADVERSAS

- 1 ► Algumas situações poderão causar a interrupção e cancelamento automático do ciclo quando:
 - a► a pressão/temperatura ideal não for atingida devido a vazamento de vapor/pressão, falta de água ou excesso de materiais na câmara. Nesse caso, o cancelamento ocorrerá em no máximo 30 minutos.
 - b► houver queda de energia ou oscilação na voltagem da rede elétrica. **Obs:** A depressurização ocorrerá quando a energia retornar;
 - c► ao ligar a autoclave, já houver pressão na câmara. Quando isso ocorrer, a autoclave emitirá bips continuamente, o display indicará **CICLO CANCELADO** e a autoclave depressurizará;
 - Confirme o cancelamento do ciclo manualmente pressionando a tecla **CANCELA**;
 - Verifique as possíveis causas, tome as providências necessárias para corrigir o problema e efetue um novo ciclo para o reprocessamento dos materiais de acordo com as instruções em "Como Usar a Autoclave Vitale Plus" (Pág. 12). Antes de iniciar o novo ciclo, o operador deverá verificar se houve sobra de água na câmara, que deverá ser retirada manualmente através da porta com o uso de um pano limpo e seco que não solte pelos. **Atenção!** Para sua segurança, lembre-se de usar EPIs (luvas de látex apropriadas). Aguarde pelo menos 15 minutos para iniciar um novo ciclo;

OBS: Nos casos **b** e **c** na página anterior, se houver pressão no interior da câmara, a autoclave exibirá a pergunta:

DES PRESSURIZAR?
IN: SIM CAN: NAO

Pressionando a tecla **Início** a válvula abre para a despressurização, pressionando a tecla **Cancela** a despressurização ocorrerá com a válvula fechada, o que não causará ebulição se houver líquidos no interior de recipientes como no caso de esterilização de líquidos;

2► Havendo a necessidade de interromper/cancelar o ciclo de aquecimento, esterilização ou secagem, basta pressionar a tecla **CANCELA**. Nesse caso, após o bip e a indicação de **CICLO CANCELADO** no display, a autoclave emitirá bips continuamente até que a pressão chegue a 0,0 kgf/cm² e a tecla **Cancela** seja pressionada novamente para confirmar o cancelamento do ciclo (não haverá nenhum efeito se a tecla **Cancela** for pressionada quando ainda houver pressão na câmara);

3► No ciclo **Instrumentos Desembalados**, após a despressurização, a autoclave exibirá a mensagem:

SECAR?
IN: SIM CAN: NAO

Pressione a tecla **Início** para realizar a secagem. Pressionando a tecla **Cancela** não haverá secagem, (esterilização flash). **Importante!** Esta opção deverá ser utilizada somente para uso imediato dos instrumentos.

4► Na autoclave modelo Vitale Plus 21, ao optar pelo ciclo **Kit Cirúrgico**, o estojo deve ser colocado na bandeja central.

REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E SUAS ETAPAS

ATENÇÃO! Antes de iniciar os procedimentos para a esterilização, o operador deverá estar paramentado com luvas de látex grossas com o punho sobre o avental de mangas compridas, avental plástico sobre o convencional, máscara, óculos de proteção, gorro e sapato fechado.

A esterilização necessita de um preparo prévio e faz parte de todo um processo. Sugerimos que o profissional padronize o seu processo. Faça um roteiro por escrito, evitando assim que algum requisito seja esquecido. As etapas de preparo para a esterilização são as seguintes: Imersão; Limpeza; Inspeção Visual; Enxágüe; Secagem; Embalagem/Empacotamento e Acondicionamento; Esterilização; Armazenamento; Monitorização da Esterilização e Validade da Esterilização.

1. IMERSÃO

Imediatamente após o uso, o ideal é que se coloque os instrumentos/artigos em imersão mergulhando-os em uma cuba contendo detergente enzimático (de preferência dupla, com escorredor, conheça a Cuba Plástica para Imersão Cristófoli). Deixe em imersão por 10 minutos, siga sempre as recomendações de diluição e imersão do fabricante. Se os instrumentos estiverem grosseiramente contaminados com matéria orgânica, é recomendado enxaguar-los primeiramente para que eles não inutilizem a solução. Retire-os e proceda então a limpeza manual ou na Cuba de Ultra-som Cristófoli.

Não utilize detergentes comerciais, de uso doméstico, para banhos ou lavagem de instrumentos/artigos, esses produtos podem danificá-los.

Não misture metais diferentes no mesmo banho, pois poderá ocorrer corrosão eletrolítica.

2. LIMPEZA

A limpeza rigorosa de todo o material é um dos fatores básicos para o sucesso na esterilização. A presença de matéria orgânica (sangue, secreções, pus, gordura, óleo ou outro tipo de sujeira), protege os microrganismos, dificultando a esterilização. Limpeza inadequada, ou com produtos incorretos pode danificar o instrumental causando manchas, escurecimento e corrosão.

Os materiais novos (recém adquiridos em lojas), devem passar pelo processo de limpeza antes da esterilização, para remoção de sujeira e produtos químicos, a fim de evitar que fiquem escurecidos, manchados ou amarelados.

Os detergentes enzimáticos são eficientes na remoção de matéria orgânica, porém alguns produtos utilizados na odontologia ficam aderidos aos instrumentos, como o cimento por exemplo, necessitando ação mecânica. A limpeza mecânica (manual) com escova deve ser feita sob imersão para evitar a produção de aerossóis que podem causar danos à saúde (isso acontece quando o procedimento é realizado sob água corrente, embaixo da torneira por exemplo).

O operador deve tomar cuidado ao remover o material aderido aos instrumentos. Evite o uso de esponjas com abrasivos ou palha de aço, pois estes produtos podem danificá-los.

Pode-se utilizar a limpeza automatizada em cubas de ultra-som (conheça a Cuba Plástica para Imersão Cristófoli) que facilitam a retirada de sujeira, sendo especialmente úteis na limpeza de pontas diamantadas, brocas e limas, cujas reentrâncias são inacessíveis às cerdas das escovas.

A limpeza das canetas de alta rotação, contra-ângulos e outras peças de mão devem seguir as recomendações do fabricante, e realizada separadamente do restante do instrumental. A sua lubrificação deve ser anterior à esterilização e com lubrificantes próprios e hidrossolúveis.

3. INSPEÇÃO VISUAL

O operador deve fazer uma inspeção visual de todos o instrumental, verificando as áreas de maior dificuldade de acesso, como cremalheiras (peças dentadas), reentrâncias, ranhuras etc., procedendo à remoção mecânica se necessário.

4. ENXÁGÜE

Enxaguar abundantemente o instrumental. O uso de **água filtrada** para o enxágüe é **altamente recomendado**. A remoção inadequada de desincrustante provoca manchas cinza-escuras no instrumental de maneira irreversível.

5. SECAGEM

Secar o instrumental com campos de algodão, outro tecido que não solte fiapos ou papel toalha. O instrumental pode ser seco em uma estufa especialmente regulada para este fim (50° C). Não deixe o instrumental secar naturalmente, além do risco operacional, isso pode causar manchas.

6. MATERIAIS, EMBALAGEM, EMPACOTAMENTO E ACONDICIONAMENTO

6.1 Recomendações sobre os tipos de embalagens e materiais a serem usados na autoclave

Antes de levar qualquer instrumental/artigo para autoclave, verifique com o fabricante do mesmo se isto é possível. Usualmente as embalagens trazem a indicação de resistência até **135 °C**, ou o símbolo .

Gaze e algodão: Devem ser embalados em **porções individuais** para cada paciente.

Campos, capotes e tecidos em geral: Devem ser embalados **individualmente**.

Materiais pequenos e/ou leves: Materiais como **cânulas, limas e anéis de identificação de silicone** devem ser **obrigatoriamente** embalados de forma adequada (envelopes de esterilização), pois podem se perder durante o processo, causando obstrução da válvula e tubulação da autoclave.

Brocas e limas: Atualmente existem embalagens apropriadas para brocas e limas, que as protegem no processo de esterilização. Outra opção são os envelopes de papel grau cirúrgico. Brocas de aço carbono são impróprias para serem esterilizadas em autoclaves. Ao adquirir brocas novas, lembre-se de lavá-las antes de autoclavar.

Caixas e bandejas: Devem ser **totalmente perfuradas** de modo a permitir a circulação de vapor e facilitar a secagem. Estas podem ser embaladas em papel grau cirúrgico, papel crepado ou campos de algodão, conforme as especificação mais adiante. A utilização de caixas não é obrigatória, porém protegem a integridade da embalagem e o instrumental, uma vez que muitos são pérfuro-cortantes.

Para esterilizar bandejas não perfuradas, coloque-as separadas do instrumental, com espaços entre as mesmas para permitir a circulação de vapor.

Pacotes: Devem ser **pequenos e compatíveis com os atendimentos** (jogo clínico, jogo de periodontia, etc.), evitando o reprocessamento desnecessário dos materiais não utilizados. Devem também ser **bem confeccionados e lacrados cuidadosamente** para que não se rompam durante o processo de esterilização, causando obstrução nas saídas de vapor, comprometendo a esterilização e causando danos ao equipamento. Retire o excesso de ar dos pacotes, pois ele dificulta a entrada do vapor.

Pontas de instrumentos pérfuro-cortantes: Sondas exploradoras, sondas milimetradas, material de periodontia, etc. Deverão ser protegidas com gaze ou algodão para evitar que furem os pacotes, inutilizando-os.

6.2 Tipos de Embalagens para Esterilização em Autoclave

Campos de Algodão: Os pacotes feitos com campos de algodão (40 fios por cm²) devem ser duplos. Este material tem a vantagem de não ser descartável, porém exige maior disponibilidade no tempo do empacotamento e lavagem a cada ciclo para recompor a disposição das fibras e após perderem 10% do seu peso, devem ser desprezados para este fim. Verificar visualmente a sua integridade, pois é incorreto cerzir os orifícios. A barreira microbiana é da ordem de 35%, quando o tecido é novo.

Embalagens e Envelopes (papel grau cirúrgico + filmes laminados e polipropileno): Embalar os artigos diretamente em envelopes especialmente confeccionados para este fim. A barreira microbiana deste material é acima de 90%. Tem a vantagem de verificação visual do instrumental e de possuir indicadores químicos de processo. A sua correta abertura proporciona um campo estéril para colocação do instrumental. Os rolos ou tubulares possuem uma grande variedade de larguras e dobras laterais que permitem a acomodação de caixas. Para o fechamento, utilize seladora que forneça um selamento adequado (maior que 6 mm). A APECIH (2003) recomenda que a borda de selagem seja de 10 mm de largura, com distância de 3 cm do corte. Este selamento pode ser simples, duplo ou triplo. Não utilize fita para autoclave na selagem do envelope, este procedimento pode comprometer a integridade da embalagem e conseqüentemente da esterilização. **A sua reutilização é proibida.**

Obs: Recomendamos a utilização das embalagens produzidas dentro dos padrões da EN 868 e/ou NBR 13386/95.

Papel crepado: A vantagem do papel crepado é ser mais resistente que o papel grau cirúrgico, pois a

embalagem é dupla. Possui barreira microbiana acima de 90%. São vendidos em folhas e possuem como desvantagem a necessidade de confecção dos pacotes e colocação de fita apropriada. São de uso único e mais indicados para caixas volumosas.

Filmes Plásticos Transparentes: Existe no mercado uma grande variedade de polímeros termoplásticos, com a finalidade de embalar artigos odonto-médico-hospitalares. Até o presente momento, esse tipo de material não é indicado para esterilização, pois dificultam o processo de secagem relatado nos testes realizados na fábrica e também baseada nas considerações apresentadas por BERGO na APECIH (2003).

Caixas perfuradas próprias para autoclave: Podem ser encontradas em inox ou plástico resistente à autoclavação. Aqui se encaixam também os broqueiros e porta-limas que também devem ser específicos para autoclave. Algumas vezes, as caixas para brocas comportam a colocação de broqueiros em seu interior. O cirurgião-dentista deverá avaliar se é o melhor método, evitando múltiplas embalagens. De todo modo, as caixas não eliminam o posterior recobrimento com barreira microbiana representada pelos materiais citados acima (campo de algodão, papel grau cirúrgico, ou papel crepado). O profissional que estiver fazendo uso de autoclavação para uso imediato poderá prescindir do invólucro final, lembrando que todas as medidas de controle devem ser tomadas, e é aconselhável **somente para materiais semi-críticos**.

Ao adquirir material de embalagem certifique-se do registro no Ministério da Saúde.

Outras opções: A indústria e comércio oferecem novos produtos a cada dia, portanto se algum novo material estiver disponível, verifique custos/benefícios e se foi confeccionado para esta finalidade, além de ter registro no órgão competente. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante.

Nunca improvise embalagens (BRASIL 2006). As embalagens para esterilização de artigos odonto-médico-hospitalares seguem padrões de qualidade que garantem a penetração de vapor, ausência de contaminantes e a manutenção da esterilização durante o armazenamento.

ADVERTÊNCIA: Materiais do tipo não-tecido, “wraps” e similares, embora confeccionados e com registro no Ministério da Saúde, não são indicados para autoclaves gravitacionais.

NOTA - O papel kraft (branco e pardo) é **contra-indicado pela ANVISA** (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Este papel não é fabricado para fins de esterilização, e apesar de não ter uma avaliação detalhada como invólucro para artigos hospitalares, possui diversas desvantagens, tais como irregularidade e inconstância na gramatura, o que compromete a resistência física, tornando-o vulnerável como barreira microbiana. Além disso, é freqüente a presença de amido, corantes e outros produtos tóxicos que podem se depositar sobre os artigos, deixando manchas. O papel kraft pardo pode apresentar na sua composição alquiltiofeno, que durante a fase de esterilização pelo vapor pode ser arrastado, gerando odor extremamente desagradável, causando náusea e cefaléia nos indivíduos expostos. Apesar disso, este papel ainda é citado como invólucro em portaria da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (1994). **A APECIH não recomenda o seu uso para fins de esterilização**, pois, além de todas as desvantagens apresentadas, durante o ciclo de esterilização, o papel kraft solta fiapos que podem obstruir as válvulas e tubulações da autoclave.

6.3 Técnica para empacotamento de instrumental e outros materiais

Há uma técnica para empacotamento de instrumental e/ou artigos para o processo de esterilização em autoclave que poderá ser em campo de tecido duplo ou papel crepado duplo, deve-se obedecer a seqüência apresentada na execução de suas dobras, conforme demonstrado na página seguinte (Fig. 21).

Esta sequência na execução das dobras não é meramente por acaso. Tem a finalidade de facilitar ao profissional o manejo na hora de seu uso e evitar a contaminação ao abrir o pacote.

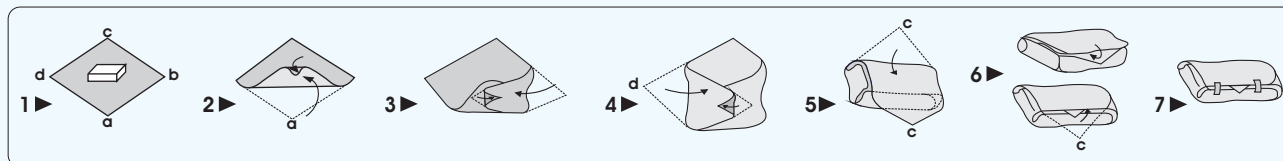


Fig.21

- 1► Colocar o artigo no centro do invólucro, em posição diagonal;
- 2► Fazer a dobra "a" e uma pequena dobra na ponta do invólucro, cobrindo totalmente o material;
- 3► Fazer a dobra "b" e uma pequena dobra na ponta do invólucro;
- 4► Repetir o mesmo procedimento na ponta "d";
- 5► Trazer a ponta "c" do invólucro em direção ao operador;
- 6► Pegar a ponta "c" do invólucro e introduzir sobre as dobras realizadas, deixando a ponta para fora do pacote para facilitar sua abertura e evitar contaminação na hora de abrir;
- 7► Lacrar o pacote com fita crepe própria para esterilização (indicador de processo). Identificar o pacote, anotando os artigos contidos e o responsável pela esterilização.

OBS: Ao utilizar os envelopes para esterilização, os mesmos devem ser acomodados nas bandejas da autoclave com o lado de papel para cima (Fig. 23), isso facilita a evaporação do vapor resultando em uma secagem rápida e eficiente. Conheça também o suporte para envelopes Cristófoli (Fig. 24) que além de facilitar a secagem, otimiza a capacidade interna da autoclave podendo comportar entre 13 pacotes (1 suporte) e 26 pacotes (2 suportes) dependendo da capacidade da autoclave.

ERRADO - Envelopes com o lado plástico p/cima

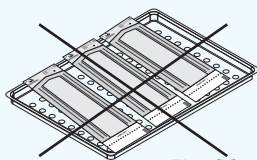


Fig.22

CORRETO - Envelopes posicionados com o lado de papel p/ cima

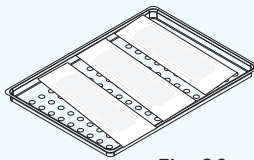


Fig.23

Suporte para envelopes Cristófoli
(acessório vendido separadamente)

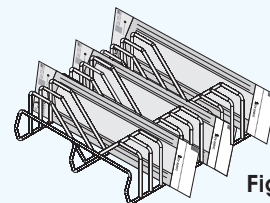


Fig.24

6.4 Recomendações para Melhor Acondicionamento do Material na Autoclave

IMPORTANTE: Use no máximo três barreiras para embalagem. Por exemplo: envelopes em papel grau cirúrgico contendo brocas, dentro de uma caixa perfurada contendo também instrumental, envolvida em papel grau cirúrgico.

- 6.4.1►** Disponha os pacotes paralelamente uns aos outros, com espaços de pelo menos um centímetro, entre um e outro. Este cuidado favorece a circulação de vapor e facilita a secagem;
- 6.4.2►** A padronização de abastecimento da câmara da autoclave, deve ser baseada em monitorização (Item 8, pág. 21). O abastecimento deve ser de até 75% da capacidade da câmara da autoclave, ou seja, 5 envelopes para Vitale Plus 12 ou 13 envelopes com o uso do suporte e 12 envelopes para o modelo Vitale Plus 21 ou ainda 13 pacotes com o uso do suporte para envelopes. A Vitale Plus 21 comporta dois suportes simultaneamente, podendo esterilizar até 26 envelopes por ciclo (envelopes 9 x 26 cm contendo 6 instrumentos cada);
- 6.4.3►** Não encoste campos, plásticos ou qualquer outro tipo de material nas paredes da autoclave, pois existe o risco de excesso de aquecimento e conseqüente dano ao artigo e/ou à câmara, além de dificultar a passagem de vapor, podendo inviabilizar a esterilização e/ou a secagem;
- 6.4.4►** Certifique-se que tanto os artigos, quanto o material de embalagem são adequados para o processo de esterilização em autoclave e possuam registro no Ministério da Saúde.
- 6.4.5► Instrumental desembalado:**
- Utilize os instrumentos desembalados **imediatamente após** a sua esterilização para evitar contaminação. Este procedimento não deve ser rotineiro e é utilizado excepcionalmente para artigos semi-críticos para uso imediato;
 - Ao acomodar os instrumentos desembalados diretamente na bandeja perfurada da autoclave, intercale-os com campos de tecido ou papel crepado para evitar a formação de corrente galvânica;
 - **Nunca** esterilize artigos pequenos sem embalagem.
- 6.4.6► Não coloque** material quente, recém saído da autoclave, sobre superfícies frias, isto poderá condensar o vapor dentro dos pacotes. Para manipulá-los, forre a superfície com campo duplo de preferência estéril.
- 6.4.7►** Ao abastecer e/ou retirar os materiais da autoclave, **manuseie-os com cuidado** para evitar o rompimento dos pacotes.
- 6.4.8►** Se estiver utilizando papel grau cirúrgico, coloque o pacote com a parte de papel voltada para cima, evitando a sobreposição total dos pacotes.

7. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESTÉRIL

O ideal é o armazenamento em armários revestidos de fórmica fechados com prateleiras aramadas e exclusivos para esta finalidade. Os armários devem ser de fácil limpeza (a ser realizada **semanalmente**), em local seco e arejado, livre de odores e umidade. Jamais embaixo de pias perto de conexões da rede de água e/ou esgoto.

8. MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

A monitorização nada mais é que o controle da esterilização. Se todos os indicadores aprovam o ciclo, significa que a autoclave foi corretamente manuseada. Para tanto utilizamos parâmetros físicos, químicos e biológicos.

a) Físicos - Tempo e pressão de acordo com o estabelecido por este manual, que necessitam ser observados pelo operador e devidamente registrados para todos os ciclos.

b) Químicos - Indicadores de processo (fitas zebradas e indicadores dos envelopes) são indicadas para utilização em

todos os pacotes. Estes não asseguram a esterilização, apenas evidenciam que aquele pacote passou pelo processo. Hoje, a indústria fornece uma variedade de indicadores multiparamétricos que avaliam mais de um fator de esterilização, como por exemplo, tempo e temperatura. Outros mais sofisticados integram tempo, temperatura e presença de vapor. Idealmente devem ser utilizados em todos os ciclos, ou pelo menos diariamente. Os testes realizados pela Cristófoli demonstraram que o ponto ideal para colocar o pacote teste é a prateleira superior, na região frontal (próximo da porta). Atenção na hora da compra de indicadores químicos, pois embora a maioria deles sejam confiáveis, alguns são específicos para determinados ciclos. Em caso de dúvida entre em contato com a consultoria em Biossegurança da Cristófoli, ver site www.cristofoli.com.

c) Biológicos - O Ministério da Saúde (BRASIL, 2000) recomenda o uso dos indicadores biológicos semanalmente, na instalação e manutenção da autoclave e também em todas as cargas que contenham artigos implantáveis. Os indicadores biológicos para autoclaves a vapor são esporos de *Geobacillus stearothermophilus*, geralmente autocitados, devendo o usuário seguir as indicações do fabricante do teste para assegurar a sua validade. Existem laboratórios de microbiologia que prestam este tipo de serviço, como por exemplo o Instituto Adolfo Lutz. Para sua segurança todos os testes devem ser documentados e arquivados. Os custos para as medidas de controle, tais como testes químicos e biológicos são de inteira responsabilidade do proprietário da autoclave.

9. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO

A recomendação da validade de esterilização, tanto da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1995), como do Ministério da Saúde (BRASIL, 2000, 2006) para autoclaves a vapor é de **7 dias**. Existe a possibilidade de validação para tempos maiores, mas devido aos custos e dificuldades no processo, são realizados apenas em centrais de esterilização de hospitais. A validação no local é também recomendada pela ANVISA (BRASIL 2006), mas ainda é de difícil execução na prática quando se trata de serviços de saúde de menor porte como consultórios odontológicos e médicos.

Este período de validade deve ser considerado desde que os pacotes tenham saído secos do processo de esterilização a vapor e armazenados em condições adequadas, isto é, com temperatura de 18 a 22 °C e umidade relativa do ar de 35 a 50% para embalagens íntegras.

COMO EVITAR MANCHAS SUPERFICIAIS E/OU CORROSÃO NO INSTRUMENTAL

As manchas nos instrumental podem ter várias origens que podem ocorrer simultaneamente, o que dificulta a identificação das causas.

As causas mais comuns são a utilização de água com impurezas (não destilada) e instrumental de qualidade inferior ou impróprio para autoclavação.

MANCHAS SUPERFICIAIS

- 1► Manchas superficiais em formato circular sem contorno definido são causadas pela secagem incorreta do instrumental antes do empacotamento;
- 2► Manchas de coloração amarelada ou marrom-escuras, localizadas nas extremidades de instrumentos (não confundir com manchas de ferrugem) são causadas pela pré-lavagem inadequada e permanência de matéria orgânica;
- 3► Manchas de cor amarela por toda a superfície do instrumento são causadas pelo superaquecimento durante o processo de esterilização;

- 4► Manchas de cor cinza-azuladas são causadas pela remoção inadequada das substâncias químicas e/ou detergentes;
- 5► Manchas de cor cinza-escuras são causadas pela remoção inadequada de desincrustantes. Este tipo de mancha é irreversível.

CORROSÃO

Pontos de corrosão são os danos mais freqüentes, ocasionam a quebra do instrumental e tem sua origem por íons halógenos de soluções salinas, cloretos, iodo, resíduos de fluidos/secreções corporais, detergentes, desincrustantes e soluções desinfectantes sujas ou alteradas;

Outro fator determinante é a qualidade do instrumental. Certifique-se que o material que você esteja adquirindo ou usando é efetivamente correto para as diversas finalidades propostas.

Existe no mercado um protetor de instrumentos, removedor de manchas e oxidação (Surgi-Stain), recomendado por Guandaline (1999). O mesmo autor indica a lubrificação posterior com um óleo mineral (Premix-Slip).

POSSÍVEIS FALHAS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

- 1► Presença de ar residual na câmara e/ou no interior do pacote;
- 2► Confecção de pacotes densos e grandes;
- 3► Embalagens inadequadas (composição do material) para a esterilização em autoclave;
- 4► Tempo insuficiente de exposição ao agente esterilizante;
- 5► Manejo incorreto do aparelho;
- 6► Obstrução dos orifícios internos e/ou saída de vapor por falta de limpeza diária do equipamento;
- 7► Falta de supervisão rotineira e manutenção do equipamento;
- 8► Sobrecarga da autoclave, o abastecimento deve ser de até 75% da capacidade da câmara da autoclave, ou seja, 5 envelopes para Vitale Plus 12 ou 13 envelopes com o uso do suporte e 12 envelopes para o modelo Vitale Plus 21 ou ainda 13 pacotes com o uso do suporte para envelopes. A Vitale Plus 21 comporta dois suportes simultaneamente, podendo esterilizar até 26 envelopes por ciclo (envelopes 9 x 26 cm contendo 6 instrumentos cada). As medidas de uso devem ser padronizadas em cada ciclo e para todos os consultórios. Para esta padronização consulte "Monitorização do Processo de Esterilização" (Item 8, pág. 21).
- 9► Rompimento das embalagens durante o abastecimento ou retirada dos materiais da autoclave;
- 10► Falta de manutenção preventiva da autoclave;
- 11► Escolha inadequada do ciclo de esterilização perante o material a ser esterilizado;
- 12► Falha do equipamento, que deve ser observada pelo operador durante o ciclo.

ATENÇÃO - As falhas na esterilização são detectadas durante a monitorização.

CONTROLE DE QUALIDADE

Os equipamentos são testados e monitorados individualmente, conforme os parâmetros da Tabela 6, abaixo. Além dos parâmetros físicos, todas as autoclaves são testadas com emuladores químicos classe 6. Os testes com indicadores biológicos são realizados por amostragem de lote.

Modo	Tempo de Aquecimento	Temperatura e Pressão de Esterilização	Tempo de Esterilização	Tempo de Secagem
1- Instrumental Embalado	10 a 35 min	134 °C / 216 kPa (2.2 kgf/cm²)	10 min	35 min
2- Instrumental Desembalado	10 a 35 min	134 °C / 216 kPa (2.2 kgf/cm²)	6 min	30 min
3- Kit cirúrgico	8 a 35 min	121 °C / 118 kPa (1.2 kgf/cm²)	18 min	50 min
4- Plásticos e Algodão	8 a 35 min	121 °C / 118 kPa (1.2 kgf/cm²)	18 min	40 min
5- Tecidos	8 a 35 min	121 °C / 118 kPa (1.2 kgf/cm²)	30 min	40 min
6- Líquidos	8 a 35 min	121 °C / 118 kPa (1.2 kgf/cm²)	30 min	- - - -
Temperatura Máxima de Secagem: 120 °C				

Obs: Os valores do tempo de aquecimento expressos levam em consideração as informações na tabela de dados técnicos (Tabela 7, pág. 30) com relação à faixa de temperatura de trabalho adequada.

Tabela 6

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para o melhor funcionamento e durabilidade da sua autoclave são necessários alguns procedimentos, a manutenção preventiva corresponde à **realização de todos os procedimentos abaixo** relacionados:

- 1► Use somente água destilada;
- 2► Mantenha a autoclave limpa. Para **câmara de alumínio**, lave a câmara internamente com água destilada, detergente neutro e uma esponja de fibra sintética **abrasiva**, opcionalmente utilize uma esponja de aço inox para dar brilho;
- 3► Para a limpeza da **câmara de aço inox**, utilize uma esponja macia **não abrasiva** com detergente neutro e água destilada, para remover a espuma use um pano que não solte pêlos ou fiapos. Finalize a limpeza com álcool 70%;
- ATENÇÃO!** Para a limpeza das bandejas de alumínio anodizado, utilize somente um pano umedecido em álcool 70%. A utilização de outros materiais e/ou produtos poderão riscar ou danificá-las;
- 4► A limpeza externa deve ser realizada diariamente com pano macio e detergente neutro, em seguida limpe-a completamente com um pano umedecido em álcool 70%. O fecho deve ser limpo da mesma maneira antes de cada remoção dos materiais da autoclave após a esterilização;
- 5► Limpar o anel de vedação **semanalmente** com um pano limpo que não solte fiapos umedecido com água. Substitua o anel de vedação de sua autoclave **semestralmente**;
- 6► Faça a manutenção preventiva da válvula VSPF **semestralmente** (que consiste na troca da válvula de segurança interna e compreende o selo e o pino), substitua o filtro de ar da válvula VSPF **mensalmente**.
- 7► Troque a pasta térmica das resistências **semestralmente**;
- 8► Recomendamos a limpeza mensal de sua autoclave com um produto desincrustante (*Clean Plus*) que foi testado pela Cristófoli com sucesso, promove a limpeza da câmara e válvulas internas e pode ser adquirido através da Rede de Assistência Técnica da Cristófoli. O procedimento de limpeza é descrito na página seguinte.

Procedimento para a utilização do *Clean Plus*:

- Retire as bandejas e o suporte de bandejas de dentro da câmara da autoclave;
- Coloque o produto em um copo com a quantidade de água necessária para a execução de um ciclo normal, de acordo com o modelo da autoclave (150 ml p/ 12 litros e 250 ml p/ 21 litros) com o acréscimo de 50 ml;
- Depois de adicionar a água ao *Clean Plus*, dissolva até que o produto esteja homogêneo e coloque-o na câmara da autoclave, se for observado que há resíduos não dissolvidos no fundo do copo, **não os utilize**, descarte-os, **utilize somente o que foi diluído**;
- Ligue a autoclave para a realização de um ciclo completo. Assim que a autoclave finalizar a esterilização, **cancele a secagem imediatamente, nunca permita que a autoclave entre no ciclo de secagem durante um ciclo de limpeza**;
- Espere a autoclave esfriar e limpe-a adequadamente como descrito anteriormente;
- Realize um novo ciclo sem as bandejas, suporte ou instrumentos, utilizando apenas água destilada, cancele a secagem novamente. Assim, o processo de limpeza estará finalizado.

COMO IDENTIFICAR SUA AUTOCLAVE

O rótulo metálico que se encontra na parte posterior do equipamento, tem por finalidade a identificação dos dados técnicos da autoclave.

ATENÇÃO - A remoção do rótulo de identificação e/ou quaisquer etiquetas ou adesivos afixados ao produto implicará na perda automática da garantia.

CRISTÓFOLI
EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA
ROD BR 158 Nº 127 - CAMPO MOURÃO - PR - BRASIL
CEP 87309-650 - FONE: 55-44: 3518 - 3432
CNPJ 01.177.248/0001-95 - INSCR. EST. 90.104.860-65
INDÚSTRIA BRASILEIRA / MADE IN BRAZIL

SN

01	02	03	04	05	06	2007
07	08	09	10	11	12	2008

LOT

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

MODELO / MODEL ☐ ALLUM. ☐ ACO INOX / STAINLESS STEEL

POTÊNCIA / POWER / POTENCIA

- Brasil/Brazil

127V -- 1,2 kW - 10A	☐
220V -- 1,2 kW - 6A	☐
127V -- 1,6 kW - 12A	☐
220V -- 1,6 kW - 8A	☐

- Europa / Europe

230V -- 1,2 kW - 10A	☐
230V -- 1,6 kW - 8A	☐

REGISTRO ANVISA / ANVISA REGISTER
10363350005

CAPACIDADE / CAPACITY / CAPACIDAD
☐ 12 L ☐ 21 L

TEMPO MÁXIMO DE AQUECIMENTO / MAXIMUM HEATING TIME / TIEMPO MÁXIMO DE CALENTAMIENTO 35 Min.

CONFORMIDADE / CONFORMITY / CONFORMIDAD
NBR 11817 / STANDARD - NBR 11817

PRESSÃO MÁXIMA / MAXIMUM PRESSURE / PRESIÓN MÁXIMA 280 kPa

FREQUÊNCIA / FREQUENCY / FRECUENCIA 50/60 Hz

RESPONSÁVEL TÉCNICO / RESPONSIBLE TECHNICIAN / RESPONSABLE TÉCNICO
ENG. MARCOS FUCHS - CREA/PR - 70700/D

PRODUTO: AUTOCLAVE CRISTÓFOLI PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.
PRODUCT: CRISTÓFOLI STEAM STERILIZATION AUTOCLAVE.
PRODUCTO: AUTOCLAVE CRISTÓFOLI PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR.

INSTRUÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO: CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES.
USE INSTRUCTIONS, PRECAUTIONS, CONSERVATION AND STORAGE: SEE INSTRUCTION MANUAL.
INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES, CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Fig.25

Obs: O rótulo aqui apresentado é somente um modelo para referência.

GRÁFICOS TEMPO X PRESSÃO

Ciclo de Pressão Baixa

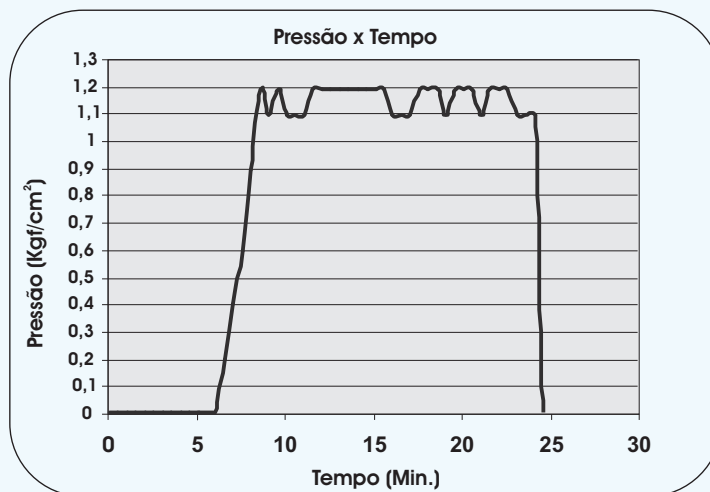


Gráfico 1

Ciclo de Pressão Alta


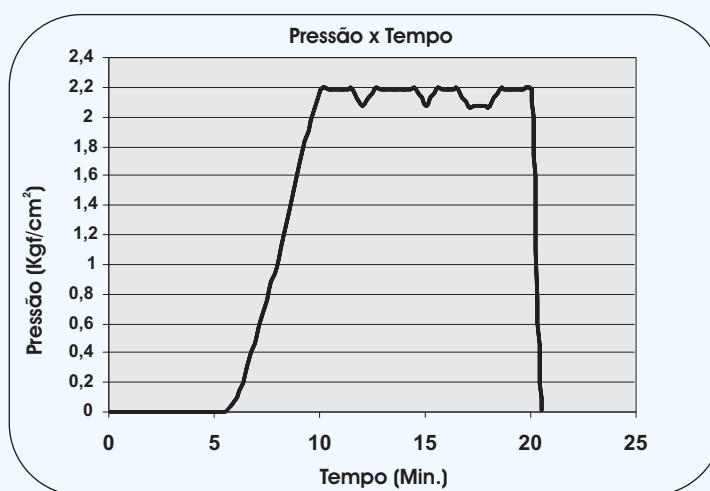



Gráfico 2

ESQUEMA ELÉTRICO

Posição dos fios no circuito eletrônico

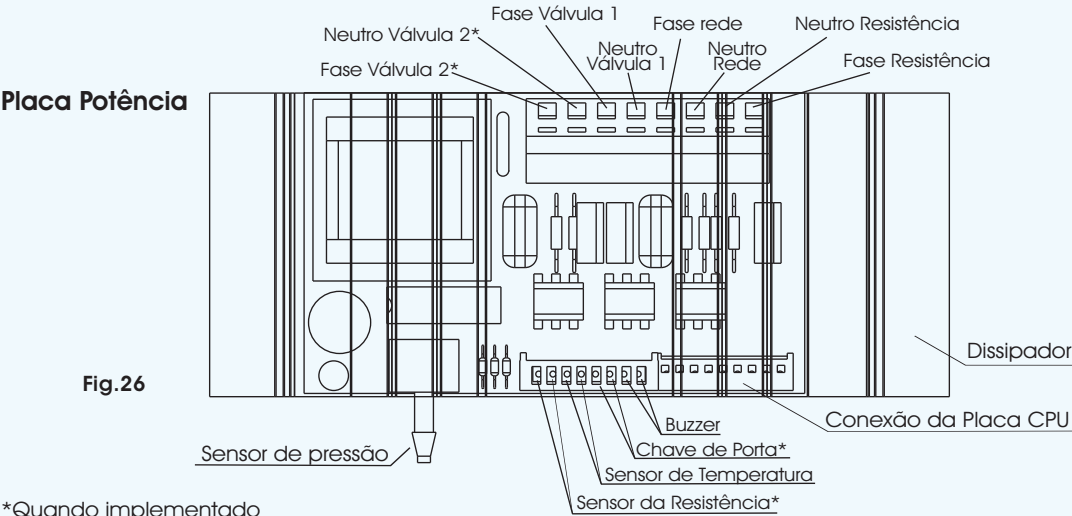

*Quando implementado

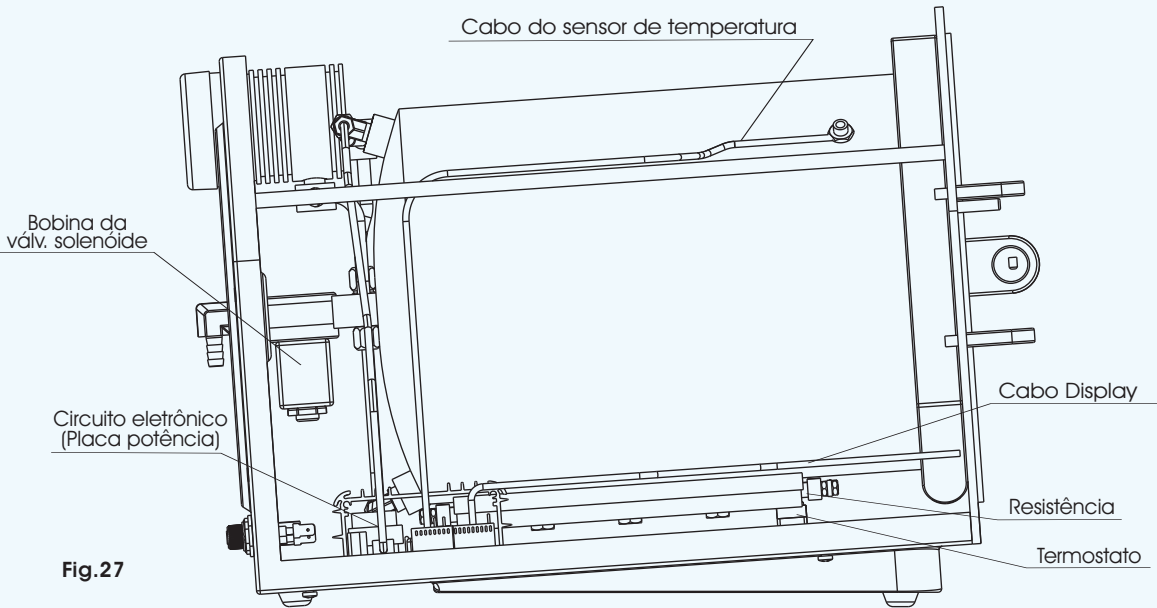

ESQUEMA HIDRÁULICO

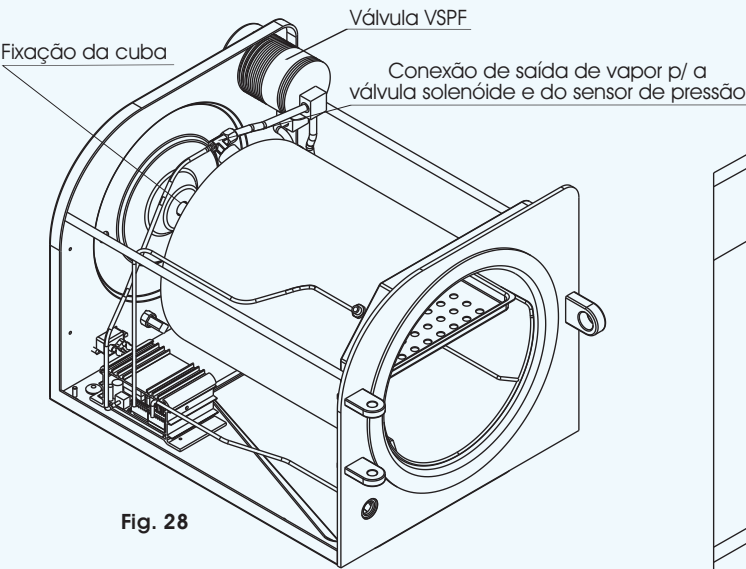


Fig. 28

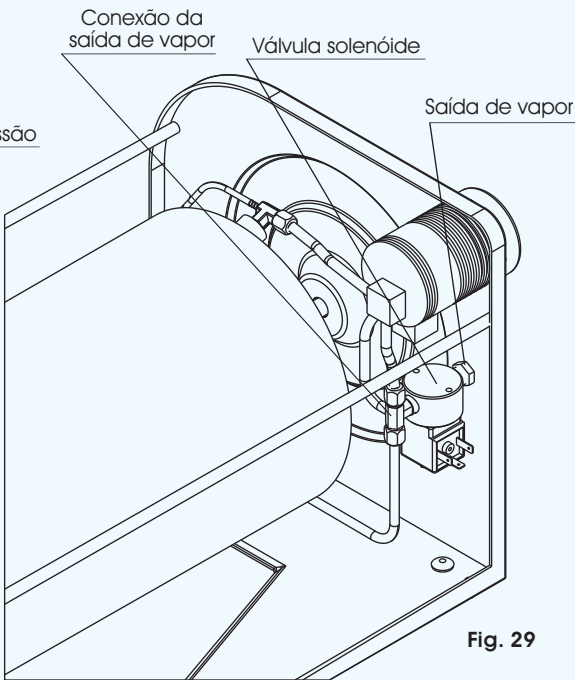


Fig. 29

RESOLVENDO PEQUENOS PROBLEMAS

ATENÇÃO! Para qualquer substituição de peças contatar o fabricante ou a Assistência Técnica Autorizada. Não recomendamos a troca de peças por pessoas não habilitadas para este fim.

Relacionamos a seguir os problemas mais freqüentes e as possíveis soluções que poderão ser realizadas pelo usuário:

A AUTOCLAVE NÃO LIGA

POSSÍVEIS CAUSAS

- Falta de energia elétrica -----
- O cabo de energia não está conectado na rede elétrica ou na parte posterior da autoclave -----
- Tecla **Início** não foi mantida pressionada por 2 segundos para ligar o equipamento -----
- Queima de fusível -----
- Circuito eletrônico com defeito -----

SOLUÇÃO

- Verifique se há queda de energia em sua área/local de trabalho;
- Conecte o cabo adequadamente onde necessário;
- Manter a tecla Início pressionada por 2 segundos até que seja exibida as informações iniciais (marca, modelo, versão do software);
- Troque o fusível próximo ao conector de energia, consulte "Instruções de Instalação", (Pág. 7 e Fig. 1, pág.8);
- Consulte a assistência técnica autorizada;

Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

A AUTOCLAVE LIGA, MAS NÃO AQUECE

POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
• O operador ligou a autoclave mas não pressionou a tecla Início -- • Não há acionamento ao apertar a tecla início ----- • Queima da resistência ----- • Termostato com defeito ----- • Queima do circuito eletrônico -----	• Aperte a tecla Início após a seleção do ciclo na tecla Modo; • Consulte "<i>Como Usar a Autoclave Vitale Plus</i>" (Pág. 12); • Consulte a Rede de Assistência Técnica Autorizada (Pág. 35);

Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

A PRESSÃO DA AUTOCLAVE SOBE EXCESSIVAMENTE, ACIONANDO OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
• Obstrução parcial da válvula solenóide ----- • Circuito eletrônico com defeito ----- • Obstrução da mangueira localizada na saída externa de vapor --	• Consulte a Rede de Assistência Técnica Autorizada (Pág. 35); • Retire a mangueira localizada na saída externa de vapor e desobstrua-a. ATENÇÃO! Nunca utilize mangueira de plástico comum, consulte "<i>Instruções de Instalação</i>" tópico "<i>Instalação Hidráulica</i>" (Pág. 8);

Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

A AUTOCLAVE DEMORA PARA ATINGIR PRESSÃO OU NÃO A MANTÉM INDICANDO CICLO CANCELADO

POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
• Voltagem ou amperagem elétrica menor do que a consumida pela autoclave ----- • Vazamento de pressão/vapor através da válvula VSPF ----- • Vazamento de pressão/vapor através do anel de vedação ----- • Câmara sobrecarregada -----	• Consulte um eletricista para a adequação da rede, com o acompanhamento de um atendente do CAC pelo fone 0800-44-0800. Consulte "<i>Instruções de Instalação</i>" (Pág. 7); • Consulte a Rede de Assistência Técnica Autorizada (Pág. 35); • Faça a manutenção preventiva (Pág. 24); • Não coloque mais instrumentos do que o especificado. O abastecimento deve ser de no máximo 75% da capacidade da câmara da autoclave, ou seja, 5 envelopes para Vitale Plus 12 ou 13 envelopes com o uso do suporte e 12 envelopes para o modelo Vitale Plus 21 ou ainda 13 pacotes com o uso do suporte para envelopes. A Vitale Plus 21 comporta dois suportes simultaneamente, podendo esterilizar até 26 envelopes por ciclo (envelopes 9 x 26 cm contendo 6 instrumentos cada). Lembre-se de deixar pequenos espaços entre os envelopes para permitir uma boa circulação do vapor e otimizar a secagem;

Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

DADOS TÉCNICOS

TABELA DE DADOS TÉCNICOS	Vitale Plus 12 litros	Vitale Plus 21 litros
CERTIFICAÇÕES.....	As Autoclaves Vitale Plus são equipamentos fabricados pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-059), atendendo também a ISO 14001:2004 - Gestão Ambiental.	
CAPACIDADE.....	12 litros	21 litros
PESO.....	Alum. - 18,2 kg (incluindo componentes de uso exclusivo) Inox - 20,1 kg (incluindo componentes de uso exclusivo)	Alumínio - 26.9 kg (incluindo componentes de uso exclusivo) Inox - 30kg (incluindo componentes de uso exclusivo)
PESO POR ÁREA DE SUPORTE (N/m²).....	42,9 N/m²	45,9 N/m²
ESPAÇO LIVRE TOTAL.....	10 cm para cada lado da autoclave	10 cm para cada lado da autoclave
ESPAÇO LIVRE NECESSÁRIO PARA O MOVIMENTO DA PORTA.....	34 cm	40 cm
DIMENSÕES INTERNAS DA CÂMARA (D x P)	22 x 33 cm	25 x 46,5 cm
DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE (D x A x P) ...	33,5 x 33 x 48,5 cm	39,5 x 38 x 61 cm
VOLTAGEM (Brasil).....	127 ou 220V AC	127 ou 220V AC
(Europa).....	230V AC	230V AC
FREQUÊNCIA.....	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA.....	1200 Watts	1600 Watts
CONSUMO ELÉTRICO.....	285 Watts por ciclo	500 Watts por ciclo
PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA	0 a 4 kgf/cm²	0 a 4 kgf/cm²
TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA	100°C a 152°C	100°C a 152°C
TEMPERATURA DA ÁGUA DRENADA.....	100°C	100°C
CALOR TOTAL EM JOULES TRANSMITIDO EM UMA HORA.....	771 KJ	1.672 KJ
FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA..	15°C a 40°C	15°C a 40°C
ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA.....	Até 3500 m	Até 3500 m

* Caso a altitude e/ou temperatura do seu local de trabalho seja diferente dos valores mencionados neste manual, entre em contato com a Cristófoli pelo e-mail: cristofoli@cristofoli.com. **Tabela 7**

CERTIFICADO DE GARANTIA

- A **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA**, garante por 2 (dois) anos as autoclaves Vitale Plus contra quaisquer defeitos de fabricação, a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
- As despesas de instalação/locomoção e/ou estada do técnico para a instalação e/ou assistência técnica serão de responsabilidade do comprador/proprietário, bem como as despesas de frete para o envio de equipamento (s) para conserto na fábrica ou para a Assistência Técnica Autorizada, ou ainda no caso de envio de peças.
- A **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA**, não se responsabiliza por danos causados por materiais não autoclaváveis ou desgastes naturais sofridos por materiais de baixa resistência à autoclavagem.
- A garantia não cobre danos provocados pelo uso indevido do equipamento, negligência, falta de realização de qualquer item que conste no tópico “*Manutenção Preventiva*” (Pág. 24), custos com testes biológicos, acidentes, instalação inadequada e/ou ligação em voltagem errada e reparos efetuados por pessoas não autorizadas pela **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA**.
- O anel de vedação, fusível, suporte de bandejas, copo dosificador, bandejas e cabo de energia não fazem parte desta garantia. A câmara e a válvula solenóide perdem a garantia quando não se utiliza água destilada ou quando partes dos instrumentos ou resíduos de embalagens se soltam dentro da câmara obstruindo a válvula. A garantia cobrirá a válvula VSPF **desde que seja respeitada a manutenção preventiva semestral (troca da válvula de segurança interna que compreende o selo e o pino) e troca mensal do filtro de ar da válvula VSPF**.

ATENÇÃO! O desrespeito a qualquer recomendação de uso e manutenção da autoclave contidas neste manual, acarretará no cancelamento imediato desta garantia.

COMO PROCEDER EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS

Antes de realizar o contato tenha sempre à mão o modelo do seu equipamento, voltagem, número de série e data de fabricação (que se encontram na etiqueta de identificação localizada na parte posterior do equipamento conforme mostrado na Pág. 8, Fig. 1 e Pág. 25, Fig. 25) e uma descrição do problema. Contate então a Cristófoli através do **CAC - Central de Atendimento ao Cliente** pelo telefone 0800-44-0800 ou (44) 3518-3434 ou ainda pelo Fax: (44) 3518-3437 para uma avaliação e eventual reparo do seu equipamento.

Para facilitar seu atendimento, enviar para o endereço abaixo somente uma cópia da nota fiscal se o “*Formulário de Registro de Garantia do Produto*” (formulário avulso que acompanha o produto) já foi enviado à Cristófoli.

Caso contrário, preencha e envie-o imediatamente, junto com uma cópia da nota fiscal, ou ainda, faça uma cópia do “*Formulário de Garantia*” na página 32, preencha-o, anexe uma cópia da nota fiscal e envie para o endereço abaixo:



CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.
Rod. BR 158, nº127 - Campo Mourão - PR - Brasil.
CEP 87309-650

CNPJ 01.177.248/0001 - 95 - Inscr. Est. 90104860-65
Website: www.cristofoli.com - e-mail: cristofoli@cristofoli.com

FORMULÁRIO DE GARANTIA

NOME		
ESPECIALIDADE		
CNPJ/CPF	E-MAIL	
ENDEREÇO		
BAIRRO	CIDADE	UF
CEP	FONE	FAX
Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO	/ /
REVENDEDOR		
MODELO	Vitale Plus 12 ☐ Vitale Plus 21 ☐	VOLTAGEM
Nº SÉRIE / LOTE	DATA DE FABRICAÇÃO	/ /
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA		

Não destaque este formulário, preencha-o e guarde para utilização caso necessite de Assistência Técnica. Envie o formulário avulso que se encontra dentro da autoclave para a Cristófoli o mais breve possível, juntamente com uma cópia da nota fiscal.

ORIENTAÇÃO PARA DISPOSIÇÃO FINAL DO EQUIPAMENTO

O meio ambiente é um bem de todos os cidadãos, portanto cabe a cada um de nós tomarmos atitudes que visem a sua preservação e/ou redução dos danos causados pelas atividades humanas a este bem tão importante.

Todos os equipamentos possuem um período de vida útil, sendo que não é possível precisar esta duração, pois isso varia de acordo com a intensidade e a forma de uso.

A CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA, reafirmando sua preocupação com o meio ambiente, já demonstrada pela implementação do Sistema de Gestão Ambiental conforme a norma ISO 14001:2004, orienta ao usuário de seus produtos a busca da melhor disposição no momento do descarte do seu equipamento ou de seus componentes, levando em consideração a legislação brasileira de reciclagem de materiais vigente.

Desde já, a Cristófoli orienta que o equipamento seja encaminhado à empresas especializadas em reciclagem que, devido ao desenvolvimento contínuo e acelerado de novas tecnologias de reciclagem e de reutilização de materiais, propiciam a melhor forma de descarte dos mesmos. A Cristófoli procura assim, contribuir para a redução do consumo de matérias-primas não renováveis.

Cabe lembrarmos que a embalagem da autoclave, conforme indicação na mesma, é reciclável.

Outros itens a serem observados para a preservação do nosso planeta:

- Reduza a quantidade de material de consumo;
- Reutilize os bens duráveis o máximo possível;
- Faça a disposição correta dos resíduos de amálgama, pois o mercúrio contamina o solo;
- Recicle os materiais no final de sua vida útil.
- Realize a correta separação de todos os resíduos.

Em nome de todos os usuários, agradecemos por sua compreensão e colaboração.

**Para melhor auxiliar nossos clientes disponibilizamos o serviço
de consultoria em Biossegurança Cristófoli.**

Liliana Junqueira de P. Donatelli
Bióloga - CRB 18469/01-D
Com aperfeiçoamento em Biossegurança
Consultora Cristófoli em Biossegurança
consultoria@cristofoli.com ou cristofoli@cristofoli.com

Docs/Layouts Informativos/Manual Vitale Plus/Vitale Plus Port.Rev.4

LINKS DE INTERESSE

www.anvisa.gov.br	Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
www.ccih.med.br	Site do livro Infecções Hospitalares e suas interfaces na Área da Saúde coord. Dr. Antonio Tadeu Fernandes, área médica.
www.cdc.gov	<i>Centers for Disease Control and Prevention Office of Health and Safety</i> - em inglês.
www.cristofoli.com	Website da Cristófoli.
www.cvs.saude.sp.gov.br	Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
www.fob.usp.br	Faculdade de Odontologia de Bauru.
www.riscobiologico.org	Risco Biológico, debates e matérias sobre o tema.
www.saude.gov.br	Ministério da Saúde.
www.saude.pr.gov.br	Secretaria da Saúde do Estado do Paraná.
www.saude.sp.gov.br	Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (Procure também o site do seu estado).
www.who.int/emc	Site da OMS - Organização Mundial de Saúde (<i>World Health Organization</i>) em inglês - manual citado acima disponível para download.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- APECIH- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Esterilização de Artigos em Unidades de Saúde. 1998.
- APECIH- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas Hospitalares e Antissepsia. 1999.
- APECIH- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Controle de Infecção na Prática Odontológica. 2000.
- APECIH- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Esterilização de Artigos em Unidades de Saúde. 2. ed., 2003.
- BRASIL. Ministério da Saúde AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos Brasília; Ministério da Saúde, Brasília, 2006 a. 156 p.
- DONATELLI, L.J.P. Manual de Biossegurança para Odontologia. 2003.
- FERNANDES, A.T.; FERNANDES, M. O.; RIBEIRO FILHO, N. Infecção Hospitalar e suas Interfaces na Área da Saúde. Editora Atheneu, 2000.
- FOB. Faculdade de Odontologia de Bauru. Manual de Biossegurança. Universidade de São Paulo, 2000.
- GUANDALINE, S. L.; MELO, N.; SANTOS, E.C.P. Biossegurança em Odontologia. Editora Edelbra, 2ª. ed., 1999.
- GUIMARÃES JUNIOR, J. Biossegurança e Controle de Infecção Cruzada em Consultórios Odontológicos. São Paulo: Livraria Santos, 2001.
- SÃO PAULO (ESTADO) Resolução SS 374. Norma Técnica sobre Organização do Centro de Material e Noções de Esterilização. 1995.
- SÃO PAULO (ESTADO) Resolução SS 15. Norma Técnica Especial Referente ao Funcionamento de Estabelecimentos de Assistência Odontológica. 1999.
- TEIXEIRA, P.; VALLE, S. (orgs) Biossegurança - Uma Abordagem Multidisciplinar. Editora Fiocruz, 2002.
- NS-EN 980, Maio de 1996.
- International Standard ISO 15223, Abril 2000.
- International Standard ISO 15223 - Amendment 1, Agosto 2002.
- Norma ABNT-NBR 12914.
- NS EN 1041, Fevereiro 1998.

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA - ATUALIZADA EM 06/03/2008

ALAGOAS

MACEIÓ

Opção Assistência Técnica

Rua Dias Cabral, 218 - Centro
Fone: (0**82) 3326-4171

Elétrica J. Omena

Rua Coronel Vieira Peixoto, 25 - Centro
Fone: (0**82) 3326-6336/346-0979

AMAZONAS

MANAUS

Lincer

Cj Jardim do Edem - Rua "A", 04 - Alvorada
Fone: (0**92) 3657-4563/3657-4574

BAHIA

EUNÁPOLIS

Odonto Tec

Pç. do Gusmão 20 A - Gusmão
(0**73)3281-5193 / 9992-0413

ILHÉUS

Durklein Serviços

Rua Visconde de Mauá, 230 - Centro
Fone: (0**73) 3634-6000/9981-6000

SALVADOR

Maxxi Doctor

Av. General Graça Lessa, 100 - VI do Ogunjá
Fone: (0**71) 3356-3393/3356-5288

Tecnoshopping Dental

Av. Tancredo Neves, 805-A - Caminho das Árvores
Fone: (0**71) 341-3096/8804-9455

CEARÁ

CAUCAIA

Dental Nordeste

Rua 339, 26 - Nova Metrópole
Fone: (0**85) 3213-3774/9988-9121

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA

Equipo Técnica

CLN 105 Bloco "A" Loja 38 - Asa Norte
Fone: (0**61) 3340-5942/3034-1719

O P F Assistência

SCS QD 05 BL C 125 Sobreloja 26,
Galeria Nova Ouvidor - Santa Comercial Sul
Fone: (0**61) 3226-4436/9115-7468

ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA

Odontec

Alto Pongal S/nº - Córrego da Prata
(0**28) 3536-6112 / (0**27) 9923-2214

CARIACICA

Delttec Assistência Técnica

Rua Pio XII, 25 - Campo Grande
Fone: (0**27) 3216-1261/9961-8212

VITÓRIA

Central de Serviços

Rua Armando M de Oliveira SL 3011 Nº10
Goiabeiras
Fone: (0**27) 3345-6246/8116-0362

GOIÁS

ANÁPOLIS

Odontoscope

Av. do Contorno, 1093 - Centro
Fone: (0**62) 321-0555/9608-2059

CALDAS NOVAS

Tecnocaldas

Av. Dos Turistas Qd.05 Lt.01, S/Nº - Jd. Dos Turistas
Fone: (0**64) 454-5246/9905-0705

GOIÂNIA

Biotek Odonto-Hospitalar

Av. Fued Jose Sebba, 389 - Quadra 31 - Lote 06
St Leste Universitário
Fone: (0**62) 3218-2300/ 9979-9410

Doctor Shop

Rua Henrique Silva (0083), 420 - Setor Sul
Fone: (0**62) 3218-5034/3218-2322

Hospcom

Rua 104, 74 Qd F-21, LT.10
Fone: (0**62) 3241-5555/8117-8527

SOS Equipamentos

Rua 68, 357 - Centro
Fone: (0**62) 3212-2023/3223-3481

RIO VERDE

Doctor Shop

Rua Abel Pereira de Castro, 1424 - Setor Central
Fone: (0**64) 623-2371/(0**62)9957-6815

MATO GROSSO

CUIABÁ

Deyve-Tec

Av. Ten Cel Duarte, 1282 (Fundos) - Centro
Fone: (0**65) 322-6085/9959-5952

Vansan

R. Senador Metelo, 460 - Porto
Fone: (0**65) 3324-1871/9952-7995

R D Odonto

Av. Beira Rio, 3772 - Dom Aquino
Fone: (0**65) 634-2387/9983-1587

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

J B Assist Téc

Rua Sete de Setembro, 1042 - Centro
Fone: (0**67) 3383-3992

DOURADOS

Anesterilav

Av. Presidente Vargas, 2105 - VI Progresso
Fone: (0**67) 421-8673/9971-6449

NOVA ANDRADINA

Odontonan Assist Téc

Rua Joaquim Sampaio Neto, 680 - Guiomar S
Andrade
Fone: (0**67) 441-5484/912-5484

MINAS GERAIS

AIMORES

Dental Bragio

Rua Pedro Nolasco, 221 - Centro
Fone: (0**33) 3267-1042/9981-8253

ANDRADAS

Maurício Tavares

Rua Paulo Sérgio Mosconi, 242 - Jd. Itália
Fone: (0**35) 3731-2388

BELO HORIZONTE

Central Técnica

Rua Campos Sales, 533 - Nova Suíça

Esta lista está sujeita a alterações, visite o nosso site www.cristofoli.com ou entre em contato pelo fone
0800 44 0800 para verificar possíveis atualizações.

Fone: (0**31) 3371-3121 / 9634-4567

Dental Técnica

Rua Castro Menezes, 100 - Santa Maria
Fone: (0**31) 3388-1375/8801-0062

Odontomax

Av. Josefino Gonçalves da Silva, 151 - Goiânia
Fone: (0**31) 3488-6669/9634-2521

Protécnica

Rua Visconde de Taunay, 197 - São Lucas
Fone: (0**31) 3323-2666

Pena Dental

Rua Maria Toledo de Paiva, 05 - São Gabriel
Fone: (0**31) 3493-1306 / 9141-5911

CARATINGA

Odontec

Av. Catarini Cimini, 177 - Centro
Fone: (0**33) 3321-9484/9105-7022

Odonto Ramos

Av. Olegário Maciel, 82 Sl 102 - Centro
Fone: (0**33) 3322-3585/9974-8015

CONSELHEIRO LAFAIETE

Top Equipamentos

Rua Coronel José Joaquim Queiróz Jr., 127,
Campo Alegre
Fone: (0**31) 3763-7388/8899-1533

DIAMANTINA

SOS ODONTO

Praça Monsenhor Neves, 22 - Centro
Fone: (0**38) 3531-3685/8801-1703

DIVINÓPOLIS

Divitec

Rua Américo Martins, 180 - Esplanada
Fone: (0**37) 3222-4587/9987-9057

GOVERNADOR VALADARES

Prodonleste

Rua Francisco Sales, 200 - Centro
Fone: (0**33) 3276-3606/9191-3231

SOS Odonto

Rua Ribeiro Junqueira, 261 - Esplanada
Fone: (0**33) 3271-4636/3272-1109

IPATINGA

Atecdonto

Rua Equador, 132 - Cariru
Fone: (0**31) 3825-1328/9988-6328

Jotécnica

Rua Sabará, 113A - Centro
Fone: (0**31) 3821-7844/9944-5570

ITABIRA

Odontomed

Rua dos Cravos, 841 - São Pedro
Fone: (0**31) 3831-2948/9995-4719

ITAJUBÁ

Reinke Assistência Técnica

Rua José Verano da Silva, 101 - Cruzeiro
Fone: (0**35) 3622-4392/3622-1445

JUIZ DE FORA

Equotec

Rua Barbosa Lima, 161 - Centro
Fone: (0**32) 3215-3584/9112-8263

Odontotécnica

Rua Halfeld, 513 sala 204 - Centro
Fone: (0**32) 3215-7411/3211-5958

LAVRAS

Odontecnica Lavrense

Rua Dep. Castejon Branco, 105A - Jd Fabiana
Fone: (0**35) 3822-1892/9979-1667

MANHUAÇU

Aste Odonto

Monsenhor Gonzales, 630 - Centro
Fone: (0**33) 3331-4834/9984-0888

MONTES CLAROS

Odontonorte

Av. Dep. Esteves Rodrigues, 920 Lj 01 - Centro
Fone: (0**38) 3221-6684/3221-6582

Odonto Service

Rua Januária, 704, Centro
Fone: (0**38) 3221-9137/3221-5102

PASSOS

RODONTEC (Ronei Gueleri ME)

R. José Muzetti, 140, SL01 - Penha II
(0**35) 3526-4897/9957-3813

PATOS DE MINAS

R P Odontopatos

Rua Padre Almir Neves de Medeiros, 1050 -
Sobradinho

Fone: (0**34) 3821-9457/9103-8728

POÇOS DE CALDAS

Dental Samia

Rua Barão do Campo Místico, 08 - Centro
Fone: (0**35) 3722-2552

Maurotec

Rua Paraiba, 537 Cj 002-A - Centro
Fone: (0**35) 3722-4432/9937-2913

Dental Odontopoços Ltda

Pç. Monsenhor Faria de Castro, 32 - Centro
CEP: 37701-049
Fone: (0**35) 3714-7888/9952-9478
E-mail: odontopocos@gmail.com
odontotecsc@hotmail.com
Skipe: Odontopocos

PONTE NOVA

ANG Manutenções Ltda.

Rua João Alves de Oliveira, 168 - Triângulo Novo
Fone: (0**31) 3817-5187/9125-0802

POUSO ALEGRE

Dental Samia

Rua Santa Catarina, 34B - Centro
Fone: (0**35) 3422-1598/9967-0017

SETE LAGOAS

Assistec

Rua Teófilo Otoni, 1021 Lj 13 - Centro
Fone: (0**31) 3773-4923/8845-9659

TEÓFILO OTONI

Jotécnica

Endereço: R. Epaminondas Otoni 702 4º andar
S/406 - Edif. Palácio do Comércio - Centro
(0**33) 3521-4240 / 9985-1345

UBERABA

Odontolog

Rua Colatina, 12 - Jd Espírito Santo
Fone: (0**34) 3338-3883/9968-2501

VISCONDE DO RIO BRANCO

DentalCavi

Av. Dr. Carlos Soares, 237 loja 06 - Centro
Fone: (0**32) 3551-2980/8812-4314

PARÁ

BELÉM

Odontécnica

Passagem de Vilhena, 42 - Montese

Esta lista está sujeita a alterações, visite o nosso site www.cristofoli.com ou entre em contato pelo fone 0800 44 0800 para verificar possíveis atualizações.

Fone: (0**91) 3274-0717/3253-6028

PARANÁ

CAMPO MOURÃO

Biotec

Rua Edmundo Mercer, 909 – Centro
Fone: (0**44) 3523-7702/9978-8277

CASCAVEL

Assist Med

Rua Fortaleza, 664 - Centro
Fone: (0**45) 3223-4243/9105-7022

Odonto Oeste

Rua Terezina, 609 - Cancelli
Fone: (0**45) 3223-3588/3225-5436

CIANORTE

Dentalmed

Rua Alvares Cabral, 836 - Centro
Fone: (0**44) 3629-3569/9977-1994

CORNÉLIO PROCÓPIO

Automatic

Rua Bento Ferraz Campos, 243 Lj 1 - Jd Bela Vista
Fone: (0**43) 523-4941/9975-0425

CURITIBA

ATAC

Av. Iguaçu, 863 Sl 8 - Rebouças
Fone: (0**41) 3223-8375/9902-5491

FOZ DO IGUAÇU

Kalmo Dental

Av. General Meira, 3159 - Ouro Verde
Fone: (0**45) 3223-8375/3527-1982

FRANCISCO BELTRÃO

Odonto Tec

Rua Sergipe, 991 - Centro
Fone: (0**45) 3523-1091/9975-0719

LONDRINA

Equipposhow

R. Jandaia, 120 - Jd. Alvorada
(0**43) 3347-7878/ 9994-2059

J L Manutenção

Av. Salgado Filho, 215 - Califórnia
(0**43) 3337-2524/ 9112-1044

Odonto Ar

Rua Alagoas, 1050 - Centro

Fone: (0**43) 3326-1202/9995-7290

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Assistec

Av. Rio Grande do Sul, 5020 - Centro
Fone: (0**45) 3254-6166/9965-3846

MARINGÁ

Oraltec

Rua Independência, 258 Sl-06 - Zona 4
Fone: (0**44) 3031-5060/9103-5054

PATO BRANCO

Cermed

Rua Timbira, 256 - Menino de Deus
Fone: (0**46) 3224-4649/3225-1561

PONTA GROSSA

Márcio José Delabernarda

Av. União Pan-Americana, 1000, BL 6. AP 303
Colônia Santa Luzia
Fone: (0**42) 3222-5734/9976-9717

PONTAL DO PARANÁ

Odonto Service

Rua Antonina, 492 - Balneário Miami
Fone: (0**41) 3458-3845/9998-4059

SANTO ANTONIO DA PLATINA

Agile

R. 24 de maio, 907 - Centro
(0**43) 3534-1779/ 9977-0779

UNIÃO DA VITÓRIA

J L Chagas

Av. Manoel Ribas, 1048 - Centro
Fone: (0**42) 3522-8453

PERNAMBUCO

RECIFE

Tecnodont

Rua Gouveia de Barros, 224 - Sto Amaro
Fone: (0**81) 3221-1392/9126-1391

PIAUÍ

TERESINA

Tec-odont

Rua Lisandro Nogueira, 1439 - Centro
Fone: (0**86) 222-6222/9982-6531

RIO DE JANEIRO

CAMPOS DOS GOYTACAZES

Nova Dental

Rua José F Sanguedo, 205 Lj "A",
Horto Municipal
Fone: (0**22) 2722-7094/2733-0906

DUQUE DE CAXIAS

Universal Tec

Rua Nunes Alves, Nº 13 SL 239 - Centro
Fone: (0**21) 3653-2786

ITAPERUNA

Diltec

Rua Buarque de Nazaré, 373 - Centro
Fone: (0**22) 3823-1187/9988-9642

NITERÓI

Manzano Assist Tecn

Rua Cel Gomes Manchado, 173 Sl 203 - Centro
Fone: (0**21) 2621-3906/2613-0095

PETRÓPOLIS

Asteco

Rua Dr Nelson de Sa Earp, 45 Sobreloja 9 -
Centro
Fone: (0**24) 2243-0575/2243-6751

RIO DE JANEIRO

Asteclin

Rua Pereira Lopes, 135 Lj "A" - Bemfica
Fone: (0**21) 3860-6358/2589-5715

Emformate Empresa Forn de Materiais Ltda.

Rua Barão de Cotegipe, 325 - Vila Isabel
Fone: (0**21) 2577-3344/2577-2241

M N Manutenção

Travessa da Generosidade, 152 - Vila da Penha
Fone: (0**21) 3301-7792/9167-3885

P L K Equipamentos

Rua Delfina Alves, 221 - Madureira
Fone: (0**21) 2458-9161/9962-1259

TERESÓPOLIS

Odonto Serrana

Av. Durval Fonseca, 111 - Europa
Fone: (0**21) 2641-4730/9306-3977

VOLTA REDONDA

Odontofec

Lrg Nove de Abril, 26 Sl 225 - Vi Sta Cecília
Fone: (0**24) 3342-1575/3342-0565

Esta lista está sujeita a alterações, visite o nosso site www.cristofoli.com ou entre em contato pelo fone
0800 44 0800 para verificar possíveis atualizações.

RIO GRANDE DO SUL

CAXIAS DO SUL

Funek

Rua General Mallet, 209 - Rio Branco
Fone: (0**54) 215-1822/215-1775

Kieling Ltda

Rua La Salle, 657 - Sl 304 – São Pelegrino
Fone: (0**54) 3028-8957

MONTENEGRO

MG DENTAL TÉCNICA

Rua Alberto Gottselig, 123 - Centenário
Fone: (0**51) 3632-9286/9957-2162

NOVO HAMBURGO

Dental Técnica

Rua Santa Maria, 207 - Ideal
Fone: (0**51) 581-4065/582-7379

PASSO FUNDO

Hospitec Assist Tec

Av 7 de Setembro, 140 Sl 03 - Centro
Fone: (0**54) 312-3344/312-9455

PELOTAS

Equipeças

Rua General Teles, 567 – Centro
Fone 0**53) 3227-6972

PORTO ALEGRE

Odontotec

Rua Buarque de Macedo, 610 - S Geraldo
Fone: (0**51) 3342-0731/3342-2063

RTMED

Rua Protásio Alves, 1033 - Rio Branco
Fone: (0**51) 3388-4694/9725-7839

TENENTE PORTELA

Wink Assistência

Rua Artur Ambros, 420 - Centro
Fone: (0**55) 3551-1565/9997-0688

RONDÔNIA

VILHENA

Trininfo

Rua Marcos da Luz, 80 - Centro
Fone: (0**69) 3321-6238/9968-3196

RORAIMA

BOA VISTA

Prosserv

Av. Major Willians, 1027 - Centro
Fone: (0**95) 3623-8978

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Edontec

R. 910 nº 360, Sl. 02 - Centro
Fone: (0**47) 9994-1923

BLUMENAU

Odonto Blu

Rua São Paulo, 2388 Sl 4 - Itoupava Seca
Fone: (0**47) 323-6149/9982-6869

Selmar Assistência

Rua Theodoro Holtrup nº 670 - Vila Nova
Fone:(0**47) 323-9616

Tecnosergio

Rua Iguçu, 75 - Itoupava Seca
Fone: (0**47) 323-8404/323-9163

CHAPECÓ

Dental Glanert

Rua 7 de Setembro - 250 E, Sl 02 - Centro
Fone: (0**49) 322-0437

FLORIANÓPOLIS

Dental Tiradentes

Rua Tiradentes, 240 Lj 01 - Centro
Fone: (0**48) 224-1202/8406-9414

Getassi Assistência

Vi Kinczeski, 149 – Centro
Fone: (0**48) 8406-9414

RCS

Rua Prefeito Tolentino de Carvalho, 187, Baln.
Estreito
Fone: (0**48) 244-6422/9903-5195

ITAJAÍ

Dipeve

Rua Carlos Seara, 377 - Vi Operária
Fone: (0**47) 3348-1117

Odomed

Rua Gaspar, 137 - Vila Operária
Fone: (0**47) 3349-0001/9106-1278

JOAÇABA

Odontomedica

Rua Francisco Lindner, 101 Sl 01 - Centro
Fone: (0**49) 521-3391/9997-3825

JOINVILLE

Edontec

Rua Nicéas Gonçalves da Maia, 96 - Itaum
Fone: (0**47) 3028-2907/9971-0133

R V Assistência Técnica

Rua Santo André, 35 - Guanabara
Fone: (0**47) 3436-0988/9961-7664

LAGES

Supridental

Rua Benjamim Constant, 474 - Centro
Fone: (0**49) 3223-2066/9971-9077

RIO DO SUL

Odonto Moretti

Rua Dr. Neumann, 104 – Centro
Fone: (0**47) 3522-6892/8409-3313

SÃO MIGUEL D'OESTE

Dental Corá

Rua Duque de Caxias, 915 - Centro
Fone: (0**49) 3621-2083/9988-9094

TUBARÃO

VBM Dental

Rua Laguna, 356 Sl 01 - Oficinas
Fone: (0**48) 3626-6792/9986-8010

SÃO PAULO

AMERICANA

Savatel

Rua Paissandu, 414 - Vi Galo
Fone: (0**19) 3461-7305/3462-5713

AMPARO

Agiletec

Rua Arlindo Fava, 545 – Jardim Silvestre II
Fone: (0**19) 3807-7072

ARAÇATUBA

Tec Odonto

Rua Cons Oscar R Alves, 1002 - Vi Mendonça
Fone: (0**18) 3623-4587/9781-5827

ARARAQUARA

Dental Gsete

Rua João Vergara Gonzales, 113 - Jd. Primavera
Fone: (0**16) 3331-8200/9713-5844

BAURU

Odonto Isa

Rua Rui Barbosa, 15-05, Jd.Bela Vista

Esta lista está sujeita a alterações, visite o nosso site www.cristofoli.com ou entre em contato pelo fone
0800 44 0800 para verificar possíveis atualizações.

Fone: (0**14) 3232-2834/9701-7839

BOITUVA

Odonto Fix

Rua Angelo Ribeiro, 352 - Centro
Fone: (0**15) 3263-1214/9705-000

BOTUCATU

Elétrica Massera

Rua José Torres Filho, 240 - Jd Peabiru
Fone: (0**14) 3882-7443/9708-1451

CAMPINAS

Alka Assist Tec Odonto

Av. Dr Alberto Sarmento, 667 - Bonfim
Fone: (0**19) 3242-6458/9116-2945

Gerentec

Rua Quintino Bocaiúva, 609 - Bonfim
Fone: (0**19) 3241-8145/9749-2603

GUARULHOS

Dentotec

Rua Ana Soares Barcellos, 33 - Ponte Grande
Fone: (0**11) 6421-0312/6421-6565

JACAREÍ

Cirúrgica Vila Garcia

R. São Marcos Nº 126 - Jardim São José
CEP 12300-000
Fone: (0**12) 3962-1758/8124-4841

JUNDIAÍ

Osvaldo Wagner Teixeira ME

R. Senador Fonseca Nº 231 - Centro
CEP: 13207-040
Fone: (0**11) 4523-0837/9966-5536

LIMEIRA

Vitalmed

Rua Carlos Gomes, 23 - Centro
Fone: (0**19) 3442-6398/3453-9376

LINS

Ótica Dental Moderna

Rua Sete de Setembro, 200 - Centro
Fone: (0**14) 3523-6195/9725-4919

MARÍLIA

Difafer

Av. Tomé de Souza, 151 - Jardim Continental
Fone: (0**14) 3417-4414

PIRACAIA

Wilson Autoclaves

Av. Doutor. Cândido Rodrigues, 227 - Centro
Fone: (0**11) 4036-6300/4036-3468

PIRACICABA

Eletrônica São Francisco

Rua Benjamin Constant, 1871 - Centro
Fone: (0**19) 3434-5377

Tecnodont

Rua Regente Feijo, 2510 - VI Monteiro
Fone: (0**19) 3433-4500/9708-9644

PRESIDENTE PRUDENTE

Med Lab II

Rua Siqueira Campos, 1236 - Vila Nova
Fone: (0*18)222-7315/9742-7661

SANTA FÉ DO SUL

Asteco

Rua Dez, 2291
Fone: (0*17) 3631-2885

SANTOS

Ignácio Com. Assist. Eqpto

Rua Comendador Martins, 20 - VL Matias
Fone: (0*13) 3222-3394/3222-9200

RC Assistência Técnica Ltda.

Av. Pref. José Monteiro, 541 - Sala 08
Jardim Independência
Fone: (0*13) 3561-5348 / (13) 8141-4070

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Di Mori

Rua Santa Maria, 496 - VI Aurora
Fone: (0*17) 3234-2427/3235-4818

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Eduardo Marinho

Est do Caju, 3151 Casa 91 - Campos de S José
Fone: (0*12) 3923-5238/9711-3736

Renova

Av. Ouro Fino, 240
Fone: (0*12) 3916-6489

SÃO PAULO

Ano Luz Eletrônica Ltda.

Rua São Patrício, 162 - Santana/Tucuruvi
Fone: (0*11) 2201-9017/3462-7076/9887-7264

Dental Madrid Ltda ME

Rua Voluntários da Pátria, 512 - Santana
Fone: (0*11) 6221-4397

Equipo Leste

Rua Guaraciaba, 461 - Tatuapé
Fone: (0*11) 6941-2948

Konsertec

Rua Salvador Rodrigues Negrão, 96 - Jardim Prudência
Fone: (0*11) 5563-9246/9576-8216 Renato

Rempres Com. e Técnica Ltda Me

Rua Domingos de Moraes, 1372 - Vila Mariana
Fone: (0*11) 5549-4828

Tecnodont Jn Assist. Tec. e Odont. Ltda

Av. Bosque da Saúde, 1745 - Saúd
Fone: (0*11) 5587-3637/8281-3662

W. E. A. Assist. Tec. Odonto Ltda. Me

Rua Amaro Cavalheiro, 118 - Pinheiros
Fone: (0*11) 3813-1630

SOROCABA

Dental Pássaro

Rua Santa Clara, 65 - Centro
Fone: (0*15) 2101-6789/3233-8686

Odontec Sorocaba

Rua Ana Augusto, 268 - VI Augusta
Fone (15) 3221-2824/ 9742-7831

SUMARÉ

Fernoodonto

Av. Duque de Caxias, 576 - Jd João Paulo II
Fone: (0*19) 3873-4132

Esta lista está sujeita a alterações, visite o nosso site www.cristofoli.com ou entre em contato pelo fone
0800 44 0800 para verificar possíveis atualizações.