

Adaptador para Sugador



- Fácil remoção e limpeza;
- Ajuste perfeito;
- Autoclavável;
- Disponível em diversas cores;

O Adaptador para Sugador, produzido em silicone atóxico flexível, é o mais novo integrante da linha colorida Indusbello que foi desenvolvido para dar ainda mais vida ao seu consultório. Disponível nas cores verde, amarelo, rosa, roxo, laranja e azul para dar mais vida ainda ao seu consultório.

ADAPTADOR PARA SUGADOR: Adapta-se facilmente ao equipamento odontológico e permite fácil remoção e limpeza.

INDICAÇÕES: Utilizado para adaptação do sugador ao equipamento.

INSTRUÇÃO DE USO: Conecte o adaptador ao equipo (mangueira do sugador), uma vez conectado, encaixe o sugador.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por 10 minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Ailicone Atóxico Pigmentado.

PRECAUÇÃO: Esterilizar o produto antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código

Descrição

Apresentação

Registro da ANVISA

109052100074
109052100075
109052100076
109052100077
109052100078
109052100079
109052100080

Adaptador para Sugador Cinza
Adaptador para Sugador Verde
Adaptador para Sugador Amarelo
Adaptador para Sugador Rosa
Adaptador para Sugador Roxo
Adaptador para Sugador Laranja
Adaptador para Sugador Azul

1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade

Dispensado



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira

EC REP Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03

E-Mail: mail@obelis.net