

Catálogo HARTMANN



www.hartmann.pt



Para a PAUL HARTMANN, já em 1885, um factor era certo:

Apenas a **QUALIDADE** e **PRODUTOS** de acordo com os **mais recentes padrões** são a base de um cuidado médico orientado.


A PAUL HARTMANN conseguiu, num estreito contacto com médicos e outros cientistas do seu tempo, alcançar uma posição relevante no desenvolvimento, produção e comercialização de novos materiais de penso.

Os exemplos que marcaram uma época foram o algodão absorvente de Bruns ou a gaze antisséptica com ácido carbólico de Lister. Ideias avançadas para os cuidados médicos são hoje tão importantes como naquela altura.

PAUL HARTMANN foi quem estabeleceu o fundamento dos princípios da nossa companhia: a exigência de fornecer apenas os melhores produtos para preservar a saúde humana.

“Apesar das exigências da procura de compressas e ligaduras baratas, que raramente estão em harmonia com qualidade e fiabilidade absolutas, mantenho o meu princípio de fornecer apenas produtos da melhor qualidade.”

- Paul Hartmann, 1885

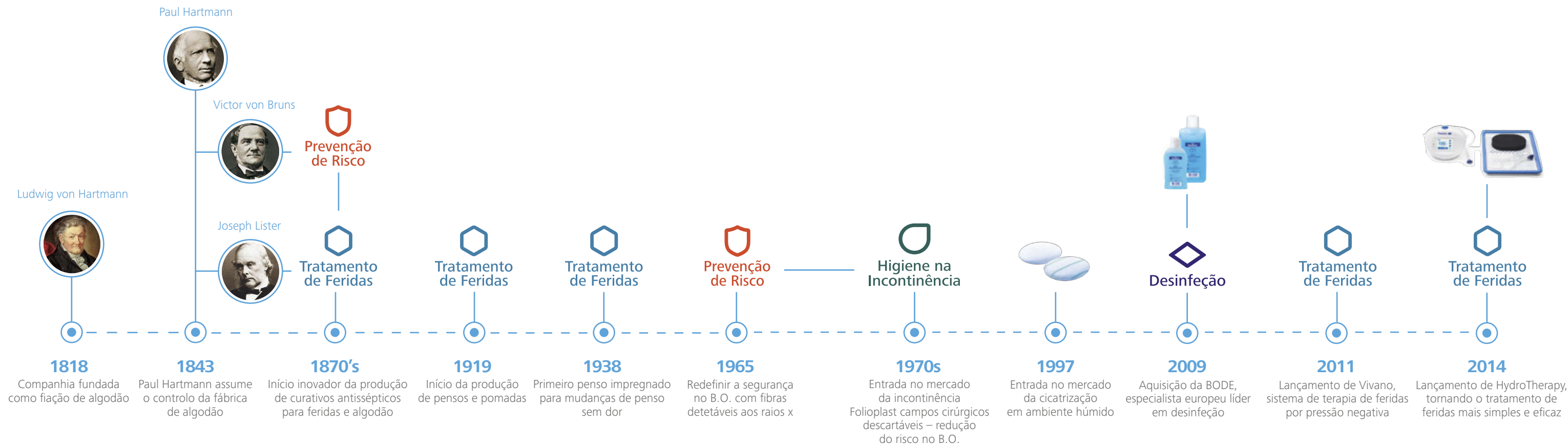

Higiene na Incontinência



Higiene na Incontinência

MoliCare®Soft Air Active	8
MoliCare®Soft	10
MoliCare®super plus	11
MoliCare®Mobile	12
MoliForm®Premium Soft	13
MoliNea®Classic textile	14
MoliNea®Plus	15
MoliNea®super	16
MoliMed®	17
MoliMed®pants active	18
MoliMed®for men active	19
MoliMed®for men protect	19
MoliMed®for men expositores	20
MoliMed®Comfort	21
Expositor “Cuidados de Higiene”	22
Espaço Sênior HARTMANN	22
Vala®	23
Vala®Clean	24
Vala®Fit	25
Vala®Comfort aventais	26

Cosmética Medicinal

Menalind®professional	27
Menalind®professional - Limpar	28
Menalind®professional - Proteger	29
Menalind®professional - Cuidar	30

Prevenção de Risco



Luvas de exame descartáveis

Peha-soft®nitrile FINO	34
Peha-soft®nitrile WHITE	34
Peha-soft®nitrile GUARD	35
Peha-fol®	36

Luvas cirúrgicas

Peha-taft®Classic POWDERED	37
Peha-taft®Classic POWDERFREE	38
Foliodress®Mask PROTECT PERFECT	39

Tratamento de Feridas



Tratamento de Feridas Moderno

TenderWet®plus	42
TenderWet®24 active	43
Atrauman®	44
Atrauman®Ag	44
Atrauman®Silicone	45

Sorbalgon®	46
PermaFoam®	47
Hydrotac®	48
Hydrocoll®	49
Hydrosorb®	50
Hydrosorb®Gel	51
Hydrotul®	52

Tratamento de Feridas Convencional

Medicomp®	53
Medicomp®Estéril	53
Grassolind®	54
Eycopad®	55
Cosmopor®Antibacterial	56
Cosmopor®Steril	57
Cosmopor®Strip	58
Hydrofilm®	59
Hydrofilm®Roll	60
Hydrofilm®Plus	61
Omniplast®	62
Omnistrip®	63
Omnipor®	64
Omnisilk®	65
Omnitape®	66
Omnifilm®	67
Omnifix®	68
Peha-crepp®E	69
Peha-Lastotel®	70
Peha-haft®	71
Stülpa-fix®	72
Idealast®	73
Idealast-haft®Latexfree	74
Idealflex®Universal	75
Idealhaft®	76
Tensocrepe®R85	77
Elastocrepe®	78
Pütter-haft®Latexfree	79
Verba®	80

Terapia Compressiva

Pütterbinde®	81
Pütter®Flex	82
Lastodur®	83
Veno 4®	84

Imobilização

Varolast®Plus	85
Rolta®Soft	85
Safix®Plus	86

Personal Healthcare



Medidores de Tensão Arterial

Tensoval®duo control	88
Tensoval®comfort	89
Tensoval®comfort classic	89
Tensoval®mobil	90

Termómetros

Therموال®kids flex	91
Therموال®kids	91
Therموال®rapid	92
Therموال®standard	92
Therموال®Expositor de balcão	92
Therموال®duo scan	93
Therموال®baby sense	93

Pensos Rápidos Tradicionais

Tiritas®Tela Classic	95
Tiritas®Plastic	95
Tiritas®Transparent	95
Tiritas®Sensitive	96
Tiritas®Sensitive Elastic	96
Tiritas®Kids	96
Tiritas®Sport Protect +	97
Tiritas®Tela Elastic	97
Tiritas®Aqua	97

Pensos Rápidos Terapêuticos

Tiritas®DermaActive®Penso Labial	98
Tiritas®DermaActive®Bolhas e Calos	98
Tiritas®DermaActive®Queimaduras	99
Tiritas®DermaActive®Protect Spray	99

Pensos Rápidos Profissionais

Tiritas®Detectables	100
Tiritas®Plastic	100
Expositor Pensos Rápidos	101

Material para Análises

Dermaplast®	102
Soft-Zellin®	102

Termoterapia

Calmor®	103
---------	-----

Primeiros Socorros

SicSac®	104
---------	-----

Desinfecção



Desinfecção das mãos

Sterillium®	106
Sterillium®Toalhetes	108
Sterillium®Gel	109
Manusept®basic	110

Lavagem das mãos

Baktolin®pure	111
---------------	-----

Desinfecção da pele

Cutasept®	112
-----------	-----

Lavagem Antisséptica

Stellisept®med	113
----------------	-----

Desinfecção de Superfícies

Bacillol AF	114
Bacillol®AF Toalhetes	115
Bacillol®30 Toalhetes	116
Bacillol®30 Foam	117
Dismozon®plus	118
Mikrobac®forte	119
Mikrobac®Tissues	120

Detergente para superfícies

Dismofix®G	121
------------	-----

Desinfecção de Instrumentos

Korsolex®PAA	122
Korsolex®READY TO USE	123
Korsolex®plus	124

Lavagem de Instrumentos

Bodedex®forte	125
---------------	-----

Acessórios

BODE X-Wipes	126
BODE Eurodispenser 3	127
BODE Suportes de parede em plástico	128
BODE Eurodispenser Vario	129
BODE Eurodispenser 4000	129
BODE Eurodispenser 3000	130
BODE Eurodispenser 1 plus	131
BODE Bombas doseadoras	132
BODE Pistolas de spray	132
BODE Tinas de desinfecção	133



Higiene
na Incontinência

HARTMANN

Inco System

*A nossa ajuda para promover a higiene na incontinência.
Apoia igualmente as pessoas afetadas e os prestadores de cuidados.*

A ampla gama de produtos de incontinência da HARTMANN possibilita aplicações especialmente eficazes e económicas. Oferece para cada necessidade individual do paciente, o produto adequado com qualidade superior e está, por isso, perfeitamente apta para satisfazer também as exigências dos profissionais.

Mas, além dos produtos, a HARTMANN oferece um apoio abrangente sob a forma de formações, análises económicas, otimização de consumos, promoções no POS ou aconselhamento nas Instituições. Todas as formações da HARTMANN proporcionam sólidos conhecimentos especializados.

GRAU DE INCONTINÊNCIA



MoliCare® Soft Air Active

A Fralda dos Profissionais

Proteção ativa da pele

Pele saudável

Única, núcleo absorvente com efeito antibacteriano e equilíbrio do valor de pH.

Testada dermatologicamente

Materiais hipoalergénicos que garantem à pele sensível uma alta tolerância.

Totalmente respirável

Devido às asas laterais transpiráveis e suaves, a pele pode respirar



Máxima suavidade

Para uma pele saudável, garantimos um contacto apenas com tecido 100% respirável.

**ACTIVE
PROTE**



E SKIN
CTION



Gestão eficaz e económica da Incontinência


Absorção ✓

Proteção contra fugas ✓

Controlo do odor ✓

Bom ajuste ao corpo ✓

Proteção da pele ✓

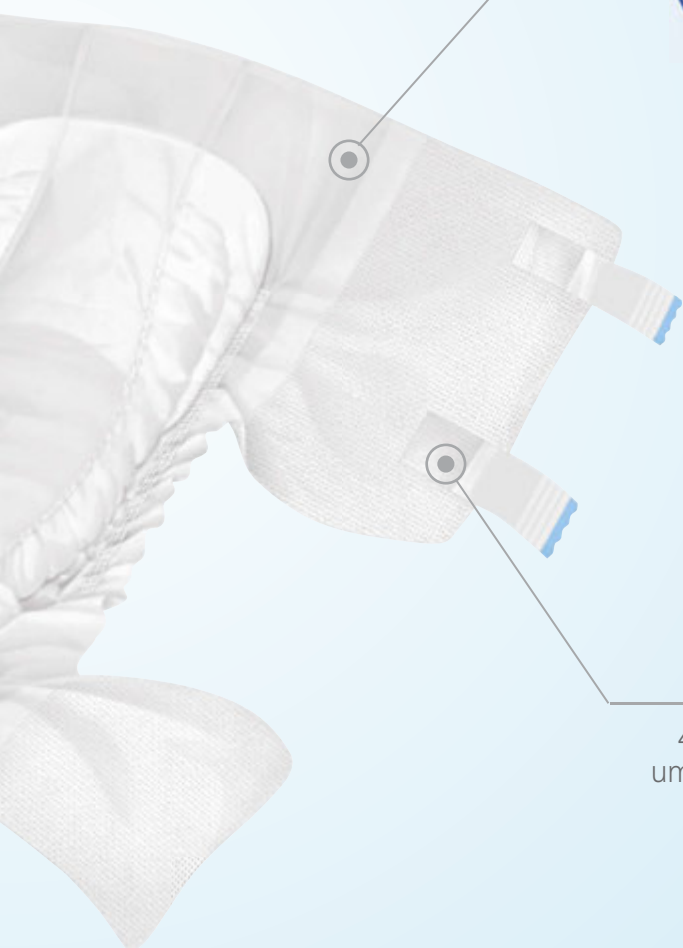

Aplicação mais fácil

4 fechos em velcro que asseguram
uma aplicação mais simples e segura



MoliCare® Soft

Fraldas descartáveis para incontinência



Molicare®
Soft Air Active plus



Molicare®
Soft Air Active extra



Molicare®
Soft Air Active maxi



Molicare®
Soft Air Active super

Características

- Fraldas para incontinência com abas laterais em tecido não tecido transpirável e barreiras antifugas encurvadas
- Repelentes de humidade e formato anatómico com ajustes elásticos na zona de entrepernas
- Fitas de velcro
- Com indicador de humidade e fecal
- Oferecem máxima proteção contra fugas devido à grande capacidade de absorção e retenção fiável dos líquidos
- São suaves para a pele e oferecem agradável conforto na utilização

Indicações / Instruções

Para pacientes com incontinência urinária e fecal, média a muito grave.



Molicare®Soft Air Active

Apresentação	Tamanho	Cintura	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Molicare® Soft Air Active plus	Small	60 - 90 cm	30	169 447	-	3
	Medium	90 - 120 cm	30	169 647	-	3
	Large	120 - 150 cm	30	169 847	-	3
Molicare® Soft Air Active extra	XS	40 - 60 cm	30	169 248	621 1169	4
	Small	60 - 90 cm	30	169 448	621 1177	3
	Medium	90 - 120 cm	30	169 648	621 1185	3
	Large	120 - 150 cm	30	169 848	621 1193	3
	XL	150 - 175 cm	14	169 948	621 1201	4
	Medium	90 - 120 cm	2	169 273	Amostras	60
	Large	120 - 150 cm	2	169 373	Amostras	60
Molicare® Soft Air Active maxi	Small	60 - 90 cm	30	169 449	-	3
	Medium	90 - 120 cm	30	169 649	-	3
	Large	120 - 150 cm	30	169 849	-	3
Molicare® Soft Air Active super	Small	60 - 90 cm	30	169 450	621 1219	3
	Medium	90 - 120 cm	30	169 650	621 1227	3
	Large	120 - 150 cm	30	169 850	621 1235	3
	Medium	90 - 120 cm	2	169 275	-	50
	Large	120 - 150 cm	2	169 375	-	50

MoliCare® super plus

Fraldas descartáveis superabsorventes para incontinência



Molicare® Super Plus

Características

- Fraldas para incontinência com camada Dry-Plus, rebordos antifugas, núcleo superabsorvente extra longo e indicador de humidade
- Camada absorvente muito ampla
- Fralda para incontinência com camada Dry-Plus e rebordos antifugas, núcleo superabsorvente extra longo e indicador de humidade
- Camada absorvente muito ampla
- Formato anatómico, com ajustes elásticos na zona de entrepernas
- Máxima proteção contra fugas devido à grande capacidade de absorção e retenção

Indicações / Instruções

Para pacientes com incontinência urinária e fecal muito grave.

Para pacientes muito dependentes e agitados.



Molicare® super plus

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Molicare® super plus	Nº 1 : 60 - 90 cm	14	169 185	640 6843	4
	Nº 2 : 90 - 120 cm	14	169 285	640 654	4
	Nº 3 : 120 - 150 cm	14	169 385	640 6538	4
	Nº 2 : 90 - 120 cm	2	169 265	-	32
	Nº 3 : 120 - 150 cm	2	169 365	-	24

MoliCare® Mobile

*Cuecas descartáveis para incontinência,
proteção com máxima mobilidade*



Molicare Mobilelight



Molicare Mobile



Molicare Mobilesuper

Características

- Cuecas absorventes descartáveis com núcleo absorvente
- Barreiras antifugas
- Formato anatômico com ajustes elásticos nas pernas
- Superfície exterior em materiais macios e suaves que deixam a pele respirar
- Proporcionam máxima proteção contra fugas, devido à grande capacidade de absorção e de retenção
- Podem ser vestidas como a roupa interior normal



Molicare Mobile

Máxima discrição

O Odour Neutralizer elimina qualquer odor de forma rápida e eficaz.



Fácil de usar

Veste-se como uma lingerie normal. Depois de usar podem-se rasgar as laterais para fácil eliminação.

Extra proteção antifugas

A camada de tecido não tecido Dry Plus absorve líquidos rapidamente, mantendo a pele confortavelmente limpa.

Apresentação	Tamanho	Cintura	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Molicare Mobilelight	Medium	80 - 120 cm	14	915 852	-	4
	Large	100 - 150 cm	14	915 853	-	4
Molicare Mobile	Small	60 - 90 cm	14	915 831	797 4998	4
	Medium	80 - 120 cm	14	915 832	797 5003	4
	Large	100 - 150 cm	14	915 833	797 5011	4
	XL	130 - 170 cm	14	915 834	629 9172	4
	Medium	80 - 120 cm	2	915 620	-	48
	Large	100 - 150 cm	2	915 621	-	40
	Medium	80 - 120 cm	14	915 872	797 5029	4
Molicare Mobilesuper	Large	100 - 150 cm	14	915 873	797 5037	4
						

MoliForm® Premium Soft

Pensos anatômicos com elástico lateral e barreiras antifugas



MoliForm Premium Soft extra

Características

- Pensos anatômicos para incontinência com barreiras antifugas, núcleo absorvente e indicador de humidade
- Cobertura completa em tecido não tecido, com ajustes elásticos na zona de entrepernas
- Fáceis de aplicar com slips elásticos

Indicações / Instruções

Selecionados de acordo com o nível de incontinência do utilizador, de ligeira a grave.



MoliForm Premium Soft

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
MoliForm Premium Soft normal	62 x 32,5 cm	30	168 019	679 8587	4
					
MoliForm Premium Soft plus	62 x 32,5 cm	30	168 219	679 8611	4
					
MoliForm Premium Soft extra	69 x 36 cm	30	168 319	679 8603	4
					
MoliForm Premium Soft super	69 x 36 cm	30	168 919	679 8595	4
					

MoliNea® Classic textile

Resguardos



MoliNea® Classic textile

Características

- Resguardo têxtil reutilizável
- Com uma camada branca superficial em tecido não tecido absorvente
- Reverso em camada azul de poliéster laminado com poliuretano
- Lavável até 200 vezes



MoliNea® Classic textile

Indicações / Instruções

Resguardos para incontinência.

Proteção adicional para a cama, complementando o uso da fralda.

Ideal para incontinentes acamados e crianças em fase de deixar a fralda.



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
MoliNea® Classic textile	75 x 85 cm	1	155 804	794 1294	25

MoliNea® Plus


Resguardos descartáveis



MoliNea®plus

Características

- Resguardos com núcleo absorvente em polpa de celulose
- Cobertura completa em tecido não tecido que repele a água
- Rebordos selados
- Impermeáveis
- Parte posterior em polietileno antideslizante
- Fornecidos já dobrados para armazenamento em armário
- Disponíveis em vários tamanhos para um uso económico

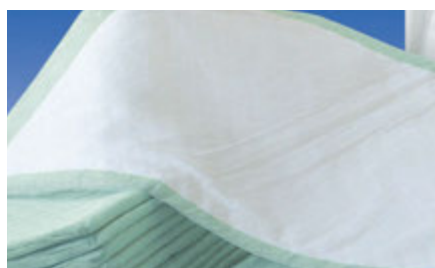

MoliNea®plus

Indicações / Instruções

Resguardos para incontinência.

Proteção adicional para a cama, complementando o uso da fralda.

Segurança máxima antifugas

Os rebordos da película exterior asseguram máxima segurança contra fugas.

Calandragem única e patenteada

Os rebordos da película exterior asseguram máxima segurança contra fugas.

Resistência Máxima

A película exterior oferece máxima resistência.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
MoliNea®plus	60 x 40 cm	150	161 100	668 5370	150 resg
	60 x 40 cm	30	161 181	630 3651	6 sacos
	60 x 60 cm	100	161 300	663 8395	100 resg
	60 x 60 cm	25	161 182	630 3669	4 sacos
	60 x 90 cm	100	161 600	663 8403	100 resg
	60 x 90 cm	25	161 184	630 3677	4 sacos
	180 x 90 cm	20	161 804	613 6697	4 sacos

MoliNea® super

Resguardos descartáveis



MoliNea®super

Características

- Resguardos com núcleo absorvente em polpa de celulose macia
- Cobertura completa em tecido não tecido que repele a água
- Rebordos selados
- Impermeáveis
- Parte posterior em polietileno antideslizante
- Fornecidos já dobrados para armazenamento em armário
- Disponíveis em várias apresentações, para utilização económica

Indicações / Instruções

Para pacientes com perdas de urina, como proteção após intervenções ginecológicas, ou como pensos pós-parto confortáveis e seguros.



MoliNea®Super

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
MoliNea®super	60 x 60 cm	100	163 300	630 9526	100 resg
	60 x 90 cm	50	163 600	630 9518	50 resg
	60 x 90 cm	25	161 194	630 9500	4 sacos

MoliMed®

Mini pensos anatómicos para perdas de urina

Características

- Pensos anatómicos com novas linhas de contorno, que direcionam a urina diretamente para o núcleo absorvente
- Com uma camada exterior em têxtil respirável permite que o ar chegue com facilidade à pele. Sistema de neutralizador de odores "Odour Neutralizer"



MoliMedo Maxi

Indicações / Instruções

Indicados para perdas de urina, como proteção após intervenções ginecológicas ou como pensos pós-parto, confortáveis e seguros.



Máxima discrição

Grças ao Odour Neutral os odores são retidos de forma segura

Amigo da pele

A camada superior com pH 5,5 ajuda a estabilizar o manto ácido protetor da pele onde este é o mais necessário: na zona de entrepernas.

Maior conforto

Os novos elásticos na zona entrepernas Molimed® mini, midi e maxi garantem um ajuste ideal e um maior conforto.

Condições: testes demonstram que 95% das pessoas afetadas gostaram do novo conforto e que 100% apreciaram a suavidade do material*

Ambiente saudável para a pele

Devido à camada exterior têxtil respirável o ar chega com facilidade à pele



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
MoliMedo	Maxi	14	168 654	676 2336	12
	Midi	14	168 644	676 2328	12
	Mini	14	168 634	676 2310	18
	Micro	14	168 624	676 2302	24
	Ultra micro	28	168 131	677 7110	8
	Sportive	14	168 137	620 6870	12
	Mini/Midi/Maxi	3	168 505	-	80
	Micro	2	168 431	-	50
	Ultra micro	2	168 432	-	180
	Sportive	2	168 411	-	72

MoliMed® pants active


Cuecas descartáveis para perdas de urina



MoliMed pants active

Características

- Cuecas absorventes descartáveis em material têtil
- Respiráveis para máximo conforto e discrição
- Com corte anatómico que permite uma adaptação perfeita aos contornos do corpo
- Sistema de neutralizador de odores "Odour Neutralizer"

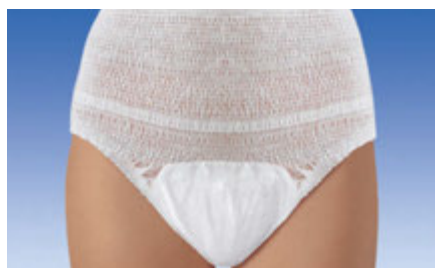

MoliMed pants active



Para retirar, rasgar pela costura



Vestir como a roupa interior normal

Indicações / Instruções

Indicadas em caso de perdas de urina.

Podem ser vestidas como a roupa interior normal.

Materiais "Soft Plus Air"

Assentam perfeitamente devido ao seu formato arredondado e melhorado. Não escorregam nem saem do sítio.

Formato "ideal-fit"

Assentam perfeitamente devido ao seu formato arredondado e melhorado. Não escorregam nem saem do sítio.



Maior Absorção

O núcleo absorvente de 3 camadas permite a absorção de uma grande quantidade de urina, conduzindo-a rapidamente para o seu interior.



COM SAQUETAS DESCARTÁVEIS
ÚNICO NO MERCADO

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
MoliMed pants active	Medium	12	161 100	668 5370	150 resg
	Large	10	161 181	630 3651	6 sacos
	Medium	2	161 300	663 8395	100 resg

MoliMed® for men

Proteções absorventes masculinas para perdas de urina



MoliMed for men protect



MoliMed for men active

Características

- Pensos especialmente concebidos para homens
- Superabsorventes
- Neutralizam o odor
- Camada exterior ativa em tecido confortável
- Novo sistema de proteção total (allround Protect System)
- Conferem máxima segurança devido à elevada absorção e capacidade de retenção
- Protegem a pele da humidade mantendo-a seca



MoliMed for men protect

Indicações / Instruções

Apropriados para homens em casos de perdas de urina

Também são indicados para o pós-operatório em cirurgias à próstata.



MoliMed for men active

Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
MoliMed for men active	14	168 600	677 3580	12
MoliMed for men active / protect	2	168 502	-	80
MoliMed for men protect	14	168 705	610 4513	12

MoliMed® for men

Expositor de balcão

Características

- Expositor de balcão em cartolina brilhante
- Capacidade para 4 pacotes
- Embalado individualmente
- Comprimento: 38,5 cm. Altura: 49 cm



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
MoliMed® for men expositor balcão	14	168 600	12

MoliMed®

Expositor de chão

Características

- Expositor de chão em cartão cancelado brilhante
- Com 4 prateleiras e 1 porta-folhetos
- Embalado individualmente
- Comprimento: 70 cm. Altura: 156 cm



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
MoliMed® expositor chão	1	871 824	1

MoliMed® Comfort


Pensos anatômicos para perdas de urina



MoliMedoComfort

Características

- Pensos anatômicos absorventes
- Com almofada fina absorvente e cobertura completa em tecido não tecido
- Com ajustes elásticos na zona de entrepernas
- Proporcionam ótima proteção contra a sensação de humidade
- Fixam-se com segurança à roupa interior através de uma faixa adesiva

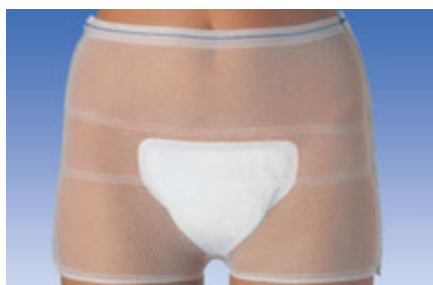

MoliMedoComfort

Indicações / Instruções

Para pacientes com perdas de urina, como proteção após intervenções ginecológicas, ou como pensos pós-parto confortáveis e seguros.



Novo

Maior Conforto

Os novos elásticos na zona de entrepernas de MoliMed® mini, midi e maxi garantem um ajuste ideal e um maior conforto

Maior Absorção

O novo núcleo absorvente de 3 camadas permite a absorção de uma grande quantidade de urina, conduzindo-a rapidamente para o seu interior.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
MoliMed® Comfort	mini (27 x 12 cm)	28	168 100	675 4176	12
	midi (34 x 14 cm)	28	168 101	675 4184	6
	maxi (44 x 17 cm)	28	168 102	675 4192	6

Expositor “Cuidados de higiene”

Características

- Expositor de chão com duas frentes opostas constituído por uma estrutura metálica lacada a azul HARTMANN
- Com 5 prateleiras, base com 4 rodízios giratórios e calhas superiores para a colocação de cartaz de dupla face
- Porta folhetos destacável lateral
- Embalado individualmente em caixa de transporte de cartão
- Altura: 192 cm. Largura: 44 cm



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Expositor “Cuidados de Higiene”	44 x 192cm	1	861 300	1

Espaço Sênior HARTMANN

Características


- Espaço composto por 2 lineares com 6 peças (4 prateleiras e 2 topos) em cartão plastificado com fita bio-adesiva
- Com 4 x 40 cm de altura e comprimento variável de 60 a 80 cm. Pode ser cortado à medida da prateleira



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
MoliMed® expositor chão	1	871 824	1

Vala®

*Ajudamos a assegurar um elevado
nível higiénico na medicina e nos cuidados*

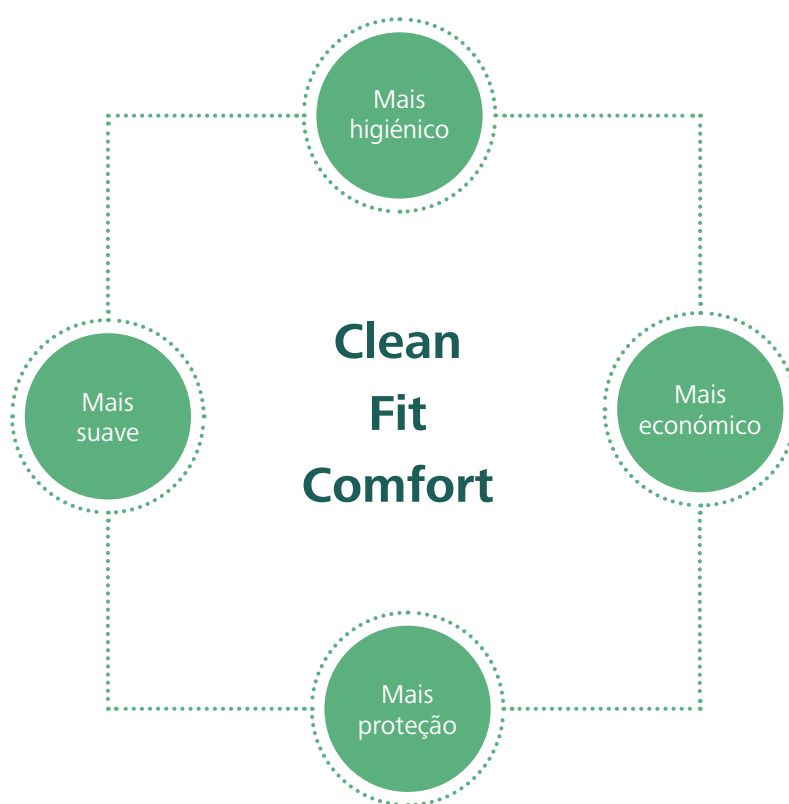

Em qualquer sítio onde as pessoas são tratadas e cuidadas, várias medidas têm que ser tomadas, para proteger os pacientes e também os prestadores de cuidados.

Isto aplica-se em especial ao cuidado geriátrico de pacientes. Sem dúvida, nem sempre é fácil manter um nível elevado de higiene.

Produtos de higiene adequados prestam aqui uma contribuição importante.

Por exemplo, a vasta gama Vala, com produtos descartáveis como panos descartáveis, luvas para lavagem, babetes, máscaras para a boca e o nariz. Facilita, decisivamente, um consequente procedimento higiénico.

Vala® Clean

Manámulas descartáveis para banho

Características

- Destinam-se apenas a uso único
- Permitem trabalhar conforme as normas de higiene
- São descartáveis e desse modo não implicam despesas de lavagem
- Os produtos incluem manámulas de limpeza para a higiene profissional dos utentes



Vala®Clean



Vala®Clean

Indicações / Instruções

Produtos especialmente indicados para os cuidados de higiene em caso de incontinência.


Vala Clean basic

Manámulas de limpeza descartáveis em tecido não tecido. Suaves e resistentes quando molhadas e de abertura arredondada para uma aplicação fácil.

Vala Clean soft

Manámulas de limpeza extra resistentes em tecido não tecido, extra suaves e absorventes.

De abertura arredondada para uma aplicação fácil.

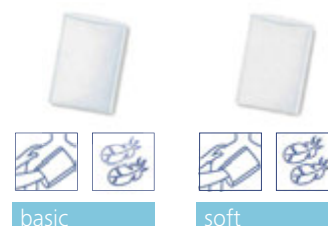

Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Vala® Clean basic (luva higiene)	50	992 245	613 7836	40
Vala® Clean soft (luva higiene)	50	992 242	613 7844	20

Vala® Fit

Babetes descartáveis



Vala® Fit band

Características

- Destinam-se a ajudar a manter os utentes limpos durante as refeições
- A roupa fica protegida e os custos de lavagem são reduzidos



Vala® Fit



Indicações / Instruções

Particularmente indicados para a proteção de pessoas imobilizadas.

Vala Fit band

Babetes descartáveis com atilhos e revestimento de papel tissue em ambos os lados com uma camada de plástico integrada.

Bolsa canguru.

Decote arredondado e fitas reforçadas para um ajuste confortável e seguro.

Impermeáveis e absorventes.

Vala Fit tape

Babetes adesivos descartáveis em papel tissue com camada de plástico, bolsa canguru e bandas adesivas melhoradas para um ajuste mais seguro. Com decote arredondado.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Vala® Fit band (babetes)	38 x 70 cm	100	992 252	613 7828	6
Vala® Fit tape (babetes)	38 x 65 cm	100	992 253	613 7810	6

Vala® Comfort aventais

Aventais descartáveis



Vala® Comfort

Características

- Aventais descartáveis de corte simples com peito e fitas para atar atrás
- Resguardam totalmente o utilizador de forma confortável, simples e higiénica
- São altamente resistentes a rasgões
- Embalagem dispensadora com estabilizador em cartão

Indicações / Instruções

Produtos especialmente desenvolvidos para hospitais e lares de Terceira Idade.



75 x 125
cm

75 x 140
cm

aventais

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Vala® Comfort aventais standard	75 x 125 cm	100	992 336	10



Menalind® Professional

Nova Fórmula!



Limpar



Proteger



Cuidar

No desenvolvimento da gama Menalind® professional, os fatores mais importantes foram a utilização inteligente e a perfeita harmonia dos componentes para proteção e tratamento, resultado de um sistema inovador especialmente concebido com creatina revitalizante, pantenol hidratante e o novo complexo de proteção "Nutriskin". Assim, Menalind® professional favorece as funções naturais da pele, e mantém saudável a pele madura e sensível.

O ingrediente inovador creatina estimula o potencial de energia reduzido da pele, e favorece os seus mecanismos naturais. Mas a creatina faz ainda mais: envolve as células da pele e protege-as contra agressões do exterior.

É assim que a pele sensibilizada pode ser protegida de outros danos. O pantenol é particularmente importante para o nível de hidratação da pele. Não só fornece agentes nutritivos como contribui para que a pele se mantenha hidratada. Todos os produtos são isentos de ingredientes de origem animal e corantes.

A tolerância pela pele sensível foi testada dermatologicamente. Além disso os produtos de limpeza têm pH neutro. O aroma novo e agradavelmente fresco neutraliza os odores.

Menalind® professional

Limpar com sistema

pH 5,5



Características

- Os produtos para limpeza Menalind® professional limpam profundamente a pele madura com substâncias que respeitam o pH
- Ajudam a preservar o manto ácido da pele

Indicações / Instruções

Para a limpeza rápida e suave da pele madura, principalmente em casos de incontinência.



Menalind® professional Toalhetes humedecidos

Toalhetes extra-grandes (200 x 300) e extra suaves, para uma limpeza rápida e prática da área genital, com pantenol nutritivo e óleo de amêndoas.

Embalagem com novo sistema de abertura e sem álcool.



Menalind® professional Champô

Limpeza suave do cabelo e do couro cabeludo seco e sensível e limpeza profunda mesmo em caso de lavagens pouco frequentes.

Com pantenol nutritivo e óleo de amêndoas e doseador integrado.



Menalind® professional Sabão líquido

Limpeza suave da pele sensível devido à incontinência e ao acamamento.

Aroma refrescante com um novo neutralizador de odores e com doseador integrado.

Com pantenol nutritivo e óleo de amêndoas.



Menalind® professional Mousse de limpeza

Para uma limpeza rápida e suave nas áreas da pele muito sujas em casos de incontinência.

Aplicação sem água e com creatina, apoia o mecanismo de defesa natural da pele.

Novo aroma refrescante com neutralizador de odores.



Menalind® professional Espuma de banho

Limpeza suave da pele madura sensibilizada pela incontinência e acamamento.

Com pantenol nutritivo e óleo de amêndoas e aroma refrescante com um novo neutralizador de odores.

Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Toalhetes humedecidos	50 toalhetes	995 038	678 8299	12
Mousse de limpeza	400 ml	995 016	665 6926	12
Mousse de limpeza	35 ml	995 042	-	30
Espuma de banho	500 ml	995 015	654 6283	12
Champô	500 ml	995 017	645 0544	12
Sabão líquido	500 ml	995 014	751 9934	12
Sabão líquido	10 ml	995 047	-	100

Menalind® professional

Proteger com sistema

pH 5,5



Características

- A pele madura e desprotegida pode ser facilmente agredida por substâncias nocivas do exterior
- É importante protegê-la, não com produtos cosméticos de cuidado habituais, mas com um sistema especialmente desenvolvido para tal, que forme uma barreira contra as influências do meio ambiente e que proteja a pele de secar ainda mais

Indicações / Instruções

Proteção das zonas sensíveis da pele contra substâncias nocivas.

Com óxido de zinco



Menalind® professional Creme dermoprotector

Protege a pele sensibilizada da área genital contra substâncias nocivas. Forma uma camada protetora.

Contém o novo complexo de proteção Nutriskin para fortalecimento da função de barreira e regeneração da pele. Aroma refrescante com um novo neutralizador de odores. Emulsão água em óleo, com óxido de zinco.

Sem óxido de zinco



Menalind® professional Óleo protector em spray

Para pele madura muito seca que precisa de proteção específica.

Em spray e fácil de aplicar, forma uma camada protetora para prevenir a desidratação da pele.

Com pantenol nutritivo e óleo de amêndoas e aroma refrescante com um novo neutralizador de odores.



Menalind® professional Creme dermoprotector transparente

Para proteção da pele sem óxido de zinco. Forma uma película protetora transparente sobre a pele.

Com uma fórmula inovadora enriquecida com creatina, bisabolol, ácidos gordos essenciais, aminoácidos e óleo de amêndoas.

Emulsão de água em óleo. pH neutro para a pele.

Sem óxido de zinco



Menalind® professional Mousse dérmica protectora

Proteção fiável e duradoura para pele sensibilizada.

Contém novo complexo de proteção Nutriskin para fortalecimento da barreira da pele e da sua função de regeneração. Com pantenol e ureia hidratante. Sem óxido de zinco.

Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Creme dermoprotector	200 ml	995 022	645 0569	12
Creme dermoprotector	10 ml	995 050	-	100
Mousse dérmica protectora	100 ml	995 025	654 6325	12
Óleo protector em spray	200 ml	995 023	665 6918	12
Creme dermoprotector transparente	200 ml	995 026	695 4180	12

Menalind® professional

Cuidar com sistema

pH 5,5



Características

- A pele madura e irritada precisa de cuidados especiais
- Para evitar as consequências de uma pele seca, a pele deve ser protegida o mais cedo possível com os produtos especiais do sistema de cuidados Menalind professional
- O tratamento intensivo é alcançado através de uma emulsão rica de água em óleo

Indicações / Instruções

Cuidado intensivo da pele madura, especificamente em casos de incontinência.



Menalind® professional Creme para as mãos

Cuidado intensivo para mãos irritadas e muito secas. Com creatina, favorece o mecanismo de defesa natural da pele.

Emulsão água em óleo.



Menalind® professional Gel de massagem

Para a massagem e aplicação na nuca, nos ombros, nos braços ou nas pernas. Agradável em caso de dores musculares devido ao acamamento.

Efeito vitalizante com panthenol. Cuidado intensivo da pele seca.



Menalind® professional Óleo para a pele

Cuidado intensivo da pele madura, sensível e muito seca. Com óleos tratantes e vitamina E. Fácil de espalhar e não deixa uma camada gordurosa.



Menalind® professional Loção corporal

Cuidado intensivo da pele madura sensibilizada pela incontinência e acamamento.

Contém o novo complexo Nutriskin para o fortalecimento da barreira da pele e da sua função de regeneração. Com óleo natural de amêndoas e aroma refrescante com neutralizador de odores com doseador integrado.

Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Loção corporal	500 ml	995 019	665 6900	12
Loção corporal	10 ml	995 048	-	100
Gel de massagem	200 ml	995 018	689 4246	12
Gel de massagem	10 ml	995 049	-	100
Creme para as mãos	200 ml	995 020	654 5525	12
Óleo para a pele	500 ml	995 021	654 6309	12



Prevenção de Risco



Luvas de exame em NITRILO

Luvas de exame sintéticas, sem látex e sem pó.

Em conformidade com as normas EN 455 e EN 374 categoria III

A sua segurança é a nossa prioridade

- As luvas como dispositivo médico de uso único são indicadas para a utilização médica, o que se traduz na proteção dos pacientes contra a contaminação cruzada.
- As luvas enquanto equipamento de proteção individual, em contraste, protegem somente o utilizador pois constituem uma barreira contra as transmissões de germes por via sanguínea, e infeções por via das secreções.
- São um escudo contra produtos de limpeza, desinfetantes, químicos, e outras substâncias perigosas.

Critérios da norma EN 455 e EN 374

É bom saber:

Os critérios da norma EN 455, aplicáveis em toda a Europa, estabelecem elevados níveis de higiene.

As luvas de exame da HARTMANN cumprem inteiramente os requisitos da EN 455 e da EN 374.

A conformidade com a EN é um pré-requisito básico para obter a marca CE.

Luvas como dispositivo médico = proteção para o paciente

Classificadas como dispositivos médicos, em conformidade com a Diretiva Dispositivos Médicos 93/42/CE. A norma EN 455 deriva da Diretiva Dispositivos Médicos 93/42/CEE.

EN 455: Norma para dispositivos médicos: ensaio às luvas médicas, por exemplo para níveis de qualidade (AQL) e propriedades físicas, como as dimensões, resistência a rasgos, etiquetagem e prazo de validade.

- **EN 455-1:** Requisitos e ensaio à ausência de orifícios
- **EN 455-2:** Requisitos e ensaio às propriedades físicas, por exemplo o comprimento
- **EN 455-3:** Requisitos e ensaio para a avaliação biológica
- **EN 455-4:** Requisitos e ensaio para determinação do prazo de validade

Luvas como equipamento de proteção individual = proteção para o utilizador

Na Europa, as luvas de proteção estão conforme a Diretiva para Equipamentos de Proteção Individual 89/686/CEE. A norma EN 374 deriva da Diretiva para Equipamentos de Proteção Individual 89/686/CEE.

EN 374: Norma para luvas de proteção contra químicos e microorganismos. Indicada para utilizadores que manipulem desinfetantes, agentes de limpeza, químicos laboratoriais ou preparação, transporte e administração de fármacos para quimioterapia.

- **EN 374-1:** Terminologia e requisitos de desempenho
- **EN 374-2:** Determinação e resistência à penetração
- **EN 374-3:** Determinação e resistência à permeabilidade de químicos

A Diretiva para Equipamentos de Proteção Individual 89/686/CEE divide os equipamentos de proteção individual em 3 categorias:

- **Categoria I:** Proteção contra riscos menores
- **Categoria II:** Proteção contra riscos médios (não pertencem nem à categoria I e nem à categoria III)
- **Categoria III:** Proteção contra a morte e riscos sérios e irreversíveis

A tabela seguinte mostra um resumo das aplicações para as diferentes categorias:

Categorias EPP	Proteção	Aplicação
	Proteção contra pequenos riscos: • Soluções pouco agressivas	Manipulação de: • Desinfetantes diluídos • Detergentes diluídos • Químicos diluídos
	Proteção contra riscos que não pertencem nem à categoria I nem à categoria III: • Proteção contra bactérias e vírus	• Proteção do utilizador contra bactérias e germes (manipulação de material de exame como colheitas de urina) • Desinfecção de superfícies de trabalho como os quartos dos pacientes
	Proteção contra a morte e riscos sérios e irreversíveis: • Soluções químicas concentradas, detergentes ou desinfetantes, fármacos para quimioterapia	• Proteção contra respingos aquando a manipulação de desinfetantes concentrados, químicos e fármacos para quimioterapia • Preparação de soluções diluídas

Peha-soft® nitrile

Luas de exame sintéticas, sem látex e sem pó.



Peha-soft nitrile WHITE



Peha-soft nitrile FINO

Características

- Luvas de exame sem pó para uso único
- Não estéreis e ambidexas
- Em nitrilo sintético e sem látex
- As pontas dos dedos têm textura para uma excelente sensibilidade tátil e aderência
- Muito confortáveis e ajustáveis
- Com elevada elasticidade, e resistentes a rasgões
- Não provocam alergia às proteínas do látex (alergia tipo I)
- Certificadas para o contato com os alimentos

Indicações / Instruções

Para utilização universal na área médica onde são exigidos uma elevada sensibilidade tátil e elevado nível de conforto

Especialmente adequadas a pessoas alérgicas ao látex (alergia tipo I).

Também qualificadas como equipamento de proteção pessoal e indicadas para limpeza e desinfecção com químicos e desinfetantes.

Adicionalmente adequadas para a utilização em cozinhas pois estão certificadas para contacto com alimentos.



Peha-soft nitrile FINO



Peha-soft nitrile WHITE



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Peha-soft nitrile FINO	XS	150	942 195	619 6824	10
	S	150	942 196	619 6816	10
	M	150	942 197	619 6808	10
	L	150	942 198	619 6790	10
	XL	150	942 199	619 6832	10
Peha-soft nitrile white	XS	200	942 205	-	10
	S	200	942 206	-	10
	M	200	942 207	-	10
	L	200	942 208	-	10
	XL	180	942 209	-	10

Peha-soft® nitrile GUARD

A luva de nitrilo duplamente qualificada para máxima proteção.



Peha-soft nitrile GUARD

Características

- Luvas de exame e de proteção pessoal, ambidextras, sem pó, descartáveis, em nitrilo sintético, de cor azul, sem látex
- Devido à sua elevada elasticidade, são resistentes a rasgos
- As pontas dos dedos têm uma textura que proporciona uma excelente aderência
- A extensão do punho oferece uma proteção extra
- Não provocam alergia às proteínas do látex

Indicações / Instruções

Para uso universal na área médica, quando o conforto e a elevada sensibilidade são exigidos

Adicionalmente qualificadas como equipamento de proteção pessoal e, por conseguinte aplicáveis em laboratórios, quando se desinfetam superfícies, ou no manuseamento de químicos e citostáticos.

Além disso, são adicionalmente qualificadas para utilização em cozinhas no contacto com os alimentos.



Peha-soft nitrile GUARD



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Peha-soft nitrile GUARD	XS	100	942 200	621 9386	10
	S	100	942 201	621 9394	10
	M	100	942 202	621 9402	10
	L	100	912 203	621 9410	10
	XL	100	942 204	621 9428	10

Peha-fol®

Luvas descartáveis em polietileno, sem pó



Peha-fol®

Características

- Peha-fol® sem látex, são luvas descartáveis constituídas por uma película de polietileno, suave, fina e transparente



Peha-fol®

Indicações / Instruções

Indicadas para tarefas higiénicas, como por exemplo, manuseamento de alimentos, gasolineiras, etc.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Peha-fol®	Small Nº 1	100	999 522	670 4288	20
	Large Nº 2	100	999 521	670 4270	20

Peha-taft® Classic POWDERED

Luvas cirúrgicas em látex natural, com pó



Peha-taft® Classic POWDERED

Características

- Luvas cirúrgicas com pó, para uso único
- Estéreis
- Em látex de borracha natural, extra suave e fino
- Equipamento de proteção individual classe III
- Ponta dos dedos com textura para uma sensibilidade e aderência otimizadas
- Altamente elásticas e resistentes a rasgões
- Muito confortáveis ao uso
- O formato anatômico evita o cansaço dos dedos

Indicações / Instruções

Utilização universal em todos os tipos de cirurgia e adicionalmente certificadas como equipamento de proteção individual.

Como tal, são aplicáveis em laboratórios para a manipulação de químicos ou citostáticos.



Peha-taft® Classic POWDERED

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Peha-taft® Classic POWDERED	6	50 pares	942 741	675 3913	4
	6,5	50 pares	942 742	675 3921	4
	7	50 pares	942 743	675 3939	4
	7,5	50 pares	942 744	675 3947	4
	8	50 pares	942 745	675 3954	4
	8,5	50 pares	942 746	675 3962	4

Peha-taft® Classic POWDERFREE

Luvas cirúrgicas em látex natural, sem pó



Peha-taft® Classic POWDERFREE


Características

- Luvas cirúrgicas com pó, para uso único
- Estéreis
- Em látex de borracha natural, extra suave e fino
- Equipamento de proteção individual classe III
- Ponta dos dedos com textura para uma sensibilidade e aderência otimizadas
- Altamente elásticas e resistentes a rasgões
- Muito confortáveis ao uso
- O formato anatômico evita o cansaço dos dedos.

Indicações / Instruções

Utilização universal em todos os tipos de cirurgia e adicionalmente certificadas como equipamento de proteção individual.

como tal, são aplicáveis em laboratórios para a manipulação de químicos ou citostáticos.

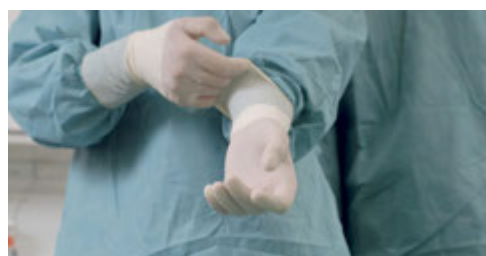

Peha-taft® Classic POWDERFREE

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Peha-taft® Classic POWDERFREE	6	50 pares	942 645	613 7786	4
	6,5	50 pares	942 646	613 7778	4
	7	50 pares	942 647	613 7760	4
	7,5	50 pares	942 648	613 7752	4
	8	50 pares	942 649	613 6747	4
	8,5	50 pares	942 650	613 6739	4

Foliodress® mask PROTECT PERFECT

Máscara bloco operatório



Foliodress®mask PROTECT PERFECT

Características

- Máscara cirúrgica em tecido não tecido inodoro, com 3 camadas
- Lado interior branco, lado exterior azul. Entre camadas existe um filtro médio com uma elevada eficiência de filtração de bactérias
- Proteção para o nariz e atilhos para fixação

Indicações / Instruções

Máscara cirúrgica facial para utilizadores com pele normal a sensível.



Foliodress®mask PROTECT PERFECT

Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Foliodress®mask PROTECT PERFECT	50	992 531	618 6890	6



Tratamento
de Feridas

O Sistema ideal para o tratamento de feridas crónicas

Remoção de necroses



TenderWet®24 active

Úlcera venosa

Combate da infeção



Atrauman®Ag

Deiscência de sutura

Gestão do exsudado e formação da granulação



Sorbalgon®


Úlcera de decúbito



PermaFoam®

Deiscência de sutura

Protege a granulação e mantém o ambiente húmido

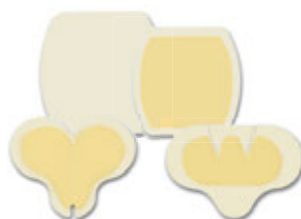


Hydrocoll®

Úlcera de pressão



Promove a epitelização e mantém o ambiente húmido

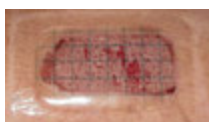

Hydrosorb®

Enxerto

TenderWet® plus

Pensos de poliacrilato com PHMB



TenderWet®plus

Características

- Pensos prontos a usar com solução de Ringer pré-ativada e PHMB (polihexanida) que cria um ambiente húmido na ferida até 72 horas
- A película de humidade impermeável no lado oposto à ferida previne que o núcleo do penso seque prematuramente
- A solução de Ringer armazenada no núcleo do penso é libertada em troca de exsudado
- Este mecanismo designado como absorção e efeito crescente proporciona uma limpeza eficaz da ferida
- O revestimento de silicone em forma de tiras sobre o lado virado para a ferida evita aderência possibilitando uma muda de pensos indolor
- Os microrganismos são eliminados pela polihexanida no núcleo do penso evitando a recontaminação



TenderWet®plus

3 DIAS
sem mudanças
de pensos

Indicações / Utilização

Para tratamento húmido de feridas crónicas durante a fase de limpeza.

Podem também ser utilizados para reativar processos de cicatrização estagnados se estes forem provocados por uma grande atividade das MMP.


TenderWet®plus indicado no tratamento de feridas superficiais e TenderWet®plus cavity indicado no tratamento de feridas profundas.

Modo de ação

Hidratação: A solução de Ringer + PHMB, amolece e liberta as necroses.

Absorção

O SAP + PHMB absorve as necroses, componentes celulares, bactérias, exsudado e metaloproteases (MMP).

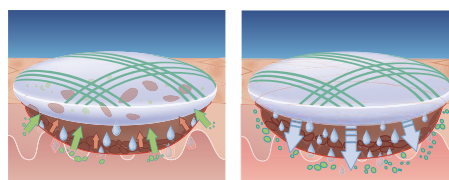

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
TenderWet® plus	Ø 5,5 cm	10	609 292	621 1417	6
	7,5 x 7,5 cm	10	609 293	621 1391	6
	10 x 10 cm	10	609 294	621 1342	6
	Ø 4 cm	10	609 295	621 1425	6

TenderWet® 24 active

Pensos de poliacrilato




TenderWet®24 active

Características

- Pensos superabsorventes para feridas, prontos a usar, pré-ativados com solução de Ringer
- Proporcionam um ambiente húmido à ferida durante 24 horas e simultaneamente substituem o exsudado pela solução de Ringer, lavando desta forma a ferida
- A cobertura hidrófila dos pensos previne que os produtos adira à ferida e permite a remoção sem dor do TenderWet®24 active



TenderWet®24 active

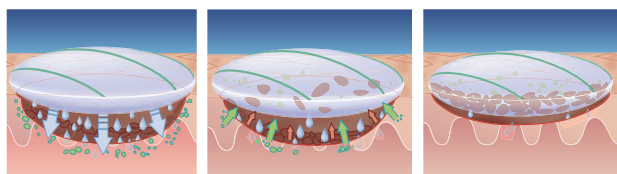

Indicações / Utilização

Para o tratamento húmido interativo, especialmente indicados quando o estado da ferida requer limpeza ativa e tratamento de reativação.

Em feridas com dificuldade de cicatrização ou estagnadas.

Queimaduras e feridas clinicamente infetadas.

Modo de ação

TenderWet® 24 é pré-ativado com solução de Ringer, que assegura uma lavagem da ferida durante 24 horas. A camada protetora do lado oposto à ferida previne a saída de fluido para o exterior.

Devido à maior afinidade do acrilato com as proteínas do que com a solução de Ringer, o centro absorvente retira o exsudado e reduz a contaminação das feridas com bactérias.

Graças a esta troca assegura-se um leito da ferida limpo, que é a condição para continuar o tratamento. As células podem agora migrar, os vasos regenerar e o novo tecido crescer.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
TenderWet® 24 active	Ø 4 cm	10	609 210	676 5602	6
	Ø 5,5 cm	10	609 211	619 2369	6
Oval	4 x 7 cm	10	609 212	619 2351	6
	7,5 x 7,5 cm	10	609 213	619 2377	6
	10 x 10 cm	10	609 214	619 2385	6

Atrauman®

Apósitos impregnados com triglicéridos

Características

Atrauman®


- Compressas neutras de gaze em poliéster hidrófobo impregnadas com triglicéridos
- Não contém parafina, é permeável ao exsudado e não adere à ferida

Atrauman®Ag

- Pensos de gaze não aderente, que contém prata
- Com propriedades antibacterianas para o tratamento atraumático de feridas, controlo da infeção e ação bactericida



Atrauman®Ag

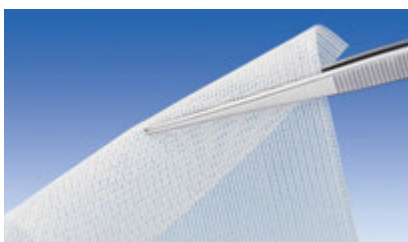

Atrauman®

Com
Prata

Sem parafina
Sem cera



Atrauman®



Atrauman®Ag

Indicações / Utilização

Atrauman®

Para o tratamento atraumático de feridas desde a fase de cicatrização, para feridas exsudativas e também para feridas na fase de granulação e epiteliação, no tratamento de pacientes com pele sensível ou sensíveis a determinada medicação.


Atrauman®Ag

Estão indicados para o uso complementar no tratamento de feridas infetadas ou em feridas com elevada contaminação bacteriana.

Está também indicado como profilaxia adicional no tratamento de feridas.

Modo de ação

A combinação ideal: a prata, usada em ações terapêuticas relacionadas com feridas infetadas e a compressa não aderente, que com os seus triglicéridos especiais cuida da ferida, com especial atenção para os seus bordos, evitando a maceração.

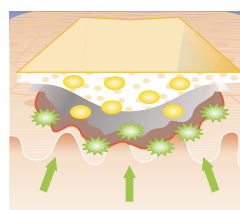

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Atrauman®	5 x 5 cm	10	499 510	-	20
	7,5 x 10 cm	10	499 513	-	10
	10 x 20 cm	30	499 536	-	10
Atrauman®Ag	5 x 5 cm	10	499 571	610 1386	12
	10 x 10 cm	10	499 573	610 1360	12
	10 x 20 cm	10	499 575	610 1378	6

Atrauman® Silicone

Camada estéril de contacto com a ferida para o tratamento atraumático de feridas

NOVO



Atrauman®Silicone

Indicações / Utilização

Camada de contacto com a ferida para:

O tratamento de feridas de todos os tipos: superficiais, agudas, crónicas, ligeira a moderadamente exsudativas.

Utilizar em combinação com o sistema de tratamento de feridas por pressão negativa Vivano.

Usar como camada protetora em feridas não exsudativas e em áreas sensíveis da pele.

Atrauman®Silicone só deve ser usado em combinação com o sistema de tratamento de feridas por pressão negativa Vivano, por profissionais de saúde especializados.

Preparação da ferida:

Antes de aplicar o penso pela primeira vez, e depois de cada troca de penso, a ferida deve estar extensamente limpa de acordo com as instruções do médico.

Secar a pele à volta da ferida.

Troca de penso:

Dependendo das condições da ferida, Atrauman®Silicone pode ficar na mesma durante alguns dias se for clinicamente necessário. No entanto, após pelo menos três dias, deve ser verificado o crescimento interno do tecido.

Aplicação da camada de contacto com a ferida de silicone:

Escolher o tamanho de Atrauman®Silicone que cobre a ferida de forma precisa. O Atrauman®Silicone pode ser cortado ao tamanho pretendido.

Utilizar tesouras estéreis. Se existir mais do que uma peça, assegurar que os poros estão expostos onde as partes de Atrauman®Silicone se sobrepõem.

Retirar o Atrauman®Silicone da bolsa com ambas as películas de proteção.

Segurar com firmeza a película de proteção mais longa enquanto se retira a outra película.

Colocar a parte adesiva na ferida e alisar o Atrauman®Silicone. Retirar a outra película.

Contra-indicações:

Não utilizar Atrauman Silicone em pacientes que possam ser alérgicos a algum dos seus ingredientes.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN
Atrauman® Silicone	7,5 x 10 cm	5	499 561
	10 x 20 cm	5	499 563
	20 x 30 cm	5	499 565

Sorbalgon®

Apósitos de alginato de cálcio



Sorbalgon®

Sorbalgon® T

Sorbalgon® e Sorbalgon T

Características

- Compressas ajustáveis de fibras de alginato de cálcio que, quando em contacto com os sais de sódio presentes no sangue e no exsudado da ferida, formam um gel hidrófilo não aderente
- O gel com propriedades hemostáticas para feridas sangrantes preenche a cavidade da ferida e cria condições favoráveis à cicatrização, retirando bactérias da ferida e mantendo-as dentro do gel



Sorbalgon®


Indicações / Utilização

Podem ser usadas no tratamento de feridas externas de qualquer tipo.

Especialmente adequadas para o tratamento de feridas sangrantes ou exsudativas, pois as propriedades de formação do gel favorecem o processo de cicatrização da ferida, p.ex. nas úlceras de origem venosa, escaras, abscessos, furúnculos, queimaduras, feridas de difícil cicatrização causadas por acidente ou cirurgia de tumores e feridas sangrantes.

Modo de ação

No caso de feridas profundas ou locas a compressa de alginato de cálcio pode ser utilizada como tampão em locais difíceis de aceder. Através da absorção do exsudado da ferida o penso transforma-se rapidamente num gel que assegura o contacto com o leito da ferida.

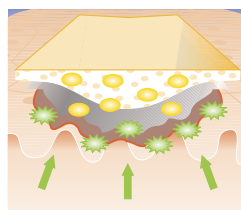

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Sorbalgon®	5 x 5 cm	10	999 598	675 3905	20
	10 x 10 cm	10	999 595	675 3897	10
	10 x 20 cm	5	999 589	677 3606	14
Sorbalgon® T	1 g / 30 cm	3	999 590	677 3614	16
	2 g / 30 cm	5	999 592	677 3622	10

PermaFoam®

Apósitos de espuma



PermaFoam®

Características

- Pensos de espuma hidroativos com uma camada de poliuretano permeáveis ao vapor de água
- A estrutura de espuma hidrófila especial proporciona, através de um efeito capilar reforçado, um transporte mais rápido do exsudado da ferida e garante à ferida um ambiente húmido equilibrado
- Absorvem bactérias e resíduos de células e mantêm estas suas características mesmo sob compressão
- Flexíveis e macios, com um bom efeito de almofada, não provocam irritação
- Também estão disponíveis com rebordo de fixação de boa tolerância cutânea



PermaFoam®

Indicações / Utilização

Para limpeza de feridas não infetadas, de exsudado forte a moderado, e na formação de tecido de granulação.

Especialmente para feridas crónicas problemáticas, como por ex. úlceras varicosas e de pressão.

Especialmente indicados para o tratamento de úlceras venosas em combinação com terapia compressiva.

Para o cuidado de queimaduras até 2º grau.

Modo de ação

A combinação ideal: a prata, usada em ações terapêuticas relacionadas com feridas infetadas e a compressa não aderente, que com os seus triglicéridos especiais cuida da ferida, com especial atenção para os seus bordos, evitando a maceração.



PermaFoam®



PermaFoam® Comfort



PermaFoam® Sacral



PermaFoam® Cavity



PermaFoam® Concave




PermaFoam® Traqueostomia

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
PermaFoam®	10 x 10 cm	10	409 401	677 7938	6
	10 x 20 cm	5	409 403	677 7953	6
	15 x 15 cm	5	409 405	677 7946	6
	20 x 20 cm	3	409 406	677 7961	6
PermaFoam® Comfort	11 x 11 cm	10	409 408	677 7979	6
	10 x 20 cm	5	409 410	677 7995	6
	15 x 15 cm	5	409 412	677 7987	6
	20 x 20 cm	3	409 413	677 8001	6
PermaFoam® Sacral	18 x 18 cm	3	409 422	610 1345	6
	22 x 22 cm	3	409 423	610 1352	6
PermaFoam® Concave	16,5 x 18 cm	3	409 424	610 1329	6
PermaFoam® Cavity	10 x 10 cm	3	409 425	610 1311	12
PermaFoam® Traqueostomia	8 x 8 cm	10	409 426	610 1337	6

HydroTac®

Apósito de espuma

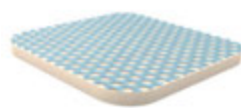

HydroTac®



HydroTac® Comfort



HydroTac®

Características

- Pensos de espuma hidrocélular com uma camada de interface em gel
- A estrutura de espuma absorvente com células de poliuretano macias e finas, permitem uma absorção do exsudado e libertando simultaneamente através do gel hidratante, humidade para o leito da ferida
- Com uma gestão de fluídos mantida em equilíbrio, para uma cicatrização efetiva e remoção indolor
- Absorvem bactérias e resíduos de células e mantêm estas suas características mesmo sob compressão
- Flexíveis e macios, com um bom efeito de almofada, não criam irritação
- Também estão disponíveis com rebordo de fixação de boa tolerância cutânea

Indicações / Utilização

Para limpeza de feridas não infetadas, de exsudado moderado a baixo.

Ideais para as fases de granulação e epitelização.



HydroTac®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
HydroTac®	10 x 10 cm	3	685 831	618 0976	12
	10 x 10 cm	10	685 832	618 0984	6
	15 x 1,5 cm	3	685 839	618 1016	12
	10 x 20 cm	3	685 833	618 1024	12
	20 x 20 cm	3	685 844	618 1032	12
HydroTac® Comfort	8 x 8 cm	10	685 810	-	6
	12,5 x 12,5 cm	3	685 814	618 0927	12
	12,5 x 12,5 cm	10	685 815	618 0935	6
	15 x 15 cm	3	685 817	618 0943	12
	15 x 20 cm	3	685 820	618 0950	12
	15 x 20 cm	10	685 821	-	6
	20 x 20 cm	3	685 822	618 0968	12

Hydrocoll®

Apósitos hidrocolóides



Hydrocoll®

Características

- Pensos hidrocolóides absorventes, autoadesivos, cobertos por uma camada semipermeável que previnem a penetração de bactérias
- Os hidrocolóides transformam-se em gel e criam um ambiente húmido para a ferida que estimula a granulação e a epitelização
- Flexíveis e ajustáveis
- Podem ser moldados facilmente aos contornos do corpo
- Podem ser removidos sem dor




Hydrocoll®

Indicações / Utilização

Para terapia em ambiente húmido, especialmente indicados para o tratamento de feridas crónicas e de difícil cicatrização, que não estejam clinicamente infetadas, por ex. úlceras de perna, úlceras de pressão, queimaduras de segundo grau.

Modo de ação

O penso hidrocolóide absorve o exsudado das feridas superficiais com exsudado ligeiro a moderado, contaminado com bactérias, e retém-no de maneira segura na sua matriz de gel. Assegura um ambiente húmido e equilibrado essencial para a granulação.

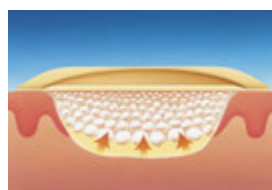

Hydrocoll®



Hydrocoll®Sacral



Hydrocoll®Concave



Hydrocoll®Thin

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Hydrocoll® Standard	5 x 5 cm	10	900 740	676 9919	20
	7,5 x 7,5 cm	10	900 742	676 9893	20
	10 x 10 cm	10	900 938	675 3830	8
	15 x 15 cm	10	900 939	610 9470	8
	20 x 20 cm	10	900 940	610 9488	8
Hydrocoll® Classic	10 x 10 cm	10	900 744	-	20
	15 x 15 cm	5	900 748	-	16
	20 x 20 cm	5	900 749	-	16
Hydrocoll® Standard Concave	8 x 12 cm	10	900 756	676 3805	20
Hydrocoll® Standard Sacral	12 x 18 cm	5	900 755	675 3863	16
Hydrocoll® Thin	7,5 x 7,5 cm	10	900 757	676 9851	12
	10 x 10 cm	10	900 758	675 3871	20
	15 x 15 cm	5	900 760	675 3889	16

Hydrosorb®

Apósitos de hidrogel



Características

- Pensos absorventes de gel hidrocelular cobertos por uma película semipermeável, para prevenir a penetração de bactérias
- Transparentes
- Devido ao seu elevado teor de água de aprox. 60% proporcionam um ambiente húmido à ferida
- Removem de forma rápida o tecido necrosado, estimulam a granulação e a epiteliação
- Podem ser removidos sem dor e sem deixar quaisquer resíduos

Hydrosorb Comfort

- Pensos absorventes em gel hidrocelular, com as propriedades do Hydrosorb, com margens adicionais de adesivo hipoalergénico



Hydrosorb®comfort

Indicações / Utilização

Especialmente indicados para o tratamento de feridas crónicas de cicatrização lenta, que não se encontrem clinicamente infetadas, por. ex.: úlceras varicosas, úlceras de pressão, queimaduras de segundo grau.


Para cobertura de zonas de onde foram retirados enxertos de pele, abrasões.

Pensos indicados para as fases de granulação e epiteliação.

Modo de ação

O penso hidrocolóide absorve o exsudado das feridas superficiais com exsudado ligeiro a moderado, contaminado com bactérias, e retém-no de maneira segura na sua matriz de gel. Assegura um ambiente húmido e equilibrado essencial para a granulação.

Ao mesmo tempo, Hydrosorb absorve o exsudado em excesso, retendo-o na matriz de gel. Desta maneira Hydrosorb assegura um nível de humidade equilibrado.

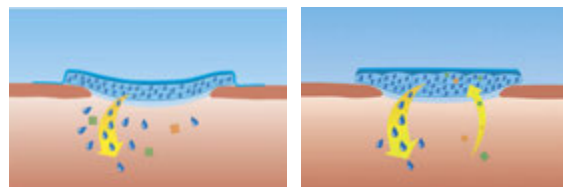

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Hydrosorb®	5 x 7,5 cm	5	900 853	675 3723	6
	10 x 10 cm	5	900 854	675 3731	6
	20 x 20 cm	3	900 855	675 3749	5
	4,5 x 6,5 cm	5	900 702	676 0884	12
	7,5 x 10 cm	5	900 706	675 3814	6
Hydrosorb® Comfort	12,5 x 12,5 cm	5	900 723	675 3822	6

Hydrosorb® Gel

Hidrogel amorfo



Hydrosorb®Gel

Características

- Gel amorfo utilizados para a remoção de tecido necrótico e fibrina. Facilitam a remoção do tecido necrosado libertando permanentemente humidade para a ferida. Desbridamento seguro
- Podem ser conjugados com outros pensos e minimizam a dor durante a mudança do penso



Hydrosorb®Gel

Indicações / Utilização

Para o tratamento húmido interativo, especialmente indicados quando o estado da ferida requer limpeza ativa e tratamento de apoio, por exemplo em feridas com difícil cicatrização e muito exsudativas, em feridas clinicamente infetadas, ou em feridas crónicas de variadas etiologias, tais como gangrenas diabéticas, escaras e úlceras de perna.

Modo de ação

Hydrosorb é um gel hidrófilo com polímeros de poliuretano com uma elevada percentagem de água que protege a ferida de maneira fiável contra a secura e previne assim a formação de crostas.



Dosagem segura

A ponta da seringa ajuda a aplicar o gel diretamente na ferida, facilitando o desbridamento de fístulas.

Eficácia de custos

Ao contrário dos outros aplicadores que retêm gel residual, a seringa pode ser efetivamente esvaziada. A seringa também pode ser tapada caso o tratamento seja interrompido.

Documentação simples

A profundidade da ferida e o volume de gel residual na seringa podem ser determinados ao milímetro.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Hydrosorb® Gel	15 g	10	900 844	679 9650	10

Hydrotul®

Apósito impregnado hidroactivo



Hydrotul®

Características

- São gazes impregnadas de simples utilização que podem ser conjugadas com outros pensos e ligaduras



Hydrotul®

Sem parafina
Sem cera

Indicações / Utilização

Todos os tipos de feridas superficiais, desde feridas secas a feridas com exsudado muito elevado, infetadas ou não infetadas.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Hydrotul®	5 x 5 cm	10	499 581	612 8033	12
	10 x 12 cm	10	499 583	612 8009	12
	10 x 12 cm	60	499 585	612 8017	1
	2 g / 30 cm	5	499 584	679 9643	6

Medicomp®

Compressa em tecido não tecido

Características

- Compressa com elevada capacidade de absorção, em tecido não tecido branco
- Isenta de agentes de ligação e agentes branqueadores óticos



Medicomp® e Medicomp® Estéril



Medicomp®

Indicações / Utilização

Para o tratamento de feridas em geral.

Para limpeza de zonas e peles sensíveis (por ex. bebés e crianças).

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Medicomp®	5 x 5 cm	100	411 831	670 4361	50
	7,5 x 7,5 cm	100	411 833	670 4379	50
	10 x 10 cm	100	411 835	670 4387	50
	10 x 20 cm	100	421 827	621 0153	6

Medicomp® Estéril

Compressa em tecido não tecido esterilizado

Características

- Apresentação em bolsa com 2 compressas
- Em caixa dispensadora



Medicomp® Estéril

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Medicomp® Estéril	5 x 5 cm	25 x 2	411 074	619 8093	50
	7,5 x 7,5 cm	25 x 2	411 072	630 3842	40
	10 x 10 cm	25 x 2	411 064	618 0059	40
	10 x 10 cm	50 x 5	411 535	676 0983	5
	10 x 20 cm	25 x 2	411 075	630 3859	15

Grassolind®

Compressa impregnada

Características

- Compressa neutra de gaze com vaselina, permeável ao ar
- A impregnação consiste em: vaselina, éster de diglicerol de ácidos gordos, monocarboxílicos, dicarboxílicos e cera



Grassolind®



Grassolind®

Indicações / Utilização

Para feridas exsudativas superficiais, abrasões, lacerações, feridas profundas, queimaduras, escaldaduras, queimaduras ácidas, para cobertura de zonas dadoras e recetoras de pele enxertada e em cirurgia plástica e cosmética.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Grassolind®	5 x 5 cm	10	499 310	676 0777	20
	7,5 x 10 cm	10	499 313	675 3616	12
	10 x 10 cm	10	499 314	675 3624	12
	10 x 20 cm	30	499 336	675 3632	10

Eycopad®

Penso ocular



Eycopad®

Características

- Penso ocular de algodão, com uma camada de gaze em algodão puro
- Particularmente macio e absorvente
- Excelente efeito almofadado que se mantém por muito tempo
- Esterilizados e embalados individualmente

Indicações / Utilização

Proteção e tratamento de feridas traumáticas pós intervenções oculares.



Eycopad®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Eycopad®	56 x 70 cm	25	415 540	676 9364	12

Cosmopor® Antibacterial

Penso esterilizado para pós-operatório



Cosmopor Antibacterial

Características

- Garante uma aplicação rápida e segura na aplicação
- Adapta-se de uma forma eficaz à ferida e promove uma excelente proteção mecânica
- Evita a aderência com o leito da ferida
- Os cantos arredondados evitam que o penso enrole quando da sua aplicação



Cosmopor Antibacterial

Indicações / Utilização

Para o tratamento de feridas pós-operatórias e cobertura estéril de pequenas feridas, por ex. em primeiros socorros.


Especialmente indicado para feridas com elevado risco de infecção.

Camada de Prata

Esta camada metálica (Ag) garante a profilaxia da infecção

Camada de contacto

Malha de polietileno
A malha de polietileno é micro perfurada e impede a aderência do penso à ferida

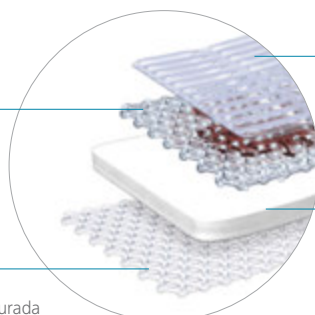

Camada de absorção

SAF = fibras super absorventes
O exsudado é permanentemente controlado por esta camada

Camada de transferência

Fibras de viscose. O exsudado é rapidamente transferido da ferida para esta camada que, por sua vez, o transfere para a camada de absorção

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Cosmopor® Antibacterial	7,2 x 5 cm	25	901 010	621 2258	20
	7,2 x 5 cm	10	901 018	621 5772	20
	10 x 6 cm	25	901 011	621 2266	24
	15 x 6 cm	25	901 012	621 2274	18
	10 x 8 cm	25	901 013	621 2282	18
	15 x 8 cm	25	901 014	621 2290	12
	20 x 10 cm	25	901 015	621 2308	10

Cosmopor® Steril

Penso pós-operatório



Cosmopor®Steril

Características

- Penso autoadesivo que se distingue dos pensos tradicionais pela inovadora combinação dos seus materiais
- Ideal para o tratamento de feridas pós-operatórias
- O núcleo absorvente é 100% algodão
- Adere aos contornos do corpo e tem excelentes propriedades absorventes e de proteção
- A suave cobertura em tecido não tecido é permeável ao ar e ao vapor de água, não interferindo assim com as funções naturais da pele

Indicações / Utilização

Para o tratamento de feridas pós-operatórias e cobertura estéril de pequenas feridas, por ex. em primeiros socorros.



Cosmopor®Steril

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Cosmopor® Steril	7,2 x 5 cm	10	900 833	630 7454	20
	7,2 x 5 cm	50	900 800	670 4544	20
	10 x 6 cm	25	900 802	670 4551	27
	15 x 6 cm	25	900 804	670 4569	18
	10 x 8 cm	25	900 806	670 4577	22
	15 x 8 cm	25	900 808	670 4585	14
	20 x 8 cm	25	900 810	670 4593	13
	20 x 10 cm	25	900 812	670 4601	12
	25 x 10 cm	25	900 814	670 4619	8
	35 x 10 cm	25	900 816	670 4627	7

Cosmopor® Strip

Penso de tecido não tecido em banda



Cosmopor®Strip

Características

- Tira adesiva de tecido não tecido revestida com uma borracha sintética
- Hipoalergénica
- Permeável ao ar e ao vapor de água
- Não adere à ferida
- Com uma compressa antiaderente colocada no centro da superfície do adesivo.

Indicações / Utilização

Indicada para o tratamento de pequenas feridas
Para pacientes com pele sensível



Cosmopor®Strip

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Cosmopor® Strip	4 cm x 10 cm	10	900 960	679 3810	78
	8 cm x 10 cm	10	900 962	679 3794	78
	5 m x 4 cm	1 rolo	900 963	679 3828	32

Hydrofilm®

Película transparente



Hydrofilm®

Características

- Película autoadesiva transparente para a proteção e tratamento de feridas, que favorece o processo natural de cicatrização criando um ambiente favorável
- Protege a ferida de microrganismos patogênicos, reduzindo assim o risco de infecções secundárias
- A película de poliuretano semipermeável facilita a passagem de gases e humidade.
- Dado que é completamente transparente, a ferida pode ser inspecionada sem se remover o penso



Hydrofilm®

Indicações / Utilização

É particularmente útil como proteção para feridas secas ligeiramente exsudativas não infetadas, por exemplo feridas cirúrgicas após dermo-abrasão cirúrgica ou enxertos de pele, queimaduras de primeiro grau, abrasões e úlceras de decúbito.

Também pode ser usado como proteção contra líquidos e bactérias para cobertura de pensos absorventes (ex. compressas, alginatos de cálcio ou para fixar cânulas e catéteres).

Destina-se ao tratamento estéril pós-operatório de feridas ligeiramente exsudativas e à cobertura de feridas cirúrgicas.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Hydrofilm®	6 x 7 cm	10	685 755	612 7613	20
	6 x 7 cm	100	685 756	612 7621	10
	10 x 12,5 cm	10	685 757	612 7647	20
	10 x 12,5 cm	100	685 758	612 7639	10
	10 x 15 cm	10	685 759	675 3699	10
	10 x 15 cm	50	685 760	675 3707	10
	15 x 20 cm	10	685 761	612 7688	10
	15 x 20 cm	50	685 762	612 7662	10
	10 x 25 cm	25	685 763	612 7654	10
	12 x 25 cm	25	685 764	612 7605	10
	20 x 30 cm	10	685 765	612 7670	10

Hydrofilm® Roll

Película transparente



Hydrofilm®Roll

Características

- Película autoadesiva para a fixação de pensos primários, composta por poliuretano transparente, semipermeável, à prova de água, que proporciona proteção contra a penetração de bactérias
- Com adesivo hipoalergénico, pode ser removido de forma indolor, sem deixar resíduos

Indicações / Utilização

Película de proteção particularmente utilizada para a fixação de pensos primários (ex. para cobrir a formação de gel do alginato de cálcio).



Hydrofilm®Roll

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Hydrofilm® Roll	5 cm x 10 m	1	685 790	621 2068	24
	10 cm x 10 m	1	685 792	621 2084	32
	15 cm x 10 m	1	685 793	621 2092	20

Hydrofilm® Plus

Penso pós-operatório impermeável



Hydrofilm®Plus

Características

- Penso adesivo transparente com um núcleo absorvente não aderente à ferida. Graças à película extremamente fina e transparente, pode inspecionar-se a ferida e a secreção absorvida pelo núcleo absorvente a qualquer momento
- Evitam-se mudanças de penso desnecessárias. Protege a ferida de microrganismos patogénicos e é impermeável.
- Assim o risco de infeções secundárias é reduzido e o paciente pode tomar duche ou banho. A película de poliuretano semipermeável permite a passagem de gases e humidade
- A camada adesiva hipoalergénica assegura uma boa aderência, mesmo em partes difíceis do corpo.

Indicações / Utilização

É particularmente útil como proteção para feridas secas ligeiramente exsudativas não infetadas, por exemplo feridas cirúrgicas após dermo-abrasão cirúrgica ou enxertos de pele, queimaduras de primeiro grau, abrasões e úlceras de decúbito.

Destina-se ao tratamento estéril pós-operatório de feridas ligeiramente exsudativas e à cobertura de feridas cirúrgicas.



Hydrofilm®Plus

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Hydrofilm® Plus	5 x 7,2 cm	5	685 770	612 7696	20
	5 x 7,2 cm	50	685 771	612 7704	10
	9 x 10 cm	5	685 772	612 7712	20
	9 x 10 cm	50	685 773	612 7720	10
	9 x 15 cm	5	685 774	612 7738	20
	9 x 15 cm	25	685 775	612 7746	10
	10 x 12 cm	25	685 776	612 7753	10
	10 x 20 cm	5	685 777	612 7761	10
	10 x 20 cm	25	685 778	612 7779	10
	10 x 25 cm	25	685 779	612 7787	10
	10 x 30 cm	25	685 780	612 7795	10

Omniplast®

Adesivo comum



Omniplast®

Características

- Adesivo cirúrgico hipoalergénico de tecido têxtil com adesivo em cola sintética
- Permeável ao ar e ao vapor de água
- Adere de forma segura
- Pode ser removido sem dor e sem deixar resíduos na pele
- Fácil de rasgar devido às suas margens em zig-zag
- Não absorve os raios X
- Resistente ao tempo e à temperatura.

Indicações / Utilização

Para todo o género de retenção de pensos, para fixar sondas, cânulas, etc.

Para pacientes com pele normal.



Omniplast®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Omniplast® (cor da pele)	1,25 cm x 5 m	1 rolo	900 530	670 3892	360
	2,5 cm x 5 m	1 rolo	900 531	670 3900	240
	5 cm x 5 m	1 rolo	900 532	670 3918	120

Omnistrip®

Tiras de sutura cutânea



Omnistrip® Emb. Farmácia



Omnistrip®

Características

- É produzido em poliéster/poliamida, coberto por um adesivo acrílico autocolante
- Tem bordos arredondados, é flexível e extensível, com alta porosidade e permeabilidade à água e ao ar e boa aderência à pele

Indicações / Utilização

Para fechar feridas, utilizado em alternativa à sutura com fios, ou à cirurgia específica para fechar feridas acidentais e incisões do escalpelo, fazendo aderir o adesivo à pele e unindo os bordos da ferida.



Omnistrip®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Omnistrip®	3 x 76 mm	250/5	540 681	616 6900	6
	6 x 38 mm	300/6	540 682	616 6918	6
	6 x 76 mm	150/3	540 683	616 6926	6
	6 x 101 mm	500/10	540 684	616 6934	6
	12 x 101 mm	300/6	540 685	616 6942	6
Omnistrip® Emb. Farmácia	6 x 38 cm	12	540 030	697 0525	20
	6 x 76 cm	6	540 040	697 0517	10

Omnipor®

Adesivo em tecido não tecido

Características

- Adesivo cirúrgico hipoalergénico de tecido não tecido branco com cola sintética
- Extremamente permeável ao ar e ao vapor de água
- Com boa adesividade, sem provocar maceração
- Pode ser removido sem dor e sem deixar marcas
- Com acabamento à prova de água
- Fácil de rasgar
- À prova de raios X
- Durável
- Resistente ao tempo e à temperatura



Omnipor®

Indicações / Utilização

Adesivo para cobertura e fixação em caso de pacientes com pele muito sensível.

Especialmente para ligaduras de longo prazo e para fixação de dispositivos de medição, sondas, etc., em partes do corpo particularmente sensíveis.



Omnipor®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Omnipor®	1,25 cm x 5 m	1 rolo	900 550	676 9224	360
	2,5 cm x 5 m	1 rolo	900 551	676 9232	240
	5 cm x 5 m	1 rolo	900 552	676 9240	120

Omnisilk®

Adesivo de seda sintética



Omnisilk®

Características

- Adesivo hipoalergénico de seda artificial branca com cola sintética
- Boas propriedades de duração e resistência à temperatura
- Permeável ao ar e ao vapor de água
- Boa aderência
- Fácil de rasgar
- Radiotransparente

Indicações / Utilização

Para retenção suave de pensos, fixação de sondas, cânulas, cateteres, etc.

Para pacientes com pele sensível.



Omnisilk®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Omnisilk®	1,25 cm x 5 m	1 rolo	900 500	670 3983	360
	2,5 cm x 5 m	1 rolo	900 501	670 3991	240
	5 cm x 5 m	1 rolo	900 502	670 4007	120

Omnitape®

Adesivo forte não elástico



Omnitape®

Características

- Adesivo forte 100% viscoso, com cola de óxido de zinco
- Particularmente tênsil e não elástico para limitar o movimento ou imobilizar articulações.



Omnitape®

Indicações / Utilização

Para envolvimento funcional, por exemplo: estabilização das articulações, especialmente em caso de rotura de ligamentos.

Para apoio e alívio de lesões musculares.

Para o tratamento de manutenção de luxações.

Como medida profilática e de recuperação em medicina desportiva.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Omnitape®	2 cm x 10 m	1 rolo	500 058	676 9190	96
	3,75 cm x 10 m	1 rolo	500 059	676 9208	96
	5 cm x 10 m	1 rolo	500 060	676 9216	48

Omnifilm®

Adesivo de película plástica microperfurada



Omnifilm®

Características

- Adesivo hipoalergénico de seda artificial branca com cola sintética
- Boas propriedades de duração e resistência à temperatura
- Permeável ao ar e ao vapor de água
- Boa aderência
- Fácil de rasgar
- Radiotransparente

Indicações / Utilização

Para retenção suave de pensos, fixação de sondas, cânulas, cateteres, etc.

Para pacientes com pele sensível.



Omnifilm®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Omnifilm®	1,25 cm x 5 m	1 rolo	900 520	675 6791	360
	2,5 cm x 5 m	1 rolo	900 521	675 6809	240
	5 cm x 5 m	1 rolo	900 522	675 6817	120

Omnifix®

Banda adesiva em tecido não tecido



Omnifix®

Características

- Banda autoadesiva hipoalergénica de tecido não tecido com adesivo sintético para fixar pensos
- Especialmente macia e elástica no sentido da largura
- Muito permeável ao ar e ao vapor de água. Não macera e tem boa aderência
- Retira-se sem dor e sem deixar marcas. É esterilizável
- Neutra contra os raios X
- Durável e não altera devido a mudanças de temperatura

Indicações / Utilização

Fixação e retenção de pensos, cobrindo totalmente as articulações e partes angulares do corpo sem impedir os movimentos.

Fixação de equipamento, cateteres e cânulas.

Indicado para pacientes com pele sensível.



Omnifix®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Omnifix®	10 cm x 2 m	1 rolo	900 601	670 4064	24
	5 cm x 10 m	1 rolo	900 602	670 4080	60
	10 cm x 10 m	1 rolo	900 603	670 4106	32
	15 cm x 10 m	1 rolo	900 604	670 4163	20
	20 cm x 10 m	1 rolo	900 605	670 0967	16

Peha-crepp® E

Ligadura de fixação superelástica



Peha-crepp®E

Características

- Ligadura de contenção superelástica, em tecido suave com grande proporção de fibras naturais
- Elasticidade aproximada de 155%
- Rápida e fácil aplicação
- Sem necessidade de voltas para fixar
- Não escorrega
- Pode ser fervida e esterilizada.

Indicações / Utilização

Ligadura de retenção, especialmente para articulações e partes cónicas do corpo.



Peha-crepp®E

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Peha-crepp®E	4 cm x 4 m	1	303 010	675 4127	160
	6 cm x 4 m	1	303 011	675 4135	200
	8 cm x 4 m	1	303 012	675 4143	200
	10 cm x 4 m	1	303 013	675 4150	120
	12 cm x 4 m	1	303 014	675 4168	80

Peha-Lastotel®

Ligadura de fixação com elevada elasticidade



Peha-Lastotel®

Características

- Ligadura de contenção extremamente elástica DIN 61634-FB, com fios de urdidura de poliamida e fios de trama suaves para a pele
- Produzida a partir de fibras de viscose hidrofílicas
- Elasticidade aprox. 140%
- Aplicação rápida e fácil, sem necessidade de voltas para fixar
- Mantém-se fixa sem deslizar
- Pode ser esterilizada
- Cor branca

Indicações / Utilização

Ligadura de retenção, especialmente nas articulações e partes cónicas ou redondas do corpo.

Ideal para fixar talas.



Peha-Lastotel®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Lastotel®	4 cm x 4 m	1	931 621	675 7823	160
	6 cm x 4 m	1	310 101	675 7831	200
	8 cm x 4 m	1	310 102	675 7849	200
	10 cm x 4 m	1	310 101	675 7856	120
	12 cm x 4 m	1	310 104	675 7864	80

Peha-haft®

Ligadura elástica de fixação coesiva



Peha-haft®

Características

- Ligadura elástica coesiva de contenção
- Com efeito coesivo duplo devido à estrutura crepe do tecido e à sua impregnação em látex
- Elasticidade aprox. de 85%
- Utilização económica do material devido à sua coesão
- São necessárias apenas algumas voltas para assegurar uma aplicação segura
- Adere a si própria e não aos pelos, pele ou roupa. Permeável ao ar e bem tolerada pela pele
- Pode ser esterilizada

Indicações / Utilização

Para retenção de pensos, especialmente em articulações

Partes cónicas e arredondadas do corpo

Fixação de material ortopédico, cânulas, etc

Indicada como ligadura de apoio com compressão ligeira



Peha-haft®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Peha-haft®	4 cm x 4 m	1	932 441	670 4189	90
	6 cm x 4 m	1	932 442	670 4114	90
	8 cm x 4 m	1	932 443	670 4122	120
	10 cm x 4 m	1	932 444	670 4130	135
	12 cm x 4 m	1	932 445	670 4197	84

Stülpa-fix®

Rede tubular



Stülpa-fix®

Características

- Ligadura tubular de rede elástica com uma elevada proporção de fibras de algodão
- De rápida e fácil colocação e retenção segura e durável
- Pode mudar-se facilmente o penso sem retirar a ligadura
- Pode ser cortada ao tamanho sem rasgar
- Pode ser esterilizada

Indicações / Utilização

Ideal para cobertura e retenção em todas as partes do corpo.



Stülpa-fix®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Stülpa-fix®	Nº1 (dedos)	1 c/ 25m	932 541	618 6809	16
	Nº2 (mão, braço, pé, perna criança)	1 c/ 25m	932 542	618 6817	10
	Nº3 (perna estreita, cabeça de criança)	1 c/ 25m	932 543	618 6825	8
	Nº4 (cabeça, tronco de criança e perna larga)	1 c/ 25m	932 544	618 6833	5
	Nº 5 (tronco)	1 c/ 25m	932 545	618 6841	4
	Nº 6 (tronco largo)	1 c/ 25m	932 546	618 6858	3
	Nº 7 (tronco muito largo)	1 c/ 25m	932 547	618 6866	3

Idealast®

*Ligadura de contenção com pouca elasticidade, 69% algodão,
31% poliamida, coesiva*



Idealast®

Características

- Ligadura coesiva de elasticidade permanente de curta tração, com tecido igual ao das "Ideal bandages". Não perde a elasticidade durante o uso
- Boa pressão em atividade com pressão ligeira durante o repouso, com extensibilidade aprox. de 80%
- Efeito aderente bilateral para um ajuste anti-deslizante
- Podem ser usadas em posição de repouso. Permeáveis ao ar
- Laváveis à mão e reutilizáveis. Esterilizáveis



Idealast®

Indicações / Utilização

Para compressão moderada.

Como profilaxia e seguimento em problemas venosos.

Indicada como ligadura de apoio e de alívio em lesões músculo-esqueléticas.

Como ligadura de desporto.

Para retenção de pensos com efeito compressivo.

Para segurar talas.

Também pode ser utilizada quando o paciente está a repousar.

Pode ser fervida e esterilizada.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Idealast®	6 cm x 5 m	1	931 153	675 4002	70
	8 cm x 5 m	1	931 154	675 4010	55
	10 cm x 5 m	1	931 155	675 4028	60
	12 cm x 5 m	1	931 156	616 6884	50
	15 cm x 5 m	1	931 157	675 4036	45
	20 cm x 5 m	1	931 158	616 6892	30
Idealast® Color Sort.	10 cm x 4 m	10	931 103	676 9356	6

Idealast-haft® Latexfree

Ligadura coesiva de elasticidade permanente até 90%



Idealast-haft®

Características

- Ligadura de curta tração com efeito coesivo em ambos os lados da ligadura para um ajuste perfeito
- Pressão em atividade com pressão ligeira durante o repouso
- Permeável ao ar
- Pode ser esterilizável (vapor a 134°C)
- Radio-transparente, branca



Idealast-haft®

Indicações / Utilização

Para compressão leve a moderada.

Profilaxia e follow-up em problemas venosos.

Como ligadura de suporte e de alívio em lesões músculo-esqueléticas.

Como ligadura de desporto.

Para retenção de pensos com efeito compressivo.

Para segurar talas.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Idealast-haft® Latexfree	6 cm x 4 m	1	931 110	40
	8 cm x 4 m	1	931 111	40
	10 cm x 4 m	1	931 112	40

Idealflex® Universal

Ligadura elástica permanente



Idealflex® Universal

Características

- Ligadura elástica permanente, multiusos, com elasticidade de aprox. 85%
- Bem tolerada pela pele
- Pode ser lavada e esterilizada
- Em branco natural
- Composição do material: 66% algodão, 33% poliamida, 1% elastano



Idealflex® Universal

Indicações / Utilização

Indicada como ligadura de retenção com efeito de compressão.

Para compressão leve.

Utilizada como ligadura de alívio e suporte de lesões músculo-esqueléticas.

Como ligadura de desporto.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Idealflex® Universal	6 cm x 5 m	10	931 271	28
	8 cm x 5 m	10	931 272	18
	10 cm x 5 m	10	931 273	21
	12 cm x 5 m	10	931 274	23
	15 cm x 5 m	10	931 275	18
	20 cm x 5 m	10	931 276	8

Idealhaft®

Ligadura coesiva de baixa elasticidade, 100% algodão

Características

- Ligadura coesiva de baixa extensibilidade com tecido igual ao da "Ideal bandage"
- Elasticidade de cerca de 60%
- Efeito coesivo para ajuste perfeito
- Boa pressão em atividade com pressão ligeira durante o repouso
- Também pode ser utilizada quando o paciente está a repousar
- Permeável ao ar
- Lavável à mão e reutilizável



Idealhaft®

Indicações / Utilização

Para compressão forte em edemas venosos crônicos obstrutivos, úlceras de perna e tromboflebitas cicatrizadas.

Follow-up de problemas venosos e em fleboartroses do joelho.

Como ligadura de apoio e de alívio em lesões músculo-esqueléticas.

Como ligadura de desporto.



Idealhaft®

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Idealhaft®	8 cm x 5 m	1	931 694	618 6874	40
	10 cm x 5 m	1	931 695	618 6882	40

Tensocrepe® R85

Ligadura elástica de contenção, 100% algodão



Tensocrepe®R85

Características

- Ligadura de elasticidade longitudinal com superfície em crepe e boa tolerância cutânea
- Confortável e sem restrições de mobilidade
- Respirável
- Absorvente
- Não escorrega
- Lavável
- Resistente a unguentos, óleos, gorduras e transpiração
- Esterilizável

Indicações / Utilização

Ligadura indicada para compressão moderada.
Para o tratamento e profilaxia de distúrbios venosos.
Como ligadura de apoio e suporte em lesões músculo-esqueléticas.
Como ligadura de desporto.
Como ligadura de retenção com efeito compressivo.
Para fixação de talas.



Tensocrepe®R85

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tensocrepe® R85	5 cm x 4 m	1	935 110	677 3481	50
	7 cm x 4 m	1	935 111	677 3499	50
	10 cm x 4 m	1	935 112	677 3507	50
	15 cm x 4 m	1	929 067	677 3515	50
	20 cm x 4 m	1	929 068	677 3523	50

Elastocrepe®

Ligadura de contenção, 90% de elasticidade



Elastocrepe®

Características

- Ligadura de curta tração, com orela, com elasticidade têxtil de 90%, lavável e esterilizável
- A elasticidade perdida durante a utilização é recuperada com a lavagem das ligaduras
- Existe uma linha central para ajudar a criar a técnica de sobreposição correta

Indicações / Utilização

É utilizada para compressão em edemas obstrutivos de origem venosa crônica, úlceras nas pernas, em tratamentos profiláticos, em tromboflebites, acompanhamento de doenças venosas e profilaxia de trombose (pré e pós-operatória).

Indicada como ligadura de suporte e alívio em lesões músculo-esqueléticas, como apoio de entorses e distensões, para veias varicosas, como suporte para auxiliar a reabilitação após cirurgia ortopédica.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Elastocrepe®	5 cm x 4,5 m	1	931 361	677 3481	264
	7,5 cm x 4,5 m	1	931 362	677 3457	252
	10 cm x 4,5 m	1	931 363	677 3465	180
	15 cm x 4,5 m	1	931 364	677 3473	120

Pütter-haft® Latexfree

Ligadura coesiva de baixa elasticidade, 100% algodão



Pütter-haft®

Características

- Ligadura coesiva em algodão crepe, de curta tração, com elasticidade têxtil de aproximadamente 60%, efeito coesivo em ambos os lados da ligadura para um ajuste perfeito
- Elevada pressão quando em atividade e pressão ligeira durante o repouso
- Também pode ser utilizada quando o paciente está numa posição de repouso, permeável ao ar
- Pode ser esterilizável (vapor a 134°C)
- Radiotransparente, da cor da pele.



Pütter-haft®

Indicações / Utilização

Para compressão forte.

Em edemas venosos crônicos obstrutivos, úlceras de perna cicatrizadas e tromboflebites, para o tratamento de "follow-up" de patologias de origem venosa e em fleboartroses do joelho.

Como ligadura de apoio e de alívio em lesões musculoesqueléticas.

Como ligadura de desporto.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Pütter-haft® Latexfree	6 cm x 5 m	1	931 840	-	60
	8 cm x 5 m	1	931 841	618 6874	40
	10 cm x 5 m	1	931 842	618 6882	40

Verba®

Ligadura de apoio pós-operatória



Verba®

Características

- Ligadura de apoio pós-operatória alternativa às ligaduras elásticas
- Alivia grandes feridas abdominais
- Previne hérnias incisionais



Verba®

Indicações / Utilização

Indicada para fixar grandes pensos, mesmo sob compressão.

Permite a verificação rápida e confortável da ferida durante a visita médica.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Verba®	Nº1 65 - 75 cm	1	932 531	789 4105	15
	Nº2 75 - 85 cm	1	932 532	789 4113	15
	Nº3 85 - 95 cm	1	932 533	789 4121	15
	Nº4 95 - 105 cm	1	932 534	789 4139	15
	Nº5 105 - 115 cm	1	932 535	789 4147	15

Pütterbinde®

Ligaduras de compressão extra forte, baixa elasticidade, curta tração e 100% algodão



Pütterbinde®

Características

- Ligaduras de longa duração, que não se alteram em contacto com a gordura, óleo ou transpiração
- Tempo de aplicação de 1,5 minutos para a desinfeção cirúrgica das mãos e 30 segundos para desinfeção higiénica das mãos
- Tolerância cutânea exceccionalmente boa, mesmo com utilização a longo prazo



Pütterbinde®

Indicações / Utilização

Para compressão extra forte depois da secagem de varizes, edemas agudos ou crónicos devido à congestão venosa.

Úlceras venosas e tromboflebitis utilizando a técnica de ligaduras sobrepostas.

Para doentes com mobilidade.

Pütterbinde®

Embalagem com uma ligadura.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Pütterbinde®	8 cm x 5 m	1	931 808	618 6700	20
	10 cm x 5 m	1	931 810	677 7441	20

Pütter® Flex

Ligaduras de compressão extra forte, baixa elasticidade, curta tração e 100% algodão



PütterFlex

Características

- Ligaduras de longa duração, que não se alteram em contacto com a gordura, óleo ou transpiração
- Permeáveis ao ar e bem toleradas pela pele
- Esterilizáveis (autoclave a 134°)
- Laváveis até 15 vezes
- Podem manter-se na perna durante 7 dias
- Ligaduras de espessura reduzida que permitem o uso de calçado
- Com características bi-elásticas para melhor conformabilidade à forma do pé

Indicações / Utilização

Para compressão extra forte depois da secagem de varizes, edemas agudos ou crónicos devido à congestão venosa.

Úlceras venosas e tromboflebitas utilizando a técnica de ligaduras sobrepostas.

Para doentes com mobilidade.



PütterFlex

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Pütter® Flex	8 cm x 5 m	10	931 832	618 0901	10
	10 cm x 5 m	10	931 833	618 0919	10

Lastodur®

Ligadura de compressão forte e progressiva

Características

- Tração longa e elasticidade permanente, extensibilidade aprox. de 180%
- Tensão variável de acordo com a compressão desejada, resistente, não indicada em posição de descanso como todas as ligaduras de compressão forte
- Permeável ao ar e bem tolerada pela pele
- Durável
- Pode ser fervida
- Da cor da pele



Lastodur®WEICH



Lastodur®STRAFF



Lastodur®WEICH

Lastodur®STRAFF

Indicações / Utilização

Lastodur® WEICH

Para compressão moderada

Para a profilaxia e tratamento de problemas venosos

Para reforçar o nível de compressão, quando aplicada sobre ligaduras elásticas têxteis

Como ligadura de apoio em lesões músculo-esqueléticas.

Lastodur® STRAFF

Para compressão forte

Para a profilaxia e tratamento de problemas venosos

Para reforçar o nível de compressão, quando aplicada sobre ligaduras elásticas têxteis

Como ligadura de apoio em lesões músculo-esqueléticas.

Como ligadura de desporto

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Lastodur® WEICH	10 cm x 7 m	1	931 655	678 0536	40
Lastodur® STRAFF	6 cm x 7 m	1	931 663	675 7773	60
	8 cm x 7 m	1	931 664	675 7781	60
	10 cm x 7 m	1	931 665	675 7799	60
	12 cm x 7 m	1	931 666	675 7807	30
	20 cm x 7 m	1	931 668	675 7815	20

Veno 4®

Ligadura de compressão sem látex



Veno 4®

Características

- É um sistema de ligaduras de compressão de 4 camadas, sem látex, aplicável à maior parte dos pacientes com úlceras de perna venosas
- Quando aplicadas corretamente, as Veno 4® providenciam compressão até 7 dias.

1ª camada



2ª camada



3ª camada



4ª camada



Indicações / Utilização

Para compressão extra forte depois da secagem de varizes, edemas agudos ou crônicos devido à congestão venosa.

Úlceras venosas e tromboflebitis utilizando a técnica de ligaduras sobrepostas.

Para doentes com mobilidade.

O Set consiste em:

- 1 ligadura de almofadamento natural
- 1 ligadura crepe de algodão
- 1 ligadura elástica de compressão ligeira sem látex
- 1 ligadura coesiva de suporte sem látex
- 1 folheto com modo de utilização

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Veno 4®	10 cm	4	931 680	620 4487	5

Varolast® Plus

Ligadura elástica de óxido de zinco



Varolast®Plus

Características

- Ligadura semirrígida impregnada com pasta de óxido de zinco, pronta a usar
- Bem tolerada pela pele
- Seca rapidamente



Varolast®Plus

Indicações / Utilização

Indicada como uma ligadura permanente de compressão no tratamento de flebite em veias profundas ou superficiais.

Para o acompanhamento do tratamento em casos de trombose, úlceras nas pernas e dermatites.

Melhor método de compressão para o controlo de edemas e redução do inchaço provocado por problemas venosos crónicos.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Varolast® Plus	10 cm x 7 m	1	931 583	610 0461	20
	10 cm x 10 m	1	931 585	675 7682	20

Rolta® Soft

Ligaduras de algodão para almofadamento



Características

- Ligadura de almofadamento sintética, muito macia, de fibras de poliéster frisadas, não absorventes. Respirável
- Especialmente macia e bem tolerada pela pele
- Pouco volumosa
- Permeável ao ar e ao exsudado
- Pode ser aplicada sem formar pregas devido à sua extensibilidade tanto longitudinal como transversal
- Retira-se com facilidade
- Pode ser esterilizada e não absorve os raios x

Indicações / Utilização

Como material de proteção sob ligaduras de gesso de Paris ou como ligadura de apoio e compressão quando se pretende apenas um enchimento ligeiro.

Especialmente indicado para pacientes com pele sensível.



Rolta®Soft

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Rolta® Soft	10 cm x 3 m	30	932 049	678 0528	1

Safix® Plus

Gesso de Paris combinado com ligadura de gaze de elevada qualidade



Safix®Plus

Características

- Ligadura de gaze revestida com gesso medicinal natural
- Safix®plus Plaster of Paris (PoP) é enrolada num tubo em cartão com um corte ondulado



Safix®Plus

Indicações / Utilização

Ligaduras

Para imobilização externa em aplicações de ligaduras de gesso com técnicas circulares.

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Safix® Plus	6 cm x 2 m	2	332 730	-	28
	10 cm x 2,7 m	2	332 732	-	12
	15 cm x 2,7 m	2	332 734	-	8
	20 cm x 2,7 m	2	332 735	-	6
	5 cm x 3 m	2	332 739	-	24
	10 cm x 3 m	2	332 741	-	12
	15 cm x 3 m	2	332 744	-	24
	20 cm x 3 m	2	332 745	-	12



Personal
Healthcare



Tensoval® duo control

Tensiómetro de braço

NOVA
GERAÇÃO



Indicações / Utilização

Indicado para medição da tensão arterial no braço.

Valores de medição exatos e fiáveis.

Garante a mesma fiabilidade que a medição do médico usando o estetoscópio, mesmo na tensão arterial muito elevada e em casos de arritmia.

A dupla medição com 2 sensores combina a tecnologia "oscilométrica" (método convencional, através da captação de vibrações na artéria) com a tecnologia "Korotkoff" (pela captação do som da pulsação, através de um microfone no aparelho).

Funciona a pilhas ou ligado à corrente elétrica.

Único, mede com 2 sensores

Aparelhos comuns utilizam apenas 1 sensor na medição da tensão arterial.

Transformador para Tensoval®

Se mede com frequência a tensão arterial em casa, pode utilizar o transformador Tensoval® de forma a poupar bateria.



3 ANOS
GARANTIA

Todas as vantagens



Resultados exatos

A Tecnologia Duo Sensor é única e garante resultados precisos de medição. O Tensoval® duo control é o único que utiliza 2 sensores para uma maior segurança



Clinicamente Validado



3 braçadeiras confortáveis

Utilização simples e intuitiva



Inteligente

Reconhece e indica a arritmia cardíaca



Guarda 120 leituras

Memória suficiente para dois utilizadores
Guarda as medições efetuadas de manhã e à noite



Serviço de reparação

Garantia de serviço técnico gratuito durante 3 anos



Cardio Control online

Possibilidade de transferência de dados para o computador

Apresentação	Tamanho da braçadeira	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tensoval® duo control II	22 - 32 cm	1	900 222	789 4097	4
Tensoval® duo control II acessórios					
Braçadeira pequena	17 - 22 cm	1	900 241	620 5666	10
Braçadeira média	22 - 32 cm	1	900 242	620 5658	10
Braçadeira grande	32 - 42 cm	1	900 243	620 5641	10
Transformador		1	900 152	787 5757	50
Cardio Control online (cabo USB)			900 291	640 3121	4

Tensoval® comfort

Tensiómetro de braço

3 ANOS
GARANTIA



Indicações / Utilização

Indicado para medição da tensão arterial no braço.
Medição rápida com sincronização individual da pulsação.
Manuseamento fácil e confortável com display grande e apenas duas teclas.
Função de memória para 2 x 30 valores de medição e valor médio, incluindo data e hora.
Com bolsa de arrumação de elevada qualidade e resistência.
Mais de 2000 medições com pilhas incluídas.
Clínicamente validado para valores de medição precisos e fiáveis.

Transformador para Tensoval

Se mede com frequência a tensão arterial em casa, pode utilizar o transformador Tensoval® de forma a poupar bateria.



O Tensoval comfort é clinicamente validado pelos institutos independentes:

- ESH-IP2 - European Society of Hipertension
- GHS - Germany Hypertension Society

CLINICAMENTE VALIDADO



Apresentação	Tamanho da braçadeira	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tensoval®comfort	22 - 32 cm	1	900 172	629 4280	4
Tensoval®comfort acessórios					
Braçadeira média	22 - 32 cm	1	900 154	789 4162	50
Braçadeira grande	32 - 42 cm	1	900 155	789 4170	40
Transformador	-	1	900 152	787 5757	50

Tensoval® comfort classic

Tensiómetro de braço



Características

- Tensiómetro automático para medições no braço
- Validado clinicamente (Norma EN 1060-4)
- Com capacidade para 60 memórias e braçadeira de tamanho único (M+L). Simples de manusear (apenas 2 botões), dispõe de um visor de grandes dimensões
- Funciona a pilhas e tem garantia de 3 anos

Indicações / Utilização

Para a medição da pressão arterial no braço, de forma simples e rápida.

Apresentação	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tensoval®comfort classic	900 251	641 22940	8

Tensoval® mobil

O prático tensiômetro de pulso

**3 ANOS
GARANTIA**



Características

- Tensiômetro com tecnologia oscilométrica, com braçadeira para medição no pulso. Graças à nova "Comfort air technology" da HARTMANN, Tensoval® mobil mede a sua tensão arterial de forma mais rápida e confortável
- A insuflação e a saída de ar são completamente automáticas
- Mede a tensão diastólica, sistólica e as pulsações
- Desliga automaticamente e funciona a pilhas

Indicações / Utilização

Indicado para diâmetros de pulso de 12,5 cm até 22,5 cm, para medições mais confortáveis.



O Tensoval mobil é clinicamente validado pelos institutos independentes:

- BHS - British Hypertension Society
- GHS - Germany Hypertension Society

CLINICAMENTE VALIDADO

COMFORT AIR TECHNOLOGY

Nova embalagem

Guarda e protege o seu aparelho

Mais adaptável

12,5 - 22,5 cm de pulso
para medições confortáveis

Novo display

Para uma boa leitura
das medições

Mais medições

60 medições e média de valores
para cada um de dois utilizadores



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tensoval® mobil	1	900 102	789 4089	6

Thermoval® kids flex

Bebês e crianças

Características

- Medição em 10 segundos com "Highspeed technology"
- Sinal acústico
- Ponta macia e flexível
- À prova de água
- 3 anos de garantia



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Thermoval® kids flex	1	925 052	641 2783	12

Thermoval® kids

Crianças

Características

- Medição em 10 segundos com "Highspeed technology"
- Sinal acústico
- Para "piratas" e "princesas"
- À prova de água
- 3 anos de garantia



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Thermoval® kids	1	925 042	641 2791	12

Thermoval® rapid

Adultos

Características

- Medição em 10 segundos com "Highspeed technology"
- Sinal acústico e mostrador de tamanho grande
- À prova de água e com 3 anos de garantia



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Thermoval®rapid	1	925 032	793 6500	12

Thermoval® standard

Características

- Sinal sonoro e função de memória
- A ponta do termômetro pode ser facilmente desinfetada
- 3 anos de garantia



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Thermoval®standard	1	925 022	640 3543	12

Thermoval® Expositor de balcão

Características

- Capacidade para 24 unidades
- Com espaço para folhetos



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Thermoval®Expositor de balcão	1	861 340	24

Thermoval® duo scan

Termómetro de infravermelhos para testa ou ouvido
Clinicamente validado em conformidade com a norma ISO 80601-2-56

3 ANOS
GARANTIA



Características

- Termómetro digital com tecnologia de infravermelhos para medição da temperatura
- Medir a temperatura nunca foi tão rápido e preciso
- Em apenas 1 segundo é possível medir a temperatura no ouvido
- Inclui pilhas, caixa rígida e 6 toalhetes de limpeza



Indicações/Utilização

Para medição da temperatura corporal na testa ou ouvido.
Ideal para toda a família.



Mede a temperatura no ouvido ou na testa

Medição com precisão clínica
Graças à tecnologia de infravermelhos e à medição direta

Resultado imediato
Medição concluída em apenas 1 segundo

Fácil de usar

Ótima qualidade

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Thermoval® duo scan	-	1	925 082	619 2344	4
Soft Zellin toalhetes com álcool	60mm x 30mm	100	999 979	618 0893	20

Thermoval® baby sense

Termómetro de infravermelhos sem contacto

3 ANOS
GARANTIA



Características

- Resultados exatos em 3 segundos
- Medição de temperatura sem ruído: não incomoda o bebé enquanto dorme
- Memória (x10)
- Funcionalidade 3 em 1



Indicações/Utilização

Para medição da temperatura corporal, temperatura do ar e de objectos

Ideal para bebés



Temperatura ambiente,
p.ex: quarto do bebé



Em objetos,
por ex: biberão



Na testa

Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Thermoval® baby sense	1	925 092	696 6291	4

10 REGRAS DE OURO

para a medição da TEMPERATURA
do corpo humano **NO OUVIDO E NA TESTA**

O sensor de medição é o acessório mais importante e sensível do aparelho. De forma a assegurar medições rigorosas, este tem de estar limpo e sem danos.

1

Depois de limpar o sensor de medição aguarde pelo menos 15 minutos até à próxima medição. Isto é essencial para permitir estabilizar a temperatura do termómetro.

2

O utilizador e termómetro deverão estar numa sala à temperatura ambiente durante 30 minutos antes da medição.

3

4

Não efectuar a medição se a testa ou os ouvidos estiverem húmidos, transpirados ou molhados.

5

O ouvido deverá estar o mais limpo possível. Retirar cabelos, suor, cosméticos ou sujidade da testa para garantir a precisão ideal de medição.

Para obter o maior rigor no caso de medições sequenciais, aguardar 30 segundos entre duas medições.

6

A medição pode ser realizada no ouvido direito ou esquerdo.

7

A medição pode ser realizada na testa.

8

9

Verá um símbolo no mostrador indicando se se trata de uma medição no ouvido ou de uma medição na testa.

10

Os valores de temperatura podem divergir de um ouvido para outro. Por isso, deve medir-se sempre a temperatura no mesmo ouvido.



Tiritas® Tela Classic

Características

- Pensos antiaderentes, em suporte têxtil e permeáveis ao ar
- Perfeitos para feridas que requerem muita proteção
- Muito resistentes



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Tela Classic	19 mm x 72 mm	20	535 034	676 3870	200
	6 cm x 10 cm	10	535 004	676 3888	200

Tiritas® Plastic

Características

- Concebidos para proteção em meios húmidos e perfurados para facilitar a transpiração
- Repelem a sujidade e são resistentes à água



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Plastic	19 mm x 72 mm	20	535 124	676 3896	200
	Sortidos	20	535 134	676 6667	200
	19 mm x 72 mm (carteira)	14	535 154	640 8690	600
	6 cm x 10 cm	10	535 104	640 8682	200

Tiritas® Transparent

Características

- Pensos muito discretos e resistentes à água



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Transparent	3 tamanhos	20	535 174	640 8757	200

Tiritas® Sensitive

Características

- Especialmente concebidos para peles sensíveis
- Suaves e permeáveis ao ar



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Sensitive	Sortidos	20	535 334	676 3953	200

Tiritas® Sensitive Elastic

Características

- Especialmente concebidos para zonas sensíveis
- Suaves e permeáveis ao ar



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Sensitive Elastic	6 cm x 1 m	1 Banda	535 484	611 5428	160
	8 cm x 1 m	1 Banda	535 504	612 0881	160

Tiritas® Kids

Características

- A solução ideal para as crianças
- Excelente dermatotolerância graças ao adesivo hipoalergénico
- Com uma película impermeável à água e à sujidade, protegem as feridas de uma forma divertida



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Kids	2 tamanhos	20	535 624	677 6138	200

Tiritas® Sport Protect⁺

Características

- Pensos ideais para quem pratica atividade física
- Com um adesivo almofadado, protegem as feridas da sujidade e da água



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Sport Protect +	Sortidos	30	535 444	676 3987	50

Tiritas® Tela Elastic

Características

- Especialmente indicados para articulações e outras zonas de difícil adesividade
- Pensos que se adaptam a todos os tipos de pele
- Elásticos e muito confortáveis
- Formato "Rapid" permite a aplicação do penso de uma só vez, de forma extremamente rápida e confortável



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Tela Elastic	6 cm x 10 cm	10	535 204	676 6709	200
Tiritas® Tela Elastic Rapid	2 tamanhos	20	535 814	612 5153	180

Tiritas® Aqua

Características

- Pensos totalmente impermeáveis à água
- Permeáveis ao ar



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Aqua	3 tamanhos	20	535 534	613 5210	160

Tiritas® DermaActive® Penso labial

Vantagens

- Reduzem a dor e o ardor, favorecendo a cicatrização
- Máxima adaptabilidade devido à sua forma oval
- Reduzem o risco de contágio
- Muito discretos e de fácil aplicação



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
DermaActive® Penso labial	1,7 cm x 1,2 cm	16	536 084	615 2843	10

Tiritas® DermaActive® Bolhas e Calos

Características

- Pensos hidrocolóides, para proteção e tratamento de bolhas
- Nova tecnologia twintec: Dupla discrição, dupla proteção, duplo conforto
- De espessura reforçada, com maior resistência à fricção
- A sua superfície é totalmente hidrocolóide
- Aliviam a dor imediatamente após a aplicação e favorecem a cicatrização.
- Transparentes, tornam-se muito discretos após aplicação
- Remoção indolor
- Permeáveis ao ar e impermeáveis à água e à sujidade



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
DermaActive® Bolhas pequenas	6	536 034	642 4812	10
DermaActive® Bolhas grandes no calcanhar	5	536 014	642 4820	10
DermaActive® Bolhas XL	6	536 044	640 8765	10
DermaActive® Calos	7	536 998	642 4804	10

Tiritas® DermaActive® Queimaduras

Características

- Pensos em hidrogel, para o tratamento eficaz de queimaduras, que favorecem a cicatrização
- Aliviam a dor, proporcionando uma sensação de frescura após aplicação
- De fácil aplicação, bem tolerados pela pele e de remoção indolor
- Permeáveis ao ar, praticamente invisíveis e impermeáveis à água e à sujidade
- Esterilizados



Apresentação	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
DermaActive® Queimaduras Peq.	536 744	640 8633	12
DermaActive® Queimaduras Grd.	536 734	640 8674	12

Tiritas® DermaActive® Protect Spray+

Características

- Penso em spray que protege as feridas, especialmente nas partes do corpo mais difíceis de fixar um penso tradicional
- A película em spray é transparente, quase invisível e permite o controlo permanente da ferida
- Aplicar a película na ferida com um movimento uniforme, a uma distância de aproximadamente 10 a 15 cm
- O penso em spray seca após cerca de 30 segundos e não arde
- Aplicar uma segunda camada se necessário



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
DermaActive® Protect Spray+	21,5 ml	1	535 774	611 9321	20

Tiritas® Detectables



Características

- Pensos rápidos em película de polietileno repelente à água e à sujidade
- Com adesivo sintético e núcleo absorvente
- De cor azul para fácil deteção

Indicações

Para o tratamento rápido de pequenas feridas

Fácil deteção visual e electromagnética na indústria

Para profissionais do ramo alimentar que necessitam de detetar visualmente e electromagneticamente (no caso de uma máquina detetora de metais), um possível e accidental desprendimento do penso durante a manipulação, facto que poderá afetar a qualidade garantida por esses profissionais

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Detectables azuis	19 mm x 72 mm	100	550 601	610 8233	36

Tiritas® Plastic



Características

- Pensos rápidos em película de polietileno
- Com adesivo sintético e núcleo com elevada capacidade de absorção
- Repelem a água e a sujidade

Indicações

Especialmente indicados para o tratamento de pequenas feridas

Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Tiritas® Plastic	redondos 22 mm	1000	281 421	676 3938	16
	19 mm x 72 mm	250	281 423	676 3946	32

Expositor Pensos Rápidos

Características

- Expositor em acrílico cristal
- Com base regulável e folheto/mostruário de pensos

Modelo

Expositor acrílico em formato de penso rápido.

Dimensão

55,8 x 29 x 185 cm

Capacidade

Sistema com 22 ganchos metálicos para fixação de diferentes pensos rápidos.



Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN
Expositor Pensos Rápidos	1	861 400

DermaPlast®

Características

- Pensos hipoalergénicos de tecido não tecido elástico e suave
- Com adesivo sintético e núcleo absorvente
- Podem ser removidos sem dor
- Da cor da pele, para partes particularmente sensíveis do corpo



Indicações

Tratamento após injeções

Pequenos ferimentos, especialmente nas articulações e partes cónicas do corpo

Em pacientes com pele sensível ou em partes particularmente sensíveis do corpo



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Dermaplast® Penso para análises	40 mm x 16 mm	250	535 381	610 1162	60

Soft-Zellin®

Características

- Toallete de álcool em tecido não tecido
- Impregnado com álcool isopropílico (70% v/v)
- Pronto a usar
- Particularmente flexível e suave



Indicações

Adequado para a limpeza da pele antes de injeções subcutâneas e da recolha de amostras de sangue capilar.

Para limpeza e desinfeção dos sensores dos termómetros de infravermelhos Thermoal.

Utilizar este produto apenas em conformidade com as normas e regulamentos nacionais, em vigor.



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Soft-Zellin®	60 mm x 30 mm	100	999 979	618 0893	20

Calmor®



Características

- Bolsa de gel reutilizável para a aplicação local de frio ou calor
- Mesmo a temperaturas de -18°C mantêm-se flexível e adaptável
- Devido ao seu sistema de fixação (incluído na bolsa), pode-se aplicar em qualquer parte do corpo que necessite tratamento
- Calmor® frio calor é composto a 100% por substâncias naturais e biodegradáveis que não contaminam o meio ambiente



Indicações

Hipertermoterapia (calor)

Alívio da dor em caso de lombalgias, dores menstruais, dores musculares, reumatismo, dores de costas, estados de hipotermia, devido à sua ação estimulante da circulação sanguínea e aos seus efeitos relaxantes sobre a musculatura

Crioterapia (frio)

Alívio da dor em caso de pancadas

Inflamações, dor de cabeça, enxaquecas, contusões, "cotovelo de tenista", luxações, entorses, dor de dentes, picadas de insetos, queimaduras superficiais

Indicado também em estados febris e epistaxe (hemorragia nasal)



Apresentação	Tamanho	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Calmor® Bolsa Gel Peq.	13 x 14 cm	1	916 4997	643 3334	12
Calmor® Bolsa Gel Grd.	12 x 29 cm	1	916 4998	643 3326	12

SicSac®

Sacos para enjoo



SicSac

Características


- Saco especialmente concebido para utilização em caso de náuseas
- Consiste num saco resistente a rasgões, em filme de polietileno branco, com um fecho por torção e encaixe no aro de plástico
- Protege as roupas, o ambiente e diminui os riscos de contaminação




SicSac Dispenser

Indicações / Instruções

Saco coletor seguro e higiénico utilizado em alas hospitalares para evitar que a roupa de cama e o paciente se sujem.

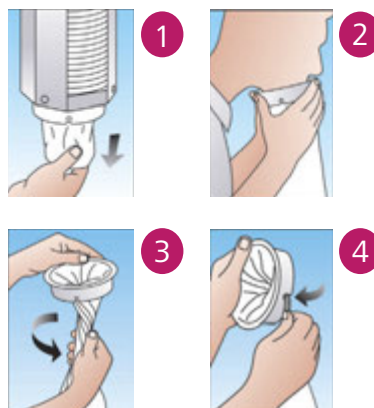

Apresentação	Unid./Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
SicSac® Sacos de enjoo	50	999 586	6
SicSac® Dispenser	1	999 587	6

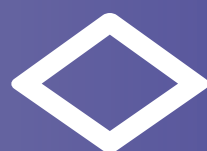

Desinfecção

Sterillium®

*O desinfetante de mãos número 1 na Europa.
Particularmente suave para a pele e eleito como o melhor entre os seus pares.*



Características

- Amplamente ativo contra bactérias, fungos e vírus encapsulados
- Tempo de aplicação de 1,5 minutos para a desinfecção cirúrgica das mãos e 30 segundos para desinfecção higiénica das mãos
- Tolerância cutânea excecionalmente boa, mesmo com utilização a longo prazo

Princípios ativos em 100 g

- Propan-2-ol 45,0 g;
- Propan-1-ol 30,0 g;
- Etilsulfato de mecetrônio 0,2 g.

Atividade microbiológica

Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC).
Ativo contra adenovírus, poliomavírus e rotavírus.

Listagem

RKI list area A, Association for Applied Hygiene (VAH).

Testado de acordo com as normas da FDA

In Vitro Time Kill study and In Vivo Glove Juice test:
Tentative Final Monograph for Health Care Antiseptic Drug Products.



Instruções de utilização

Friccionar Sterillium® nas mãos secas, sem diluir.
Manter as mãos húmidas com o Sterillium® durante todo o tempo de aplicação.

Salmonela, Listeria	15 s
MRSA	30 s
Tuberculocida	15 s
Virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC)	15 s
Vírus Herpes simplex	15 s
Vírus Influenza A	15 s
SARS (coronavírus da SARS)	30 s
Adenovírus	1 min
Poliomavírus	5 min
Rotavírus	15 s

Testado de acordo com as normas EN

EN 1500 desinfecção higiénica das mãos	30 s
EN 12791 desinfecção cirúrgica das mãos	1,5 min

Áreas de aplicação

Para a desinfecção higiénica e cirúrgica das mãos por fricção - independentemente da presença de lavatório ou água.

Áreas de internamento, blocos operatórios, unidades de cuidados intensivos e unidades de doenças infecciosas.


Salas de tratamento e áreas de ambulatório.

Ambulâncias e laboratórios. Serviços domiciliários e em cozinhas de hospitais e cantinas.

Serviços de emergência médica, consultórios médicos de todas as especialidades e serviços de diálise.

O Sterillium® aumenta a hidratação da pele

Uma pele saudável é a base para uma eficaz higiene das mãos. Um estudo aleatorizado realizado sob condições práticas investigou o efeito na pele de um desinfetante de mãos à base de álcool*.

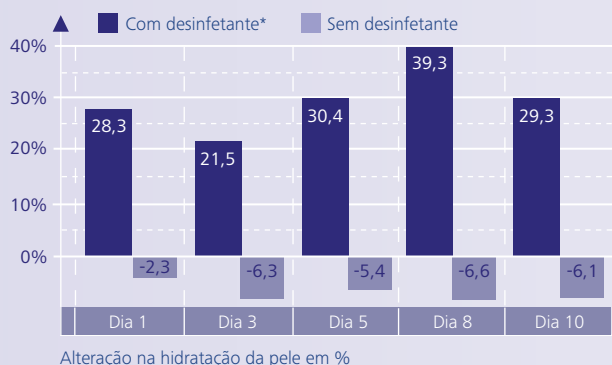

A utilização regular do desinfetante provoca um aumento de cerca de 30% na hidratação da pele. Durante o período do estudo, a hidratação da pele das mãos não desinfetadas diminuiu.

Durante um período de 10 dias, o desinfetante foi aplicado 300 vezes: 30 vezes por dia, uma das mãos foi desinfetada com 3 ml durante 30 segundos. A outra mão não foi tratada e serviu como controlo.

A condição da pele foi avaliada e a hidratação da pele foi determinada com um *corneometer*. Em todas as medições realizadas, a hidratação da pele da mão desinfetada era significativamente maior do que a mão de controlo.

A hidratação da pele da mão não desinfetada, por outro lado, diminuiu.

Conclusão: O uso repetido de Sterillium aumenta a hidratação da pele.

*O estudo foi conduzido com o Sterillium Classic Pure, a versão sem corante nem perfume do Sterillium. As propriedades de hidratação da pele podem ser atribuídas aos produtos com o mesmo complexo de emolientes (p. ex.: tetradecanol e glicerina). Estes são idênticos no Sterillium e Sterillium Classic Pure. Assim, o resultado do estudo conduzido com Sterillium Classic Pure pode ser aplicado na totalidade ao Sterillium.

Fonte RCTS, Barry (2014)

Investigação para prevenção de infeções.

www.bode-science-center.com



Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Código CNP	Emb./Caixa
Sterillium®	100 ml	981 396	254 5986	45
	500 ml	980 602	254 6083	20

NOME DO MEDICAMENTO: STERILLIUM, solução cutânea. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA, 100 g de solução contém: Álcool isopropílico 45 g, Propanol 30 g, Etilsulfato de mecetrônio 0,2 g. FORMA FARMACÉUTICA: Solução colorida perfumada. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Desinfecção higiénica e cirúrgica das mãos. Desinfecção da pele antes de injeções e punções. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Na desinfecção higiénica das mãos: deve aplicar-se, pelo menos, 3 ml de STERILLIUM nas mãos secas, e esfregá-las durante 30 segundos, sem enxaguar. Na desinfecção cirúrgica das mãos: STERILLIUM deve ser distribuído sobre as mãos secas e antebraços secos, de modo a cobri-los completamente. Devem ser aplicadas as doses que forem necessárias para mantê-los húmidos durante, pelo menos, 1,5 minutos sem enxaguar. Desinfecção da pele: STERILLIUM deve ser friccionado sobre a área de pele seca durante 15 segundos antes de injeções e punções; antes de punções de articulações, cavidades do corpo e órgãos ocultos, bem como intervenções cirúrgicas, devendo manter-se a área húmida durante um minuto. Peles com uma grande quantidade de glândulas sebáceas devem ser mantidas húmidas durante 10 minutos. STERILLIUM é utilizado sem ser diluído. CONTRAINDICAÇÕES: STERILLIUM não é adequado para a desinfecção de membranas mucosas e não pode ser utilizado na proximidade imediata dos olhos ou de feridas abertas. Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. EFEITOS INDESEJÁVEIS: Toxicidade aguda DL50 (rato) oral, após 14 dias 13,0 ml/kg do p.c., DL50 (ratazana) oral, após 14 dias 15,6 ml/kg do p.c., DL50 (coelho) dérmica > 10,0 ml/kg do p.c.. Toxicidade por dose repetida: um estudo cutâneo de 28 dias em coelhos com 1,0 e 5,0 ml de STERILLIUM por kg de peso corporal não revelou quaisquer efeitos atribuíveis à substância no peso corporal, aparência clínica, peso dos órgãos e histopatologia do fígado e rins. Os níveis sanguíneos de n-propanol, isopropanol e acetona não aumentaram. Toxicidade reprodutiva Com base em dados in vitro e in vivo, calcula-se que apenas quantidades insignificantes dos ingredientes ativos de STERILLIUM possam penetrar na pele durante a desinfecção higiénica e cirúrgica das mãos. Os álcoois evaporam-se no espaço de tempo da aplicação. O etilsulfato de mecetrônio é dificilmente absorvido por pele intacta. Por esta razão, os estudos sobre toxicidade fetal e toxicidade reprodutiva podem ser omitidos de acordo com a Diretiva do Conselho 75/318/CEE. Não existem referências na literatura acerca dos efeitos teratogénicos dos álcoois leves em seres humanos e animais após aplicação cutânea. Genotoxicidade, os testes de genotoxicidade deram negativo com n-propanol, isopropanol e etilsulfato de mecetrônio. Tolerância local Os ingredientes ativos de STERILLIUM não são irritantes para a pele com as concentrações aplicadas no produto. O n-propanol, o isopropanol e o etilsulfato de mecetrônio não possuem propriedades sensibilizadoras. STERILLIUM causa irritação das membranas mucosas. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO Bode Chemie GmbH Melanchthonstrasse 27 D-22525 Hamburg Alemanha. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. MEDICAMENTO NÃO SUJEITO A RECEITA MÉDICA.

Sterillium® Toalhetes

Desinfecção higiénica e segura das mãos em viagem.

Características

- Aplicável em qualquer lugar
- Amplo espectro de ação
- Particularmente compatível com a pele

Princípios ativos

1 toalhete com um peso total aproximado de 4,2 g contém:

- Propan-2-ol 1.341,0 mg;
- Propan-1-ol 894 mg;
- Etisulfato de mecetrónio 5,96 mg.

Atividade microbiológica

Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC).
Ativo contra rotavírus.

Listagem

Association for Applied Hygiene (VAH).

Instruções de utilização

Utilize pelo menos 1 toalhete para a desinfecção das mãos e pele com um tempo de exposição de 30 segundos.

Ao desinfetar objectos e áreas da pele, é necessário humidificar por completo.

Áreas de aplicação

Para a desinfecção das mãos e da pele, bem como para a desinfecção de pequenas superfícies resistentes ao álcool em âmbitos profissionais ou privados.

Para as mãos, antes e após o apoio a doentes e feridos.

Para médicos no âmbito profissional e para visitas médicas ao domicílio.

Em viagem.

Para a descontaminação de tampas de sanita, auscultadores de telefone, brinquedos.

Na Indústria (indústria farmacêutica e cosmética e de processamento de alimentos).



Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Sterillium® Toalhetes	15 toalhetes	981 081	10

Sterillium® Gel

Desinfetante de mãos em gel à base de etanol.



Características

- Amplo espectro de ação
- Aumenta a hidratação da pele
- Tolerância cutânea excepcionalmente boa mesmo com utilização a longo prazo

Princípio ativo em 100g

- Etanol 85,0 g.

Atividade microbiológica

Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC).
Ativo contra adenovírus, poliomavírus e rotavírus.

Áreas de aplicação

Para a desinfecção higiénica e cirúrgica das mãos.



Instruções de utilização

Friccionar Sterillium® Gel nas mãos secas, sem diluir.
As mãos devem ser mantidas húmidas com o Sterillium® Gel durante todo o tempo de aplicação.

MRSA	15 s
Tuberculocida	15 s
Virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC)	30 s
Vírus Herpes simplex	15 s
Vírus Influenza A	15 s
SARS (coronavírus da SARS)	30 s
Adenovírus	2 min
Poliovírus	3 min
Rotavírus	30 s

Testado de acordo com as normas EN

EN 1500 desinfecção higiénica das mãos	30 s
EN 12791 desinfecção cirúrgica das mãos	1,5 min

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Sterillium® Gel	100 ml	980 299	45
Sterillium® Gel com doseador	475 ml	981 405	20

Manusept® basic

Desinfetante de mãos à base de etanol. Sem fragrâncias.



Características

- Amplamente ativo contra bactérias, fungos e vírus encapsulados
- Boa compatibilidade cutânea

Princípio ativo em 100 g

- Etanol 80,0 g.

Atividade microbiológica

Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC).
Ativo contra rotavírus.

Áreas de aplicação

Para a desinfecção higiénica e cirúrgica das mãos por fricção.

Para todas as áreas de cuidados de saúde e indústria onde a higiene das mãos é relevante.



Instruções de utilização

Friccionar Manusept® basic nas mãos secas, sem diluir. As mãos devem ser mantidas húmidas com o Manusept® basic durante todo o tempo de aplicação.

Tuberculocida	30 s
Virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC)	30 s
Rotavírus	30 s

Testado de acordo com as normas EN

EN 1500 desinfecção higiénica das mãos	30 s
EN 12791 desinfecção cirúrgica das mãos	3 min

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Manusept® basic	500 ml	981 062	20

Baktolin® pure

Loção de lavagem normal para uma limpeza profunda das mãos e pele.



Características

- Surfactantes modernos e suaves
- Valor do pH adaptado à pele (5.5)
- Limpeza suave e agradável

Áreas de aplicação

O Baktolin®pure é indicado para a limpeza das mãos e corpo. O produto limpa com suavidade e preserva a camada ácida protetora natural da pele.

Substitui os sabonetes, pouco higiénicos, e os utilizadores particularmente sensíveis podem beneficiar da composição sem fragrâncias nem corantes.

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Baktolin® pure	500 ml	981 328	20
	1 Lt	981 329	10

Cutasept®

Antisséptico da pele com um efeito rápido e amplo para utilização antes de injeções, punções e intervenções cirúrgicas.



Características

- Atua rapidamente e de forma abrangente
- Excelente compatibilidade cutânea
- Frascos de 250 ml com uma prática bomba de spray invertível sem agente propulsor
- Boa adesão dos campos cirúrgicos
- Em versão incolor e também colorido, para melhor visualização da área desinfetada

Princípio ativo em 100 g

- Propan-2-ol 63,0 g (equivalente a 72 vol. %)
- Cloreto de benzalcônio 0,025 g

Atividade microbiológica

Bactericida, leveduricida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC) e ativo contra adenovírus, poliovírus e rotavírus.

Listagem

Association for Applied Hygiene (VAH).

Áreas de aplicação

Para a antissepsia da pele antes de injeções, punções e intervenções cirúrgicas em hospitais, cuidados primários de saúde, cuidados geriátricos em consultório e ambulatório.

Para a antissepsia em diabéticos, no âmbito da medição do nível de açúcar no sangue e da injeção de insulina, respetivamente.

Instruções de utilização

Antissépsia da pele	
antes de injeções e punções	15 s
antes de punções nas articulações, cavidades viscerais, órgãos ocos e procedimentos cirúrgicos.	1 min.
Pele rica em glândulas sebáceas - antes de cada procedimento	2 min.
Virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC)	pelo menos 15 s
Rotavírus	30 s



Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Cutasept® Incolor	250 ml	980 109	20
Cutasept® Colorido	250 ml	980 566	20
	1 Lt	980 110	10

Stellisept® med

Limpeza antimicrobiana do corpo.



Características

- Atividade bactericida
- Atividade abrangente contra várias estirpes de MRSA
- Excelente tolerância cutânea e da membrana mucosa
- Propriedades reparadoras da pele

Áreas de aplicação

Para limpeza antimicrobiana do corpo (também no caso de MRSA/ORSA) e também como champô.

Através de ingredientes selecionados e de uma formulação sem álcool, o produto possui uma compatibilidade com a pele consideravelmente melhor que as preparações de descontaminação convencionais.



Instruções de utilização

Para a lavagem antisséptica do corpo: Aplique Stellisept® med diretamente na pele humedecida ou numa esponja ou pano húmidos e limpe a pele vigorosamente.

Também pode ser utilizado como champô. Depois de 30 segundos, pelo menos, passe água limpa nas áreas do corpo tratadas.

Testado de acordo com as normas EN

EN 13727	30 s
EN 1499	30 s
Lavagem de todo o corpo em caso de MRSA / ORSA	30 s

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Stellisept® med	100 ml	980 499	45
	500 ml	980 508	20

Bacillol® AF

Desinfetante rápido sem aldeídos e à base de álcool.



Características

- Sem aldeídos nem fragrâncias
- Seca sem deixar resíduos

Princípios ativos

- Propan-1-ol 450 mg / g;
- Propan-2-ol 250 mg / g;
- Etanol 47 mg / g.



Áreas de aplicação

Para áreas que exigem tempos de exposição e de secagem curtos, bem como para áreas que entram em contacto com produtos sensíveis.

Listagem

Association for Applied Hygiene (VAH), German Veterinary Medicine Society (DVG), marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos (DDM).

Atividade microbiológica

Bactericida (incl. salmonela e listeria), leveduricida, fungicida, tuberculicida, micobactericida, virucida contra vírus encapsulados (incl. VHB, VIH, VHC), adenovírus, FCV, MNV, poliomavírus e rotavírus.

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Bacillol® AF	1 Lt	980 212	10
	5 Lt	980 217	1
Bacillol® Toalhetes	100 Toalhetes	980 503	12
Recarga	100 Toalhetes	980 504	12

Bacillol® AF Toalhetes

Toalhetes de desinfecção rápida de base alcoólica com largo espectro de atividade em embalagem Flow-pack.



Características

- Toalhetes impregnados prontos a usar
- Toalhetes absorventes e de alta qualidade
- Com ação rápida e abrangente
- Ampla compatibilidade com as superfícies resistentes ao álcool
- Excelente humedecimento e rápida secagem da superfície
- Prático e seguro sistema de dobragem de toalhetes que facilita a sua distribuição individual numa embalagem Flow-pack resselável

Princípios ativos

- Propan-1-ol 450 mg/g;
- Propan-2-ol 250 mg/g;
- Etanol 47 mg/g.

Instruções de utilização

Limpar cuidadosamente as superfícies com os toalhetes Bacillol®AF Tissues.

Humedecer toda a superfície para alcançar melhores resultados na desinfecção.

Graças à sua composição, Bacillol®AF Tissues pode ser usado sem luvas se as comissões de controlo de infeção e a de saúde ocupacional o permitirem.

Não usar para a limpeza da pele e descartar os toalhetes usados.

Para evitar que os toalhetes sequem feche a embalagem Flow-pack após retirar o toalhete.



Não usar para a desinfecção de dispositivos médicos invasivos.

- Desinfecção de rotina de superfícies:

Tempo de contacto 30 segundos

Atividade microbiológica

Bactericida, leveduricida, fungicida, tuberculicida, micobactericida, virucida contra vírus encapsulados (incl. HBV, HIV, HCV), MNV, adenovírus, poliomavírus e rotavírus.

Áreas de aplicação

Bacillol®AF Tissues é adequado para a desinfecção de:

Superfícies resistentes ao álcool tais como:

Superfícies em estabelecimentos de saúde, superfícies de trabalho, assentos sanitários, maçanetas, camas e mesas.

Superfícies em cozinhas, cantinas, áreas de reprocessamento de alimentos e em outras áreas que entram em contato com produtos sensíveis.

Listagem

Todos os dados se referem à solução impregnada de Bacillol®AF:

- Certificado / lista emitida pela Association for Applied Hygiene (VAH).
- Lista de desinfetantes e procedimentos de desinfecção testados e aprovados pelo Robert Koch Institute (RKI), de acordo com o art. 18 da Lei Federal sobre a prevenção de doenças infecciosas em seres humanos (área de atividade A).
- Marcação CE conforme Diretiva sobre Dispositivos Médicos (DDM).
- Lista emitida pela Sociedade Médica Veterinária alemã (DVG) para a Higiene Alimentar.
- Lista de desinfetantes virucidas emitidas pela Associação Industrial Alemã de Higiene e Proteção de Superfícies (IHO).

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Bacillol® AF Toalhetes	80 toalhetes	981 311	6

Bacillol®30 Toalhetes

Toalhetes de limpeza e desinfecção rápida para superfícies sensíveis em embalagem Flow-pack.



Características

- Toalhetes de limpeza e desinfecção impregnados prontos a usar
- Toalhetes absorventes de alta qualidade
- Atua rapidamente
- Especialmente suave para os materiais sensíveis, tais como Makrolon®, Plexiglas® e Polysulfon®
- Excelente humedecimento e rápida secagem da superfície
- Prático e seguro sistema de dobragem de toalhetes que facilita a sua distribuição individual numa embalagem Flow-pack resselável
- Sem aldeídos, corantes e perfumes

Princípios ativos

- Etanol 140 mg/g;
- Propan-2-ol 100 mg/g;
- Propan-1-ol 60 mg/g, n-alkyl-aminopropyl-glycine (CAS number 1397 34-65-9) 5 mg/g.

Atividade microbiológica

Bactericida, leveduricida, virucida contra vírus encapsulados (incl. VHB, VIH, VHC), MNV, poliomavírus e rotavírus.

Instruções de utilização

Limpar cuidadosamente as superfícies com os toalhetes Bacillol®30 Tissues.

Humedecer toda a superfície para alcançar melhores resultados na desinfecção.

Graças à sua composição, Bacillol®30 Tissues pode ser usado sem luvas se a comissão de controlo de infeção e a de saúde ocupacional o permitir.



Não usar para a limpeza da pele.

Descartar os toalhetes usados.

Para evitar que os toalhetes sequem feche a embalagem Flow-pack após retirar o toalhete.

Não usar para a desinfecção de dispositivos médicos invasivos.

- Desinfecção de rotina de superfícies:

Tempo de contacto 30 segundos

Áreas de aplicação

Bacillol®30 Tissues está indicado para a limpeza e desinfecção rápida de superfícies sensíveis, por ex.:

Visores, teclados, ecrãs táteis sensíveis e equipamento de comunicação, por ex. telemóveis.

Outras superfícies sintéticas sensíveis tais como pele sintética, Makrolon®, vidro acrílico e Polysulfon®.

Superfícies em cozinhas, cantinas, áreas de reproprocessamento de alimentos e em outras áreas que entram em contacto com produtos sensíveis.

Dispositivos Médicos não invasivos sensíveis, por exemplo, equipamento de mamografia e iluminação da sala de operações.

Listagem

- Todos os dados referem-se à solução impregnada de Bacillol®30:
- Certificado/lista emitida pela Associação para a Association for Applied Hygiene (VAH).
- Marcação CE conforme Diretiva sobre Dispositivos Médicos (DDM).
- Lista de desinfetantes virucidas emitidas pela Associação Industrial Alemã de Higiene e Proteção de Superfícies (IHO).
- Lista de desinfetantes para a indústria alimentar emitidas pela Associação Industrial Alemã de Higiene e Proteção de Superfícies (IHO).

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN
Bacillol®30 Toalhetes	80 toalhetes	981 312

Bacillol®30 Foam

Limpeza e desinfecção de ação rápida sem aldeídos para superfícies sensíveis.



Características

- Solução de limpeza e desinfecção pronta a usar
- Atua rapidamente
- Especialmente suave para os materiais sensíveis, tais como Makrolon®, Plexiglas® e Polysulfon®
- Excelente humedecimento da superfície
- Garrafa com pega anatómica com spray de espuma, que garante uma aplicação suave e sem libertação de aerossóis
- Sem corantes nem fragrâncias

Princípios ativos

- Etanol 140 mg / g;
- Propan-2-ol 100 g / g;
- Propan-1-ol 60 mg / g;
- N-alkyl-aminopropyl-glycine (CAS number 139734-65-9) 5 mg / g.

Listagem

Association for Applied Hygiene (VAH).
 Marcação CE conforme Diretiva sobre Dispositivos Médicos (DDM).



Atividade microbiológica

Bactericida, fungicida, leveduricida, virucida contra vírus encapsulados (incl. HBV, HIV, HCV), MNV, poliomavírus e rotavírus.

Áreas de aplicação

Bacillol®30 Foam está indicado para a limpeza e desinfecção rápida em spray / toalhetes de superfícies laváveis, por exemplo:

Dispositivos médicos e material incluídos na Diretiva de Dispositivos Médicos (DDM)

Para uma uniforme aplicação, foi desenvolvida uma pistola de pulverização da espuma que facilita o controle visual da cobertura.

Para a desinfecção de superfícies verticais, por ex. ecrãs e monitores, superfícies irregulares como teclados e painéis de controlo recomenda-se uma pulverização de uma quantidade suficiente de Bacillol®30 Foam num pano/ toalhete descartável e de seguida limpar as superfícies a desinfetar.

Instruções de utilização

Bacillol®30 Foam está pronto-a-usar.

Humedecer a superfície a ser desinfetada com uma quantidade suficiente de produto. Limpar com um pano ou toalhete descartável limpo.

Manter a superfície húmida durante o tempo de contacto.

- Desinfecção de rotina de superfícies:

Tempo de contacto 30 segundos

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Bacillol® 30 Foam	1 Lt	981 342	1

Dismozon®plus

Desinfetante de limpeza de superfícies à base de oxigénio ativo, com um espectro de ação amplo (incl. esporicida).



Características

- Listado pelo RKI (área A / B)
- Eficaz contra esporos *Clostridium difficile*
- Reduzida formação de resíduos
- Excelente biodegradabilidade

Princípio ativo

- Monoperoxifitalato de magnésio hexahidrato
958 mg / g.



Áreas de aplicação

Indicado para a desinfecção de alto nível de vários tipos de superfícies e dispositivos médicos em todas as áreas de cuidados de saúde que sejam relevantes para a higiene e sejam sensíveis a fragrâncias.

Também indicado para a desinfecção de materiais extremamente sensíveis, como o Makrolon® e vidro acrílico.

Listagem

Association for Applied Hygiene (VAH), Instituto Robert Koch (RKI), lista de agentes de limpeza testados para azulejos e revestimentos em piscinas (lista RK), marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos (DDM).

Atividade microbiológica

Bactericida, leveduricida, tuberculicida, esporicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC), virucida.

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Dismozon® plus	100 saquetas de 16 gr	981 187	1

Mikrobac® forte

Desinfetante de superfícies sem aldeídos e com elevada compatibilidade com os materiais.



Características

- Amplo espectro de ação
- Excelente poder de limpeza

Princípios ativos

- Cloretos de benzil-C12-18-alquilidimetilamónio
199 mg / g;
- N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3diamina
50 mg / g.



Áreas de aplicação

Para a desinfecção diária de todas as superfícies laváveis, em áreas onde é preferível a desinfecção sem fragrâncias.

Outras áreas de aplicação incluem:

- Cozinhas e zonas de confecção de alimentos, uma vez que é necessário usar-se produtos sem aldeídos.

Listagem

Association for Applied Hygiene (VAH), German Veterinary Medicine Society (DVG), lista de agentes de limpeza testados para azulejos e revestimentos em piscinas (lista RK), marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos (DDM).

Atividade microbiológica

Bactericida, leveduricida, tuberculicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC), SARS, adenovírus, FCV, MNV, poliomavírus e rotavírus.

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Mikrobac® forte	5 Lt	980 435	1
Mikrobac® forte saquetas	250 Saquetas de 20 ml	980 434	1

Mikrobac® Tissues

Toalhetes desinfetantes sem aldeídos nem álcool para a desinfecção rápida de equipamento e superfícies médicas.



Características

- Sem fragrâncias nem agentes corantes
- Grande compatibilidade com os materiais
- Tempo de atuação reduzido
- Boa cobertura e poder de limpeza
- Eficaz contra poliomavírus
- Toalhetes fáceis e seguros de retirar devido ao prático sistema de dobragem e embalagem hermética
- Sem efeitos de absorção

Princípios ativos

Princípios ativos da solução:

- Cloretos de benzil-C12-18-alquildimetilamónio 4 mg / g;
- Cloreto de didecildimetilamónio 4 mg / g.



Instruções de utilização

Mikrobac® Toalhetes é um produto pronto a utilizar.

- Desinfecção de rotina de superfícies:

Tempo de contacto 30 segundos

Áreas de aplicação

Os toalhetes Mikrobac® são indicados para:

- Uma limpeza desinfetante e fácil do equipamento médico, conforme definido pela Diretiva de Dispositivos Médicos (DDM).
- Todos os tipos de superfícies sensíveis.

Atividade microbiológica

Bactericida, leveduricida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC), rotavírus e poliomavírus.

Listagem

Association for Applied Hygiene (VAH), marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos (DDM).

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Mikrobac® Tissues 18 x 20 cm	80 Toalhetes	981 387	6
Mikrobac® Tissues XXL 38 x 25 cm	40 Toalhetes	981 339	6

Dismofix® G

Produto de limpeza para todas as superfícies laváveis e chãos laminados.




Características

- Elevado poder de limpeza
- Não produz espuma, podendo ser utilizado para lavagem manual ou automática

Ingredientes

- Surfactantes não iónicos.
- Álcoois.
- Fragrâncias.
- Substâncias auxiliares.

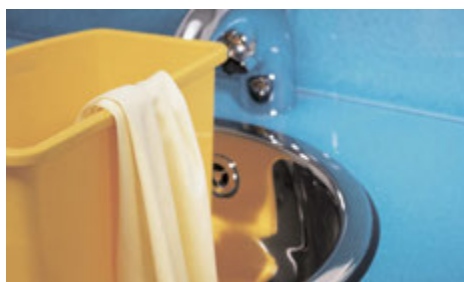

Áreas de aplicação

O Dismofix® G é particularmente adequado para:

- Limpeza de todos os materiais resistentes à água, tais como, superfícies sintéticas e superfícies envernizadas.
- Limpeza de superfícies sensíveis tais como vidros, espelhos, aço inoxidável e cerâmica, sem deixar manchas nem resíduos.
- Limpeza de manutenção de todos os chãos laminados.
- Limpeza automática de todo o tipo de chão com máquinas de limpeza do chão.
- Limpeza do chão especial contra descargas eletrostáticas.

Instruções de utilização

Sujidade normal

Limpeza manual	0,5 %
Limpeza automática	1,0 %
Limpeza intermédia com máquina de disco único	10 %

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Dismofix® G	5 Lt	980 200	1

Korsolex® PAA

Desinfetante à base de ácido peracético para instrumentos sensíveis e resistentes ao calor.



Características

- Pronto a utilizar, fácil de aplicar
- Sem aldeídos
- À base de ácido peracético
- Desinfecção de alto nível

A solução alcalina pronta a utilizar (ativada no momento da utilização) contém 1200 ppm de ácido peracético. A concentração diminui durante a aplicação e deve ser verificada regularmente com o auxílio das tiras de teste Korsolex®PAA Test.

Atividade microbiológica

Bactericida, leveduricida, fungicida, tuberculicida, micobactericida, esporicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH e VHC), virucida.



Não adequado para:

- Instrumentos cirúrgicos com metais duros incorporados.
- Instrumentos com partes anodizadas.
- Suportes para instrumentos contendo titânio.
- Instrumentos contaminados.

Listagem

Association for Applied Hygiene (VAH).
Rótulo CE de acordo com a diretiva relativa aos dispositivos médicos (DDM).

Áreas de aplicação

Endoscópios flexíveis, material de anestesia e instrumentos cirúrgicos.

Termoplásticos e elastómeros.

Tempo de contato com a solução

De 5 a 15 min. (dependendo do espectro de ação pretendido).

Estabilidade

A solução de utilização não contaminada possui um prazo de validade no máximo de 9 dias ou de 50 endoscópios, se fechado num banho de desinfecção.

Nota

Os instrumentos devem ser previamente lavados antes da desinfecção.

Recomenda-se que o Korsolex®PAA seja utilizado em combinação com o detergente Bodedex forte.

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Korsolex® PAA com Ativador	5 Lt	981 210	1
Korsolex® PAA Tiras de teste	100 Tiras	980 409	6

Korsolex® READY TO USE

Desinfetante à base de aldeídos para instrumentos e endoscópios.



Características

- Amplo espectro de ação
- Desinfecção rápida
- Excelente compatibilidade com os materiais
- Fácil de utilizar, não é necessário ativador

Princípio ativo em 100g

- Glutaral 2,1 g.

Atividade microbiológica

Bactericida, leveduricida, fungicida, tuberculicida, esporicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC), virucida.



Áreas de aplicação

O Korsolex® pronto a utilizar é particularmente indicado para a desinfecção de todos os tipos de instrumentos sensíveis e resistentes ao calor, como endoscópios, laparoscópios e equipamento de anestesia.

A solução não precisa de ser previamente diluída.

Listagem

Marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos (DDM).

Nota

Os instrumentos devem ser previamente lavados antes da desinfecção.

Recomenda-se que o Korsolex® Ready-to-use seja utilizado em combinação com o detergente Bodedex® forte.

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Korsolex® READY TO USE	5 Lt	980 102	1

Korsolex® plus

Desinfetante de instrumentos sem aldeídos com elevado poder de limpeza.



Características

- Poder de limpeza excecional
- Aroma agradável
- Também pode ser utilizado no banho de desinfecção por ultrassons
- Elevada compatibilidade com os materiais

Princípios Ativos em 100g

- N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 9,2 g
- Cloreto de didecildimetilamónio 13,0 g.

Atividade Microbiológica

Bactericida, leveduricida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC), poliomavírus e rotavírus.



Áreas de Aplicação

Sendo indicado para o reprocessamento de instrumentos sensíveis e resistentes ao calor em variadas áreas, o Korsolex® plus é uma alternativa aos produtos à base de aldeídos.

As principais vantagens deste produto são:

- Excelente poder de limpeza e amplo espectro de ação do efeito de desinfecção.

Por conseguinte:

- Não necessita de um potenciador de limpeza adicional, mesmo no caso de sujidade resistente.
- Estabilidade: 7 dias.
- A solução deve ser sempre preparada com água fria (no máximo à temperatura ambiente).

Listagem

Association for Applied Hygiene (VAH).

Marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos (DDM).

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Korsolex® plus	2 Lt	980 264	4
	5 Lt	980 268	1

Bodedex® forte

Detergente para instrumentos - Sistema Patenteado.



Características

- Atua sem necessidade de esfregar, possuindo um forte efeito de limpeza, mesmo em caso de sujidade persistente
- Dissolve resíduos de meios de contraste de raios-x e biofilmes
- Fácil de enxaguar, sem deixar resíduos
- Elevada compatibilidade com os materiais

Instruções de Utilização

Limpeza: 0,5% - 1,0%

Tempo de Exposição: 5 - 10 minutos
(conforme o nível de sujidade)



Áreas de Aplicação

Para a remoção ativa do sangue, proteínas, secreções e gordura.

O detergente de instrumentos também dissolve de forma suave os resíduos persistentes de meios de contraste de raios-x e biofilmes.

Indicado para instrumentos óticos rígidos e flexíveis, materiais dos cuidados intensivos e de anestesia, bem como instrumentos cirúrgicos, de unidades hospitalares, dos cuidados primários de saúde e de laboratório.

Listagem

Marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos (DDM).

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Bodedex® forte	2 Lt	980 244	4
	5 Lt	980 250	1

BODE X-Wipes

Dispensador de toalhetes multiusos para desinfetantes de superfícies líquidos.



Características

- Para todos os desinfetantes de superfícies líquidos da HARTMANN
- Particularmente económico e higiénico
- Sistema patenteado: Ótima libertação das substâncias ativas durante a desinfecção
- Máxima segurança: Rolos em saco higiénico para uma aplicação livre de contaminação



Instruções de utilização

O sistema dispensador BODE X-Wipes é indicado para a utilização conjunta com todos os desinfetantes de superfícies BODE.

O dispensador BODE X-Wipes tem capacidade para 2,5 a 3 litros de solução de utilização. Os BODE X-Wipes toalhetes não são indicados para utilização conjunta com desinfetantes e detergentes de instrumentos.

Áreas de aplicação

Para a desinfecção de superfícies em:

- Todas as áreas de hospitais, lares, companhias farmacêuticas e laboratórios.
- Processamento de alimentos, que necessitam de uma eficácia, higiene e conveniência máximas.

Apresentação	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN	Emb./Caixa
Bode X-Wipes - Dispensador Sistema Higiénico	1	981 370	4
Bode X-Wipes Toalhetes 38 x 20 cm	Toalhetes - rolo PET-fleece com 90 unid.	981 373	6

BODE Eurodispenser 3

Para a aplicação de frascos BODE.



Características


- Indicado para frascos BODE de 500 ml
- Estrutura metálica robusta
- Com encaixe para fixação a estruturas de cama (pés da cama)
- De fácil instalação e utilização
- Autoclavável
- Entrega não inclui frasco e bomba doseadora

Dados técnicos

BODE Eurodispenser 3

- 500 ml (A x L x P sem encaixe) 115 x 73 x 75 mm (encaixe reto para os pés da cama)
- 500 ml (A x L x P sem encaixe) 140 x 73 x 75 mm (encaixe em ângulo para os pés da cama)
- 500 ml (A x L x P sem encaixe) 135 x 73 x 75 mm (encaixe reto estreito para os pés da cama)

Tamanhos disponíveis	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN
BODE Eurodispenser para frascos de 500 ml		
Com encaixe reto	10 peças	980 381
Com encaixe em ângulo	10 peças	980 380
Com encaixe reto estreito	10 peças	980 382
Com grampo de mesa	10 peças	980 383
Placa de parede com furos	10 peças	980 384
Adaptador tubular	10 peças	980 385

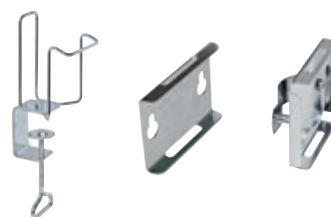

BODE Suportes de parede em plástico

Para a aplicação de frascos BODE.



Características

- Para instalar frascos BODE de 500 ou 1000 ml
- Em plástico sólido e robusto
- De fácil instalação e limpeza
- Entrega inclui peças de montagem, folha de instruções e manual
- Fácil de instalar com os parafusos ou tiras adesivas (BODE Power-strips)
- Entrega não inclui frasco e bomba doseadora
- Não autoclavável



Apresentação	Unidade	Código HARTMANN
Suporte de Parede BODE 500 Para frascos BODE 500 ml	2 peças	980 3331
Suporte de Parede BODE 1000 Para frascos BODE 1000 ml	2 peças	980 3341

BODE Eurodispenser Vario

Para a aplicação de frascos BODE.



Características

- Indicado para frascos de 500 ml
- Em plástico robusto e estável e de fácil instalação
- Todos os materiais foram testados em conformidade com alimentos
- Plásticos com boa resistência ao álcool e tensão
- Fácil e rápida troca de frascos e fácil limpeza
- Quantidade dispensada ajustável entre 1 ml a 3 ml (aproximadamente)
- Dispensador inclui peças de montagem e manual de instruções



Tamanhos disponíveis	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN
BODE Eurodispenser Vario	1 peça	981 287

BODE Eurodispenser 4000

Para a aplicação de frascos BODE.



Características

- Indicado para frascos de 500 ml
- Em plástico robusto e estável
- Produto fica protegido dentro do dispenser
- Fácil e rápida troca de frascos e fácil limpeza
- Dispensador inclui peças de montagem e manual de instruções

Tamanhos disponíveis	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN
BODE Eurodispenser 4000	1 peça	981 211

BODE Eurodispenser 3000

Para a aplicação de frascos BODE.



Características

- Em plástico sólido e robusto
- Enchimento rápido e fácil com frascos BODE de 500/1000 ml
- Fácil utilização e limpeza
- Quantidade de dosagem de 1,5 ml a 2,0 ml por actuação
- Entrega inclui bomba especial de dosagem, material de fixação, folha de instruções e manual
- Frasco não incluído



Apresentação	Unidade	Código HARTMANN
BODE Eurodispenser Para frascos BODE 500 ml e 1000 ml	1 peça	980 4220
Bomba doseadora Para o BODE Eurodispenser 3000	1 peça	980 4230

BODE Eurodispenser 1 plus

Para a aplicação de frascos BODE.



Características

- Fácil substituição da bomba através da remoção pela parte da frente
- Dispensador metálico robusto e fiável
- Todas as peças removíveis totalmente autoclaváveis
- Instalação fácil, mesmo com espaço limitado
- Adaptável a todos os frascos padrão
- Substituição de frascos simples e rápida
- Fácil utilização e limpeza
- Quantidade de dosagem ajustável de 0,75 ml a 1,5 ml por actuação
- Entrega inclui peças de montagem, folha de instruções e manual



Tamanhos disponíveis	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN
Eurodispenser 1 plus - 500ml braço longo	1 peça	980 478

BODE Bombas doseadoras

Para uma aplicação conveniente dos produtos dos frascos e embalagens BODE originais.



Tamanhos disponíveis	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN
Bomba doseadora para:		
frascos BODE de 500 ml	1 peça	980 424
frascos BODE de 1000 ml	1 peça	980 425
Bombas doseadoras de 10 ml para:		
Frascos de 2 L e garrações de 5 L	1 peça	980 029
Bombas doseadoras de 20 ml para:		
Frascos de 2 L e garrações de 5 L	1 peça	980 030

BODE Pistolas de spray

Para pulverizar com Bacillol®AF.



Tamanhos disponíveis	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN
Cabeça de spray universal para frascos BODE de 500 ml e 1000 ml	1 peça	980 035

BODE Tinas de desinfecção

Acessórios para a desinfecção de instrumentos.



Características

- Para a preparação de soluções desinfetantes em todas as áreas hospitalares, cuidados primários de saúde e laboratórios
- Tapa transparente de fácil utilização (tinas de 5, 10 e 30 L)
- Prática ranhura de peneira em PVC
- Pegas moldadas
- Disponível em diferentes tamanhos

Dados técnicos

- Tina de 3 litros (C x L x A) 300 x 200 x 110 mm (tapa com ranhura)
- Tina de 5 litros (C x L x A) 550 x 200 x 120 mm
- Tina de 10 litros (C x L x A) 390 x 290 x 170 mm
- Tina de 30 litros (C x L x A) 615 x 400 x 220 mm (incl. torneira de descarga)

Tamanhos disponíveis	Conteúdo/Emb.	Código HARTMANN
Tina de 3 litros (tapa com ranhura)	1 peça	980 060
Tina de 5 litros	1 peça	980 057
Tina de 10 litros	1 peça	980 059
Tina de 30 litros (incl. torneira de descarga)	1 peça	980 061

PAUL HARTMANN LDA
Av. Severiano Falcão, 22 - 2º
2685-378 Prior Velho
Portugal

Tel.: (Geral) 219 409 920
Fax.: 219 409 929
E-mail: info@pt.hartmann.info

www.hartmann.pt



Going further
for health