

# Espátula Flexível



- Leveza
- Variedade de pontas
- A resina não adere a espátula

**ESPÁTULA FLEXÍVEL:** Espátula para resinas com design e pontas especiais que facilitam o procedimento odontológico atendendo às necessidades do profissional

**INDICAÇÃO:** Utilizada para reconstrução da coroa dental devolvendo sua forma e função.

**INSTRUÇÕES DE USO:** Com o auxílio da espátula flexível a resina será levada ao dente, e uma vez inserida esta resina poderá ser adaptada, moldada e esculpida por este mesmo instrumento.

**LIMPEZA:** A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

**DESINFECÇÃO:** Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

**ACONDICIONAMENTO:** Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

**COMPOSIÇÃO:** Alumínio anodizado e aço inox. Cerdas sintéticas no pincel da espátula nº5.

**PRECAUÇÃO:** Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

**PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:** 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código

Descrição

Apresentação

Registro na ANVISA

104510100412

Espátula Flexível nº1

1 unidade

180213420020

104510100413

Espátula Flexível nº2

1 unidade

104510100414

Espátula Flexível nº3

1 unidade

104510100415

Espátula Flexível nº4

1 unidade

104510100416

Espátula Flexível nº5

1 unidade

 **Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

 Indústria Brasileira