

# Tamborel e Refil



- Miniorganizador de limas endodônticas
- Formato oval
- Favorece a maior área de trabalho do mercado
- Acomoda o maior número de limas endodônticas
- Diversas cores

**TAMBOREL:** Medindo 70x54x42mm é o que oferece o maior campo para acomodação para limas endodônticas rotatórias e manuais do mercado. Sua altura permite acomodar limas de até 31mm, melhorando a estabilidade das mesmas. Disponível em várias cores, proporciona harmonia entre os demais produtos de seu consultório. Acompanham 02 refis para Tamborel Indusbello, com 15mm de espessura.

**INDICAÇÃO:** Utilizado como suporte de apoio, acondicionamento e limpeza mecânica de limas endodônticas manuais e rotatórias durante todas as fases do tratamento de canal.

**INSTRUÇÕES DE USO:** Autoclavar o Refil; 1&2. Colocar o Refil sobre a base inferior do Tamborel e encaixar a parte superior. 3. Inserir as limas que serão utilizadas durante o tratamento.

Nota: o refil deve ser descartado após o uso

**LIMPEZA:** A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

**DESINFECÇÃO:** Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

**ACONDICIONAMENTO:** Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

**COMPOSIÇÃO:** Resina Polissulfona e Poliuretano.

**PRECAUÇÃO:** Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

**PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:** 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

## Código

## Descrição

## Apresentação

## Registro na ANVISA

109559101709

Tamborel Branco

1 tamborel + 2 refis

180213429006

109559102301

Tamborel Bege

1 tamborel + 2 refis

109559102302

Tamborel Vermelho

1 tamborel + 2 refis

109559102303

Tamborel Lilás

1 tamborel + 2 refis

109559102304

Tamborel Verde Bebê

1 tamborel + 2 refis

109559102305

Tamborel Amarelo

1 tamborel + 2 refis

109559102306

Tamborel Azul

1 tamborel + 2 refis

109559102307

Tamborel Rosa

1 tamborel + 2 refis

109559102308

Tamborel Preto

1 tamborel + 2 refis

109588102309

Refil 12 unidades

12 Unidades

109588102310

Refil 45 unidades

45 Unidades

 **Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

 Indústria Brasileira