



- Fixação do lençol de borracha
- Isolamento absoluto
- Garras para fixação
- Facilidade nos procedimentos clínicos

**ARCO YOUNG:** Produzido em material esterilizável, dotado de garras para fixação do lençol de borracha para isolamento absoluto dos dentes durante procedimentos endodônticos e de dentística restauradora.

**INDICAÇÕES:** Arco de fixação do lençol para isolamento absoluto na endodontia e dentística restauradora.

**INSTRUÇÕES PARA USO:** Prenda o lençol de borracha no Arco Young; Leve todo o conjunto à boca do paciente, marque o dente que sofrerá intervenção; Perfure o lençol de borracha no local marcado e prenda ao dente com o auxílio de grampos.

**LIMPEZA:** A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente se observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

**DESINFECÇÃO:** Utilizar solução de ácido peracético a 0,2 % por dez minutos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Deverá ser feita através da autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

**ACONDICIONAMENTO:** Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

**COMPOSIÇÃO:** Poliacetil.

**PRECAUÇÃO:** Esterilizar o produto antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

**PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:** 05 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código

Descrição

Apresentação

Registro da ANVISA

102565100802

Arco Young – Autoclavável

1 Unidade

180213420013



**Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira

Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03

E-Mail: mail@obelis.net