

COMEÇANDO

Monitor de Pressão Arterial de Pulso Automático





Modelo HEM-6200
5330607-6A

PASSO 1


Instalando as Pilhas



Remova a tampa puxando-a na direção da seta.

Insira 2 pilhas “AAA” na unidade principal e coloque a tampa de volta no lugar.

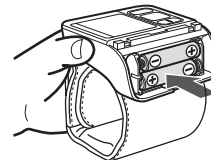
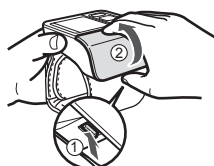


Ajuste o monitor com a data e hora corretos antes de fazer uma medição pela primeira vez.

Aperte o botão .

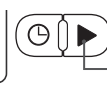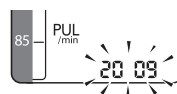

Aperte o botão  para mudar.

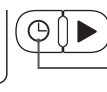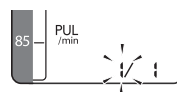


Aperte o botão  para confirmar.

Aperte o botão START/STOP (Iniciar/Parar) para armazenar a configuração.


PASSO 2

Como aplicar a Braçadeira do Pulso

Coloque a braçadeira sobre seu pulso esquerdo com seu polegar esquerdo para cima.

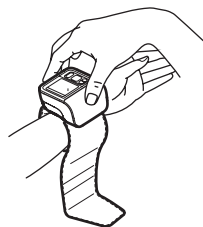

Certifique-se que a braçadeira não cobre a parte saliente do osso de seu pulso (cúbito) na parte externa do pulso.

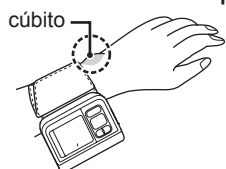

Segure a parte inferior da braçadeira de pulso e coloque-a ao redor do pulso enquanto a puxa de modo que se ajuste confortavelmente.



Para usar o braço direito, veja o manual de instruções.

PASSO 3

Comece a medição

Sente-se confortavelmente e com as costas retas, segure seu braço cruzado em seu peito, e relaxe.



Posicione seu braço de modo que a unidade esteja no mesmo nível de seu coração (altura de um bico).



Para ligar a unidade e fazer uma medição, aperte o botão START/STOP (Iniciar/Parar) uma vez.

A braçadeira inflará automaticamente. Fique quieto até que a braçadeira se desinfe e os resultados sejam exibidos.

