

# Manual de Instruções

## Recortador de Gesso 1/2 CV



**PROTÉCNI**

**Equipamentos Médicos e Odontológicos LTDA - ME**  
**Rua: Antenor Borba, 39**  
**Jardim Universal - Araraquara - SP**  
**Fone: (16) 3333-7323**

## Instruções de Utilização

### Instalação

- Verificar a voltagem do local antes de conectar o equipamento na tomada. Na parte traseira do motor encontra-se uma chave seletora de voltagem que deve ser alterada conforme a voltagem do local (110 ou 220 V).
- Acoplar a mangueira de entrada de água na torneira. Regular a entrada de água o mínimo possível, para uma limpeza homogênea do disco.
- Regular o ângulo da mesa de corte conforme necessário (Regulagem da mesa através do manípulo conforme figura).
- Remover o lacre da tampa e fechá-la com o manípulo.

### Limpeza e Troca do disco

- Após a utilização deixar escorrer água por algum tempo até sair água limpa, evitando assim o acúmulo de resíduos de gesso no recortador.
- Para limpeza interna do equipamento solte o manípulo sentido anti-horário e abra a tampa.
- Com o uso ocorrerá um desgaste natural do disco que facilmente poderá ser trocado soltando-o com a chave allen 7/32” .

### Conteúdo da Embalagem

- 01 Chave Allen 7/32”
- 01 Transferidor de Ângulos
- 01 Mangueira de entrada de água cinza 9,5 X 2,0 X 1200
- 01 Mangueira de saída de água cinza 1.1/4”

### Especificações Técnicas

- Potência do Motor: 1/2 CV
- Tensão: 127/220 V
- Rotação: 1720 RPM
- Peso: 17,214 KG
- Freqüências: 50 OU 60 HZ

## RECORTADOR DE GESSO 1/2 CV DISCO 10”



\*FOTO ILUSTRATIVA

**WWW.PROTECNI.COM.BR**