

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu produto ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: JT-21

Peso líquido: 0,750 Kg

Peso bruto: 0,800 kg

Tensão: 100~240V – Bivolt Automático

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 50W máxima

Corrente: 2 A

Dimensões: 160mm (comprimento), 73mm (altura) e 120mm (largura).

Temperatura em °C: 50 à 200 °C

Temperatura em °F: 122 à 392 °F

Importado e distribuído por:

essencedental
a essência do sorriso

CNPJ: 04.004.318/0001-70

Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios em nosso site - www.essencedental.com.br

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000

e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

essencedental
a essência do sorriso



Espátula Elétrica
Manual de Instruções

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir a ESPATULA ELETRICA da ESSENCE DENTAL.

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este produto oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma;
- O número de serie no produto for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível;
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL;
- Na instalação do produto não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis;
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo;
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam **defeito de fabricação**, independente do prazo de garantia.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Não liga	Falta de energia	Verifique se a tomada tem energia.
	Desligado	Verifique se acionou o botão "POWER".
	Fusível queimado	Substitua o fusível (5 A)
Não aquece	Não acionado botão "ON/OFF"	Verifique se foi acionado o botão "ON/OFF" após programação de temperatura.
	Caneta	Verifique se a caneta está conectada do mesmo lado que foi feita a programação.
Temperatura baixa ou alta	Escala temperatura errada	Verifique se a escala de temperatura se esta °C ou °F
	Temperatura	Verifique qual a temperatura que está no painel, caso necessário re programe.

Termo de garantia:

Caso este produto apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de três (3) meses. Caso seja realizada a substituição do produto ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o produto seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do produto, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

Aplicação:

Auxilia no enceramento de trabalhos protéticos e artísticos, onde necessita uma escultura uniforme e com qualidade.

Características e benefícios:

- Produto de longa durabilidade e fácil de utilizar;
- Botão de controle 'soft touch';
- Possui dois (2) circuitos que podem operar simultaneamente, com controle de temperatura individual, possibilitando o trabalho de dois técnicos;
- A tensão de corrente constante garante a estabilidade da temperatura;
- Um "chip" de controle e redefinição garante precisão na temperatura durante o uso prolongado;
- Painel digital, em graus Celsius ou Fahrenheit;
- Possui memória de temperatura;
- Acompanha seis (6) tipos de pontas intercambiáveis, quatro (4) canetas, sendo duas (2) reservas e dois (2) suporte de caneta;
- Equipamento de baixo ruído;
- Preserva as propriedades da cera devido ao melhor controle de temperatura;
- Controle de temperatura entre 50°C a 200°C;
- Equipamento Bivolt;
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:



Fotos meramente ilustrativas.

Todas as partes ou acessórios que acompanham este produto são de uso exclusivo do mesmo, a utilização de qualquer item não especificado neste manual, bem como seus insumos é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

Instale a sua ESPÁTULA ELÉTRICA a uma distância mínima de 40 cm de fontes de calor, umidade e ao abrigo do sol, em uma base plana e nivelada de modo que o equipamento fique estável e numa posição ergonomicamente adequada para se trabalhar.

1º passo: Encaixe o cabo de força no conector que se encontra na parte de trás do equipamento.



2º passo: Conecte o plugue da caneta no equipamento (pode ser conectada somente uma caneta ou as duas), em seguida conecte a ponta na caneta.

Funcionamento:

1º passo: Conecte a tomada na rede elétrica.

Obs.: Equipamento bivolt automático (não necessita trocar a voltagem manualmente).

2º passo: Pressione “POWER” uma luz verde acenderá indicando que o equipamento está em funcionamento.

Obs.: Se der mensagem de erro, verifique se as canetas estão corretamente conectadas.

3º passo: Acione o botão “°C/°F”, conforme a preferência.

4º passo: Em seguida acione o botão (para cima e para baixo) até atingir a temperatura desejada, conforme o lado que conectou a caneta.

5º passo: Em seguida acione o botão “ON/OFF”, para iniciar o aquecimento.

Obs.: Se houver algum erro durante a operação será exibido um alerta, desligue o equipamento no botão “POWER” para cancelar o alerta, ligue novamente e faça uma nova programação (a partir do 3º passo).

Atenção: Não remover ou trocar as canetas enquanto o equipamento estiver ligado ou em uso.

Conselhos:

- Não toque nas pontas da caneta quando estiverem quentes;
- Não opere o equipamento com as mãos molhadas;
- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
- Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

- Desligue o equipamento na chave e também da tomada, e aguarde o resfriamento das pontas para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
- Para realização da limpeza da carenagem utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Para realização de limpeza das pontas aguarde o resfriamento do restante da cera e, com o auxílio de uma espátula, remova a cera que ficou na ponta;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.