

# Espátulas Titânio



- Leveza e variedade de pontas
- A resina não adere a espátula
- Dentística restauradora e estética
- Reconstrução da coroa dental devolvendo sua forma e função
- Pontas especiais que facilitam os procedimentos odontológicos

Espátula para resinas com design e pontas especiais que facilitam o procedimento odontológico atendendo as necessidades do profissional. Na dentística restauradora, estética e clínica geral utilizada para reconstrução da coroa dental de dentes anteriores e posteriores devolvendo sua forma e função.

**INDICAÇÕES:** Utilizada na dentística restauradora e na estética para reconstrução da coroa dental devolvendo sua forma e função.

**INSTRUÇÕES DE USO:** Levar a resina ao dente do paciente, uma vez inserida, esta resina poderá ser adaptada, moldada e esculpida pela espátula de titânio.

**LIMPEZA:** A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

**DESINFECÇÃO:** Utilizar solução de ácido peracético a 0,2 % por dez minutos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Deverá ser feita através da autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

**ACONDICIONAMENTO:** Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

**COMPOSIÇÃO:** Aço inox e silicone.

**PRECAUÇÃO:** Esterilizar o produto antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

**PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:** 05 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro da ANVISA
104588100037	Espátula Titânio N.º 1	1 Unidade	180213420026
104588100038	Espátula Titânio N.º 2	1 Unidade	
104588100044	Espátula Titânio N.º 3	1 Unidade	
104588100039	Espátula Titânio N.º 4	1 Unidade	
104588100040	Espátula Titânio N.º 5	1 Unidade	
104588100041	Espátula Titânio N.º 6	1 Unidade	
104588100045	Espátula Titânio N.º 11	1 Unidade	
104588100283	Espátula Titânio N.º 12	1 Unidade	
104588100046	Espátula Titânio N.º 15	1 Unidade	
104588100043	Espátula Titânio Interproximal	1 Unidade	
104588100042	Espátula Titânio Silicato	1 Unidade	



**Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira

**EC REP** Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03

E-Mail: mail@obelis.net