

# Afastador Labial em “C”



- Produzido em material transparente
- Ideal para fotografar dentes anteriores
- Bordas arredondadas
- Ausência de rebarbas
- Máximo conforto

**AFASTADOR LABIAL EM “C”:** Possui bordas arredondadas e ausência de rebarbas, evitando desconforto ao paciente, proporcionando qualidade às fotografias odontológicas.

**INDICAÇÃO:** Fotografias odontológicas.

**INSTRUÇÕES DE USO:** Levar o AFASTADOR LABIAL EM “C” à boca do paciente, sendo segurado pelo cabo, mantendo-o em posição pelo paciente ou auxiliar. Para fotografia frontal manter os afastadores em posição (um do lado direito e outro do lado esquerdo) puxando-os com a mesma intensidade para afastar os lábios. Para fotografias laterais puxar o produto com maior intensidade no lado que será fotografado, evidenciando os dentes anteriores em questão. O outro AFASTADOR servirá de apoio, afastando a região dos dentes anteriores. Nas duas situações o paciente deve fechar a boca após a acomodação dos afastadores.

**LIMPEZA:** A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

**DESINFECÇÃO:** Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

**ACONDICIONAMENTO:** Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

**COMPOSIÇÃO:** Policarbonato cristal.

**PRECAUÇÃO:** Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

**PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:** 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código

Descrição

Apresentação

Registro na ANVISA

102042100609  
102042100617

Afastador Labial em “C”  
Afastador Labial em “C”

2 unidades  
1 unidade

180213420029



Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira