


# seca 456

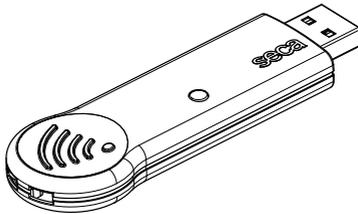


# 1. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O **seca 360° wireless USB adapter 456** da seca é um acessório para o funcionamento de um PC numa rede sem fio **seca 360° wireless**. O adaptador USB permite a transmissão sem fio de dados entre o PC e outros aparelhos **seca 360° wireless**. O adaptador USB funciona apenas em PCs com o software para PC seca instalado.

# 2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Observe as indicações deste manual de instruções de utilização.
- Guarde cuidadosamente o manual de instruções de utilização.
- Respeite o manual de instruções de utilização do seu PC, bem como as instruções de utilização dos aparelhos **seca 360° wireless** utilizados.
- Para evitar anomalias, não opere ou armazene o aparelho em ambientes sujeitos a elevados níveis de umidade, vibrações, pó, calor ou exposição solar direta.
- Não coloque o aparelho em funcionamento imediatamente após ter sido transportado. Grandes oscilações da temperatura e alterações da umidade do ar podem levar à formação de umidade no aparelho. Esta tanto pode danificar o próprio aparelho, como também o PC ao qual esse se encontra ligado.
- Proteja o aparelho contra a desconexão inadvertida do PC, a fim de evitar anomalias e utilizações impróprias.
- Ao utilizar aparelhos de alta frequência, como p. ex. telefones celulares e televisores, mantenha uma distância mínima de aprox. 1 metro, de forma a evitar medições erradas ou falhas na transmissão via rádio.
- Não abra a caixa do aparelho. Tal pode provocar danos no aparelho. Nestes casos, a seca não assegura o direito à garantia.

### 3. VISTA GERAL

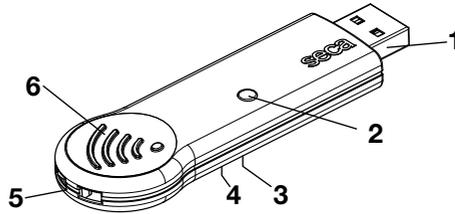

N.º	Elemento/Símbolo	Função/Significado
1	Conector USB	É ligado a uma entrada USB livre do PC
2	LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermelho: o adaptador USB foi devidamente detectado pelo PC</li> <li>• Azul: os dados estão sendo transmitidos</li> </ul>
3		Respeitar o manual de instruções de utilização
4		O aparelho está em conformidade com as normas e diretivas da CE
5	Olhal de segurança	Serve para prender, p. ex., uma fita porta-chaves: proteção contra a desconexão inadvertida do adaptador USB do PC
6		O aparelho encontra-se equipado com um módulo de rádio, os dados são recebidos e enviados sem fio

### 4. UTILIZAÇÃO

O adaptador USB é fornecido pronto a utilizar.

1. Ligue o adaptador USB a uma entrada USB livre do PC.
2. Proteja o adaptador USB contra a desconexão inadvertida da ligação USB.
3. Estabeleça uma rede sem fio tal como descrito no manual do administrador do software de PC seca.

### 5. LIMPEZA

Em condições normais de funcionamento, não é necessária qualquer limpeza.

- ◆ Se necessário, limpe a caixa com um pano úmido.

## **ATENÇÃO!**

**Risco de danos no aparelho e de anomalias devido a produtos de limpeza inadequados**

- Não utilize solventes nem líquidos ou sprays de limpeza corrosivos.

## **6. DADOS TÉCNICOS**

<b>Dados técnicos</b>	
Banda de frequência utilizada	2433,00 até 2480,4 MHz
Espaçamento entre canais	199,951 kHz
Modulação	2-FSK
Data rate	50 kBaud

## **7. ELIMINAÇÃO**



Não jogue o aparelho no lixo doméstico. O aparelho tem de ser eliminado de forma adequada como sucata eletrônica. Respeite as respectivas disposições nacionais. Para mais informações, contate os nossos serviços em:

**[service@seca.com](mailto:service@seca.com)**



**0464-14-4456**



**(01)07898994389316**

**NOTA:**

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/200 e atende os requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

**NOTA:**

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.





# Sistemas de Medição Médica e Balanças desde 1840

seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 9-25  
22089 Hamburg · Alemanha  
Telefone +49 40 20 00 00 0  
Fax +49 40 20 00 00 50  
info@seca.com

A seca opera em todo o mundo com sede  
na Alemanha e filiais em:

**seca** france  
**seca** united kingdom  
**seca** north america  
**seca** schweiz  
**seca** zhong guo  
**seca** nihon  
**seca** mexico  
**seca** austria  
**seca** polska  
**seca** middle east  
**seca** brasil  
**seca** suomi

e com parceiros exclusivos em  
mais de 110 países.

Todos os dados de contato estão em  
[www.seca.com](http://www.seca.com)