

Espátulas Flexíveis



- Leveza
- Variedade de pontas
- A resina não adere a espátula

Espátula para resinas com design e pontas especiais que facilitam o procedimento odontológico atendendo às necessidades do profissional. Na dentística restauradora, estética e clínica geral utilizada para reconstrução da coroa dental de dentes anteriores devolvendo sua forma e função.

INDICAÇÕES: Utilizada para reconstrução da coroa dental devolvendo sua forma e função.

INSTRUÇÕES DE USO: Com o auxílio da espátula flexível a resina será levada ao dente, e uma vez inserida esta resina poderá ser adaptada, moldada e esculpida por este mesmo instrumento.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2 % por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através da autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Composição: Alumínio e aço inox. Cerdas sintéticas no pincel da espátula nº 5.

PRECAUÇÃO: Esterilizar o produto antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro da ANVISA
104588100350	Espátula Flexível Nº 1	1 Unidade	180213420020
104588100351	Espátula Flexível Nº 2	1 Unidade	
104588100352	Espátula Flexível Nº 3	1 Unidade	
104588100353	Espátula Flexível Nº 4	1 Unidade	
104588100354	Espátula Flexível Nº 5	1 Unidade	



Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira

EC REP Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03

E-Mail: mail@obelis.net