



Abritec Infantil



- Tortubello | 01 Unidade
1 Unit / 1 Unidad
- Joanabella | 01 Unidade
1 Unit / 1 Unidad
- Indusbelha | 01 Unidade
1 Unit / 1 Unidad
- Fofobell | 01 Unidade
1 Unit / 1 Unidad
- Standard | 01 Unidade
1 Unit / 1 Unidad

- **Dois tamanhos**
- **Material atóxico e esterilizável, de grande durabilidade**
- **Disponível em designs e cores variadas**
- **Maior segurança e facilidade de remoção**
- **Possui orifício central para fio dental**



INDICAÇÕES: Indicado para manter a boca do paciente aberta, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos.

INSTRUÇÕES DE USO: Levar à boca; manter em posição pelos dentes das hemi-arcadas (superior e inferior), sendo que estas hemi-arcadas devem ser do lado oposto ao dente que será tratado. O lado que tem o trapézio maior deve ficar na vestibular dos dentes.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Silicone atóxico e pigmento.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

| Código | Descrição | Apresentação | Cadastro na ANVISA |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 101052101540 | Abritec AC Verde | 1 Unidade | I 80213420037 |
| 101052101541 | Abritec AC Amarelo | 1 Unidade | |
| 101052101542 | Abritec AC Laranja | 1 Unidade | |
| 101052101543 | Abritec AC Azul | 1 Unidade | |
| 101052101544 | Abritec AC Lilás | 1 Unidade | |
| 101052101545 | Abritec AC Rosa | 1 Unidade | |

REP Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileira

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

