

# Flexor de Lima



- Design exclusivo Indusbello
- Permite ao profissional executar o procedimento com segurança e precisão
- Curva as limas endodônticas para acompanhar a anatomia do canal durante os tratamentos sem formar cantos vivos

**FLEXOR DE LIMA:** Seu exclusivo design permite melhor empunhadura, facilitando curvar as limas endodônticas para acompanhar a anatomia do canal durante os tratamentos, sem formar cantos vivos. O produto permite ao profissional executar o procedimento com segurança e precisão.

**INDICAÇÃO:** Instrumento manual usado para curvar linhas endodônticas.

**INSTRUÇÕES DE USO:** Colocar a lima endodôntica entre as duas colunas do FLEXOR DE LIMA e de acordo com a anatomia do canal escolher a melhor posição para curvá-la, pois no encontro das colunas a lima se prende favorecendo este procedimento, podendo ser curvada até na ponta de acordo com a necessidade do profissional.

**LIMPEZA:** A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

**DESINFECÇÃO:** Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

**ESTERILIZAÇÃO:** Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

**ACONDICIONAMENTO:** Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

**COMPOSIÇÃO:** Aço inox.

**PRECAUÇÃO:** Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

**PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO:** 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código

Descrição

Apresentação

Registro na ANVISA

101510101501

Flexor de Limas

1 unidade

Dispensado

 **Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

 Indústria Brasileira