



Manual de Instruções

Equipo de Irrigação VOLMED

Nome Técnico: Equipo de Irrigação Volmed



Fabricante:

VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -ME
AV. SÃO GABRIEL, 291 – JD. PAULISTA
CEP: 13574-540 - São Carlos - SP
CNPJ: 20.137.275/0001-89

Responsável técnico:

Rodrigo Gomes da Silva
CREA-SP 5063397397

Registro ANVISA Nº: 81130100006

Tel/Fax: (16) 3419-1794

www.volmed.com.br


Produto **Estéril**, de **uso único**, Proibido Reprocessar.

FINALIDADE

O **Equipo de Irrigação** é um dispositivo projetado para ser utilizado em conjunto com a Bomba de infusão, para proporcionar a distensão da articulação e a irrigação, objetivando a visibilidade e a facilidade da manipulação da instrumentação em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.

O **Equipo de Irrigação** foi desenvolvido para ser utilizado por profissionais da área de saúde, que estejam familiarizados com instrumentos cirúrgicos. O cirurgião é responsável pela aprendizagem das técnicas empregadas neste sistema. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

EQUIPO DE IRRIGAÇÃO

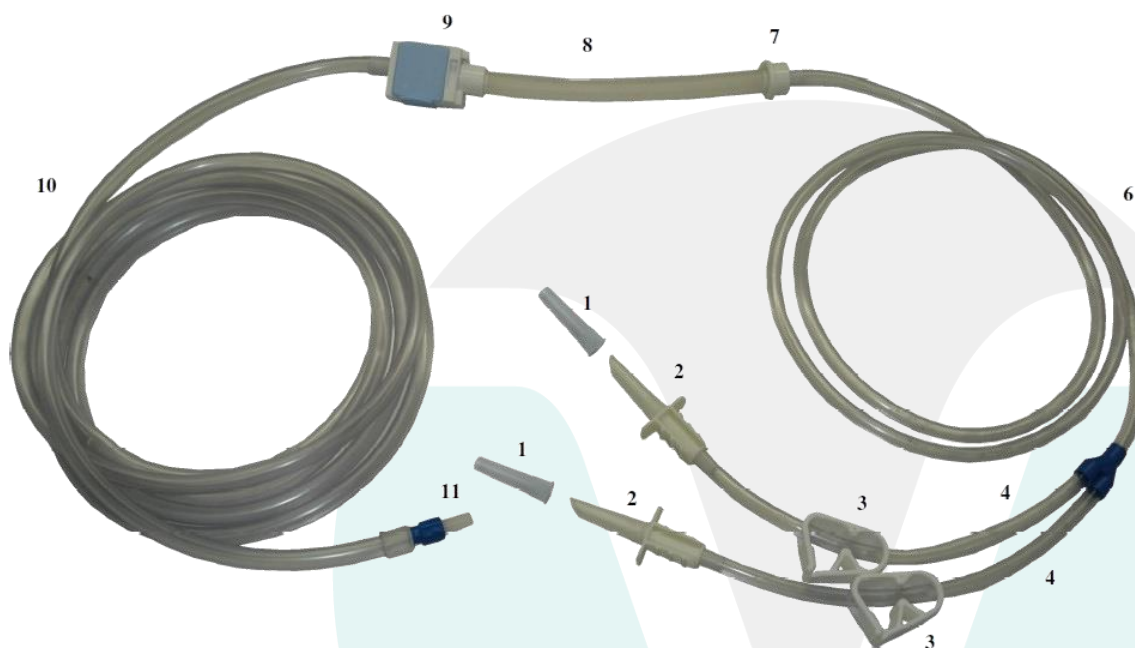


Os modelos do Equipo de Irrigação são compostos pelas seguintes partes:

1. Protetor de Extremidade da Conexão para o Fluido;
2. Conector para o Fluido;
3. Presilha;
4. Tubo de PVC com 2000 mm de comprimento;
5. Conector em Y;
6. Tubo de PVC com 1300 mm de comprimento;
7. Conector do tubo de silicone;
8. Tubo de silicone;
9. Câmara de pressão com capa de proteção;
10. Tubo de PVC com 3000 mm de comprimento;
11. Conector luer lock macho.

MODELOS DO EQUIPO DE IRRIGAÇÃO


Equipo de Irrigação tipo Perfurador 02 e 04 vias

Possui um conector perfurador para o soro tipo bolsa.

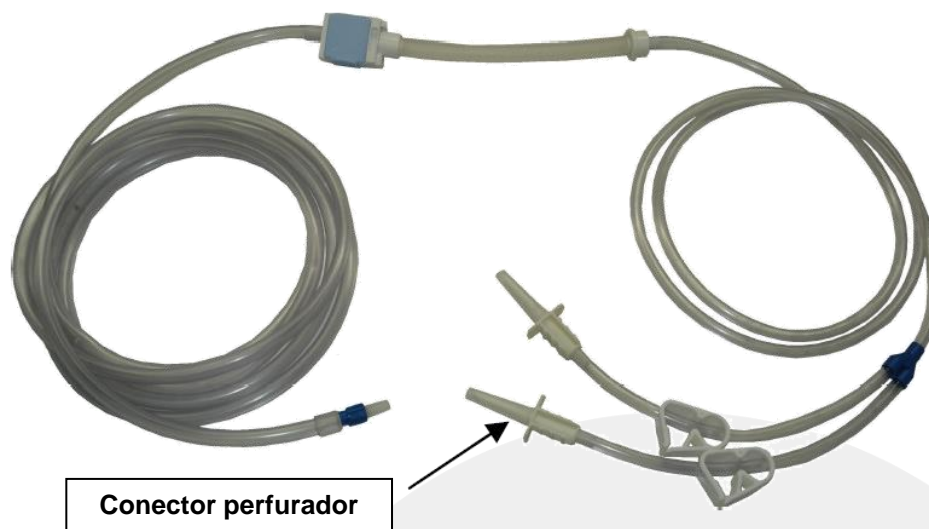

Equipo de Irrigação tipo Conector 02 e 04 vias

Possui um conector safe look para o soro tipo garrafa.

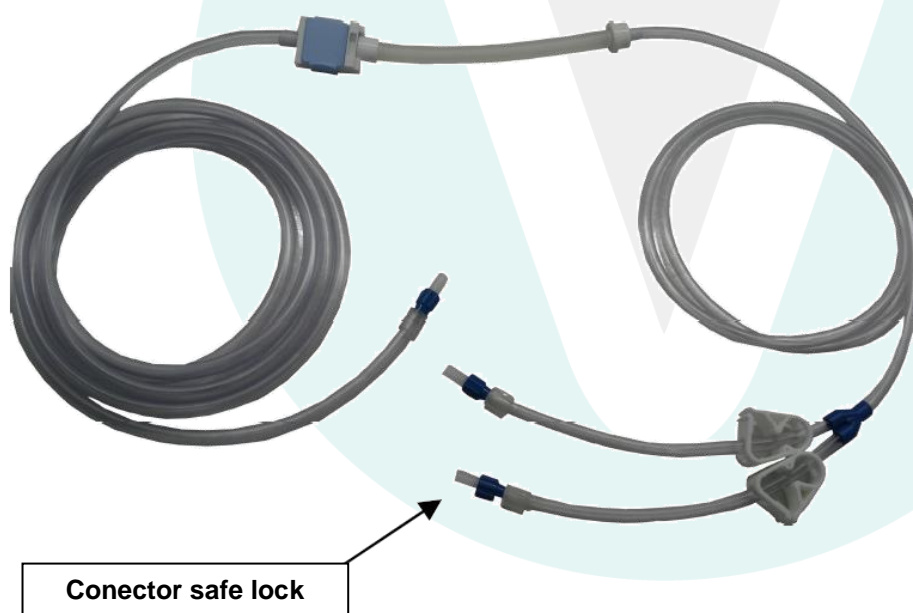

Instruções de Uso

1. Usar técnica asséptica durante todo o procedimento.
2. Conectar o Spike do Equipo ao frasco de soro contendo a solução medicamentosa a ser administrada.
3. Fazer o priming do circuito com a solução para retirar todo o ar do sistema.
4. Conectar o Luer Lock da ponta distal na agulha de Klein.
5. Introduzir a agulha no tecido celular subcutâneo.
6. Descartar o Equipo após a utilização, não reutilizar

Precauções

- Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação;
- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica.
- Verificar se o encaixe do conector para fluido e do recipiente estão seguros e não apresentam vazamentos;
- A escolha do fluido de irrigação é determinada pelo profissional com base no método a ser empregado.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por óxido de etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

GARANTIA

O Equipo de Irrigação é um material de consumo, portanto o mesmo não possui garantia.

Rodrigo Gomes da Silva
Responsável Técnico
Equipo de Irrigação Volmed
Reg. ANVISA: 81130100006
SAC: volmed@volmed.com.br
Fone: (16) 3419-1794