

POWER TECH

Manual de Instruções TORQUE CONTROL



PAINEL FRONTAL

- 1.Chave liga / desliga;
- 2.Chave seletora de giro do motor (horário ou anti-horário) - só pode ser acionada com a fonte desligada;
- 3.Botão RPM - ajusta a velocidade desejada do motor (1.000 a 30.000 RPM);
- 4.Conector do motor (Dim 5 pinos);
- 5.Conector do pedal;
- 6.Chave seletora de voltagem (110V ou 220v) e porta fusível na parte inferior da fonte;

Para funcionar com o pedal, basta conecta-lo que o acionamento passa para o pedal.

PEÇA DE MÃO

Troca de brocas: girar a parte recartilhada no sentido anti-horário para abrir a pinça. Colocar a broca e repetir a operação no sentido inverso.

Peça de mão e micro integrados, dispensa lubrificação.

OBSERVAÇÃO

✍ Fonte eletrônica com controle eletrônico de torque. Se houver travamento da broca, se desligará automaticamente;

✍ Para reacionar o motor, desligar a fonte ou desacionar o pedal por 5 segundos;

✍ Não acionar a chave de sentido de giro com o motor funcionando, pois poderá danificar a fonte.

Usitudo Ind. e Com. de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda.

CNPJ:08.435.673/0001-86 - IE:78.209.763 - Insc.Municipal:399.193-8

Rua José dos Reis , 2.577 - Inhaúma - RJ - CEP:20760-245

Tel:(21)2595-2792 /Fax:(21) 3979-2017/ 9858-6341 / 7884-9817 ID:104*194832

www.usitudo.com.br

