



# Inalador Nebulizador

**G·TECH**

Modelo  
ULTRANEB  
DESK

110 V / 220 V  
BIVOLT



Leia este Manual de Instruções antes de utilizar o seu Inalador / Nebulizador G-TECH modelo Ultraneb Desk.

**MANUAL**







## INTRODUÇÃO

O Nebulizador G-TECH ULTRANEB DESK é indicado para o tratamento das afecções respiratórias das vias aéreas inferiores (brônquios, pulmões), junto com as soluções de nebulização de uso comum.


## AVISOS IMPORTANTES

- Não exponha o Nebulizador G-TECH à: temperaturas extremas, umidade, poeira ou luz direta;
- Não o deixe cair e evite vibrações fortes;
- Para evitar infecções e contágios os acessórios não devem ser compartilhados por diferentes indivíduos;
- Não encha a câmara de nebulização acima de 8 ml;
- Não deixe a câmara de nebulização com solução se não estiver utilizando o nebulizador G-TECH;
- Desconecte o nebulizador G-TECH da tomada sempre que ele não estiver em uso;
- Somente utilize o nebulizador G-TECH sobre superfícies estáveis;
- Utilize o nebulizador G-TECH de forma intermitente, ou seja, após 30 minutos descontinue o uso por 30 minutos e caso necessite volte a utilizá-lo por no máximo mais 30 minutos;
- Nunca lave, molhe ou submerja o nebulizador em água ou em outro líquido qualquer. Para limpá-lo siga exatamente as instruções do item MANUTENÇÃO E LIMPEZA deste manual;
- Não o utilize com as mãos molhadas, sob o risco de danos ao nebulizador e ao usuário;
- Não incline o nebulizador, sob risco de vazamento do medicamento e mau funcionamento do próprio nebulizador;
- Crianças não devem utilizar o nebulizador G-TECH sem a supervisão de um adulto;
- Não utilize medicamentos que não sejam prescritos por um médico e sob nenhuma circunstância altere as dosagens de medicamentos por conta própria!
- Siga exatamente as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o Nebulizador G-TECH de qualquer forma não descrita neste manual (tais como utilizar acessórios não fornecidos pelo fabricante, inserir objetos ou abri-lo) sob risco de acidentes e da perda da garantia.





## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

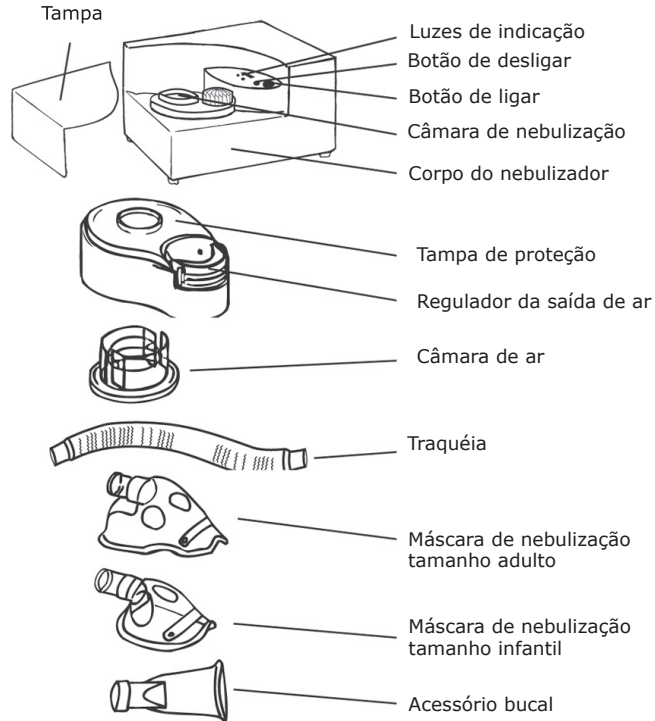





## INSTRUÇÕES DE USO

Verifique se todos os componentes do nebulizador estão na caixa.


### Montagem

1 - Retire as tampas do nebulizador e da câmara de nebulização. Coloque a quantidade indicada na bula do medicamento tendo atenção para não ultrapassar o volume máximo da câmara de 8 ml.

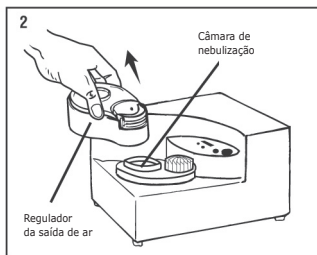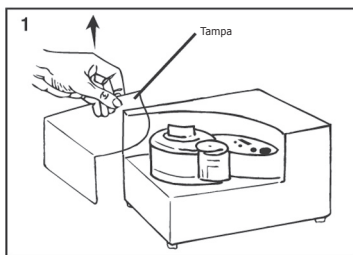

2 - Feche tampa da câmara de nebulização.


3 - Conecte na parte superior da câmara de nebulização a máscara de nebulizador ou o acessório bucal. Lembrando-se que as máscaras que acompanham o nebulizador são fornecidas em dois tamanhos: infantil e adulto.

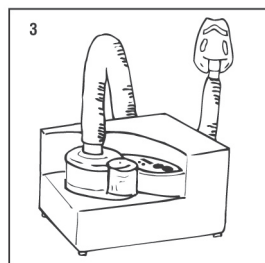

4 - Depois de realizada a montagem, conecte o nebulizador G-TECH numa tomada. Note que o led do botão Ligar ficará na cor verde.

5 - A nebulização começará assim que o botão Ligar for pressionado. Neste momento a luz ficará verde e um timer se iniciará automaticamente e desligará o aparelho após 4 minutos de uso. Caso queira continuar a nebulização, pressione novamente o botão ligar. **ATENÇÃO:** tenha certeza de que existe solução de nebulização suficiente na câmara de nebulização antes de reiniciar a nebulização.

6 - Caso ache que o fluxo de ar não esteja de acordo com a necessidade mova a alavanca do regulador de saída de vapor para a esquerda ou para a direita para diminuir ou aumentar o fluxo, respectivamente.

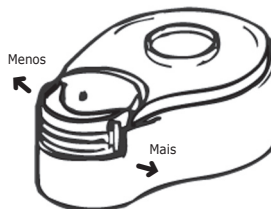

7 - Desligue o nebulizador ao término da nebulização pressionando o botão Desligar e desconecte o plugue da tomada.

8 - Limpe os acessórios conforme descrito no item "Manutenção" e somente depois guarde o nebulizador e seus acessórios na caixa.





## FUNÇÃO TIMER

Para assegurar que o uso do nebulizador seja de no máximo 4 minutos, um timer interno será acionado automaticamente sempre que o nebulizador for ligado.

## TROCA DO FILTRO DE AR

O filtro de ar deve ser trocado caso esteja sujo ou corroído. Para tal basta seguir as instruções abaixo:

1 - Remova a tampa do filtro.

2 - Retire o filtro com auxílio de um objeto com ponta e o substitua por um novo.

Observação: O uso de filtro sujo ou de outro material em seu lugar, como por exemplo, o algodão pode danificar o compressor.

## MANUTENÇÃO

Antes de utilizar o nebulizador pela primeira vez ou após o seu uso limpe os acessórios com detergente neutro e enxágüe com água morna para retirar resíduos do mesmo. Depois mergulhe os acessórios em uma solução germicida/ desinfetante (pelo tempo que as instruções determinarem) ou numa solução contendo 3 partes de água morna e uma parte de vinagre branco por 30 minutos. Após este tempo, com as mãos limpas, retire os acessórios da solução, enxágüe com água morna e deixe secar ao ar livre sobre folhas de papel absorvente limpas. Limpe as partes externas com um pano seco.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Método de nebulização: Vibração ultrasônica

Tensão: 110 V ou 220 V – 60Hz

Consumo: 15W

Capacidade máxima da câmara de nebulização: 8 ml

Diâmetro da partícula: 1,5 – 5,7 (MMAD 3,8 microns)

Fluxo de nebulização: 0,5mL/min.

Frequência Oscilométrica: 2,5 Mhz

Peso: 1,2 Kg

Dimensões: 125 x 175 x 109 mm

Temperatura e umidade de operação: 5°C a 40°C; 30% a 95%

Temperatura e umidade de armazenamento: 1°C a 40°C; 10% a 95%

Faixa de pressão atmosférica para transporte e armazenamento: 500 – 1060 mb





## ALTERAÇÕES NO FUNCIONAMENTO

Se algum imprevisto ocorrer durante o funcionamento do Nebulizador G-TECH, por favor, verifique a provável causa no quadro abaixo e a respectiva sugestão do que fazer.

Problema	Provável Causa	O que Fazer
O nebulizador não funciona.	O plugue não está bem conectado à tomada.	Reinsira o plugue na tomada.
	Falta de energia elétrica.	Verifique se há energia elétrica na tomada.
Não há saída de solução pela câmara de nebulização ou o fluxo de saída está muito fraco.	Falta solução na câmara de nebulização.	Inserir solução (no máximo 8 ml).
	Excesso de solução.	Retire o volume excedente.
	Filtro de ar obstruído (entupido).	Troque-o por um novo.
	O nebulizador está inclinado	Corrija a posição do aparelho nebulizador.
O nebulizador funciona por um tempo e logo se desliga.	A função timer está sendo ativada	Para desativar a função timer pressione duas vezes o botão Ligar assim que o nebulizador parar a nebulização

Observação: caso nenhum destas soluções dê resultados, não tente reparar por si mesmo o nebulizador, pois ao abri-lo perderá a cobertura da Garantia. Encaminhe o Nebulizador G-TECH a um Posto Autorizado de Assistência Técnica.





## TERMO DE GARANTIA

O Nebulizador G-TECH modelo ULTRANEB DESK tem garantia de 2 anos a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante a apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor.

A garantia de 2 anos não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de 90 dias. Os prazos são contados a partir da data de compra.

A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de uso, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no aparelho por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário.

A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não o prorrogam. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado separadamente, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

Importado Por:

**ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.**

Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão L - Vila São Sebastião

Duque de Caxias - RJ • CEP: 25055-009

CNPJ: 06.105.362/0001-23

Suporte: 0800 052 1600 • Comercial: 21 2126 1600

E-mail: sac@accumed.com.br

Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão

CRQ3ªReg.:03212320

Fabricado na Argentina Por: SAN UP S.A.

Registro ANVISA nº: 80275310029

Rev. 03\_080411

