




sanders

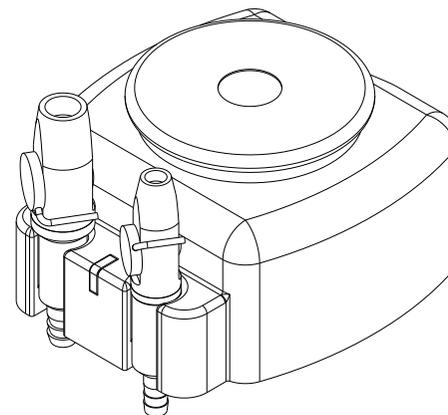


Kit Suctor

Manual de Instruções

SANDERS DO BRASIL LTDA.
Av. Sebastião Reginaldo da Cunha, 500 - Vianna
Santa Rita do Sapucaí - MG CEP: 37540-000
www.sandersdobrasil.com.br / sanders@sandersdobrasil.com.br

Rev: 00

Apresentação

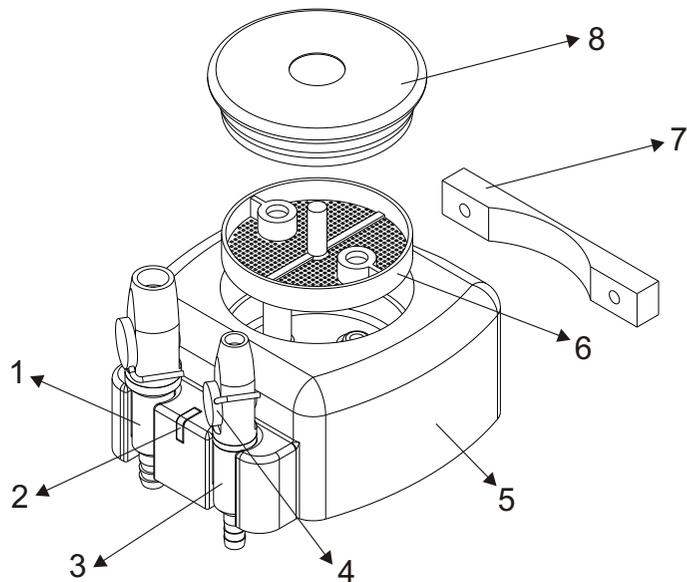

- 1) Ponteira Cônica Grossa de 11mm (ver modelo de equipamento)
- 2) Led Indicador de Funcionamento e Aviso de Reservatório cheio
- 3) Ponteira Cônica fina de 6mm
- 4) Registro para regular potência de sucção
- 5) Base
- 6) Peneira separadora de detritos
- 7) Abraçadeira para fixar o kit suctor em um tubo
- 8) Tampa do separador de detritos

Funcionamento

O kit Suctor é um acessório da Bomba Vácuo que pode ser acoplado no braço do refletor ou no braço articulável Sanders (opcional).

Para iniciar seu funcionamento basta remover qualquer uma das ponteiras da base. Para desligar, basta voltá-la na base. Através do registro da ponteira, é possível fazer a regulagem da potência de sucção e até mesmo fechar a ponteira que não estiver em uso. Também existe a possibilidade de acionar via pedal de comando (opcional), porém é necessário que se faça a instalação do pedal no local da chave de comando.

Ao remover a ponteira da base, o led vermelho acenderá, indicando o funcionamento do motor da bomba. Caso este led pisque e soe um bip, o usuário deve aguardar cerca de

10 segundos até que o reservatório interno da bomba vácuo esvazie. Após este tempo a bomba vácuo religa automaticamente caso a ponteira ainda esteja fora da base.

Caso este beep não pare no máximo em 1 minuto, verifique se existe entupimento na saída de esgoto da bomba vácuo.

Limpeza



O kit Suctor possui uma peneira para separar detritos que podem entupir tubulações internas da bomba vácuo e até mesmo para evitar que metais perigosos como amalgama sejam despejados diretamente na rede de esgoto.

Recomenda-se a remoção da peneira da caixa frequentemente para evitar perda de potência de sucção. Já as ponteiras podem ser destacadas e esterilizadas.

Instalação

O kit suctor pode ser instalado em qualquer local, dependendo somente do lay-out do consultório odontológico, porém o mais comum é a instalação no braço do refletor ou utilizando um braço articulável Sanders para maior conforto. Seguir os passos abaixo:

- 1- Definir onde será instalado o Kit Suctor
- 2 - Passar a mangueira espiral 1/2" e o cabo de comando (acompanha a bomba vácuo sanders) do local do kit até a bomba vácuo.
- 3 - Conectar as mangueiras e o cabo de comando conforme figuras abaixo.
- 4 - Prender o kit suctor com abraçadeira no tubo onde será instalado.

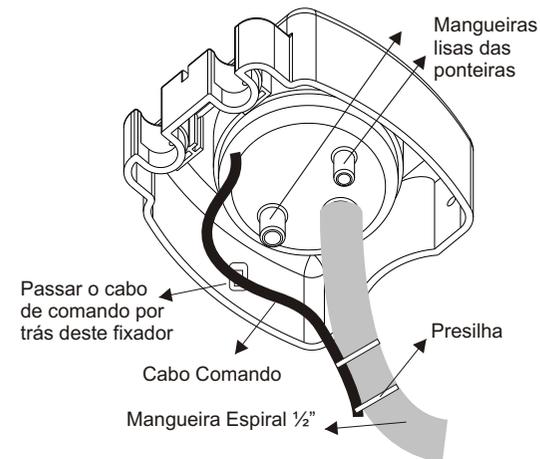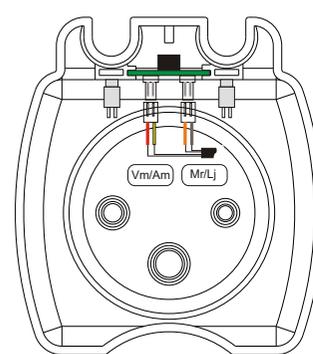

Opcionais:

