



A Cristófoli é a única empresa nacional fabricante de autoclave com ISO 9001 - Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Sistema de Gestão de Qualidade - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC N°59)



ISO 9001:2000  
FS 509853



ISO 14001:2004  
EMS 509854



ISO 13485:2003  
MD 509855

Autoclave Vitale 12  
Autoclave Vitale 21  
Modelo 2006

## **MISSÃO DA CRISTÓFOLI**

---

Proteger a vida através da Biossegurança.

## **POLÍTICA AMBIENTAL E DA QUALIDADE CRISTÓFOLI**

---

A Cristófoli Equipamentos de Biossegurança LTDA., estabelecida na Rodovia BR-158, 127, Jardim Curitiba em Campo Mourão, Paraná, Brasil, fabrica equipamentos de biossegurança para atender a área de saúde, tendo como política: "Cumprir cada vez melhor sua missão como instituição, buscando a melhoria contínua de seus produtos e processos, adotando medidas preventivas e corretivas nas áreas funcionais e administrativas da empresa, para melhor atender seus clientes. Este comprometimento implica em cumprir a legislação, normas e requisitos ambientais aplicáveis, com a finalidade de prevenir a poluição e minimizar os impactos decorrentes de suas atividades produtivas, contribuindo assim para uma vida mais saudável".

## “Cristófoli. Valorizando a Vida!”

Agradecemos sua escolha. Você, cliente, é a razão de existir da Cristófoli.

Elaboramos este Manual com a finalidade de orientá-lo sobre a melhor forma de utilizar sua Autoclave Vitale Cristófoli.

Para melhor atendê-lo, disponibilizamos a consultoria de Biossegurança da bióloga Liliana Junqueira de P. Donatelli, através do e-mail: [consultoria@crisstofoli.com](mailto:consultoria@crisstofoli.com) ou do site: [www.crisstofoli.com](http://www.crisstofoli.com)

Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores por nos ajudarem na melhoria contínua e na inovação de nossos produtos e serviços, em especial à Liliana Junqueira de P. Donatelli, Consultora de Biossegurança Cristófoli, que presta um grande e valioso auxílio na coordenação do Projeto Biossegurança Cristófoli; na pesquisa de produtos complementares; no treinamento de nossos funcionários, vendedores e técnicos; e como ministrante dos Cursos de Biossegurança para profissionais, acadêmicos e auxiliares.

Para quaisquer reclamações ou sugestões sobre nossos produtos, por favor entre em contato com o **CAC** - Central de Atendimento ao Cliente através do endereço abaixo.

### **CAC - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda.  
Rodovia BR-158, 127, Saída para Maringá,  
Campo Mourão, Paraná - Brasil.  
CEP 87309-650  
Tel: 0800-44-0800 / 44 3518-3432 / 3434 / 3435  
Fax: 44 3518-3437  
E-mail: [cac@crisstofoli.com](mailto:cac@crisstofoli.com)



## **APRESENTAÇÃO**

---

Este equipamento foi desenvolvido para atendê-lo na importante função da esterilização de materiais e instrumentos a vapor sob pressão. Dedicamo-nos intensamente para garantir sua segurança. Esperamos assim, obter o mais alto nível de satisfação de nossos clientes.

Este manual tem por finalidade familiarizá-lo com as características de funcionamento de sua autoclave e preveni-lo quanto aos cuidados que devem ser tomados para que sejam atingidos resultados satisfatórios na esterilização e secagem, bem como obter o aumento da vida útil do equipamento.

Para aqueles que por muito tempo usaram somente a estufa (Forno de Pasteur) para a esterilização, recomendamos atenção extra a este manual, pois a esterilização em autoclave, apesar de mais rápida e eficiente, requer uma rotina diferente, porém não necessariamente mais complexa.

Todos os dados sobre Biossegurança que constam neste manual foram retirados, parcialmente ou na íntegra, de publicações de conceituados professores de Biossegurança, com o objetivo de proporcionar informações atualizadas nos assuntos pertinentes ao controle de infecção e no processo de esterilização, baseadas na Legislação Nacional e Normas Internacionais.

É importante conhecer alguns aspectos que podem comprometer a garantia em virtude de negligência, má utilização, reparos não autorizados, etc.

O Certificado de Garantia encontra-se na página 27.

### **FABRICANTE**

CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.  
Rod. BR 158, nº127 - Campo Mourão - PR - Brasil.  
CEP 87309-650  
CNPJ 01.177.248/0001 - 95 - Inscr. Est. 90104860-65  
[www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com)  
e-mail: [cristofoli@cristofoli.com](mailto:cristofoli@cristofoli.com)

### **Responsável Técnico**

Eng. Antonio M. Santana Neto  
CREA SP/147423 - D

## ÍNDICE

---

Legenda de Símbolos.....	05
Cuidados Importantes para Segurança.....	06
Instruções de Instalação.....	07
Identificação dos Componentes da Autoclave.....	08
Dispositivos de Segurança.....	10
Como Usar a Autoclave Vitale 12/21.....	11
Situações Adversas.....	14
Requisitos a Serem Observados no Processo de Esterilização e suas Etapas.....	15
Como Evitar Manchas Superficiais e/ou Corrosão no Instrumental.....	21
Possíveis Falhas no Processo de Esterilização.....	22
Manutenção Preventiva.....	22
Aprovação da Autoclave.....	23
Resolvendo Pequenos Problemas.....	23
Como Identificar sua Autoclave.....	25
Esquema Hidráulico.....	25
Esquema Elétrico.....	26
Dados Técnicos.....	26
Certificado de Garantia.....	27
Como Proceder em Caso de Constatação de Defeitos.....	27
Formulário de Garantia.....	28
Orientação para a Disposição Final do Equipamento.....	28
Links de Interesse.....	29
Referências Bibliográficas.....	30
Rede de Assistência Técnica Autorizada.....	31

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL ANTES DE USAR SUA  
AUTOCLAVE Vitale 12/21, POIS O USO INCORRETO PODE RESULTAR EM  
FALHAS NA ESTERILIZAÇÃO OU ACIDENTES!**

LEGENDA DE SÍMBOLOS



Advertência, consulte manual de instruções



Frágil - manuseie com cuidado



Autoclavável



ISO 9001

ISO 9001:2000



Boas Práticas de Fabricação



ISO 13485

ISO 13485:2003



Corrente alternada



Cuidado!  
superfície quente



ISO 14001

ISO 14001:2004



Data de fabricação



Mantenha seco



Empilhamento máximo




Número de lote




Número de série



Equipamento Classe II

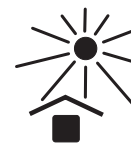

Proteja da luz solar

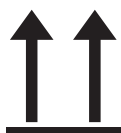

Este lado para cima



Reciclável



Fabricante



Tensão elétrica perigosa

## **CUIDADOS IMPORTANTES PARA SEGURANÇA**

---

Para usar sua autoclave **Vitale 12/21** são necessárias algumas medidas de segurança. As autoclaves para esterilização são equipamentos que trabalham com temperatura e pressão elevadas, portanto devem ser manuseadas por pessoas devidamente habilitadas e bem informadas quanto as suas características de funcionamento. É fundamental para tal habilitação que o operador leia atentamente todas as instruções e certifique-se do seu correto entendimento antes de usar a autoclave.

**ADVERTÊNCIA!** Certifique-se sempre de ter desligado sua autoclave da tomada para realizar qualquer tipo de manutenção (limpeza diária ou até mesmo troca de fusível).

- ▶ Antes de ligar o equipamento, certifique-se da limpeza da autoclave e da desobstrução da saídas de vapor interna (Fig.7, pág.10) e externa (Fig.1, pág.8). Verifique também se a mangueira de saída de vapor está conectada à rede de esgoto ou ao recipiente com água como descrito no item "*Instalação Hidráulica*", pág.8.  
É importante observar ainda a voltagem correta da autoclave (127 ou 220V) antes de conectá-la à rede elétrica.
- ▶ Se houver pressão na câmara ao ligar a autoclave, o ciclo será cancelado automaticamente.

**ATENÇÃO! Nunca** toque na Saída Externa de Vapor (Fig.1, pág. 8) e/ou nas superfícies internas da autoclave (câmara, bandejas, material, etc.) quando estiverem quentes, ou seja, durante ou logo após o ciclo de esterilização. Mesmo após aguardar o resfriamento dos materiais, é recomendado o uso de luvas adequadas para a manipulação dos materiais esterilizados. **O uso indevido poderá resultar em queimaduras. Não nos responsabilizamos por procedimentos incorretos que possam causar acidentes.**

- ▶ **Não** permita que pacientes e, principalmente crianças, aproximem-se da autoclave.
- ▶ **Tenha** por rotina assegurar-se de que o fecho da porta da autoclave esteja devidamente travada antes de usá-la. **A não observação deste procedimento poderá causar o escape do anel de vedação.** Consulte "*Como Usar a Autoclave Vitale 12/21*", (Pág.11).
- ▶ Ao destravar o fecho, a porta da autoclave deve abrir com facilidade. Certifique-se sempre da completa despressurização: o ponteiro do manômetro deverá estar na posição "0" (zero). **Nunca** force para abrir a autoclave!
- ▶ É normal que saia um mínimo de vapor pela porta ao abri-la ao final da despressurização para a secagem do material esterilizado.
- ▶ No caso de acionamento de um dos dispositivos de segurança (escape súbito de vapor), geralmente ocasionado por obstrução do orifício interno da saída de vapor ou por obstrução da válvula solenóide, aguarde a total despressurização para abrir a porta.
- ▶ Use **somente** a mangueira do tipo resistente ao calor conforme a amostra fornecida com sua autoclave. **Nunca** utilizar mangueira de plástico comum na saída externa de vapor, pois a autoclave atinge temperaturas superiores às suportadas por este material. Consulte "*Instruções de Instalação*", tópico "*Instalação Hidráulica*" (Pág.8).
- ▶ **Nunca** esterilize ou aqueça alimentos na autoclave.
- ▶ Antes de iniciar qualquer esterilização, certifique-se com o fabricante do material a ser esterilizado, que o mesmo suportará a temperatura/pressão máxima gerada pela autoclave.
- ▶ **Nunca** realize nenhum experimento com animais na autoclave.
- ▶ **Nunca** realize nenhum procedimento não descrito neste manual.
- ▶ **Recomendamos** a leitura deste manual até o completo entendimento do mesmo. Utilize-o como fonte de consulta e mantenha-o sempre em local de fácil acesso.

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O transporte do equipamento deve ser feito por duas pessoas evitando assim quedas e choques. O armazenamento/instalação em local livre de intempéries em condições normais de temperatura ambiente sobre um balcão que suporte o peso do equipamento.

A autoclave Cristófoli Vitale 12/21 é de simples instalação. Verifique se a rede elétrica encontra-se de acordo com as especificações abaixo, para isso consulte um técnico eletricista com o acompanhamento de um atendente do CAC pelo fone 0800-44-0800 ou a Rede de Assistência Técnica Autorizada Cristófoli. Veja também "Certificado de Garantia", (Pág.27) e "Rede de Assistência Técnica Autorizada" (Pág.31).

### INSTALAÇÃO FÍSICA

Instale a autoclave em lugar plano, nivelado e firme a uma altura ergonomicamente adequada ao operador (aproximadamente 80 cm de altura do chão). Deixe espaço suficiente para o manuseio dos materiais a serem esterilizados. O local da instalação deverá ser arejado, limpo e afastado do local de atendimento aos pacientes. O ideal para a instalação é que seja feita em uma sala exclusiva para esterilização.

**Importante!** Instale sua autoclave onde ela possa ser facilmente desconectada da rede elétrica.

### INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- 1▶Verifique se a voltagem da autoclave coincide com a voltagem da rede elétrica do local de instalação. Para tanto, observe a voltagem indicada no rótulo metálico de identificação que se encontra na parte posterior do equipamento. Consulte "Como Identificar sua Autoclave" (Pág. 25).
- 2▶Na instalação utilize tomada de três pinos, do tipo usada em computador (Fig.2, pág. 8) ligando fase/neutro ou fase/fase nos pinos laterais e o aterramento no pino central: **Nunca ligar o aterramento no neutro.**

**ATENÇÃO!** Como em qualquer outro equipamento elétrico, o aterramento é muito importante para a segurança do operador e garantia de seu equipamento. Por isso o pino central (aterramento) **nunca** deve ser retirado ou cortado. **A não observação desse procedimento poderá danificar sua autoclave. A Cristófoli não se responsabiliza por danos causados por instalações e/ou voltagens inadequadas.**

- 3▶**Nunca** utilize extensões, adaptadores, benjamins ou transformadores de voltagem (Fig.2A, pág. 8).
- 4▶Para que a autoclave tenha um bom funcionamento, a voltagem da rede elétrica deverá ser estável, ou seja, sem oscilações. Acione um técnico eletricista e verifique se a sua instalação elétrica está de acordo com as especificações necessárias. **É obrigatória a utilização de um disjuntor exclusivo para a tomada onde a autoclave será conectada.** Se mesmo após todas as especificações seguidas, a rede elétrica se apresentar oscilante, entre em contato com sua concessionária para adequação (Resolução nº 505 de 26/11/2001 - ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) - Art. 2º Incisos IV, V, VI e VII - Art. 6º Incisos I, II e III - Art. 16º).

A instalação elétrica deve seguir obrigatoriamente os dados da Tabela 1 abaixo.


MODELO	CORRENTE NOMINAL	VOLTAGEM	BITOLA DA FIAÇÃO <sup>(2)</sup>	DISJUNTOR
Vitale 12 - 127V	10A	127V Ac » 114V - 140V 220V Ac » 198V - 242V	De 5 m do disjuntor até a tomada do equipamento a fiação deverá ser 2,5 mm, p/ 6 a 15 m fiação 4,0 mm e p/ 16 a 50 m fiação 6,0 mm.	1 Disjuntor 15A.
Vitale 12 - 220V	6A			1 Disjuntor 10A.
Vitale 21 - 127V	12A			1 Disjuntor 20A.
Vitale 21 - 220V	8A			1 Disjuntor 15A.

Tabela 1 <sup>(2)</sup>Conforme norma da ABNT NBR-0148, série métrica PVC 70°C.

OBS: Em regiões de rede 220V:

FF (Fase-Fase) use disjuntor "bipolar"

FN (Fase-Neutro) use disjuntor "unipolar" ligado na Fase.

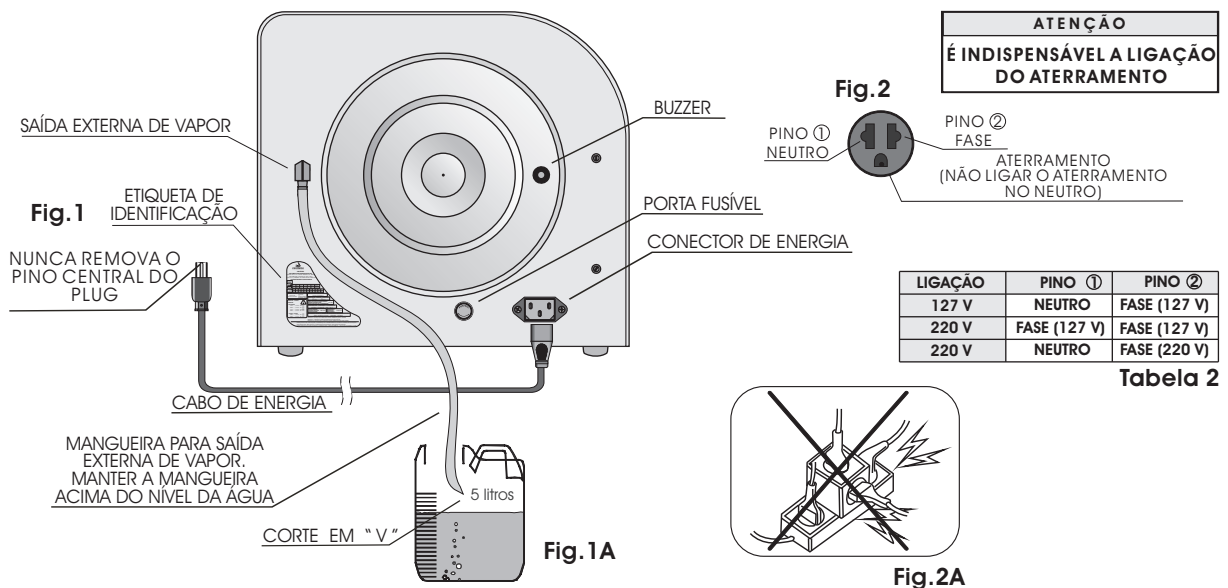

## INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

**IMPORTANTE!** Para a correta conexão dos acessórios é indispensável a leitura do manual de instruções.

Adquira uma mangueira de borracha resistente ao calor com tecido interno de bitola 5"/16, 300 psi (conforme amostra) e conecte-a na extremidade da Saída Externa de Vapor (Fig.1) localizada na parte posterior da autoclave. A outra extremidade deve ser colocada dentro de um recipiente sem tampa posicionado 40 cm abaixo do nível da autoclave com água comum para a despressurização (Fig.1A), a mangueira deve estar acima do nível da água ou conectada a uma tubulação de esgoto que suporte a temperatura de 100°C.

**OBS:** Para instalar ou substituir a mangueira da saída externa de vapor, certifique-se de que a autoclave esteja fria e desligada da rede elétrica, proceda então da seguinte forma:

- Encaixe a mangueira à conexão da Saída Externa de Vapor, coloque a braçadeira e aperte-a com uma chave de fenda. Para a substituição, simplesmente solte a braçadeira remova a mangueira antiga e coloque uma nova seguindo o mesmo procedimento de instalação.

**ADVERTÊNCIA!** Não utilize mangueira de plástico, pois o calor do vapor irá derretê-la, ocasionando obstrução e pane na Saída Externa de Vapor. Pela mesma razão, a outra extremidade da mangueira deverá ficar livre de qualquer obstrução, **acima do nível de água**, com corte em "V" na extremidade.

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA AUTOCLAVE

- 1▶ **PAINEL** - Está localizado na parte frontal da autoclave, é feito em plástico ABS injetado, é onde se encontra o teclado de controle da autoclave (Fig.3, pág.9).
- 2▶ **TAMPA** - Fica logo atrás do painel, é injetada em alumínio e é responsável pelo fechamento da câmara da autoclave (Fig.6, pág.9).
- 3▶ **TECLADO DE CONTROLE** - Está localizado na parte central do painel, é onde ficam as teclas de controle, LEDs indicativos de operação e o manômetro da autoclave (Figs. 3 e 4, pág.9).
- 4▶ **MANÔMETRO** - É onde são exibidas as informações relativas à pressão e temperatura da autoclave, localiza-se na parte direita do teclado de controle, (Figs. 3 e 4, pág.9).
- 5▶ **FECHO** - Localizado na parte frontal da autoclave (Fig.3, pág.9), é utilizado para abrir, fechar e travar a porta da autoclave (conjunto painel/tampa). Para verificar a posição correta do fechamento consulte a Figs.14 e 15 (Pág.12).



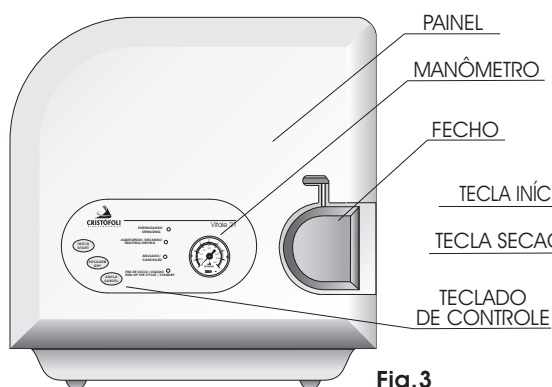


Fig.3

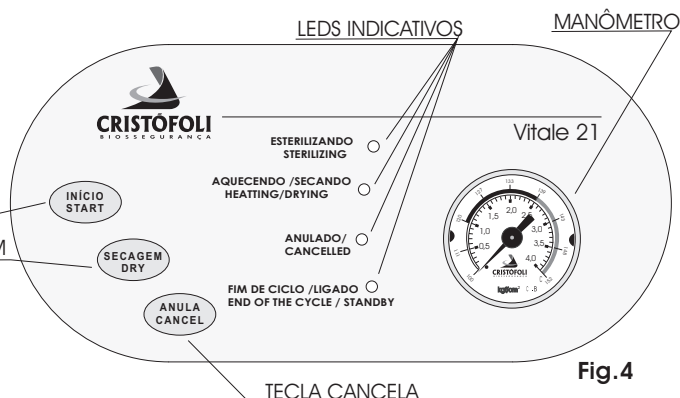


Fig.4

6► **ANEL DE VEDAÇÃO** - É encaixado na tampa, tem a função de vedá-la com a câmara (Figs. 5 e 6), servindo também como dispositivo de segurança. Consulte "Dispositivos de Segurança" (Pág.10). Requer manutenção semanal. Consulte "Manutenção Preventiva" (Pág.22).

7► **VÁLVULA DE SEGURANÇA E VÁLVULA ANTI-VÁCUO** - A válvula de segurança é um dos dispositivos responsáveis para aliviar a pressão da câmara caso ultrapasse os valores limite estabelecidos. A válvula anti-vácuo tem a mesma função, aliviando o vácuo da câmara quando houver (Fig.6). Consulte "Dispositivos de Segurança" (Pág.10)


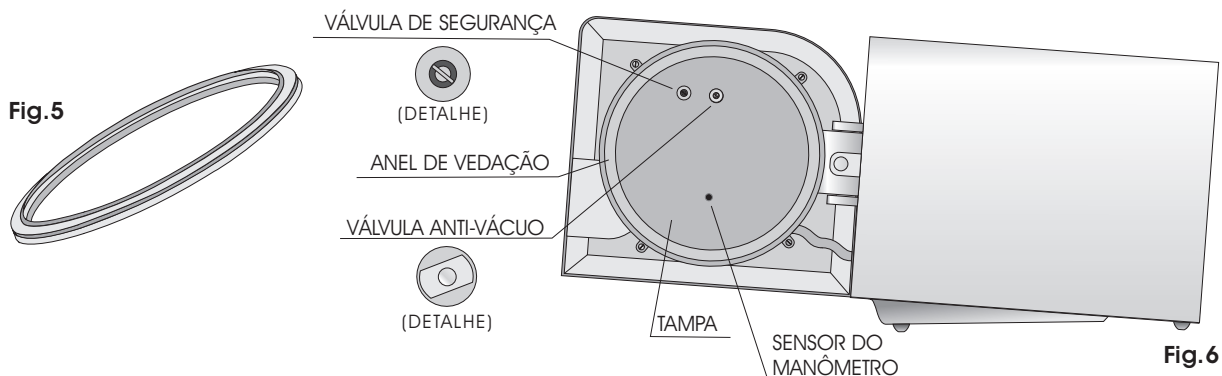


Fig.6

8► **SAÍDAS INTERNAS DE VAPOR** - Orifícios localizados na parede posterior da câmara (Fig.7, pág.10). Servem como conduto para o vapor até a Válvula Solenóide. Devem ser inspecionadas **diariamente** e permanecer livre de obstruções. **ATENÇÃO!** Ao colocar os materiais na autoclave, tome sempre cuidado para não encostá-los nos orifícios das Saídas Internas de Vapor, isso ocasionará interferência no ciclo. Consulte item 6.4 (Pág.19).

9► **SAÍDA EXTERNA DE VAPOR** - Localizada na parte posterior superior da autoclave (Fig.1, pág.8), possui um diâmetro de 5"/16 para conexão da mangueira de despressurização, que por sua vez é conectada à tubulação de esgoto ou recipiente com água, expulsando o ar frio da câmara no início do ciclo e o ar quente no final do ciclo. Consulte "Instruções de Instalação" tópico "Instalação Hidráulica" (Pág.8).

10► **VÁLVULA SOLENÓIDE** - Componente interno do equipamento responsável pela desaeração e despressurização, ela se abre no início do estágio de aquecimento para permitir a saída de ar frio, depois fecha-se para permitir o aumento da pressão para a esterilização e abre-se novamente ao final do ciclo de esterilização para a despressurização da câmara (Fig.23, pág.25).

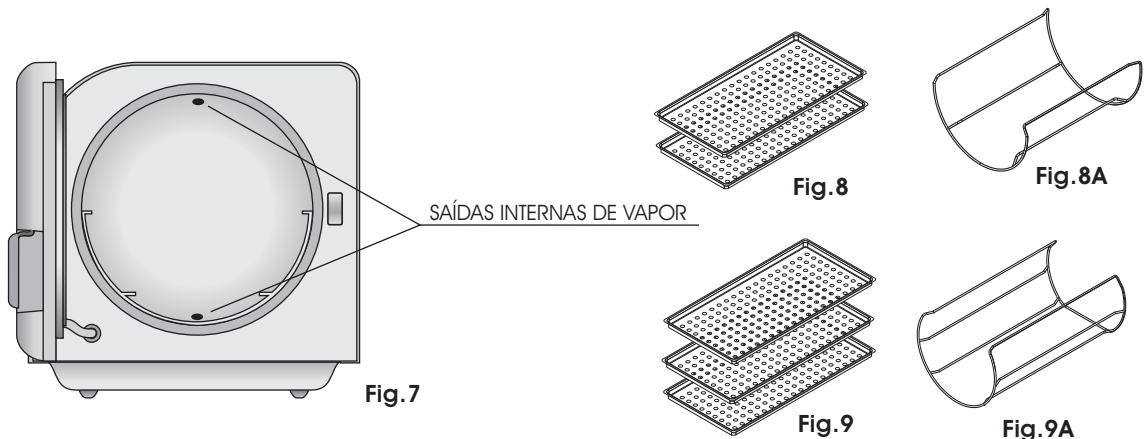

### DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

A autoclave **Vitale 12/21** possui os seguintes dispositivos de segurança:

- 1▶ **VÁLVULA DE SEGURANÇA** - Ela se abre quando a pressão alcança de 2 a 2,5 Kgf/cm<sup>2</sup> ou 200 a 250 kPa - Consulte "Identificação dos Componentes da Autoclave" (Item 7, pág.9).
- 2▶ **VÁLVULA ANTI-VÁCUO** - Funciona da mesma maneira que a Válvula de segurança, no caso de formação de vácuo. Consulte "Identificação dos Componentes da Autoclave" (Item 7, pág.9).
- 3▶ **ANEL DE VEDAÇÃO** - Caso a pressão ultrapasse 3 Kgf/cm<sup>2</sup> ou 300 kPa, o anel de vedação escapará pela borda ocasionando um ruído alto, consulte "Identificação dos Componentes da Autoclave" (Item 6, pág.9).
- 4▶ **FUSÍVEL** - Dispositivo de segurança que tem por finalidade proteger as instalações elétricas contra excessos de corrente. O fusível utilizado é o 20 AGLF de Vidro.

Caso o usuário deseje substituir o fusível pessoalmente, a Tabela 3 abaixo fornecerá as informações necessárias.

!	VOLTAGEM	LINHA DE VOLTAGEM ~	FUSÍVEL (Vitale 12)	FUSÍVEL (Vitale 21)
	127V	127V (114V - 140V)	10A (250V)	12A (250V)
	220V	220V (198V - 253V)	6A (250V)	8A (250V)

Tabela 3

- 5▶ **TERMOSTATO** - Dispositivo interno do equipamento. Tem a função de limitar o aquecimento excessivo da câmara durante os ciclos de esterilização ou em caso de mau funcionamento do circuito eletrônico (Fig.26, pág.26).
- 6▶ **SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA** - Dispositivo interno do equipamento que monitora a temperatura e a pressão da autoclave durante o funcionamento.



Fig. 10

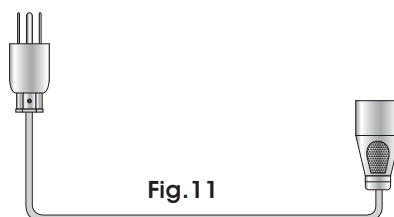


Fig. 11

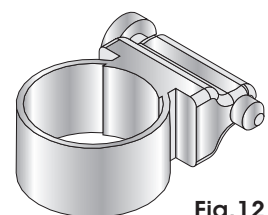


Fig. 12


### ACESSÓRIOS DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO


- 11► **Suporte** - É fornecido 1 suporte para cada modelo, Vitale 12 (Fig.8A, pág.10) e Vitale 21 (Fig.9A, pág.10). Para colocar corretamente o suporte de bandejas, observe que para o modelo Vitale 21, o lado arredondado deve estar voltado para a abertura da câmara (Fig.9A, pág.10).
- 12► **Bandejas** - São fornecidas 2 bandejas para Vitale 12 (Fig.8, pág.10) e 3 para Vitale 21 (Fig.9, pág.10), que servem para manter os materiais a serem esterilizados fora do contato direto com a água e as paredes internas da câmara da autoclave.
- 13► **Copo Graduado** - Usado para dosar a quantidade de água destilada necessária para o processo de esterilização (Fig.10, pág.10).
- 14► **Cabo de Energia** - Usado para conectar o equipamento à rede elétrica, (Fig.11, pág.10).
- 15► **Braçadeira** - Usada para fixar a mangueira na saída externa de vapor, (Fig.12, pág.10).

### COMO USAR A AUTOCLAVE VITALE 12/21

**Atenção!** Durante o funcionamento da autoclave é perfeitamente normal ouvir alguns ruídos, que são produzidos pela abertura e fechamento das válvulas, desaeração e despressurização, que fazem parte do adequado funcionamento do equipamento. O anel de vedação, a válvula de segurança e a válvula VSPF são mecanismos de segurança que quando ativados liberam pressão automaticamente, produzindo ruídos relativamente altos.

O ideal é que a autoclave seja instalada em sala própria para esterilização de acordo com a publicação da ANVISA **Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos**, pág.18, 2006. A Cristófoli não se responsabiliza por acidentes que possam ocorrer devido aos sobressaltos causados pelos ruídos produzidos pelo equipamento, tampouco por acidentes e/ou falhas causadas pela não observação dos itens aqui mencionados.

O símbolo 14  aparece em alguns locais da autoclave, e registra que é necessário uma atenção especial e que o usuário/operador deve observar suas referências no Manual de Instruções que acompanha o equipamento. No manual poderá ser encontrada a descrição dos potenciais riscos e as ações a serem tomadas em uma situação adversa que venha a ocorrer.

O símbolo 13  que tem como finalidade chamar a atenção do usuário/operador para superfícies que poderão estar quentes quando a autoclave estiver em funcionamento ou logo após o uso.

- Abra a porta da autoclave, usando o copo graduado, coloque a quantidade correta de **água destilada** diretamente na câmara antes de cada ciclo (Fig.13) de acordo com a Tabela 4 abaixo.

Quantidade de água destilada para cada ciclo	
Vitale - 12 litros	Vitale - 21 litros
150 ml	250 ml

Tabela 4

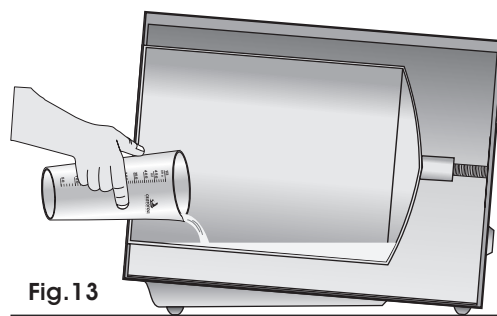


Fig. 13

**ATENÇÃO!** Utilizar somente água destilada na esterilização. O não cumprimento desta recomendação pode ocasionar a obstrução do sistema hidráulico da autoclave (tubulação e/ou válvulas), manchas no instrumental e conseqüentemente a perda da garantia.



Fig.14

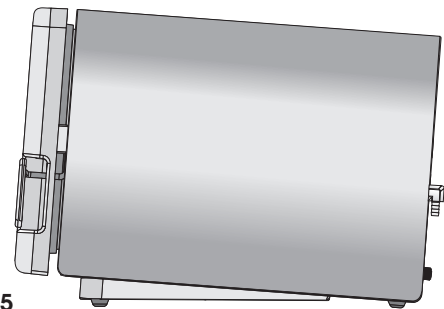


Fig.15

- ▶ Abasteça a autoclave com os materiais a serem esterilizados, tomando cuidado para não encostá-los nos orifícios das saídas internas de vapor, pois isso ocasionará interferência no ciclo. Consulte o item 6.4 "Recomendações para o Melhor Acondicionamento do Material na Autoclave" (Pág. 19, ). **Não sobrecarregue a autoclave.**
- ▶ Feche a porta da autoclave pressionando-a contra a câmara (cuba) e mova o fecho totalmente para a direita e para baixo até o final do curso (o fecho deverá estar completamente nivelado com o painel (Figs.14 e 15). Para a abertura da autoclave repita o mesmo procedimento de modo inverso.  
**ATENÇÃO!** A não observação desta recomendação pode prejudicar o funcionamento adequado de sua autoclave, podendo até mesmo causar o desprendimento do anel de vedação. É muito importante manter a autoclave fechada e travada adequadamente para evitar acidentes e queimaduras.
- ▶ Ligue a autoclave na rede elétrica, o LED **Fim de Ciclo/Ligado** acenderá (Fig.16). Aperte a tecla **INÍCIO**, nesse momento, a autoclave emitirá um bip, o LED **Aquecendo/Secando** estará aceso (Fig.17), a autoclave iniciará então o aquecimento que poderá variar de 8 a 30 minutos dependendo das condições de temperatura e altitude do local de trabalho, rede elétrica e quantidade de material carregado.

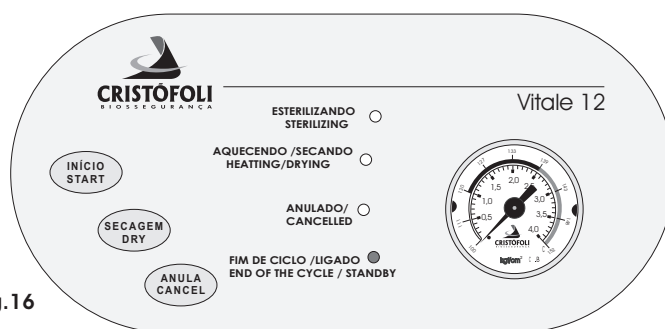


Fig.16



Fig.17

- Assim que a temperatura ideal para o início da esterilização for atingida, a autoclave entrará na fase de esterilização propriamente dita, a autoclave soará 1 bip e o LED indicativo **Esterilizando** acenderá, permanecendo neste estado pelo tempo pré-programado de 16 minutos (Fig.18). Caso a autoclave não atinja a pressão/temperatura ideal para a esterilização em no máximo 30 minutos, seja por falta de água, excesso de material ou por vazamento, o ciclo será cancelado automaticamente. Oscilações de voltagem na rede elétrica podem fazer com que o ciclo seja cancelado a qualquer momento.

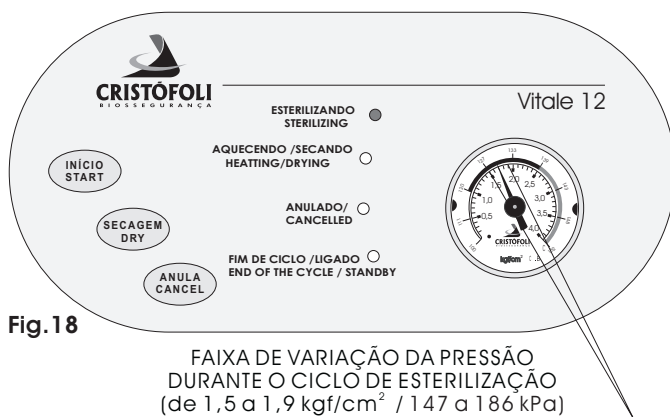


Fig.18



Fig.19

A autoclave funciona de acordo com um determinado tempo e temperatura pré estabelecidos de fábrica. A Tabela 5 abaixo orienta quanto ao tempo de aquecimento, temperatura, pressão e tempo de esterilização e ainda o tempo de secagem do ciclo completo.

Ciclos Vitale 12 / 21	Tempo de Aquecimento	Temperatura e Pressão de Esterilização	Tempo de Esterilização	Tempo de Secagem
Ciclo Único	10 a 30 min	126 a 130° C / (1,5 a 1,9 kg/cm <sup>2</sup> ) 147 a 186 kPa	16 min	30 min
Secagem Extra	(- - - - -)	(- - - - -) Temperatura de Secagem - 95 °C / 203 °F	(- - - - -)	30 min

Obs: Os valores do Tempo de Aquecimento expressos levam em consideração a tabela de dados técnicos com relação às condições de temperatura ambiente e altitude do local de trabalho. **Tabela 5**

- f ► Ao término da esterilização a autoclave soará 1 bip, a válvula solenóide se abrirá e poderá ser ouvido o estalo de sua abertura, nesse momento a autoclave despressurizará, ao seu término, o manômetro indicará pressão "0". A seguir a autoclave entrará no ciclo de secagem emitindo 10 bips, o LED indicativo **Aquecendo/Secando** acenderá (Fig.19). **Neste momento é necessário que o operador entreabra a porta para a secagem** (Fig.20, pág. 14).

Vista superior

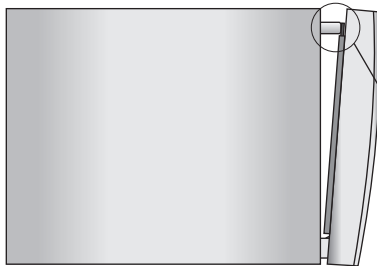


Fig.20

**ATENÇÃO!**

Ao abrir a autoclave para a secagem observe a posição correta da porta na figura ao lado. (a Vitale 12/21 realiza a **secagem com a porta entreaberta**, sua abertura é necessária para a evaporação do vapor e um processo de secagem eficiente).

**OBS:** Durante o aquecimento e a secagem, a válvula produz um ruído semelhante ao funcionamento de um motor elétrico.

Para que a secagem seja eficiente, entreabra a porta imediatamente após os bips indicativos do ciclo de secagem.

Nunca toque nas partes internas da autoclave (câmara, bandejas, material, etc.) quando estiverem quentes, mesmo após os bips de indicação de ciclo concluído os materiais ainda estarão quentes, aguarde até que estejam frios o suficiente para o manuseio e use luvas adequadas para a manipulação dos materiais esterilizados.

9► Ao final do processo de secagem, a autoclave emitirá 4 bips e o LED **Fim de Ciclo/Ligado** permanecerá piscando continuamente. Para a finalização do processo e volta à fase inicial, pressione a tecla **ANULA**.

## SITUAÇÕES ADVERSAS

1► Algumas das situações poderão causar a interrupção e cancelamento automático do ciclo no máximo em 30 minutos, quando:

- a► a pressão/temperatura não for atingida;
- b► houver vazamento de vapor/pressão, falta de água ou excesso de material;

Quando isso ocorrer, a autoclave soará 1 bip e o LED **Anulado** acenderá e a autoclave despressurizará automaticamente. Após a despressurização, aperte a tecla **ANULA** para voltar à fase inicial.

Verifique a causa do ocorrido, tome as providências necessárias e efetue um novo ciclo para o reprocessamento dos materiais de acordo com as instruções do tópico "Como Usar a Autoclave Vitale 12/21" (Pág.11). O operador deverá verificar se houve sobra de água na câmara, que deverá ser retirada manualmente através da porta com o uso de um pano limpo e seco. **Atenção!** Para sua segurança, lembre-se de usar EPIs (luvas de látex apropriadas). Aguarde pelo menos 10 minutos para o resfriamento da câmara antes de iniciar um novo ciclo.

2► Havendo a necessidade de interromper o ciclo de aquecimento ou esterilização, basta pressionar a tecla **ANULA** (nesse caso, após o bip, o LED **ANULADO** ficará piscando, pressione a tecla **ANULA** mais uma vez para voltar à fase inicial.

3► Quedas de energia ou oscilações na voltagem da rede elétrica também poderão causar a interrupção e cancelamento automático do ciclo, nesse caso, o LED **Fim de Ciclo/Ligado** acenderá. Se o monômetro indicar a existência de pressão na câmara, pressione a tecla **ANULA**, nesse momento a autoclave despressurizará. Aguarde o final da despressurização e pressione **ANULA** mais uma vez para voltar à fase inicial. Se não houver pressão na câmara, abra a porta da autoclave e retire manualmente toda a água restante na câmara com o uso de um pano limpo e seco.

- 4► Caso o material não esteja completamente seco, pode-se optar pela função extra de secagem: mantenha a porta entreaberta, acione a tecla **SECAGEM**. O LED **"AQUECENDO/SECANDO"** acenderá (Fig.19), o que indica o início do ciclo de 30 minutos. Este ciclo poderá ser interrompido, acionando-se a tecla **ANULA**, caso o operador constate que o material já esteja seco.
- 5► Para facilitar o fechamento da porta entre um ciclo e outro, considerando que o LED indique **Standby**, acione a tecla **ANULA**, o painel indicará **ANULADO**. Desta forma, a Válvula Solenóide se abrirá, facilitando o fechamento. Pressione novamente a tecla **ANULA** antes de iniciar o novo ciclo.

## **REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E SUAS ETAPAS**

---

**ATENÇÃO!** Antes de iniciar os procedimentos para a esterilização, o operador deverá estar paramentado com luvas de látex grossas com o punho sobre o avental de mangas compridas, avental plástico sobre o convencional, máscara, óculos de proteção, gorro e sapato fechado.

A esterilização necessita de um preparo prévio e faz parte de todo um processo. Sugerimos que o profissional padronize o seu processo. Faça um roteiro por escrito, evitando assim que algum requisito seja esquecido. As etapas para a sua realização e seu preparo são as seguintes: Imersão; Limpeza; Inspeção Visual; Enxágüe; Secagem; Embalagem/Empacotamento e Acondicionamento; Esterilização; Armazenamento; Monitorização da Esterilização e Validade da Esterilização.

### **1. IMERSÃO**

Imediatamente após o uso, o ideal é que se coloque os instrumentos/artigos em imersão (também chamado de pré-banho ou pré-lavagem), mergulhando os instrumentos/artigos em uma cuba (de preferência dupla, com escorredor) contendo detergente enzimático (siga as recomendações de diluição e imersão do fabricante). Conheça a Cuba Plástica para Imersão Cristófoli. Esta é uma recomendação especialmente útil quando os instrumentais estiverem grosseiramente contaminados com matéria orgânica. Deixe em imersão por 10 minutos, retire e proceda a limpeza na Cuba de Ultra-som Cristófoli.

Não utilize detergentes comerciais, de uso doméstico, para banhos ou lavagem de instrumentos/artigos, esses produtos podem danificá-los.

Não misture metais diferentes no mesmo banho, pois poderá ocorrer corrosão eletrolítica.

### **2. LIMPEZA**

A limpeza rigorosa de todo o material é um dos fatores básicos para o sucesso na esterilização. A presença de matéria orgânica (sangue, secreções, pus, gordura, óleo ou outro tipo de sujidade), protege os microrganismos, dificultando a esterilização. Limpeza inadequada, ou com produtos incorretos pode danificar o instrumental causando manchas, escurecimento e corrosão.

Os materiais novos (recém chegados da loja), devem passar pelo processo de limpeza antes da esterilização, para remoção de sujidade e produtos químicos, a fim de evitar que fiquem escurecidos, manchados ou amarelados.

Os detergentes enzimáticos são eficientes na remoção de matéria orgânica, porém alguns produtos utilizados na odontologia ficam aderidos aos instrumentos, como o cimento por exemplo, necessitando ação mecânica. A limpeza mecânica (manual) com escova deve ser feita sob imersão. Quando realizada em água corrente, embaixo da torneira por exemplo, produz aerossóis que podem causar danos a saúde.

O operador deve tomar cuidado ao remover o material aderido aos instrumentos. Evite o uso de esponjas com abrasivos ou palha de aço, pois estes produtos podem danificá-los.



Pode-se utilizar a limpeza automatizada em cubas de ultra-som que facilitam a retirada de sujidade, sendo especialmente úteis na limpeza de pontas diamantadas, brocas e limas, cujas reentrâncias são inacessíveis às cerdas das escovas.

A limpeza das canetas de alta rotação, contra-ângulos e outras peças de mão devem seguir as recomendações do fabricante, e realizada separadamente do restante do instrumental. A sua lubrificação deve ser anterior a esterilização e com lubrificantes próprios e hidrossolúveis.

### 3. INSPEÇÃO VISUAL

O operador deve fazer uma inspeção visual de todos o instrumental, verificando as áreas de maior dificuldade de acesso, como cremalheiras (peças dentadas), reentrâncias, ranhuras etc., procedendo a remoção mecânica se necessário.

### 4. ENXÁGÜE

Enxaguar abundantemente o instrumental. O uso de água filtrada para o enxágüe é altamente recomendado. A remoção inadequada de desincrustante provoca manchas cinza-escuras no instrumental de maneira irreversível.

### 5. SECAGEM

Secar o instrumental com campos de algodão, outro tecido que não solte fiapos ou papel toalha. O instrumental pode ser seco em uma estufa especialmente regulada para este fim (50° C). Não deixe o instrumental secar naturalmente, que além do risco operacional, pode causar manchas.

## 6. MATERIAIS, EMBALAGEM, EMPACOTAMENTO E ACONDICIONAMENTO

### 6.1 Recomendações sobre os tipos de embalagens e materiais a serem usados na autoclave

Antes de levar qualquer **instrumental/artigo** para autoclave, verifique com o fabricante do mesmo se isto é possível. Usualmente as embalagens trazem indicação de resistência até **135 °C**, ou o símbolo .

**Gaze e algodão:** Devem ser embalados em **porções individuais** para cada paciente.

**Campos, capotes e tecidos em geral:** Devem ser embalados individualmente.

**Materiais pequenos e/ou leves como cânulas e limas:** Devem ser **obrigatoriamente** embalados, pois podem se perder durante o processo, causando obstrução da válvula e tubulação da autoclave.

**Brocas e limas:** Atualmente existem embalagens apropriadas para **brocas e limas**, que as protegem no processo de esterilização. Outra opção são os envelopes de papel grau cirúrgico. Brocas de aço carbono são impróprias para serem esterilizadas em autoclaves. Ao adquirir brocas novas, lembre-se de lavá-las antes de autoclavar.

**Anéis de Identificação de Silicone:** Lavá-los individualmente e esterilizá-los junto com o próprio instrumental, ou separadamente, desde que acomodados em envelopes de papel grau cirúrgico para que não se percam no processo e/ou obstruam as tubulações da autoclave.

**Caixas e bandejas:** Devem ser **totalmente perfuradas** de modo a permitir a circulação de vapor e facilitar a secagem. Estas podem ser embaladas em papel grau cirúrgico, papel crepado ou campos de algodão, conforme as especificação mais adiante. A utilização de caixas não é obrigatória, porém protegem a integridade da embalagem e o instrumental, uma vez que muitos são pérfuro-cortantes.

Para esterilizar bandejas não perfuradas, coloque-as separadas do instrumental, com espaços entre as mesmas para permitir a circulação de vapor.



**Pacotes:** Devem ser **pequenos e compatíveis** com os atendimentos (jogo clínico, jogo de periodontia, etc.), evitando reprocessamento desnecessário dos materiais não utilizados. Devem também ser bem confeccionados e lacrados cuidadosamente, para que não se rompam durante o processo de esterilização, causando obstrução nas saídas de vapor, comprometendo a esterilização e causando danos ao equipamento. Retire o excesso de ar dos pacotes, pois ele dificulta a entrada do vapor.

**Pontas de instrumentos pérfuro-cortantes:** Sondas exploradoras, sondas milimetradas, material de periodontia, etc. Deverão ser protegidas com gaze ou algodão para evitar que furem os pacotes, inutilizando-os.

## 6.2 Tipos de embalagens para esterilização em autoclave

**Campos de Algodão:** Os pacotes feitos com campos de algodão (40 fios por cm<sup>2</sup>) devem ser duplos. Este material tem a vantagem de não ser descartável, porém exige maior disponibilidade no tempo do empacotamento e lavagem a cada ciclo para recompor a disposição das fibras e após perderem 10% do seu peso, devem ser desprezados para este fim. Verificar visualmente a sua integridade, pois é incorreto cerzir os orifícios. A barreira microbiana é da ordem de 35%, quando o tecido é novo.

**Embalagens e Envelopes (papel grau cirúrgico + filmes laminados e polipropileno):** Embalar os artigos diretamente em envelopes especialmente confeccionados para este fim. A barreira microbiana deste material é acima de 90%. Tem a vantagem de verificação visual do instrumental e de possuir indicadores químicos de processo. A sua correta abertura proporciona um campo estéril para colocação do instrumental. Os rolos ou tubulares possuem uma grande variedade de larguras e dobras laterais que permitem a acomodação de caixas. Para o fechamento, utilize seladora que forneça um selamento adequado (maior que 6 mm). A APECIH (2003) recomenda que a borda de selagem seja de 10 mm de largura, com distância de 3 cm do corte. Este selamento pode ser simples, duplo ou triplo. Não utilize fita para autoclave na selagem do envelope, este procedimento pode comprometer a integridade da embalagem e conseqüentemente da esterilização. **A sua reutilização é proibida.**

**Obs:** Recomendamos a utilização das embalagens produzidas dentro dos padrões da EN 868 e/ou NBR 13386/95.

**Papel crepado:** A vantagem do papel crepado é ser mais resistente que o papel grau cirúrgico, pois a embalagem é dupla. Possui barreira microbiana acima de 90%. São vendidos em folhas e possuem como desvantagem a necessidade de confecção dos pacotes e colocação de fita apropriada. São de uso único e mais indicados para caixas volumosas.

Ao adquirir material de embalagem certifique-se do registro no Ministério da Saúde.

**Filmes Plásticos Transparentes:** Existe no mercado uma grande variedade de polímeros termoplásticos, com a finalidade de embalar artigos odonto-médico-hospitalares. Esse tipo de material não é indicado para esterilização, até o presente momento, pois dificultam o processo de secagem relatado nos testes realizados na fábrica e também baseada nas considerações apresentadas por BERGO na APECIH (2003).

**Caixas perfuradas próprias para autoclave:** Podem ser encontradas em inox ou plástico resistente à autoclavação. Aqui se encaixam também os broqueiros e porta-limas que também devem ser específicos para autoclave. Algumas vezes, as caixas para brocas comportam a colocação de broqueiros em seu interior. O cirurgião-dentista deverá avaliar se é o melhor método, evitando múltiplas embalagens. De todo modo, as caixas não eliminam o posterior recobrimento com barreira microbiana representada pelos materiais citados acima (campo de algodão, papel grau cirúrgico, ou papel crepado). O profissional que estiver fazendo uso de autoclavação para uso imediato poderá prescindir do invólucro final, lembrando que todas as medidas de controle devem ser tomadas, e só é aconselhável para materiais semi-críticos.

**ADVERTÊNCIA:** Materiais do tipo não-tecido, "wraps" e similares, embora confeccionados e com registro no Ministério da Saúde, não são indicados para autoclaves gravitacionais.

Nunca improvise embalagens (BRASIL 2006). As embalagens para esterilização de artigos odonto-médico-hospitalares seguem padrões de qualidade que garantem a penetração de vapor, ausência de contaminantes e a manutenção da esterilização durante o armazenamento.

**Outras opções:** A indústria e comércio oferecem novos produtos a cada dia, portanto se algum novo material estiver disponível, verifique custos/benefícios e se foi confeccionado para esta finalidade, além de ter registro no órgão competente. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante.

**NOTA - O papel kraft (branco e pardo) é contra-indicado pela ANVISA** (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Este papel não é fabricado para fins de esterilização, e apesar de não ter uma avaliação detalhada como invólucro para artigos hospitalares, possui diversas desvantagens, tais como irregularidade e inconstância na gramatura, o que compromete a resistência física, tornando-o vulnerável como barreira microbiana. Além disso, é freqüente a presença de amido, corantes e outros produtos tóxicos que podem se depositar sobre os artigos, deixando manchas. O papel kraft pardo pode apresentar na sua composição alquiltiofeno, que durante a fase de esterilização pelo vapor pode ser arrastado, gerando odor extremamente desagradável, causando náusea e cefaléia nos indivíduos expostos. Apesar disso, este papel ainda é citado como invólucro em portaria da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (1994). A APECIH não recomenda o seu uso para fins de esterilização, pois, além de todas as desvantagens apresentadas, durante o ciclo de esterilização, o papel kraft solta fiapos que podem obstruir as válvulas e tubulações da autoclave.

### 6.3 Técnica para empacotamento de instrumental e outros materiais

A técnica para empacotamento de material e/ou instrumental para o processo de esterilização em autoclave poderá ser em campo de tecido duplo ou papel crepado duplo e deve-se obedecer a seqüência na execução de suas dobras, conforme demonstrado na Fig. 18 abaixo.

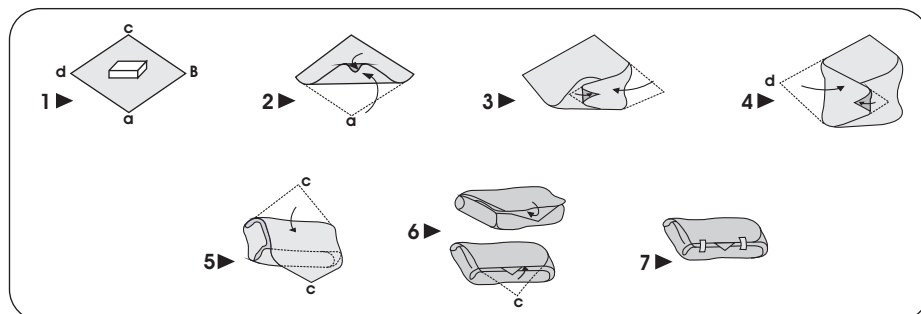


Fig.18

- 1▶ Colocar o artigo no centro do invólucro, em posição diagonal;
- 2▶ Fazer a dobra "a" e uma pequena dobra na ponta do invólucro, cobrindo totalmente o material;
- 3▶ Fazer a dobra "b" e uma pequena dobra na ponta do invólucro;
- 4▶ Repetir o mesmo procedimento na ponta "d";
- 5▶ Trazer a ponta "c" do invólucro em direção ao operador;
- 6▶ Pegar a ponta "c" do invólucro e introduzir sobre as dobras realizadas, deixando a ponta para fora do pacote para facilitar sua abertura e evitar contaminação na hora de abrir;
- 7▶ Lacrar o pacote com fita crepe própria para esterilização (indicador de passagem). Identificar o pacote, anotando o artigo e o responsável pela esterilização do material.

**OBS:** Ao utilizar os envelopes para esterilização, os mesmos devem ser acomodados nas bandejas da autoclave com o lado de papel para cima (Fig.20), isso facilita a evaporação do vapor resultando em uma secagem rápida e eficiente. Conheça também o suporte para envelopes Cristófoli (Fig.21) que além de facilitar a secagem e otimiza a capacidade interna da autoclave podendo comportar até 13 pacotes.

**ERRADO** - Envelopes com o lado plástico p/cima

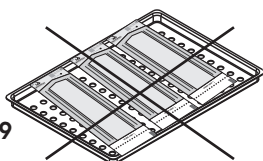


Fig.19

**CORRETO** - Envelopes posicionados com o lado de papel p/ cima

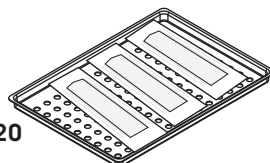


Fig.20

Suporte para envelopes Cristófoli

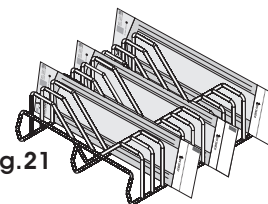


Fig.21

#### 6.4 Recomendações para Melhor Acondicionamento do Material na Autoclave

**IMPORTANTE:** Use no máximo três barreiras para embalagem. Por exemplo: envelopes em papel grau cirúrgico contendo brocas, dentro de uma caixa perfurada contendo também instrumental, envolvida em papel grau cirúrgico.

- 6.4.1▶ Disponha os pacotes paralelamente uns aos outros, com espaços de pelo menos um centímetro, entre um e outro. Este cuidado favorece a circulação de vapor e facilita a secagem;
- 6.4.2▶ A padronização de abastecimento da câmara da autoclave, deve ser baseada em monitoração (Item 8, pág. 20). O abastecimento deve ser de até 75% da capacidade da câmara da autoclave, ou seja, 5 envelopes para Vitale 12 e 12 envelopes para Vitale 21 (envelopes 9 x 26 cm contendo 6 instrumentos cada) ou ainda 13 pacotes para Vitale 12 com o uso do suporte para envelopes. A Vitale 21 comporta dois suportes simultaneamente, podendo esterilizar até 26 envelopes;
- 6.4.3▶ Não encoste campos, plásticos ou qualquer outro tipo de material nas paredes da autoclave, pois existe o risco de excesso de aquecimento e conseqüente dano ao material ou à câmara, além de dificultar a passagem de vapor, podendo inviabilizar a esterilização e/ou a secagem;
- 6.4.4▶ Certifique-se que tanto os artigos, quanto o material de embalagem são adequados para o processo de esterilização em autoclave e possuam registro no Ministério da Saúde.
- 6.4.5▶ **Instrumental desembalados:**
  - Utilize os instrumentos desembalados imediatamente após a sua esterilização para evitar contaminação;
  - Ao acomodar os instrumentos desembalados diretamente na bandeja perfurada da autoclave, intercale-os com campos de tecido ou papel crepado para evitar a formação de corrente galvânica;
  - **Nunca** esterilize artigos pequenos sem embalagem.
- 6.4.6▶ **Não coloque material quente**, recém retirado da autoclave, sobre **superfícies frias**, isto poderá condensar o vapor dentro dos pacotes. Para manipulá-los forre a superfície com campo duplo de preferência estéril.
- 6.4.7▶ Atenção ao abastecer e/ou retirar os materiais da autoclave, tomando cuidado para evitar o rompimento dos pacotes.

6.4.8 ► Se estiver utilizando papel grau cirúrgico, coloque o pacote com a parte de papel voltada para cima, evitando a sobreposição total dos pacotes.

## 7. ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ESTÉRIL

O ideal é o armazenamento em armários revestidos de fórmica fechados com prateleiras aramadas e exclusivos para esta finalidade. Os armários devem ser de fácil limpeza (semanal), em local seco e arejado, livre de odores e umidade. Jamais embaixo de pias perto de conexões da rede de água e/ou esgoto.

## 8. MONITORAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

A monitoração nada mais é que o controle da esterilização. Utilizamos também para a padronização dos ciclos. Se todos os indicadores aprovam o ciclo, significa que a autoclave foi corretamente manuseada. Para tanto utilizamos os parâmetros:

**a) Físicos** - Tempo e pressão de acordo com o estabelecido por este manual, que necessitam ser observados pelo operador e devidamente registrados em todos os ciclos.

**b) Químicos** - Indicadores de passagem (fitas zebreadas e indicadores dos envelopes) são indicadas para utilização em todos os pacotes. Estes não asseguram a esterilização, apenas evidenciam que aquele pacote passou pelo processo. Hoje, a indústria fornece uma variedade de indicadores multiparamétricos que avaliam mais de um fator de esterilização, como por exemplo, tempo e temperatura. Outros mais sofisticados integram tempo, temperatura e presença de vapor. Idealmente devem ser utilizados em todos os ciclos, ou pelo menos diariamente. Os testes realizados pela fábrica demonstraram que o ponto ideal para colocar o pacote teste é a bandeja superior, na região frontal (próximo da porta da autoclave). Atenção na hora da compra de indicadores químicos, pois embora a maioria deles sejam confiáveis, alguns são específicos para determinados ciclos. Em caso de dúvida entre em contato com a consultoria em Biossegurança da Cristófoli, ver site [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com).

**c) Biológicos** - O Ministério da Saúde (BRASIL, 2000) recomenda o uso dos indicadores biológicos semanalmente, na instalação e manutenção da autoclave e também em todas as cargas que contenham artigos implantáveis. Os indicadores biológicos para autoclaves a vapor são esporos de *Geobacillus stearothermophilus*, geralmente auto-contidos, devendo o usuário seguir as indicações do fabricante do teste para assegurar a sua validade. Existem laboratórios de microbiologia que prestam este tipo de serviço, como por exemplo o Instituto Adolfo Lutz. Para sua segurança todos os testes devem ser documentados e arquivados. Os custos para as medidas de controle, tais como testes químicos e biológicos são de inteira responsabilidade do proprietário da autoclave.

## 9. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO

A recomendação da validade de esterilização, tanto da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1995), como do Ministério da Saúde (BRASIL, 2000) para autoclaves a vapor é de **7 dias**. Existe a possibilidade de validação para tempos maiores, mas devido aos custos e dificuldades no processo, são realizados apenas em centrais de esterilização de hospitais.

Este período de validade deve ser considerado desde que os pacotes tenham saído secos do processo de esterilização a vapor e armazenados em condições adequadas, isto é, com temperatura de 18 a 22 °C e umidade relativa do ar de 35 a 50% para embalagens íntegras.

## **COMO EVITAR MANCHAS SUPERFICIAIS E/OU CORROSÃO NO INSTRUMENTAL**

---

As manchas no instrumental podem ter várias origens que podem ocorrer simultaneamente, tornando-se muitas vezes difícil identificar a sua causa.

As causas mais comuns são a utilização de água com impurezas (não destilada) e instrumental de qualidade imprópria para autoclavagem.

### **MANCHAS SUPERFICIAIS**

- 1▶Manchas superficiais em formato circular sem contorno definido são causadas pela secagem incorreta do instrumental antes do empacotamento;
- 2▶Manchas de coloração amarelada ou marrom-escuras, localizadas nas extremidades de instrumentos (não confundir com manchas de ferrugem) são causadas pela pré-lavagem inadequada e permanência de matéria orgânica;
- 3▶Manchas de cor amarela por toda a superfície do instrumento são causadas pelo superaquecimento durante o processo de esterilização;
- 4▶Manchas de cor cinza-azuladas são causadas pela remoção inadequada das substâncias químicas detergentes;
- 5▶Manchas de cor cinza-escuras são causadas pela remoção inadequada de desincrustantes. Este tipo de mancha é irreversível.

### **CORROSÃO**

Pontos de corrosão são os danos mais freqüentes, ocasionam a quebra do instrumental e tem sua origem por íons halógenos de soluções salinas, cloretos, iodo, resíduos de fluídos/secreções corporais, detergentes, desincrustantes e soluções desinfectantes sujas ou alteradas;

Outro fator determinante é a qualidade do instrumental. Certifique-se que o material que você esteja adquirindo ou usando é efetivamente correto para as diversas finalidades propostas.

Existe no mercado um protetor de instrumentos, removedor de manchas e oxidação (Surgi-Stain), recomendado por Guandaline (1999). O mesmo autor indica a lubrificação posterior com um óleo mineral (Premix-Slip).

## POSSÍVEIS FALHAS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

---

- 1▶ Presença de ar residual na câmara e/ou no interior do pacote;
- 2▶ Confeção de pacotes densos e grandes;
- 3▶ Embalagens inadequadas (composição do material) para a esterilização em autoclave;
- 4▶ Tempo insuficiente de exposição ao agente esterilizante;
- 5▶ Manejo incorreto do aparelho;
- 6▶ Obstrução na saída de vapor por falta de limpeza diária do equipamento;
- 7▶ Falta de supervisão rotineira do equipamento;
- 8▶ Sobrecarga da autoclave, o abastecimento deve ser de até 75% da capacidade da câmara da autoclave, ou seja, 5 envelopes para Vitale 12 e 12 envelopes para Vitale 21 (envelopes 9 x 26 cm contendo 6 instrumentos cada) ou ainda 13 pacotes para Vitale 12 com o uso do suporte para envelopes. A Vitale 21 comporta dois suportes simultaneamente, podendo esterilizar até 26 envelopes. As medidas de uso devem ser padronizadas em cada ciclo e para todos os consultórios. Para esta padronização utilize o item "Monitoração do Processo de Esterilização" (Item 8, pág.20).
- 9▶ Rompimento das embalagens durante o abastecimento ou retirada dos materiais da autoclave;
- 10▶ Falta de manutenção preventiva da autoclave;
- 11▶ Falha do equipamento, que deve ser observada pelo operador durante o ciclo.

**ATENÇÃO - As falhas na esterilização são detectadas durante a monitoração.**

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA

---

Para o melhor funcionamento e durabilidade da sua autoclave são necessários alguns procedimentos:

- 1▶ **Use somente água destilada;**
- 2▶ Mantenha a autoclave limpa. Para **câmara de alumínio**, lave a câmara internamente com água destilada, sabão neutro ou sabonete e uma esponja de fibra sintética **abrasiva**, opcionalmente utilize uma esponja de aço inox para dar brilho;
- 3▶ Para a limpeza da **câmara de aço inox**, utilize uma esponja macia **não abrasiva** com sabão neutro ou sabonete e água destilada, para remover a espuma use um pano que não solte pêlos ou fiapos. Finalize a limpeza com álcool 70%;

**ATENÇÃO!** Para a limpeza das bandejas de alumínio anodizado, utilize somente um pano umedecido em álcool 70%. A utilização de outros materiais e/ou produtos poderão riscar ou danificá-las;

- 4▶ Recomendamos a limpeza de sua autoclave mensalmente com um produto desincrustante (*Asseptic ou Clean Plus*) que foram testados pela Cristófoli com sucesso e promovem a limpeza da câmara e válvulas internas. O produto usado deverá ser diluído de acordo com a capacidade de sua autoclave em litros (150 ml para Vitale 12 e 250 ml para Vitale 21) e colocado diretamente na câmara. Ligue a autoclave para a realização de um ciclo completo, mas nunca permita que a autoclave entre no ciclo de secagem (verifique as instruções de uso do produto com o fabricante). Esses produtos poderão ser adquiridos através da Rede de Assistência Técnica da Cristófoli;
- 5▶ A limpeza externa deve ser realizada diariamente com pano macio e sabão neutro, em seguida limpe-a completamente com álcool 70%. O fecho deve ser limpo da mesma maneira antes de cada remoção dos materiais da autoclave após a esterilização;

6►Limpar o Anel de Vedação e as válvulas de segurança e anti-vácuo com um pano limpo que não solte fiapos umedecido com água.

7►Substitua o anel de vedação de sua autoclave **anualmente** e as válvulas de segurança e anti-vácuo **a cada 6 meses**;

## APROVAÇÃO DA AUTOCLAVE

Os equipamentos são testados e monitorados individualmente, conforme os parâmetros da Tabela 6, abaixo. Além dos parâmetros físicos, todas as autoclaves são testadas com emuladores químicos classe 6. Os testes com indicadores biológicos são realizados por amostragem de lote.

Ciclos Vitale 12 / 21	Tempo de Aquecimento	Temperatura e Pressão de Esterilização	Tempo de Esterilização	Tempo de Secagem
Ciclo Único	10 a 30 min	126 a 130° C / (1,5 a 1,9 kg/cm <sup>2</sup> ) 147 a 186 kPa	16 min	30 min
Secagem Extra	(- - - - -)	(- - - - -) Temperatura de Secagem - 95 °C / 203 °F	(- - - - -)	30 min

Obs: Os valores do Tempo de Aquecimento expressos levam em consideração a tabela de dados técnicos com relação às condições de temperatura ambiente e altitude do local de trabalho. **Tabela 6**

## RESOLVENDO PEQUENOS PROBLEMAS

**ATENÇÃO!** Para qualquer substituição de peças contatar a Assistência Técnica Autorizada ou o fabricante. Não recomendamos a troca de peças por pessoas não habilitadas para este fim.

Relacionamos a seguir os problemas mais freqüentes e as possíveis soluções que poderão ser realizadas pelo usuário:

### A AUTOCLAVE NÃO LIGA

#### POSSÍVEIS CAUSAS

- Falta de energia elétrica.
- Mau contato do cabo de energia no conector na parte posterior da autoclave ou na tomada da parede.
- Queima do circuito eletrônico.
- Queima de fusível.

#### SOLUÇÃO

- Verifique se há queda de energia em seu local de trabalho.
- Empurre o plug com firmeza para o encaixe correto;
- Verifique o encaixe do cabo de energia no conector da autoclave e/ou na tomada, empurre o plug com firmeza para o encaixe correto.
- Consulte a assistência técnica autorizada.
- Troque o fusível localizado próximo ao conector de energia, consulte "Instruções de Instalação", (Fig.1, pág.8) e "Dispositivos de Segurança" Item 4, pág.10)

Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.



## A AUTOCLAVE LIGA MAS NÃO AQUECE

### POSSÍVEIS CAUSAS

- Queima da resistência.
- Queima do circuito eletrônico.

### SOLUÇÃO

- Consulte a Rede de Assistência Técnica Autorizada (Pág.31).
- Consulte a Rede de Assistência Técnica Autorizada (Pág.31).

## A AUTOCLAVE DEMORA PARA ATINGIR PRESSÃO OU NÃO A MANTÉM INDICANDO CICLO ANULADO

### POSSÍVEIS CAUSAS

- Tensão ou amperagem elétrica menor do que a consumida pela autoclave.
- Vazamento de pressão/vapor através da válvula de segurança e anti-vácuo.
- Fecho mal encaixado causando vazamento de pressão/vapor através da tampa.
- Vazamento de pressão/vapor através do anel de vedação.
- Quantidade de água insuficiente.
- Câmara sobrecarregada.

### SOLUÇÃO

- Consulte um electricista para a adequação da rede, consulte "*Instruções de Instalação*" (Pág. 7).
- Com a autoclave desligada e fria, remova a válvula de segurança e a válvula anti-vácuo, limpe-as e recolque-as de volta em seus lugares que também deverão ser limpos, caso seja necessário, substitua-as.
- Aperte o fecho para baixo até o final.
- Faça a manutenção preventiva (Pág.22).
- Verifique o volume indicado de água.
- Lembre-se de deixar espaços para a circulação do vapor, os pacotes não devem ser muito grandes ou apertados. Não coloque mais instrumentos do que o especificado. O abastecimento deve ser de no máximo 75% da capacidade da câmara da autoclave, ou seja, 5 envelopes para Vitale 12 e 12 envelopes para Vitale 21 (envelopes 9 x 26 cm contendo 6 instrumentos cada) ou ainda 13 pacotes para Vitale 12 com o uso do suporte para envelopes. A Vitale 21 comporta dois suportes simultaneamente, podendo esterilizar até 26 envelopes.

Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

## A PRESSÃO DA AUTOCLAVE SOBE EXCESSIVAMENTE, ACIONANDO OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

### POSSÍVEIS CAUSAS

- Obstrução parcial ou total da válvula solenóide.
- Obstrução da mangueira localizada na saída externa de vapor.
- Problemas com o circuito eletrônico.

### SOLUÇÃO

- Consulte a Rede de Assistência Técnica Autorizada (Pág.32).
- Retire a mangueira localizada na saída externa de vapor e desobstrua-a. **ATENÇÃO!** Nunca utilize mangueira de plástico comum, consulte "*Instruções de Instalação*" (Pág.7) tópico "*Instalação Hidráulica*", (Pág.8).
- Consulte a Rede de Assistência Técnica Autorizada (Pág.31).

Se o problema persistir após a verificação de todos os itens, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.



**COMO IDENTIFICAR SUA AUTOCLAVE**

O rótulo metálico que se encontra na parte posterior do equipamento, tem por finalidade a identificação dos dados técnicos da autoclave.

**ATENÇÃO!** A remoção do rótulo de identificação e/ou quaisquer etiquetas afixadas ao produto implicará na perda automática da garantia.

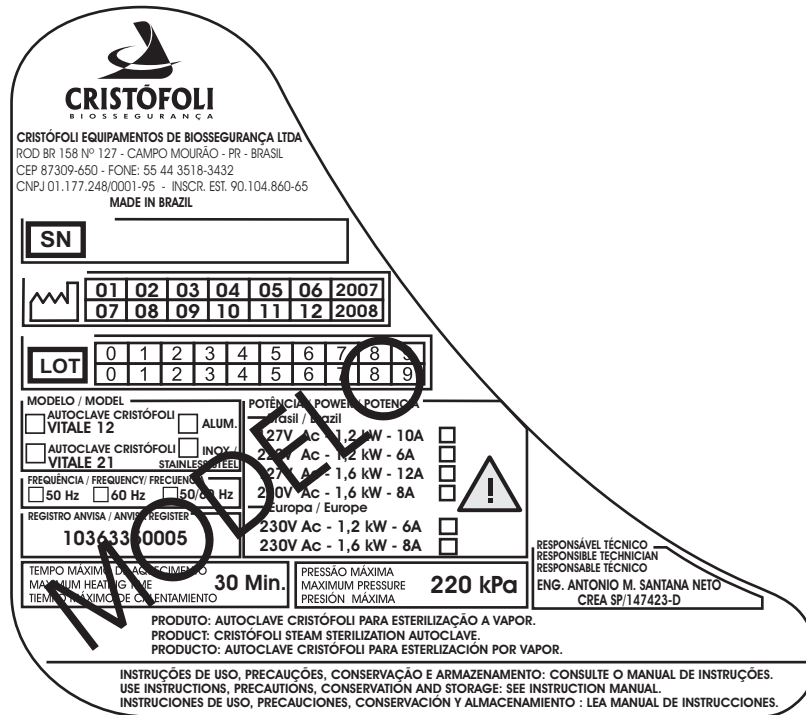


Fig. 22

**ESQUEMA HIDRÁULICO**

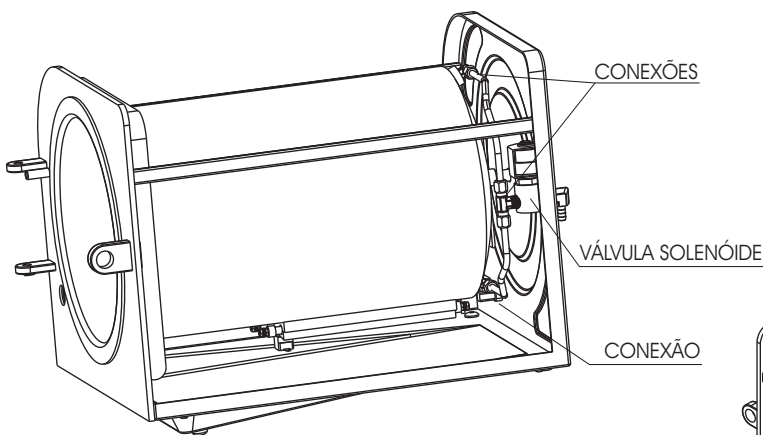


Fig. 23


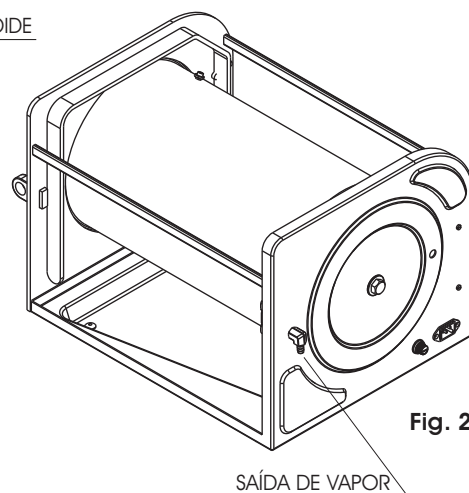


Fig. 24

**ESQUEMA ELÉTRICO**

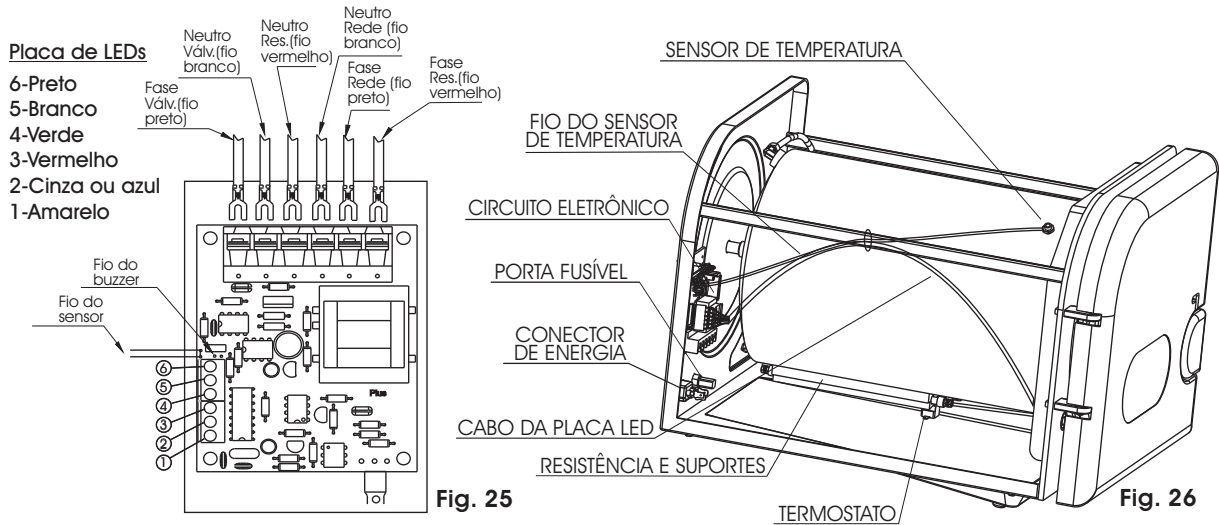

**DADOS TÉCNICOS**

DADOS TÉCNICOS	VITALE 12		VITALE 21	
CERTIFICAÇÕES.....	As Autoclaves Vitale são equipamentos fabricados pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 e BPF- Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-059), atendendo também a ISO 14001:2004 - Gestão Ambiental.			
CAPACIDADE.....	12 litros		21 litros	
PESO.....	Alumínio - 18 kg	(incluindo suporte e bandejas)	Alumínio - 26.9 kg	(incluindo suporte e bandejas)
	Inox - 19.8 kg	(incluindo suporte e bandejas)	Inox - 31 kg	(incluindo suporte e bandejas)
PESO POR ÁREA DE SUPORTE (N/m <sup>2</sup> ).....	42,9 N/m <sup>2</sup>		45,9 N/m <sup>2</sup>	
ESPAÇO LIVRE TOTAL.....	10 cm para cada lado da autoclave		10 cm para cada lado da autoclave	
ESPAÇO LIVRE NECESSÁRIO PARA O MOVIMENTO DA PORTA.....	34 cm		40 cm	
DIMENSÕES INTERNAS DA CÂMARA.....	22 x 33 cm		25 x 46,5 cm	
DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE.....	33,5 x 33 x 48,5 cm		39,5 x 38 x 61 cm	
VOLTAGEM (Brasil).....	127 ou 220V Ac		127 ou 220V Ac	
(Europa).....	230V Ac		230V Ac	
FREQÜÊNCIA.....	50/60 Hz		50/60 Hz	
POTÊNCIA.....	1200 Watts		1600 Watts	
CONSUMO ELÉTRICO.....	285 Watts por ciclo		500 Watts por ciclo	
PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA .....	0 a 4 kgf/cm <sup>2</sup>		0 a 4 kgf/cm <sup>2</sup>	
TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA .....	100°C a 152°C		100°C a 152°C	
TEMPERATURA DA ÁGUA DRENADA.....	100°C		100°C	
CALOR TOTAL EM JOULES TRANSMITIDO EM UMA HORA.....	771 KJ		1.672 KJ	
FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA.....	15°C a 40°C		15°C a 40°C	
ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA.....	Até 2500 m.		Até 2500 m.	

\* Caso a altitude e/ou temperatura do seu local de trabalho seja diferente dos valores mencionados neste manual, entre em contato com a Cristófoli pelo e-mail: cristofoli@cristofoli.com.

**Tabela 7**

## CERTIFICADO DE GARANTIA

---

- A **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA**, garante por 2 (dois) anos as autoclaves Vitale 12 e Vitale 21 contra quaisquer defeitos de fabricação, a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
- As despesas de instalação/locomoção e/ou estada do técnico para a instalação e/ou assistência técnica serão de responsabilidade do comprador/proprietário, bem como as despesas de frete para o envio de equipamento (s) para conserto na fábrica ou para a Assistência Técnica Autorizada, ou ainda no caso de envio de peças.
- A **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA**, não se responsabiliza por danos causados por materiais não autoclaváveis ou desgastes naturais sofridos por materiais de baixa resistência à autoclavação.
- A garantia não cobre danos provocados pelo uso indevido do equipamento, negligência, custos com testes biológicos, acidentes, instalação inadequada e/ou ligação em voltagem errada e reparos efetuados por pessoas não autorizadas pela **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA**.
- O Anel de Vedação, Fusível, Válvula de Segurança, Válvula Anti-Vácuo, Suporte de Bandejas, Bandejas e Cabo de Energia não fazem parte desta garantia. A Câmara e a Válvula Solenóide perdem a garantia quando não se utiliza água destilada ou quando partes dos instrumentos ou resíduos de embalagens se soltam dentro da câmara obstruindo a válvula.

**ATENÇÃO!** O desrespeito a qualquer recomendação de uso e manutenção da autoclave contidas neste manual, acarretará no cancelamento imediato desta garantia.

## COMO PROCEDER EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS

---

Antes de realizar o contato tenha sempre à mão o modelo do seu equipamento, voltagem, número de série e data de fabricação (que se encontram no rótulo de identificação localizado na parte posterior do equipamento (Fig.1, pág.8) e uma descrição do problema. Contate então a Cristófoli através do **CAC - Central de Atendimento ao Cliente** pelo telefone 0800-44-0800 ou (44) 3518-3434 ou ainda pelo Fax: (44) 3518-3437 para uma avaliação e eventual reparo do seu equipamento.

Para facilitar seu atendimento, enviar para o endereço abaixo somente uma cópia da nota fiscal se o "Formulário de Registro de Garantia do Produto" (formulário avulso que acompanha o produto) já foi enviado à Cristófoli.

Caso contrário, preencha e envie-o imediatamente, junto com uma cópia da nota fiscal, ou ainda, faça uma cópia do "Formulário de Garantia" na página 28, preencha-o, anexe uma cópia da nota fiscal e envie para o endereço abaixo:



CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.  
Rod. BR 158, nº127 - CEP 87309-650 - Campo Mourão - PR - Brasil.  
CNPJ 01.177.248/0001 - 95 - Inscr. Est. 90104860-65  
Website: [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com)  
e-mail: [cristofoli@cristofoli.com](mailto:cristofoli@cristofoli.com)

**FORMULÁRIO DE GARANTIA**

NOME		
ESPECIALIDADE		
CNPJ/CPF	E-MAIL	
ENDEREÇO		
BAIRRO	CIDADE	UF
CEP	FONE	FAX
Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO / /	
REVENDEDOR		
MODELO	<input type="checkbox"/> Vitale 12 <input type="checkbox"/> Vitale 21	VOLTAGEM
Nº SÉRIE / LOTE	DATA DE FABRICAÇÃO / /	
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		

Não destaque este formulário, preencha-o e guarde para utilização caso necessite de Assistência Técnica. Envie o formulário avulso que se encontra dentro da autoclave para a Cristófoli o mais breve possível, juntamente com uma cópia da nota fiscal.

**ORIENTAÇÃO PARA DISPOSIÇÃO FINAL DO EQUIPAMENTO**

O meio ambiente é um bem de todos os cidadãos, portanto cabe a cada um de nós tomarmos atitudes que visem a sua preservação e/ou redução dos danos causados pelas atividades humanas a este bem tão importante.

Todos os equipamentos possuem um período de vida útil, sendo que não é possível precisar esta duração, pois isso varia de acordo com a intensidade e a forma de uso.

A **CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA**, reafirmando sua preocupação com o meio ambiente, já demonstrada pela implementação do Sistema de Gestão Ambiental conforme a norma ISO 14001:2004, orienta ao usuário de seus produtos a busca da melhor disposição no momento do descarte do seu equipamento ou de seus componentes, levando em consideração a legislação brasileira de reciclagem de materiais vigente.

Desde já, a Cristófoli orienta que o equipamento seja encaminhado à empresas especializadas em reciclagem que devido ao desenvolvimento contínuo e acelerado de novas tecnologias de reciclagem e de reutilização de materiais, propiciam a melhor forma de descarte dos mesmos. A Cristófoli procura assim, contribuir para a redução do consumo de matérias-primas não renováveis.

Cabe lembrarmos que a embalagem da autoclave, conforme indicação na mesma, é reciclável.

Outros itens a serem observados para a preservação do nosso planeta:

- Reduza a quantidade de material de consumo;

- Reutilize os bens duráveis o máximo possível;
- Faça a disposição correta dos resíduos de amálgama, pois o mercúrio contamina o solo;
- Recicle os materiais no final de sua vida útil.
- Realize a correta separação de todos os resíduos.

Em nome de todos os usuários, agradecemos pela sua compreensão e colaboração.

**Para melhor auxiliar nossos clientes disponibilizamos o serviço de consultoria em Biossegurança Cristófoli.**

Liliana Junqueira de P. Donatelli  
Bióloga - CRB 18469/01-D  
Mestre em Saúde Pública  
Consultora Cristófoli em Biossegurança  
[consultoria@crisofoli.com](mailto:consultoria@crisofoli.com) ou [crisofoli@crisofoli.com](mailto:crisofoli@crisofoli.com)

*Docs/Layouts Informativos/Manual Vitale 12/21/Vitale 12/21 Port. Rev.5*

## LINKS DE INTERESSE

---

<a href="http://www.anbio.org.br">www.anbio.org.br</a>	Associação Nacional de Biossegurança.
<a href="http://www.anvisa.gov.br">www.anvisa.gov.br</a>	Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
<a href="http://www.ccih.med.br">www.ccih.med.br</a>	Site do livro Infecções Hospitalares e suas interfaces na Área da Saúde coord. Dr. Antonio Tadeu Fernandes, área médica.
<a href="http://www.cdc.gov">www.cdc.gov</a>	<i>Centers for Disease Control and Prevention Office of Health and Safety</i> (em inglês).
<a href="http://www.crisofoli.com">www.crisofoli.com</a>	Website da Cristófoli.
<a href="http://www.cvs.saude.sp.gov.br">www.cvs.saude.sp.gov.br</a>	Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
<a href="http://www.fob.usp.br">www.fob.usp.br</a>	Faculdade de Odontologia de Bauru.
<a href="http://www.riscobiologico.org">www.riscobiologico.org</a>	Risco Biológico, debates e matérias sobre o tema.
<a href="http://www.saude.gov.br">www.saude.gov.br</a>	Ministério da Saúde.
<a href="http://www.saude.pr.gov.br">www.saude.pr.gov.br</a>	Secretaria da Saúde do Estado do Paraná.
<a href="http://www.saude.sp.gov.br">www.saude.sp.gov.br</a>	Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (Procure também o site do seu estado).
<a href="http://www.who.int/emc">www.who.int/emc</a>	Site da OMS - Organização Mundial de Saúde ( <i>World Health Organization</i> ) - em inglês - manual citado acima disponível para download.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

APECIH- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Esterilização de Artigos em Unidades de Saúde. 1998.

APECIH- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas Hospitalares e Antissepsia. 1999.

APECIH- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Controle de Infecção na Prática Odontológica. 2000.

APECIH- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR. Esterilização de Artigos em Unidades de Saúde. 2. ed., 2003.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Controle de Infecções e a Prática Odontológica em Tempos de AIDS. Manual de Condutas, 2000.

DONATELLI, Liliana Junqueira de P. Manual de Biossegurança para Odontologia. 2003.

FERNANDES, Antonio Tadeu; FERNANDES, Maria Olívia Vaz; RIBEIRO FILHO, Nelson. Infecção Hospitalar e suas Interfaces na Área da Saúde. Editora Atheneu, 2000.

FOB. Faculdade de Odontologia de Bauru. Manual de Biossegurança. Universidade de São Paulo, 2000.

GUANDALINE, Sérgio Luiz; MELO, Norma Sueli Falcão de Oliveira; SANTOS, Eduardo Carlos de Peixoto. Biossegurança em Odontologia. Editora Edelbra, 2ª. ed., 1999.

GUIMARÃES JR, Jairo. Biossegurança e Controle de Infecção Cruzada em Consultórios Odontológicos. São Paulo: Livraria Santos, 2001.

SÃO PAULO (ESTADO) Resolução SS 374. Norma Técnica sobre Organização do Centro de Material e Noções de Esterilização. 1995.

SÃO PAULO (ESTADO) Resolução SS 15. Norma Técnica Especial Referente ao Funcionamento de Estabelecimentos de Assistência Odontológica. 1999.

TEIXEIRA, Pedro; VALLE, (orgs) Silvio. Biossegurança - Uma Abordagem Multidisciplinar. Editora Fiocruz, 2002.

VASCONCELOS, Jacqueline. Apostila de Esterilização. Recife.

NS-EN 980, Maio de 1996.

International Standard ISO 15223, Abril 2000.

International Standard ISO 15223 - Amendment 1, Agosto 2002.

Norma ABNT-NBR 12914.

NS EN 1041, Fevereiro 1998.

**REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA - ATUALIZADA EM 28/11/2007**

<b>ALAGOAS</b>	Fone: (0**27) 3345-6246/8116-0362	<b>AIMORES</b> <b>Dental Bragio</b> Rua Pedro Nolasco, 221 - Centro Fone: (0**33) 3267-1042/9981-8253
<b>MACEIÓ</b> <b>Opção Assistência Técnica</b> Rua Dias Cabral, 218 - Centro Fone: (0**82) 3326-4171	<b>GOIÁS</b>	<b>ANDRADAS</b> <b>Mauricio Tavares</b> Rua Paulo Sergio Mosconi, 242 – Jd. Itália Fone: (0**35) 3731-2388
<b>Elétrica J. Omena</b> Rua Coronel Vieira Peixoto, 25 - Centro Fone: (0**82) 3326-6336/346-0979	<b>ANÁPOLIS</b> <b>Odontoscope</b> Av. do Contorno, 1093 - Centro Fone: (0**62) 321-0555/9608-2059	<b>BELO HORIZONTE</b> <b>Central Técnica</b> Rua Campos Sales, 533 - Nova Suíça Fone: (0**31) 3371-3121 / 9634-4567
<b>AMAZONAS</b>	<b>CALDAS NOVAS</b> <b>Tecnocaldas</b> Av. Dos Turistas Qd.05 Lt.01, S/Nº - Jd. Dos Turistas Fone: (0**64) 454-5246/9905-0705	<b>Dental Técnica</b> Rua Castro Menezes, 100 - Santa Maria Fone: (0**31) 3388-1375/8801-0062
<b>MANAUS</b> <b>Lincer</b> Cj Jardim do Edem - Rua "A", 04 - Alvorada Fone: (0**92) 3657-4563/3657-4574	<b>GOIÂNIA</b> <b>Biotek Odonto-Hospitalar</b> Av. Fued Jose Sebba, 389 - Quadra 31- Lote 06 St Leste Universitário Fone: (0**62) 3218-2300/ 9979-9410	<b>Odontomax</b> Av. Josefino Gonçalves da Silva, 151 - Goiânia Fone: (0**31) 3488-6669/9634-2521
<b>BAHIA</b>	<b>Doctor Shop</b> Rua Henrique Silva (0083), 420 - Setor Sul Fone: (0**62) 3218-5034/3218-2322	<b>Profécnica</b> Rua Visconde de Taunay, 197 - São Lucas Fone: (0**31) 3223-2666
<b>EUNÁPOLIS</b> <b>Odonto Tec</b> Pç. do Gusmão 20 A - Gusmão (0**73)3281-5193 / 9992-0413	<b>Hospcom</b> Rua 104, 74 Qd F-21, LT.10 Fone: (0**62) 3241-5555/8117-8527	<b>Pena Dental</b> Rua Maria Toledo de Paiva, 05 - São Gabriel Fone: (0**31) 3493-1306 / 9141-5911
<b>ILHÉUS</b> <b>Durklein Serviços</b> Rua Visconde de Mauá, 230 - Centro Fone: (0**73) 3634-6000/9981-6000	<b>SOS Equipamentos</b> Rua 68, 357 - Centro Fone: (0**62) 3212-2023/3223-3481	<b>CARATINGA</b> <b>Odontec</b> Av. Catarini Cimini, 177 - Centro Fone: (0**33)3321-9484/9105-7022
<b>SALVADOR</b> <b>Maxxi Doctor</b> Av. General Graça Lessa, 100 - VI do Ogunjá Fone: (0**71) 3356-3393/3356-5288	<b>RIO VERDE</b> <b>Doctor Shop</b> Rua Abel Pereira de Castro, 1424 - Setor Central Fone: (0**64) 623-2371/(0**62)9957-6815	<b>Odonto Ramos</b> Av. Olegario Maciel, 82 Sl 102 - Centro Fone: (0**33) 3322-3585/9974-8015
<b>Tecnoshopping Dental</b> Av. Tancredo Neves, 805-A - Caminho das Árvores Fone: (0**71) 341-3096/8804-9455	<b>MATO GROSSO</b>	<b>CONSELHEIRO LAFAIETE</b> <b>Top Equipamentos</b> Rua Coronel José Joaquim Queiroz Jr., 127, Campo Alegre Fone: (0**31)3763-7388/8899-1533
<b>CEARÁ</b>	<b>CUIABÁ</b> <b>Deyve-Tec</b> Av. Ten Cel Duarte, 1282 (Fundos) - Centro Fone: (0**65) 322-6085/9959-5952	<b>DIAMANTINA</b> <b>SOS ODONTO</b> Praça Monsenhor Neves, 22 - Centro Fone: (0**38) 3531-3685/8801-1703
<b>CAUCAIA</b> <b>Dental Nordeste</b> Rua 339, 26 - Nova Metrópole Fone: (0**85) 3213-3774/9988-9121	<b>Vansan</b> R. Senador Metelo, 460 – Porto Fone: (0**65) 3324-1871/9952-7995	<b>DIVINÓPOLIS</b> <b>Divitec</b> Rua Américo Martins, 180 - Esplanada Fone: (0**37)3222-4587/9987-9057
<b>DISTRITO FEDERAL</b>	<b>R D Odonto</b> Av. Beira Rio, 3772 - Dom Aquino Fone: (0**65) 634-2387/9983-1587	<b>GOVERNADOR VALADARES</b> <b>Prodonleste</b> Rua Francisco Sales, 200 – Centro Fone: (0**33) 3276-3606/9191-3231
<b>BRASÍLIA</b> <b>Equipo Técnica</b> CLN 105 Bloco "A" Loja 38 - Asa Norte Fone: (0**61) 3340-5942/3034-1719	<b>MATO GROSSO DO SUL</b>	<b>SOS Odonto</b> Rua Ribeiro Junqueira, 261 - Esplanada Fone: (0**33) 3271-4636/3272-1109
<b>O F F Assistência</b> SCS QD 05 BL C 125 Sobreloja 26, Galeria Nova Ouvidor - Santa Comercial Sul Fone: (0**61) 3226-4436/9115-7468	<b>CAMPO GRANDE</b> <b>J B Assist Téc</b> Rua Sete de Setembro, 1042 - Centro Fone: (0**67) 3383-3992	<b>IPATINGA</b> <b>Atecdonto</b> Rua Equador, 132 - Cariru Fone: (0**31) 3825-1328/9988-6328
<b>ESPÍRITO SANTO</b>	<b>DOURADOS</b> <b>Anesterilav</b> Av. Presidente Vargas, 2105 - VI Progresso Fone: (0**67) 421-8673/9971-6449	<b>Jotécnica</b> Rua Sabará, 113A – Centro Fone: (0**31) 3821-7844/9944-5570
<b>ANCHIETA</b> <b>Odontec</b> Alto Pongal S/nº - Córrego da Prata (0**28) 3536-6112 / (0**27) 9923-2214	<b>NOVA ANDRADINA</b> <b>Odontonan Assist Téc</b> Rua Joaquim Sampaio Neto, 680 - Guiomar S Andrade Fone: (0**67) 441-5484/912-5484	
<b>CARIACICA</b> <b>Delttec Assistência Técnica</b> Rua Pio XII, 25 - Campo Grande Fone: (0**27) 3216-1261/9961-8212	<b>MINAS GERAIS</b>	
<b>VITÓRIA</b> <b>Central de Serviços</b> Rua Armando M de Oliveira SL 3011 N°10 Goiabeiras		

Esta lista está sujeita a alterações, visite o nosso site [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com) ou entre em contato pelo fone 0800 44 0800 para verificar possíveis atualizações.



#### **ITABIRA**

##### **Odontomed**

Rua dos Cravos, 841 - São Pedro  
Fone: (0\*\*31) 3831-2948/9995-4719

#### **ITAJUBÁ**

##### **Reinke Assistência Técnica**

Rua José Verano da Silva, 101 - Cruzeiro  
Fone: (0\*\*35) 3622-4392/3622-1445

#### **JUIZ DE FORA**

##### **Equotec**

Rua Barbosa Lima, 161 - Centro  
Fone: (0\*\*32) 3215-3584/9112-8263

##### **Odontotecnica**

Rua Halfeld, 513 sala 204 - Centro  
Fone: (0\*\*32) 3215-7411/3211-5958

#### **LAVRAS**

##### **Odontecnica Lavrense**

Rua Dep. Castejon Branco, 105A - Jd Fabiana  
Fone: (0\*\*35) 3822-1892/9979-1667

#### **MANHUAÇU**

##### **Aste Odonto**

Monsenhor Gonzales, 630 - Centro  
Fone: (0\*\*33) 3331-4834/9984-0888

#### **MONTES CLAROS**

##### **Odontonorte**

Av. Dep. Esteves Rodrigues, 920 Lj 01 - Centro  
Fone: (0\*\*38) 3221-6684/3221-6582

##### **Odonto Service**

Rua Januária, 704, Centro  
Fone: (0\*\*38) 3221-9137/3221-5102

#### **PASSOS**

##### **RODONTEC (Ronei Gueleri ME)**

R. José Muzetti, 140, SL.01 - Penha II  
(0\*35) 3526-4897/9957-3813

#### **PATOS DE MINAS**

##### **R P Odontopatois**

Rua Padre Almir Neves de Medeiros, 1050 -  
Sobradinho  
Fone: (0\*\*34) 3821-9457/9103-8728

#### **POÇOS DE CALDAS**

##### **Dental Samia**

Rua Barão do Campo Místico, 08 - Centro  
Fone: (0\*\*35) 3722-2552

##### **Maurotec**

Rua Paraíba, 537 Cj 002-A - Centro  
Fone: (0\*\*35)3722-4432/9937-2913

##### **Dental Odontopocos Ltda**

Pç. Monsenhor Faria de Castro, 32 - Centro  
CEP: 37701-049  
Fone: (0\*\*35) 3714-7888/9952-9478  
E-mail: odontopocos@gmail.com  
odontotecsc@hotmail.com  
Skype: Odontopocos

#### **PONTE NOVA**

##### **ANG Manutenções Ltda.**

Rua João Alves de Oliveira, 168 - Triângulo  
Novo  
Fone: (0\*\*31) 3817-5187/9125-0802

#### **POUSO ALEGRE**

##### **Dental Samia**

Rua Santa Catarina, 34B - Centro  
Fone: (0\*\*35) 3422-1598/9967-0017

#### **SETE LAGOAS**

##### **Assistec**

Rua Teófilo Otoni, 1021 Lj 13 - Centro  
Fone: (0\*\*31) 3773-4923/8845-9659

#### **TEÓFILO OTONI**

##### **Jotécnica**

Endereço: R. Epaminondas Otoni 702 4º andar  
Sl406 - Edif. Palácio do Comércio - Centro  
(0\*\*33) 3521-4240 / 9985-1345

#### **UBERABA**

##### **Odontolog**

Rua Colatina, 12 - Jd Espírito Santo  
Fone: (0\*\*34) 3338-3883/9968-2501

#### **VISCONDE DO RIO BRANCO**

##### **DentalCavi**

Av. Dr. Carlos Soares, 237 loja 06 - Centro  
Fone: (0\*\*32) 3551-2980/8812-4314

#### **PARÁ**

##### **BELÉM**

##### **Odontécnica**

Passagem de Vilhena, 42 - Montese  
Fone: (0\*\*91) 3274-0717/3253-6028

#### **PARANÁ**

#### **CAMPO MOURÃO**

##### **Biotec**

Rua Edmundo Mercer, 909 - Centro  
Fone: (0\*\*44) 3523-7702/9978-8277

#### **CASCAVEL**

##### **Assist Med**

Rua Fortaleza, 664 - Centro  
Fone: (0\*\*45) 3223-4243/9105-7022

##### **Odonto Oeste**

Rua Terezina, 609 - Cancelli  
Fone: (0\*\*45) 3223-3588/3225-5436

#### **CIANORTE**

##### **Dentalmed**

Rua Alvares Cabral, 836 - Centro  
Fone: (0\*\*44) 3629-3569/9977-1994

#### **CORNÉLIO PROCÓPIO**

##### **Automatic**

Rua Bento Ferraz Campos, 243 Lj 1 - Jd Bela  
Vista  
Fone: (0\*\*43) 523-4941/9975-0425

#### **CURITIBA**

##### **ATAC**

Av. Iguaçú, 863 Sl 8 - Rebouças  
Fone: (0\*\*41) 3223-8375/9902-5491

#### **FOZ DO IGUAÇU**

##### **Kalmo Dental**

Av. General Meira, 3159 - Ouro Verde  
Fone: (0\*\*45) 3223-8375/3527-1982

#### **FRANCISCO BELTRÃO**

##### **Odonto Tec**

Rua Sergipe, 991 - Centro  
Fone: (0\*\*45) 3523-1091/9975-0719

#### **LONDRINA**

##### **Equipposhow**

R. Jandaia, 120 - Jd. Alvorada  
(0\*\*43) 3347-7878/ 9994-2059

##### **J L Manutenção**

Av. Salgado Filho, 215 - California

(0\*\*43) 3337-2524/ 9112-1044

##### **Odonto Ar**

Rua Alagoas, 1050 - Centro  
Fone: (0\*\*43) 3326-1202/9995-7290

#### **MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

##### **Assistec**

Av. Rio Grande do Sul, 5020 - Centro  
Fone: (0\*\*45) 3254-6166/9965-3846

#### **MARINGÁ**

##### **Oraltec**

Rua Independência, 258 Sl-06 - Zona 4  
Fone: (0\*\*44) 3031-5060/9103-5054

#### **PATO BRANCO**

##### **Cermed**

Rua Timbira, 256 - Menino de Deus  
Fone: (0\*\*46) 3224-4649/3225-1561

#### **PONTA GROSSA**

##### **Márcio José Delabernarda**

Av. União Pan-Americana, 1000, BL 6. AP 303  
Colônia Santa Luzia  
Fone: (0\*\*42) 3222-5734/9976-9717

#### **PONTAL DO PARANÁ**

##### **Odonto Service**

Rua Antonina, 492 - Balneário Miami  
Fone: (0\*\*41) 3458-3845/9998-4059

#### **SANTO ANTONIO DA PLATINA**

##### **Agile**

R. 24 de maio, 907 - Centro  
(0\*\*43) 3534-1779/ 9977-0779

#### **UNIÃO DA VITÓRIA**

##### **J L Chagas**

Av. Manoel Ribas, 1048 - Centro  
Fone: (0\*\*43) 3522-8453

#### **PERNAMBUCO**

#### **RECIFE**

##### **Tecnodont**

Rua Gouveia de Barros, 224 - Sto Amaro  
Fone: (0\*\*81) 3221-1392/9126-1391

#### **PIAUI**

#### **TERESINA**

##### **Tec-odonto**

Rua Lisandro Nogueira, 1439 - Centro  
Fone: (0\*\*86) 222-6222/9982-6531

#### **RIO DE JANEIRO**

#### **CAMPOS DOS GOYTACAZES**

##### **Nova Dental**

Rua José F Sanguedo, 205 Lj "A",  
Horto Municipal  
Fone: (0\*\*22) 2722-7094/2733-0906

#### **DUQUE DE CAXIAS**

##### **Universal Tec**

Rua Nunes Alves, Nº 13 SL 239 - Centro  
Fone: (0\*\*21) 3653-2786

#### **ITAPERUNA**

##### **Diítec**

Rua Buarque de Nazaré, 373 - Centro  
Fone: (0\*\*22) 3823-1187/9988-9642

#### **NITERÓI**

**Manzano Assist Tec**

Esta lista está sujeita a alterações, visite o nosso site [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com) ou entre em contato pelo fone 0800 44 0800 para verificar possíveis atualizações.



# AUTOCLAVES

## CRISTÓFOLI

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Rua Cel Gomes Manchado, 173 Sl 203 - Centro  
Fone: (0\*\*21) 2621-3906/2613-0095

### PETRÓPOLIS

#### **Asteco**

Rua Dr Nelson de Sa Earp, 45 Sobreloja 9 - Centro  
Fone: (0\*\*24) 2243-0575/2243-6751

### RIO DE JANEIRO

#### **Asteclin**

Rua Pereira Lopes, 135 Lj "A" - Belfmica  
Fone: (0\*\*21) 3860-6358/2589-5715

### **Emformate Empresa Forn de Materiais Ltda.**

Rua Barão de Cotegipe, 325 - Vila Isabel  
Fone: (0\*\*21) 2577-3344/2577-2241

### **M N Manutenção**

Travessa da Generosidade, 152 - Vila da Penha  
Fone: (0\*\*21) 3301-7792/9167-3005

### **P L K Equipamentos**

Rua Delfina Alves, 221 - Madureira  
Fone: (0\*\*21) 2458-9161/9962-1259

### TERESÓPOLIS

#### **Odonto Serrana**

Av. Durval Fonseca, 111 - Europa  
Fone: (0\*\*21) 2641-4730/9306-3977

### VOLTA REDONDA

#### **Odontotec**

Lrg Nove de Abril, 26 Sl 225 - VI Sta Cecilia  
Fone: (0\*\*24) 3342-1575/3342-0565

### **RIO GRANDE DO SUL**

### CAXIAS DO SUL

#### **Funek**

Rua General Mallet, 209 - Rio Branco  
Fone: (0\*\*54) 215-1822/215-1775

### **Kieling Ltda**

Rua La Salle, 657 - Sl 304 - São Pelegrino  
Fone: (0\*\*54) 3028-8957

### MONTENEGRO

#### **MG DENTAL TÉCNICA**

Rua Alberto Gottselig, 123 - Centenário  
Fone: (0\*\*51) 3632-9286/9957-2162

### NOVO HAMBURGO

#### **Dental Técnica**

Rua Santa Maria, 207 - Ideal  
Fone: (0\*\*51) 581-4065/582-7379

### PASSO FUNDO

#### **Hospitec Assist Tecn**

Av 7 de Setembro, 140 Sl 03 - Centro  
Fone: (0\*\*54) 312-3344/312-9455

### PELOTAS

#### **Equipeças**

Rua General Teles, 567 - Centro  
Fone 0\*\*53) 3227-6972

### PORTO ALEGRE

#### **Odontotec**

Rua Buarque de Macedo, 610 - S Geraldo  
Fone: (0\*\*51) 3342-0731/3342-2063

### **RTMED**

Rua Protásio Alves, 1033 - Rio Branco

Fone: (0\*\*51) 3388-4694/9725-7839

### TENENTE PORTELA

#### **Wink Assistência**

Rua Artur Ambros, 420 - Centro  
Fone: (0\*\*55) 3551-1565/9997-0688

### **RONDÔNIA**

### VILHENA

#### **Trininfo**

Rua Marcos da Luz, 80 - Centro  
Fone: (0\*\*69) 3321-6238/9968-3196

### **RORAIMA**

### BOA VISTA

#### **Prosserv**

Av. Major Williams, 1027 - Centro  
Fone: (0\*\*95) 3623-8978

### **SANTA CATARINA**

### BALNEÁRIO CAMBORIÚ

#### **Edontec**

R. 910 nº 360, Sl. 02 - Centro  
Fone: (0\*\*47) 9994-1923

### BLUMENAU

#### **Odonto Blu**

Rua São Paulo, 2388 Sl 4 - Itoupava Seca  
Fone: (0\*\*47) 323-6149/9982-6869

### **Selmar Assistência**

Rua Theodoro Holtrup nº 670 - Vila Nova  
Fone: (0\*\*47) 323-9616

### **Tecnosergio**

Rua Iguaçú, 75 - Itoupava Seca  
Fone: (0\*\*47) 323-8404/323-9163

### CHAPECÓ

#### **Dental Glanert**

Rua 7 de Setembro - 250 E, Sl 02 - Centro  
Fone: (0\*\*49) 322-0437

### FLORIANÓPOLIS

#### **Dental Tiradentes**

Rua Tiradentes, 240 Lj 01 - Centro  
Fone: (0\*\*48) 224-1202/8406-9414

### **Getassi Assistência**

Vi Kinczeski, 149 - Centro  
Fone: (0\*\*48) 8406-9414

### **RCS**

Rua Prefeito Tolentino de Carvalho, 187, Baln. Estreito  
Fone: (0\*\*48) 244-6422/9903-5195

### ITAJAÍ

#### **Dipeve**

Rua Carlos Seara, 377 - VI Operária  
Fone: (0\*\*47) 3348-1117

### **Odomed**

Rua Gaspar, 137 - Vila Operária  
Fone: (0\*\*47) 3349-0001/9106-1278

### JOAÇABA

#### **Odontomedica**

Rua Francisco Lindner, 101 Sl 01 - Centro  
Fone: (0\*\*49) 521-3391/9997-3825

### JOINVILLE

#### **Edontec**

Rua Nicéas Gonçalves da Maia, 96 - Itaum  
Fone: (0\*\*47) 3028-2907/9971-0133

### **R V Assistência Técnica**

Rua Santo André, 35 - Guanabara  
Fone: (0\*\*47) 3436-0988/9961-7664

### LAGES

#### **Supridental**

Rua Benjamim Constant, 474 - Centro  
Fone: (0\*\*49) 3223-2066/9971-9077

### RIO DO SUL

#### **Odonto Moretti**

Rua Dr. Neumann, 104 - Centro  
Fone: (0\*\*47) 3522-6892/8409-3313

### SÃO MIGUEL D'OESTE

#### **Dental Corá**

Rua Duque de Caxias, 915 - Centro  
Fone: (0\*\*49) 3621-2083/9988-9094

### TUBARÃO

#### **VBM Dental**

Rua Laguna, 356 Sl 01 - Oficinas  
Fone: (0\*\*48) 3626-6792/9986-8010

### **SÃO PAULO**

### AMERICANA

#### **Savatel**

Rua Paissandu, 414 - VI Galo  
Fone: (0\*\*19) 3461-7305/3462-5713

### AMPARO

#### **Agiletec**

Rua Arlindo Fava, 545 - Jardim Silvestre II  
Fone: (0\*\*19) 3807-7072

### ARACATUBA

#### **Tec Odonto**

Rua Cons Oscar R Alves, 1002 - VI Mendonça  
Fone: (0\*\*18) 3623-4587/9781-5827

### ARARAQUARA

#### **Astech**

Av. Djalma Dutra, 1427 - Centro  
Fone: (0\*\*16) 3324-5600/3332-6010

### BAURU

#### **Odonto Isa**

Rua Rui Barbosa, 15-05, Jd. Bela Vista  
Fone: (0\*\*14) 3232-2834/9701-7839

### BOITUVA

#### **Odonto Fix**

Rua Angelo Ribeiro, 352 - Centro  
Fone: (0\*\*15) 3263-1214/9705-000

### BOTUCATU

#### **Elétrica Massera**

Rua José Torres Filho, 240 - Jd Peabiru  
Fone: (0\*\*14) 3882-7443/9708-1451

### CAMPINAS

#### **Alka Assist Tec Odonto**

Av. Dr Alberto Sarmento, 667 - Bonfim  
Fone: (0\*\*19) 3242-6458/9116-2945

### **Gerentec**

Rua Quintino Bocaiuva, 609 - Bonfim  
Fone: (0\*\*19) 3241-8145/9749-2603

### GUARULHOS

#### **Dentotec**

Rua Ana Soares Barcellos, 33 - Ponte Grande  
Fone: (0\*\*11) 6421-0312/6421-6565

### JACARÉ

Esta lista está sujeita a alterações, visite o nosso site [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com) ou entre em contato pelo fone 0800 44 0800 para verificar possíveis atualizações.

**Cirúrgica Vila Garcia**

R. São Marcos Nº 126 - Jardim São José  
CEP 12300-000  
Fone: (0\*\*12) 3962-1758/8124-4841

**JUNDIAÍ**

**Oswaldo Wagner Teixeira ME**

R. Senador Fonseca Nº 231 - Centro  
CEP: 13207-040  
Fone: (0\*\*11) 4523-0837/9966-5536

**LIMEIRA**

**Vitalmed**

Rua Carlos Gomes, 23 - Centro  
Fone: (0\*\*19) 3442-6398/3453-9376

**LINS**

**Ótica Dental Moderna**

Rua Sete de Setembro, 200 - Centro  
Fone: (0\*\*14) 3523-6195/9725-4919

**MARÍLIA**

**Difafer**

Av. Tomé de Souza, 151 - Jardim Continental  
Fone: (0\*\*14) 3417-4414

**PIRACAIA**

**Wilson Autoclaves**

Av. Doutor. Cândido Rodrigues, 227 - Centro  
Fone: (0\*\*11) 4036-6300/4036-3468

**PIRACICABA**

**Eletrônica São Francisco**

Rua Benjamin Constant, 1871 - Centro  
Fone: (0\*\*19) 3434-5377

**Tecnodont**

Rua Regente Feijo, 2510 - VI Monteiro  
Fone: (0\*\*19) 3433-4500/9708-9644

**PRESIDENTE PRUDENTE**

**Med Lab II**

Rua Siqueira Campos, 1236 - Vila Nova  
Fone: (0\*18)222-7315/9742-7661

**SANTA FÉ DO SUL**

**Asteco**

Rua Dez, 2291  
Fone: (0\*17) 3631-2885

**SANTOS**

**Ignácio Com. Assist. Eaqpto**

Rua Comendador Marfins, 20 - VL Matias  
Fone: (0\*13) 3222-3394/3222-9200

**RC Assistência Técnica Ltda.**

Av. Pref. José Monteiro, 541 - Sala 08  
Jardim Independência  
Fone: (0\*13) 3561-5348 / (13) 8141-4070

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

**Di Mori**

Rua Santa Maria, 496 - VI Aurora  
Fone: (0\*17) 3234-2427/3235-4818

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**Eduardo Marinho**

Est do Cajuru, 3151 Casa 91 - Campos de S  
José  
Fone: (0\*12) 3923-5238/9711-3736

**Renova**

Av. Ouro Fino, 240  
Fone: (0\*12) 3916-6489

**SÃO PAULO**

**Ano Luz Eletrônica Ltda.**

Rua São Patrício, 162 - Santana/Tucuruvi  
Fone: (0\*11) 6201-9017/3462-7076/9887-7264

**Dental Madrid Ltda ME**

Rua Voluntários da Pátria, 512 - Santana  
Fone: (0\*11) 6221-4397

**Dental Stilo**

Rua Melo Peixoto, 1483 - Tatuapé  
Fone: (0\*11) 295-0202/6867-3874

**Equipo Leste**

Rua Guaraciaba, 461 - Tatuapé  
Fone: (0\*11) 6941-2948

**Konsertec**

Rua Salvador Rodrigues Negrão, 96 - Jardim  
Prudência  
Fone: (0\*11) 5563-9246/9576-8216 Renato

**Rempres Com. e Técnica Ltda Me**

Rua Domingos de Morais, 1372 - Vila Mariana  
Fone: (0\*11) 5549-4828

**Sollai**

Av. Indianópolis, 2631 - Indianópolis  
Fone: (0\*11) 5581-0055/6193-8811

**Tecnodonto Jn Assist. Tec. e Odont. Ltda**

Av. Bosque da Saúde, 1745 - Saúd  
Fone: (0\*11) 5587-3637/8281-3662

**W. E. A. Assist. Tec. Odonto Ltda. Me**

Rua Amaro Cavalheiro, 118 - Pinheiros  
Fone: (0\*11) 3813-1630

**SOROCABA**

**Dental Pássaro**

Rua Santa Clara, 65 - Centro  
Fone: (0\*15) 2101-6789/3233-8686

**Odontec Sorocaba**

Rua Ana Augusto, 268 - VI Augusta  
Fone (15) 3221-2824/ 9742-7831

**SUMARÉ**

**Fernoodonto**

Av. Duque de Caxias, 576 - Jd João Paulo II  
Fone: (0\*19) 3873-4132

Esta lista está sujeita a alterações, visite o nosso site [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com) ou entre em contato pelo fone 0800 44 0800 para verificar possíveis atualizações.

