

## Lupa de Mesa com Lâmpada e Lente de 3x para Avaliação e Análise da Pele

Para sua segurança leia este Manual de Instruções atentamente antes da operação deste equipamento.

Mantenha-o sempre ao seu alcance para consulta.



Design prático e moderno. Visão sem distorção: 3X de aumento mono focal, ou 10X bifocal.

Permite ao usuário manusear ferramentas ou instrumentos livremente.

Protege os olhos do usuário. Lâmpada fluorescente circular branca.

### **ESPECIFICAÇÕES:**

Potência lâmpada (W): 12

Material lente: cristal Aumento mono focal /bifocal: 3X /10X

Tensão de alimentação: 110V / 220V

Plug de alimentação: NEMA 5-15

Cor: branca

Tipo fixação: mesa

### **INSTRUÇÕES DE USO:**

Verificar se a tensão de rede esta compatível com a tensão de operação da lupa (Ver etiqueta no corpo da lupa).

Acione a chave L/D para ligar a lâmpada.

No caso de qualquer anormalidade, entre em contato com o nosso departamento técnico.

### **COMO SUBSTITUIR A LÂMPADA:**

Desligue a lupa retirando o plug da tomada.

Acomode a luminária em um lugar plano e com refletor voltado para cima.

Retire 3 parafusos da tampa acrílica.

Retire a lâmpada com cuidado, pois a lente de cristal é frágil.

Troque a lâmpada e reinstale a tampa acrílica.