




Série 1000 Manual de Instruções da Unidade de Sucção

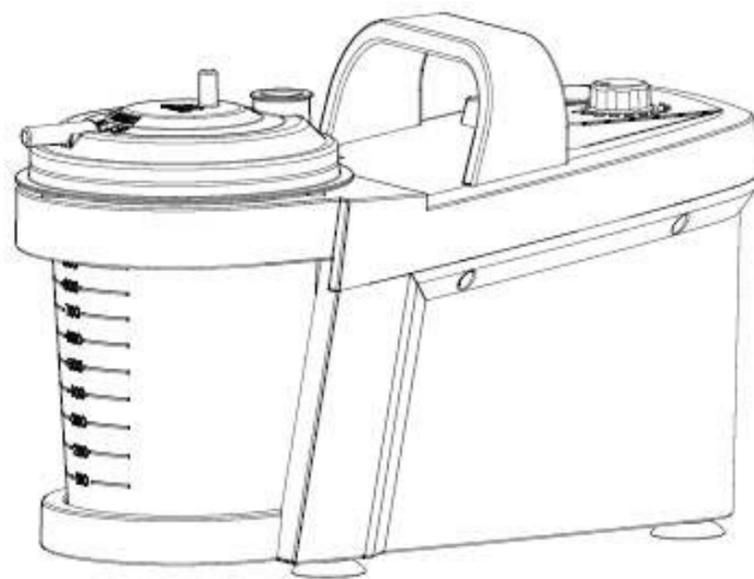

pulmocare

DISPOSITIVO DE SUCÇÃO MÉDICA

Modelos No. SU-02
SU-DC02

Esta unidade é compatível com a EU EMC norma EN60601-1-2



CUIDADO - Utilize este Aspirador conforme descrito neste manual. O uso indevido ou inadequado pode resultar em danos pessoais ou danos materiais.



Equipamento de sucção médica

Modelos SU-02 / SU-DC02

INSTRUÇÕES

Informação do conteúdo

1. Introdução	Pág. 1
2. Estrutura do produto	Pág. 2
3. Salvaguardas importantes	Pág. 3
4. Especificações do dispositivo	Pág. 4
5. Instrução de operação	Pág. 5
6. Limpeza e esterilização	Pág. 6
7. Peças de reposição e acessórios	Pág. 7


I. Introdução do uso pretendido

- A. Este dispositivo médico de sucção destina-se à remoção de fluidos das vias aéreas ou do sistema respiratório. Este aparelho pode também ser empregue no remoção de materiais infecciosos de feridas nos doentes.
- B. Utilizando um motor para gerar pressão negativa (vácuo), este dispositivo vai aspirar as secreções mucosas do corpo do paciente, na gestão e tratamento de doenças respiratórias. As secreções aspiradas são colocadas no frasco coletor para inutilização.

II. Estrutura do produto


A. Aspecto visual

Modelos SU-02 / SU-DC02

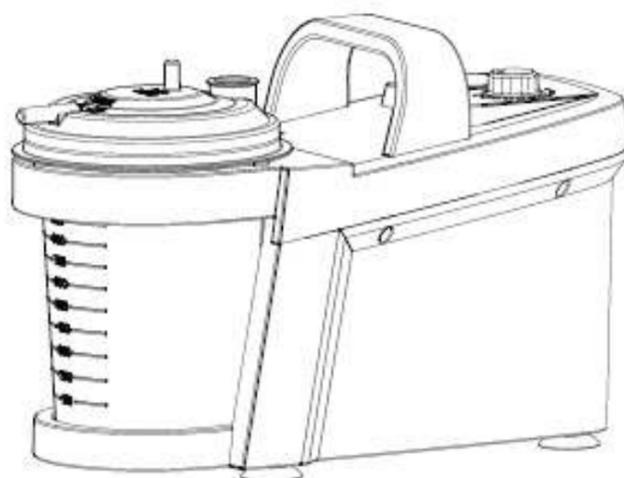


B. Montagem

SU-02

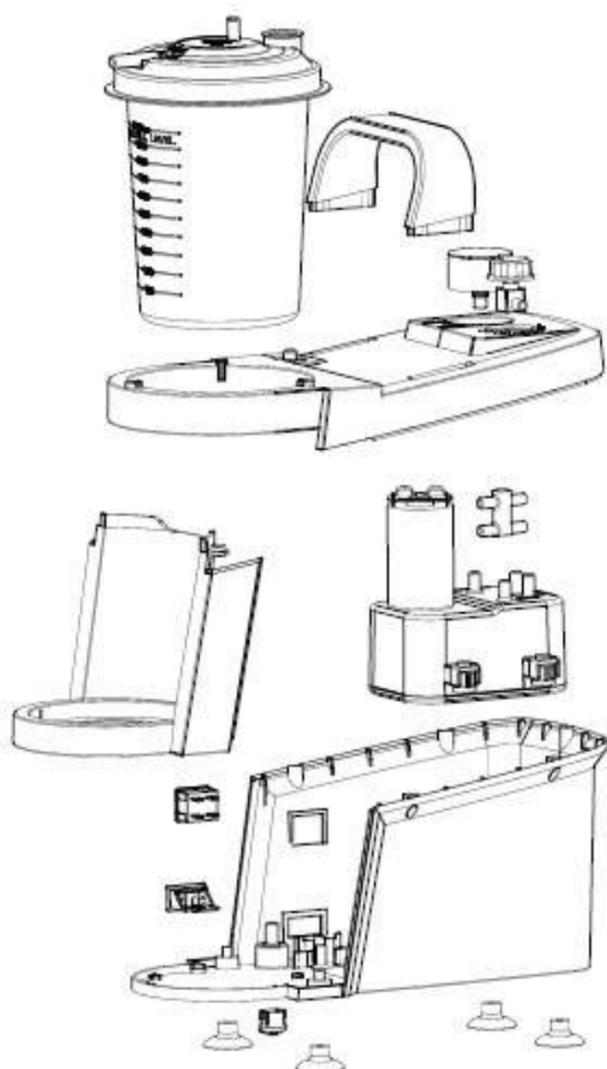

SU-DC02

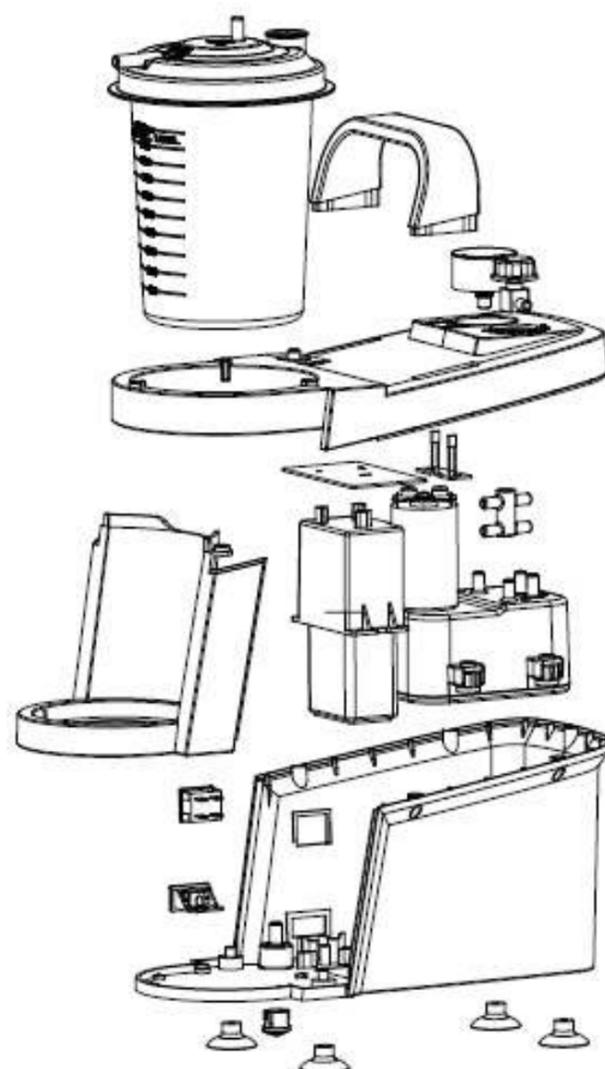

III. Salvaguardas Importantes

Nota: Leia atentamente todas as instruções antes de usar.

As seguintes precauções básicas são recomendados quando se utiliza este produto:

Cuidado: Deixar de ler e observar todas as precauções pode resultar em danos pessoais ou danos ao equipamento.

Aviso: A modificação deste equipamento anula a garantia.

Cuidados do produto:

1. Para evitar choque elétrico, mantenha o aparelho longe de água; Não mergulhe o cabo de alimentação ou a unidade em qualquer líquido; não use durante o banho; não pegar num aparelho que tenha caído na água - desligue imediatamente o aparelho.
2. Nunca utilize o aparelho se tiver as peças danificadas (incluindo cabo de alimentação), e / ou se ela tiver caído ou submerso em água.
3. Este aparelho não deve ser utilizado quando o gás inflamável, oxigênio ou aerossol estiverem a ser usados.
4. Desligue o aparelho da tomada antes de limpar, encher e depois de cada uso.

Cuidados operacionais:

1. Ligue este aparelho a uma tomada de tensão apropriado para o seu modelo.
2. Não execute este produto isoladamente.
3. Nunca utilize esta unidade se tem um cabo ou tomada danificada, e / ou se o aparelho tiver caído na água.
4. Se ocorrer qualquer anomalia, interrompa o uso imediatamente até que a unidade seja examinada e reparada.
5. Desligue sempre o aparelho imediatamente após o uso.

Cuidados de armazenamento:

1. Não guarde a unidade sob luz direta do sol, temperatura ou humidade extremas.
2. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
3. Mantenha sempre a unidade desligada quando não estiver em uso.

Cuidados de Limpeza: Limpar após cada utilização conforme as instruções deste guia.

1. Não mergulhe a unidade na água. Isso pode danificar o aparelho.
2. Desligue o aparelho da tomada antes de limpar.

IV. Especificações do dispositivo

No.	Item	SU-02	SU-DC02
1	Entrada de energia	DC 12V	DC 12V
2	Energia	48VA Max	48VA Max
3	Máx. pressão negativa	530mmHg	530mmHg
4	Gama de ajustamento da pressão negativa	150-530mmHg	150-530mmHg
5	Máx. velocidade sucção	25 Lpm	25 Lpm
6	Capacidade do coletor	800cc	
7	Tamanho	340x160x220mm	
8	Peso	2.0 kgs	2.4 kgs
9	Tempo de utilização	\cong 2 anos	
10	Ambiente operacional	10°C a 40°C, 30% a 75% HR	
11	Ambiente de armazenagem	-20°C a 60°C, 10% a 95% HR	
12	Ruído	\leq 60 dBA a 1 metro	


DOIS ANOS DE GARANTIA LIMITADA

Esta unidade está garantida pela ausência de defeitos de fabrico e materiais por um período de dois anos a partir da data da compra. As pilhas recarregáveis são garantidos por 90 dias. Qualquer peça defeituosa será substituída ou reparada por iniciativa do fabricante. Se os cuidados e manutenção desta unidade adequada não for seguido conforme detalhado no manual de instruções, a garantia está sujeita a ser rescindida. Se for necessário reparar de garantia entre em contato com o distribuidor do fabricante, conforme indicado no interior. Não há nenhuma outra garantia expressa. A Medicare reserva todos os direitos.

V. Instruções de funcionamento

A. Colocar o filtro de ar:

1. Abra a caixa de acessórios e tire os dois tubos de silicone e tampa do filtro.
Conecte uma extremidade do tubo de silicone para a frente da porta de entrada de ar e a outra extremidade à tampa do filtro.
2. Conecte a tampa do filtro para o frasco coletor com o tubo de silicone.
3. Inspeccione a tubulação de sucção e a garrafa de recolha de vazamentos antes de cada uso.

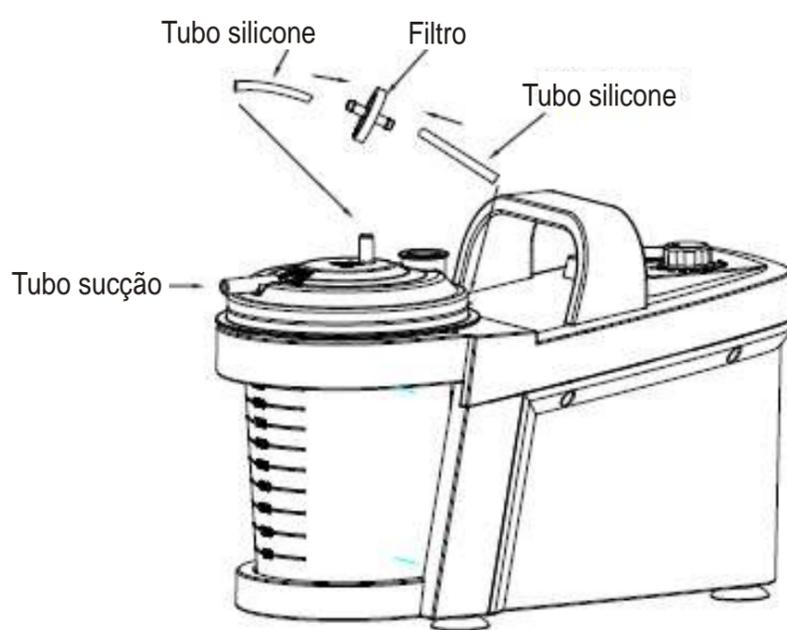

B. Ligue o dispositivo:

1. Conecte o cabo de alimentação.
2. Ligue o interruptor de alimentação
3. Ligue o tubo de sucção para o dispositivo, abra a válvula de sucção e certifique-se de que a sucção de ar está desobstruída.
4. Ajuste a pressão negativa através do botão de ajuste; escolher a apropriada pressão negativa para o tratamento recomendado (consulte o seu médico).

Nota: modelo DC, se o dispositivo estiver ligado com o adaptador, o dispositivo não utilizar a energia da bateria.

C. Desligue o dispositivo:

Após o tratamento, desligue o interruptor de alimentação, o dispositivo irá parar de funcionar. Para o modelo DC, quando o interruptor estiver desligado, o dispositivo começa a carregar a bateria. O tempo de carga da bateria é inferior a oito horas.

2. O ciclo de trabalho do dispositivo é de 30 minutos e 30 minutos desligado.

Limpeza e Esterilização



Desligue da fonte de alimentação antes da limpeza.

1. Recomenda-se que a garrafa de recolha e tubagem sejam cuidadosamente limpas com água quente após cada utilização e com um detergente suave. Se o seu médico ou terapeuta respiratório especifica um procedimento de limpeza diferente, siga as suas instruções.
2. O filtro não pode ser limpo.
3. NOTA:. Se o filtro se molhar, ou torna-se contaminado ou entupido, deve ser substituído.

Enxaguar (depois de cada tratamento)

1. Desligue os tubos, frasco coletor e a tampa do filtro. Lavar os tubos, frasco coletor com água.
2. Seque-os com uma toalha limpa e macia ou deixe secar.
3. Volte a montar o produto, quando completamente seco e coloque essas peças num ambiente limpo.

Desinfecção:

Por favor, respeitar os seguintes passos para desinfetar o seu dispositivo de sucção, a menos que de outra forma especificada pelo seu médico. Sugere-se que a unidade seja desinfetada após cada tratamento.

1. Use uma parte de vinagre branco com três partes de água destilada. Certifique-se que a solução é o suficiente para submergir os tubos e frasco coletor.
2. Completar Lavagem Passos 1-3.
3. Lave os tubos e coleta de garrafas em água com um detergente suave. Depois lave-los em água quente da torneira.
4. Submergir essas partes na solução de vinagre e água por trinta minutos.
5. Conclua Lavagem Passos 2-3.


Germicidas bacterianas comerciais destinados especificamente para a limpeza de dispositivos médicos dentro do ambiente institucional pode ser utilizado em conformidade com as instruções recomendadas pelo fabricante em limpar o equipamento.

VI. Peças de reposição e acessórios

Use sempre peças OEM

Nunca utilize um adaptador AC-DC diferente: Modelo UE48-120400SPA1

Use em conformidade com a aprovação CE do tubo de sucção no diâmetro de Ø6,0mm x Ø9.0mm da VEGA SU-02/SU-DC02 equipamento de sucção médica.

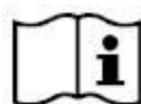


Consulte os documentos anexos



Equipamento tipo BF



Eliminação de recolha separada

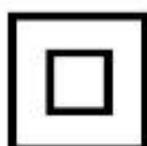

Dispositivo de protecção classe 2



Apartado 2 • 4536-909 LOUROSA • Tel: 22 745 4611 • Fax: 22 744 3077
infogeral@medcare.pt • www.medcare.pt