

CADEIRA DE BANHO

Manual de instruções

IMPORTANTE!

Por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar a sua cadeira de banho. Tenha em consideração todas as recomendações e advertências, especialmente referentes á segurança e aos procedimentos de utilização.

As cadeiras de banho **AQUATEC** Ocean e **AQUATEC** Ocean XL têm uma estrutura idêntica, excepto no que respeita á distância entre os apoios de braços, que, no caso da **AQUATEC** Ocean XL é maior.

1. INSTRUÇÕES GERAIS

1.1 INTRODUÇÃO

Este manual de utilização, contém informações e instruções de segurança para uma correcta utilização e para que possa usufruir com o máximo de conforto e comodidade a sua nova cadeira de banho.

Neste manual, fazemos referência a figuras e a itens específicos nelas contidos. Estas referências, estão evidenciadas em parênteses.

Exemplo: (3, figura 1) refere-se á figura 1, item 3.

Todos os documentos fornecidos deverão ser guardados num local seguro, para quando necessário poder consulta-los.

1.2 UTILIZAÇÃO

Esta cadeira é para ser utilizada apenas como uma ajuda para o banho ou duche, deslocações para o WC ou para transferências em espaços interiores.

Utilizar esta cadeira para qualquer outro fim é estritamente proibido.

Não utilize a sua cadeira em espaços exteriores ou como um acessório/ajuda para subir.

Esta cadeira de banho pode ser utilizada como um assento de toilette standard ou como um dispositivo sanitário (Opcional).

Pode utilizar a sua cadeira numa piscina, mas APENAS se a piscina não tiver água salgada e sempre na presença de um assistente que o poderá ajudar se for necessário.

1.3 GARANTIA

Esta cadeira de banho tem uma garantia de 2 anos fornecida pela **AQUATEC**.

O período de garantia inicia na data de entrega conforme demonstrado no certificado de garantia **AQUATEC**.

1.4 ARMAZENAMENTO/RE-UTILIZAÇÃO

Este produto foi concebido para repetidas utilizações. O número máximo de vezes que a poderá utilizar depende das condições gerais do seu estado e do manuseamento durante as utilizações.

Sempre que a armazenar, siga as recomendações e instruções de higiene fornecidas pela **AQUATEC**.

1.5 RECICLAGEM

Importante!

Este produto não contém nenhuma substância perigosa.

Sempre que necessitar de se desfazer de alguns componentes, faça-o sempre individualmente e nas instalações locais para o efeito, de acordo com a identificação do material nas etiquetas dos componentes.

Poderá também optar por entregar os componentes no fabricante, que encarregará de lhes dar o fim conveniente.

1.6 SÍMBOLO CE

Este produto está em concordância com a Directiva EU 93/42/EEC para equipamentos médicos.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 SIMBOLOS E AVISOS

Os seguintes avisos e símbolos são usados nas seguintes instruções de funcionamento:

*	ATENÇÃO!
	Este aviso indica um potencial problema/erro. O não seguimento das instruções pode resultar em ferimentos ou danos materiais.

Importante!

Este símbolo indica instruções adicionais, informações ou conselhos.

* No texto seguinte, o asterisco será substituído por uma figura que ilustrará o tipo de risco.

2.2 INSTRUÇÕES GERAIS

Bloqueia os travões em posição de estacionamento.

Utilização apenas em espaços interiores e só em superfícies planas.

Se detectar alguma avaria ou danos nos componentes, por favor, contacte imediatamente o seu revendedor autorizado.

Não tente, sob qualquer circunstância alterar ou modificar os componentes.

Observe as informações nas etiquetas. Não ultrapasse o peso máximo.

3. DESCRIÇÃO

3.1 NA ENTREGA

As cadeiras Ocean e Ocean XL **AQUATEC** são fornecidas com os seguintes componentes (Figura 1):

- 1 Manual de Instruções (No saco plástico)
- 2 A Encosto com cobertura e apoio de braços (Ocean)
- 2 B Encosto com cobertura e apoio de braços (Ocean XL)
- 3 Estrutura e base do assento
- 4 Secções laterais e castores (x2)
- 5 Apoio de pés com calcanheiras (x2)
- 6 Clips (x2) para apoio de pés (Encaixe)
- 7 Clips (x4) para estrutura do assento
- 8 Chave sextavada (4mm)
- 9 Parafusos (x4) e anilhas (x4)

3.2 ACESSÓRIOS

As rodas com travões são fornecidas com as seguintes peças (Figura 2):

- 1 Rodas
- 2 Travões
- 3 Parafusos

Por favor, tenha em atenção que as dimensões da cadeira são alteradas quando as rodas estão montadas. Esta informação pode ser encontrada na secção de Dados Técnicos.

3.3 DADOS TÉCNICOS

Dimensões

Largura (Ocean)	560 mm
Largura(Ocean XL)	640 mm
Largura com rodas	675 mm
Profundidade	934 mm
Profundidade com rodas	1060 mm
Altura	964–1094 mm
Largura de assento	490 mm
Profundidade de assento	450 mm
Altura de assento	477-600 mm
Largura mínima entre secções laterais	+/- 381 mm
Distancia mínima entre o chão e o suporte do dispositivo sanitário	+/- 408 mm
Peso	15 kg
Peso máximo utilizador (Ocean)	130 kg
Peso máximo utilizador (Ocean XL)	150 kg

A etiqueta (Figura 8 ou 9) fornece informações técnicas importantes.

A etiqueta está colocada no lado direito e na parte de dentro da secção lateral.

4. TRANSPORTE

Pode desmontar facilmente os componentes da sua cadeira para transportá-la. (Secção 3.1).

Para instruções detalhadas sobre como desmontar o equipamento, por favor, consulte a secção 5.

5. MONTAGEM

Importante!

- Antes de montar o equipamento, inspeccione todos os componentes para verificar se existem danos ocorridos durante o transporte.
- Esta secção descreve a montagem. A desmontagem é realizada em ordem inversa.
- Durante a montagem do equipamento, certifique-se que os componentes estão posicionados correctamente. (Figura 1).

5.1 MONTAR A CADEIRA

5.1.1 Montar as secções laterais

1. Retire os clips (7, Figura 1) da embalagem.
2. Coloque a estrutura do assento sobre um dos lados.

Importante!

- Empurre totalmente e equilibradamente toda a secção e tenha cuidado para não torcer os componentes.
 - Fixe a secção lateral á mesma altura à frente e atrás.
3. Empurre a secção lateral (1, Figura 3) com as guias dos apoios de pés (4, Figura 3) para a frente contra a estrutura do assento (3, Figura 3).
 4. Alinhe os clips (5, Figura 3) á frente e atrás da secção lateral com o orifício da estrutura do assento (2, Figura 3).
 5. Pressione os clips (6, Figura 3) de fora para dentro na secção lateral até que posicionem correctamente (7, Figura 3) e encaixe no tubo da estrutura do assento (3, Figura 3).

Importante!

- A secção lateral esquerda e direita devem ser ajustadas á mesma altura.
6. Rode o assento e encaixe a segunda secção da mesma forma.
 7. Coloque a estrutura do assento com as secções laterais encaixadas nos castores.

5.1.2 Montar o encosto

1. Bloqueie os 4 castores. Para o fazer, pressione para baixo o pedal vermelho dos castores com o pé.

Importante!

- Quando o encosto se encontra rebatido para cima, os apoios de braços devem estar virados para a frente.
2. Coloque o encosto (4, Figura 4) na estrutura do assento (5, Figura 4) até que atinja o tubo da estrutura do assento (6, Figura 4).

Importante!

- A secção redonda das anilhas devem tocar no tudo da estrutura do assento.
 - Aperte os parafusos usando a chave sextavada fornecida com a cadeira.
3. Coloque a anilha (2, Figura 4) em cada parafuso (1, Figura 4) e aperte o encosto com 2 parafusos de cada lado.

5.1.3 Montar os apoios de pés

Importante!

- Este procedimento é o mesmo para ambos os apoios de pés, esquerdo e direito.
1. Encaixe o apoio de pés (2, Figura 5) e o patim (4, Figura 5) na parte da frente das guias da secção lateral (8, Figura 5) até que o tubo do patim (1, Figura 5) alcance o pino do clip (6, Figura 5). Os apoios de pés não poderão mais ser rodados para os lados.

5.2 INSTALAR E REMOVER AS RODAS

Importante!

- Quando instalar as rodas, os castores traseiros deverão estar bloqueados.
 - O procedimento é igual para ambas as rodas esquerda e direita.
 - Os travões devem estar montados.
1. Alinhe os quatro castores para a frente.
 2. Bloqueie os castores.
 3. Empurre o eixo (4, Figura 6) para dentro da roda.
 4. Pressione o botão (5, Figura 6) no exterior do eixo.
 5. Levante ligeiramente a cadeira.
 6. Empurre o eixo (2, Figura 6) e encaixe a roda o máximo que o permita.
 7. Solte o botão.
 8. Verifique, puxando a roda, se esta está bem encaixada.

As rodas poderão ser removidas realizando o inverso deste procedimento.

6. FUNCIONAMENTO

6.1 AJUSTAR A ALTURA DO ENCOSTO

Importante!

- A altura do assento deve ser ajustada de forma a oferecer maior conforto ao seu utilizador. Regra geral, a altura do assento está correctamente ajustada quando o seu utilizador está confortavelmente sentado e os seus pés chegam ao chão.
 - A altura do assento deve ser a mesma para ambos os lados.
 - Não pode ajustar ou regular a altura do assento quando está alguém sentado na cadeira.
1. Suporte a estrutura do assento com uma mão e levante ligeiramente para um lado.
 2. Retire ambos os clips (6, Figura 3) desse mesmo lado.
 3. Para ajustar a altura, empurre ou puxe o assento da sua estrutura.
 4. Coloque novamente os clips.
 5. Faça o mesmo procedimento para o outro lado.

6.2 AJUSTAR A ALTURA DO APOIO DE PÉS

1. Eleve ligeiramente os apoios de pés (2, Figura 5).
2. Retire o clip (6, Figura 5) e coloque-o novamente na posição desejada.
3. Empurre o para baixo o apoio de pés até que o tubo do patim (1, Figura 5) alcance o pino do clipe (6, Figura 5).
4. Realize o mesmo procedimento para o outro lado, não se esqueça de os colocar á mesma altura.

6.3 AJUSTAR A COBERTURA DO ENCOSTO

O encosto regulável em tensão pode ser ajustado individualmente.

Apertar

Aperte as fitas (1, Figura 7) da cobertura do encosto.

Libertar

Abra os fechos das fitas (2, Figura 7) pressionando o fecho. Puxe a fita para trás através do fecho. Aperte novamente os fechos.

6.4 UTILIZAÇÃO

Quando utilizar a sua cadeira, tenha em consideração as seguintes recomendações de segurança:

ATENÇÃO!

- A base da superfície do assento pode escorregar se estiver solta
Verifique se a base do assento está firmemente segura á estrutura do assento antes utilizar a sua cadeira.
- A cadeira poderá deslizar caso não esteja travada
Bloqueie os 4 castores, utilizando o pedal vermelho antes de tentar entrar ou sair da cadeira.
- Deslizar
Bloqueie os castores em posição de estacionamento.
- Cadeira pode virar
Empurre os apoios de pés para o lado ou recline os patins antes de entrar ou sair da sua cadeira.
Não suporte o seu peso nos apoios de pés, a cadeira poderá virar.
- Risco de danos
Para levantar a sua cadeira com o seu utilizador sentado, poderá faze-lo apenas segurando-a pelos lados.

6.5 MECANISMO DE ENCARTAR

ATENÇÃO!

- Quando rebater os apoios de braços, não o faça alcançar a estrutura e certifique-se que os componentes não ficam danificados.
- Quando rebater os apoios de braços, não tente alcançar o espaço entre os apoios de braços e o encosto.

6.6 REBATER OS APOIOS DE PÉS

Posicionar para entrar e sair da cadeira

1. Puxe o apoio ligeiramente para cima, até que o tubo (1, Figura 5) se liberte do pino de bloqueio (6, Figura 5).
2. Rebata o apoio de pés para o lado.

Posição de condução

ATENÇÃO!

- Se os apoios de pés não estiverem correctamente instalados, existe o perigo de estes se soltarem colocando em risco o seu utilizador.
 - Fixe os apoios de pés em posição de condução.
1. Rode os apoios de pés para dentro.
 2. Empurre os apoios de pés para baixo até que o pino de bloqueio (1, Figura 5) fique em posição (6, Figura 5).

6.7 REMOVER E INSTALAR A BASE DO ASSENTO

Remover

Levante a base do assento de ambos os lados.

Instalar

ATENÇÃO!

- Risco de ferimentos.
 - Não tente alcançar o espaço entre a superfície do assento e a estrutura do assento quando estiver a pressionar a base do assento.
1. Coloque a base do assento na estrutura conforme demonstrado na figura 1.
 2. Empurre a base do assento o mais para trás possível.
 3. Utilizando a palma da sua mão, empurre os lados da base do assento para baixo. Até que este encaixe em posição.

6.8 REMOVER E INSTALAR O CINTO DE PÉS

1. Desaperte as fitas em velcro do cinto de pés.

IMPORTANTE!

Tenha atenção, quando os parafusos estão desapertados, porque a fêmea poderá cair.

2. Desaperte o parafuso (3, Figura 5).
3. Retire o parafuso com o espaçador e a fêmea por baixo do patim.
4. Puxe a fita em velcro para fora do espaçador.

O cinto de pés pode ser instalado realizando o inverso deste procedimento.

IMPORTANTE!

As fitas em velcro do cinto de pés quando instaladas, devem estar inseridas para dentro.

6.9 DETECTAR ERROS E DANOS

PROBLEMA	CAUSAS POSSIVEIS	SOLUÇÃO
Dificuldade em ajustar a altura do assento.	Poderá existir sujidade entre a base do assento e a secção lateral.	Desmonte os componentes da cadeira e limpe-os cuidadosamente.
Dificuldade em virar os castores.	Poderá existir sujidade entre a forqueta e as rodas.	Limpe cuidadosamente os castores.
Dificuldade em rodar os apoios de pés.	Poderá existir sujidade nas guias.	Retire os apoios de pés e limpe-os cuidadosamente.
Os travões de bloqueio não accionam.	Poderão estar ajustados incorrectamente.	Regule novamente os castores e os travões.

7. MANUTENÇÃO E CUIDADOS

IMPORTANTE!

A higiene é particularmente importante. Limpe regularmente e cuidadosamente a sua cadeira e mantenha-a limpa e seca.

7.1 LIMPEZA EM CASA

IMPORTANTE!

- Não utilize agentes de limpeza abrasivos.
- Não separe os suportes dos seus componentes
 1. Retire os acessórios amovíveis.
 2. Retire os apoios de pés das suas guias.
 3. Retire a base do assento e a cobertura do encosto.
 4. Retire as secções laterais conforme exemplificado no capítulo 5.
 5. Coloque os clips na estrutura do assento para prevenir que se percam.
 6. Quando lavar componentes individuais com detergentes e desinfectantes comerciais utilize uma escova ou um pano.
 7. Coloque os componentes sobre água morna.
 8. Seque os componentes com um pano seco.
 9. Monte a cadeira.

7.2 LIMPEZA EM CLINICAS

ATENÇÃO! QUEIMADURAS

- Aguarde até que a cadeira arrefeça antes de a tocar.

Assim como os procedimentos de limpeza descritos no capítulo 7.1, deverá com intervalos regulares efectuar serviços de limpeza na sua cadeira. Deverá ser limpa a 85 ° durante 3 minutos.

7.3 MANUTENÇÃO

Esta cadeira de banho, é livre de manutenção desde que se efectuem as instruções de cuidado e limpeza em cima descritas.

7.4 MUDAR OS CASTORES

ATENÇÃO!

Apenas os revendedores autorizados poderão levar a cargo operações de substituição dos castores.