
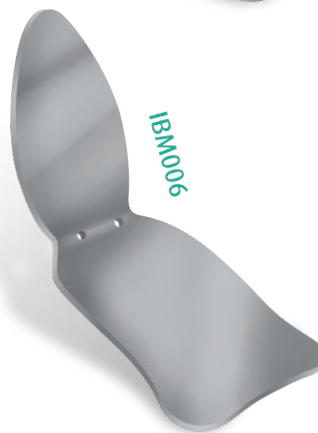
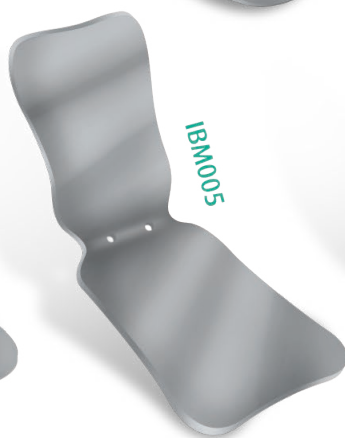


Espelho Metálico

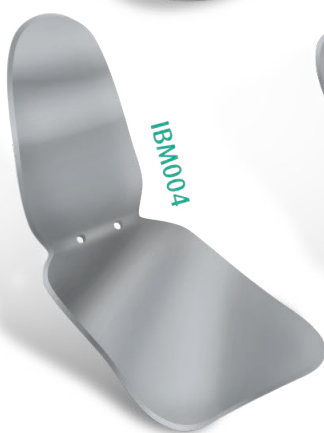

- Reflexão de imagem perfeita
- Cantos arredondados
- Ajuste perfeito na boca
- Máximo conforto para o paciente

ESPELHO METÁLICO: Permite reflexão de imagem perfeita, possui contornos arredondados que permitem ajuste na boca do paciente sem causar lesões. Durante o procedimento, o lado que não estiver sendo utilizado servirá como cabo evitando que as mãos entrem no campo de visão da câmera.

INDICAÇÃO: Instrumento manual usado para fotografia oral.

Espelho IBM 001 Oclusal adulto e infantil

Espelho IBM 002 Lingual

Espelho IBM 003 Lateral

Espelho IBM 004 Oclusal adulto e lateral

Espelho IBM 005 Oclusal adulto e infantil

Espelho IBM 006 Oclusal Infantil e lateral

INSTRUÇÕES DE USO: Levar o espelho metálico à boca do paciente. Manter o produto na posição ideal. Realizar o procedimento fotográfico. Após o uso, guardar o ESPELHO METÁLICO dentro do envelope de tecido que acompanha o produto.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Latão cromado.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. Evite utilizar buchas de lã de aço ou abrasivos para limpeza do espelho, pois pode resultar em riscos e/ou manchas na peça. Para evitar que os espelhos metálicos embacem, direcione o jato de ar nas peças, antes de usar ou no momento da execução da foto.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código

Descrição

Apresentação

Registro na ANVISA

106210101008

Espelho Metálico Kit IBM001, IBM002 e IBM003

1 Kit

180213420017

106210101009

Espelho Metálico IBM001

1 unidade

106210101010

Espelho Metálico IBM002

1 unidade

106210101011

Espelho Metálico IBM003

1 unidade

106210101012

Espelho Metálico IBM004

1 unidade

106210101013

Espelho Metálico IBM005

1 unidade

106210101015

Espelho Metálico IBM006

1 unidade

 **Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.**

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

 Indústria Brasileira