

DESCRIÇÃO DOS TESTES PARA NARCÓTICOS



MILITARIA


NarcoPouch #901

Análise Geral

Reagente Mayer's Teste preliminar para substâncias controladas. Desenvolvido para funcionar como o ponto de partida para os teste seqüenciais. Se a substância for totalmente desconhecida (tablete, cápsulas, pós ou cepo) o reagente Mayer's irá indicar o próximo teste no campo das drogas a ser realizado.


Narcotest #7601

NarcoPouch #902

Análise Geral

Reagente Marquis Teste presuntivo para MDMA (Ecstasy) e compostos do tipo da Anfetamina (Anfetaminas e Metanfetaminas), e para Alcalóides derivados do Ópio (Heroína e Morfina). Para diferenciar entre Anfetaminas e Metanfetaminas use o reagente para Metanfetaminas N°23. Para confirmar todas as variações de Heroína (Branca, Marrom ou Preto Alcatrão) use o reagente Mecke's N° 24


Narcotest #7602

NarcoPouch #903

Teste de Confirmação

Reagente de Ácido Nítrico Teste presuntivo desenvolvido para diferenciar entre a Heroína e a Morfina. Este teste não é um Teste Preliminar e a ODV desencoraja o seu uso. A ODV recomenda o uso do reagente Mecke's N°24 para teste Heroína.


Narcotest #7603

NarcoPouch #904

Cocaína / Crack

Sais de Cocaína & Reagente Base Teste presuntivo desenvolvido para identificar Cocaína HC1, Freebase ou Crack. Na configuração sachet o teste seqüencial deve revelar 03 reações positivas: (1) Presença Azul, (2) Solução Rosa, (3) Rosa sobre camada Azul. A configuração tubo revelará uma solução Azul com resíduo aderente nas laterais do tubo. O tradicional N° 7604 encontra-se disponível. Entretanto a ODV recomenda o N° 7613.


Narcotest #7613


NarcoPouch #905

Barbitúricos

Reagente Dille-Koppanyi Teste presuntivo desenvolvido para identificação de Barbitúricos, em tabletes ou em cápsulas. Para testar os tabletes, reduza a substância à forma de pó. Para cápsulas, abra a cápsula e remova a quantidade do pó. Coloque uma pequena quantidade da amostra no teste. Uma coloração Lavanda se revelará na presença de Barbitúricos.


Narcotest #7605

NarcoPouch #906

Metadona

Reagente Mandelin Teste presuntivo desenvolvido para identificar Metadona. Colocar uma pequena quantidade da substância no teste, recolocar a tampa. Quebrar a ampola e agitar o teste. Uma coloração Azul Escuro se revelará na presença de Metadona. No passado os Departamentos usavam este teste para confirmar a presença de compostos da família da Anfetamina. Hoje em dia usa-se o reagente para Metanfetamina N°23.


Narcotest #7606

NarcoPouch #907

LSD

Reagente Modificado Ehrlich's Teste presuntivo destinado para identificar a dietilamina ácido lisérgico-d ou LSD. Devido à natureza perigosa do LSD evitar contato direto com a substância evitando com isto que a mesma seja absorvida pelo seu sistema. Ao quebrar a 2ª ampola uma coloração púrpura se revelará e ao quebrar e agitar a 3ª ampola (somente na versão sachet) a coloração escurecerá recomenda-se o uso de luvas de nitrilo para manusear o LSD.


Narcotest #7607

NarcoPouch #908

Maconha

Reagente Duquenois-Levine (Sachet) e Reagente Duquenois (Tubo) Teste presuntivo desenvolvido para identificar a presença do THC na Maconha, Haxixe ou Óleo de Haxixe. Quebrar a 1ª ampola e agitar por 60 segundos. Ao quebrar a 2ª ampola uma coloração Azul/Violeta se revelará nas duas configurações. O Reagente Duquenois-Levine (Sachet) traz uma 3ª ampola que após ser quebrada e agitada formará uma camada. A camada inferior DEVE ser Púrpura para presumir um resultado positivo.


Narcotest #7608


NarcoPouch #909

Maconha

Reagente KN (Sal Azul Fixo B) Teste presuntivo desenvolvido para identificar a presença de THC na Maconha, Haxixe ou Óleo de Haxixe. Também é indicado para reagir com o material da folha verde e fresca da Maconha. Ao quebrar a 2ª ampola formará uma camada, a camada inferior deve ter coloração Vermelho Tomate, para presumir um resultado positivo.


Narcotest #7609

NarcoPouch #914

PCP / Metaqualona

PCP / Reagente Metaqualona Teste presuntivo desenvolvido para identificar a presença de Fenciclidina (PCP) e Metaqualona. Ao quebrar e agitar a 1ª ampola uma coloração Rosa se revelará. Ao quebrar e agitar a 2ª ampola um Azul intenso se revelará na presença do PCP e da Metaqualona. Recomenda-se o uso de luvas de nitrilo para manusear todas as variações do PCP (Poeira de Anjo, Pó, Erva Assassina).


Narcotest #7614

NarcoPouch #922

Opiatos / Oxycodona

Reagente para Derivados de Opiatos Teste presuntivo desenvolvido para identificar a presença de todas as variedades de Heroína (Branca, Marrom e Preto Alcatrão). Para diferenciar entre a Heroína e a Codeína, quebrar e agitar a 2ª ampola. Na presença de Heroína apresentará coloração Púrpura; na presença de Codeína coloração Verde. A coloração Amarela indica a presença de Oxycodone.


Narcotest #7622

NarcoPouch #923

Metanfetamina / MDMA

Reagente de Nitroprussido de Sódio Teste presuntivo desenvolvido para identificar a presença de Metanfetamina e MDMA (Êxtase). Quebrar todas as ampolas. Agitar. A coloração Azul Escuro presume a confirmação de um amino secundário (Metanfetamina ou Êxtase). Pode-se diferenciar estas substâncias usando o reagente Marquis Nº 2, combinado com o Reagente de Nitroprussido de Sódio Nº 23.


Narcotest #7623


NarcoPouch #924

Heroína

Reagente Mecke's Modificado Teste presuntivo desenvolvido para identificar a presença de todas as formas de Heroína (Branca, Marrom e Preto Alcatrão). Quebrar e agitar a 1ª ampola por 30 segundos. Ao quebrar a 2ª ampola e à medida que se agitar o teste, uma coloração Verde se revelará gradualmente.


Narcotest #7624

NarcoPouch #925

Valium® / Rofinol® / Ketamina

Reagente Valium/Diazepan Teste presuntivo desenvolvido para identificar a presença de Valium, Diazepan, Rofinol (Roofies) e Ketamina. Quebrar e agitar as duas ampolas. Na presença de Valium, Diazepan ou Rofinol, revelara uma coloração Lavanda Clara. Após a quebra da 2ª ampola revelara uma coloração Lavanda Escura na presença de Ketamina.


Narcotest #7625

NarcoPouch #926

Talwin®

Reagente Talwin/Pentazocina Teste presuntivo desenvolvido para identificar a presença de Pentazocina, nome químico para o Talwin. Quebrar a 2ª ampola. Revelará instantaneamente uma coloração Azul Intenso na presença de Pentazocina.


Narcotest #7626

NarcoPouch #927

Efedrina

Reagente Efedrina Teste presuntivo desenvolvido para identificar a presença de Efedrina e Pseudoefedrina. Quebrar e agitar as duas ampolas. Revelará uma coloração Azul/Violeta na presença de efedrina ou Pseudoefedrina.


Narcotest #7627

Produtos Adicionais da ODV, Inc.




NarcoPouch®

- ✎ Manual de Instruções Nº 900 Ácido Neutralizador NarcoPouch Nº 910
- ✎ Material para Amostra Plástico Descartáveis Embalagem com 50, Nº 990 ou embalagem com 1000, Nº 991
- ✎ Bloco de Resultados para registrar os resultados dos testes realizados no campo - bloco com 25 folhas Nº 950
- ✎ A/V Fita de treinamento Nº 999 VHS-NTSC 20 minutos cobrindo o essencial (também disponível em PAL).
- ✎ Nova Apresentação do PowerPoint Nº 995 Treinamento em NarcoPouch / Narcotest.

NOVO Produto da ODV! **Bíblia para Identificação de Drogas Nº 989**

900 páginas. Seção completa a cores mostrando tabletes/cápsulas e drogas ilícitas, glossário de gírias. PDR Completo, Inventário, Diretório de Impressão, Processos de Fabricação para substâncias controladas.

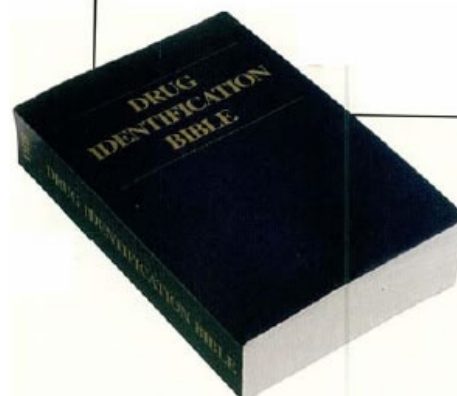

Narcotest®

- ✎ Manual de Instruções Nº 7600
- ✎ Sacos Descartáveis (sacos Poly) Narcotest Nº 7610
- ✎ Material para Amostra ver acima Nº 990 ou Nº 991
- ✎ Bloco de Resultados para registrar os resultados dos testes realizados no campo ver acima Nº 950
- ✎ A/V Fita de Treinamento Nº 7700 VHS-NTSC 20 minutos cobrindo o essencial (também disponível



Para maiores informações sobre sacos de evidência, fitas e outros produtos de Investigação criminal. Ligue hoje e peça a sua cópia do catálogo da ODV com nossa completa linha de produtos para Investigação Criminal.

KITS Narcotest®



Kit Padrão Narcotest Nº 7615

O Kit traz um total de oito (8) caixas refil; inclui uma caixa de cada: 1601 (Mayer's), 7602 (Marquis), 7605 (Barbitúricos), 7624 (Heroína), uma caixa com sacos de polietileno e manual de instruções.

Kit Especial Nº 7618

Nos moldes do item Nº7615, traz um total de oito (8) caixas refil de livre escolha, uma caixa de sacos de polietileno e manual.



Kit Patrulha® Nº 7620

Cada Kit Nº 7620 contém a escolha de seu Departamento (embalagem especial) com vinte e quatro (24) testes individuais acondicionados em estojo de alumínio com prancheta e manual de instruções.

Você escolhe o teste desejado!



Kit Profissional Nº 7618B

Contém treze (13) caixas refil, uma caixa de sacos de polietileno e manual de instruções. O kit embalado de fábrica contém uma caixa de cada: Mayer's, Barbitúricos, LSD, PCP e Mecke's; duas caixas de cada: Marquis, Cocaína, Maconha e Metanfetamina, MDMA. O Kit Profissional também pode ser embalado de acordo com a escolha de seu Departamento.

O Kit Narcotest Profissional Especial Nº7618BS Conterá a sua escolha de treze (13) caixas refil, mais uma caixa de sacos poly,manualeinstruções.



Caixa Patrulha de Narcotest Nº 7688

Estojo embalado de fábrica contendo dois tubos de cada: Marquis, Maconha, Metanfetamina / MDMA, três de cada Cocaína / Crack e um manual de instruções.

Também disponível em Embalagem Especial contendo o seu pedido de nove (09) testes individuais em estojo rígido de plástico com instruções.

Caixa Patrulha Especial de Narcotest Nº 7688S

Caixa para Seringas e Agulhas Hipodérmicas



Caixa de Segurança para Agulhas/Seringa			Dúzia	Atacado
BOM	P-900	Retângulo Plástico com Tampão 5 1/4" x 7/8" x 1/2"	\$ 4.75	\$ 50.00
MELHOR	P-1000	Plástico Moldado Maciço	14.91	151.20
OTIMO.....	P-1000A	Plástico Moldado Maciço com Base em Latão	18.00	178.50



Eva-Safe™ Peça Única – Caixa de Segurança para Seringa Hipodérmica

Características Especiais:

- ✓ Tampa Hexagonal Impede que a Proteção Gire
- ✓ Construído em Plástico Resistente (Cuidado com as Imitações)
- ✓ Material de Lacre Exclusivo Patenteado Impede que a Agulha Vaze

P-2000 Caixa de Segurança para Seringa Hipodérmica Eva-Safe.....	1-49	\$ 1.50 cada
	50-99	1.25 cada
	100+	1.10 cada

Sacos de Evidência



100 Sacos de Evidência por caixa. Nº do catálogo EB-S (Pequeno, 5 de larg. x 8 de comp.).....	\$17.00
100 Sacos de Evidência por caixa. Nº do catálogo EB-M (Médio, 9 de larg. x 12 de comp.).....	\$27.00
100 Sacos de Evidência por caixa. Nº do catálogo EB-L (Grande, 12 de larg. x 15 de comp.).....	\$37.00

LUVAS DE LÁTEX

A Melhor Qualidade Disponível

370.....	Com Talco—caixa com 50 pares.....	\$7.44
370NP.....	Sem Talco—caixa com 50 pares.....	12.56
370NIT.....	Luvas de Nitrilo-6-mil (Resistente a químicos) 50 pares.....	27.55
370NITH.....	Luvas de Nitrilo— 5 mil (Resistente a químicos) 2 pares.....	19.95



NarcoPouch® e Narcotest®

Teste para o Campo de Narcóticos

Os testes de campo **NarcoPouch** apresentam todas as reações de cores diretamente nas ampolas de teste. Para simplificar o uso do sachet, um sistema de numeração 1-2 ou 1-2-3 aparece nos testes de ampolas múltiplas. Para melhorar a visibilidade em situações de pouca luz um painel branco foi acrescentado no verso do sachet. Para maior segurança, a armação interna envolve a ampola de vidro em 360°.

Todos os números dos produtos NarcoPouch começam com 9.



1ª Ampola presença Azul



2ª Ampola Solução Rosa



3ª Ampola Rosa sobre Azul

As reações acima mostram a seqüência de reações para Cocaína HCl nos NarcoPouch Sais de Cocaína e Reagente Base Nº 904B.

Os testes de campo **Narcotest** são apresentados em tubos. Todos os testes de ampola múltipla devem ser quebrados na seqüência de baixo para cima e devem ser agitados após a quebra de cada ampola. Para simplificar as reações de cores do Narcotest os agentes devem ser treinados para combinar a cor com o impresso na caixa refil individual ou na tampa do tubo.

Todos os números dos produtos Narcotest começam com 76_

Fabricação: Todos os compostos, cargas, montagens e controle de qualidade dos reagentes usados nos produtos NarcoPouch e Narcotest são conduzidos nas nossas instalações de fábrica em South Paris, Maine.

Suporte Técnico: A ODV oferece assistência técnica 24 horas, 7 dias da semana para todos os departamentos que utilizam os produtos NarcoPouch e Narcotest.

Treinamento: A ODV oferece classes de treinamento nas categorias Máster e Certification.

Apresentação: Todos os produtos NarcoPouch e Narcotest são fornecidos em caixas refil contendo dez testes individuais (ver abaixo). Sortimentos de Caixas Refil também são vendidas em Kits. (ver página contendo Kits neste folheto).

Configuração em Sachet Configuração em Tubo



Configuração em Sachet



Configuração em Tubo

Os testes podem ser adquiridos em kits.
A ODV oferece uma gama completa de kits
na versão narcopouch e narcotest.

Note: A letra S. “Embalagem Especial”, após o número do produto indica que o kit pode ser fornecido de acordo com as especificações do cliente.

KITS NarcoPouch®



Você escolhe o teste desejado!

Kit Esquadrão NarcoPouch Nº 920
 Cada kit traz vinte e quatro (24) testes individuais de acordo com a escolha do seu Departamento contidos em estojo de alumínio com prancheta Saunders e manual de instruções.



Caixa de Patrulha NarcoPouch Nº988 é um kit embalado de fábrica contendo dois de cada: Marquis, Cocaína, Maconha e Metanfetamina/MDMA com manual de instruções. **Também disponível na Versão Especial** contendo a sua escolha de oito (8) testes individuais em estojo de plástico rígido com instruções.
Caixa de Patrulha NarcoPouch Especial Nº 988S




Kit Sessenta NarcoPouch Nº 915
 Kit embalado de fábrica contendo uma caixa refil de cada: Marquis, Cocaína, LSD, Maconha, Mecke's e Metanfetamina/MDMA com manual de instruções. **Também disponível na Versão Especial** contendo a sua escolha de seis (6) caixas refil, a escolha do seu Departamento com manual de instruções.

Kit Sessenta NarcoPouch Especial Nº 915S



Novo Item!
Kit Noventa NarcoPouch “Alfândega” Nº 919
 contém nove (9) NarcoPouch caixas refil. Inclui uma de cada: Mayer's 901, Marquis 902, Cocaína 904B, Barbituricos 905.

LSD 907, Duquenois-Levine 908, KN909, Metanfetamina/MDMA 924, manual de instruções e formulário para relatório.

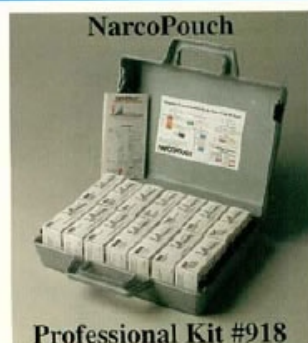

Kit Profissional Nº918 contém 13 caixas refil uma caixa com Ácido Neutralizador e manual de instruções. O kit embalado de fábrica contém uma caixa de cada: Mayer's, Barbituricos, LSD, PCP e Mecke's; duas caixas de cada: Marquis, Cocaína, Maconha e Metanfetamina/MDMA.

O Kit Profissional também pode ser montado de acordo com as especificações do seu Departamento trazendo a sua escolha de treze (13) caixas refil mais uma caixa de Ácido Neutralizador.

Kit Profissional NarcoPouch Especial Nº 918S.