

Suporte bi-articulado que pode ser fixado em parede (através do acessório **TRANSFIXA**) ou equipo (através do acessório **FIXA EQUIPO**).


Seu design exclusivo facilita a passagem de fios de maneira prática e sem complicação.

Legenda

- 1. Suporte Multiuso
- 2. Parafusos
- 3. Buchas

Acompanha

- 1 Suporte Multiuso
- 4 Parafusos
- 4 Buchas
- 1 Chave Allen ("L")

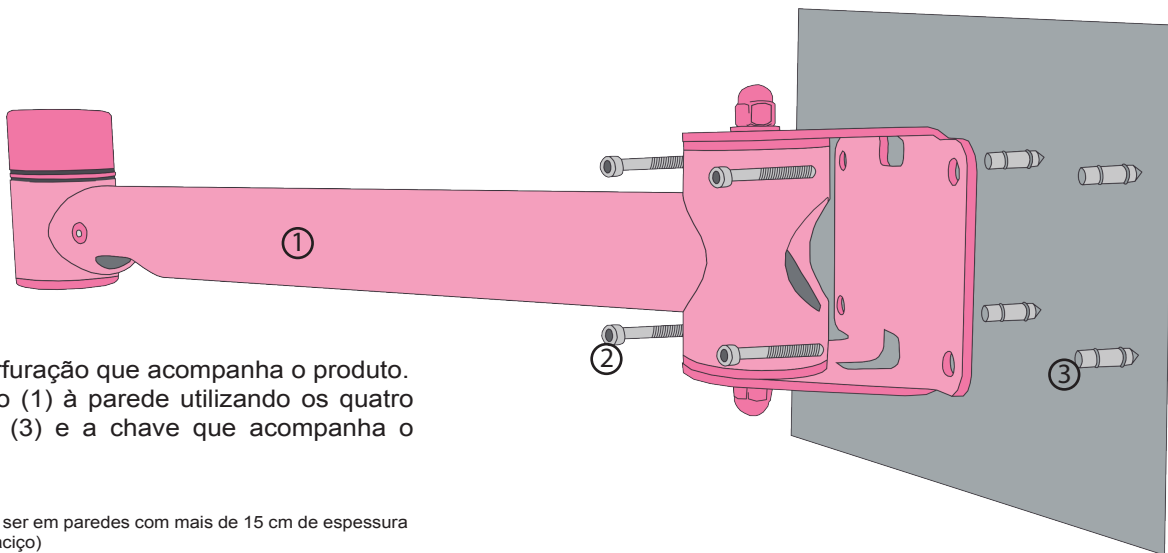

Montagem

Utilize o gabarito de perfuração que acompanha o produto. Fixe o Suporte Multiuso (1) à parede utilizando os quatro parafusos (2) e bucha (3) e a chave que acompanha o produto.

Atenção:


1. A instalação com buchas deve ser em paredes com mais de 15 cm de espessura e de material compacto (tijolo maciço)
2. Em paredes com menos de 15 cm de espessura, de gesso, dry-wall e divisórias eucatex, recomendamos a utilização do uso do acessório TRANSFIXA.
3. Em equipos (coluna) utilize o acessório FIXA EQUIPO.

Não nos responsabilizamos pela qualidade e resistência da parede a ser instalado.

Acessórios

FIXA EQUIPO

Peça em alumínio fundido que se adapta no **SUPORTE MULTIUSO** para acoplar em equipos com tubo de 1,5" a 3,0" (2,5 a 7,5cm de diâmetro)

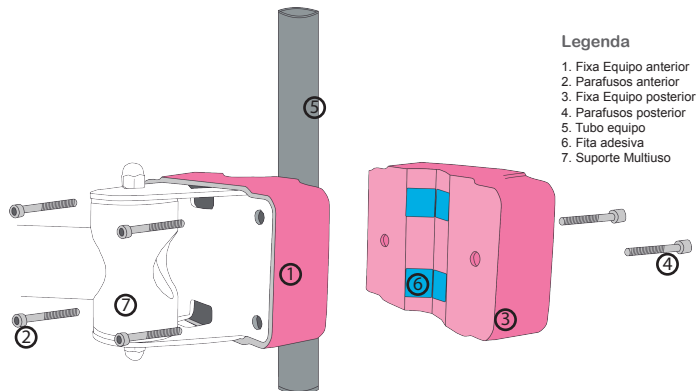

Legenda

- 1. Fixa Equipo anterior
- 2. Parafusos anterior
- 3. Fixa Equipo posterior
- 4. Parafusos posterior
- 5. Tubo equipo
- 6. Fita adesiva
- 7. Suporte Multiuso

Montagem

Fixe o **SUPORTE MULTIUSO** (7) à parte anterior do **FIXA EQUIPO** (1) utilizando os parafusos (2). Através de seus dois parafusos posteriores (4) acople as duas peças do **FIXA EQUIPO** posterior (3) de maneira que o tubo escolhido (5) fique entre as peças.


Acompanha fita adesiva (6) que protege o tubo do braço do equipo.

Atenção:

Dê preferência para fixar o produto em tubo fixo (sem giro) do equipamento odontológico. Não nos responsabilizamos pela qualidade e resistência da parede a ser instalado.

TRANSFIXA

Peça em metal que se adapta posteriormente no **SUPORTE MULTIUSO** para acoplar em paredes com menos de 15cm de espessura.

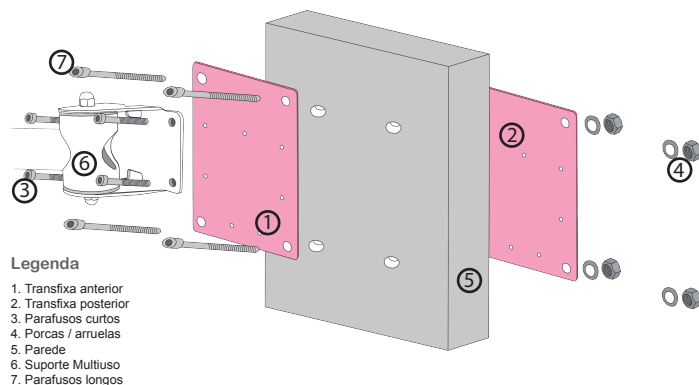

Legenda

- 1. Transfixa anterior
- 2. Transfixa posterior
- 3. Parafusos curtos
- 4. Porcas / arruelas
- 5. Parede
- 6. Suporte Multiuso
- 7. Parafusos longos

Montagem

Fixe o **SUPORTE MULTIUSO** (6) em uma das placas do **TRANSFIXA** (1) através dos parafusos menores (3). Posicione este conjunto (suporte e uma das placas) na parede (5) onde o produto será fixado. Marque as perfurações dos cantos das extremidades desta primeira placa. Uma vez demarcada os quatros furos, perfure a parede mantenha um ângulo de 90°. Posicione a outra placa do **TRANSFIXA** (2) do outro lado da parede de maneira que coincidam os furos, una todo o conjunto com os parafusos longos (7), porcas e arruelas (4).

Atenção:

A parede deve ter acesso livre em ambos os lados para instalação do produto. Não nos responsabilizamos pela qualidade e resistência da parede a ser instalado.