



Manual de Instruções Gama Bravissimo

BV-9X
aparelho intra-canal



Nestas instruções o aparelho auditivo, o molde, os utensílios de limpeza e outros equipamentos podem ter um aspecto diferente do seu próprio aparelho. Além disso reservamo-nos o direito de introduzir alterações.



Os aparelhos auditivos e os seus acessórios não devem ser deitados fora com o lixo doméstico habitual. Consulte o distribuidor do seu país sobre a forma de descartar o seu aparelho auditivo.

Índice

Parabéns pelo seu aparelho auditivo Bravissimo BV-9X	4
Um novo mundo com novos sons	5
Sensação nova de ter um corpo estranho no ouvido	6
O exercício faz o mestre	7
O caminho para uma boa audição e uma vida activa	7
Incentivo ao esforço individual	8
Bravissimo BV-9X	10
Informação sobre a pilha	12
Tipo de pilha	12
Inserção da pilha	12
Como ligar e desligar	15
Identificação do lado direito e esquerdo	16
Colocação do Bravissimo BV-9X	17
Remoção do Bravissimo BV-9X	18
Ajustamento automático da intensidade sonora	19
Regulação de precisão do volume sonoro	20
Os programas de escuta	21
Programas de escuta possíveis	22
Mudanças entre os programas de escuta	23
Limpeza do Bravissimo BV-9X	26
Utensílios de limpeza	28
A saída do som	29
Abertura do orifício de ventilação	30
O protector de cera CeruSTOP	31
Substituição do CeruSTOP	32
Manutenção	35
Bons conselhos	37
Em caso de deficiência no funcionamento	39

Parabéns pelo seu aparelho auditivo Bravissimo BV-9X

Você escolheu um ou dois aparelhos auditivos da Widex. Parabéns pela sua escolha. Com este manual pretendemos informá-lo sobre os vários aspectos ligados ao uso de aparelho auditivo. As presentes instruções são compostas por duas partes. A primeira parte consiste numa introdução à sua nova vida como utilizador de aparelho, tal como habituar-se aos novos sons, etc. A segunda parte contém factos concretos sobre o seu aparelho auditivo, nomeadamente a forma de o manter e manusear e da solução para eventuais questões. Ambas as partes são igualmente importantes, pelo que recomendamos que leia todas as instruções, a fim de tirar o máximo partido do seu novo aparelho auditivo Bravissimo BV-9X.




Um novo mundo com novos sons

Começar a usar aparelho é uma experiência interessante, mas exigente. O aparelho não restitui uma audição normal, mas os sons que pouco a pouco desapareceram, voltarão rapidamente a aparecer, o que pode causar uma sensação de aflição. Pode tratar-se de sons que você não terá ouvido ou imaginado durante muitos anos, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Pode ser o tiquetaque do relógio, a torneira da água, o carro, os passos no chão, as vozes das crianças, a música, o bater das portas, as gargalhadas, as ferramentas, as máquinas, etc. Procure identificar os sons e localizar aqueles que você não está habituado a ouvir. Quando primeiro tiver aprendido a reconhecer os sons do seu ambiente, habituar-se-á a eles e será capaz de os utilizar activamente no seu dia a dia.



Sensação nova de ter um corpo estranho no ouvido

Tal como os seus pés devem habituar-se a um novo par de sapatos, os seus ouvidos terão de habituar-se aos novos aparelhos auditivos. Como utilizador inexperiente terá primeiro de habituar-se a ter algo no ouvido. Nos primeiros dias, o aparelho poderá causar uma ligeira pressão, e você poderá ter uma sensação de calor e de dor no canal auditivo. Isso é completamente normal. Se o seu aparelho auditivo lhe causar um grande desconforto, deverá contactar o seu especialista.

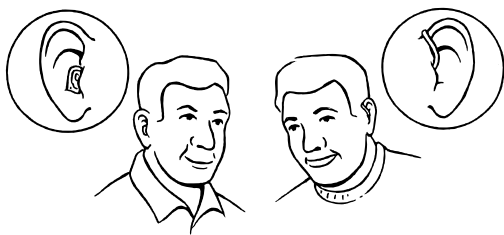

O exercício faz o mestre

É boa ideia começar a utilizar os aparelhos por um período de tempo limitado, como, por exemplo, uma ou duas horas de cada vez e em situações com poucas pessoas e pouco ruído. A partir daí, pouco a pouco poderá utilizá-los por mais tempo e em situações de escuta mais difíceis como, por exemplo, na companhia de mais pessoas. É importante que você dedique o tempo necessário para habituar-se tanto aos novos sons como ao facto de ter um corpo estranho no ouvido.



O caminho para uma boa audição e uma vida activa


Os seus aparelhos auditivos podem ser o caminho para reencontrar a alegria de comunicar com as outras pessoas e obter assim uma melhor qualidade de vida. Portanto, mesmo se no início tudo parece um grande desafio, a recompensa está ao seu alcance.

Incentivo ao esforço individual

A maior parte dos aparelhos auditivos modernos possuem uma vasta gama de possibilidades e características que podem remediar a maioria dos tipos de deficiências auditivas. O seu aparelho auditivo Bravissimo BV-9X está ajustado precisamente à sua audição ou deficiência, a fim de assegurar que você obtenha a reprodução sonora mais confortável.


Pode ser que após algum tempo o seu aparelho necessite de um ajustamento preciso pelo seu especialista. Pode ser que você tenha identificado necessidades novas ou pode haver situações em que o nível ou a reprodução sonora não estejam adequados. Quantas mais informações você puder dar ao seu especialista sobre as suas primeiras experiências com o aparelho auditivo, tanto mais fácil será para ele encontrar a solução mais adequada. Portanto, antes da próxima consulta com o seu especialista, avalie bem como se sente com os novos aparelhos auditivos.

Aponte as situações em que pretende alterações e quais os motivos porque não está inteiramente satisfeito. Será que são os sons graves, ligeiros ou fortes que causam problemas? É sempre ou apenas em determinadas situações? Procure identificar as suas experiências com tantos pormenores quanto possível para que você e o seu especialista tenham uma base concreta para a Vossa próxima consulta.

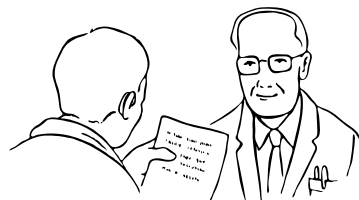

Bravissimo BV-9X

1. Aberturas do microfone para entrada do som no aparelho auditivo.
2. Selector de programa oferecendo a possibilidade de escolher entre vários programas de escuta.
3. Função Ligar/Desligar incorporada na tampa do compartimento da pilha.
(Ver também a página 15)
4. O controlo do volume encontra-se disponível em alguns modelos Bravissimo BV-X, o qual oferece a possibilidade de regular com precisão o volume sonoro que de outra forma é regulado automaticamente.
5. Ranhura para abertura na tampa do compartimento da pilha que facilita a abertura da mesma.
6. Saída de ampliação do som.
7. Orifício de ventilação que assegura a entrada de ar no canal auditivo.
8. O logotipo colorido da Widex que indica se o aparelho é para o ouvido esquerdo ou direito. Um logotipo de cor vermelha no aparelho do lado direito e um logotipo azul para o lado esquerdo.

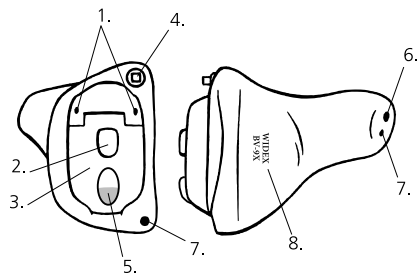

Informação sobre a pilha

Tipo de pilha

Tipo de pilha recomendado para o Bravissimo BV-9X:


Pilha de zinco e ar do tipo 312.

Fale com o seu especialista sobre a compra das pilhas. Preste atenção na data da embalagem que indica a duração das pilhas e nas recomendações sobre a forma de as destruir depois de utilizadas. Para assegurar o melhor aproveitamento das pilhas, estas deverão ser utilizadas antes da data indicada. Como as pilhas são do tipo de zinco e ar necessitam de ar para funcionar. Por isso, retire apenas o rótulo quando necessita de utilizar a pilha. Uma vez retirado o rótulo, a pilha começa a funcionar após alguns segundos. A duração da pilha depende de um número de factores, tais como os parâmetros do aparelho, o número de horas por dia em que o mesmo é utilizado e do ambiente sonoro do utilizador.



Inserção da pilha

Antes de inserir uma pilha nova no seu aparelho auditivo, recorde-se de retirar o pequeno rótulo de selagem. Não use pilhas que possuam quaisquer resíduos de cola ou outros corpos estranhos.

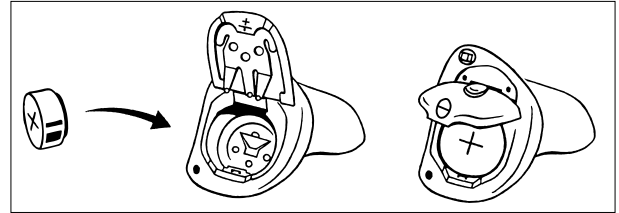

Ao abrir a tampa, evite forçar a tampa para além da posição vertical. Insira a pilha na respectiva tampa de forma a que o pequeno sinal + esteja voltado para a mesma direcção que o sinal + impresso na tampa.

Caso não consiga fechar a tampa da pilha com facilidade, isso significa que a pilha não está colocada correctamente.


Substituição da pilha

Se ouvir quatro pequenos sinais acústicos ligeiros enquanto tiver o aparelho no ouvido, isso indica que a pilha está quase gasta. Se a pilha estiver totalmente gasta, o aparelho ficará completamente mudo. O tempo exacto em que o aparelho continua a funcionar depois dos sinais acústicos varia muito de caso para caso. Por isso, recomendamos que tenha sempre uma pilha nova à mão.


Nunca deixe uma pilha gasta dentro do aparelho auditivo. Qualquer derrame proveniente da pilha pode danificar o aparelho. Ao mudar a pilha, tenha sempre o cuidado de manusear o aparelho em cima de uma mesa ou numa sala alcatifada no caso de deixar cair o aparelho ou a pilha.

Como ligar e desligar

A tampa do compartimento da pilha do seu aparelho auditivo Bravissimo BV-9X também serve para ligar e desligar o aparelho. O aparelho auditivo estará ligado quando a pilha se encontrar inserida correctamente e a respectiva tampa completamente fechada.

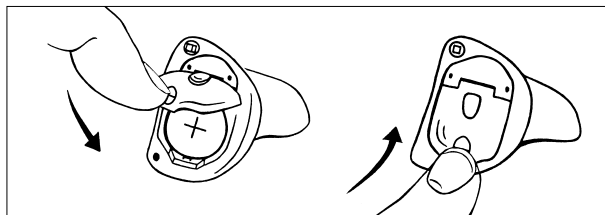

O aparelho auditivo estará desligado, enquanto a tampa do compartimento da pilha se encontrar aberta.

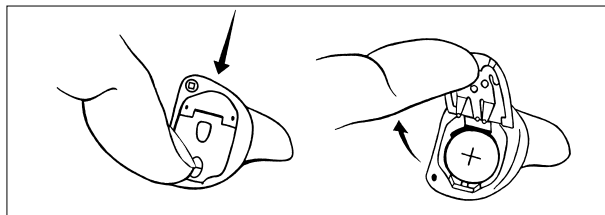


Recorde-se sempre de desligar o aparelho auditivo quando este não estiver a ser utilizado. Retire a pilha do aparelho auditivo, se não o utilizar durante alguns dias.


Identificação do lado direito e esquerdo

Se utilizar aparelho em ambos os ouvidos poderá sempre distinguí-los, porque o aparelho do lado direito está marcado com um logotipo da Widex em cor vermelha e do lado esquerdo, com um logotipo em cor azul.

Colocação do Bravissimo BV-9X

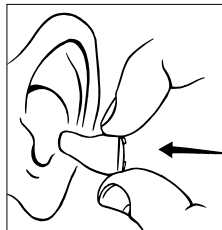


Antes de colocar o aparelho no ouvido necessita de inserir uma pilha no aparelho auditivo, fechando a respectiva tampa completamente.

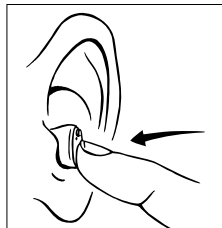

Segure no aparelho auditivo com o dedo indicador e o polegar. Insira cuidadosamente o aparelho no canal auditivo até sentir uma leve resistência. Liberte o aparelho e empurre-o cuidadosamente para o respectivo lugar com a ponta do dedo indicador, até ficar confortável no canal auditivo.

Para facilitar uma colocação correcta do aparelho auditivo, recomenda-se que endireite um pouco o canal auditivo, puxando a parte superior do ouvido exterior para cima e para trás com a outra mão.

Remoção do Bravissimo BV-9X

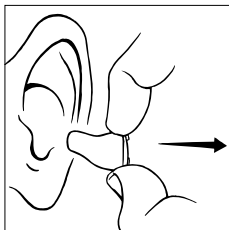

Segure no aparelho auditivo com o dedo indicador e o polegar e puxe-o cuidadosamente. Se tiver dificuldade em remover o aparelho auditivo, tente abaná-lo cautelosamente de um lado para outro. Também pode puxar a orelha um pouco para cima como faz

quando coloca o aparelho, pressionando ao mesmo tempo ligeiramente em redor da saída do canal auditivo com o polegar.


Ajustamento automático da intensidade sonora

O seu Bravissimo BV-9X ajusta automaticamente a intensidade sonora do aparelho auditivo de acordo com os ambientes sonoros. O Bravissimo BV-9X mede o som ambiente vários milhares de vezes por segundo e ajusta a intensidade sonora em conformidade. Com o Bravissimo BV-9X, você não precisa de se preocupar com o ajustamento do volume do som, porque isso acontece automaticamente.

Importante: Se o volume do seu aparelho for demasiado forte ou demasiado fraco, ou se necessita de mais informações, contacte o seu fornecedor.

Regulação de precisão do volume sonoro

Se o seu aparelho auditivo estiver equipado com um controlo do volume, este terá a forma de uma pequena alavanca (a alavanca do seu aparelho pode estar posicionado de forma diferente do que mostra a figura).

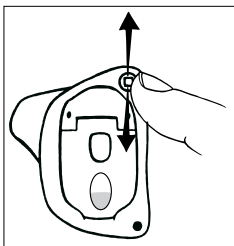

Se pretender um volume mais forte do que a sintonização padrão, empurre a alavanca para cima. Se pretender um volume mais fraco, empurre a alavanca para baixo, o que alterará o volume gradualmente na direcção pretendida.

Quando aumentar o volume, o aparelho emitirá um sinal sonoro do tipo “bip” que se torna mais ligeiro por cada passo em que o volume é aumentado. Quando reduzir o volume, o aparelho emitirá um sinal sonoro do tipo “bip” que se torna mais grave por cada passo em que o volume é reduzido. Quando o volume atingir o nível mais forte, e respectivamente mais baixo, o sinal sonoro passará a ser constante.

Quando voltar a ligar o aparelho após um período de descanso, o mesmo começará a funcionar ao volume normal.

Os programas de escuta

O seu aparelho auditivo intra-canal Bravissimo BV-9X está equipado com programas de escuta diversos, optimizados conforme as várias situações de escuta. Aconselhe-se com o seu fornecedor sobre os programas que são mais relevantes para si. Se houver alterações das suas necessidades, a escolha de programa de escuta poderá ser modificada. Nestas instruções, o seu fornecedor poderá assinalar os programas de escuta disponíveis no seu aparelho auditivo (ver o esquema da página 24).


Programas de escuta possíveis

M: (microfone) Este programa de escuta representa o programa padrão, o que significa que este é o programa que deverá utilizar em situações normais.

M+T. Este programa de escuta combina o programa M (microfone) com o programa T (telebobina). Deverá utilizar este programa se pretender ouvir directamente da fonte sonora e ao mesmo tempo desejar ouvir os sons provenientes do ambiente.

T: (telebobina) Apenas poderá utilizar este programa de escuta em locais que dispõem da instalação de um circuito fechado. Quando seleccionar este programa, poderá ouvir directamente da fonte sonora e desta forma excluir os sons provenientes do ambiente.

Mudanças entre os programas de escuta

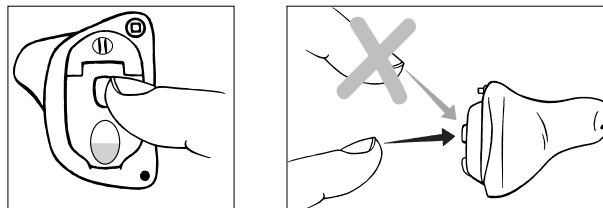

Muda-se entre os 3 programas de escuta ao pressionar no botão de seleccionador de programa colocado na tampa da pilha.

Para mudar do programa 1 para o programa 2, prima ligeiramente a tampa para baixo uma vez (durante cerca de 1 segundo). Para mudar do programa 1 para o programa 3, prima o botão apenas uma vez durante alguns segundos (cerca de 3 segundos).

Se o seu aparelho auditivo Bravissimo estiver no programa 3 e você premir o botão comutador de selecção de programas, o programa mudará para o programa 1 (independentemente de premir ligeiramente ou com força).


Pequenos sinais sonoros do tipo “bip” indicam o programa escolhido. Quando seleccionar o programa 1, ouvirá um breve sinal sonoro. Quando seleccionar o programa 2, também ouvirá um breve sinal sonoro, com uma tonalidade mais grave do que a do sinal produzido quando seleccionar o programa 1. Quando seleccionar o programa 3, ouvirá dois breves sinais sonoros. O número dos sinais sonoros varia em função do número de programas seleccionados no seu aparelho auditivo.”

No final destas instruções encontrará alguns esquemas de programa extra para o caso de posteriormente escolher outra combinação de programas em colaboração com o seu fornecedor.

Esquema dos programas de escuta

Programa	Programas escolhidos:	Aplicação:
1.		
2.		
3.		
4.		

Limpeza do Bravissimo BV-9X

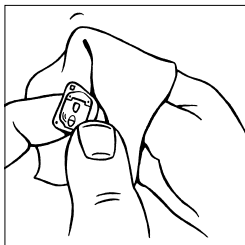


O Bravissimo BV-9X é um aparelho auditivo totalmente intra-auricular, o que significa que é colocado no fundo do canal auditivo.

É importante que o aparelho auditivo se mantenha sem cera ou

sujidade para assegurar o seu bom funcionamento. Nunca limpe o Bravissimo BV-9X usando água. Em vez disso, limpe o seu aparelho diariamente com um pano macio a fim de o manter seco e sem resíduos de cera. Sempre que se retira o aparelho, é necessário controlar a saída do som, a abertura do microfone e o orifício de ventilação, a fim de verificar que não acumulou cera ou outra sujidade nestes sítios.

Abaixo segue um exemplo de como podem estar posicionados respectivamente a saída do som e o orifício de ventilação. As posições do seu aparelho podem ser ligeiramente diferentes.


1. Saída do som
2. Abertura de ventilação

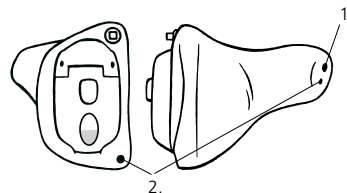


Utensílios de limpeza

Tem à sua disposição os seguintes utensílios de limpeza para o seu aparelho. Aconselhe-se junto do seu fornecedor sobre quais irá necessitar para o seu aparelho:

1. Ímã para facilitar a inserção da pilha na respectiva tampa.
2. Utensílio de remoção de cera para limpar a abertura de ventilação.
3. Escovinha para a remoção de cera da área junto à saída do som.
4. Pano macio para secar e limpar o aparelho auditivo.

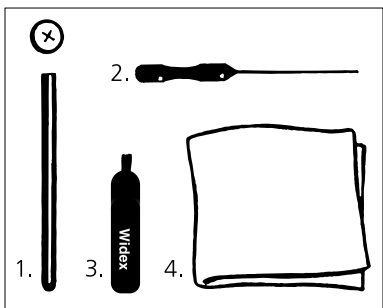

Contacte o seu fornecedor se necessita de mais utensílios de limpeza.

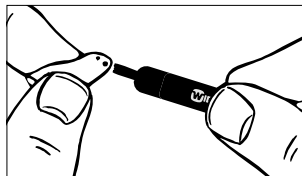


A saída do som

Elimina-se a cera em redor da saída do som com a pequena escova de limpeza ou um pano. É importante que a saída do som não esteja obstruído com cera.

Importante: Nunca insira qualquer tipo de utensílio de limpeza na saída do som, porque isto pode prejudicar o aparelho!

O seu Bravissimo BV-9X pode estar equipado de um protector de cera CeruSTOP para impedir que a cera entre no canal do som. Ver página 30.

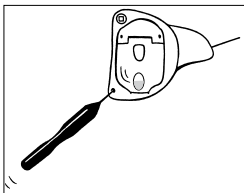

Abertura do orifício de ventilação


Se houver cera acumulada dentro ou em redor da abertura do orifício de ventilação, retira-se a mesma com o utensílio de remoção de cera comprido.

Retire qualquer resíduo de cera de todo o orifício de ventilação passando o utensílio de remoção de cera por todo o orifício. Para o bom funcionamento do seu aparelho auditivo, é importante que o orifício de ventilação não esteja obstruído com cera. **Por isso, habitue-se a limpar o orifício de ventilação diariamente!** Se houver acumulação excessiva de cera no orifício de ventilação ao ponto de alterar as características do aparelho auditivo, deverá contactar o seu fornecedor.


O protector de cera CeruSTOP

O protector de cera CeruSTOP é composto pelas seguintes partes:

1. Pino de guia
2. Gancho de extracção
3. Protector de cera

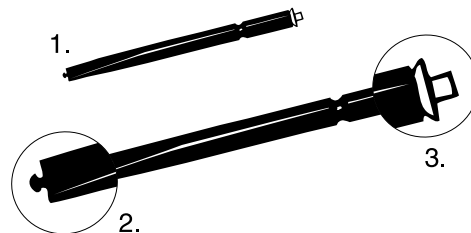



O protector de cera é fornecido numa pequena caixa e está montado numa das pontas do pino de guia.

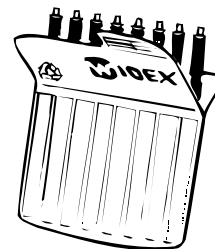


Substituição do CeruSTOP

Coloque o gancho de extracção no protector de cera já colocado na saída do som e retire o protector usado.


1. Abertura de ventilação
2. Saída do som
3. Protector de cera usado

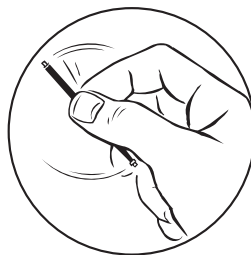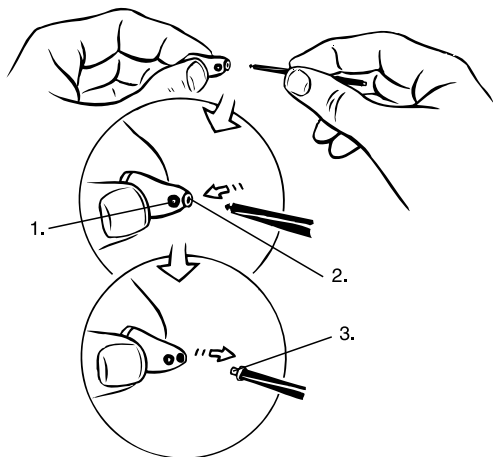


Depois de removido o protector de cera usado, vire o pino de guia de forma a colocar o novo protector de cera no seu lugar.

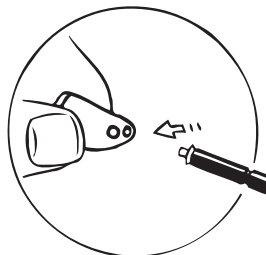

Coloque o pino de guia na saída do som e prima o protector de cera na saída do som com uma pressão ligeira

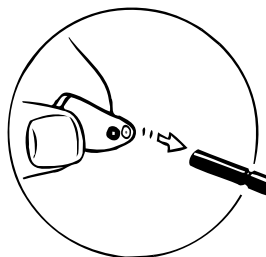

De seguida, retire o pino de guia do protector de cera / da saída do som. O novo protector deslizará automaticamente do pino de guia e permanecerá na saída do som depois de retirar o pino de guia.

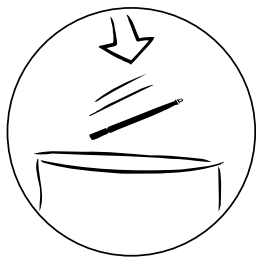

Depois de colocar o novo protector de cera, deite fora o protector usado e o pino de guia. Nunca volte a reutilizar protectores já usados.

A frequência da necessidade de substituição do protector de cera CeruSTOP varia muito de indivíduo para indivíduo, dependendo, entre outros, do tipo e da quantidade de cera produzidos.




Importante: Se o protector de cera não assentar bem, retire-o e coloque outro em sua substituição. Se, contrariamente ao habitual, o protector de cera se deslocar do aparelho enquanto este se encontrar no canal auditivo, recomenda-se que contacte o seu médico. Nunca tente retirar o protector do canal auditivo sozinho.

Se tiver dúvidas sobre o uso do CeruSTOP, deverá contactar o seu fornecedor.

Manutenção

Se dispensar os devidos cuidados ao seu aparelho auditivo, este funcionará por muito tempo. A seguir indicamos alguns cuidados que poderão prolongar a vida do seu aparelho:

- Lembre-se de desligar o aparelho quando não estiver a ser utilizado. Retire a pilha do seu aparelho se não o utilizar durante alguns dias.
- Trate o seu aparelho auditivo com atenção e com cuidado. Em caso de não utilização, guarde o aparelho auditivo na respectiva caixa num lugar fresco e seco, fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
- Nunca exponha o seu aparelho a temperaturas excessivamente elevadas ou húmidas.
- Não utilize o seu aparelho auditivo quando tomar banho ou quando estiver a secar o cabelo com o secador ou a aplicar laca.
- Nunca tente abrir ou consertar o aparelho auditivo sozinho.

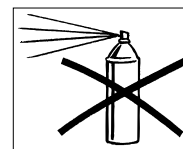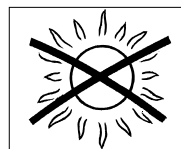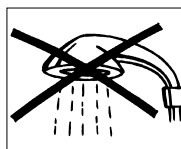

-
- Não use o seu aparelho auditivo durante quaisquer tratamentos de radiação (tais como raios de onda curta, raio-X, ou tratamentos de scanning do tipo MR e CT). Alguns tipos de tratamentos de radiação podem danificar o aparelho. Por exemplo, nunca coloque o seu aparelho auditivo num forno de microondas. Outros tipos de radiação, tais como de sistemas de vigilância, alarmes contra roubo e telefones celulares são mais fracos e não prejudicam o aparelho.
 - Os aparelhos auditivos Widex não estão certificados para uso em minas ou outras áreas com gases explosivos.

Bons conselhos

- A utilização de aparelho auditivo aumenta o risco de acumulação de cera. Contacte o seu médico se suspeitar que haja acumulação de cera no ouvido. A cera pode não só reduzir a sua própria audição, mas também afectar o aparelho auditivo consideravelmente. Como utilizador de aparelho auditivo é recomendável pedir ao médico que lhe faça uma limpeza aos ouvidos algumas vezes ao ano.
- Assegure-se que mantém o seu aparelho e os acessórios fora do alcance das crianças, que os podem introduzir na boca. Mantenha igualmente as pilhas fora do alcance das crianças e deite fora cuidadosamente as que já estiverem gastas. Nunca mude as pilhas à frente das crianças ou as deixe ver onde guarda a sua reserva.
- Nunca meta uma pilha na boca, porque arrisca-se a engoli-la. Em caso de ingestão, contacte imediatamente o médico.
- Este aparelho auditivo é feito de materiais modernos anti-alérgicos. Todavia, preste atenção a qualquer irritação eventual da pele, inclusivamente do canal auditivo. A maioria dos problemas poderá ser resolvida com o seu fornecedor.

-
- Tenha em atenção que a utilização de qualquer tipo de aparelho auditivo ou molde pode causar um aumento do risco de infecção no canal auditivo. A não ventilação adequada do ouvido poderá provocar infecções no mesmo. Por isso, recomendamos que retire o aparelho durante a noite, permitindo uma boa ventilação do canal auditivo. Além disso, assegure-se de que limpa e controla o aparelho auditivo/o molde conforme as necessidades. Se surgir uma infecção, recomenda-se que limpe o aparelho/o molde com um pano com um desinfectante ou produto semelhante. Em nenhuma ocasião utilize álcool, cloro ou quaisquer substâncias similares para limpar o aparelho/molde.

Em caso de deficiência no funcionamento

As páginas a seguir contêm alguns bons conselhos caso tenha problemas com o seu aparelho auditivo. Antes de contactar o seu fornecedor, verifique o seguinte:

O aparelho está mudo:

- *O aparelho não está ligado.* Verifique se a pilha está colocada correctamente e feche bem a tampa da pilha.
- *A pilha está gasta / voltagem baixa.* Coloque uma pilha nova e verifique se está inserida correctamente.
- *A saída do som está obstruída.* A saída do som pode ficar obstruída com cera. Se o seu aparelho estiver equipado com um protector CeruSTOP, substitua o protector. Caso não esteja equipado com um protector de cera: Limpe a saída do som do aparelho auditivo com a pequena escova. Ver página 28. Nunca insira qualquer tipo de utensílio de limpeza na saída do som, porque isto poderia prejudicar o aparelho. Se não conseguir efectuar uma limpeza total da saída do som, deverá contactar o seu fornecedor.

-
- *Os contactos das pilhas estão sujos.* Contacte o seu fornecedor para efectuar uma limpeza dos contactos das pilhas.
 - *A saída do som está obstruída.* A abertura do microfone pode ficar obstruída com cera ou sujidade. Nunca insira qualquer tipo de utensílio de limpeza na saída do microfone. Contacte o seu fornecedor.

O volume sonoro do aparelho não é suficientemente poderoso

- *A saída do som está obstruída.* A saída do som pode ficar obstruída com cera. Se o seu aparelho estiver equipado com um protector CeruSTOP, substitua o protector. Caso não esteja equipado com um protector de cera: Limpe a saída do som do aparelho auditivo com a pequena escova. Ver página 27. Nunca insira qualquer tipo de utensílio de limpeza na saída do som, porque isto poderia prejudicar o aparelho. Se não conseguir efectuar uma limpeza total da saída do som, deverá contactar o seu fornecedor.
- *O canal auditivo está obstruído com cera.* Contacte o seu médico para limpar o ouvido.

O aparelho emite um sinal sonoro constante:

- *O aparelho não está inserido correctamente no canal auditivo.* Retire o aparelho e volte a colocá-lo. É importante que o aparelho fique bem colocado no canal auditivo.
- *O canal auditivo está obstruído com cera.* Contacte o seu médico para limpar o ouvido.
- *O aparelho está solto.* Contacte o seu fornecedor.

É desconfortável usar o aparelho

- *O aparelho auditivo não está inserido correctamente.* Contacte o seu fornecedor a fim de receber uma orientação sobre a forma correcta de colocar o aparelho.
- *O aparelho não assenta bem* Contacte o seu fornecedor.

-
- *O ouvido externo ou o canal auditivo ficam doridos* Para os que utilizam o aparelho auditivo pela primeira vez, é importante que de início não o utilizem por um período de tempo demasiado longo. A pele do canal auditivo é muito fina e pode inchar ligeiramente por causa da pressão do aparelho. Levará 2 a 3 semanas a habituar-se gradualmente ao uso de um aparelho novo. Se continuar a sentir incómodo, deverá contactar o seu fornecedor.

O aparelho funciona de forma intermitente

- *Os contactos das pilhas estão sujos.* Contacte o seu fornecedor para efectuar uma limpeza dos contactos das pilhas.

Esquema dos programas de escuta

Programa	Programas escolhidos:	Aplicação:
1.		
2.		
3.		

CE 0459

WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Printed by HTO / 2005-11
9 514 0056 005 #01