


myMED 4 CAIXA DE COMPRIMIDOS DIÁRIA MULTI-ALARME

MANUAL DE INSTRUÇÕES

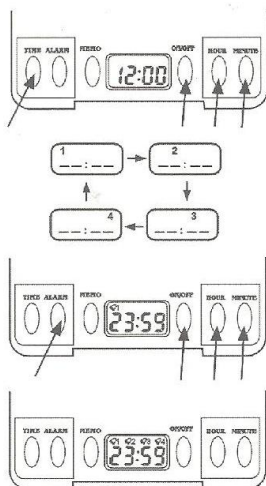

1-Relógio

- Carregue no botão TIME e os dígitos no ecrã começam a piscar
- Carregue no botão HOUR (HORA) para ajustar a hora e no botão MINUTE para colocar os minutos
- Carregue no botão ON/OFF para confirmar que o relógio está certo.
- Carregue no botão ON/OFF para escolher o formato de 12/24 horas.

2- Cinco Modos para colocar os 4 alarmes

- Carregue no botão ALARM até que no ecrã apareça a piscar o número (1,2,3,4) do alarme que pretende programar.
- Carregue no botão HOUR e MINUT, para colocar a hora e os minutos (a que quer que o alarme toque)
- Para activar alarme carregue no botão ON/OFF até ver o símbolo de uma campainha no ecrã
- carregue no botão ALARM para programar nova hora da segunda toma de comprimidos. Repetir até todos os alarmes estarem

programados.

Carregue no botão Time para o ecrã voltar a mostrar o relógio com a hora actual.

O alarme beep-beep tocará durante um minuto, surgindo no ecrã a campainha indicado qual o compartimento de onde devemos retirar o/s comprimido/s. Ou seja, quando foi programada a hora de toma para o alarme 1, além de surgir no ecrã a campainha referente ao compartimento 1, o alarme soará beep pausa beep etc. Quando alarme 2 começar a tocar o alarme soará beep beep pausa etc. Quando for o alarme 3 a tocar soará beep beep beep pausa etc. O alarme quatro soará beep beep beep beep pausa etc.

- **Função de som:** se não tomar logo o medicamento, o alarme continuará a tocar a cada 3 minutos durante meia hora.
- **Para cancelar o alarme** carregue no botão ALARM até que apareça a piscar no ecrã o número do alarme que pretende desactivar
- Carregue ON/OFF até a campainha desaparecer do ecrã. Proceda do mesmo modo para os restantes alarmes que pretender desactivar.

3-Um modo para programar os 4 alarmes

- Estando o ecrã no modo do relógio, carregue no botão MEMO. O primeiro alarme será programado assim que ouvir o som "Di", a caixa memorizará essa hora. A seguir 24 horas mais tarde o alarme soará beep beep beep beep durante 30 segundos.
- Carregue no botão MEMO outra vez. O segundo alarme será programado assim que ouvir o som "di di" e assim sucessivamente até ao alarme 4.
- Carregue no botão MEMO pela quinta vez. O primeiro horário do alarme 1 será substituído pelo novo que acabou de programar. Deste modo consegue substituir um alarme a seguir ao outro.
- Carregue no botão MEMO durante 3 segundos até ouvir o som di~~~~~ e simultaneamente os quatro alarmes serão cancelados.

4-Substituição da bateria

Vire a caixa de comprimidos. Puxar com a unha o compartimento da pilha e substitua a pilha 3V (CR2025). Certifique se que o pólo "+" fica virado para cima.