



Monitor de Pressão Arterial Semi-Automático



PRO CHECK™

Manual de Instruções

Modelo UAAOXB-H
para o braço





OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: este monitor de pressão arterial semi-automático Pro Check modelo UAAOXB-H deve ser usado de acordo com as instruções para garantir medições exatas.

Monitor de Pressão Arterial Semi-Automático
Manual de Instruções (modelo número UAAOXB-H)

Índice

1. Introdução

- 1.1. Características do seu monitor de pressão arterial.
- 1.2. Informações importantes sobre a auto-medição.

2. Informações importantes sobre a questão da pressão arterial e sua medição

- 2.1. Como ocorre a pressão arterial alta/baixa?
- 2.2. Quais são as medidas normais?
- 2.3. O que pode ser feito se forem obtidos valores regulares altos/baixos?

3. Componentes do seu monitor de pressão arterial

4. Instalação das baterias e acessórios

- 4.1. Instalação das baterias

2 • UAAOXB-H





4.2. Indicador de bateria fraca

4.3. Conexão do tubo

5. Procedimento para a medição

5.1. Antes da medição

5.2. Causas comuns de erro

5.3. Ajustando a braçadeira

5.4. Procedimento de medição

5.5. Interrupção de uma medição

5.6. Memória – indicação da última medição

6. Mensagens de erro/solução de problemas

7. Cuidados e manutenção

8. Garantia

9. Certificados

10. Especificações técnicas



1. Introdução

1.1. Características do seu monitor de pressão arterial semi-automático Pro Check, modelo UAAOXB-H.

O seu monitor de pressão arterial Pro Check possibilita uma medição muito rápida e confiável da pressão arterial sistólica e diastólica, bem como da frequência cardíaca por meio do método oscilométrico de medição. Este monitor oferece uma exatidão clinicamente comprovada e foi projetado para proporcionar uma utilização fácil.

Antes de utilizar o aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual de instruções e guarde-o em um local seguro. Por favor, procure o seu médico se tiver quaisquer outras dúvidas sobre a questão da pressão arterial e sua medição.





Atenção!

1.2. Informações importantes sobre a auto-medição.

- A auto-medição significa Controle, e não diagnóstico, ou tratamento. Os valores incomuns deverão sempre ser discutidos com o seu médico.
- O valor da pulsação exibido no visor do monitor não é adequado para a verificação da frequência cardíaca de portadores de marcapassos!
- Nos casos de irregularidade cardíaca (Arritmia), as medições efetuadas com este instrumento deverão ser avaliadas pelo seu médico.

Interferência Eletromagnética

Este monitor contém componentes eletrônicos sensíveis (sensores). Não deve, portanto, ser armazenado ou utilizado na proximidade de campos elétricos ou eletromagnéticos fortes, como, por exemplo, telefones móveis e fornos de microondas, a fim de evitar alterações temporárias na exatidão do instrumento.



2. Informações importantes sobre a pressão arterial e sua medição

2.1. Como ocorre a pressão arterial alta/baixa?

O seu nível de pressão arterial é determinado numa parte do cérebro chamada centro circulatório. Essa parte do seu cérebro responde a determinadas situações pela resposta juntamente com o sistema nervoso. Para ajustar a pressão arterial, a força e a frequência cardíaca bem como a largura dos vasos sanguíneos, são alteradas. A largura dos vasos sanguíneos é alterada pelos delicados músculos das paredes dos vasos sanguíneos.

O nível de pressão arterial varia periodicamente durante a atividade cardíaca. Durante a saída do sangue do coração (Sístole) o valor é maior (valor da pressão arterial sistólica). No final do “período de repouso” do coração, Diástole ou valor da pressão arterial diastólica, a pressão arterial cai para um valor mais baixo. Os valores para a pressão arterial deverão permanecer dentro de uma variação normal específica para que se evite determinadas doenças.

2.2. Quais são as medidas normais?

A pressão arterial é muito alta se, em repouso, a sua pressão diastólica for superior a 90mmHg





e/ou a sua pressão sistólica for superior a 160mmHg. Nesse caso, por favor, consulte o seu médico imediatamente. **Medidas desse nível durante um longo período de tempo ameaçam o seu coração devido aos danos contínuos causados aos vasos sanguíneos do seu corpo.**

Caso os resultados das medições da pressão sistólica fiquem entre 140 mmHg e 160 mmHg e/ou da pressão diastólica fiquem entre 90 mmHg e 95 mmHg, consulte o seu médico, pois faz-se necessária a realização regular de auto-verificações.

Consulte seu médico se os resultados da sua medição forem muito baixos, ou seja, os valores sistólicos sejam inferiores a 105 mmHg / ou os valores diastólicos sejam inferiores a 60 mmHg.

A auto-verificação regular com o seu monitor de pressão arterial é recomendada mesmo se o resultado de suas medições de pressão arterial são tidas como normais, pois você poderá detectar de maneira precoce possíveis alterações na sua pressão arterial e adotar as medidas apropriadas.

Caso você esteja sendo submetido a um tratamento médico para o controle da sua pressão arterial, mantenha um registro das medições juntamente com a hora do dia e a data. Mostre este registro ao seu médico sempre que for visitá-lo. **Jamais use os resultados das suas medições para interromper ou modificar de maneira independente as doses dos medicamentos prescritos pelo seu médico.**



Tabela com Classificação da Pressão Arterial. Fonte: Organização Mundial da Saúde – O.M.S.

Varição	Pressão Arterial Sistólica	Pressão Arterial Diastólica	Medidas
Hipotensão (Baixa)	Inferior a 100	Inferior a 60	Consulte o seu médico
Varição normal	entre 100 e 140	entre 60 e 90	Monitore regularmente
Hipertensão suave (Alta)	entre 140 e 160	entre 90 e 110	Consulte o seu médico
Hipertensão moderadamente grave (Mais Alta)	entre 160 e 180	entre 100 e 110	Consulte o seu médico com urgência!
Hipertensão grave (muito alta)	superior a 180	superior a 110	Consulte o seu médico com urgência!
Hipertensão sistólica específica	Superior a 140	Inferior a 90	Consulte o seu médico

8 • UAAOXB-H





Informações adicionais

• Caso as suas medidas forem na sua maior parte normais em condições de repouso, mas excepcionalmente altas em condições de estresse físico ou psicológico, é possível que você esteja sofrendo do que é chamado "hipertensão lábil". Por favor, consulte o seu médico se você suspeitar que esse possa ser o caso.

Cuidado:

• Valores superiores a 120mmHg para a pressão arterial diastólica requerem tratamento médico imediato.

2.3. O que pode ser feito se forem obtidas medidas altas/baixas regularmente?

a) Há várias causas diferentes para a pressão alta/baixa, por favor consulte seu médico para saber quais medidas devem ser adotadas.

b) Existem medidas que você pode adotar para reduzir e até mesmo impedir que haja alterações na sua pressão e se encontram abaixo listadas:



A) Hábitos alimentares

- Empenhe-se para obter um peso saudável correspondente à sua idade. Consulte seu médico sobre o seu peso ideal.
- Evite o consumo excessivo de sal.
- Evite o consumo excessivo de alimentos gordurosos.

B) Doenças anteriores

Siga corretamente quaisquer orientações médicas para o tratamento de doenças como:

- Diabetes mellitus;
- Problemas com o metabolismo de gorduras, e
- Gota.





C) Hábitos

- Abandone completamente o fumo.
- Evite a ingestão de bebidas alcóolicas.
- Restrinja o seu consumo de cafeína (café, chá, chocolate, etc).


D) O seu Condicionamento Físico:

- A prática de exercícios físicos é importante para a regulação da pressão e da frequência cardíaca. Procure orientação médica para saber qual exercício é o mais indicado para você.
- Quando houver doenças anteriores e/ou caso tenha mais de quarenta anos, por favor, consulte o seu médico antes de iniciar as suas atividades físicas. Você precisará ser orientado sobre o tipo e a intensidade dos exercícios adequados a você.



3. Componentes do seu monitor de pressão arterial

a) Unidade de medição

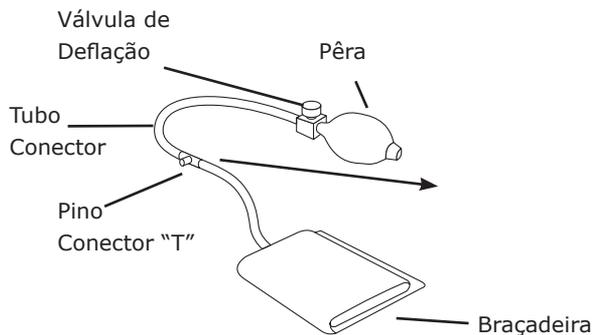

b) Tamanhos de Braçadeira:

Tamanho Adulto para circunferência do braço entre 22 a 32 cm (tamanho padrão que acompanha o monitor)

Tamanho Grande para circunferência do braço entre 32 a 42 cm (item opcional).






4. Instalação das Baterias e Acessórios

4.1. Instalação das Baterias


Depois de retirar o seu aparelho da embalagem, siga os passos abaixo para instalar as baterias no seu monitor.

- Para abrir o compartimento de baterias pressione a lingüeta no sentido da seta.
- Coloque as baterias (4 pilhas AA, de 1,5 V), seguindo a polaridade indicada.
- Verifique as polaridades das baterias, pois se as mesmas forem colocadas de maneira incorreta o visor poderá funcionar de maneira aleatória ou até não funcionar.

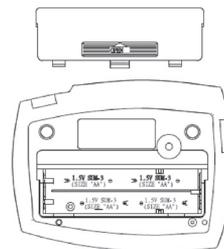

4.2. Indicador de Bateria Fraca

Caso no canto direito inferior do visor apareça o símbolo indicador de bateria fraca (uma bateria cortada por um "X"), significa que as suas baterias estão fracas e que precisam ser trocadas para que o monitor funcione corretamente.

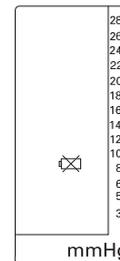



Atenção!

- Depois que o indicador de bateria fraca aparecer no visor, o seu monitor não funcionará até que as baterias sejam substituídas.
- Por favor, use baterias "AA" de longa duração, ou alcalinas, de 1,5V.
- Não use baterias recarregáveis.
- Retire as baterias do aparelho caso o seu monitor de pressão arterial permaneça sem ser usado por períodos longos.


Verificação das funções:

Mantenha o botão liga/desliga pressionado para testar todos os elementos do visor. Todos os ícones deverão aparecer demonstrando o funcionamento correto de todo o visor.

4.3. Conexão do tubo

• Braçadeira

Faça (ou verifique) as conexões do tubo entre a braçadeira, o monitor e a pêra, conforme ilustração na figura ao lado.

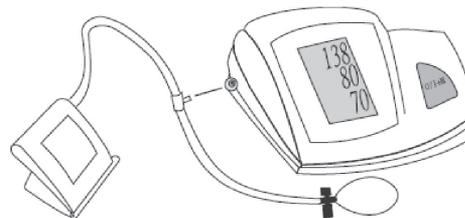



5. Procedimento de Medição

5.1. Antes da medição

- Evite comer, fumar, bem como todas as formas de exercício imediatamente antes de qualquer medição. Todos esses fatores influenciam o resultado da medição. Relaxe, sentando-se numa poltrona em um ambiente tranquilo durante cerca de dez minutos antes de qualquer medição.
- Retire qualquer roupa que aperte o seu braço.
- Faça a medição sempre no mesmo braço.
- Tome as medições no mesmo horário do dia, já que a pressão sangüínea muda com o decorrer do dia.

5.2. Causas comuns de erro

Observação

Para fazer comparações entre resultados de medições, esses devem ser medidos sob as mesmas condições. E todas as observações seguintes devem ser seguidas!

- O esforço do usuário para apoiar o seu braço poderá aumentar a pressão sangüínea. Assegure-se de estar sentado numa posição confortável e relaxada e não tensione qualquer músculo do braço



durante a medição. Caso seja necessário ajustar a altura do braço sobre a mesa, utilize uma almofada como apoio.

- Se a braçadeira ficar consideravelmente abaixo ou acima da altura do coração, será medida uma pressão arterial erroneamente alta ou baixa! **Uma variação de 15 cm entre a braçadeira e a altura do coração pode resultar num erro de leitura de 10 mmHg.**

- Braçadeiras que não se ajustam adequadamente produzem medições incorretas. A seleção do tamanho, que é de extrema importância, irá depender da circunferência do braço a qual se destina. As braçadeiras Pro Check possuem impressa a faixa de variação de circunferências de braço a qual se destinam. A braçadeira padrão que acompanha o monitor se adequa braços com circunferências situadas entre 22 a 32 cm. Se a sua braçadeira, não se adequa a sua circunferência de braço e você deseja saber como adquirir outro tamanho, por favor, entre em contato com a Accumed. Use apenas braçadeira Pro Check em seu monitor Pro Check, pois elas são testadas de maneira especial e aprovadas clinicamente.

- Uma braçadeira frouxa, apertada demais ou mal posicionada produz medições incorretas.

- Medições repetidas sem intervalos de descanso fazem com que o sangue acumule no braço. Isso pode levar a resultados incorretos. As medições devem ser feitas depois de um repouso de cinco minutos para assegurar a sua exatidão.

16 • UAAOXB-H







5.3. Ajustando a braçadeira

a) Passe a extremidade da braçadeira pelo anel de metal de modo que ela dê uma volta. O fecho de velcro deverá ficar virado para fora.


(Ignore essa etapa se a braçadeira já tiver sido preparada.)

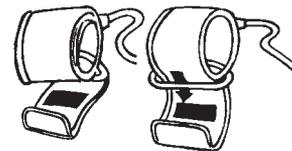

b) Coloque a braçadeira sobre o braço de modo que o tubo fique próximo ao seu antebraço.

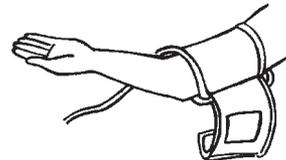

c) Mantenha a braçadeira no seu braço de acordo com a ilustração. Certifique-se de que a extremidade inferior da braçadeira fique aproximadamente entre 2 e 3 cm acima do cotovelo e de que o tubo está mais próximo da parte interna do braço.

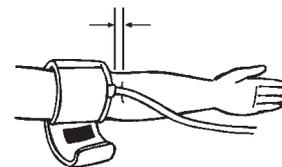




5.4. Procedimento de medição

Depois que a braçadeira tiver sido adequadamente posicionada, a medição poderá ser iniciada:

a) Ligue o instrumento pressionando o Botão Liga / Desliga / Memória. Vários ícones irão aparecer no visor durante dois segundos: Dois sinais sonoros curtos seguirão para indicar que o instrumento está pronto. O mostrador indicará um "0".




b) A pera deve ser inflada pressionando continuamente a pera até uma pressão de pelo menos 40 mmHg acima da pressão sistólica esperada. Se você não souber o valor dessa pressão, infle até um valor aproximado de 160 – 180 mmHg. A pressão da braçadeira é indicada continuamente no visor.

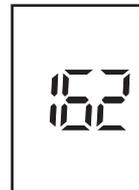



c) Após ter terminado de inflar a pera, permaneça sentado numa posição quieta e relaxada. Nesse momento a medição prossegue sozinha.

d) Caso não ocorra qualquer medição e aparecer somente no mostrador uma seta apontada para cima piscando, pressione novamente a pera e infle a braçadeira até conseguir uma pressão de 20 mmHg maior que o início. A instrução para inflar mais poderá aparecer várias vezes se a pressão ainda não for suficiente.

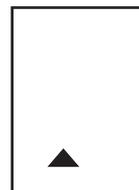



e) Quando o instrumento detectar a frequência cardíaca, o símbolo do coração começará a piscar no visor e poderá ser ouvido um sinal para cada batimento do coração e após a medição for concluída soará um sinal longo. Os valores da pressão arterial sistólica e diastólica medidos, bem como o da frequência cardíaca, serão mostrados então. A pressão da braçadeira poderá, então, ser rapidamente liberada, pressionando-se a válvula de deflação.

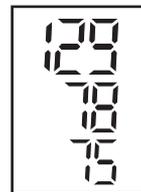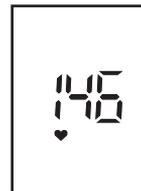

Atenção:

Se a braçadeira for inflada demais (acima de 300 mmHg), irão aparecer no visor as letras "HI" e será ouvido um sinal sonoro de aviso. A pressão da braçadeira deverá ser imediatamente liberada com o uso da válvula de deflação, a braçadeira deverá ser retirada e aguarde pelo menos uns 5 minutos antes de iniciar outra medição.



5.5. Interrupção de uma medição

Caso seja necessário interromper a medição da pressão arterial por qualquer razão, pressione a válvula de deflação. O dispositivo diminuirá imediatamente a pressão da braçadeira.

5.6. Memória – indicação da última medição

Este monitor de pressão arterial armazena automaticamente o último valor medido. Pressionando-se continuamente o Botão Liga / Desliga / Memória durante pelo menos três segundos e será indicada a última medição.

Informações adicionais

As medições não deverão ser feitas em seqüências com intervalos pequenos entre as mesmas, para garantir medições adequadas. Espere pelo menos **um minuto** numa posição relaxada, sentado ou deitado, antes de repetir uma medição.



6. Mensagens de erro/solução de problemas

Se ocorrer qualquer erro durante uma medição, a mesma será interrompida e será indicado um código de erro correspondente (exemplo: erro número 1).



Número do Erro	Provável causa
ERR 1	A pressão sistólica foi determinada. O tubo de conexão da braçadeira pode ter se afrouxado ou o pulso pode não ter sido encontrado. Assegure-se de que as conexões da braçadeira estão firmes e de que a braçadeira foi colocada adequadamente. Veja a seção (5.3)
ERR 2	Impulsos de pressão incomuns. Motivo: O braço foi movimentado durante a medição. Repita a medição mantendo o braço parado.



ERR 3	O tempo para inflar a braçadeira foi muito longo, a braçadeira foi incorretamente posicionada ou as conexões não estão firmes. Verifique as conexões, a posição da braçadeira e repita a medição com o braço parado.
ERR 5	A diferença entre a pressão sistólica e diastólica é excessiva. Meça novamente, com cuidado, seguindo os procedimentos adequados para a braçadeira e faça a medição em condições tranquilas.
HI	A pressão na braçadeira está muito alta (superior a 300 mmHg) ou o pulso é demasiadamente alto (superior a 200 BPM). Relaxe por cinco minutos e repita a medição.*
LO	A pulsação está muito baixa (inferior a 40 batimentos por minuto) ou está abaixo da pressão mínima que o instrumento mede (30 mmHg). Repita a medição seguindo cuidadosamente as instruções.*

*Caso esses problemas se repitam, consulte o seu médico.





Outros problemas possíveis e suas possíveis soluções:

Problema	Solução
O visor permanece em branco quando o instrumento é ligado mesmo com as baterias colocadas.	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique a polaridade das baterias e corrija, caso necessário2. Caso o visor indique algo incomum, retire as baterias e coloque pilhas novas.
A pressão não sobe, mesmo pressionando a pêra.	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique a conexão do tubo da braçadeira e conecte adequadamente.
O monitor deixa freqüentemente de medir os valores da pressão arterial, ou os valores medidos são muito baixos (ou muito altos).	<ol style="list-style-type: none">1. Ajuste a braçadeira corretamente no braço.2. Antes de iniciar uma medição certifique-se de que a braçadeira não está muito apertada. Assegure-se de que a sua roupa não está exercendo pressão sobre o braço acima da posição de medição. Tire peças de roupa, caso necessário.3. Meça novamente a pressão arterial em completa paz e tranqüilidade.



Todas as medições resultam em valores diferentes, apesar do funcionamento normal do monitor e da indicação de valores normais.

1. Por favor, leia a informação abaixo e os pontos relacionados em “Causas comuns de erro” (em 5.2) e repita a medição.”

- A pressão arterial varia constantemente. As medições observadas podem refletir com exatidão a sua pressão.







7. Cuidados e manutenção

- a) Não exponha o aparelho a temperaturas muito elevadas, umidade, poeira, ou à luz do sol direta.
- b) A braçadeira contém uma bolsa de ar (manguito) muito sensível. A manuseie com cuidado e evite qualquer tipo de compressão, torção ou dobra.

- c) Limpe o aparelho com um pano macio seco. Não use gasolina, removedores ou solventes similares. Manchas na braçadeira poderão ser removidas cuidadosamente com um pano umedecido e água e espuma de sabão neutro.

A braçadeira não deve ser lavada em lava-louças, máquina de lavar roupas, ou mergulhada em água.

- d) Manuseie o tubo de conexão com cuidado. Não o puxe. Não permita que ele seja torcido ou colocado sobre superfícies cortantes.

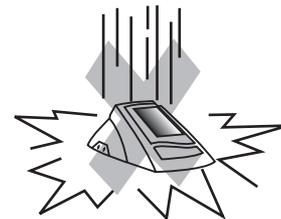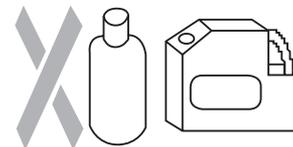



e) Não deixe o monitor cair e nem o trate de maneira rude. Evite vibrações fortes.

f) **Jamais tente consertar o monitor por conta própria.** Pois qualquer abertura desautorizada do mesmo invalidará o direito à garantia.





8. Garantia

O monitor de pressão arterial Pro Check mod. UAAOXB-H tem garantia de dois anos a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor.

A garantia de dois anos não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal (Pino conector "T", Válvula de Deflação Pera e tubo conector) que possuem garantia de noventa dias e, também, à braçadeira que tem dois anos de garantia. Os prazos são contados à partir da data de compra.

A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do monitor invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário.

As baterias e os danos provocados por vazamento das mesmas não estão cobertos pela garantia.

A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas.

O fabricante se reserva do direito de substituir o monitor defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica.

Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não renovam o prazo de garantia.

Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso serão cobrados separadamente, mesmo que o monitor esteja dentro do prazo de garantia.

As verificações periódicas do monitor não estão cobertas pela garantia e serão cobradas separadamente. A calibração periódica não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica.

Observação importante: de acordo com a Portaria INMETRO nº 96/2008, é obrigatória a verificação desse instrumento uma vez ao ano por um órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - INMETRO (RBMLQ-I).



Informações adicionais

A pressão arterial está sujeita a variações mesmo em pessoas saudáveis. Medições comparáveis necessitam sempre das mesmas condições (condições tranquilas)! **Se as variações nas leituras forem superiores a 15 mmHg, e/ou se você ouvir sons de pulso irregulares, consulte o seu médico.**

Para receber a liberação para o mercado das entidades governamentais, este monitor foi submetido a testes clínicos rigorosos. O programa de computador usado para medir a pressão arterial foi testado por especialistas cardíacos na Alemanha.

A fabricação do seu monitor de pressão arterial Pro Check está em conformidade com os termos do padrão europeu para monitores de medição de pressão arterial (veja as informações técnicas) sob supervisão da Associação Técnica de Monitoramento de Essen (RWTÜV-Essen).

- Realize a sua medição quando a sua temperatura corporal estiver normal. Se você estiver sentindo calor ou frio você deve esperar sua temperatura se normalizar antes de realizar a medição;
- Se o monitor estiver num local muito quente ou muito frio leve-o para uma temperatura mais amena e aguarde uns 15 minutos antes de realizar a sua medição;
- O uso inadequado deste monitor pode gerar resultados incorretos! Não utilize o Monitor de Pressão Arterial Pro Check Modelo UAAOXB-H de qualquer forma não descrita neste manual;
- As baterias podem danificar a unidade se ficarem muito tempo nela. Portanto, é recomendado que elas sejam removidas se o monitor for ficar sem uso por longos períodos;
- O monitor não deve ser manuseado por crianças!
- Caso tenha dúvidas quanto ao seu correto manuseio, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC;
- O Monitor de Pressão Arterial Pro Check Modelo UAAOXB-H não deve ser utilizado em medições invasivas.
- As baterias podem danificar a unidade se ficarem muito tempo nela. Portanto, é recomendado que elas sejam removidas se o monitor for ficar sem uso por longos períodos;

28 • UAAOXB-H





• As baterias podem danificar a unidade se ficarem muito tempo nela. Portanto, é recomendado que elas sejam removidas se o monitor for ficar sem uso por longos períodos;

- O monitor não deve ser manuseado por crianças!
- Caso tenha dúvidas quanto ao seu correto manuseio, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC;
- O Monitor de Pressão Arterial Pro Check Modelo UAAOXB-H não deve ser utilizado em medições invasivas.

9. Certificados

Padrão do monitor: este monitor corresponde às requisições dos padrões europeus e norte-americanos para monitores de pressão arterial não-invasivos.

EN1060-1/ 12:95

EN1060-3/ 09:97

DIN 58130, NIBP – investigação clínica

ANSI / AAMI SP10, NIBP – requisições

Compatibilidade eletromagnética:

Este monitor atende aos requisitos do padrão europeu EN 60601-1-2.

Testes clínicos: foram conduzidos testes de desempenho clínico nos Estados Unidos e na Alemanha de acordo com a DIN 58130/1997 procedimento N6 (seqüencial) e AAMI padrão (E.U.A.).

Foram atendidos os requisitos das Diretrizes da União Européia 93/42/EWG para Produtos Médicos da Classe IIa.



10. Especificações técnicas

Peso: 265g (com baterias)

Dimensões do monitor: 131 (L) x 174 (P) x 73 (A)mm

Circunferência do braço: Modelo Adulto: 22 - 32 cm (tamanho padrão que acompanha o monitor)
Modelo Grande: 32 - 42 cm (item opcional)

Dimensões da braçadeira:

Modelo Adulto: 50,0 ± 1 cm (C) x 15 ± 0,5 cm (L) (tamanho padrão que acompanha o monitor)

Modelo Grande: 62 ± 1 cm (C) x 17 ± 0,5 cm (L) (item opcional)

Temperatura de armazenamento: -5°C a +50°C

Umidade: 15% a 85% de umidade relativa máxima

Temperatura de operação: 10°C a 40°C

Visor: visor em cristal líquido

Método de medição: oscilométrico

Sensor de pressão: capacitivo

Faixa de indicação: 0-299 mmHg

Faixa de medição: SIS/DIA: 30 A 280 mmHg / **Pulsação:** 40 a 200 batimentos por minuto

Memória: armazena automaticamente a última medição

Resolução: 1mmHg

Erro máximo de indicação: Pressão SIS/DIA: ± 3 mmHg / **Pulsação:** ± 5% do valor medido

Alimentação: 4 baterias AA de 1,5V



11. Importado por:

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Endereço: Rua São Jorge nº 119 / Quadra 70 – Lote 19 a 21 - Vila São Luiz
Duque de Caxias - RJ - CEP: 25086-110

CNPJ: 06.105.362/0001-23 • Insc. Est.: 77.701.290
SAC: Tel.: (21) 2775-8929 • e-mail: sac@accumed.com.br

Resp. Técnico: Marcos Jordão • CRQ 3a Região: 03212320
Reg. Anvisa no: 80275310004
Fabricante: Onbo Electronics • Ta Laneg Loong Hwa Chen Bao Na ShinShenzhen - China

Rev. 02_15/12/2008

UAAOXB-H • 31

