

Garantia

O Foco Clínico MEDICATE modelo 500 / 500E e seus acessórios têm 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de compra.

A troca deste produto só poderá ser realizada no ponto de venda no máximo até 15 dias da data de compra comprovados pela nota fiscal. Após este período deverá ser encaminhado ao posto de assistência técnica autorizado pela fábrica.

Excluem desta Garantia os seguintes itens:

Lâmpada, defeitos decorrentes de transporte, quebras resultantes de acidentes e desgaste por uso inadequado.

A Garantia ficará automaticamente anulada caso se comprove que:

- Os defeitos apresentados sejam resultantes de adaptação de peças ou acessórios não originais ao produto;
- O aparelho tenha sido aberto ou consertado por pessoas não autorizadas pela fábrica.
- Uso inadequado, procedimentos de longa duração (acima de 10 minutos contínuos)

IMPORTANTE:

- Esta garantia não abrange eventuais despesas com transporte de ida e volta até o posto de assistência técnica e ou fábrica.
- Cabe ao proprietário do aparelho comprovar o prazo de garantia através da nota fiscal de compra e ou certificado de garantia devidamente preenchido.

Durante o período de garantia todo e qualquer reparo deverá ser efetuado somente pela rede de assistência técnica autorizada pela fábrica.



Certificado de Garantia

Cliente _____
Endereço _____
Cidade _____ Estado _____
Telefone _____
Revendedor _____
Endereço _____
Cidade _____ Estado _____
Número da Nota Fiscal _____ Data da Emissão _____

Carimbo e Assinatura do Revendedor

Modelo:

500
 500E

Numero de Série



Fabricado e Distribuído por:

Dorja - Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda

Rua Tonelero, 790 • Lapa

São Paulo • SP • Cep. 05056-001

e-mail: dorja@dorja.com.br • www.dorja.com.br

CNPJ 50.208.271/0001-05 • Indústria Brasileira

Registro Anvisa: 10332179001

Responsável Técnico:

Ricardo Nardelli Escobosa • CREA-SP 0601694023

Este manual não poderá ser copiado ou usado sem prévia autorização por escrito de Dorja - Ind. e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.

Manual de Instruções e Certificado de Garantia Foco Clínico 500 / 500E

Rev.1008

Indicações, Finalidade e Uso


Este aparelho foi projetado para uso clínico e ambulatorial, para as especialidades de ginecologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia, angiologia e estética.

O uso deste equipamento é para procedimentos ambulatoriais de curta duração de tempo, não devendo ser utilizado para outros fins.


A cada 10 minutos de uso contínuo, o produto deverá ser desligado por 10 minutos para resfriamento do seu bloco óptico e carenagem. (compartimento da lâmpada)

Conteúdo desta embalagem:

- A** Conjunto da coluna montada com refletor
- B** Base com rodízios
- C** Manipulos
- D** Cabo de Força

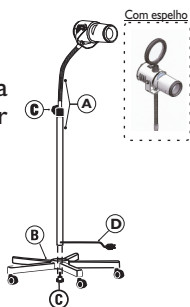


Panel de controle

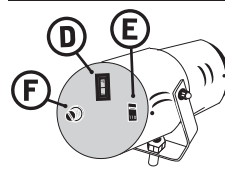


Instruções de Montagem e Uso:

- Remova o manípulo **C** que encontra-se na parte inferior da coluna **A**
- Posicionar a base conforme figura ao lado.
- Colocar o manípulo e rosquear na coluna. Certifique-se que manípulo esteja alinhado, para não danificar a rosca da coluna do foco.
- Pronto, seu foco está montado !
- Selecione a tensão desejada no equipamento **E** 110 ou 220 volt., antes de conectar o pino de força na tomada **G**
- Conecte o pino de força na tomada **G**
- Acione a chave Liga-Desliga **D**

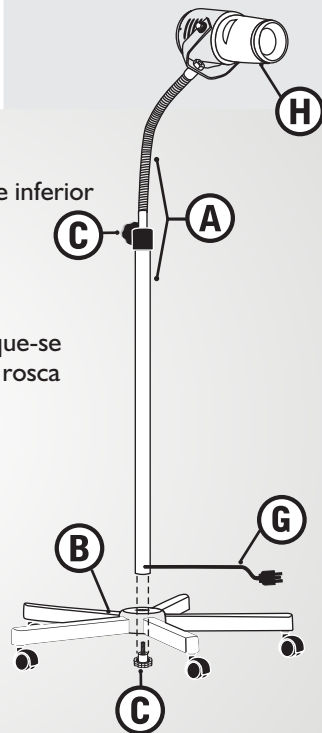

Instruções para substituir a lâmpada:

- Certifique-se de que o foco esteja desconectado da rede elétrica.
- Com uma chave phillips, remova o parafuso que encontra-se na parte inferior frontal do refletor.
- Puxe o conjunto da lâmpada para fora e desconecte o soquete.
- Proceda a desmontagem conforme figura ao lado, removendo a lâmpada 50 watt - 12 volt - halógena branca (ref.500.1)

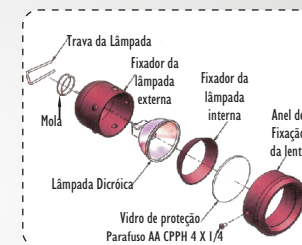

Cuidados e Manutenções

- Procure sempre desligar o foco após o uso, preservando desta forma, a vida útil da lâmpada.
- Mantenha a lente sempre limpa.
- Verifique sempre a voltagem antes de conectar o equipamento na rede elétrica.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

SINTOMA	VERIFICAR	MEDIDA
O foco não liga	Verificar se há energia na rede elétrica	Aguardar retorno da energia
O foco liga mas produz uma luz fraca	Verificar a E chave de tensão 110 / 220 volt.	Colocar na tensão correta
O foco ligou mas desligou em seguida.	Verificar a chave de tensão está na posição correta	Colocar na tensão correta
	Verificar o fusível de proteção F	Tirar o cabo de força da tomada; abrir a tampa do porta fusível e proceder a troca do fusível caso esteja queimado. Atenção!!! Use sempre fusível de ação rápida Potência de 5A - 2cm..
Nenhuma solução foi encontrada.		Entrar em contato com a rede de assistência técnica ou o serviço de atendimento ao consumidor sac@dorja.com.br ou pelo telefone (11) 3872.4266