

**P**

# power one 675charger

## Volume de fornecimento

- 1 x carregador **power one 675charger**
- 1 x cabo de ligação do carregador / fonte de alimentação para a pilha
- 1 x adaptador de rede com interface USB para cabo de ligação
- 1 x conjunto de adaptadores de fichas para o adaptador de rede com 4 diferentes tomadas internacionais

## Manual de instruções

Exmo. cliente,

**Muito obrigada pela aquisição do carregador power one p675 ACCU plus. Adquiriu um sistema de carregamento rápido moderno e seguro, para pilhas recarregáveis power one p675 ACCU plus para aparelhos auditivos. Para uma aplicação do aparelho sem quaisquer problemas, recomendamos que leia cuidadosamente o manual de instruções que se segue.**

### 1. Descrição

O carregador **power one 675charger** foi concebido para o carregamento de uma ou duas pilhas ACCU plus para aparelhos auditivos. O aparelho carrega as pilhas power one 675 ACCU plus dentro de 5 horas (apenas com pilhas completamente descarregadas / as pilhas parcialmente carregadas são primeiro automaticamente descarregadas, por razões de segurança e para uma maior durabilidade da pilha / protecção Refreshing).

**Para o carregador power one 675charger utilize apenas pilhas recarregáveis da marca power one ACCU plus.**

### 2. Utilização

Abra a embalagem e verifique se o material fornecido está completo e em perfeitas condições.

Para efectuar o carregamento da pilha, retire o cabo de ligação fornecido, estenda-o no comprimento pretendido (para desenrolar puxar ambas as extremidades simultaneamente!) e ligue a ficha fêmea ao contacto de encaixe no carregador power one 675: o contacto de encaixe encontra-se na parte traseira recta do carregador. Ligue a ficha USB na outra extremidade do cabo de ligação a uma fonte de corrente adequada. O adaptador de rede contido no fornecimento permite a ligação da tomada USB a uma tomada. Os adaptadores de ficha (um total de quatro diferentes adaptadores) do adaptador de rede podem ser substituídos e seleccionados de acordo com o país ou região onde se encontra.

Também pode operar o carregador através da ficha USB, ligando-a directamente a uma interface USB de um computador de secretária ou portátil. Outra possibilidade de carregamento é a ligação da ficha USB a um adaptador para ligação de isqueiro ou outras ligações de 12 Volt no automóvel (o adaptador não está incluído no volume de fornecimento).

Agora o carregador **power one 675charger** está operacional e pode ser utilizado para o carregamento de pilhas de níquel híbridas para aparelhos auditivos do carregador **power one p675 ACCU plus**. Para tal, desloque a tampa prateada do carregador em direcção à parte redonda.

Introduza uma ou duas pilhas de níquel híbridas para aparelhos auditivos **power one p675 ACCU plus** no compartimento das pilhas previsto para o efeito, com o pólo + (lado plano da pilha) virado para baixo. Verifique a correcta polaridade ao inserir as pilhas. Em caso de polaridade errado ou uma pilha defeituosa serão emitidos sinais luminosos intermitentes (aceso durante 0,1 seg e desligado durante 0,1 seg).

Neste caso, não é efectuado qualquer carregamento. Volte a fechar a tampa deslizante prateada. A tampa tem de estar fechada, para que a(s) pilha(s) seja(m) carregada(s). O processo de carregamento das pilhas de níquel híbridas para aparelhos auditivos é indicado através de uma luz verde a piscar .

O carregador **power one 675charger** verifica automaticamente o estado de carga da pilha de níquel híbrida inserida. As pilhas descarregadas no aparelho auditivo são totalmente carregadas no espaço 5 horas. Assim que o processo de carregamento termina, a luz verde intermitente comuta para contínuo e pode retirar as pilhas carregadas para serem usadas no seu aparelho auditivo.

### 3. Indicações de conservação para pilhas recarregáveis de NiMH

Manter as superfícies de contacto das pilhas recarregáveis, bem como o aparelho, sempre limpos. Para manter a melhor capacidade e durabilidade, evite a descarga profunda ou o curto-circuito das pilhas. Após um longo período sem utilização, a capacidade total só é novamente atingida após alguns ciclos de carga e descarga.

## Imagens (ver última página)

1. Carregador **power one 675charger**
2. Cabo de ligação USB / ficha fêmea
3. Fonte de alimentação com adaptadores de ficha possíveis de substituir
4. Pilhas de NiMH para aparelhos auditivos **power one ACCU plus** adequadas (não incluídas no volume de fornecimento)