



Ortus, empresa brasileira fabricante de produtos para saúde, desenvolve equipamentos de alta tecnologia que visam sempre a qualidade e satisfação de cada cliente.

Bioscaler Jato de Bicarbonato e Ultrassom Piezoelétrico

MISSÃO DA ORTUS

Garantir a qualidade dos produtos e processos, priorizando a inovação tecnológica e valorizando a responsabilidade sócio-ambiental.

POLÍTICA AMBIENTAL E DA QUALIDADE ORTUS

A Ortus Indústria e Comércio LTDA, estabelecida na Rua Santos Dumont, 2748, Jardim Cidade Verde em Campo Mourão, Paraná, Brasil, fabrica equipamentos para atender a área da saúde, tendo como escopo à satisfação das necessidades do cliente e o bom funcionamento da organização. Todos os colaboradores assumem a responsabilidade de garantir a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, fornecendo produtos e serviços com qualidade superior. A melhoria contínua dos processos é o nosso principal objetivo e é suportada através da liderança, do comprometimento e do trabalho em equipe.

Ficamos felizes por ter escolhido a Ortus.

Elaboramos este manual com a finalidade de orientá-lo sobre a melhor forma de utilizar seu Bioscaler.

Agradecemos a todos os nossos parceiros e colaboradores por nos ajudarem na melhoria contínua e na inovação de nossos produtos e serviços.

Para quaisquer observações ou sugestões sobre nossos produtos, por favor entre em contato com o CAC - Central de Atendimento ao Cliente através do endereço abaixo.

CAC - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Ortus Indústria e Comércio Ltda.
Rua Santos Dumont, 2748- CEP 87303-250
Campo Mourão, Paraná - Brasil.
Fone/Fax: 44 3529 1619
E-mail: info@ortus.com.br

Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira
07:45 às 12:00
13:30 às 18:00

APRESENTAÇÃO

O Bioscaler é desenvolvido com o mais alto nível de tecnologia para atendê-lo na importante função de profilaxia dentária na área de periodontia, sendo utilizado com rapidez e confiabilidade em clínicas e consultórios odontológicos. Para outras especialidades como Endodontia, Dentística, Prótese e Odontopediatria é necessária a aquisição de insertos adequados aos respectivos procedimentos.

Para garantir a qualidade e segurança nos seus processos, a ORTUS tem se dedicado na pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias, procurando, desse modo, obter o mais alto nível de qualidade e satisfação de nossos clientes.

Este manual tem por finalidade familiarizá-lo com as características de funcionamento de seu Bioscaler e preveni-lo quanto aos cuidados que devem ser tomados para que sejam atingidos resultados mais satisfatórios na sua utilização, assim como aumentar a vida útil do equipamento.



Ortus Indústria e Comércio Ltda.
Rua Santos Dumont, 2748 - Jd. Cidade Verde
Campo Mourão - PR - Brasil
CEP 87303-250
CNPJ 73.279.044/0001-76
Inscr. Est. 90237603-87

Responsável Técnico
Eng. Alexandre Zardo
CREA PR - 78560/D

ÍNDICE

Advertências e precauções	05
Instalação do Bioscaler	06
Importante	07
Medidas de segurança	07
Cuidados especiais	07
Especificações técnicas	08
Esclarecimento do produto	09
Sistema elétrico de segurança	09
Removendo a capa do transdutor	09
Substituindo o Inserto	10
Ponta do jato de bicarbonato	10
Conexão de ar	11
Reservatório de bicarbonato	11
Estojo autoclavável	12
Painel traseiro	12
Lacre de fábrica	13
Reservatório de líquidos	13
Painel de comando	13
Trabalhando com o Jato de Bicarbonato	14
Trabalhando com o Ultrassom	15
Como Identificar seu Bioscaler.....	16
Insertos	16
Dificuldades, causas e soluções.....	17
Legenda de símbolos	18
Formulário de garantia	19
Orientação para disposição final do equipamento	19
Links de interesse	20
Rede de Assistência Técnica Autorizada	21

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL ANTES DE USAR SEU BIOSCALER
POIS O USO INCORRETO PODE RESULTAR EM DANOS AO
EQUIPAMENTO E/OU ACIDENTES.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- ▶ Use óculos e máscara durante o procedimento;
- ▶ O uso do jato de bicarbonato não é indicado para pacientes com alterações renais e que se submetem a hemodiálise, pois o bicarbonato seria uma sobrecarga. Neste caso, recomendamos orientação médica antes do procedimento odontológico;
- ▶ Para pacientes e Profissionais portadores de marca-passo cardíaco, desaconselha-se o uso do Bioscaler pois, pode haver interferência do ultrassom. Procure orientação médica antes de iniciar o procedimento odontológico;
- ▶ As partículas do bicarbonato que ficam no ar durante ou depois do procedimento pode interferir nos males respiratórios de pacientes com problemas pulmonares. Aconselha-se o uso do aparelho em local ventilado;
- ▶ Durante a aplicação do jato de bicarbonato poderá ocorrer sangramento nas áreas onde a gengiva está inflamada. Cabe ao profissional avaliar e aplicar os procedimentos adequados;
- ▶ Certamente o uso do jato ressecará os lábios do paciente ocasionado pelo bicarbonato de sódio, então recomenda-se a aplicação de vaselina líquida ou manteiga de cacau nos lábios antes da aplicação do jato;
- ▶ Não esqueça de esterilizar as partes ativas dos instrumentos que mantém contato íntimo com a cavidade bucal;
- ▶ Instalar o equipamento longe de fontes geradoras de calor, para não danificá-lo;
- ▶ Deve-se usar o jato com moderação em facetas de acrílico das coroas metaloplásticas, pois seu uso excessivo pode causar desgaste desnecessário;
- ▶ Após o uso do ultrassom, o profissional deverá regularizar a superfície do dente com curetas bem afiadas;
- ▶ O estojo e os inserts que acompanham o Bioscaler, deverão ser autoclavados para garantir a maior segurança nos procedimentos.
- ▶ O equipamento deverá ser desconectado da rede elétrica antes de ser limpo e esterilizado, pois evitará a exposição do usuário a choques elétricos;
- ▶ Mergulhar o módulo de controle ou a peça de mão do Bioscaler em quaisquer líquidos, tais como água ou desinfetante não é recomendado pois, certamente a umidade excessiva causará problemas elétricos no produto;
- ▶ Levar somente a manopla do transdutor para a autoclave antes de todo e qualquer procedimento, aumentando ainda mais a confiabilidade nos processos.
- ▶ Não utilizar tanques ultra-sônicas para a limpeza da peça de mão do ultrassom;
- ▶ Inserts para outras especialidades devem ser adquiridos separadamente em casas do ramo.

INSTALAÇÃO DO BIOSCALER

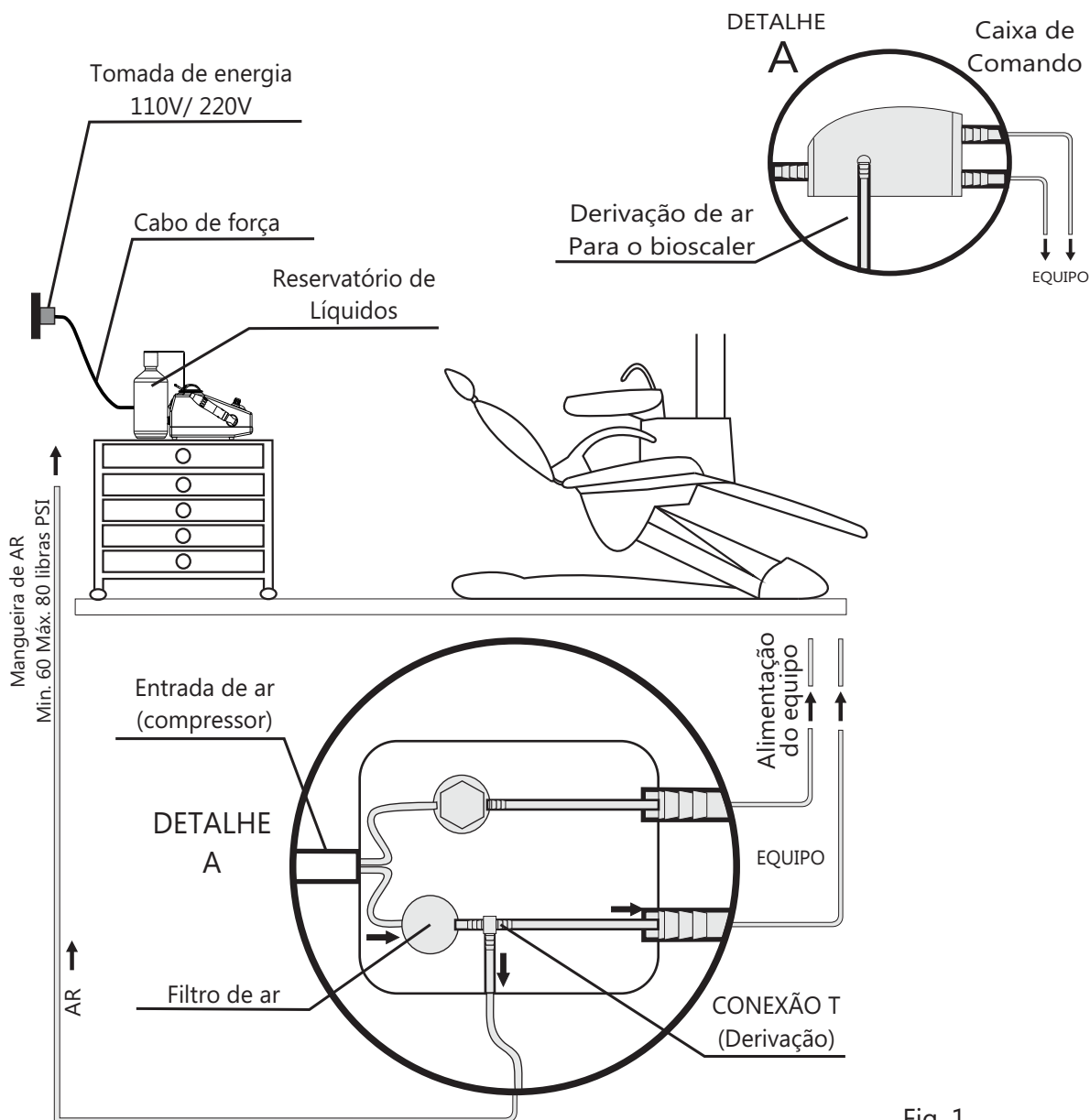


Fig. 1

IMPORTANTE

- ▶ A derivação deverá se encontrar posteriormente ao filtro de ar do consultório ou do equipo;
- ▶ O Bioscaler não necessita da instalação de água do consultório ou qualquer rede externa para opera, pois possui seu próprio reservatório. É importante apenas seguir alguns passos:
 - Antes de utilizar o Bioscaler verifique se o reservatório de água não está vazio;
 - Verifique se a quantidade de líquido no reservatório é o suficiente e não está acima do nível indicado para realizar o procedimento;
 - Certifique-se de que não tenha nenhuma impureza no reservatório de líquidos que possa danificar o equipamento ou o procedimento.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- ▶ Antes de ligar o equipamento e pressionar o pedal confira as ligações externas do Bioscaler;
- ▶ Certifique-se de que as instruções de instalação estão corretas conforme desenho ilustrativo de instalação (Fig. 1, Pág. 6);
- ▶ Certifique-se de que a pressão primária de ar esteja dentro das especificações indicadas na parte traseira do equipamento. Qualquer dúvida contate um técnico;
- ▶ Confira se a tampa do reservatório de bicarbonato está fechada adequadamente para o funcionamento;
- ▶ Ao fechar a tampa do reservatório de bicarbonato aperte-a levemente;

CUIDADOS ESPECIAIS

- ▶ Não exceder o nível de pó no reservatório (marcação em vermelho);
- ▶ Ao recarregar o pó no reservatório, verifique se não há ciscos ou sujeiras além de grânulos aglutinados de bicarbonato de sódio no fundo do reservatório e no pó;
- ▶ Ao utilizar o jato de bicarbonato, deslocar a ponta em movimentos curtos e constantes;
- ▶ Se a peça de mão do ultrassom apresentar aquecimento, significa que está ocorrendo uma ineficiente circulação de líquido na peça, em caso positivo certifique-se de que:
 - O registro de água está totalmente aberto;
 - O reservatório de líquido não está vazio ou não está colocado de maneira correta;
- ▶ A esterilização das peças de mão deverá ser feita em autoclave para melhor segurança do usuário e paciente, jamais utilize estufa no processo de esterilização;
- ▶ Para desinfecção do produto, passar algodão ou gaze embebido em álcool 70°;
- ▶ Como todo aparelho elétrico, não permita que seja manuseado por crianças, mesmo quando desligado;
- ▶ Use somente bicarbonato próprio para uso odontológico.

- Utilizar o spray de bicarbonato com uma distância de 0,5mm até 5mm dos dentes;
- O spray deverá atingir apenas tecidos duros;
- Para o melhor aplainamento da superfície radicular, recomenda-se usar instrumentais manuais após a utilização do ultrassom;
- Procurar utilizar a ponta do inserto para a raspagem, pois esta é a parte efetiva do inserto;
- Recomenda-se, ao utilizar o jato de bicarbonato, incliná-lo com um ângulo de incidência de 45° a 85° em relação a superfície a ser limpa;
- Para uma limpeza eficaz do jato de bicarbonato, realizar movimentos curtos, suaves e rápidos permanecendo por no máximo 30 segundos em cada dente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 90 ~ 240 V;

Dimensões (AxLxC): 185x322x260mm;

Frequência (rede elétrica): 50/60 Hz;

Fusível de Proteção: 2 A/250V;

Peso Líquido: 2,836 Kg;

Consumo de ar: 10 L/min.;

Consumo elétrico: 29 watts/hora;

Capacidade do reservatório de bicarbonato: 40 g;

Pressurização do reservatório de líquidos: 12-15 Lbs;

Capacidade do reservatório líquidos: 450ml;

Frequência do transdutor: 29 a 33 KHz;

Pressão mínima e máxima de ar: 60 a 80 Lbs

Garantia: 1 ano (contra defeito de fabricação).

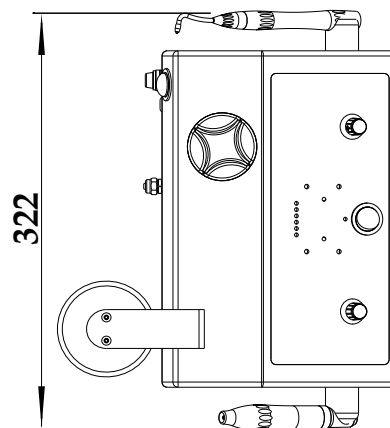
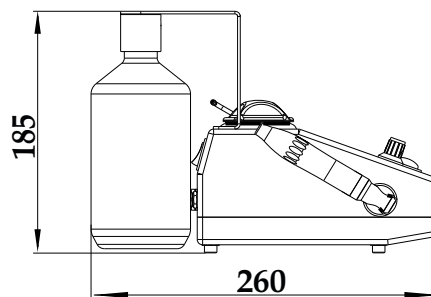



Fig. 2

ESCLARECIMENTO DO PRODUTO


O Bioscaler é um equipamento que trabalha com água e ar sob pressão e vibração ultrasônica, portanto, devem ser manuseados por pessoas devidamente habilitadas e bem informadas quanto às suas características de funcionamento. Em relação a manutenção e calibração, não se faz necessária, este procedimento é realizado na fábrica na etapa de testes. É fundamental que todo operador leia todas as instruções antes de usar o Bioscaler com especial atenção, certificando-se de que as compreendeu claramente.

SISTEMA ELÉTRICO DE SEGURANÇA

- ▶ Para sua segurança certifique-se de que o fusível e a tampa do fusível estejam conectados corretamente. Caso ocorra a queima do mesmo troque-o;
- ▶ Realizar a troca do fusível com o cabo de força desconectado da tomada.

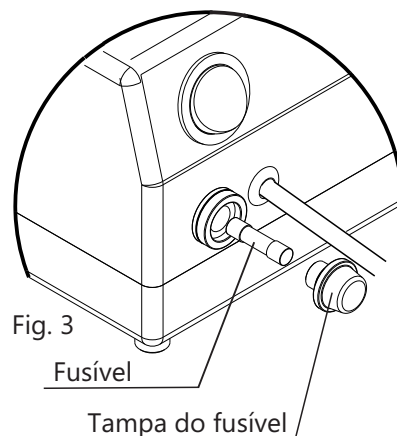


REMOVENDO A CAPA DO TRANSDUTOR

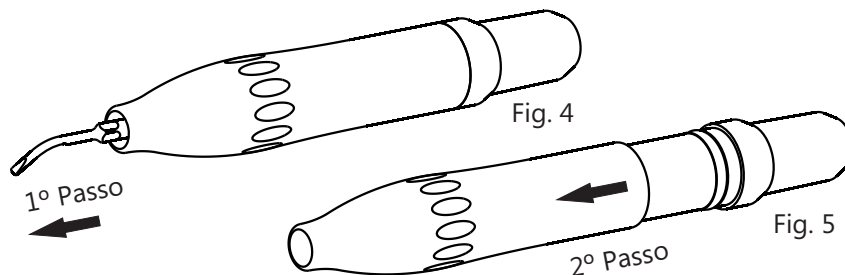


- ▶ Remova o inserto conectado ao transdutor, girando-o com o auxílio da chave de troca no sentido anti-horário;
- ▶ Para remover a capa autoclavável, puxe-a na direção indicada no desenho;

SUBSTITUINDO O INSERTO

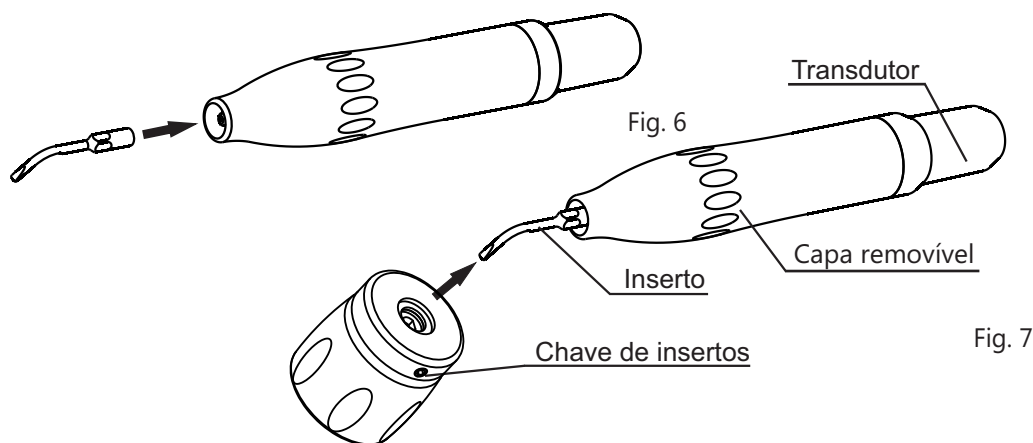

- Para remover o inserto, acople a chave e gire no sentido anti-horário;
 - Acople o novo inserto, e com o auxílio da chave gire no sentido horário até o estalo da mesma;
- Obs. Se ao girar, o inserto não chegar até o final significa que o inserto não é padrão Ortus, portanto não o utilize.

PONTA DO JATO DE BICARBONATO

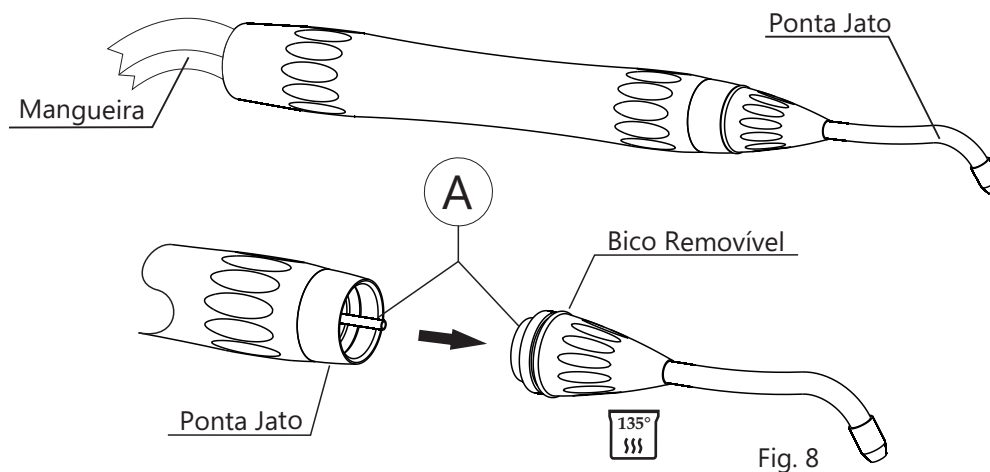

Para autoclavar o bico removível, gire-o no sentido anti-horário até desconectá-lo da ponta;

Para o bom funcionamento do produto e segurança do paciente, ao desconectar o bico removível, limpe com um pano umedecido a área A (Fig. 8, Pág. 10) . Após este procedimento, embale o bico em embalagem apropriada.

CONEXÃO DE AR

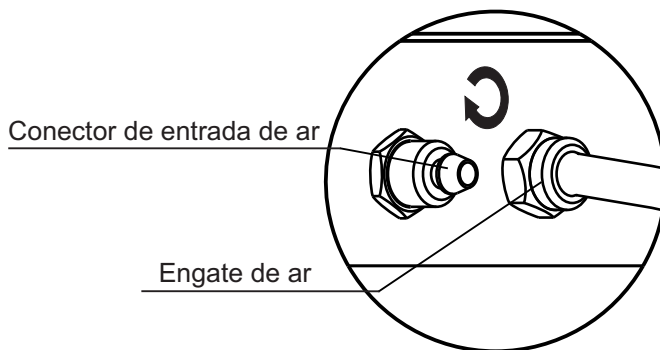


Fig. 9

RESERVATÓRIO DE BICARBONATO

- Retire a tampa do reservatório girando-a no sentido anti-horário.
- Acrescente o bicarbonato dentro do reservatório até a marcação interna em vermelho.
- Coloque a tampa do reservatório girando-a no sentido horário.
- No caso de usar sachê de 40g, depositá-lo inteiramente dentro do recipiente, pois o mesmo já apresenta a quantidade correta para o perfeito funcionamento do Bioscaler. Ao depositar o bicarbonato no reservatório, o mesmo não deverá apresentar-se com pequenos grânulos aglutinados, umedecido e com impurezas.


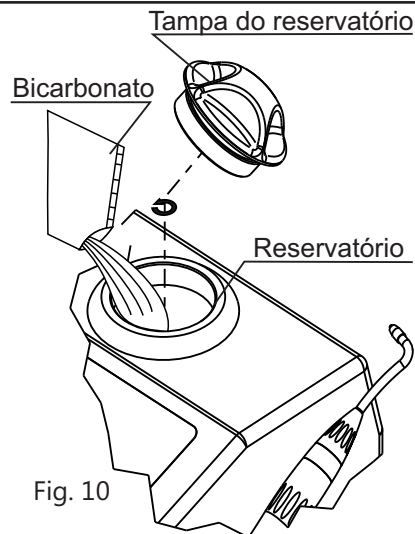


Fig. 10

- No caso de apresentar impurezas, não utilize o pó, troque-o por uma nova dosagem. Assim, evitará o futuro entupimento do equipamento e proporcionará um procedimento mais seguro ao seu paciente. Antes de iniciar o procedimento de profilaxia, certifique-se de que a tampa do reservatório esteja bem apertada no reservatório.


ESTOJO AUTOCLAVÁVEL

- Acomode os insertos a serem esterilizados nos orifícios do estojo;
- Gire a base do estojo 90°, com os insertos acomodados;

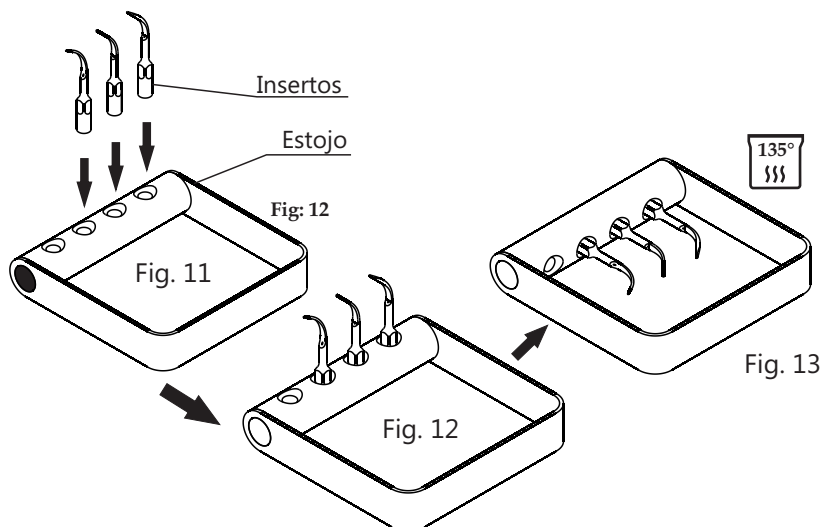


- Em seguida, acomode o estojo com os insertos na embalagem própria para autoclaves e lacre-os corretamente; Seu estojo, juntamente com os acessórios, estão prontos para serem autoclavados.

PAINEL TRASEIRO

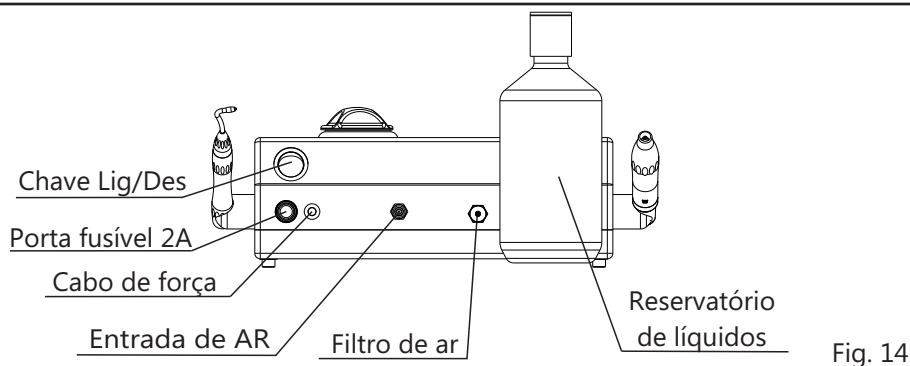

Ao acoplar o engate de ar no conector de entrada de ar, gire no sentido horário (Fig. 9, Pág. 11). Para desacoplar, gire-os no sentido anti-horário. Não é necessário a utilização de chaves e ou ferramentas para o acoplamento. Obs. Pressione a válvula do filtro de ar para que o mesmo seja drenado.

LACRE DE FÁBRICA

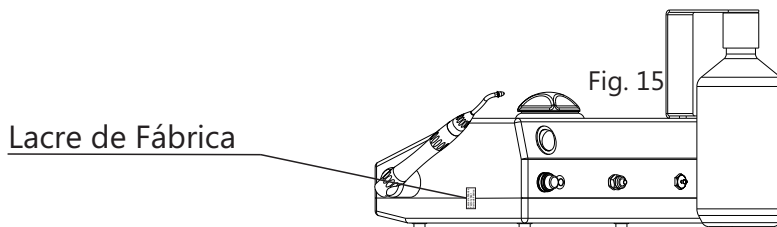

Ao violar o selo de segurança de fábrica do Bioscaler, o produto automaticamente perderá a garantia. Portanto, não viole o selo de garantia e não autorize técnicos não credenciados pela Ortus para prestar serviços em seu aparelho.

RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS

Para abastecer o reservatório, levante levemente a traseira, desacople o reservatório girando-o no sentido anti-horário. Após o abastecimento, acople novamente o reservatório à tampa, girando-o no sentido horário.

IMPORTANTE: É necessário realizar a assepsia do reservatório regularmente, para garantir a segurança do paciente e o bom funcionamento do equipamento.

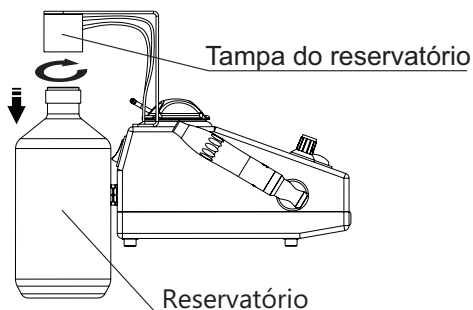


Fig. 16

PAINEL DE COMANDO

- | | | |
|--|---|--|
|  Controle de fluxo da água. |  Função Jato de Bicarbonato. |  Controle de fluxo de ar. |
|  Potência do ultrassom |  Função Ultrassom. | |

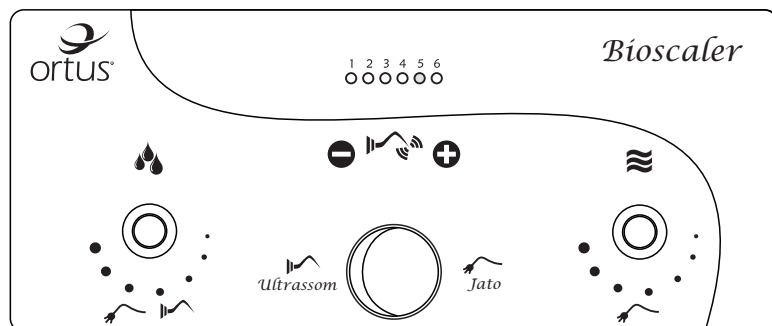


Fig. 17

TRABALHANDO COM O JATO DE BICARBONATO

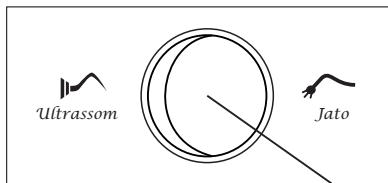


Fig. 18

1- Certifique-se de que as ligações na parte traseira do equipamento estejam corretas

2-Ligue o aparelho pressionando a chave Lig/Desl (Fig. 14, Pág. 12).

Botão seletor de função

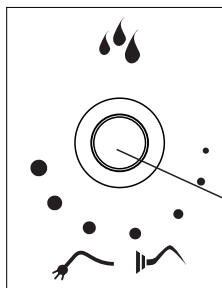


Fig. 19

3-Retire a ponta do jato do suporte;

4- Regule o fluxo de água no botão específico;

Botão de regulagem do fluxo de água

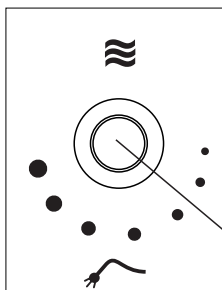


Fig. 20

5- Abra a tampa do reservatório de bicarbonato;

6- Adicione o pó até a marca interna (em vermelho);

7- Feche o reservatório rosqueando a tampa verificando se o recipiente está bem fechado;

8- Regule o fluxo de pó no botão de ar;

9- Para iniciar o procedimento de profilaxia, pressione o pedal acionador.

Botão de regulagem do fluxo de ar e bicarbonato

TRABALHANDO COM O ULTRASSOM

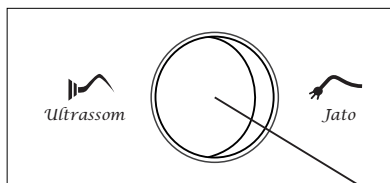


Fig. 21

1- Certifique-se de que as ligações na parte traseira do equipamento estejam corretas;

2-Ligue o aparelho pressionando a chave Lig/Desl (Fig. 14, Pág. 12).

Botão seletor de função

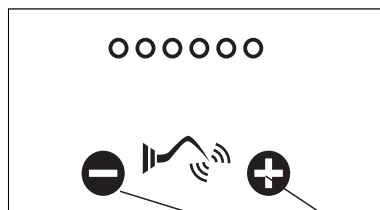


Fig. 22

3-Retire a peça de mão do suporte;

4-Acople o inserto desejado na peça de mão utilizando a chave;

5-Utilizando as teclas de ajuste, regule a potência de acordo com a necessária;

Teclas de ajuste de potência

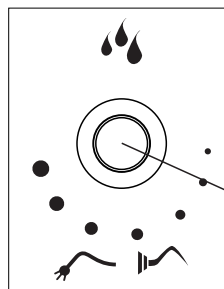


Fig. 23

6- Ajuste o fluxo de água para realizar o trabalho através do botão de regulagem;

7-Pressione o pedal acionador para ativar o transdutor piezoelétrico;

8- Ao final de cada procedimento, desligue o Bioscaler na chave Lig/Desl (Fig. 14, Pág. 12).

Botão de regulagem do fluxo de água



No caso do ultrassom, o ajuste da potência interfere no fluxo de água no inserto. Portanto, a regulagem de água deverá ser feita em função da potência selecionada. Ex: se aumentar a potência aumente o fluxo de água no inserto. Desse modo, o transdutor trabalhará com uma refrigeração satisfatória e o rendimento do trabalho será maior.

COMO IDENTIFICAR SEU BIOSCALER

O rótulo metálico que se encontra na parte inferior do gabinete, tem por finalidade a identificação dos dados técnicos do equipamento.

ATENÇÃO - A remoção do rótulo de identificação, lacre de segurança e/ou quaisquer etiquetas ou adesivos afixados ao produto implicará na perda automática da garantia.

ORTUS IND. E COM. LTDA.
RUA SANTOS DUMONT, 2748 - CAMPO MOURÃO - PR - BRASIL
FONE: 55 44 3529 1619 / 3529 3674 - CEP: 87303-250
CNPJ: 73.279.044/0001-76 I.E.: 90.376.887
INDÚSTRIA BRASILEIRA / MADE IN BRAZIL

ortus

SN **REV** 

MODELO / MODEL Bioscaler	DIMENSÕES (L x A x P) DIMENSIONS 32 x 18,5 x 26 cm	PRESSÃO DA PET / PET PRESSURE / (PET) 12 - 15 Lbs
TENSÃO / POWER 90 - 240 V 	PESO LÍQUIDO NET WEIGHT / 2,0 Kg	CAP. RESERVATÓRIO BICARBONATO / RESERVOIR CAPACITY 40,0 g
REGISTRO ANVISA / ANVISA REGISTER 80164030004 RESPONSÁVEL TÉCNICO / RESPONSIBLE TECHNICIAN ALEXANDRE ZARDO CREA PR 78560/D		
FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA / ULTRASONIC FREQUENCY 29 - 33 kHz		FREQUÊNCIA / FREQUENCY 50 / 60 Hz
PRODUTO: APARELHO PARA ELIMINAÇÃO DE TÁRTARO SUB E SUPRA GENGIVAL PRODUCT: PIEZOELECTRIC DENTAL SCALER		
INSTRUÇÕES DE USO, PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO: CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES USE INSTRUCTIONS, PRECAUTIONS, CONSERVATION AND STORAGE: SEE INSTRUCTION MANUAL		

Fig. 24

Obs: O rótulo aqui apresentado é somente um modelo para referência.

INSERTOS



Os inserts acima são disponibilizados juntamente com seu Bioscaler, para os demais modelos, vide catálogo de inserts, podendo ser adquiridos separadamente.


DIFICULDADES, CAUSAS E SOLUÇÕES

ATENÇÃO! Para qualquer substituição de peças contatar o fabricante ou a Assistência Técnica Autorizada. Não recomendamos a troca de peças por pessoas não habilitadas pela Ortus.

Relacionamos a seguir os problemas mais frequentes e as possíveis soluções que poderão ser realizadas pelo usuário:

DIFICULDADE	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
O equipamento está ligado, mas não há fluxo de água nem vibração	- O pedal de acionamento está danificado.	- Consulte a rede de assistência técnica autorizada.
O aparelho está operante mas não existe fluxo de água.	- Garrafa PET vazia; - Registro de fluxo no mínimo; - PET mal rosqueada; - Registro com defeito.	- Recarregue a PET; - Ajuste o registro de fluxo; - Aperte o reservatório com firmeza até vedá-lo corretamente; - Contate a rede de assistência técnica autorizada.
Vazamento na tampa do reservatório de bicarbonato	Anel de vedação e assento sujos.	Retirar o anel de vedação preto localizado abaixo da borda do reservatório, limpe-o com álcool 90° e, em seguida, recoloque o anel no assento.
Vazamento no encaixe da ponta do jato.	Ponta do jato mal conectada.	Apertar a ponta com maior pressão.
Vibração baixa.	Seletor de ajuste de potência está no mínimo.	Reajuste a potência para mais.
Fluxo de água do transdutor está OK, mas não existe movimento vibratório	- O inserto não está devidamente apertado; - O tipo de inserto utilizado não está adequado; - O transdutor está danificado.	- Aperte um pouco mais o inserto; - Substitua o inserto; - Consulte a rede de assistência técnica autorizada.
A potência de vibração não pode ser ajustada	- A placa de controle está danificada; - Teclas de ajuste estão danificadas.	- Consulte a rede de assistência técnica autorizada.

LEGENDA DE SÍMBOLOS

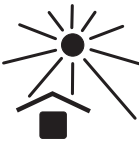	Advertência, consulte manual de instruções		Fabricante
	Autoclavável		Frágil - manuseie com cuidado
	Corrente alternada		Mantenha seco
	Data de fabricação		Revisão de alterações
	Empilhamento máximo		Número de série
	Equipamento Classe II		Proteja da luz solar
	Equipamento Tipo B		Reciclável
	Este lado para cima		

FORMULÁRIO DE GARANTIA

Nome		
Especialidade		
CNPJ/CPF	E-mail	
Endereço		
Bairro	Cidade	UF
CEP	Fone	Fax
Nº Nota Fiscal	Data da Emissão	/ /
Revendedor		
Modelo	Bioscaler	Voltagem
Nº Série / Lote	Data de Fabricação	/ /
Descrição do Problema		

Não destaque este formulário, preencha-o e guarde para utilização caso necessite de Assistência Técnica. Envie o formulário (Pág. 28) para a Ortus o mais breve possível, juntamente com uma cópia da nota fiscal. Em caso de alteração de endereço, por favor, informe a Ortus imediatamente através do e-mail info@ortus.com.br.

ORIENTAÇÃO PARA DISPOSIÇÃO FINAL DO EQUIPAMENTO

O meio ambiente é um bem de todos os cidadãos, portanto cabe a cada um de nós tomarmos atitudes que visem a sua preservação e/ou redução dos danos causados pelas atividades humanas a este bem tão importante.

Todos os equipamentos possuem um período de vida útil, sendo que não é possível precisar esta duração, pois isso varia de acordo com a intensidade e a forma de uso.

A ORTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, reafirmando sua preocupação com o meio ambiente, orienta ao usuário de seus produtos a busca da melhor disposição no momento do descarte do seu equipamento ou de seus componentes, levando em consideração a legislação brasileira de reciclagem de materiais vigente.

Desde já, a Ortus orienta que o equipamento seja encaminhado às empresas especializadas em reciclagem que, devido ao desenvolvimento contínuo e acelerado de novas tecnologias de reciclagem e de reutilização de materiais, propiciam a melhor forma de descarte dos mesmos. A Ortus procura assim, contribuir para a redução do consumo de matérias-primas não renováveis.

LINKS DE INTERESSE

Mantenha-se sempre atualizado(a) com as constantes mudanças na legislação e a publicação da literatura científica pertinente através dos links abaixo.

www.anvisa.gov.br	Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
www.ccih.med.br	Site do livro Infecções Hospitalares e suas interfaces na Área da Saúde coord. Dr. Antonio Tadeu Fernandes, área médica.
www.cdc.gov	Centers for Disease Control and Prevention Office of Health and Safety- em inglês.
www.ortus.com.br	Website da Ortus.
www.cvs.saude.sp.gov.br	Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
www.fob.usp.br	Faculdade de Odontologia de Bauru.
www.riscobiologico.org	Risco Biológico, debates e matérias sobre o tema.
www.saude.gov.br	Ministério da Saúde.
www.saude.pr.gov.br	Secretaria da Saúde do Estado do Paraná.
www.saude.sp.gov.br	Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (Procure também o site do seu estado).

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA - ATUALIZADA EM 19/01/2011

ACRE	Fone: (0**71) 3356-3393 / 3356-5288	(0**28) 9968-9227 (Giovany) E-mail: dental_sul@terra.com.br
<u>RIO BRANCO</u> Sertec Rua Marechal Deodoro, 837 - Centro Fone: (0**68) 3222-7540 / 9971-3398	Mercap Rua Barbosa Lima Sobrinho, 41 Gleba GSTF - Mussurunga IFone: (0**71) 3252-9706 / 9148-1355	<u>LINHARES</u> Ritec Av. Das Gaivotas, 910 A - Residencial Gaivotas Fone: (0**27) 3371-1644
ALAGOAS	Tecnoclave Rua Dom João VI, 503 - Sl.210, Ed. San Diego - Brotas Fone: (0**71) 3013-1669 / 8804-9455 (Marivaldo)	<u>VITÓRIA</u> Astecom Rua Lisandro Nicollete, 221, Loja 01 - Cruzamento Fone: (0**27) 3222-1426 / 9999-1548
<u>MACEIÓ</u> Opção Assistência Técnica Rua Dias Cabral, 218 - Centro Fone: (0**82) 3326-4171	<u>TEIXEIRA DE FREITAS</u> Odontomelo Hayashibara Rua Walt Disney, 50 - Vilas Vargas Fone: (0**73) 3011-9300 / 3011-8399	Dental Atlântico Av. Nossa Senhora da Penha, 1495, Loja 03 - Edif. Corporate Center - Santa Luzia Fone: (0**27) 3324-1406 / 3225-1599
AMAZONAS	CEARÁ	GOIÁS
<u>MANAUS</u> High Precision Com. e Rep. Ltda. Av. Presidente Castelo Branco, 1936A - Cachoeirinha CEP: 69065-011 Fone: (0**92) 3087-2518 / 3657-4574	<u>CAUCAIA</u> Dental Nordeste Rua 339, 26 - Nova Metrópole Fone: (0**85) 3213-3774 / 8876-9121	<u>ANÁPOLIS</u> Multiservice Av. Universitária, 1892 - Vl. Santa Isabel Fone: (0**62) 3387-2692
Lincer Cj Jardim do Edem - Rua "A", 04 - Alvorada I Fone: (0**92) 3657-4574 / 9128-6681	<u>FORTALEZA</u> Dental Nordeste Rua 339, 26 - Nova Metrópole Fone: (0**85) 3213-3774 / 8876-9121	<u>ARAGARCAS</u> RC Equipamentos Rua Maria Providência Barbosa, 307 Fone: (0**64) 3638-3378 / (0**66) 9991-5663 / (0**66) 9982-6844
BAHIA	DISTRITO FEDERAL	<u>CALDAS NOVAS</u> Tecnocaldas Av. Dos Turistas Qd.05 Lt. 01, S / N° - Jd. Dos Turistas Fone: (0**64) 3454-1309
<u>FEIRA DE SANTANA</u> Mercap Rua Flamengo, 215, Gabriela Fone: (0**75) 3624-6515	<u>BRASÍLIA</u> Taguatec C 09, Lote 13, Sala 202 - Edifício Castilho Fone: (0**61) 3562-1995 / 3562-0310 / 8571-4395	<u>GOIÂNIA</u> Biotek Odonto-Hospitalar Av. Fued Jose Sebbá, 389 - Quadra 31- Lote 06 St Leste Universitário Fone: (0**62) 3218-2300 / 9979-9410
<u>ILHÉUS</u> Durklein Hospitalar Rua Visconde de Mauá, 230 - Centro Fone: (0**73) 3634-6000 / 9981-6000	Odonto-Medica Costa ST SCLN, 311 - Bloco C, Loja 58, subsolo - Asa Norte Fone: (0**61) 3340-7588	Hospcom Rua 104, 74 Qd F-21, LT.10 Fone: (0**62) 3241-5555 / 8117-8527
<u>ITABUNA</u> Odontonorte Rua Miguel Calmon, 195 - Centro Fone: (0**73) 3613-9810 / 8857-9810	O P F Com. Serv. Equip. Ltda. SRTVN Quadra 702 - Ed. Brasília Rádio Center - Sobreloja 31 - Asa Norte Fone: (0**61) 3034-4080 / 7813-8595 (Osvaldo)	SOS Equipamentos Rua 68, 357 - Centro Fone: (0**62) 3212-2023 / 3223-3481
<u>JEQUIÉ</u> Eletromed Rua Felipe Nery, 93 - Jequiezinho Fone: (0**73) 9999-6642 / 8842-5453	<u>TAGUATINGA</u> Taguatec C 09, Lote 13, Sala 202 - Edifício Castilho Fone: (0**61) 3562-1995 / 3562-0310 / 8571-4395	<u>ITUMBIARA</u> Odonto ITA Av. Adelina Alves Vilela, 79 - Jardim Primavera Fone: (0**64) 3430-2023
Tecnodonto Rua D Urbis 3, 5 - Jequiezinho Fone: (0**73) 3527-7805	ESPÍRITO SANTO	
<u>SALVADOR</u> Maxxi Doctor Av. General Graça Lessa, 100 - Acupe de Brotas	<u>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</u> Dental Sul Rua Samuel Levy, 357 - Aquidabam Fone (0**28) 3521-3776 (0**28) 9945-0178 (Abílio)	

Esta lista está sujeita a alterações, entre em contato pelo fone
(44) 3529-1619 para verificar possíveis atualizações.

RIO VERDE

Odonto Medica Rio Verde
Av. Presidente Vargas, 307 - AP. 101, SL 1 - Setor Central
Fone: (0**64) 3621-1799
CEP: 75901-040

MARANHÃO

SÃO LUIZ

Quark Eletrônica
Cj. Planaldo Anil III, 04
Fone: (0**98) 3238-0285 / 3238-7034

Shiemann - TEC

AV. Castelo Branco, 559 - E. Tóquio
Fone: (0**98) 3227-2546

MATO GROSSO

CUIABÁ

R D Odonto
Av. Beira Rio, 3772 - Dom Aquino
Fone: (0**65) 3634-2387 / 9983-1587

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

Briato Comercio Médico Hospitalar e Serviços
Rua Rui Barbosa, 1901 - Centro
Fone: (0**67) 3026-1243
CEP: 79004-441

J B Assist Téc

Rua Sete de Setembro, 1042 - Centro
Fone: (0**67) 3383-3992

DOURADOS

Anesterilav
Av. Presidente Vargas, 2105 - VI Progresso
Fone: (0**67) 3421-8673 / 9971-6449

Washington Orlando Popin & Cia Ltda.

(Inga Max)
Av. Joaquim Teixeira Alves, 2211 - Jardim Climax Fone:
(0**67) 3421-0197

NOVA ANDRADINA

Odontonan Assist Téc
Rua Joaquim Sampaio Neto, 2012 - Guiomar S Andrade
Fone: (0**67) 3441-5484 / 9918-8594

MINAS GERAIS

ALTO CAPARAÓ

Centro Tecnológico
Rua Carolina Martins Tavares, 282 - Serra Monte
Fone: (0**32) 3747-2800 / (0**33) 8416-6891 /

(0**33) 8471-8096 (Inácio)

ANDRADAS

Mauricio Tavares
Rua Paulo Sergio Mosconi, 242 - Jd. Itália
Fone: (0**35) 3731-2388

BELO HORIZONTE

Central Técnica
Rua Castro Alves, 184 - Nova Suíça
Fone: (0**31) 3371-3121 / 9957-3064

Dental Técnica

Rua Castro Menezes, 100 - Santa Maria
Fone: (0**31) 3388-1375 / 8801-0062

Odontobrasil Periféricos Odont. Ltda.

Rua Cel. Leri Santos, 202 - Planalto
Fone: (0**31) 3495-1609

Odonto Center Manutenção Técnica

Rua Maria Toledo de Paiva, 05
Fone: (0**31) 3493-1306

Odontomax

Av. Josefino Gonçalves da Silva, 151 - Goiânia
Fone: (0**31) 3488-6669 / 9634-2521

Protécnica

Rua Visconde de Taunay, 197 - São Lucas
Fone: (0**31) 3223-2666

CARATINGA

Odonto Ramos
Av. Olegario Maciel, 82 - Sala 102 - Centro
Fone: (0**33) 3322-3585 / 8845-3585

CONSELHEIRO LAFAIETE

Top Equipamentos
Rua Jorge Zacarias Mafus, 42, Centro
Fone: (0**31) 3763-7388 / 8899-1533
CEP: 36400-000

CORONEL FABRICIANO

Equipodontio
Rua Dom Bosco, 34 - Centro
FONE: (0**31) 3841-2263
CEP: 35170-031

FORMIGA

Odontotec Ltda.
Av. Dr. Henrique Braga, 233A, 2º Andar - Centro
Fone: (0**37) 3321-1288 / 3321-3876

GOVERNADOR VALADARES

Prodonleste
Rua Francisco Sales, 200 - Centro

Fone: (0**33) 3276-3606 / 9191-3231

SOS Odonto

Rua Ribeiro Junqueira, 261 - Esplanada
Fone: (0**33) 3271-4636 / 3272-1109

IPATINGA

Atecdonto
Rua Equador, 132 - Cariru
Fone: (0**31) 3825-1328 / 9988-6328
CEP: 35160-098

Jotécnica

Rua Sabará, 113A - Centro
Fone (0**31) 3821-7844 / 9944-5570

ITABIRA

Odontomed
Rua dos Cravos, 841 - São Pedro
Fone: (0**31) 3831-2948 / 9995-4719

ITAJUBÁ

Reinke Assistência Técnica
Rua José Verano da Silva, 101 - Cruzeiro
Fone: (0**35) 3622-4392 / 3622-1445

JUIZ DE FORA

Equotec
Rua Barbosa Lima, 161 - Centro
Fone: (0**32) 3215-3584 / 9112-8263

Odontotecnica

Rua Halfeld, 513 sala 204 - Centro
Fone: (0**32) 3215-7411 / 3211-5958

LAVRAS

Odontecnica Lavrense
Rua Dep. Castejon Branco, 105A - Jd Fabiana
Fone: (0**35) 3822-1892 / 9979-1667

MONTES CLAROS

Odontonorte
Av. Dep. Esteves Rodrigues, 920 Lj 01 - Centro
Fone: (0**38) 3221-6684 / 3221-6582

Odonto & Service

Rua Januaria, 704, Centro
Fone: (0**38) 3221-9137 / 3221-9007

Odonto & Medic de Montes Claros Ltda.

Av. Cula Mangabeira, 593, Santo Expedito
Fone: (0**38) 3222-4040 / 3084-0342
CEP: 39401-001

PATOS DE MINAS

R P Odontopatos
Rua Padre Almir Neves de Medeiros, 1050 - Sobradinho

Esta lista está sujeita a alterações, entre em contato pelo fone
(44) 3529-1619 para verificar possíveis atualizações.

Fone: (0**34) 3821-9457 / 9103-8728

PONTE NOVA

ANG Dental
Rua João Alves de Oliveira, 168
Fone: (0**31) 8117-5187 / 9125-0802

POUSO ALEGRE

Dorival Jonas Cabral ME
Rua Vivaldi Pereira da Silva, 347 - Aristeu Costa Rios
Fone: (0**35) 8858-0900 / 8819-1093
CEP: 37550-000

SETE LAGOAS

Assistec
Rua Teófilo Otoni, 1021 Lj 13 - Centro
Fone: (0**31) 3773-4923 / 8845-9659

TEÓFILO OTONI

Jetécnica
Rua Epaminondas Otoni, 702 4º andar
SI406 - Edif. Palácio do Comércio - Centro
Fone: (0**33) 3521-4240 / 9985-1345

UBÁ

G-Tec Assistência Técnica
Rua Cel. Carlos Brandão, 99 - Centro
Fone: (0**32) 3532-5666 / 9934-5975

UBERABA

Odontolog
Rua Colatina, 12 - Jd Espírito Santo
Fone: (0**34) 3338-3883 / 9968-2501

Odontoprest

Rua Santo Antonio, 479 - Centro
Fone: (0**34) 3075-4012 / 9978-7108

UBERLÂNDIA

Dental Cerrado
Rua Tenente Virmondes, 982 - Centro
Fone: (0**34) 3231-5383

Odontokraft

Rua Cel. Antonio Alves Pereira, 880 - Centro
Fone: (0**34) 3235-8381

PARÁ

BELÉM

Odontécnica
Trv. Campos Sales, 443 - Campian
Fone: (0**91) 3223-9388 / 3222-9986 / 8120-6371

MARABÁ

Oral Técnica
Rua Miguel David, 1425 - Novo Horizonte

Fone: (0**94) 3012-1367 ou 9134-4346 (Emerson)
CEP: 68503-000

REDENÇÃO

Assistecodont
Rua Barbosa, 472 - Serrinha
Fone: (0**94) 9153-1229 / 9156-7968

PARAÍBA

CAMPINA GRANDE

Medontec
Av. Marechal Floriano Peixoto, 780 - Bodocongo
Fone: (0**83) 3321-8224 / 9971-4035

JOÃO PESSOA

Equipmed
Av. Juarez Tavora, 306, SL103 - Torres
CEP: 58040-021
Fone: (0**83) 3045-0550

PARANÁ

APUCARANA

Eletro Omega
Rua Rio Grande do Sul, 1009 - Jd. Apucarana
Fone: (0**43) 3424-4645 / 9973-1336

CAMBARÁ

M&Z Produtos Hospitalares
Rua Alambari, 1049
Fone: (0**43) 3532-3008 / 3532-3325

CAMPO MOURÃO

Odenciar
Rua Esperança, 319 - Cj. Habitacional Mendes
Fone: (0**44) 3524-2668 / 8819-2776

CASCADEI

Eletro Médica
R. Marechal Candido Rondon, 3171- Cancelli
Fone: (0**45) 3038-0030 / 3037-5900

CIANORTE

Dentalmed
Rua do Engenheiro, 251 - Jardim Universidade I
Fone: (0**44) 3629-3569 / 9977-1994

CORNÉLIO PROCÓPIO

Automatic
Rua Bento Ferraz Campos, 506 - Jd. Bela Vista
Fone: (0**43) 3524-7015 / 9975-0425

CURITIBA

ATAC Equip. e Soluções Odontológicas
Av. Iguaçu, 863 Sala 8 - Rebouças
Fone: (0**41) 3016-9795 / 9902-5491

VTEC

Av. Dias da Rocha Filho, 488 A - Alto da Rua XV
Fone: (0**41) 3263-2427

FOZ DO IGUAÇU

Kalmo Dental
Av. General Meira, 3159 - Ouro Verde
Fone: (0**45) 3223-8375 / 3527-1982

Odontotec

Rua Antônio Raposo, 225 - Centro
Fone: (0**45) 3572-7209 / 9114-6307

FRANCISCO BELTRÃO

Odonto Tec
Rua Sergipe, 991 - Alvorada
Fone: (0**45) 3523-1091 / 9975-0719

LONDRINA

J L Manutenção
Rua Alagoas, 792 - Sala 11, Térreo - Centro
Fone: (0**43) 3324-0032 / 9112-1044

Odonto Ar

Rua Alagoas, 1050 - Centro
Fone: (0**43) 3326-1202 / 9995-7290

MARINGÁ

Oraltec
Rua Silva Jardim, 48 Lj 2 - Zona I
Fone: (0**44) 3031-5060 / 9103-5054

PATO BRANCO

C P dos Santos
Rua Timbira, 256 - Menino de Deus
Fone: (0**46) 3225-7819 / 9972-3073

Eletronic Eletel

Rua Tapejara, 357 - Centro
Fone: (0**46) 3224-5596 / 3224-2277

PONTA GROSSA

Márcio José Delabernarda
Rua Francisco Ribas, 1031, Lj 3 - Centro
Fone: (0**42) 3225-3301 / 8409-7858

UNIÃO DA VITÓRIA

J L Chagas
Rua Colotário Portugal, 882 - Centro
Fone: (0**42) 3222-8453 / 9124-4271 (Jefferson)

PERNAMBUCO

OLINDA

Odontomédica
Rua Benjamin Constant, 117 - Sítio Novo

Esta lista está sujeita a alterações, entre em contato pelo fone
(44) 3529-1619 para verificar possíveis atualizações.

Fone: (0**81) 3243-4571

PETROLINA

Odonto Clav
Rua União, 44 A - Atrás da Banca
Fone: (0**87) 3861-6755 / 8812-6777

RECIFE

Odontomédica
Rua Benjamin Constant, 117 - Sítio Novo
Fone: (0**81) 3243-4571

Odontos Técnica

Rua Franklin Tavora, 900 - Campo Grande
Fone: (0**81) 3243-1600 / 3241-8869

Odontoset

Rua Dr. Carlos Chagas, 136 Sala 03
Fone: (0**81) 3034-1075

PIAUÍ

TERESINA

Odontovida
Rua David Caldas, 449 - Centro
CEP: 64001-190
Fone: (0**86) 3223-8683

Tec-odont

Rua Lisandro Nogueira, 1439 - Centro
Fone: (0**86) 3222-6222 / 9982-6531

RIO DE JANEIRO

ARARUAMA

Eraldo Alves da Silva - ME
Rua Cons. Macedo Soares, Nº 314 SL 204 - Centro
Fone: (0**22) 2665-1171 / 9997-4375

CAMPOS DOS GOYTACAZES

Nova Dental
Rua José F Sanguedo, 205 Lj "A",
Horto Municipal
Fone: (0**22) 2722-7094 / 2733-0906

DUQUE DE CAXIAS

Universal Tec
Rua Nunes Alves, Nº 13 SL 239 - Centro
Fone: (0**21) 3653-2786

ITAPERUNA

Diltec
Rua Buarque de Nazaré, 373 - Centro
Fone: (0**22) 3823-1187 / 9988-9642

NITERÓI

Manzano Assistência Técnica

Rua São João, 227 - Centro
Fone: (0**21) 2621-3906 / 2613-0095

PETRÓPOLIS

Asteco
Rua Dr Nelson de Sa Earp, 45 Sobreloja 9 - Centro
Fone: (0**24) 2243-0575 / 2243-6751

RIO DE JANEIRO

Emformate Empresa Forn. de Materiais Ltda.
Rua Barão de Cotegipe, 325 - Vila Isabel
Fone: (0**21) 2577-3344 / 2577-2241

Fix End Support Máquinas e Equipamentos Ltda. (Filial)

Rua Andradass, 29 - Centro
Fone: (0**21) 2242-2802 / 2242-7456

Fix End Support Máquinas e Equipamentos Ltda. (Matriz)

Rua Lucídio Lago, 96 - Meier
Fone: (0**21) 2261-9460

M N Manutenção

Travessa da Generosidade, 152 - Vila da Penha
Fone: (0**21) 3087-5974 / 3301-7792
Site: www.mnhospitalar.com.br

P L K Equipamentos

Rua Delfina Alves, 221 - Madureira
Fone: (0**21) 2458-9161 / 9962-1259

Willmarc

Est. Campinho, 742 - Campo Grande
Fone: (0**21) 3406-8230 / 2416-3432

VOLTA REDONDA

Odontotec
Lrg Nove de Abril, 26 SL 225 - VI Sta Cecília
Fone: (0**24) 3342-1575 / 3342-0565

TERESÓPOLIS

Diego Eugenio Gil
Av. Delfim Moreira, 1470
Fone: (0**21) 2641-4219

RIO GRANDE DO NORTE

CURRAIS NOVOS

Comedical Serviços Médicos Ltda.
Rua José Milanês, 4 - Centro
Fone: (0**84) 9962-7904 / 8888-5882

NATAL

E.R. Representações
Av. Capitão Mor Gouveia, 1323 - Cidade Nova
Fone: (0**84) 3605-3138 / 9982-2368

PARNAMIRIM

MSK Eletrônica
Rua Cap. Martinho Machado, 1630 - Passagem de Areia
Fone: (0**84) 3272-7428 / 9922-5414

RIO GRANDE DO SUL

BOM PROGRESSO

Wink Assistência
Rua Nove, 281 - Centro
Fone: (0**55) 9954-4604 / 9997-0688

CAXIAS DO SUL

Funek
Rua General Mallet, 209 - Rio Branco
Fone: (0**54) 3215-1822 / 3215-1775
Kieling Ltda
Rua La Salle, 657 - SL 304 - São Pelegrino
Fone: (0**54) 3028-8957

MONTENEGRO

MG DENTAL TÉCNICA
Rua Alberto Gottselig, 123 - Centenário
Fone: (0**51) 3632-9286 / 9957-2162

NOVO HAMBURGO

Dental Técnica
Rua Caçador, 322 - Ideal
Fone: (0**51) 3582-7379 / 9988-1760

Reatech Manutenção em Eletrônica Ltda.
Rua São Francisco de Paula, 149 - Boa Vista
CEP 93410-330
Fone / Fax: (0**51) 3066-9682 - 3036-3030
Email: fabio@reatech.com.br
Site: www.reatech.com.br

PASSO FUNDO

Hospitec Assist Tecn
Av 7 de Setembro, 140 SL 03 - Centro
Fone: (0**54) 3312-3344 / 312-9455

Irmãos Tortelli

Rua Paissandú, 1762 - Boqueirão
Fone: (0**54) 3312-1144 / 3312-1244

PELOTAS

Equipasul
Rua Cel. Alberto Rosa, 402D - Centro
CEP: 96010-770
Fone: (0**53) 3227-4005

Equipeças

Rua General Teles, 567 - Centro
Fone 0**53) 3227-6972

Esta lista está sujeita a alterações, entre em contato pelo fone
(44) 3529-1619 para verificar possíveis atualizações.

SOS Equipamentos Odontológicos
Rua Gonçalves Chaves, 714 - Centro
Fone: (0**51) 3225-5571 / 9121-7224

PORTO ALEGRE
Odontotec
Rua Buarque de Macedo, 610 - S Geraldo
Fone: (0**51) 3342-0731 / 3342-2063

RTMED
Av. Osvaldo Aranha, 734 - Sala 401 - Bonfim
Fone: (0**51) 3388-4694 / 8475-1471

SANTA CRUZ DO SUL
Servtecnica
A. Paul Harris, 712
Fone: (0**51) 3711-2787

SANTA MARIA
Odonto Difusão
Av. Rio Branco, 176 - Centro
Fone: (0**55) 3026-9275 / 9982-2296 (Fernando)

SOS Odontotécnica
Rua Cinco, 110 - Centro
Fone: (0**55) 3304-1436 / 9939-9037

SANTA ROSA
L M Comércio e Serviços
Av. Júlio Fehlauser, 191 - Centro
Fone:(0**55) 3511-2126

SANTO ANGELO
Serv-Medical
Rua Daltro Filho, esquina com Monte Castelo, 140 - Emília
Fone: (0**55) 9968-3087 (Airtom)

RONDÔNIA

CACOAL
Eletrônica JM
Av. Dois de Junho, 2540 - Centro
Fone: (0**69) 3441-3298 / 3441-1144

RORAIMA

BOA VISTA
Prosserv
Av. Major Willians, 1027 - Centro
Fone: (0**95) 3623-897

Total Dente
Av: Getúlio Vargas, 5575 B - Centro
CEP: 69301-030
Fone: (0**95) 3224-8262

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO CAMBORIU
F & F Assist. Tec. e Com. de Equip. Odont. Ltda.
(FF Assistência)
Rua Ernesto Geisel, 06,Praia dos Amores
CEP: 88330-000
Fone: (0**47) 3367-7533
Contato: Fernando (9994-1923)

BARRA VELHA
F & F Assist. Tec. e Com. de Equip. Odont. Ltda.
(FF Assistência)
Av. Paraná, 784, Sala 01 - Centro
Fone: (0**47) 9994-1923

BLUMENAU
Odonto Blu
Rua São Paulo, 2871 Sl 3 - Itoupava Seca
Fone: (0**47) 3323-6149

Selmar Assistência
Rua Theodoro Holtrup, 670 - Vila Nova
Fone: (0**47) 3323-9616

CHAPECÓ
Dental Pan
Rua 7 de Setembro - 250 E, Sl 02 - Centro
Fone: (0**49) 3322-0437

Trentin
Rua Caiagangue, 402 D - Esplanada
Fone: (0**49) 3323-8627 / 9139-2528 / 8855-4877

FLORIANÓPOLIS
JV Com. e Manut. de Equip. Odontológicos Ltda. ME
Rua Ver. Walter Borges, 25 - Campinas
Fone: (0**48) 3035-4933

Kobrasol
Rua Koesa, 241, Kobrasol
Fone: (0**48) 3259-1500 / 8412-0344

RCS
Rua Prefeito Tolentino de Carvalho, 187, Baln. Estreito
Fone: (0**48) 3244-6422 / 9983-5195

ITAJAÍ
Dipeve
Rua Carlos Seara, 377 - VI Operária
Fone: (0**47) 3348-1117

Tecnofelix
Rua Antonio Manoel Moreira, 49 - Fazenda
Fone: (0**47) 3367-4061 / 8402-9510

Odomed

Rua Gaspar, 137 - Vila Operária
Fone: (0**47) 3349-0001 / 9106-1278

JOACABA
Odontomedica
Rua Francisco Lindner, 101 Sl 01 - Centro
Fone: (0**49) 3521-3391

JOINVILLE
Edontec
Rua Nicéas Gonçalves da Maia, 96 - Itaum
Fone: (0**47) 3028-2907 / 9971-0133

R V Assistência Técnica
Rua Santo André, 35 - Guanabara
Fone: (0**47) 3436-0988 / 9961-7664

LAGES
Gerli Adriane Cordova ME
Rua Alice Rosa Ramos, 58 - Coral
Fone: (0**49) 9983-3186

Supridental
Rua Benjamim Constant, 474 - Centro
Fone: (0**49) 3223-2066 / 9971-9077

RIO DO SUL
Odonto Moretti
Rua Dr. Neumann, 104 - Centro
Fone: (0**47) 3522-6892 / 8409-3313

SÃO JOSÉ
JV Com. e Manut. de Equip. Odontológicos Ltda. ME
Rua Ver. Walter Borges, 25 - Campinas
Fone: (0**48) 3035-4933

Kobrasol
Rua Koesa, 241 - Kobrasol
Fone: (0**48) 3259-1500 / 8412-0344

SÃO MIGUEL D'OESTE
Dental Corá
Rua Duque de Caxias, 915 - Centro
Fone: (0**49) 3621-2083 / 9988-9094

TUBARÃO
Dental Universitária
Rua Capitão Alexandre de Sá, 280 - Dehon
Fone: (0**48) 3628-0699 / 8406-0947

VBM Dental
Rua Laguna, 356 Sl 01 - Oficinas
Fone: (0**48) 3626-6792 / 8809-1811

Dilnei Martins Assistência Técnica da Saúde
Rua Luiz Martins Colloço, 719 - Sala 01
Fone: (0**48) 3622-5609 / 9640-9690

Esta lista está sujeita a alterações, entre em contato pelo fone
(44) 3529-1619 para verificar possíveis atualizações.

VIDEIRA

Odontec Com. e Manut. de Equipamentos Médicos e
Odontológicos Ltda.
Rua Alberto Grandó, 1020 - São Cristóvão
Fone: (0**49) 3566-1075 / 9995-3712

SÃO PAULO

AMPARO

Agiletec
Rua Arlindo Fava, 545 - Jardim Silvestre II
Fone: (0**19) 3807-7072

AMERICANA

Savatel
Rua Paçandu, 414
Fone: (0**19) 3462-5713

ARAÇATUBA

Tec Odonto
Rua Cons Oscar R. Alves, 965 - Vila Mendonça
Fone: (0**18) 3623-4587 / 9781-5827

ARARAQUARA

Dental Gsete
Rua João Vergara Gonzales, 113 - Jd. Primavera
Fone: (0**16) 3331-8200 / 9713-5844

BAURU

Nilson Lopes Bauru - ME
(Odontonev)
Rua São Gonçalo, 65, Qd.8 - Vila Altinópolis
Fone: (0**14) 3234-1904

Odonto Isa

Al. Dr. Octávio P Brisolla 2-85, Vila universitária
Fone: (0**14) 3227-6754 / 9961-5024

BOITUVA

Odonto Fix
Rua Angelo Ribeiro, 352 - Centro
Fone: (0**15) 3263-1214 / 9705-000

CAMPINAS

Alka Assist Tec Odonto
Av. Dr Alberto Sarmento, 667 - Bonfim
Fone: (0**19) 3242-6458 / 9116-2945

Fernodonto

Rua Helena de Camargo Pereira, 143 - DIC IV
Fone: (0**19) 9232-7333 / 8836-8194
CEP: 13054-423

Gerentec

Rua Quintino Bocaiuva, 609 - Bonfim
Fone: (0**19) 3241-8145 / 9749-2603

Previtec

AV. Andrade Neves, 1181 - Centro
Fone: (0**19) 3234-8762 / 3236-0817 / 3722-5738
CEP: 13013-161

DIADEMA

NC Odonto
Rua Gaspar Ricardo, 616 - Jardim Rosinha
Fone: (0**11) 3418-8311 / 8281-3662
ou 9938-6469 (Nilson)

GUARULHOS

Dentotec
Rua Ana Soares Barcellos, 33 - Ponte Grande
Fone: (0**11) 6421-0312 / 6421-6565

Leal Odonto

Av. Mariana Ubald Esp. Santo, 421, Sl.8 - Bom Clima
Fone: (0**11) 2229-6099 / 2229-6169

JABOTICABAL

S.Z Comércio e Manutenção de Equipamentos
R. Dr. Armando Montelli, 156 - Conj. Habit. Hugo L. Vitale
II
Fone: (0**16) 3203-6098 / 9785-8721

JUNDIAÍ

Santec
Rua Francisco Morato, 73 - BR Vianelo
Fone: (0**11) 4522-6563 (Silvio)

LIMEIRA

Limeirodonto Assistência Técnica
Av. São Sebastião, 474 - Boa Vista
Fone: (0**19) 3702-2400 / 9708-9693

Vitalmed

Rua Carlos Gomes, 23 - Centro
Fone: (0**19) 3442-6398 / 3453-9376

MARÍLIA

Difafer
Av. Tomé de Souza, 151 - Jardim Continental
Fone: (0**14) 3417-4414

MOGI GUACU

Odontec
Rua Antunes Garcia, 323 - Lote
Fone: (0**19) 3831-2161

MOGI DAS CRUZES

Mogiteq
Rua Otto Unger, 361 - Centro
Fone: (0**11) 4725-1843 / 4796-3783

Tecnoserv

Rua Barão Jaceguai, 1398 - Centro

Fone: (0**11) 4798-2288 / 4799-9438 / 9640-0401

OURINHOS

Seomed
Rua Brasil, 549
Fone: (0**14) 3322-7943 / 8118-1987

PIRACICABA

Dentalserv
Rua Prudent Morais, 1457 - Alto
Fone: (0**19) 3434-5194

Eletrônica São Francisco
Rua Benjamin Constant, 1871 - Centro
Fone: (0**19) 3434-5377

Tecnodonto

Rua Regente Feijo, 2510 - VI Monteiro
Fone: (0**19) 3433-4500 / 9708-9644

PRESIDENTE PRUDENTE

Med Lab II
Rua Siqueira Campos, 1236 - Vila Nova
Fone: (0**18) 3903-7754 / 3222-7315 / 8111-9210

Odonto Centro

Av Clemente Pereira, 250, centro
Fone: (0**18) 3279-1539
Contato: Juliano (0**18) 9783-0711

REGENTE FEIJÓ

Odonto Centro
Av Clemente Pereira, 250, centro
Fone: (0**18) 3279-1539
Contato: Juliano (0**18) 9783-0711

RIBEIRÃO PRETO

SOS Equipamentos
Rua Antonio Rivoiro, 105 - Adelino Simioni
Fone: (0**16) 3974-8706 / 9139-0339

SANTA FÉ DO SUL

Asteco
Rua Dez, 2291
Fone: (0**17) 3631-2885

Biotec Medical

Rua 08, 1544 - Centro
Fone: (0**17) 3631-4294 / 8118-9728
E-mail: assistencia@biotecmedial.com.br

SANTOS

RC Assistência Técnica Ltda.
Av. Rangel Pestana, 15 - Sala 08 - Vila Matias
Fone: (0**13) 3561-5348 / (13) 8141-4070

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Esta lista está sujeita a alterações, entre em contato pelo fone
(44) 3529-1619 para verificar possíveis atualizações.

HM Assistência Técnica
Av. São João Batista, 409 - Vila Helena
Fone: (0**11) 4177-4700 / 4362-4104

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Di Mori
Rua Santa Maria, 496 - VI Aurora
Fone: (0**17) 3234-2427 / 3235-4818

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Eduardo Marinho
Est Cajuru, 3151 Casa 91 - Campos de São José
Fone: (0**12) 3018-9155 / 9711-3736

Renova
Av. Ouro Fino, 240
Fone: (0**12) 3916-6489

SÃO PAULO

Ano Luz Eletrônica Ltda.
Rua São Patricio, 162 - Santana / Tucuruvi
Fone: (0**11) 2201-9017 / 3462-7076 / 9887-7264

Consertos Tonello.
Rua Tito, 115 - Vila Romana
CEP: 05051-000
Fone: (0**11) 3673-4719
Contato: Gentil - 3875-0114

Dental Madrid Ltda ME
Rua Voluntários da Pátria, 512 - Santana
Fone: (0**11) 6221-4397

Equipo Leste
Rua Guaraciaba, 461 - Tatuapé
Fone: (0**11) 6941-2948

Konsertec
Rua Salvador Rodrigues Negrão, 96 - Jardim Prudência
Fone: (0**11) 5563-9246 / 9576-8216 Renato

Rempres Com. e Técnica Ltda Me
Rua Domingos de Moraes, 1372 - Vila Mariana
Fone: (0**11) 5549-4828

Sollai
Av. Indianópolis, 2631 - Planalto Paulista
Fone: (0**11) 5070-0055

TDN Com. e Assist. Técnica de Prod. Hospitalares Ltda.
Rua Isaac Annes, 160 - Lapa
Fone: (0**11) 3832-8462 / 3834-4518 (Eduardo)

Tecnodonto Jn Assist. Tec. e Odont. Ltda
Av. Bosque da Saúde, 1745 - Saúde

Fone: (0*11) 5587-3637 / 9602-4820

W. E. A. Assist. Tec. Odonto Ltda. Me
Rua Amaro Cavalheiro, 118 - Pinheiros
Fone: (0**11) 3813-1630

SOROCABA

T T Tech Assistência Técnica
Rua Raimundo R. Santos F., 320 - CHJ Mesquita F
Fone (0**15) 3011-9670 / 9744-2493

Sigmamed
Av. Cecília Meireles, 172
Fone: (0**15) 3018-0509 / 3221-8612 / 9134-1845

SUMARÉ

Fernodonto
Av. Duque de Caxias, 576 - Jd João Paulo II
Fone: (0**19) 9232-7333 / 8836-8194

TAUBATÉ

Odontotécnica Taubaté
Av. José Olegário de Barros, 642 - Vila Nossa Senhora das
Graças
Fone: (0**11) 3633-6825

SERGIPE

ARACAJU

Santec
Av. Chanceler Osvaldo Aranha, 1048 - José C. Araujo
Fone: (0**79) 3241-7344 / 9982-7424

TOCANTINS

PALMAS

Odontec
Rua SE, 11 - Quadra 54 Sul, lote 13, sala 03 - Centro
Fone: (0**63) 3212-1474
Contato: Ildebrando

Esta lista está sujeita a alterações, entre em contato pelo fone
(44) 3529-1619 para verificar possíveis atualizações.

VALIDAÇÃO DA GARANTIA

Para consolidar a garantia de seu produto, preencha o formulário de certificação de garantia e o envie para a Ortus.

Ortus Indústria e Comércio Ltda.
Rua Santos Dumont, 2748 - Jd. Cidade Verde
Campo Mourão - PR - Brasil
CEP 87303-250

FORMULÁRIO DE GARANTIA

Nome		
Especialidade		
CNPJ/CPF	E-mail	
Endereço		
Bairro	Cidade	UF
CEP	Fone	Fax
Nº Nota Fiscal	Data da Emissão	/ /
Revendedor		
Modelo	Bioscaler	Vtagem
Nº Série / Lote	Data de Fabricação	/ /
Descrição do Problema		