

Manual do usuário
do aparelho
auditivo micro BTE
(micro retroauricular)
Quantum™



unitron. Hearing matters

Obrigado

Obrigado por escolher os aparelhos auditivos da Unitron.

Na Unitron, nossa maior preocupação é com as pessoas com perda auditiva. Trabalhamos diretamente com os profissionais da saúde auditiva para disponibilizar soluções avançadas, adaptadas às necessidades de cada um. Porque a audição é importante.

Os aparelhos auditivos

Fonoaudiólogo: _____

Telefone: _____

Modelo: _____

Número de série: _____

Baterias: Tamanho 312

Garantia: _____

O programa 1 corresponde a: _____

O programa 2 corresponde a: _____


O programa 3 corresponde a: _____

O programa 4 corresponde a: _____

Data de compra: _____

Consulta rápida

Substituição das baterias Aviso de bateria fraca

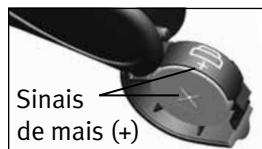

2 bips de 30 em 30 minutos



☐ 312

Ligado/Desligado



Botão


- ☐ alterar programas
- ☐ controle de volume;
aparelho da direita=mais alto,
aparelho da esquerda=mais baixo
- ☐ controle conforto-nitidez;
aparelho da direita=nitidez,
aparelho da esquerda=conforto

Índice

Breve descrição dos aparelhos auditivos	2
Modo de colocação dos aparelhos auditivos	4
Ligar e desligar os aparelhos auditivos	6
Informações sobre a bateria	8
Sugestões para a utilização inicial dos aparelhos auditivos	12
Instruções de funcionamento	14
Utilização do telefone	19
Cuidados com os aparelhos auditivos	20
Limpeza dos aparelhos auditivos	22
Características específicas dos aparelhos auditivos	26
Guia para solução de problemas	29
Avisos	34
Informações sobre conformidade	38
Feedback do cliente	40
Notas adicionais	41

Breve descrição dos aparelhos auditivos

- 1 **Gancho** - o molde auricular personalizado prende-se aos aparelhos auditivos por intermédio do gancho
- 2 **Microfone** - o som entra nos aparelhos auditivos através dos microfones. **Protetor do microfone** - protege os microfones de sujeiras e resíduos
- 3 **Botão** - permite a mudança entre as diferentes programações OU mudança no controle de volume OU ajustes conforto-nitidez, personalizado de acordo com as suas necessidades
- 4 **Compartimento da bateria/ligar e desligar** - feche o compartimento de pilha para ligar os aparelhos auditivos e abra-o parcialmente para desligar. A abertura completa do compartimento facilita a substituição da bateria
- 5 **Molde auricular** - permite que o som dos aparelhos auditivos passe para o ouvido, além de manter os aparelhos auditivos bem posicionados na orelha
- 6 **Tubo fino** - o som do aparelho auditivo é propagado através do tubo fino para o canal auditivo
- 7 **Tulipa** - mantém o tubo fino no lugar no seu canal auditivo
- 8 **Fio de retenção** - ajuda a evitar que a tulipa e o tubo fino saiam do canal auditivo, além de auxiliar no momento da remoção do tubo fino de dentro do canal auditivo


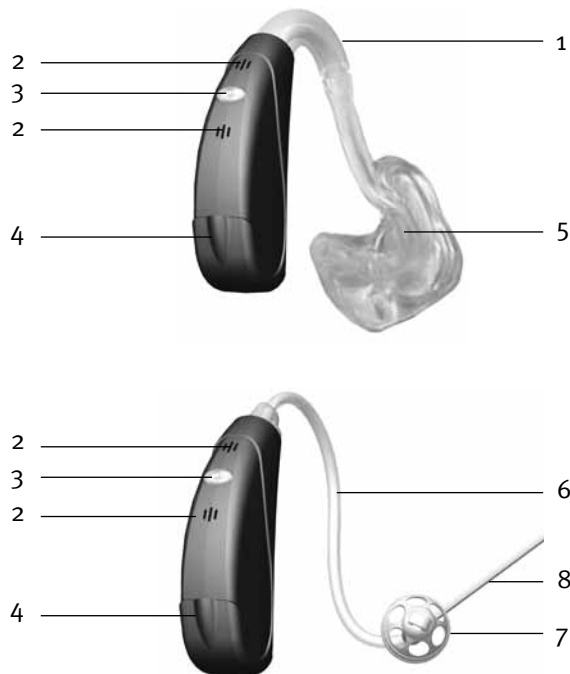


Modo de colocação dos aparelhos auditivos

Os aparelhos auditivos retroauriculares (BTE) poderão ter um código de cor na forma de um pequeno ponto no compartimento da bateria: vermelho = orelha direita; azul = orelha esquerda.


Aparelhos BTE com moldes auriculares

1. Segure o molde auricular entre o polegar e o indicador. A abertura deve estar direcionada para o canal auditivo, com o aparelho BTE apoiado na parte superior da sua orelha.
2. Insira cuidadosamente o molde auricular no seu ouvido. Você poderá ter que girar ligeiramente para trás. O molde auricular deve ajustar-se ao seu ouvido de forma confortável.

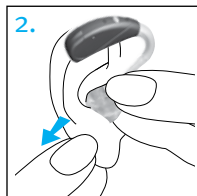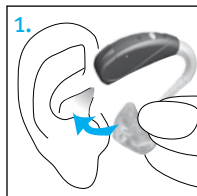



Puxar o lóbulo da sua orelha para baixo e para trás poderá ajudá-lo a inserir mais facilmente o molde auricular no canal auditivo.

3. Coloque o aparelho atrás da orelha.

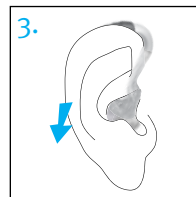


Aparelhos BTE com tubos finos

1. Coloque o aparelho auditivo atrás da sua orelha. O tubo fino deve ficar próximo à orelha e não ultrapassar a porção superior do pavilhão auricular.
2. Segure o tubo fino no local onde se prende à tulipa e empurre suavemente a tulipa para dentro do canal auditivo.

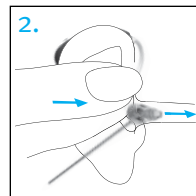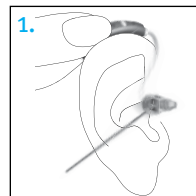

3. Coloque o fio de retenção no ouvido para que fique apoiada na parte inferior da abertura do canal auditivo (na concha da orelha).

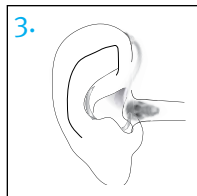

Ligar e desligar os aparelhos auditivos

Os aparelhos auditivos têm um compartimento para a bateria com três posições que funcionam como liga e desliga, além de permitir a troca da bateria.

1. LIGADO: Feche totalmente o compartimento da bateria.



Nota: o aparelho auditivo poderá demorar 5 segundos para ligar. O seu fonoaudiólogo pode aumentar gradativamente o tempo de iniciação do som, se necessário.



2. DESLIGADO: Abra parcialmente o compartimento da bateria.



3. ABERTO: Abra totalmente o compartimento da bateria para ter acesso a troca da mesma.



Nota: Para ligar e desligar o aparelho auditivo enquanto o mesmo estiver no ouvido, é necessário que segure firmemente a parte superior e inferior do dispositivo com o indicador e o polegar. Utilize o polegar para abrir e fechar o compartimento da bateria.


Informações sobre a bateria

Para substituir a bateria, abra totalmente o compartimento da mesma.

Aviso de bateria fraca


Dois bips longos indicam que a bateria do aparelho auditivo está fraca. Depois do aviso de bateria fraca, você poderá notar uma diminuição na qualidade do som. Esta situação é normal e pode ser corrigida ao inserir baterias novas nos aparelhos auditivos.

Se não conseguir ouvir o aviso de bateria fraca, o seu fonoaudiólogo pode alterar a tonalidade ou intensidade do mesmo. Se preferir, essa função pode ser totalmente desativada.

 Os aparelhos auditivos emitem um aviso de bateria fraca a cada 30 minutos até a substituição das pilhas. Contudo, conforme o estado das baterias, estas podem acabar antes de ser emitido outro aviso de bateria fraca. Recomenda-se a substituição das baterias assim que possível após ouvir o aviso de bateria fraca.

Substituição da bateria

1. Abra cuidadosamente o compartimento da bateria com a unha.
2. Segure firmemente a bateria com o polegar e o indicador e retire-a.
3. Insira a nova bateria no compartimento com o sinal de mais (+) virado para o mesmo lado do sinal de mais (+) na parte lateral do compartimento da bateria. Certifique-se que o compartimento da bateria esteja fechado corretamente.

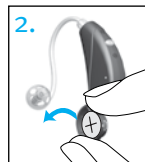

 Nota: se a bateria for inserida de forma incorreta, o aparelho auditivo não liga.

4. Feche o compartimento da bateria.



Substituição da bateria em aparelhos auditivos com um compartimento de bateria resistente

Alguns aparelhos auditivos têm um compartimento de bateria resistente por motivos de segurança. Para substituir a bateria, abra o compartimento da bateria e empurre a peça de bloqueio para dentro do aparelho auditivo com a ponta de uma caneta.

Retire a bateria. Insira a nova bateria com o sinal de mais (+) da mesma virado para o mesmo lado do sinal de mais (+) na parte lateral do compartimento da bateria. A nova bateria ficará segura quando fechar o compartimento da bateria.



Cuidados com as baterias

Sempre descarte as baterias de forma segura e ecológica.

Para prolongar a duração da bateria, não se esqueça de desligar os aparelhos auditivos quando não estiverem em uso.

Retire as baterias e mantenha os compartimentos das mesmas abertos enquanto não estiver utilizando os aparelhos auditivos. Isso fará com que a umidade presente no interior do aparelho auditivo evapore.

Sugestões para a primeira utilização dos aparelhos auditivos

1. Comece a utilizar os aparelhos em casa, num local silencioso, para se habituar à nova qualidade de som. Determinados sons, como o tique taque de um relógio, o chiado do computador, o som do microondas ou o som de papéis, poderão parecer altos no início, visto que esses sons não eram mais percebidos há algum tempo.
2. Leia para si mesmo em voz alta e aprenda a ajustar o volume da sua própria voz quando estiver utilizando os aparelhos auditivos.
3. Fale com pessoas diferentes e reaprenda a distinguir os diferentes tipos de sons.
4. Levará algum tempo até que você esteja totalmente habituado aos aparelhos auditivos e até que possa usufruir completamente dos benefícios auditivos.
5. Utilize os aparelhos auditivos o máximo de horas por dia que conseguir e vá aumentando

esse tempo dia a dia.

6. No verso deste folheto, faça anotações, escreva sobre situações difíceis e descreva todos os ruídos que forem desagradáveis. Estas informações ajudarão o seu fonoaudiólogo a ajustar melhor os aparelhos auditivos.
7. Peça à sua família e aos seus amigos para auxiliarem durante este período de familiarização. Por exemplo, peça a alguém para ajustar o som da televisão para um volume confortável.
8. Quando começar a habituar-se aos aparelhos auditivos, utilize-os em ambientes em que a audição se torna mais difícil, como no escritório, em festas ou em restaurantes. Ambientes mais ruidosos são situações que podem ser difíceis, mesmo para as pessoas que têm uma audição normal. É necessário tempo para recuperar a sua capacidade de audição em situações difíceis como as referidas (com ruído).

9. Faça com que o uso dos seus aparelhos auditivos entrem na sua rotina. Seja tolerante consigo mesmo e tenha paciência durante este período em que estiver reaprendendo a ouvir.

Instruções de funcionamento

Os aparelhos auditivos BTE vêm equipados com um botão que lhe permite ajustá-los melhor.

Botão







Os aparelhos auditivos têm um botão que pode ser programado para diferentes utilizações, tais como:

mudanças de programas, ajustes do controle de volume ou ainda ajustes do controle conforto-nitidez.

Controle de programas

Se o botão foi configurado como controle de programas, ele auxiliará na mudança manual de programações cada vez que pressionar o botão.






Os aparelhos auditivos emitem bips para indicar a mudança dos programas.

Programa 1 (por exemplo, programa automático)		1 bip
Programa 2 (por exemplo, fala com ruído)		2 bips
Programa 3 (por exemplo, telefone)		3 bips
Programa 4 (por exemplo, música)		4 bips
DuoLink (se ativo) (ver pág. 17)		O aparelho auditivo oposto emite bips, tal como o que está recebendo os ajustes.

Controle de volume

Se o botão foi configurado como controle de volume:

- Pressione o botão do aparelho auditivo em uma das orelhas, por exemplo lado direito, para aumentar o volume dos dois aparelhos.
- Pressione o botão do aparelho auditivo em uma das orelhas, por exemplo lado esquerdo, para aumentar o volume dos dois aparelhos.

Definição de volume	Bips	
Volume recomendado		1 bip
Aumento do volume		bip curto
Diminuição do volume		bip curto
Volume máximo		2 bips
Volume mínimo		2 bips

□ Controle conforto-nitidez




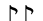
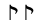
Se o botão foi configurado como controle conforto-nitidez:

- Pressione o botão do seu aparelho auditivo da orelha direita para aumentar a nitidez de fala.
- Pressione o botão do seu aparelho auditivo da esquerda para diminuir o ruído geral ou melhorar o conforto auditivo.

Cada passo alterará o desempenho do aparelho auditivo. Serão necessários alguns passos para alcançar os resultados auditivos pretendidos. Aguarde cerca de 4-5 segundos após cada vez que pressionar o botão para que o aparelho

auditivo possa se ajustar à nova definição.

Os aparelhos auditivos emitirão bips à medida que alteram o nível de conforto-nitidez.

Definição do controle conforto-nitidez	Bips	
Nível de conforto e nitidez ideal		1 bip
Aumentar o nível de nitidez do som		bip curto
Aumentar o conforto auditivo		bip curto
Nível máximo de nitidez do som		2 bips
Nível máximo de conforto auditivo		2 bips

DuoLink

Se o DuoLink estiver ativo, a alteração do volume, dos programas ou da definição de conforto-nitidez efetuada num aparelho auditivo será aplicada automaticamente aos dois aparelhos auditivos simultaneamente.

Por exemplo, se o botão estiver configurado como controle de programas e o DuoLink estiver ativo, quando você pressionar o botão do aparelho auditivo da direita, o programa será alterado nos dois aparelhos.

Aprendizagem

Os aparelhos auditivos registrarão os seus ajustes em diferentes ambientes, se essa funcionalidade estiver disponível e tiver sido ativada pelo seu fonoaudiólogo. Com o passar do tempo, os aparelhos auditivos ajustarão as definições de volume e conforto-nitidez preferidas e de acordo com as suas necessidades auditivas.

Controle Remoto

Os aparelhos auditivos poderão vir acompanhados por um controle remoto opcional que lhe permite alternar entre diferentes programas e alterar as definições de volume ou ainda de conforto-nitidez.

Utilização do telefone

Tendo em vista que os telefones não funcionam todos da mesma forma, você poderá constatar resultados diferentes com telefones diferentes. Você pode utilizar vários telefones, bastando apenas segurar o telefone de forma que a saída de som do telefone fique perto do seu ouvido, sem ter de mudar para um programa específico para telefones. Lembre-se de deslocar o receptor do telefone ligeiramente para cima ou para trás de forma a encontrar a posição em que você consegue ouvir melhor.

O seu fonoaudiólogo poderá ter selecionado um programa específico para telefones nos seus aparelhos auditivos, dependendo do tipo de telefone utilizado.

Se os aparelhos auditivos estiverem configurados para funcionar com o acessório sem fio uDirect™ 2 para usar ao redor do pescoço, você poderá usufruir da tecnologia Bluetooth®. Consulte o manual do usuário do uDirect 2 para obter mais informações.

Cuidados com os aparelhos auditivos

Abra o compartimento da bateria quando o aparelho não estiver sendo utilizado.

Retire sempre os aparelhos auditivos quando utilizar produtos para o cabelo. Os aparelhos auditivos podem ficar obstruídos, comprometendo o seu funcionamento.

Não utilize os aparelhos auditivos no banho nem deixe-os em contato com a água.

Se os aparelhos auditivos ficarem molhados, não tente secar num forno ou microondas. Não ajuste quaisquer mecanismos de controle. Abra os compartimentos das baterias imediatamente e deixe os aparelhos auditivos secarem naturalmente durante 24 horas.

Proteja os aparelhos auditivos do calor excessivo (secador, porta-luvas ou painel do carro).

A utilização regular de um desumidificador, como um Dri-Aid kit (kit de sílica para aparelho auditivo) pode ajudar a evitar a corrosão e prolonga a vida útil dos aparelhos auditivos.

Não deixe os aparelhos auditivos caírem e evite as pancadas contra superfícies rígidas.

Limpeza dos aparelhos auditivos

A cera do ouvido é natural e comum. Verificar se os aparelhos auditivos contêm cera é uma etapa importante na rotina de manutenção e limpeza diária.

Nunca utilize álcool para limpar os aparelhos auditivos, moldes auriculares ou tulipas.

Não utilize ferramentas pontiagudas para remover a cera. Inserir objetos nos aparelhos auditivos ou moldes auriculares pode danificá-los seriamente.

Moldes auriculares

Verifique sempre se os moldes auriculares estão limpos e não contêm cera.

Não utilize álcool para limpar os moldes auriculares.

Se os moldes auriculares ficarem obstruídos, limpe a sua abertura.



Se o seu médico lhe receitar medicamentos em gotas para os ouvidos, limpe toda a umidade que possa entrar nos moldes auriculares ou nos tubos para evitar a obstrução.

Se os moldes auriculares necessitarem de uma limpeza adicional:

1. Desencaixe o tubo de plástico do gancho de acrílico dos aparelhos auditivos.
2. Lave apenas os moldes auriculares em água morna com um sabão neutro.
3. Passe-os em água fria e deixe-os secar de um dia para o outro.
4. Certifique-se de que os tubos dos moldes auriculares estejam secos antes de encaixar novamente nos ganchos correspondentes dos aparelhos auditivos. A utilização de um soprador para limpeza pode ajudar a remover a gotículas de água/resíduos do tubo plástico do molde. Consulte o seu fonoaudiólogo para obter mais informações.

Tubos finos e tulipas

As tulipas e os tubos finos devem ser substituídos pelo seu fonoaudiólogo a cada três a seis meses aproximadamente ou quando estiverem rígidos, frágeis ou com alteração de cor.

Limpe as tulipas diariamente com um pano úmido.


Você deve também limpar regularmente os tubos finos com um fio de limpeza quando começar a notar a existência de resíduos na parte interior dos tubos.


1. Segure o tubo fino com uma mão e o aparelho auditivo com a outra.
2. Gire cuidadosamente o aparelho auditivo até desencaixar do tubo fino.
3. Utilize um pano úmido para limpar a parte exterior do tubo fino e da tulipa.



4. Antes de limpar o tubo fino, retire a tulipa do mesmo, puxando-a cuidadosamente.

5. Pegue um fio de limpeza (de nylon) apropriado para esta utilização, introduza cuidadosamente no local onde o tubo fino se prende ao aparelho auditivo (abertura maior) e empurre para dentro do tubo até que transpasse para a outra extremidade do tubo fino. Retire completamente o fio de limpeza.

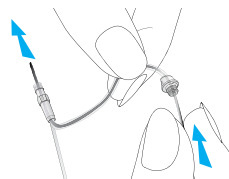

 **Nota:** os tubos finos e as tulipas nunca devem ser lavados ou passados por água. As gotas de água poderão permanecer no interior do tubo, bloqueando o som ou danificando os componentes elétricos do aparelho auditivo.

6. Assim que limpar o tubo fino, volte a encaixá-lo, rosqueando cuidadosamente o aparelho auditivo no tubo fino.
7. Volte a encaixar a tulipa no tubo fino, cuidadosamente, na extremidade do tubo.

Características específicas dos aparelhos auditivos

Controle conforto-nitidez

Os aparelhos auditivos ajustam-se automaticamente com o intuito de melhorar a nitidez dos sons da fala ou para proporcionar maior conforto em situações em que existem ruídos. Alguns modelos de aparelhos auditivos Quantum BTE (retroauricular) dispõem de um mecanismo de controle para ajustar as regulagens de conforto-nitidez.

- Se ajustar o controle conforto-nitidez para cima, os aparelhos auditivos proporcionarão maior nitidez para os sons da fala.
- Se ajustar o controle conforto-nitidez para baixo, os aparelhos auditivos suavizarão os ruídos de fundo, proporcionando maior conforto auditivo.

Os ajustes do controle conforto-nitidez podem ser efetuados no controle dos aparelhos auditivos ou no controle remoto. Consulte o seu

fonoaudiólogo para saber quais botões foram configurados para ajustes do conforto-nitidez.

À medida que vai ajustando o controle de conforto-nitidez, os aparelhos auditivos registram gradualmente as suas alterações preferidas.

DuoLink

Com o DuoLink, os aparelhos auditivos da orelha direita e da orelha esquerda comunicam-se entre si, por intermédio da tecnologia sem fio. Ao ajustar um controle, como por exemplo o de conforto-nitidez ou o controle de volume em um dos aparelhos auditivos, o outro lado também realiza a alteração automaticamente.

Telefone Bilateral

A função Telefone Binaural permite escutar o som do telefone (fixo ou celular) em um dos lados e esse som será transmitido, também, para o lado oposto de forma clara nos dois ouvidos, com o intuito de somar as informações

auditivas vindas do telefone. Para esta função não serão necessários o uso de acessórios.

uDirect 2 e uTV 2

O uDirect™ 2 e o uTV™ 2 são acessórios opcionais para o Quantum micro retroauricular.

- O uDirect 2 proporciona acesso a qualquer dispositivos com Bluetooth, como os celulares. Também dispõe de uma entrada de áudio com fios para ligar a dispositivos, como leitores de MP3.
- O uTV 2 é utilizado com o uDirect 2 para transmitir o som da televisão diretamente para os aparelhos auditivos. O uTV 2 pode igualmente transmitir o som da televisão e de outras fontes de áudio.

Para mais informações sobre a utilização dos acessórios uDirect 2 ou uTV 2, consulte o manual do respectivo acessório. Para obter informações sobre como obter um acessório uDirect 2 ou uTV 2, contate o seu fonoaudiólogo.

Guia para solução de problemas

Causa	Possível solução
Sem som	
Não está ligado	Ligar
Bateria fraca/descarregada	Substituir a bateria
Mau contato com a bateria	Consultar o seu fonoaudiólogo
Bateria colocada ao contrário	Inserir a bateria com o sinal de mais (+) virado para cima
Moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas obstruídos com cera	Limpar os moldes auriculares/ tulipas. Consultar o item sobre “Limpeza dos aparelhos auditivos”. Utilizar o fio de limpeza para remover a cera dos tubos finos. Consultar o seu fonoaudiólogo.
Protetor do microfone obstruído	Consultar o seu fonoaudiólogo

Causa	Possível solução
Não está suficientemente alto	
Volume baixo	Aumentar o volume. Consultar o fonoaudiólogo para obter informações sobre modelos sem controle de volume manual ou se o problema persistir.
Bateria fraca	Substituir a bateria
Moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas inseridos incorretamente	Consultar o item “Modo de colocação dos aparelhos auditivos”. Voltar a inserir cuidadosamente.
Alteração na audição	Consultar o seu fonoaudiólogo
Moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas obstruídos com cera	Limpar os moldes auriculares. Consultar o item “Limpeza dos aparelhos auditivos”. Utilizar o fio de limpeza para remover a cera dos tubos finos. Consultar o seu fonoaudiólogo.
Protetor do microfone obstruído	Consultar o seu fonoaudiólogo

Causa	Possível solução
Intermitente	
Bateria fraca	Substituir a bateria
Sujeira no contato da bateria	Consultar o seu fonoaudiólogo
Dois bips longos	
Bateria fraca	Substituir a bateria
Apitos	
Moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas inseridos incorretamente	Consultar o item “Modo de colocação dos aparelhos auditivos”. Voltar a inserir cuidadosamente.
Mão/ roupa perto do ouvido	Afastar a mão/ roupa do ouvido
Adaptação inadequada dos moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas	Consultar o seu fonoaudiólogo

Causa	Possível solução
-------	------------------

Falta de nitidez, distorção

Adaptação inadequada dos moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas	Consultar o seu fonoaudiólogo
---	-------------------------------

Moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas obstruídos com cera

Limpar os moldes auriculares. Consultar o item “Limpeza dos aparelhos auditivos”. Utilizar o fio de limpeza para remover a cera dos tubos finos. Consultar o seu fonoaudiólogo.

Bateria fraca	Substituir a bateria
---------------	----------------------

Protetor do microfone obstruído

Consultar o seu fonoaudiólogo

Os moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas caem do ouvido

Adaptação inadequada dos moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas	Consultar o seu fonoaudiólogo
---	-------------------------------

Moldes auriculares/ tubos finos/ tulipas inseridos incorretamente

Consultar o item “Modo de colocação dos aparelhos auditivos”. Voltar a inserir cuidadosamente.

Causa	Possível solução
-------	------------------

Fraco no telefone

O telefone não está corretamente posicionado	Deslocar o receptor (saída do som) do telefone para outra região do ouvido para obter um sinal mais nítido. Consultar o item “Utilização do telefone”.
--	--

O aparelho auditivo necessita ser ajustado

Consultar o seu fonoaudiólogo

Em caso de quaisquer problemas adicionais não indicados no guia, consulte o seu fonoaudiólogo.

Avisos

- ⚠ Os aparelhos auditivos devem ser apenas utilizados conforme indicado pelo seu médico ou fonoaudiólogo.
- ⚠ Os aparelhos auditivos não restabelecerão as capacidades auditivas normais e não evitarão nem melhorarão qualquer deficiência auditiva resultante de problemas orgânicos.
- ⚠ Não utilize os aparelhos auditivos em regiões com risco de explosão.
- ⚠ As reações alérgicas aos aparelhos auditivos são pouco prováveis. No entanto, em caso de coceira, vermelhidão, irritabilidade, inflamação ou sensação de ardor no interior ou à volta dos ouvidos, informe o seu fonoaudiólogo e contate o seu médico.
- ⚠ Na eventualidade improvável de quaisquer partes ficarem no canal auditivo após a remoção do aparelho, contate um médico imediatamente.

- ⚠ Retire os aparelhos auditivos quando realizar tomografia computadorizada e ressonância magnética ou outros procedimentos eletromagnéticos.
- ⚠ Atenção especial na utilização dos aparelhos auditivos em casos em que os níveis máximos de pressão sonora excedam os 132 dB. Poderá existir o risco de tal situação comprometer as suas capacidades auditivas residuais/ preservadas. Fale com o seu fonoaudiólogo para garantir que o nível de saída máxima dos seus aparelhos auditivos esteja adequado à sua perda auditiva.

Avisos relativos à bateria

- ⚠ Nunca deixe os aparelhos auditivos nem as baterias ao alcance de crianças ou animais de estimação.
- ⚠ Nunca coloque os aparelhos auditivos nem as baterias na boca. Se a bateria ou o aparelho auditivo for ingerido, procure um médico imediatamente.

Precauções

- ⚠️ A utilização dos aparelhos auditivos é apenas uma parte da reabilitação auditiva. Também poderão ser necessárias o uso de estratégias de comunicação, como: leitura labial e solicitação de repetição da fala não compreendida.
- ⚠️ Na maioria dos casos, a utilização pouco frequente dos aparelhos auditivos não permite a percepção dos benefícios dos mesmos. Quando estiver habituado a utilizar os aparelhos auditivos, utilize-os diariamente e durante o dia inteiro.
- ⚠️ Os aparelhos auditivos utilizam os componentes mais modernos para fornecer a melhor qualidade de som possível em todas as situações auditivas. Contudo, os dispositivos de comunicação, como os celulares, podem criar interferências (chiado) nos aparelhos auditivos. Se notar a interferência de um celular que está sendo

utilizado perto de você, tente minimizar essa interferência de várias formas. Mude o programa dos aparelhos auditivos, vire a cabeça para outra direção ou localize o celular e afaste-se do mesmo.

Nota para o fonoaudiólogo

- ⚠️ As tulipas nunca devem ser colocadas em pacientes com tímpanos perfurados, cavidades do ouvido médio expostas ou canais auditivos alterados cirurgicamente. Na ocorrência das situações referidas, recomendamos a utilização de um molde auricular personalizado.

Número de Série

O número de série do aparelho auditivo encontra-se na parte interior do compartimento da bateria.

Informações sobre conformidade

Declaração de conformidade

A Unitron declara que este produto Unitron cumpre os requisitos da Medical Devices Directive 93/42/EEC relativa a dispositivos médicos, bem como da Medical Devices Directive 1999/5/EC relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações. Você pode obter o texto completo da Declaração de Conformidade a partir do fabricante.

O aparelho auditivo descrito no presente manual do usuário tem as seguintes certificações:

Standard hearing system

EUA FCC ID: VMY-UWBTE1

Canadá IC: 2756A-UWBTE1

Nota 1

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da Fc e com a RSS-210 da Industry Canada. A sua utilização está sujeita às duas condições que se seguem:

- 1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- 2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que poderão causar um funcionamento indesejado.

Nota 2

Quaisquer alterações ou modificações efetuadas a este aparelho que não estejam expressamente aprovadas pela Unitron poderão anular a autorização da Fc relativamente à utilização deste dispositivo.

Nota 3

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da Fc e com a ICES-003 da indústria canadense. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequências e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais em comunicações de rádio. Contudo, isto não garante que não possam ocorrer interferências numa determinada instalação. Se este dispositivo causar realmente interferências prejudiciais em recepções de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, o usuário poderá corrigir as interferências utilizando uma ou mais das medidas que se seguem:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor
- Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele que alimenta o receptor
- Consultar o distribuidor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter ajuda

Feedback do cliente

Registre as suas observações ou necessidades específicas e apresente-as na sua primeira visita após estar com os seus aparelhos auditivos.

Esse registro ajudará o seu fonoaudiólogo a atender às suas necessidades.

Notas adicionais

REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
(BTE M): No. 10356330030

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
FGA. MARIA DO CARMO ALVES BRANCO
CRFa 9783



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Rua Francisco Marengo, 941/947
03313-000 - São Paulo SP Brasil

CNPJ 66.704.701/0001-10

T/F: 11 2789-2400

email: microsom@microsom.com.br

site: www.microsom.com.br

Atendimento ao consumidor

DDG 0800-116491

www.microsom.com.br



Unitron Hearing Ltd.

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Representante europeu

Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

Para obter uma lista de
empresas do grupo Unitron,
visite www.unitron.com



Distribuidor

www.unitron.com



12-030 029-5884-43

