


Caratteristiche - SV21-91008

- 1 Supporto di sollevamento
- 2 Custodia per notebook
- 3 Superficie di lavoro
- 4 Cassetto elettronico con chiusura automatica
- 5 Ripiano per tastiera inclinabile e poggiapolsi
- 6 Ripiano per mouse sinistra/destra e supporto
- 7 Gestione dei cavi
- 8 Blocco supporto di sollevamento
- 9 Ruote anteriori con bloccaggio
- 10 Staffa per supporto lettore
- 11 Maniglia posteriore ergonomica
- 12 Contenitore

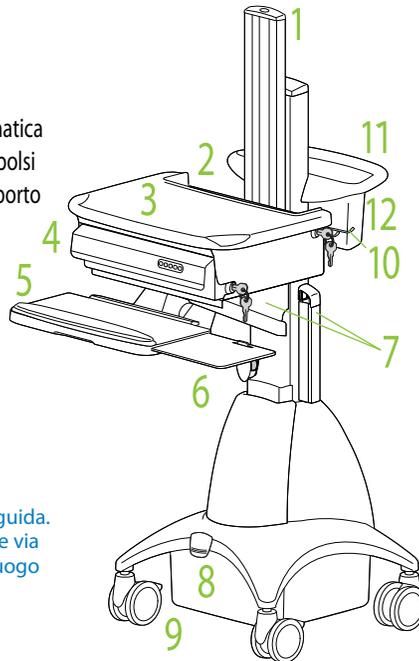

set-up&go
guide




Leggere tutte le sezioni di questa guida. Al termine dell'installazione, non gettare via la guida. La guida va conservata in un luogo sicuro per riferimento futuro.

Specifiche del carrello

Escursione di movimento


Intervallo di regolazione verticale: 508 mm (20 pollici)

IN PIEDI

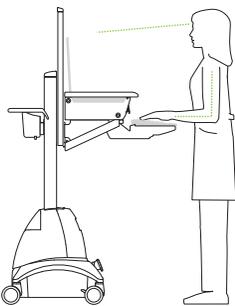


Portate

SEDUTO

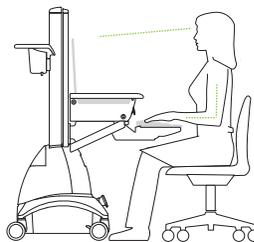


Inclinazione: angolo di visualizzazione ± 15°
in base a un notebook alto 10 piedi x 1/2 pollici di profondità

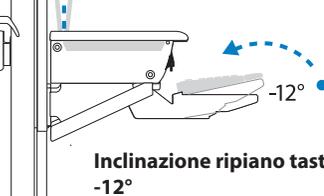

Inclinazione ripiano tastiera: -12°

Notebook	5-12 lbs	2.3-5.4 kg
Cassetto	4 lbs	1.8 kg
Superficie di lavoro	2.5 lbs	1.1 kg
Supporto CPU	25 lbs	11 kg
Ripiano per tastiera	2.5 lbs	1.1 kg
Supporto per mouse	.5 lb	.23 kg
Staffa per supporto lettore	.5 lb	.23 kg
Contenitore	5 lbs	2.3 kg

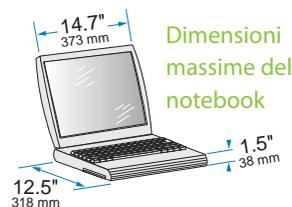


Dimensioni massime del notebook




ATTENZIONE: Il blocco di sollevamento impedisce il sollevamento verticale del supporto durante il normale utilizzo ma NON aumenta la capacità di carico. NON caricare il supporto di sollevamento con apparecchiature il cui peso totale è superiore alla portata massima specificata da Ergotron. Garantire la funzionalità ottimale di sollevamento eseguendo un controllo e, se necessario, regolando nuovamente la tensione a ogni variazione del peso installato sul supporto di sollevamento, ad esempio quando si rimuovono o aggiungono apparecchiature. Vedere la procedura di regolazione "Impostazione della tensione del supporto di sollevamento" al punto 7 a pagina 4.

Dimensioni

Supporto di sollevamento nella posizione più bassa

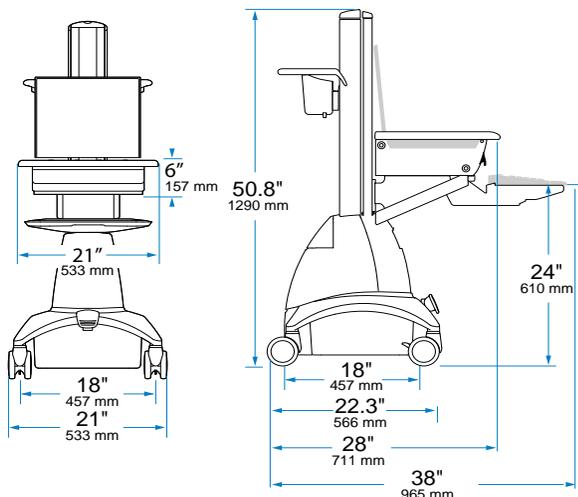

Supporto di sollevamento alla massima altezza

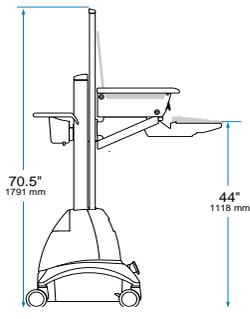

Per ulteriori informazioni su questo prodotto o altri prodotti Ergotron, visitare il sito Web:


www.ergotron.com

Attrezzatura per il montaggio

1 Preparare il montaggio del carrello.

a Preparare gli attrezzi per il montaggio del carrello.

b Per impedire lo spostamento del supporto di sollevamento durante il montaggio, bloccarlo premendo verso il basso il blocco di sollevamento.

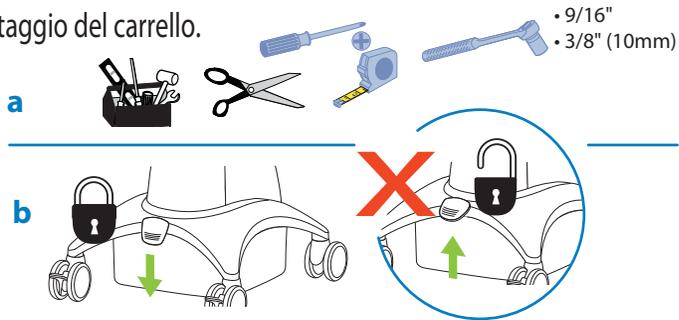


2 Rimuovere le viti di ancoraggio che collegano il supporto di sollevamento alla torre.

a Verificare che il supporto di sollevamento sia bloccato (blocco di sollevamento verso il basso), quindi rimuovere le due viti con cappuccio che agganciano il supporto di sollevamento alla torre.

! AVVERTENZA: Il supporto di sollevamento potrebbe sollevarsi bruscamente e in modo inaspettato quando si rimuove una forza controbilanciante! Pertanto, bloccarlo sempre verso il basso con l'apposito blocco quando si aggiungono o rimuovono apparecchiature e quando si rimuovono o inseriscono le viti di ancoraggio che assicurano il supporto di sollevamento alla torre durante la spedizione. La mancata osservanza di questa Avvertenza può essere causa di gravi infortuni e di danni sia al carrello che alle apparecchiature.


b Conservare le viti e i cappucci nell'apposito sacchetto per utilizzarli nel caso in cui sia necessario agganciare il supporto di sollevamento alla torre in un secondo momento.

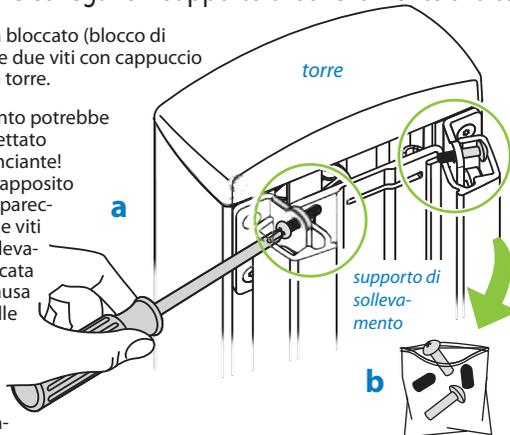

3 Fissare il portatile

a Sollevare la superficie di lavoro e posizionare il portatile nella custodia.

b Attaccare il velcro adesivo ai parabordi e far aderire alla custodia in modo da mantenere il portatile in posizione.

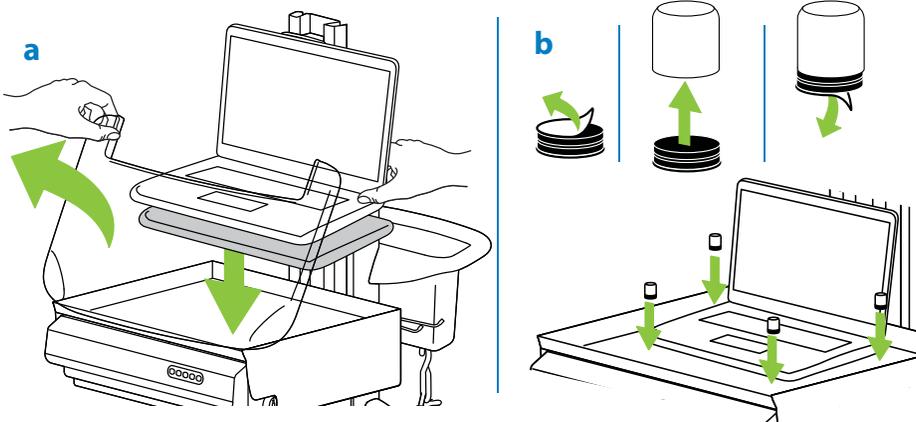

4 Personalizzare il codice del cassetto con chiusura automatica.

a Aprire il cassetto con la chiave principale (vengono fornite chiavi duplicate identiche). Tirare il cassetto per aprirlo e accedere alla scatola della batteria: rimuovere il coperchio della scatola di distribuzione e inserire le quattro batterie AA fornite. Riposizionare il coperchio e chiudere il cassetto.


b Rimuovere l'adesivo con il codice principale situato accanto al tastierino numerico e posizionarlo sulla destra della scatola, in modo che possa essere facilmente consultabile.

c Programmare il codice personale:


- 1 Inserire il codice principale
- 2 Premere contemporaneamente 3 e 5
- 3 Immettere un nuovo codice personale costituito da qualsiasi combinazione di cinque numeri

Il cassetto è ora programmato per sbloccarsi quando viene digitato il codice personale o il codice principale. Il cassetto rimane sbloccato per 2 minuti e il numero 5 rimane illuminato. Dopo due minuti, il cassetto si richiude automaticamente. Il cassetto può anche essere bloccato in qualsiasi momento premendo contemporaneamente 1 e 2 sulla tastiera.

*** Conservare questa guida e le chiavi principali in un posto sicuro per impedire l'accesso non autorizzato al cassetto con chiusura automatica.**

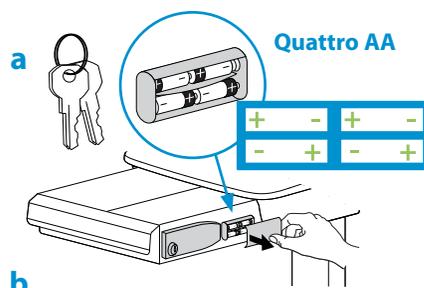

Codice principale

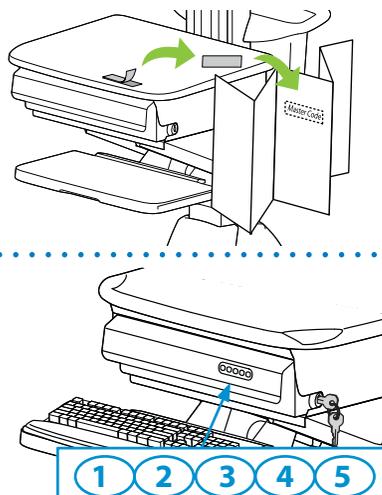

Attrezzatura per il montaggio

Suggerimenti sul cassetto con chiusura automatica

Per aprire il cassetto: 3 metodi

- Chiave: girare in senso antiorario di 1/8 di giro
- Inserire il codice principale
- Inserire il codice personale



Codice principale

Codice personale

1 2 3 4 5


Per programmare il codice personale

- 1 Inserire il codice principale
- 2 Premere contemporaneamente 3 e 5 (quando lampeggiano)
- 3 Immettere un nuovo codice costituito da qualsiasi combinazione di cinque numeri



Per cancellare il codice personale

- 1 Inserire il codice principale
- 2 Premere contemporaneamente 3 e 5 (quando lampeggiano)
- 3 Premere contemporaneamente 1 e 2 sulla tastiera

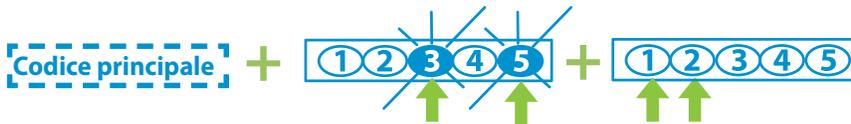


Per bloccare il cassetto: 2 metodi

- Premere contemporaneamente 1 e 2 sulla tastiera
- oppure*
- Attendere due minuti che il cassetto si blocchi automaticamente

Manuale

Automatico

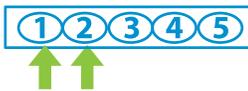

Risoluzione dei problemi relativi al cassetto con chiusura automatica

• I numeri sulla tastiera sono scuri

- Toccare qualsiasi punto della tastiera per attivare la retroilluminazione (il cassetto rimane bloccato fino a quando si immette un codice valido)
- Se toccando la tastiera la retroilluminazione non si attiva, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Vedere le istruzioni al punto 4a.

• Il numero 4 sulla tastiera lampeggia = Avviso di bassa tensione

- Potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Vedere le istruzioni al punto 4a.

Avviso di bassa tensione



• Il cassetto non si apre quando viene inserito il codice personale

- Controllare il sistema inserendo il codice principale. Se il cassetto non si sblocca, sostituire le batterie come descritto al punto 4a.

5 Montare gli accessori della tastiera e la scheda di riferimento


a Applicare nastro biadesivo sul fondo del poggiapolsi e posizionare sul ripiano.






b Usare nastro tipo velcro per fissare la tastiera sul ripiano.



c Posizionare la tasca per mouse sul lato destro o sinistro del ripiano.

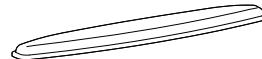

d Fissare la scheda di riferimento alla maniglia con l'apposita fascetta.

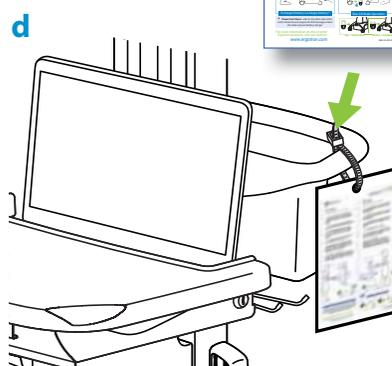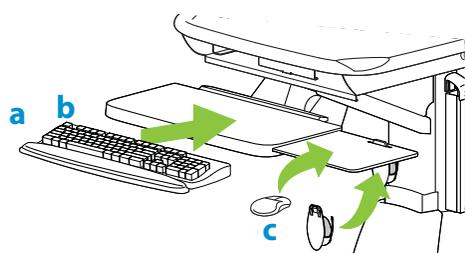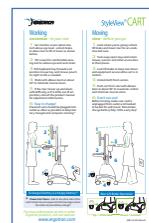

* Per un fissaggio ottimale, pulire tutte le superfici con un panno imbevuto di alcool e lasciare asciugare per un minuto prima di applicare il nastro.


Disposizione dei cavi

6 Instradare i cavi

a Rimuovere i coperchi laterali della muffola per cavi montata sotto il cassetto. Instradare i cavi del computer nel supporto di sollevamento e nella muffola per cavi. Instradare i cavi della tastiera e del mouse nella muffola per cavi. Riporre il cavo in eccesso e gli alimentatori nella muffola per cavi.

b Riposizionare i coperchi laterali della muffola per cavi. Spostare il supporto di sollevamento verso l'alto e il basso in modo da verificare che i cavi siano correttamente instradati e che il movimento del supporto non sia intralciato. Regolare, se necessario.

⚠ ATTENZIONE: instradare i cavi solo sul lato del canale portacavi (a destra) del carrello. Non conservare l'alimentatore all'interno dei coperchi della base. La conservazione di un alimentatore all'interno dei coperchi della base può interferire con il funzionamento del supporto di sollevamento, con conseguenti danni al carrello e all'attrezzatura montata su di esso o lesioni per folgorazione.

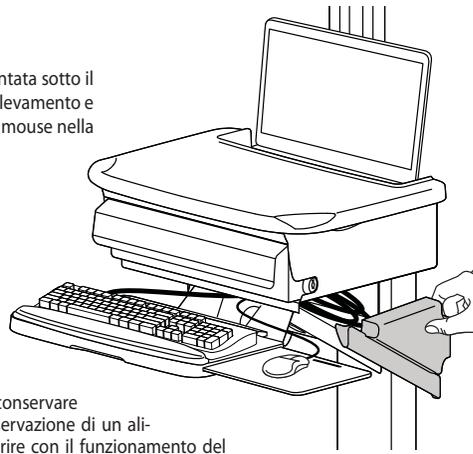

Regolazione supporto di sollevamento

7 Impostare la tensione di sollevamento del supporto.

a Sbloccare il supporto di sollevamento (sollevare il blocco verso l'alto).


b Spostare il supporto di sollevamento verso l'alto e il basso. Nel caso in cui si dovesse percepire eccessiva resistenza nell'intervallo di movimento o se il supporto di sollevamento non rimane nella posizione desiderata, regolare la tensione di sollevamento.

c Rimuovere il coperchio della torre.

d Sollevare il supporto nella posizione più alta sulla torre.

e Girare il dado della tensione verso l'alto o il basso, in base alle esigenze.

f Al termine della regolazione, verificare la tensione di sollevamento spostando il supporto verso l'alto e il basso (come descritto nel precedente punto 7b). Se è necessario regolare ulteriormente, continuare a girare il dado fino a quando il sollevamento del supporto risulta appropriato.

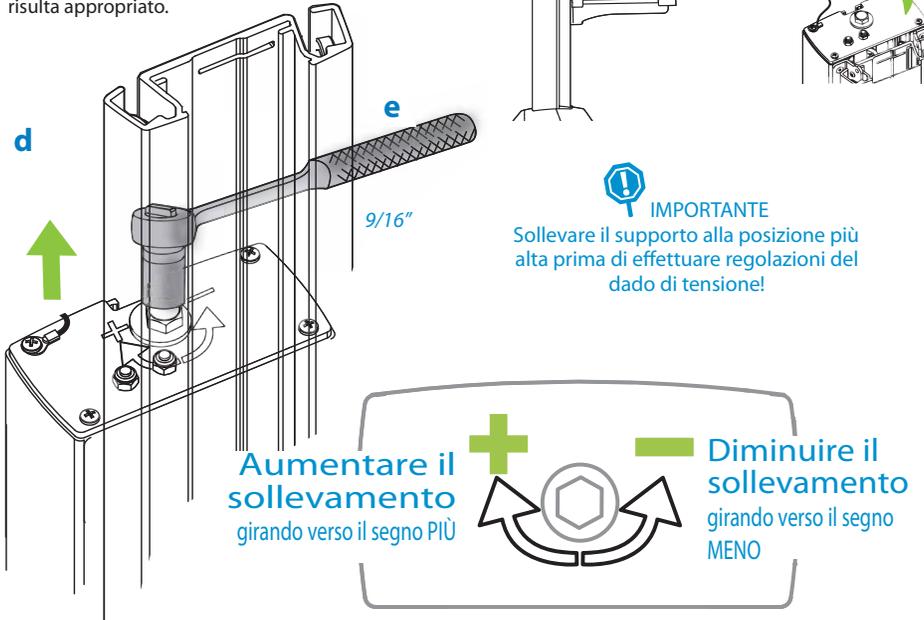


8 Montare i coperchi.

a Coprire i cavi sul supporto di sollevamento.

b Montare il coperchio della torre.

c Montare la parte superiore del coperchio del supporto di sollevamento.

d Bloccare il coperchio del supporto di sollevamento.

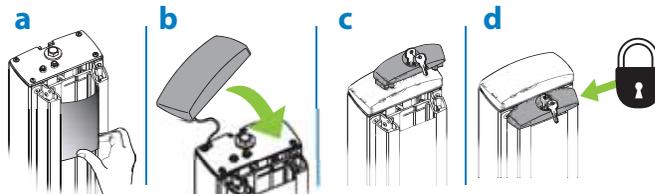

L'installazione è terminata: il carrello è pronto all'uso!

Nelle pagine seguenti sono fornite importanti informazioni per utilizzare in maniera sicura ed eseguire interventi di manutenzione sul carrello SV

Per ulteriori informazioni sul carrello StyleView e altri prodotti

www.ergotron.com

Ergonomia del carrello

Quando si lavora

Personalizzazione - in base alle proprie esigenze

1 Impostare lo schermo del monitor a circa un pollice sopra il livello degli occhi e sbloccare il blocco in modo da poter abbassare o alzare il supporto, come illustrato di seguito.

2 Inclinare lo schermo in modo da consentire una visione ottimale e ridurre lo stress sugli occhi e sul collo.


3 Estrarre il ripiano della tastiera e posizionare il ripiano e la tasca del mouse sul lato sinistro o destro, a seconda delle esigenze.

4 Lavorare con i gomiti piegati a circa 90° in modo da ridurre lo stress sui muscoli.

5 Se il supporto di sollevamento si sposta in alto o in basso con difficoltà o non rimane bloccato nella posizione desiderata, consultare il manuale del prodotto per informazioni sulla corretta regolazione.

6 Sempre in carica!

Collegare il più spesso possibile il carrello alimentato alla presa di corrente in modo da mantenere la batteria carica e consentire il corretto funzionamento del computer.

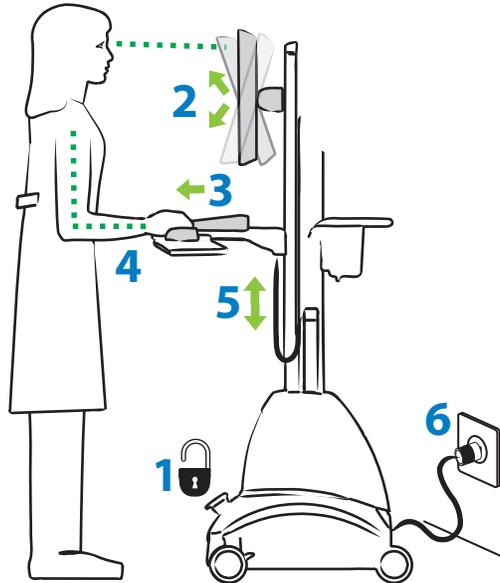

In movimento

Ripiegare - prima di spostarsi

1 Guardare sempre in avanti: sbloccare il blocco di sollevamento e abbassare il supporto in modo da consentire una visione ottimale del percorso.

2 Ripiegare i ripiani aperti e riporre il mouse, lo scanner e altri accessori nelle apposite custodie.


3 Bloccare il blocco di sollevamento in modo da mantenere abbassato il supporto e le attrezzature in posizione sicura mentre il carrello è in movimento.

4 Sbloccare entrambe le ruote anteriori.

5 Spingere il carrello dalla parte posteriore con i gomiti piegati a circa 90° in modo da garantire il massimo controllo e ridurre lo stress sui muscoli.

6 Non correre!

Prima di procedere, verificare che il cavo di alimentazione sia disconnesso dalla presa e agganciato al contenitore in modo da non ostruire il movimento. Ricordarsi di caricare completamente la batteria ogni giorno!

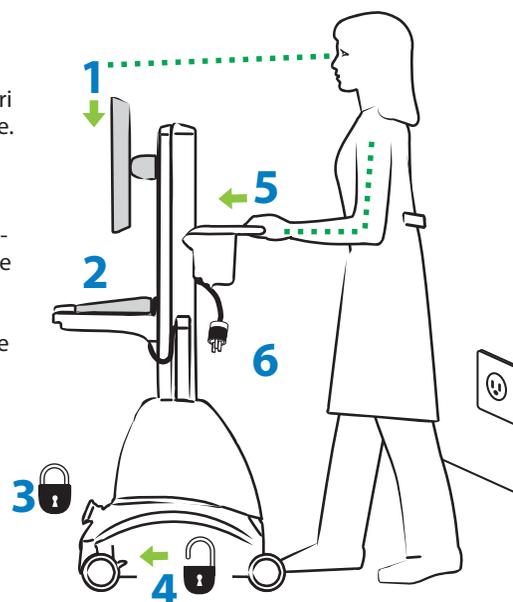

Istruzioni sulla sicurezza del carrello

Sostituzioni delle apparecchiature e trasferimenti del carrello

Aggianciare sempre il supporto di sollevamento alla torre PRIMA di apportare modifiche al carrello, ad esempio:

- rimozione o aggiunta di apparecchiature
- preparazione per lo spostamento del carrello in un'altra postazione

Per ulteriori informazioni vedere il punto 2 a pagina 2.

Pulizia e manutenzione

Le seguenti procedure non garantiscono il controllo delle infezioni. Per informazioni sulle procedure e processi di pulizia, consultare l'amministratore addetto al controllo delle infezioni ospedaliere o l'epidemiologo.



Per evitare il rischio di scossa elettrica, non esporre i componenti elettrici all'acqua, soluzioni di pulizia o altri liquidi o sostanze potenzialmente corrosivi.



Non immergere il carrello o i relativi componenti in sostanze liquide e fare attenzione che le sostanze liquide non entrino nel carrello. Rimuovere immediatamente le sostanze di pulizia dalle superfici con un panno umido. Asciugare con cura la superficie al termine delle operazioni di pulizia.



Non utilizzare sostanze di pulizia infiammabili sulle superfici del carrello a seguito della vicinanza della corrente elettrica e delle apparecchiature.

Tutte le vernici e i componenti in plastica del carrello sono resistenti alle soluzioni di pulizia non abrasive, diluite e più diffuse, ad esempio composti in ammoniaca quaternaria, agenti di pulizia con enzimi ammonio, sbiancanti o soluzioni a base di alcool.

- I segni di penna e i segni permanenti di cancellatura possono essere rimossi con un panno morbido imbevuto del 91% di alcool isopropilico.
- Le macchie di iodio possono essere rimosse con un panno morbido imbevuto dei più diffusi agenti di pulizia.
- Non utilizzare mai lana d'acciaio altro materiale abrasivo che potrebbe danneggiare la finitura della superficie.

Si consiglia di provare la soluzione di pulizia su una piccola parte nascosta in modo da verificare che non danneggi la superficie.

 **Regolazione, manutenzione, sostituzione** - NON cercare di regolare, riparare o sostituire parti del carrello StyleView se non espressamente indicato nella documentazione ufficiale di Ergotron (ad es. istruzioni di installazione). Gli interventi di regolazione, manutenzione o sostituzione dei componenti del carrello StyleView possono essere eseguiti solo da Ergotron, Inc. o da un organismo certificato da Ergotron. Nel caso in cui uno dei componenti risulti mancante o danneggiato, non utilizzare il carrello e contattare immediatamente l'Assistenza clienti Ergotron e richiedere una parte di sostituzione.

 **Cavi** - Mantenere i cavi organizzati in maniera ordinata sul carrello (a tale scopo sono fornite diverse soluzioni). I cavi in eccesso devono essere instradati lontano dai componenti mobili mediante morsetti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Instradamento dei cavi di questa guida contattare l'Assistenza clienti Ergotron.

 **Ruote** - Verificare periodicamente le ruote per accertarsi che siano pulite e prive di detriti che potrebbero intralciare il movimento. Non spostare il carrello su superfici sconnesse, sporche o danneggiate.



Apparecchiature del cliente - Accertarsi che le apparecchiature siano bilanciate e installate saldamente sul carrello. Non riposizionare i componenti del carrello sul supporto di sollevamento o sulla torre se non espressamente indicato nelle istruzioni di installazione. Se si spostano i componenti del carrello in posizione eccessivamente alta o bassa sul supporto di sollevamento, si potrebbe creare una posizione instabile, con conseguenti danni alle apparecchiature o lesioni personali. Per informazioni sullo spostamento dei componenti del carrello, contattare l'Assistenza clienti Ergotron.



 **Stabilità del carrello** - Quando si sposta il carrello, il supporto di sollevamento deve essere posizionato nella posizione più bassa possibile e il blocco di sollevamento deve essere azionato in modo da impedire l'eventuale ribaltamento. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare danni alle apparecchiature o lesioni personali.

Avvisi di sicurezza correlati al prodotto

I seguenti Avvisi/Avvertenze sono riportati nella presente guida di riferimento o sul carrello:

NOTA: la mancata osservanza delle linee guida potrebbe causare danni alle apparecchiature o lesioni personali.



ATTENZIONE: Il blocco di sollevamento aiuta a stabilizzare la superficie di lavoro e il ripiano della tastiera durante il normale utilizzo ma NON aumenta la capacità di carico. NON caricare il supporto di sollevamento con apparecchiature il cui peso totale è superiore alla portata massima specificata da Ergotron. Garantire la funzionalità ottimale di sollevamento eseguendo un controllo e, se necessario, regolando nuovamente la tensione a ogni variazione del peso installato sul supporto di sollevamento, ad esempio quando si rimuovono o aggiungono apparecchiature. Vedere la procedura di regolazione "Impostazione della tensione del supporto di sollevamento" al punto 7 a pagina 4.



ATTENZIONE: Non utilizzare il carrello StyleView in caso di componenti mancanti o danneggiati! Non rimuovere, modificare o sostituire i componenti del carrello senza aver prima contattato Ergotron. In caso di problemi con l'installazione o il funzionamento del carrello, contattare l'Assistenza clienti Ergotron.



ATTENZIONE: NON serrare eccessivamente gli elementi di fissaggio, per evitare di causare danni all'apparecchiatura.



ATTENZIONE: Il supporto di sollevamento è soggetto alla tensione della molla. Prima del controbilanciamento, potrebbe alzarsi o abbassarsi bruscamente. Bloccarlo con l'apposito blocco prima di rimuovere le relative viti di ancoraggio o caricare/scaricare le apparecchiature. Non posizionarsi nella traiettoria del supporto di sollevamento mobile o dei componenti installati fino a quando il supporto non è adeguatamente controbilanciato. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare danni alle apparecchiature o lesioni personali.



ATTENZIONE: NON allentare, serrare o rimuovere altri dadi o bulloni sul supporto di sollevamento o sulla parte superiore della torre. La manomissione dei dadi o dei bulloni potrebbe rendere instabile il carrello, causando danni all'apparecchiatura e/o lesioni personali.



AVVERTENZA: Sbloccare il blocco di sollevamento prima di spostare la superficie di lavoro! Se si sposta la superficie di lavoro con il blocco di sollevamento attivato, si potrebbero causare gravi danni al motorino di sollevamento.



AVVERTENZA: nel caso in cui sia necessaria la riparazione del carrello StyleView, contattare immediatamente l'assistenza clienti Ergotron. La riparazione del carrello può essere effettuata solo da Ergotron, Inc. o da un suo agente autorizzato.



ATTENZIONE: instradare ricavi solo sul lato del canale portacavi (a destra) del carrello. Non conservare l'alimentatore all'interno dei coperchi della base. La conservazione di un alimentatore all'interno dei coperchi della base può interferire con il funzionamento del supporto di sollevamento, con conseguenti danni al carrello e all'attrezzatura montata su di esso o lesioni per folgorazione.

Sintomo	Probabile causa	Soluzione
Il supporto di sollevamento si sposta in alto o in basso con facilità o con difficoltà o l'apparecchiatura sul supporto non rimane nella posizione desiderata.	Controbilanciamento non adeguato del supporto di sollevamento.	Vedere la procedura di regolazione "Impostazione della tensione del supporto di sollevamento" al punto 7 a pagina 4.
	Il peso dell'apparecchiatura installata è superiore alla portata.	Mettere a confronto il peso dell'apparecchiatura installata con le portate consigliate nella sezione relativa alle specifiche. Contattare l'Assistenza clienti Ergotron: America del Nord 1-800-888-8458; Europa +31 (0)33-45 45 600


Esame dei simboli di pericolo

Il significato dei simboli che appaiono in questa Guida, sul carrello o sul sistema di alimentazione elettrica
Questi simboli avvisano l'utente di una condizione di sicurezza che richiede la sua attenzione. È necessario essere in grado di riconoscere e comprendere il significato dei seguenti Pericoli per la sicurezza se presenti sul carrello o all'interno della relativa documentazione (ad es. Guida di installazione).

Colore	Simbolo	Indicazione di avvertenza	Livello di pericolo
Rosso		PERICOLO	Indica una situazione di imminente pericolo che, se non evitata, causerà morte o lesioni gravi.
Arancione		AVVERTENZA	Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
Giallo		ATTENZIONE	Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può causare lesioni da lievi a moderate.
Nessuno		ATTENZIONE	Usato senza il simbolo di avvertenza per la sicurezza, indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può avere come conseguenza danni alla proprietà.
Rosso, arancione o giallo		Elettrico	Indica un imminente pericolo elettrico che, se non evitato, può causare lesioni personali, incendio e/o morte.

Dichiarazione di conformità FCC - Carrello e cassetto Autolock

Il cassetto con chiusura automatica è stato testato e dichiarato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe A, secondo i dettami della Parte 15 della normativa FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una ragionevole protezione da interferenze pericolose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, usa e può emettere energia a radiofrequenze e, se non installata e utilizzata conformemente al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'uso di questa apparecchiatura in un'area residenziale può provocare interferenze dannose; nel qual caso l'utente è tenuto a correggerle a sue spese.

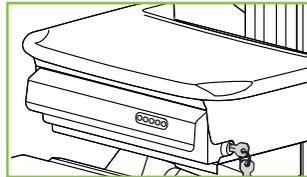

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate da Ergotron, Inc. potrebbero annullare il diritto dell'utente a usare l'apparecchiatura.

Contattare Ergotron per informazioni complete sulla compatibilità CEM.

Marchi del prodotto



Ergotron® Garanzia

Ergotron garantisce che i propri prodotti saranno privi di difetti di materiale e fabbricazione per cinque (5) anni. Tutti i prodotti sono da intendersi subordinati alle eccezioni, esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

Scarica il PDF

Eccezioni alla presente garanzia:

- Garanzia di tre (3) anni su tutti prodotti Neo-Flex™ da parte di Ergotron
- Garanzia di due (2) anni su tutti i componenti del sistema di alimentazione da parte di Ergotron; le batterie sono dotate di una garanzia sulle prestazioni di 90 giorni e una garanzia di due (2) anni sui difetti del produttore
- I prodotti OEM rivenduti da Ergotron sono garantiti dal rispettivo produttore
- I prodotti ricondizionati da Ergotron hanno una garanzia di 90 giorni
- Le garanzie di Ergotron non sono trasferibili

Esclusioni e limitazioni: Ergotron si solleva da qualsiasi responsabilità in merito a lesioni o perdite causate o associate all'installazione o utilizzo delle proprie apparecchiature in qualsivoglia modalità non strettamente conforme alle istruzioni specificate nei manuali di installazione, schede di istruzione supplementari di assemblaggio e installazione, bollettini tecnici o documentazione del prodotto o da parte di apparecchiature che risultino alterate, danneggiate o utilizzate in modo improprio.

IL PRESENTE RIMEDIO È DA INTENDERSI COME RIMEDIO ESCLUSIVO A COPERTURA DELLA GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE, ad eccezione di quanto previsto in relazione agli infortuni personali. L'Acquirente comunicherà immediatamente per iscritto a Ergotron eventuali lesioni personali che dovessero risultare dall'utilizzo di un'apparecchiatura Ergotron.

Exclusions and Limitations: Ergotron disclaims liability for injuries or losses caused by or associated with installation or use of its equipment in any manner other than in strict conformance with the instructions set forth in its installation manuals, supplemental assembly and installation instruction sheets, technical bulletins or product literature, or by equipment that has been altered, damaged or misused.

La garanzia sulle batterie è automaticamente invalidata, se queste, completamente cariche, vengono lasciate inutilizzate per più di tre (3) mesi consecutivi. La garanzia sulle batterie è automaticamente invalidata se queste, completamente scariche, vengono lasciate inutilizzate per più di tre (3) giorni consecutivi.

L'Acquirente non può rivendicare ed Ergotron si solleva da qualsiasi e da tutte le garanzie ad eccezione dell'esplicita garanzia di cui sopra, subordinatamente alle esclusioni e limitazioni ivi specificate. Ergotron si esonera da tutte le altre garanzie, implicite o esplicite, comprese, a mero titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità e idoneità per scopi specifici. Ergotron si solleva altresì da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente e di tutti i danni consequenziali, incidentali e speciali causati o correlati ai prodotti, al relativo utilizzo o abuso e alle relative prestazioni o mancate prestazioni.



© 2007 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

Poiché Ergotron, Inc ha posto ogni impegno a fornire accurate e complete informazioni sulla installazione e l'uso dei suoi prodotti, non si riterrà responsabile di eventuali errori editoriali od omissioni (comprese quelle commesse nel processo di traduzione dall'inglese a un'altra lingua) o per danni incidentali, speciali o consequenziali di qualunque natura, derivanti dalla istruzioni fornite e dalle prestazioni dell'apparecchiatura in connessione con queste istruzioni. Ergotron, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche nel design del prodotto e/o nella documentazione del prodotto senza previa notifica agli utenti. Per informazioni più recenti sul prodotto o per sapere se la propria documentazione è disponibile in lingue diverse da quella in uso, contattare l'assistenza clienti di Ergotron. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi di riferimento o trasmessa in forma alcuna o con alcun mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro, senza previo consenso scritto di Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Brevetto in corso di registrazione e registrato in U.S.A. e all'estero. Ergotron è un marchio registrato di Ergotron, Inc.

Vendite in America e Quartier generale

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Vendite EMEA

Amersfoort, Paesi Bassi
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Vendite APAC

Singapore
www.ergotron.com
info.apac@ergotron.com

Vendite OEM nel mondo

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com